



i-LIMB[®] QUANTUM
La force du titane



i-LIMB® QUANTUM

La main myoélectrique multi-articulée haut de gamme Össur intègre des doigts en titane pour porter **50% de poids en plus**. Les fonctions Vari Grip™ et Speed Boost™ permettent quant à elles de développer jusqu'à **30% de force de serrage supplémentaire** et d'**augmenter de 30% la rapidité des doigts**.

L'élégance du titane

Un design high-tech en titane pour une esthétique élégante.

La force du titane

Le métal qui offre la plus grande résistance au poids, parmi tous les métaux.

La résistance du titane

Le titane résiste à la corrosion, il est particulièrement solide et léger.





Écran tactile activé par le bout de l'index

Cinq doigts articulés et motorisés individuellement

Des doigts en titane pour plus de résistance et de durabilité

4 méthodes de contrôle pour une plus grande liberté

- Contrôle Gestuel
- Contrôle Musculaire
- Contrôle via l'Application
- Contrôle de Proximité

Rotation motorisée du pouce avec ajustement manuel possible, passant automatiquement de la position latérale à l'opposition aux doigts longs

Fonction Vari-Grip™ permettant d'accroître la force de serrage, doigt par doigt

Fonction Auto Grasp™ prévient la chute accidentelle d'objets pour plus de sécurité

Disponible en 4 tailles - XS*, S, M, L

Un large choix de gants de recouvrement i-Limb® Skin disponible

Flexion Wrist - Flexion manuelle souple du poignet avec un simple verrou magnétique pour ajuster les angles

* La taille XS est en aluminium




Contrôle Gestuel

Le **Contrôle Gestuel** permet d'accéder à une prise automatisée en déplaçant la prothèse i-Limb® Quantum dans l'une des 4 directions. Les prises programmées peuvent être changées facilement via l'application mobile.



Contrôle via l'Application

Accès instantané à 24 prises préprogrammées **Quick Grips™** et 12 prises personnalisables **My Grips™**. Cette diversité apporte de la polyvalence à la main et permet de la personnaliser pour accomplir des activités de la vie quotidienne variées.

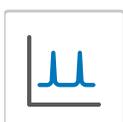

Contrôle Musculaire

Les **déclencheurs** sont des signaux musculaires spécifiques qui indiquent à i-Limb® Quantum d'activer une prise spécifique.



Contrôle de Proximité

Les **Grip Chips™** sont des puces Bluetooth® qui permettent à l'utilisateur d'activer une prise, en déplaçant simplement sa prothèse dans le rayon de détection de la puce.

LES PRISES

i-Limb® Quantum possède **24 prises préprogrammées**, chacune ayant une fonctionnalité spécifique. De plus, les utilisateurs peuvent programmer jusqu'à **12 prises My Grips**, personnalisables et adaptées à des tâches quotidiennes spécifiques.

My Grips ont été améliorées avec des **QR codes** permettant aux utilisateurs de scanner* ou de partager rapidement des prises personnalisées auprès de notre communauté d'utilisateurs **i-Limb® Quantum**.



Écrire



Prise crochet

... et bien d'autres !

Pour toute question ou information complémentaire, nous avons développé une série de ressources pour vous aider.

Veuillez consulter le site go.ossur.com/prises-qr-codes

*Les QR codes doivent être scannés depuis l'application My i-Limb.



GANTS DE RECOUVREMENT

Réalistes. Détaillés. Fonctionnels.

Au-delà de l'esthétique, nos gants sont conçus pour s'adapter aux modes de vie des utilisateurs.

Les gants **i-Limb® Skin Active** sont constitués d'une fine couche de silicone enveloppant chaque contour de la main. Ils s'adressent aux utilisateurs qui souhaitent mettre en avant l'aspect robotique de leur prothèse. Disponible en transparent ou en noir.

Les gants **i-Limb® Skin Contour** sont fabriqués à partir d'un silicone souple à la durabilité accrue et ont une forme anatomique ressemblant à une main naturelle. Disponibles en transparent ou en noir.

Les gants **i-Limb® Skin Active** et **Contour** sont disponibles en version **Touch Screen (TS)** pour utiliser tous les appareils à écran tactile grâce à la pointe conductrice de l'index.

Les gants **i-Limb® Skin Natural** sont destinés aux utilisateurs qui recherchent un aspect esthétique plus naturel. Ils sont disponibles en 18 teintes différentes pour refléter une grande variété de couleurs de peaux.

Les gants **i-Limb® Skin Match** sont entièrement personnalisés pour correspondre à la couleur, au teint et à l'apparence de la peau. Le résultat est particulièrement réaliste.

Siège Social France :
Össur France
21 Chemin de la Sauvegarde
69130 Ecully
France

Retour des produits :
Össur Europe B.V.
De Schakel 70
5651 GH Eindhoven
Pays-Bas

TEL 00800 35 39 36 68
FAX 00800 35 39 32 99
EMAIL orders.france@ossur.com

[WWW.OSSUR.FR](https://www.ossur.fr)

 **ÖSSUR**
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

