

ICEROSS[®] POST-OP TT Y TF

Folleto para hospital



El tratamiento previo con el liner Icross POST-OP ha demostrado facilitar la movilización anticipada y adelantar el proceso de curación del muñón. Esta tarjeta de referencia rápida proporciona un sencilla guía paso a paso sobre el uso y el proceso de limpieza del liner, cuyas explicaciones son válidas para cualquier persona que se ocupe de estas tareas.

1 Selección de tamaño

A TT: Doblar la rodilla ligeramente y colocarse de forma que el tejido blando quede colgando.
TF: Levantar el muñón ligeramente.




B Medir 4 cm desde el extremo distal.

C Medir el contorno a 4 cm desde el extremo distal.




D Seleccionar el tamaño de liner que coincida con la medición del contorno o el siguiente tamaño más pequeño.

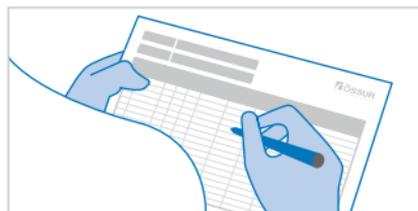


E Añadir las mediciones al gráfico de tratamiento.


2 Colocación

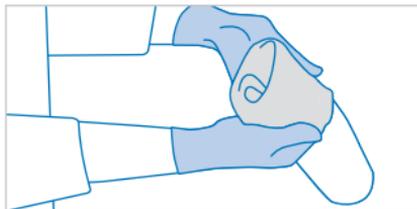

A Volver el liner del revés.

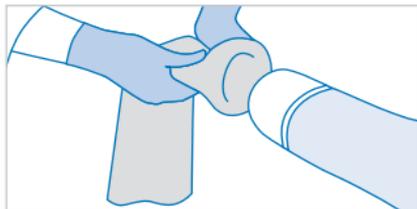


B Apoyar la base del liner completamente invertido contra el muñón.

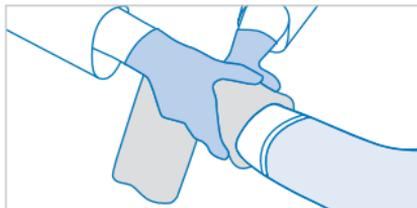

C Desenrollar el liner subiéndolo a lo largo del muñón.

TT: Doblar la rodilla ligeramente.

TF: Levantar el muñón ligeramente.

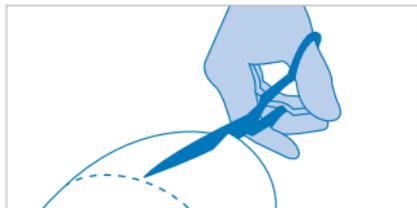


D TF: Si es necesario recortar el liner para adaptarlo a la forma anatómica.


Note

- Compruebe que no queden burbujas de aire. En caso positivo, vuelva a colocarlo.
- Anote la hora de la colocación.

3 Retirada

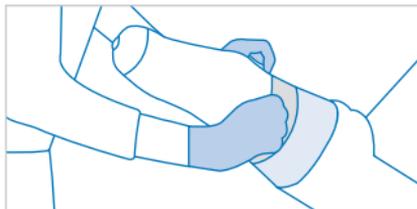


A Invertir el borde proxima.

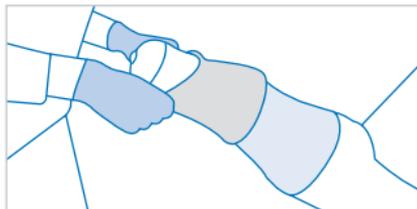


B Desenrollar suavemente desde el extremo proximal hasta el distal.

- Anotar la hora de la retirada.


4 Limpieza para el uso diario

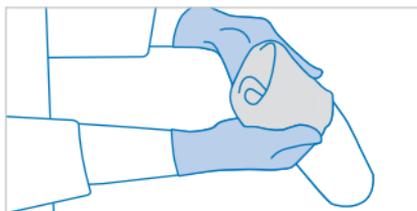


A Volver el liner del revés.

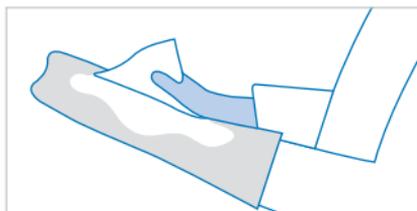

B Limpiar la superficie con toallitas impregnadas en alcohol hasta mojarla por completo.


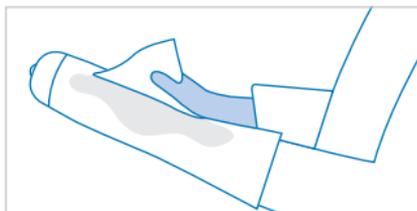


C Poner el liner del derecho y repetir la operación en la parte externa.

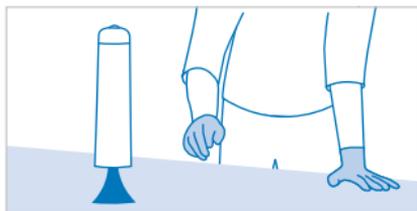

D Dejar que se seque.

5 Esterilización

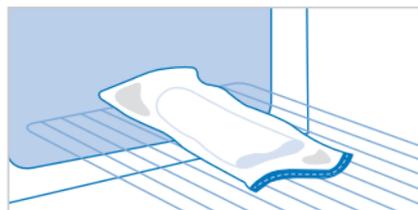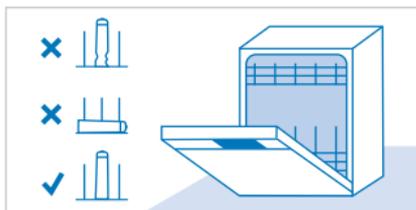

- A** Limpieza y desinfección.
- Lavado de desinfección a 90 °C/5 min.
 - O bien manualmente como se describe para la limpieza diaria.

- B** Esterilización
- Colocar el liner en una película de esterilización y cerrar ambos extremos.
 - Esterilizar en autoclave con prevacío fraccionado y calor húmedo a 134 °C durante al menos 5 min.

6 Colocación del paciente



- A** Problemas venosos

- B** Problemas arteriales



- C** Silla de ruedas



P-953044ES-ES



WWW.OSSUR.ES



© ÖSSUR, 07. 2019