


ÖSSUR LOGIC



Guide de connexion
Clinicien

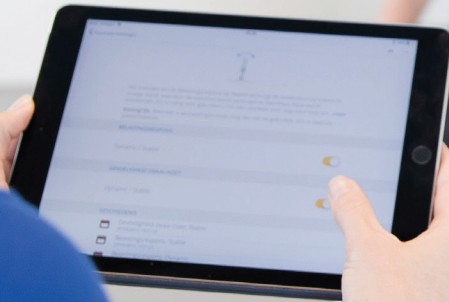

1 Téléchargez l'appli Össur Logic

Disponible sur l'App Store d'Apple.

Vérifier que votre iPad ou iPhone est bien connecté à Internet et que le RHEO KNEE® est allumé.

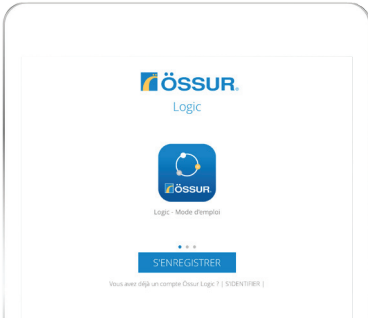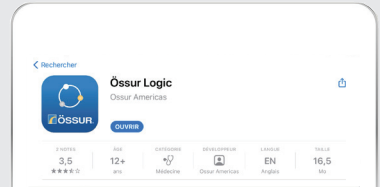

2

A Si c'est votre première connexion

Appuyez sur "S'ENREGISTRER" pour créer un compte Össur Logic.

B Si vous avez déjà un compte

- Appuyez sur "S'IDENTIFIER" pour vous connecter avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Puis, passez à l'étape 5.

3



A Pour les professionnels de santé

Saisissez votre **numéro de client**. Celui-ci se trouve sur vos factures Össur, selon le format **FROXXX**.

⚠ En cas de difficulté, veuillez contacter notre Service Clients (00800 35 39 36 68 ou +33 9 70 01 96 09).

B Pour les utilisateurs RHEO KNEE®

Passez cette étape en appuyant sur **Passer**.

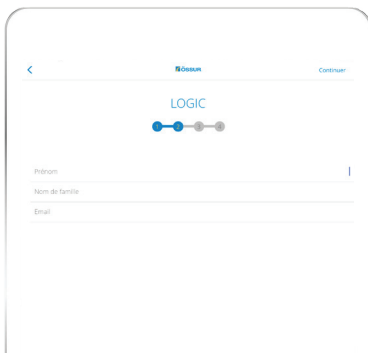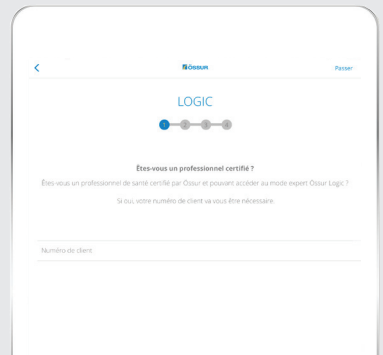

4


Créez vos identifiants

- Indiquez votre prénom, nom et adresse e-mail, puis choisissez un mot de passe.
- Pour finaliser votre inscription à Össur Logic, vous devrez confirmer votre adresse e-mail à l'aide d'un lien envoyé par e-mail.
- Autorisez la connexion Bluetooth.

5

A Ajoutez un RHEO KNEE®


Appuyez sur **Ajouter un dispositif**.

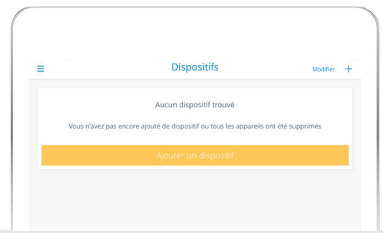

B Sélectionnez votre dispositif

Toutes les prothèses bioniques Össur à portée et allumées apparaissent. Votre RHEO KNEE® apparaît selon le format **RK3****7**


⚠ Si votre RHEO KNEE® n'apparaît pas : Il est possible que votre appareil iOS soit jumelé à trop d'appareils. Quittez Össur Logic, allez dans Réglages / Bluetooth. Supprimez ceux qui ne vous sont plus utiles et réessayez la manipulation.

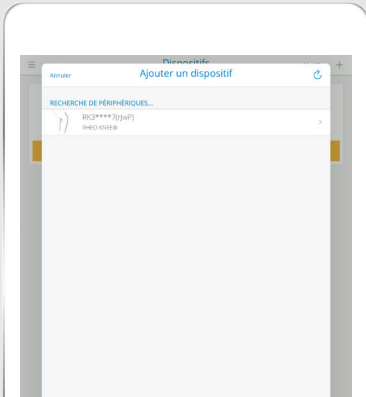

C Indiquer le Code de couplage


L'établissement d'une connexion sécurisée nécessite un code de couplage. Celui-ci correspond aux 6 derniers chiffres du numéro de série se trouvant au dos du RHEO KNEE® : **HFXXXXXX**.

Le genou émet un signal sonore lors du couplage.

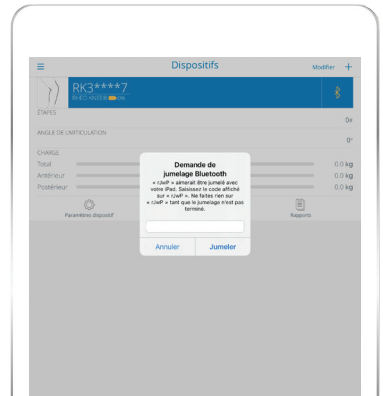


Connexion réussie

Le genou est maintenant connecté à Össur Logic, vous pouvez accéder aux différents réglages du genou et paramètres utilisateur.

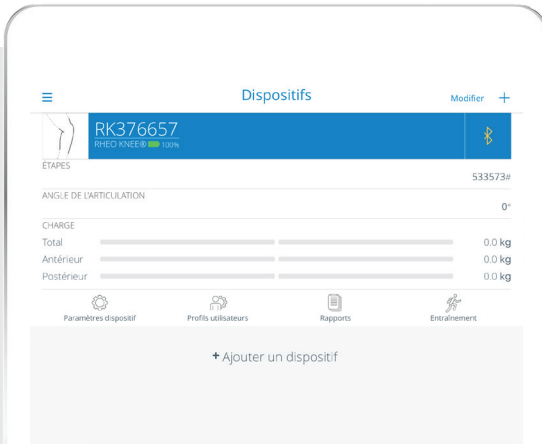

6**A Préparez le calibrage**

- Appuyez sur l'icône **Paramètres dispositif**.
- Mettez le genou en position verticale, sans emboîture.
Aucune charge ne doit être appliquée sur la pyramide supérieure du genou.

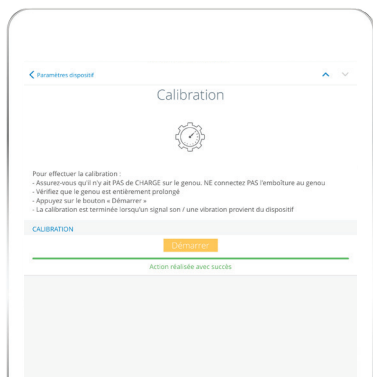
**C Commencez le calibrage**

- Appuyez sur **Calibration**.
 - Puis, **Démarrer**.
- Le calibrage s'effectuera automatiquement.

7**Effectuez le Réglage Automatique**

- Revenez à la page précédente (**Paramètres dispositif**).
- Appuyez sur **Réglage automatique**.
- Mettez la prothèse en place sur l'utilisateur.
- Vérifiez l'alignement statique.
- Vérifiez l'alignement dynamique.
Les réglages d'usine permettent de vérifier l'alignement dynamique en toute sécurité.
- Appuyez sur le bouton **Démarrer**.
- Demandez à l'utilisateur de faire 30 pas à sa vitesse de marche habituelle, sur sol plat.

Le réglage automatique est effectué.

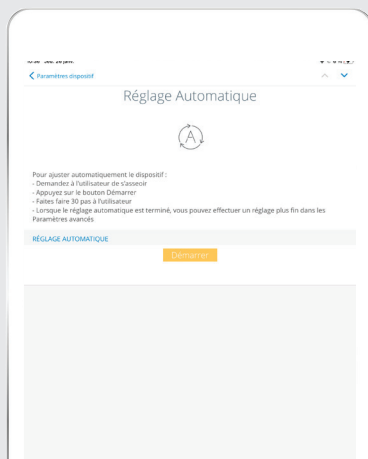**Terminé !**

Le genou RHEO KNEE est prêt à l'emploi.

Vous pouvez effectuer des réglages manuels à l'aide des différents options dans la section **Réglages avancés**.

