

Solutions Orthèses

Catalogue



SOMMAIRE

SOLUTIONS ARTHROSE ÖSSUR	4	GENOU	47
UNLOADER ONE® X	6	CTI® CUSTOM	48
UNLOADER ONE®	12	CTI®3	51
UNLOADER® CUSTOM	15	EXTREME®	53
FORMFIT® PRO KNEE OA	17	FORMFIT® POST-OP KNEE	54
OA EASE	18	REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL	55
SOLUTIONS DE STABILISATION ÖSSUR	20	FORMFIT® HINGED LATERAL J	56
SOLUTIONS COLONNE VERTÉBRALE	23	FORMFIT® KNEE ROM	57
MIAMI LSO™	24	FORMFIT® TRACKER	58
MIAMI TLSO 456	26	PIED ET CHEVILLE	61
MIAMI J® SELECT	28	REBOUND® AIR WALKER	62
MIAMI J®	29	AFO LEAF SPRING	64
MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION	31	REBOUND FOOT-UP®	65
OCCIAN® BACK & OCCIAN® BACK JR	32	FORMFIT® WALKER, AIR	66
MIAMI Jr®	33	FORMFIT® WALKER	67
PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR	34	PEDIATRIC WALKER	68
PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR	35	FORMFIT® PRO ANKLE	69
PATRIOT® COLLAR	36	FORMFIT® ANKLE BRACE	70
FORMFIT® BACK SUPPORT, AIR	37	FORMFIT® ANKLE STIRRUPS	71
FORMFIT® BACK VS	38	CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES	72
MEMBRE SUPÉRIEUR	39	NOTES	78
FORMFIT® SHOULDER BRACE	40		
REBOUND® POST-OP ELBOW	41		
FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM	43		
FORMFIT® WRIST & THUMB, UNIVERSAL	44		
FORMFIT® THUMB SPICA	45		

SOLUTIONS ARTHROSE ÖSSUR

Améliorer la qualité de vie et la mobilité des personnes souffrant d'arthrose.

Ces solutions sont le fruit de décennies d'expérience et sont conçues pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'arthrose en réduisant leur douleur et en développant leur mobilité. Grâce à notre capacité d'innovation, à notre expertise dans le domaine de l'arthrose et à nos collaborations avec des professionnels de santé, Össur propose des options de traitement complètes et éprouvées.

UNLOADER®

Avec plus de 15 études cliniques démontrant son efficacité, le concept Unloader® d'Össur s'est imposé comme une solution incontournable des orthèses pour l'arthrose.

Össur s'efforce de maintenir sa position de leader en matière d'innovation pour subvenir aux besoins des personnes souffrant d'arthrose en continuant à développer des solutions de traitement efficaces et cliniquement prouvées, améliorant ainsi leur qualité de vie.





GENOU



UNLOADER ONE[®] X

PAGE 6



UNLOADER ONE[®]

PAGE 12



UNLOADER[®] CUSTOM

PAGE 15



OA EASE

PAGE 18

UNLOADER ONE® X

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

Unloader One X est une orthèse discrète qui améliore la mobilité en soulageant la douleur causée par l'arthrose du genou et les déchirures méniscales dégénératives.

Unloader One X est doté du système à trois points d'appui breveté et cliniquement éprouvé d'Össur, qui génère une mise en décharge unicompartmentale de l'articulation du genou.

Disponible en version standard ou sur-mesure (custom) selon l'anatomie de vos patients.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Gonarthrose unicompartmentale modérée à sévère
- Lésions méniscales dégénératives
- Autres affections unicompartmentales du genou qui pourraient bénéficier d'une réduction de la charge, telles que :
 - Réparation des défauts du cartilage articulaire
 - Réparation méniscale
 - Nécroses avasculaires
 - Lésions de la moelle osseuse condylienne
 - Fractures du plateau tibial

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Le système à trois points d'appui composé de deux sangles DFS (Dynamic Force Strap®), de coques et d'une seule articulation verticale contribue à un déchargement unicompartmental de l'articulation du genou.
- Contrôle - SmartDosing® permet d'adapter sans outil et précisément la tension des sangles afin de gérer le niveau de décharge. Elle permet un ajustement même lorsque l'orthèse est portée sous des vêtements.
- Confortable - Des capitonnages et des coussinets doux pour la peau ainsi qu'une surface intérieure lisse des coques réduisent la probabilité de points de pression.
- Simple à utiliser - Le guide d'alignement sur l'articulation facilite le positionnement correct sur la jambe.
- Simple à porter - Un cadre fin et perforé aux bords souples, s'adapte facilement à chaque anatomie et reste discret, qu'il soit porté par-dessus ou sous les vêtements.
- Simple à laver - L'orthèse est entièrement lavable en machine (filet de lavage fourni avec le produit).

MESURES NÉCESSAIRES - VERSION SUR-MESURE (CUSTOM)

- Sur-mesure (custom) : Scan 3D (.AOP, .STL, .OBJ, .CPV)
- Bon de commande spécifique à compléter.


UNLOADER ONE® X

MESURES NÉCESSAIRES - VERSION STANDARD

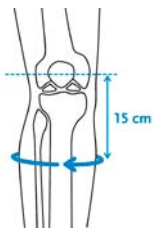

Tour de mollet :
15 cm au-dessous
du centre de la rotule.

Longueur jambe :
Mesurer la longueur de
la jambe du sol à l'aîne.

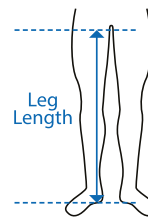

Taille	Tour de Mollet
XS - M	25 - 43 cm
L - XL	43 - 62 cm

Modèle	Longueur jambe
Standard	> 85 cm
Court	≤ 85 cm

COULEURS

SUR-MESURE (CUSTOM)



Orthèse noire /
Composants noirs



Orthèse bleue /
Composants noirs



Orthèse grise foncée /
Composants noirs



Orthèse rouge /
Composants noirs



Orthèse blanche /
Composants gris



Orthèse jaune /
Composants noirs

STANDARD



Orthèse noire /
Composants noirs

Les couleurs peuvent varier.

INFORMATIONS DE COMMANDE

L'articulation se situe sur le côté de la région affectée.

La version courte est conseillée aux patients dont la longueur de jambe est ≤ 85 cm.


STANDARD

Standard	Médial droit	Latéral droit	Médial gauche	Latéral gauche
XS - M	UOX0518713	UOX0528713	UOX0618713	UOX0628713
L - XL	UOX0518715	UOX0528715	UOX0618715	UOX0628715

Court	Médial droit	Latéral droit	Médial gauche	Latéral gauche
XS - M	UOX1518713	UOX1528713	UOX1618713	UOX1628713
L - XL	UOX1518715	UOX1528715	UOX1618715	UOX1628715


UNLOADER ONE® X

PIÈCES DÉTACHÉES

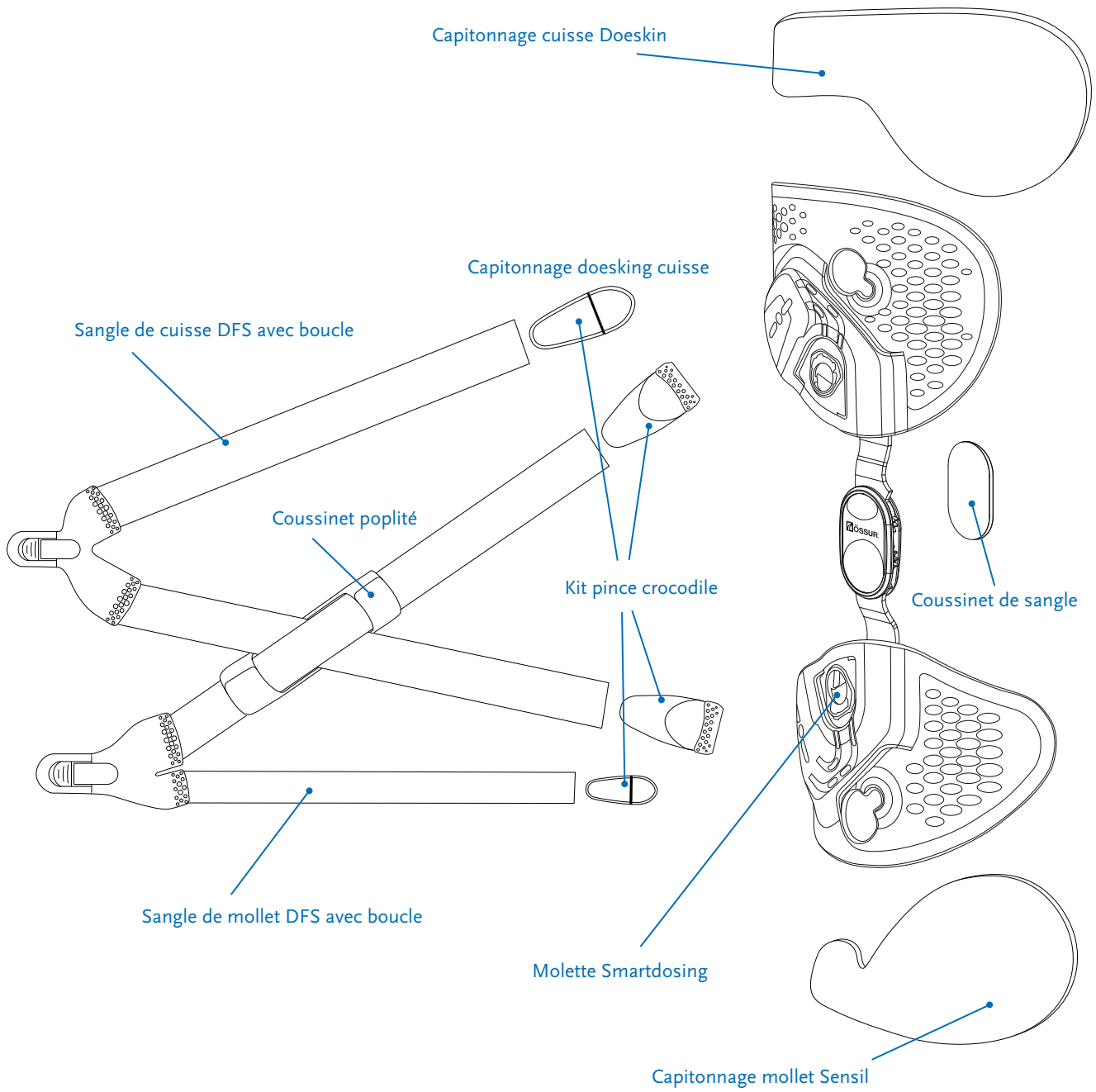

UNLOADER ONE® X

ACCESSOIRES

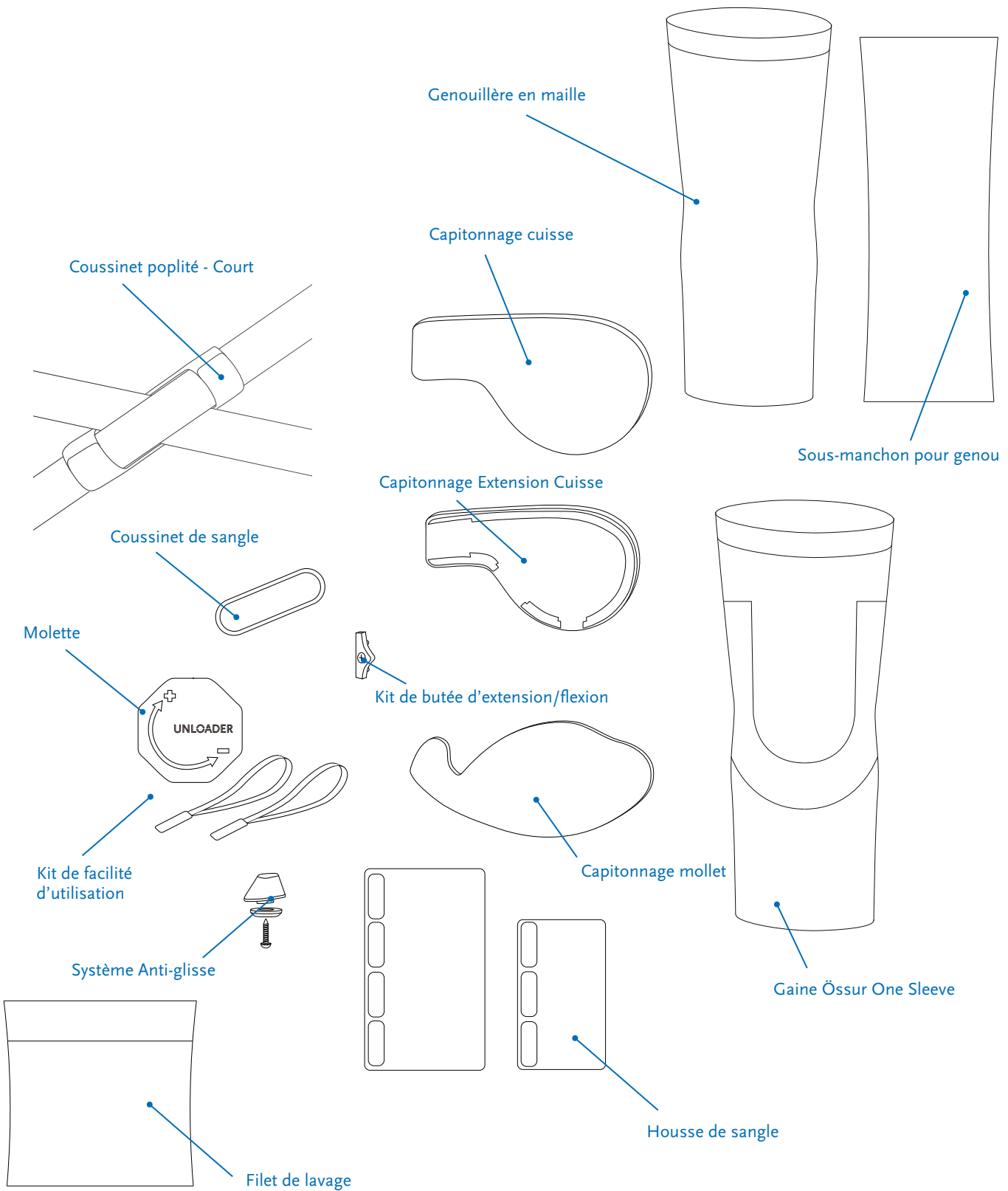

UNLOADER ONE® X

CAPITONNAGE CUISSE	CUISSE Médial droit Latéral gauche	CUISSE Latéral droit Médial gauche	EXTENSION CUISSE Médial droit Latéral gauche	EXTENSION CUISSE Latéral droit Médial gauche
Noir, Sensil	UOX526801	UOX525801	N/A	N/A
Noir, Doeskin	UOX526901	UOX525901	UOX546901	UOX545901
Gris, Sensil	UOX526201	UOX525201	N/A	N/A
Gris, Doeskin	UOX526101	UOX525101	UOX546101	UOX545101

Capitonnage MOLLET	Médial droit, Latéral gauche	Latéral droit, Médial gauche
Noir, Sensil XS-M	UOX516952	UOX515952
Noir, Sensil L-XL	UOX516962	UOX515962
Noir, Doeskin XS-M	UOX516951	UOX515951
Noir, Doeskin L-XL	UOX516961	UOX515961
Gris, Sensil XS-M	UOX516152	UOX515152
Gris, Sensil L-XL	UOX516162	UOX515162
Gris, Doeskin XS-M	UOX516151	UOX515151
Gris, Doeskin L-XL	UOX516161	UOX515161

SANGLE DE CUISSE*	Médial droit, Latéral gauche	Latéral droit, Médial gauche
Noir	UOX406902	UOX405902
Gris	UOX406102	UOX405102

*Comprend : sangle de cuisse DFS avec boucle

SANGLE DE MOLLET*	Médial droit, Latéral gauche	Latéral droit, Médial gauche
Noir	UOX406901	UOX405901
Gris	UOX406101	UOX405101

*Comprend : sangle de mollet DFS avec boucle

KIT DE REMPLACEMENT - UOX*	Médial droit, Latéral gauche	Latéral droit, Médial gauche
Noir, XS-M	UOX416901	UOX415901
Noir, L-XL	UOX416911	UOX415911
Gris, XS-M	UOX416101	UOX415101
Gris, L-XL	UOX416111	UOX415111

*Comprend : Capitonnage cuisse en daim, Capitonnage mollet Sensil, Sangle de cuisse DFS avec boucle, Sangle de mollet DFS avec boucle, Coussinet de sangle, Coussinet poplité, et Kit pince crocodile

Système Anti-glisse	Médial droit, Latéral gauche	Latéral droit, Médial gauche
Noir	UOX700015	UOX700035
Gris	UOX700025	UOX700045

UNLOADER ONE® X

AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES	Noir	Gris
Kit pince crocodile*	UOX900001	UOX900001
Coussinet de sangle	UOX900001	UOX700011
Coussinet poplité	UOX700012	UOX700092
Coussinet poplité - Court	UOX700022	UOX700082
Coussinet de sangle Sensil	UON0181	UON0182
Coussinet de sangle Sensil - 10 Pièces	UOX700113	UOX700193
Molette Smartdosing	UOX1000001	UOX1000002
Jeu de housses de sangles	UOX700014	UOX700094

*Comprend 4 Pincés crocodile : 2 DFS, 1 Cuisse et 1 Mollet

AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES	Réf.
Kit de facilité d'utilisation*	UOX800001
Kit de butées de flexion/extension**	B-301040053
Kit de butées de flexion/extension** - 5 Sets	B-301040055
Molette	UOX1200001
Filet de lavage	UON60200

*Comprend Sundial et 4 boucles de serrage

**Comprend des butées d'extension 0°, 5°, 10°, 15°, 30°, butée de flexion 90°

SLEEVES	Genouillère en maille* Noir	Sous-manchon pour genou** Noir
XXS	N/A	N/A
XS	SLV60011	B-250150101
S	SLV60012	B-250150102
M	SLV60013	B-250150103
L	SLV60014	B-250150104
XL	SLV60015	B-250150105
XXL	SLV60016	B-250150106
3XL	N/A	N/A

*Genouillère en maille : Textile principal : 92% cotton / 8% élasthanne - Maille : 100% polyester - Bande : 80% polyester / 20% élasthanne

**Sous-manchon pour genou : 80% nylon / 20% élasthanne

UNLOADER ONE®

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

L'orthèse Unloader One® est conçue pour soulager la douleur liée à l'arthrose du genou et peut aider à améliorer la mobilité. Elle est dotée du système breveté unique de pression à trois points d'appui Össur, qui associe une simple articulation à deux sangles Dynamic Force Strap® (DFS) pour décharger l'articulation du genou. Ce système est conçu pour soulager la douleur liée à l'arthrose du genou et améliorer la fonction du genou et la qualité de vie pendant son utilisation.

Les boucles de fixation rapide à code couleur simplifient la mise en place et le retrait, tandis que les coques souples et le revêtement intérieur tibial respirant et enduit de silicone sensil Össur sont conçus pour améliorer le confort et la tenue de l'orthèse, assurant ainsi le respect des consignes thérapeutiques.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Gonarthrose unicompartmentale modérée à sévère
- Déchirures méniscales dégénératives
- Autres pathologies du genou pouvant bénéficier d'un déchargement unicompartmental

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le système de sangle Dynamic Force Strap® est conçu pour réduire la pression sur le compartiment du genou atteint et ainsi réduire la douleur.
- Coque légère et perforée pour plus de flexibilité et d'aération, avec articulation souple et discrète qui épouse l'anatomie du patient et permet une utilisation sous les vêtements.
- SmartDosing® permet d'adapter sans outil et précisément la tension des sangles afin de gérer le niveau de décharge. Elle permet un ajustement même lorsque l'orthèse est portée sous des vêtements.
- Les boucles de fixation rapide codées par couleur permettent une pose et un retrait facile.
- Les garnissages en silicone Sensil® exclusifs sont conçus pour réduire le glissement de l'orthèse.
- Flexible et discrète, elle s'adapte à l'anatomie du patient et peut être utilisée sous les vêtements.
- Sangles rapides à mettre en place.
- Coques légères et perforées pour permettre flexibilité et aération.

MESURES NÉCESSAIRES

- Tour de mollet : 15 cm au-dessous du centre de la rotule.

UNLOADER ONE®

INFORMATIONS DE COMMANDE

UNLOADER ONE AVEC SMARTDOSING

Taille	Tour de mollet	Médial gauche	Médial droit	Latéral gauche	Latéral droit
S	31 - 36 cm	B-240618712	B-240518712	B-240628712	B-240528712
M	36 - 43 cm	B-240618713	B-240518713	B-240628713	B-240528713
L	43 - 51 cm	B-240618714	B-240518714	B-240628714	B-240528714
XL	51 - 61 cm	B-240618715	B-240518715	B-240628715	B-240528715

UNLOADER ONE VERSION COURTE AVEC SMARTDOSING

Taille	Tour de mollet	Médial gauche	Médial droit	Latéral gauche	Latéral droit
XS	25 - 31 cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31 - 36 cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	36 - 43 cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	43 - 51 cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51 - 61 cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

ACCESSOIRES

Kits d'accessoires	SmartDosing Gris	
Description	Médial droit Latéral gauche	Latéral droit Médial gauche
Kit sangles, coussinets de sangles et fermoir boucle	B-705277003	B-705278003
Kit sangles	B-705270003	
Kit sangle DFS	B-701240002	

AUTRES ACCESSOIRES

Description	Médial droit Latéral gauche	Latéral droit Médial gauche
Kit fermoir de boucle	B-708217003	B-708218003
Kit pince crocodile - 4 Pièces	B-704210003	
Kit pince crocodile	B-310005334	
Kit attaches Twist-Fit Velcro®	B-721240003	
Hinge Screws	B-301010076	
Post	B-301010075	

UNLOADER ONE®

ACCESSOIRES

SOUS-MANCHON POUR GENOU

Taille	Tour de Cuisse	Réf.
XS	30.5 – 38 cm	B-250150201
S	38 – 45.5 cm	B-250150202
M	45.5 – 56 cm	B-250150203
L	55 – 66 cm	B-250150204
XL	66 – 73.5 cm	B-250150205
XXL	73.5 – 84 cm	B-250150206

Lors de l'utilisation d'un Sous-manchon pour genou, nous vous conseillons d'utiliser le kit de sangles anti-glisse afin de réduire le glissement.

KIT SANGLE DE SUSPENSION

Description	Réf.
Kit sangle de suspension	UNL00212

COUSSINETS SENSIL

Taille	Mollet		Cuisse	
	Médial droit Latéral gauche	Latéral droit Médial gauche	Médial droit Latéral gauche	Latéral droit Médial gauche
XS	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
S	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
M	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
L	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
XL	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325

COUSSINETS DOESKIN

Taille	Mollet		Cuisse	
	Médial droit Latéral gauche	Latéral droit Médial gauche	Médial droit Latéral gauche	Latéral droit Médial gauche
XS	B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
S	B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
M	B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
L	B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
XL	B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725

Lors de l'utilisation d'un coussinet Doeskin, nous vous conseillons d'utiliser le kit de sangles anti-glisse afin de réduire le glissement.

COUSSINETS SENSIL AMS (SYSTÈME ANTI-GLISSE)

Taille	Médial droit/Latéral gauche	Latéral droit/Médial gauche
XS	B-715217031	B-715218031
S	B-715217032	B-715218032
M	B-715217033	B-715218033
L	B-715217034	B-715218034
XL	B-715217035	B-715218035

UNLOADER® CUSTOM

LPPR HT: € 1,132.71 | LPPR TTC: € 1,195.01
2736120 + 2706342 | Code individuel fabricant à venir

Dotée d'une coque semi-rigide en Triax et d'une articulation poli-axiale, l'orthèse Unloader Custom s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de jambes. Son articulation dynamique réglable, associée à une sangle diagonale Dynamic Force Strap® (DFS), font partie intégrante du système breveté unique à trois points d'appui Össur qui permet de réduire les charges appliquées sur le compartiment du genou lésé par l'arthrose tout en garantissant un confort maximal au patient. Les orthèses Unloader Custom, testées cliniquement, offrent de nombreuses options et peuvent être personnalisées grâce à la variété de couleurs, de conceptions et d'accessoires disponibles.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Gonarthrose unicompartmentale légère à sévère
- Autres pathologies du genou pouvant bénéficier d'un déchargement unicompartmental

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Les coques semi-flexibles moulées sur mesure sont résistantes et adaptables aux différentes formes de jambe, mais suffisamment rigides pour contenir les tissus lorsqu'une force est appliquée au niveau du genou.
- L'articulation en acier à haute teneur en carbone ADJ (Adjustable Dynamic Joint™) est suffisamment solide pour résister aux forces appliquées et décharger la pression sur le compartiment lésé du genou.
- Le système de sangle Dynamic Force Strap® est conçu pour réduire la pression sur le compartiment du genou atteint et ainsi réduire la douleur.
- Disponible en 12 couleurs standards, finition mate ou brillante et avec designs personnalisés

MESURES NÉCESSAIRES

- Fabriqué sur-mesure (custom) : Scan 3D (.AOP, .STL, .OBJ, .CPV). Bon de commande spécifique à compléter.

COULEURS STANDARD



MOTIFS FANTAISIE



Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les motifs fantaisie et designs personnalisés.



UNLOADER® CUSTOM

INFORMATIONS DE COMMANDE

UNLOADER CUSTOM AVEC SMARTDOSING

Description	Réf.
Droit	B-122500020
Gauche	B-122600020

Description	Réf.
AMS Wrap (custom made)	B-426000150
AMS Sleeve (custom made)	B-426000250

UNLOADER XT AVEC SANGLES DFS STANDARD

Description	Réf.
Droit	B-102500010
Gauche	B-102600010

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Genouillère	B-250110000
Cache-articulation en néoprène	B-251030000

GAINES

Taille	Tour de Cuisse	Gaine softsleeve	Sous-gaine en néoprène	Sur-gaine en néoprène
S	< 38 cm	20643	20251	20051
M	38 – 46 cm	20644	20252	20052
L	46 – 50 cm	20644	20253	20053
XL	50 – 55 cm	20645	20254	20054
XXL	55 – 62 cm	20645	20255	20055
XXXL	62 – 71 cm	20646	20256	20056
XXXXL	71 – 86 cm	20647	20257	20057

Taille	Tour de Cuisse	Sous-manchon pour genou
XS	30.5 – 38 cm	B-250150101
S	38 – 45.5 cm	B-250150102
M	45.5 – 56 cm	B-250150103

Taille	Tour de Cuisse	Sous-manchon pour genou
L	56 – 66 cm	B-250150104
XL	66 – 73.5 cm	B-250150105
XXL	73.5 – 84 cm	B-250150106

FORMFIT® PRO KNEE OA

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

Össur Formfit® Pro Knee OA est une genouillère unique qui possède un système "Dynamic Force Strap" conçu pour soulager les stades précoces de la gonarthrose. Le tissu dynamique 3-D MotionTech™ apporte du soutien et répond aux exigences de compression médicale certifiées. Son efficacité reconnue supérieure aux produits concurrents en terme d'évacuation d'humidité et de pouvoir respirant, permet à votre genou de rester au frais lors du port de la genouillère. La technologie CoolVent™ améliore la respirabilité et le confort dans le creux poplité. Le graphisme unique de la zone patellaire permet une mise en place intuitive de la genouillère. Le montant intégré StayBilizer™, conçu dans un matériau EVA léger et flexible, convient pour la pratique sportive comme le football, par exemple.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



FoldLock™

INDICATIONS D'UTILISATION

Problèmes au genou qui peuvent nécessiter une compression :

- Douleur médiale ou latérale
- Gonarthrose unicompartmentale modérée ou précoce
- Lésion dégénérative du ménisque

CONTRE-INDICATIONS


- Ne pas utiliser chez les personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système DFS breveté
- Compression certifiée de qualité médicale (20-30 mmHg)
- Tricot CoolVent™ léger dans la zone poplité pour plus de respirabilité et de confort
- Système breveté FoldLock™ pour une application plus facile et plus sûre
- Charnière StayBilizer™ compatible avec une activité sportive en matériau EVA léger et flexible pour une forme optimale et un ajustement parfait
- Graphiques rotuliens pour un positionnement intuitif
- Disponible en 5 tailles standard et 3 tailles confort

MESURES NÉCESSAIRES

Taille	Tour de Mollet	Tour de cuisse	Médial droit, Latéral gauche	Latéral droit, Médial gauche
XS	26 - 31 cm	36 - 41 cm	FP110401	FP110301
S	31 - 36 cm	41 - 46 cm	FP110402	FP110302
M	36 - 41 cm	46 - 51 cm	FP110403	FP110303
M Comfort	36 - 41 cm	51 - 56 cm	FP110413	FP110313
L	41 - 46 cm	51 - 56 cm	FP110404	FP110304
L Comfort	41 - 46 cm	56 - 60 cm	FP110414	FP110314
XL	46 - 50 cm	56 - 60 cm	FP110405	FP110305
XL Comfort	46 - 50 cm	60 - 64 cm	FP110415	FP110315

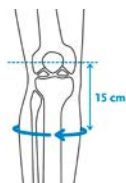

Tour de mollet :
15 cm au-dessous
du centre de la rotule.



Tour de cuisse :
15 cm au-dessus
du centre de la rotule.

OA EASE

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

L'orthèse OA Ease est une orthèse mono-montant avec son système de sangle DFS (Dynamic Force Strap®) conçue pour soulager la douleur liée à la gonarthrose unicompartmentale légère à modérée.

Sa conception enveloppante permet de la mettre en place et de la retirer facilement grâce aux attaches en caoutchouc, aux points de repère avec codage couleur et aux indicateurs de tension pour la sangle.

Cette orthèse de genou discrète est confortable, facile à utiliser et s'adapte à diverses formes de jambe. L'orthèse OA Ease peut également être lavée en machine pour un entretien facile.




INDICATIONS D'UTILISATION

- Gonarthrose unicompartmentale légère à modérée et/ou déchirures méniscales dégénératives
- Autres pathologies pouvant bénéficier d'un déchargement unicompartmental.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conception enveloppante facile - Des attaches en caoutchouc simples, des marquages avec codage couleur et un guide d'alignement de l'articulation pratique facilitent la mise en place et le retrait.
- Soulage la douleur liée à l'arthrose - Le système à 3 points d'appui avec sangle DFS (Dynamic Force Strap®), les coques et l'articulation discrète déchargent biomécaniquement le compartiment affecté du genou.
- Confortable - Le tissu extensible, léger et respirant est agréable au toucher et peut être lavé en machine pour un entretien sans effort.
- Discrète - Une orthèse discrète avec une articulation fine qui peut être portée sous les vêtements.
- Contrôle - Ajustez finement la tension de la sangle pour un soulagement personnalisé de la douleur grâce aux repères de dosage.
- Des kits d'extension sont disponibles pour améliorer l'ajustement et le confort.

MESURES NÉCESSAIRES

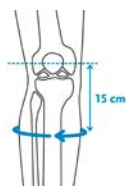

Tour de mollet :
15 cm au-dessous
du centre de la rotule.



Tour de cuisse :
15 cm au-dessus
du centre de la rotule.

OA EASE

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de Mollet	Tour de cuisse	Médial droit	Médial gauche	Latéral droit	Latéral gauche
XS	28 - 32 cm	36 - 41 cm	FOA0518711	FOA0618711	FOA0528711	FOA0628711
S	32 - 36 cm	41 - 46 cm	FOA0518712	FOA0618712	FOA0528712	FOA0628712
M	36 - 41 cm	46 - 53 cm	FOA0518713	FOA0618713	FOA0528713	FOA0628713
L	41 - 46 cm	53 - 60 cm	FOA0518714	FOA0618714	FOA0528714	FOA0628714
XL	46 - 51 cm	60 - 67 cm	FOA0518715	FOA0618715	FOA0528715	FOA0628715
XXL	51 - 56 cm	67 - 75 cm	FOA0518716	FOA0618716	FOA0528716	FOA0628716
3XL	56 - 61 cm	75 - 81 cm	FOA0518717	FOA0618717	FOA0528717	FOA0628717

L'articulation se situe sur le côté de la région affectée.

PIÈCES DÉTACHÉES

Description	Réf.
Pince crocodile (Médial droit/Latéral gauche)	FOW00501
Pince crocodile (Latéral droit/Médial gauche)	FOW00502
Coussinet de sangle	B-304120101


ACCESSOIRES

Description	Réf.
Petit Kit d'extension - 2 Pieces	FOA000301
Petit Kit d'extension - 10 Pieces	FOA000302
Grand Kit d'extension XS-S (Médial droit/Latéral gauche)	FOA000401
Grand Kit d'extension M-L (Médial droit/Latéral gauche)	FOA000402
Grand Kit d'extension XL-3XL (Médial droit/Latéral gauche)	FOA000403
Grand Kit d'extension XS-S (Latéral droit/Médial gauche)	FOA000404
Grand Kit d'extension M-L (Latéral droit/Médial gauche)	FOA000405
Grand Kit d'extension L-3XL (Latéral droit/Médial gauche)	FOA000406
Filet de lavage	WB000001
Sangle de suspension	OAW00007
Kit de butées de flexion/extension*	B-301040053
Kit de butées de flexion/extension* - 5 kits	B-301040055

*Comprend des butées d'extension 0°, 5°, 10°, 15°, 30°, butée de flexion 90°

Petit Kit d'extension:


Élargit la circonférence du mollet et/ou de la cuisse jusqu'à 4.5 cm

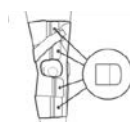

Petit Kit d'extension

Grand Kit d'extension:

XS-S élargit la circonférence de la cuisse jusqu'à 4 cm
 M-L élargit la circonférence de la cuisse jusqu'à 5 cm
 XL-3XL élargit la circonférence de la cuisse jusqu'à 6 cm

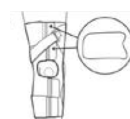

Grand Kit d'extension

SOLUTIONS DE STABILISATION ÖSSUR

Pour les personnes qui se remettent de fractures, de lésions ligamentaires ou qui ont besoin de solutions de traitement post-opératoire.

Ces solutions sont le fruit de décennies d'expérience et sont conçues pour améliorer le processus de guérison des blessures osseuses et des tissus mous. Grâce à notre capacité d'innovation, à notre expertise dans le domaine de la biomécanique et à nos collaborations avec des professionnels de santé, Össur propose des options de traitement complètes et éprouvées.

Les solutions traumatologiques Össur sont toutes développées pour faciliter la guérison et améliorer la qualité de vie des personnes, tout en préservant la fonction et la mobilité.





COLONNE VERTÉBRALE



MIAMI J®
PAGE 30

GENOU



CTi® CUSTOM
PAGE 48

PIED



REBOUND® AIR WALKER
PAGE 62

SOLUTIONS COLONNE VERTÉBRALE



MIAMI LSO™

LPPR HT: € 54.54 | LPPR TTC: € 57.54
201E00.031

Miami LSO est une orthèse spinale conçue pour le soulagement de la douleur, la protection des ligaments ou des muscles blessés et l'immobilisation postopératoire. Elle offre une immobilisation anatomique discrète, facile à mettre en place et à porter. Options supplémentaires pour un support modulaire et un système de poulie à l'avant-garde avec un cordon de poulie réglable en longueur. La ceinture de Miami LSO immobilise L1-L5. Avec le panneau postérieur supplémentaire, Miami LSO immobilise S1-T9.



INDICATIONS D'UTILISATION

Conditions nécessitant une immobilisation générale du tronc dans la région lombaire, telles que :

- Fractures de la colonne vertébrale stables et non déplacées (L1-L5)
- Sténose spinale
- Disques intervertébraux herniés
- Pathologies rachidiennes dégénératives
- Spondylolyse
- Spondylolisthésis

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture fine et universelle, discrète sous les vêtements et favorisant un microclimat perméable à l'air, aidant à garder la peau fraîche et confortable
- Système Miami éprouvé à double poulie avec câble de poulie réglable en longueur
- Ajustement intuitif, facile et sans outil, avec des bras de ceinture repliables et des aérations Precise-Size™ permettent un réglage rapide directement sur l'utilisateur
- Fermeture de poche Quick-Fit et rehauts bleus pour une utilisation facile par le patient
- Panneau postérieur disponible en taille universelle pour convenir à davantage de patients avec moins d'inventaire. Également disponible en modèles de taille profilée pour un ajustement précis et anatomique

MESURES NÉCESSAIRES

- Tour de taille





MIAMI LSO™


INFORMATIONS DE COMMANDE









OPTION 1 : COMMANDE D'ORTHÈSES DE STOCK

ORTHÈSE MIAMI LSO		
		
Taille	Tour de taille	Réf.
15 cm universel (Slim)	66 - 127 cm	MLSO-1E
20 cm universel (Standard)	66 - 127 cm	MLSO-2E
Extension de ceinture 15 cm (Slim)	66 - 177 cm	MLSO-1EXT
Extension de ceinture 20 cm (Standard)	66 - 177 cm	MLSO-2EXT

COUSSINET DORSAL AVEC SUPPORT LATÉRAL		
		
Taille	Tour de taille	Réf.
S	66 - 86 cm	MLSO-P12
M	86 - 96 cm	MLSO-P22
L	96 - 127 cm	MLSO-P32
XL	127 - 167 cm	MLSO-P42

COUSSINET STANDARD DORSAL AVEC SUPPORT LATÉRAL	
	
Taille	Réf.
Standard	MLSO-P56

COUSSINET AVANT	
	
Taille	Réf.
Coussinet 15 cm (Slim)	MLSO-PA6
Coussinet 20 cm (Standard)	MLSO-PA8

	CEINTURE		COUSSINET DORSAL AVEC SUPPORT LATÉRAL		COUSSINET AVANT		MIAMI LSO
3.		+		=			
4.		+		+		=	

AUTRES ACCESSOIRES

Description	Réf.
Quick fit tool	B-040100000

MIAMI TLSO 456

LPPR HT: € 179.61 | LPPR TTC: € 189.49
201E00.05 + 201E00.051

L'O.D.L.S. Miami 456 d'Össur répond directement aux besoins des patients et des praticiens, en simplifiant la préparation sans compromettre l'adaptabilité ni les performances. L'attelle O.D.L.S. Miami pré-assemblée, facile à utiliser, offre la commodité d'une taille unique universelle ou d'une conception anatomique au format unique.

Conformité : les points de repère patient Blue is You™ permettent de renvoyer les patients chez eux en toute confiance.

Réglabilité : la conception de ceinture universelle permet de régler la longueur de la ceinture sur le patient pour une adaptation plus précise. Les panneaux postérieurs thermo-moulables permettent un ajustement personnalisé, tandis que la conception modulaire permet le passage à une LSO.

Confort : équipée du système de poulies Miami LSO™ Advanced Compression avec compression lombaire perceptible et dotée d'une conception anatomique qui immobilise mieux la colonne vertébrale tout en optimisant le confort du patient.

Facilité d'utilisation : facile à appliquer avec des sangles sur l'épaule, l'attelle O.D.L.S. Miami nécessite une préparation minimale et est conçue pour offrir un confort optimal au patient.



Miami TLSO 456 version Posterior-Thoracic Extension (PTE)

INDICATIONS D'UTILISATION

Pathologies nécessitant une immobilisation globale des colonnes thoracique et lombaire. Elles peuvent inclure :

- Immobilisation post-chirurgicale
- Fixation par O.D.L.S. pour soutien vertébral jusqu'à T7
- Sténose spinale
- Hernie discale
- Fractures spinales dégénératives
- Spondylolisthésis
- Spondylolyse

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Confort nettement supérieur et facilité d'enfilage/de retrait accrue (par rapport à l'O.D.L.S. Miami Lumbar)
- Entièrement assemblée pour une adaptation facile
- S'adapte à des tailles de 155 à 193 cm
- Passage à une LSO au cours de la réadaptation
- La commodité d'un produit universel de taille unique ou personnalisé avec une conception anatomique à taille unique


CONTRE-INDICATIONS

- Fractures instables et déplacées

MESURES NÉCESSAIRES

Taille	Tour de taille*
Universal	66 - 177 cm
S	66 - 86 cm
M	86 - 107 cm
L	107 - 127 cm
XL	127 - 177 cm

*Les extensions de ceinture sont nécessaires pour les tours de taille supérieurs à 127 cm / 50".

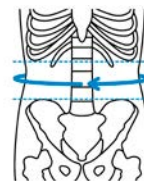

Mesurez la circonférence du tronc à mi-chemin entre les côtes les plus basses et la crête iliaque supérieure. En position debout.

MIAMI TLSO 456

INFORMATIONS DE COMMANDE

PTE NON-LORDOTIQUE, SLIM, 15 CM

Taille	Réf.
S	MTLSO-1212
M	MTLSO-1222
L	MTLSO-1232
XL	MTLSO-1242

PTE NON-LORDOTIQUE, STANDARD, 20 CM

Taille	Réf.
S	MTLSO-2212
M	MTLSO-2222
L	MTLSO-2232
XL	MTLSO-2242

AUTRES ACCESSOIRES

Description	Réf.
Quick fit tool	B-040100000
Extension de ceinture (orthèse standard) recommandée pour un tour de taille de 127 à 177 cm. Cela correspond à la taille XL pour l'orthèse Miami LSO.	MLSO-2EXT
Extension de ceinture (orthèse Slim) recommandée pour un tour de taille de 127 à 177 cm. Cela correspond à la taille XL pour l'orthèse Miami LSO.	MLSO-1EXT

MIAMI J® SELECT

LPPR HT: € 17.79 | LPPR TTC: € 18.77
2193813 | Code individuel fabricant à venir

Le collier cervical Miami J Select d'Össur offre la plus grande plage de réglage en hauteur du marché, grâce à un design unique et universel qui apporte le confort, l'immobilisation et la qualité que vous attendez d'un produit Miami J. Doté d'un mécanisme de verrouillage breveté innovant qui favorise l'observance des patients ainsi que d'un rembourrage Sorbatex antimicrobien, le Miami J Select est conçu pour offrir d'excellents résultats aux patients.



INDICATIONS D'UTILISATION

Pathologies nécessitant une immobilisation globale du rachis cervical. Cela peut inclure :

- Précaution au niveau de la colonne cervicale chez les patients traumatisés
- Immobilisation avant et après une chirurgie de la colonne cervicale

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Réglage de la hauteur facile grâce au mécanisme de verrouillage sécurisé : « À gauche pour verrouiller »
- Rembourrage antimicrobien et biocompatible Sorbatex pour prévenir la prolifération bactérienne
- Conception universelle sans compromis entre immobilisation et confort
- 7 tailles ajustées avec possibilité de réglages fins
- Mentonnière inspirée par le collier cervical Miami J®
- Minerve monobloc anatomique avec système Flex Edge® conçu pour réduire la pression occipitale
- Facile à enfiler et à retirer grâce à l'option brevetée Reproducible Fit
- Points de repère intuitifs bleus permettant de renvoyer les patients chez eux en toute confiance – Blue is You™
- Réglages de confort simplifiés grâce au disque Sternal-Relief Dial intégré et breveté
- Grande ouverture trachéale - fonction améliorée pour les patients en soins intensifs
- Capitonage multicolore facile à nettoyer et à remplacer
- Radiotransparent, compatible avec l'IRM
- Compatible avec les accessoires Occian™ Back & Miami® JTO

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Réf.
Orthèse cervicale Miami J Select avec un coussinet de rechange supplémentaire	MJSR-101
Orthèse cervicale Miami J Select	MJS-101
Coussinet de rechange Miami J Select	MJSP-101
Fermetures rapides Miami J Select (10 pièces)	MJST-101

MIAMI J®

LPPR HT: € 17.79 | LPPR TTC: € 18.77
2193813 | Code individuel fabricant à venir

Reconnu comme l'immobilisateur supérieur du rachis cervical dans de multiples études indépendantes ; la conception brevetée du Miami J répond aux besoins spécifiques des personnes souffrant de lésions cervicales. Développé en bio-ingénierie pour minimiser les points de pression dans les zones clés connues : menton, occiput, trapèzes et clavicules. Miami J offre des fonctionnalités qui améliorent l'observance, tout en assurant l'immobilisation, l'inhibition de la détérioration de la peau et le confort du patient.



INDICATIONS D'UTILISATION

Situations nécessitant une immobilisation générale de la colonne cervicale, telles que les suivantes :

- Précautions pour les patients traumatisés avant et après une chirurgie rachidienne
- Maladie du motoneurone
- Polyarthrite rhumatoïde (PR) et arthrose (AO) de la colonne cervicale
- Spondylite et spondylose cervicales







PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le capitonnage en Sorbatex est antibactérien et empêche la prolifération microbienne. Cela augmente le confort et aide à l'observance du patient
- Boutons de réglage du confort pour l'occiput et coussin sternal amovible en position couchée sur le dos, dans d'autres positions allongées et pour avaler
- Transparent aux rayons X, IRM et scanographie (TDM). Compatible avec les IRM

MESURES NÉCESSAIRES

- Phénotype

Le système de dimensionnement basé sur le phénotype facilite la sélection de la taille adéquate, tout en minimisant la marge d'erreur d'adaptation au patient. Chaque orthèse cervicale possède une partie antérieure développée selon des procédés biotechnologiques et qui, combinée à une partie postérieure spéciale, permet une très bonne fixation. Les tailles pédiatriques figurent dans ce catalogue sous Miami Jr.

TAILLE	PHÉNOTYPES	DESCRIPTION	RECOMMANDATION DE PRODUITS ÖSSUR
Extracourt (10 %)	Votre patient a-t-il un cou cyphotique (menton sur poitrine) ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Cyphotique (menton sur poitrine) • Spondylarthrite ankylosante gériatrique 	Miami J
XS (5 %)	Votre patient a-t-il un cou très court et fin ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Cou très court et fin • Principalement des femmes • Très répandu parmi la population asiatique 	Miami J
Fort (15 %)	Votre patient a-t-il un très grand tour de cou ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Très grand tour de cou • Corpulent • Pas de cou • Épaules très larges 	Miami J Select
Long (10 %)	Votre patient a-t-il un cou très long et haut ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Cou long et haut • « Cou de cygne » • Jeunes femmes • Adolescents 	Miami J Select
Normal (30 %)	Votre patient est-il une femme ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Féminin • Taille standard pour les femmes adultes • Hommes adultes minces 	Miami J Select
Court (30 %)	Autres adultes 	<ul style="list-style-type: none"> • Taille standard pour les hommes adultes • Femmes de grande taille 	Miami J Select

MIAMI J®

INFORMATIONS DE COMMANDE

MIAMI J

Taille	Collier complet*	Collier	Partie postérieure du collier	Partie antérieure du collier
Cou extracourt	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Cou fort	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200LBK	MJ-200LFRT
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250FRT
Cou court	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
Cou normal	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
Cou long	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT
Bariatrique	MJR-200B	MJ-200B		

* Les colliers complets sont fournis avec un jeu supplémentaire de capitonnage de rechange.
 Les parties antérieure et postérieure de l'orthèse cervicale Miami J peuvent être combinées pour une adaptation correcte à l'anatomie du patient. Par exemple, une partie antérieure pour cou court peut être utilisée avec une partie postérieure pour cou long.
 Choisissez la taille du collier en fonction de la hauteur de la nuque et non de la taille du patient. Les colliers pour cou extra court sont fournis avec des parties postérieures de taille normale.

ACCESSOIRES

COUSSINET DE RECHANGE

Taille	Réf.
Cou extracourt	MJP-100
Cou fort	MJP-200L
XS	MJP-250
Cou court	MJP-100
Cou normal	MJP-100
Cou long	MJP-100
Bariatrique	MJP-200B

MIAMI JTO[®] THORACIC EXTENSION

L'extension thoracique Miami JTO est conçue en collaboration avec des chirurgiens de la colonne vertébrale renommés, des orthésistes et des infirmières renommés spécialistes de la colonne vertébrale. L'orthèse est utilisée exclusivement avec toutes les minerves Miami J lorsqu'une stabilité accrue au niveau des jonctions cervicales est indiquée.

L'extension thoracique Miami JTO est un dispositif polyvalent, sans outil, doté d'un support de menton breveté, offrant plus de contrôle que la seule minerve et conçu pour traiter les blessures cervicales et thoraciques hautes.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Précaution pour colonne cervicale basse et colonne thoracique haute pour les patients traumatisés
- Immobilisation pré et post chirurgie de la colonne cervicale basse et de la colonne thoracique haute
- Autres affections nécessitant une immobilisation globale de la colonne cervicale basse et/ou de la colonne thoracique haute
- Affections nécessitant une immobilisation globale de la colonne cervicale basse et/ou de la colonne thoracique haute

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- La conception brevetée avec « dos flottant » permet une immobilisation maximale sans risque de mouvement compensatoire
- S'attache et se détache sans outils
- Le rembourrage Sorbatex II est antibactérien et inhibe la croissance microbienne, ce qui améliore le confort et aide à assurer la compliance du patient
- MRI, CT and X-ray lucent, MR compatible

MESURES NÉCESSAIRES

- Taille universelle

INFORMATIONS DE COMMANDE

MIAMI JTO THORACIC EXTENSION

Description	Réf.
Miami JTO	MT-900
Miami JTO avec capitonnage de rechange	MTR-900

Compatible avec toutes les tailles de la Miami J[®], les niveaux 1-5 de la Miami J[®] Select et P3 de la Miami Jr[®]. L'orthèse Miami J n'est pas fournie avec le support thoracique Miami JTO.

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Capitonnage de rechange	MTP-950

OCCIAN® BACK & OCCIAN® BACK JR

La coque Occian Back est conçue exclusivement pour répondre aux besoins spécifiques des patients polytraumatisés en unité de soins intensifs. Cette coque pour position couchée de taille universelle, de conception spéciale et dotée d'une mousse Intuitech™ moderne et anti-pression à mémoire de forme aide le personnel médical à éviter les points de pression chez les patients souffrant de lésions cervicales.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Patients non réveillés et alertes dans les 24 à 48 heures suivant leur admission
- Patients présentant des lésions cutanées préexistantes et/ou des lacérations à la tête/au cou
- Patients brûlés qui doivent porter un collier
- Patients ayant une chirurgie programmée souhaitant un confort postopératoire nocturne
- Patients qui restent en position couchée pendant de longues périodes liée à une instabilité hémodynamique, neurologique ou respiratoire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- La mousse à mémoire de forme, de décharge de pression Intuitech prévient les escarres occipitales
- Maintient la stabilité de la colonne cervicale
- Offre un confort unique pour soulager la pression en remplaçant la partie postérieure d'une minerve Miami J
- Il a été cliniquement prouvé qu'elle élimine pratiquement les escarres occipitales sans sacrifier la stabilité de la colonne cervicale
- Facile à nettoyer
- Radiotransparente, compatible avec l'IRM

MESURES NÉCESSAIRES

- Taille universelle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Réf.
Occian Back*	ACB-100
Occian Back Junior**	ACB-200

*Compatible avec toutes les tailles de Miami J®, Miami J® Select et Miami Jr®.
 ** Partie antérieure du collier non incluse.

MIAMI Jr®

LPPR HT: € 17.79 | LPPR TTC: € 18.77
2118823 | Code individuel fabricant à venir

Miami Jr est conçu pour s'adapter aux anatomies uniques des patients âgés de 12 ans et moins. La ligne Miami Jr, qui couvre la totalité du cycle de croissance, est dimensionnée en fonction de l'âge. Össur est la seule société à proposer une gamme de minerves pédiatriques tenant compte des différences anatomiques entre adultes et enfants. Nous sommes conscients que les enfants ne sont pas seulement des « petits adultes » ; ils ont besoin d'une conception innovante.



INDICATIONS D'UTILISATION

Situations nécessitant une immobilisation du rachis cervical, par ex. :

- Immobilisation pré- et post-opératoire
- Immobilisation préventive du rachis cervical chez les patients accidentés

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conçu exclusivement pour l'anatomie des enfants de 12 ans et moins
- Les coussinets Sorbatex II rendent la minerve « douce pour la peau » et protègent l'intégrité de la peau durant le port prolongé
- MRI, CT and X-ray lucent, MR compatible

MESURES NÉCESSAIRES

- Âge

INFORMATIONS DE COMMANDE

MIAMI JR

Taille	Collier complet*	Collier
0 - 6 mois	MJR-P0	MJ-P0
6 - 24 mois	MJR-P1	MJ-P1
2 - 6 ans	MJR-P2	MJ-P2
6 - 12 ans	MJR-P3	MJ-P3

*Les colliers complets sont fournis avec un jeu supplémentaire de capitonnage de recharge.

ACCESSOIRES

COUSSINET DE RECHANGE

Taille	Réf.
0 - 6 mois	MJP-P0
6 - 24 mois	MJP-P1
2 - 6 ans	MJP-P2
6 - 12 ans	MJP-P3

PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR

INDICATIONS D'UTILISATION

Situations nécessitant une immobilisation générale du rachis cervical, telles que

- Avant et après une chirurgie rachidienne
- Protection au niveau du rachis cervical chez les patients traumatisés

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en circonférence et en hauteur avec verrouillage permanent
- Mousse Plastazote® de forme anatomique laissant de l'espace aux veines cervicales
- Bien ventilé et résistant à l'eau pour le bain et l'hydrothérapie
- Radiotransparent. Compatible avec les IRM



MESURES NÉCESSAIRES

- Selon le tour de cou et la hauteur épaules-menton

INFORMATIONS DE COMMANDE

PHILADELPHIA ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR

Taille	Tour de cou
S (2 tears)	25.4 - 33 cm
M (1 tear)	33 - 40.6 cm
L (no tear)	40.6 - 48.3 cm

Remarque : Le tableau ci-dessus ne représente que les tailles courantes. La taille doit être vérifiée par le fournisseur de soins de santé pour chaque patient individuellement.

Réf.	Taille / Description
PHP-AA	Conforme aux tailles 2, 3 et 4 du collier Philadelphia® Tracheotomy Collar

PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR

LPPR HT: € 17.79 | LPPR TTC: € 18.77
2118823 | Code individuel fabricant à venir

INDICATIONS D'UTILISATION

- Protection au niveau du rachis cervical chez les patients traumatisés
- Immobilisation avant et après une chirurgie de la colonne cervicale

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Mousse en Plastazote® non toxique
- Soutien total de l'arc cervical
- Gamme complète de tailles pour un ajustement personnalisé
- Minerve radiotransparente
- Nettoyage aisé avec du savon et de l'eau
- Crochet et boucle de fixation
- À utiliser tel que prescrit par un médecin



MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence du cou

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de cou	Hauteur 6 cm 2 ¼"	Hauteur 8 cm 3 ¼"	Hauteur 11 cm 4 ¼"	Hauteur 13 cm 5 ¼"
XS	< 25 cm	PHP-T2XS			
S	25 - 33 cm	PHP-T2S	PHP-T3S	PHP-T4S	PHP-T5S
M	33 - 41 cm	PHP-T2M	PHP-T3M	PHP-T4M	PHP-T5M
L	41 - 48 cm	PHP-T2L	PHP-T3L	PHP-T4L	PHP-T5L
XL	> 48 cm	PHP-T2XL	PHP-T3XL	PHP-T4XL	PHP-T5XL

Taille	Tour de cou	Hauteur	Réf.
Tout-petits	15 - 20 cm	3 cm	PHP-T1
Enfants	20 - 28 cm	4.5 cm	PHP-TP

ACCESSOIRES

COUSSINET PHILADELPHIA COOLMAX COTTON

Taille	Tour de cou	Réf.
S	25 - 33 cm	PHP-LCS
M	33 - 41 cm	PHP-LCM
L	41 - 48 cm	PHP-LCL

CONNECTEUR DE TRACHÉOTOMIE PHILADELPHIA

Taille	Stabilisateur
Adultes	PHP-OS

PATRIOT® COLLAR

LPPR HT: € 17.79 | LPPR TTC: € 18.77
2118823 | Code individuel fabricant à venir

INDICATIONS D'UTILISATION

- Protection au niveau du rachis cervical chez les patients traumatisés
- Immobilisation avant une chirurgie rachidienne

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Ajustement à différentes hauteurs - Adulte (4 positions) et pédiatrique (3 positions)
- Fenêtrage postérieur pour un drainage des fluides, une circulation de l'air et une palpation du rachis cervical
- La taille universelle optimise les besoins en matière de stock
- Résistante à l'eau
- Grande ouverture trachéale
- Transparente aux rayons X et scanographie (TDM). Compatible avec les IRM
- Fixations pour canule nasale



MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence du cou

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de cou	Réf.
Enfant	20 - 46 cm	PHP-PP
Adulte	28 - 58 cm	PHP-PA

FORMFIT® BACK SUPPORT, AIR

LPPR HT: € 44.73 | LPPR TTC: € 47.19
201E00.021

INDICATIONS D'UTILISATION

Les affections dorso-lombaires pouvant nécessiter une limitation de la mobilité, telles que :

- Douleurs musculaires au bas du dos
- Foulures lombo-sacrées
- Douleurs chroniques au bas du dos
- Sciatique



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le système pneumatique autonome est discret et facile à utiliser
- Ses panneaux en maille et les orifices d'aération augmentent la respirabilité et améliorent le confort
- Son système double serrage offre un soutien supplémentaire au niveau des zones lombaire et abdominale
- Ses renforts flexibles offrent un soutien optimal dans les zones lombaires et abdominales
- Ses bandes antidérapantes empêchent le glissement de la ceinture
- Sa poche d'air réglable offre un ajustement personnalisé et une compression ciblée dans la région lombaire

MESURES NÉCESSAIRES

- Tour de taille

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de taille	Standard
S	63 - 76 cm	209133
M	76 - 86 cm	209135
L	86 - 97 cm	209137
XL	97 - 107 cm	209138
XXL	107 - 142 cm	209139

FORMFIT® BACK VS

LPPR HT: € 44.73 | LPPR TTC: € 47.19
201E00.021

Formfit® Back VS est une ceinture de soutien lombaire à double serrage. Les baleines métalliques disposées en V à l'arrière de la ceinture sont destinées à soutenir la charnière lombo-sacrée. Vous pouvez ajuster la hauteur de la seconde sangle pour ajuster la pression exercée sur le bas du dos.



INDICATIONS D'UTILISATION

Pour les affections du bas du dos qui peuvent bénéficier d'une restriction des mouvements bruts, telles que

- Lomalgie musculaire
- Les entorses lombo-sacrées
- Lomalgie chronique
- La sciatique

CONTRE-INDICATIONS

- Affections nécessitant une immobilisation plus rigide ou plus importante (> D12) ou une intervention chirurgicale, sauf indication médicale.
- Dysfonctionnement du plancher pelvien

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Double sangle amovible et polyvalente, réglable en hauteur
- Baleines brevetées en forme de V
- Matériaux respirants
- Grandes boucles pour les doigts et zones auto-agrippantes

MESURES NÉCESSAIRES

- Tour de taille

INFORMATIONS DE COMMANDE

FORMFIT BACK VS - 21 CM

Taille	Tour de taille	Réf.
XS	70 - 80 cm	209112
S	80 - 90 cm	209113
M	90 - 100 cm	209115
L	100 - 110 cm	209117
XL	110 - 125 cm	209118
XXL	125 - 140 cm	209119

FORMFIT BACK VS - 26 CM

Taille	Tour de taille	Réf.
XS	70 - 80 cm	209122
S	80 - 90 cm	209123
M	90 - 100 cm	209125
L	100 - 110 cm	209127
XL	110 - 125 cm	209128
XXL	125 - 140 cm	209129

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Coussinet en gel	GB28

MEMBRE SUPÉRIEUR



FORMFIT® SHOULDER BRACE

LPPR HT: € 14.45 | LPPR TTC: € 15.24
1156684 | Code individuel fabricant à venir

L'orthèse Formfit® Shoulder Brace est conçue pour immobiliser l'épaule suite à un traumatisme/une intervention chirurgicale. Avec sa coupe profilée, son look sportif et sa respirabilité, elle offre un excellent confort et une grande facilité d'utilisation. Comme son prédécesseur, le SmartSling®, l'orthèse Formfit® Shoulder Brace permet également une mise en abduction (lorsque le coussin d'abduction est attaché) ou en rotation externe de l'épaule (lorsque le coussin de rotation externe est attaché).

L'orthèse d'épaule polyvalente est également disponible avec un kit avion personnalisable pour les patients qui ont besoin d'un positionnement précis après une chirurgie de l'épaule.

Le coussin axillaire en option disponible à l'achat aide à répartir le poids sur une plus grande surface et diminue la pression sur le nerf cubital.



Coussinet d'aisselle



Coussinet de rotation externe

INDICATIONS D'UTILISATION

- Immobilisation pour la réparation de la coiffe des rotateurs
- Réparations des lésions de Bankart
- Déplacements capsulaires
- Luxations/subluxations gléno-humérales
- Réparations/froissements des tissus mous
- Instabilités/traumatismes de l'épaule
- Rééducation postopératoire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Matériau respirant
- Boucles à ouverture rapide
- Sangle de déchargement
- Capitonnage supplémentaire
- Attache de pouce universelle
- Disponible en harnais seul, avec abduction et avec rotation externe

MESURES NÉCESSAIRES

- Distance coude-poignet

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Longueur	Description	Réf.
S	jusqu'à 29 cm	Formfit Shoulder Brace - harnais seul	SSS-SO
M	29 - 40 cm	Formfit Shoulder Brace - harnais seul	SSR-SO
L	40 - 44.5 cm	Formfit Shoulder Brace - harnais seul	SSL-SO
S	jusqu'à 29 cm	Formfit Shoulder Brace avec abduction	SSS
M	29 - 40 cm	Formfit Shoulder Brace avec abduction	SSR
L	40 - 44.5 cm	Formfit Shoulder Brace avec abduction	SSL
S	jusqu'à 29 cm	Formfit Shoulder Brace avec rotation extérieure	SSS-ER
M	29 - 40 cm	Formfit Shoulder Brace avec rotation extérieure	SSR-ER
L	40 - 44.5 cm	Formfit Shoulder Brace avec rotation extérieure	SSL-ER

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Coussinet d'aisselle	SSAXP
Formfit Shoulder Brace Kit Rotation Externe	SSE

REBOUND® POST-OP ELBOW

L'orthèse de coude post-opératoire Rebound® d'Össur associe des fonctionnalités intuitives pour les installateurs et les utilisateurs avec une conception qui vise à améliorer l'expérience post-opératoire. Combiner une articulation à bouton de verrouillage et quatre embrasses télescopiques, les protocoles post-opératoires individuels sont facilement pris en charge. Le coude post-opératoire Rebound, le plus léger de sa catégorie, favorise le confort de l'utilisateur grâce à des sangles qui restent en place, une adaptation anatomique gauche/droite avec des manchons de stabilité moulables et des points de repère bleus pour un apprentissage facile.



INDICATIONS D'UTILISATION

Indications nécessitant une immobilisation du coude et/ou une restriction de l'amplitude articulaire. Ces dernières peuvent inclure les suivantes :

- Fractures stables du coude, de l'humérus distal, du radius proximal ou du cubitus
- Blessures ou réparations des tendons et ligaments
- Reconstructions du ligament collatéral
- Hyper-extension du coude
- Réparation du tendon du triceps
- Blessures chroniques du coude
- Soulagement du tennis elbow

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour être l'orthèse la plus légère du marché
- Les embrasses télescopiques se déplacent pour personnaliser la longueur et garder les sites d'incision dégagés
- Apprentissage facile pour les utilisateurs avec des points de repère intuitifs, y compris des boucles Blue-is-You™ et un système de sangle numéroté
- L'articulation avec la butée de verrouillage permet une amplitude articulaire sécurisée avec des butées de réglage de tirage résistantes aux chocs et des verrous d'amplitude articulaire en option
- Manchons de stabilité moulables conçus pour être personnalisés pour une adaptation et un soutien améliorés
- Les guides de sangle maintiennent la sangle pour plus de sécurité et de confort
- Adaptation universelle pour les coudes gauche et droit

MESURES NÉCESSAIRES

- Taille universelle

REBOUND® POST-OP ELBOW

INFORMATIONS DE COMMANDE

Côté	Réf.
Gauche	B-8391680
Droite	B-8391580

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Jeu de coussinets	B-8390002
Poignée pour le contrôle de la pronation et de la supination	B-8390003
Set de bandoulières	B-8390004
Jeu de verrous ROM	B-8390005
Fermeture auto-agrippante Alligator	B-8390006
Jeu de fermetures auto-agrippantes autocollantes	B-8390007
Jeu de coussinets AMS	B-8390008
Jeu de sangles	B-8390009

FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM

LPPR HT: € 53.69 | LPPR TTC: € 56.64
2159526 | Code individuel fabricant à venir

Formfit® Wrist et Formfit® Wrist & Forearm immobilisent et protègent les patients souffrant de tendinite, de certaines lésions des tissus mous, y compris les entorses et foulures légères à modérées, ainsi qu'en relais après une immobilisation plâtrée. Le matériau léger et respirant et la coupe ajustée font de ce produit confortable un excellent choix.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Entorse ou foulure légère à modérée
- Tendinite
- En relais après immobilisation plâtrée
- Certaines autres lésions des tissus mous

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Matériau respirant
- Adaptation morphologique
- Fermetures auto-agrippantes
- Eclisses conformables

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence du poignet

INFORMATIONS DE COMMANDE

FORMFIT WRIST & FOREARM

Taille	Circonférence du poignet	Formfit Wrist 20 cm		Formfit Wrist & Forearm 25 cm	
		Gauche	Droite	Gauche	Droite
XS	13 - 16 cm	317082	317072	617082	617072
S	16 - 18.5 cm	317083	317073	617083	617073
M	18.5 - 20.5 cm	317085	317075	617085	617075
L	20.5 - 23.5 cm	317087	317077	617087	617077
XL	23.5 - 25.5 cm	317088	317078	617088	617078

ACCESSOIRES

COUSSINET EN GEL POUR LA THÉRAPIE PAR LE CHAUD/LE FROID

Description	Gauche	Droite
Formfit Wrist (20 cm)*	GB20L	GB20R
Formfit Wrist & Forearm (25 cm)	GB22L	GB22R



* Convient aux tailles XS et S. Pour les tailles M à XL, utilisez les numéros d'article pour Formfit Wrist & Forearm.

FORMFIT® WRIST & THUMB, UNIVERSAL

Formfit® Wrist Universal: LPPR HT: € 53.69 | LPPR TTC: € 56.64
2159526 | Code individuel fabricant à venir

Formfit® Thumb Universal: LPPR HT: € 50.41 | LPPR TTC: € 53.18
2189800 | Code individuel fabricant à venir

Formfit® Universal Wrist est conçue pour limiter le mouvement du poignet. Permet l'immobilisation et la protection contre certaines lésions des tissus mous, les foulures et les entorses légères à modérées, y compris le relais d'immobilisations plâtrées. Le design léger et universel réduit également les besoins de stockage.

Formfit® Universal Thumb est conçue pour limiter le mouvement du poignet et du pouce. Fournit une immobilisation et une protection contre certaines lésions des tissus mous, les foulures et les entorses légères à modérées, y compris la cicatrisation en relais de plâtre. Le design léger et universel réduit également les besoins de stockage.



INDICATIONS D'UTILISATION

Formfit® Universal Wrist :

- Entorse ou foulure légère à modérée
- Tendinite
- Relais après immobilisation plâtrée
- Certaines autres lésions des tissus mous

Formfit® Universal Thumb :

- Pouce du skieur
- Certains traumatismes scaphoïdiens
- Lésions des tissus mous
- Tendinite de De Quervain
- Consolidation en relais de plâtre

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Formfit® Universal Wrist :

- Matériau respirant
- Sangle de fermeture Quick-Pull
- Renfort de positionnement dorsal
- Renfort palmaire malléable

Formfit® Universal Thumb :

- Matériau respirant
- Sangle de fermeture Quick-Pull
- Renfort pour pouce personnalisable
- Renfort dorsal positionnel
- Renfort palmaire malléable

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence du poignet

INFORMATIONS DE COMMANDE

FORMFIT WRIST

Taille	Circonférence du poignet	Gauche	Droite
Enfants	9 - 13 cm	B-252603301	B-252603300
Universelle	11 - 24 cm	B-252603109	B-252503109
XL	19 - 28 cm	B-252603106	B-252603105

FORMFIT WRIST & FOREARM UNIVERSAL

Taille	Circonférence du poignet	Gauche	Droite
Universelle	11 - 24 cm	B-252603210	B-252603209

FORMFIT THUMB SPICA UNIVERSAL

Taille	Circonférence du poignet	Gauche	Droite
Enfants	9 - 13 cm	B-253603301	B-253603300
Universelle	11 - 24 cm	B-253603109	B-253503109
XL	19 - 28 cm	B-253603106	B-253603105

FORMFIT® THUMB SPICA

LPPR HT: € 50.41 | LPPR TTC: € 53.18
2189800 | Code individuel fabricant à venir

Formfit® Thumb est conçue pour limiter les mouvements du poignet et du pouce. Elle permet la mise au repos et la protection des patients souffrant de tendinite (par ex., tendinite de De Quervain), de certaines lésions des tissus mous, y compris les entorses et foulures légères à modérées et le pouce du garde-chasse, ainsi qu'en relais d'une immobilisation plâtrée. Le matériau léger et respirant et la coupe ajustée font de ce produit confortable un excellent choix.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Entorse ou foulure légère à modérée
- Tendinite par exemple, tendinite de De Quervain
- Relais d'immobilisation plâtrée
- Certaines autres lésions des tissus mous, par exemple, le pouce du garde-chasse

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Matériau respirant
- Ajustement morphologique
- Sangles auto-agrippantes
- Renforts conformables

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence du poignet

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Circonférence du poignet	Gauche	Droite
XS	13 - 16 cm	3020	3120
S	16 - 18.5 cm	3030	3130
M	18.5 - 20.5 cm	3050	3150
L	20.5 - 23.5 cm	3070	3170
XL	23.5 - 25.5 cm	3080	3180

ACCESSOIRES

COUSSINET EN GEL POUR LA THÉRAPIE PAR LE CHAUD/LE FROID

Description	Gauche	Droite
Formfit Wrist (20 cm)*	GB20L	GB20R
Formfit Wrist & Forearm (25 cm)	GB22L	GB22R

* Convient aux tailles XS et S. Pour les tailles M à XL, utilisez les numéros d'article pour Formfit Wrist & Forearm.



GENOU



CTI® CUSTOM

Développée en 1983, CTI reste aujourd'hui une pièce maîtresse de la gamme d'orthèses ligamentaires d'Össur. Bien que l'orthèse CTI ait évolué au fil du temps, notre philosophie reste inchangée – un système composé d'un cadre rigide qui maintient la jambe dans un bon alignement et fournit un haut niveau de stabilisation pour prévenir tout déplacement inapproprié. Le développement constant et l'amélioration de cette conception singulière est la raison pour laquelle CTI reste le premier choix des athlètes et médecins à travers le monde.

Son cadre rigide en carbone composite épouse la forme du tibia, fournissant le contact nécessaire entre l'orthèse et l'os pour une stabilisation maximale de l'articulation du genou.

CTI Custom est généralement utilisée pour des niveaux de soutien et protection élevés où le confort et la résistance ne sont pas compromis par le poids et l'encombrement. Cela offre également des avantages pour un ajustement précis en cas d'anomalies de la forme de la jambe.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Pour les affections du genou qui peuvent bénéficier d'une augmentation de la stabilité antéropostérieure, médio-latérale et rotatoire du genou, par exemple : instabilités LCA, LCP, LLI, LLE.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Articulation Accutrac® anatomiquement adaptées avec butées d'extension
- Doublures en silicone Sensil® exclusives conçues pour réduire la migration
- Total Support System™ pour les instabilités LCA, LCP, LLI, LLE, rotatives et combinées
- Fibre de carbone pré-impregnée, construction de cadre rigide
- Matériaux non corrosifs, idéaux pour les sports nautiques
- Option de peinture personnalisée disponible
- Modèle standard pour niveaux d'impact modérés à élevés
- Modèle Pro Sport pour les niveaux d'impact les plus élevés
- Modèle Vapor pour des niveaux d'impact faibles à modérés
- Disponible en 12 couleurs.

MESURES NÉCESSAIRES

- Fabriqué sur-mesure (custom) : Scan 3D (.AOP, .STL, .OBJ), .CPV). Bon de commande spécifique à compléter.

COULEURS STANDARD



MOTIFS FANTAISIE



Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les motifs fantaisie et designs personnalisés.

CTI® CUSTOM

INFORMATIONS DE COMMANDE

CTI CUSTOM

Description	Gauche	Droit
Standard	B-116600010	B-116500010
Pro Sport	B-117600010	B-117500010
Vapor	B-118600010	B-118500010

ACCESSOIRES

COUSSINET MOLLET

Description	Réf.
Coussinet de mollet en silicone	B-411500115

KITS DE SANGLES

Taille	Réf.
S, M, L	B-701130104
XL, XXL, XXXL, XXXXL	B-701130108

KITS PCL

Taille	Réf.
S, M	B-705000132
L, XL	B-705000235

CTI® CUSTOM

ACCESSOIRES

COUSSINETS DE SANGLE*

Taille	Réf.
S	B-304010057
M, L	B-304010058
XL, XXL	B-304010059

*Must also order hook-and-loop B-309020017

SANGLES AMS (SYSTÈME D'ANTI-MIGRATION))

Description	Réf.
Sangles AMS (système d'anti-migration) en EVA (éthylène-acétate de vinyle)	22095
Sangles AMS (système d'anti-migration) en néoprène - Taille S/L (jusqu'à 43 cm de circonférence*)	22094
Sangles AMS (système d'anti-migration) en néoprène - Taille XL (au delà de 43 cm de circonférence*)	22152

*Circonférence mesurée 8 cm sous le genou.

KIT MOTOCROSS

Description	Réf.
Coque rotulienne	B-711130011
Protège-charnières	B-705000003
Kit Taille S*	B-711140002
Kit Taille M*	B-711140003
Kit Taille L*	B-711140004
Kit Taille XL*	B-711140005

*Comprend coque rotulienne, protège-charnières, sous-gaine, autocollants

GAINES

Taille	Tour de cuisse	Gaine Softsleeve	Sous-gaine en néoprène	Sur-gaine en néoprène	Sur-gaine Sport rembourrée	Genouillère en maille* Noir
XXS						
XS						SLV60011
S	<38 cm	20643	20251	20051	20448	SLV60012
M	38 - 45 cm	20644	20252	20052	20448	SLV60013
L	45 - 49.5 cm	20644	20253	20053	20449	SLV60014
XL	49.5 - 54.5 cm	20645	20254	20054	20449	SLV60015
XXL	54.5 - 62 cm	20645	20255	20055		SLV60016
XXXL	62 - 71 cm	20646	20256	20056		
XXXXL	71 - 86 cm	20647	20257	20057		

*Genouillère en maille : Textile principal : 92% cotton / 8% élasthanne - Maille : 100% polyester - Bande : 80% polyester / 20% élasthanne

AUTRES ACCESSOIRES

Description	Réf.
Kit d'anneaux en D Standard (inclus : 2 x 1" et 2 x 1.5")	B-704132600
Kit d'anneaux en D (inclus : 2x 2")	B-704132602
Kit de coussinet condylien	B-704130150
ACL Kit de réparation	B-705130041
Kit de butées d'extension	22130
Kit de butée de flexion	19254
Kit de sangles d'extension (installé lors de la fabrication)	21144

CTI®3

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

CTi®3 est une orthèse ligamentaire confortable, légère et durable, qui offre une stabilisation de l'articulation du genou et une conception physiologique adaptée aux activités quotidiennes et sportives.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Pour les affections du genou qui peuvent bénéficier d'une plus grande stabilité et d'une meilleure protection antéro-postérieure et médio-latérale, par exemple : les blessures et les instabilités du LCA, LLI, LLE, LCP, rotatoires et combinées.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication améliorée : légers et résistants, les cadres en composite de carbone offrent un rapport rigidité/poids optimal.
- Adaptation à l'anatomie : l'orthèse est conçue pour s'adapter à un éventail plus large de formes de jambes. Elle est équipée d'une articulation Accutrac® pour suivre précisément le mouvement anatomique du genou.
- Meilleur confort : les manchons uniques améliorent le confort grâce à leur motif spécial, qui offre un excellent équilibre entre amortissement et aération.
- Accessoires et pièces de rechange faciles à utiliser, notamment des kits Motocross, jeux de sangles, manchons de rechange et butées de flexion.

MESURES NÉCESSAIRES

- Largeur médio-latérale (M/L) : mesure de la largeur médio-latérale au niveau de l'articulation du genou en position standard debout en charge.
- Tour de cuisse (mesure secondaire pour les patients entre deux tailles) : 20 cm au dessus du centre de la rotule.
- Circonférence de la rotule distale au niveau de la pointe de la rotule



CTI®3

INFORMATIONS DE COMMANDE

CTI3

Comprend : Jeu de coussinets condyliens et butées d'extension (la butée d'extension à 0° et le coussinet condylien standard sont préinstallés).

Taille	Largeur médio-latérale (M/L)	Tour de Cuisse	Circonférence rotule distale	Droite	Gauche
S	8.9 - 10.2 cm	40 - 47 cm	28 - 34 cm	CTI-22002	CTI-23002
M	10 - 11.4 cm	45 - 55 cm	34 - 38 cm	CTI-22003	CTI-23003
L	11.2 - 12.7 cm	52 - 61 cm	38 - 41 cm	CTI-22004	CTI-23004
XL	12.5 - 14 cm	58 - 67 cm	41 - 44 cm	CTI-22005	CTI-23005

Remarque : Les mesures médio-latérales M/L (interne/externe) sont les mesures à privilégier et les plus précises pour l'orthèse CTI. Le tour de cuisse doit être utilisée lorsque les mesures M/L se situent entre deux tailles.

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

CTI3 KIT MOTOCROSS

Comprend : Protecteur d'impact, Gaine avec maille, Feuille d'autocollants CTI, Sac CTI

Taille	Droite	Gauche
S	CTI-22132	CTI-23132
M	CTI-22133	CTI-23133
L	CTI-22134	CTI-23134
XL	CTI-22135	CTI-23135

JEU DE MANCHONS

Taille	Droite	Gauche
S	CTI-22322	CTI-23322
M	CTI-22323	CTI-23323
L	CTI-22324	CTI-23324
XL	CTI-22325	CTI-23325

JEU DE CROCHETS

Taille	Droite	Gauche
S	CTI-22332	CTI-23332
M	CTI-22333	CTI-23333
L	CTI-22334	CTI-23334
XL	CTI-22335	CTI-23335

JEU DE SANGLES

Taille	Réf.
S	CTI-24222
M	CTI-24223
L	CTI-24224
XL	CTI-24225

DIVERS

Description	Réf.
Cordon élastique du protecteur d'impact	CTI-24130
Vis du protecteur d'impact	CTI-24140
Cale coussinet tibial	22077
Jeu de coussinets condyliens (Fin, Standard, Epais)	CTI-24320
Kit de butées d'extension (0°, 5°, 10°, 20°, 30°)	CTI-24430
Kit de butées de flexion (0°, 60°, 75°, 90°)	CTI-24440
Jeu d'autocollants d'articulation	CTI-24450
Jeu d'anneaux en D	CTI-24510
Kit de sangles PCL CTI3	CTI-24520

GENOUILLÈRE EN MAILLE

Taille	Réf.
S	SLV60012
M	SLV60013
L	SLV60014
XL	SLV60015

EXTREME®

LPPR HT: € 1,132.71 | LPPR TTC: € 1,195.01
2736120

INDICATIONS D'UTILISATION

- Laxités ligamentaires des LCA, LCP, LLI ou LLE (simples ou combinées) entraînant une instabilité moyenne à sévère.
- Protection et stabilisation après chirurgie (greffe ou réparation).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Son design unilatéral éprouvé fournit une stabilisation dynamique, offrant un soutien maximal quand le genou est sous tension.
- Son système de sangle Dynamic Force Strap® unique minimise l'encombrement et maximise l'agilité.
- Disponible en 12 couleurs, mates et brillantes. Peinture personnalisée possible.



MESURES NÉCESSAIRES

- Fabriqué sur-mesure (custom) : Scan 3D (.AOP, .STL, .OBJ, .CPV). Bon de commande spécifique à compléter.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description	Réf.
Extreme avec sangle DFS Gauche	B-108600010
Extreme avec sangle DFS Droit	B-108500010
Extreme avec SmartDosing Gauche	B-108600020
Extreme avec SmartDosing Droit	B-108500020

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Sangle wrap (sur mesure)	B-426000150
Gaine AMS (sur mesure)	B-426000250

GAINES

Taille	Sous-manchon pour genou	Gaine Sofsleeve	Sous-gaine en néoprène	Sur-gaine en néoprène
XS	B-250150101			
S	B-250150102	20643	20251	20051
M	B-250150103	20644	20252	20052
L	B-250150104	20644	20253	20053
XL	B-250150105	20645	20254	20054
XXL	B-250150106	20645	20255	20055
XXXL		20646	20256	20056
XXXXL		20647	20257	20057

FORMFIT® POST-OP KNEE

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

Formfit® Post-Op Knee offre une gamme de contrôle de l'amplitude articulaire et de l'immobilisation après un traumatisme ou une chirurgie. Le réglage de la longueur est facile et sans outil. Le montant articulé ROM discret peut être ajusté avec un simple mouvement de traction, de rotation et de libération. Une large gamme de butée de flexion et d'extension vous permet de choisir l'amplitude articulaire optimale.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Immobilisation ou contrôle de l'amplitude articulaire post-opératoire/post-traumatique
- Indiquée pour les chirurgies suite à des lésions ligamentaires et à des fractures, et les situations nécessitant un contrôle de l'amplitude articulaire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Supports amovibles pour un réglage de longueur facile et sans outil
- Montant ROM OneTouch™ facile à régler avec possibilité de verrouillage de -10° à 30° (par paliers de 10°)
- Contrôle d'extension de -10° à 90° (par paliers de 10°)
- Contrôle de flexion de 0° à 120° (par paliers de 10°)
- Disponible en modèles froid ou mousse, 3 longueurs et deux tailles (Standard et XL)



Formfit® Post-Op Knee - Cool

Formfit® Post-Op Knee - Full Foam

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de Cuisse	Cool	Full Foam
Knee PO 24in DL	< 69 cm	FPOK403100	FPOK403200
Knee PO XL 24in DL	69 - 89 cm	FPOK403102	FPOK403202
Knee PO 28in DL	< 69 cm	FPOK403101	FPOK403201
Knee PO XL 28in DL	69 - 89 cm	FPOK403103	FPOK403203
Knee PO 16in DL	< 69 cm	-	FPOK403300
Knee PO XL 16in DL	69 - 89 cm	-	FPOK403301

CONSOMMABLES

Description	Cool	Full Foam
Pièce de rechange, Standard	403175	403275
Pièce de rechange, XL	403176	403277
Pièce de rechange, Longue	403276	403278

PIÈCES DE RECHANGE

Taille	Réf.
Limites ROM - set de 20 clips de verrouillage	B-8380005
Kit de réduction de longueur des sangles (Cool)	403199
Kit de réduction des sangles (Full Foam)	403299

REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL

LPPR HT: € 54.25 | LPPR TTC: € 57.23
2124338 | Code individuel fabricant à venir

L'orthèse de genou Rebound® Knee Immobilizer Universal présente une conception universelle à 3 panneaux qui peut être ajustée pour s'adapter à la plupart des circonférences de jambes. Grâce à sa compatibilité avec les IRM* sous conditions, les patients peuvent passer des IRM en toute sécurité tout en maintenant l'immobilisation de leur genou.

*Reportez-vous au mode d'emploi pour l'utilisateur pour en savoir plus.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Immobilisation d'urgence
- Immobilisation du genou pré et post-chirurgicale
- Blessures traumatiques du genou

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Les renforts internes/externes réglables et les renforts postérieurs rigides limitent le mouvement du genou.
- La conception universelle en 3 pièces simplifie les besoins de stockage
- Compatible avec les IRM* sous conditions : faites passer des IRM aux patients en toute sécurité tout en maintenant l'immobilisation.
- Circonférence de cuisse minimum : 26 cm (10,25 po)
- Circonférence de cuisse maximum : 67,31 cm (26,5 po)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Longueur	Réf.
30 cm	210012
35 cm	210014
40 cm	210016
45 cm	210018
50 cm	210020
55 cm	210022
60 cm	210024

FORMFIT® HINGED LATERAL J

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

INDICATIONS D'UTILISATION

Situations qui pourraient tirer un bénéfice d'un réalignement de la patella (rotule). Celles-ci peuvent comprendre :

- Subluxations et luxations latérales de la patella (rotule)
- Mauvais alignement fémoro-patellaire latéral
- Défaut d'alignement et douleur fémoro-patellaires
- Chondromalacie par désalignement latéral

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Matériau respirant
- Montants articulés amovibles
- Facile à enfiler
- Contrefort latéral en J
- Zone poplitée ouverte



MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule
- Circonférence du mollet 15 cm au-dessous du centre de la rotule

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de Cuisse	Circonférence du genou	Tour de mollet	Droite	Gauche
XS	33 - 39.4cm	30.5 - 33cm	25.4 - 30.5cm	709152	709162
S	39.4-47cm	33 - 35.6cm	30.5 - 35.6cm	709154	709164
M	47-53.3cm	35.6 - 38.1cm	35.6 - 40.6cm	709155	709165
L	53.3-59.7cm	38.1 - 43.2cm	40.6 - 45.7cm	709157	709167
XL	59.7-67.3cm	43.2 - 48.3cm	45.7 - 50.8cm	709158	709168
XXL	67.3-74.9cm	48.3 - 53.3cm	50.8 - 55.9cm	709159	709169

FORMFIT® KNEE ROM

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

L'orthèse de genou Formfit® ROM s'adresse aux patients souffrant de foulures, d'entorses ou de déchirures ligamentaires (LCA/LCP/LCM/LCL) légères à modérées. Elle offre une stabilité, une protection et une compression excellentes pendant la récupération des traumatismes. Fabriquée à partir de matériaux solides et respirants, elle apporte du confort tout en restant très durable. La zone poplitée ouverte réduit le gonflement du matériau et l'irritation potentielle, tandis que les bras d'articulation rigides et malléables assurent une adaptation morphologique précise. Disponible en version Wrap ou Sleeve. Amplitude articulaire disponible en longueur de 12" et 16" (30 cm et 40 cm).

L'orthèse de genou Formfit existe en version enveloppante ou en version avec gaine.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Déchirures du LCA et du LCP légères à modérées
- Déchirures du LCM et du LCL
- Entorses et foulures légères combinées du genou
- Instabilités du genou

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Matériau respirant
- Charnières souples
- Contrefort universel avec versions à manchon
- Zone poplitée ouverte
- Disponible en version Wrap ou Sleeve
- Disponible en longueur 12" et 16" (30 cm et 40 cm)

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Circonférence du genou	Gaine		Enveloppe	
		Gaine longue	Gaine courte	Enveloppe longue	Enveloppe courte
XS	33 - 39 cm	508352	508252	507352	507252
S	39 - 47 cm	508353	508253	507353	507253
M	47 - 53 cm	508355	508255	507355	507255
L	53 - 60 cm	508357	508257	507357	507257
XL	60 - 67 cm	508358	508258	507358	507258
XXL	67 - 75 cm	508359	508259	507359	507259
XXXL	75 - 81 cm			507360	507260

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Contrefort de genou de l'orthèse Formfit	503000

FORMFIT® TRACKER

LPPR HT: € 96.96 | LPPR TTC: € 102.29
2152211 | Code individuel fabricant à venir

Formfit® Tracker avec son coussinet de soutien ReflexWing™ microajustable réaligne la patella, offrant un support latéral dynamique pour les affections de la patella les plus courantes. Son tissu FlyWeight™ offre légèreté, respirabilité et une conception discrète agréable sur la peau et réduit la migration. Les sangles PowerLock™ fonctionnent en tandem avec les articulations thermoformables CustomFit™ pour fournir un ajustement personnalisable pour votre patient.



INDICATIONS D'UTILISATION


Pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un réalignement de la patella (rotule) et/ou chez les patients pouvant bénéficier d'un soutien latéral supplémentaire de la patella, notamment dans les cas suivants :

- Subluxation ou luxation latérale de la patella
- Déviation latérale

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Articulations CustomFit™ pour un ajustement et soutien personnalisé
- Anti-Migration Tech™ minimise la migration
- Sangles PowerLock™ pour un soutien latéral sécurisé
- Renfort ReflexWing™ pour un réalignement confortable de la rotule
- Tissu FlyWeight™ pour une sensation de douceur et de respirabilité
- Disponible en 7 tailles, droite et gauche
- Durable et lavable en machine

MESURES NÉCESSAIRES

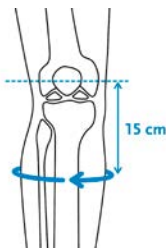

Circonférence du mollet 15 cm au-dessous du centre de la rotule



Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule

FORMFIT® TRACKER

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Tour de Mollet	Circonférence de la cuisse (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Gauche	Droite
XS	25 - 30 cm	33 - 39 cm	719162	719152
S	30 - 35 cm	39 - 47 cm	719163	719153
M	35 - 40 cm	47 - 53 cm	719164	719154
L	40 - 46 cm	53 - 60 cm	719165	719155
XL	46 - 51 cm	60 - 67 cm	719166	719156
XXL	51 - 56 cm	67 - 75 cm	719167	719157
3XL	56 - 61 cm	75 - 81 cm	719168	719158

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Coussinet de soutien ReflexWing™	719100

PIED ET CHEVILLE



REBOUND® AIR WALKER

LPPR HT: € 61.04 | LPPR TTC: € 64.40
2161530 | Code individuel fabricant à venir

Rebound Air Walker est une orthèse périphérique avec une pompe à air et une valve de décompression totalement intégrées qui permettent un gonflage et un dégonflage faciles et sans outil pour une compression homogène et précise. Il présente une multitude de particularités conçues pour fournir une protection supplémentaire, une mise en place et une utilisation simplifiées, un confort amélioré et, au final, de bons résultats pour les patients.



INDICATIONS D'UTILISATION

REBOUND AIR WALKER

Atteintes du pied et de la cheville pouvant nécessiter une restriction de la mobilité, telles que les suivantes :

- Entorses de la cheville (de grades 2 et 3)
- Fractures stables du pied
- Atteintes tendineuses ou ligamentaires
- Les ruptures du tendon d'Achille peuvent aussi être traitées si utilisé en conjonction avec le kit Achilles Wedge Kit

VERSION COURTE

Atteintes du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mobilité, telles que :

- Fractures stables du pied
- Atteintes tendineuse ou ligamentaire
- Pendant la phase post-opératoire ou de rééducation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Les ballonnets médians et latéraux reliés, avec un unique point de gonflage, assurent une compression équilibrée et sont conçus pour épouser la forme du tendon d'Achille, maintenant le talon en place
- Le fond à bascule favorise une démarche naturelle et stable, tandis qu'un pare-chocs semi-souple ajustable offre une protection supplémentaire pour les orteils
- L'élément non rigide anti-humidité aide à garder la peau sèche et confortable
- Sangles serrées sur le devant pour faciliter l'application, le réglage et le retrait
- Le matériau EVA offre une meilleure absorption des chocs sur le talon
- La pompe à air et la valve de décompression entièrement intégrées permettent un gonflage et un dégonflage faciles et sans outil pour une compression homogène et précise
- Le surmoulage Flex Edge® s'adapte à l'anatomie de chaque patient pour aider à limiter la formation de points de compression
- Les panneaux ventilés et les matériaux souples évacuant l'humidité permettent de réduire l'accumulation microbienne

MESURES NÉCESSAIRES

- Pointure

REBOUND® AIR WALKER

INFORMATIONS DE COMMANDE

REBOUND AIR WALKER

Taille	Pointure - Homme	Pointure - Femme	Standard	Version courte
XS	34 - 35	35 - 37	B-242900001	B-242900061
S	35 - 39	37 - 41	B-242900002	B-242900062
M	39,5 - 44	41 - 44	B-242900003	B-242900063
L	44 - 46	44 - 46,5	B-242900004	B-242900064
XL	46,5 - 49,5	46,5 - 49,5	B-242900005	B-242900065

ACCESSOIRES

CONSOMMABLES

Taille	Coussinet Slim (standard)	Coussinet Slim (court)
XS	B-418030101	B-418030161
S	B-418030102	B-418030162
M	B-418030103	B-418030163
L	B-418030104	B-418030164
XL	B-418030105	B-418030165

KIT DE TALONNETTES

Taille	Réf.
S	AWK0001
M	AWK0005
L	AWK0009
Taille universelle*	AWK00015

* La taille universelle ne convient qu'aux orthèses des tailles M à XL

PROTECTIONS BOTTE DE MARCHÉ

Taille	Protections d'hygiène (2 pcs.)	Protections contre les intempéries, réutilisables	Protections jetables contre les intempéries (20 pcs)
S	B-418500602	B-418500502	B-418500512
M	B-418500603	B-418500503	
L	B-418500604	B-418500504	B-418500514
XL	B-418500605	B-418500505	

AUTRES ACCESSOIRES

Description	Réf.
Semelle intérieure adhésive pour talonnette	WHW-W0107
Extension de sangle	B-502100101
Chaussettes Rebound Walker pour version standard S/M (2 pièces)	B-418500703
Chaussettes Rebound Walker pour version standard L/XL (2 pièces)	B-418500704

AFO LEAF SPRING

LPPR HT: € 72.25 | LPPR TTC: € 76.22
2122138 | Code individuel fabricant à venir

AFO Leaf Spring est une orthèse en polypropylène préfabriquée conçue pour soutenir le pied tombant. Elle offre une section semi-rigide pour le dégagement et le soutien des orteils, tout en ayant un repose-pied fin et flexible facile à découper. L'absence de coque talonnière rend le Leaf Spring plus confortable à porter et plus facile à insérer dans les chaussures



INDICATIONS D'UTILISATION

- Pied tombant
- Pied tombant léger dû à d'autres pathologies neurologiques

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le polypropylène moulé par injection est léger
- L'épaisseur variable dans toute l'orthèse assure de la force
- Assure un bon dégagement et un bon maintien des orteils
- La partie située au niveau du pied est fine et flexible afin d'en faciliter le découpage avec des ciseaux
- Excellent ajustement pour la plupart des types de chaussures
- Absence de section talonnière pour un confort amélioré

MESURES NÉCESSAIRES

- Pointure

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Pointure	Longueur du pied à plat	Hauteur de l'orthèse	Gauche	Droite
S – M	36 - 39	Entre 23 et 25 cm	27 cm	O-110227	O-110127
L	39.5 - 45	Entre 25.5 et 30 cm	30 cm	O-110230	O-110130

REBOUND FOOT-UP®

LPPR HT: € 72.25 | LPPR TTC: € 76.22
2122138 | Code individuel fabricant à venir

L'orthèse Rebound Foot-Up est une orthèse tibio-pédieuse légère qui assure un soutien dynamique et discret aux problèmes de pied tombant ou aux troubles connexes nécessitant un soutien de la flexion dorsale. Conçue pour épouser la forme de la jambe, elle est confortable à porter et facile à utiliser. L'orthèse Rebound Foot-Up offre une amélioration visible de la marche en soutenant le pied au moment où il est soulevé.



INDICATIONS D'UTILISATION

- Pied tombant
- Troubles nécessitant un soutien de la flexion dorsale

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Permet la flexion plantaire volontaire
- Contrôle médial/latéral réglable
- Longueur de la sangle d'embrace réglable
- Une pince intelligente facilite l'enfilage/le retrait d'une main
- Le manchon de pied en option permet une utilisation sans chaussures, ou avec des chaussures ouvertes ou des sandales

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence de la cheville
- Circonférence de l'avant-pied

INFORMATIONS DE COMMANDE

SANGLE DE CHEVILLE

Taille	Circonférence de la cheville	Réf.
S/M	18 - 21 cm	RFU50001
L/XL	26 - 33 cm	RFU50002

SANGLE DU PIED

Taille	Circonférence du pied	Réf.
Taille unique	20 - 28 cm	RFU50101

*La version sans chaussures ne comprend que l'enveloppe du pied et doit être commandée avec le Foot-Up, à moins que le patient n'en possède déjà un.

ACCESSOIRES

Description	Réf.
Kit de fixation Rebound Foot-Up (comprend une semelle intérieure en matériau synthétique, une sangle élastique et 1 vis et 1 écrou)	RFU50201
Vis et écrous de rechange Rebound Foot-Up (comprend 5 écrous : 2 vis courtes et 3 longues)	RFU50202

FORMFIT® WALKER, AIR

LPPR HT: € 61.04 | LPPR TTC: € 64.40
2161530 | Code individuel fabricant à venir

INDICATIONS D'UTILISATION

Atteintes du pied et de la cheville pouvant nécessiter une limitation de mouvement, telle que :

- Entorses de la cheville (de stades 2 et 3)
- Lésions des tissus mous
- Fractures stables
- Pendant période postopératoire ou de rééducation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Versions longue et courte disponibles
- Système pneumatique intégré
- Semelle incurvée basse et large favorisant un déroulement du pas stable et naturel
- Semelle amortissante pour un impact réduit au niveau du talon lors de l'attaque du pas
- Habillage respirant et sans couture



MESURES NÉCESSAIRES

- Pointure

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Pointure	Standard	Version courte
XS	33 - 35.5	A-W0200BLK	A-W0300BLK
S	36 - 39	A-W0400BLK	A-W0500BLK
M	39.5 - 44	A-W0600BLK	A-W0700BLK
L	44.5 - 46.5	A-W0800BLK	A-W0900BLK
XL	47 - 50	A-W1000BLK	A-W1100BLK

ACCESSOIRES

CONSOMMABLES

Taille	Standard	Version courte
XS	12349	12356
S	10675	12357
M	10678	12358
L	10681	12359
XL	12347	12360

FORMFIT® WALKER

LPPR HT: € 61.04 | LPPR TTC: € 64.40
2161530 | Code individuel fabricant à venir

INDICATIONS D'UTILISATION

Pour les affections du pied et de la cheville pouvant tirer bénéfice d'une limitation de mouvement, telles que :

- Entorses de la cheville de stades 2 et 3
- Fractures stables
- Lésions des tissus mous
- Pendant la période postopératoire ou de rééducation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Versions longue et courte disponibles
- Semelle incurvée basse et large favorisant un déroulement du pas stable et naturel
- Semelle amortissante pour un impact réduit au niveau du talon lors de l'attaque du pas
- Habillage respirant et sans couture



MESURES NÉCESSAIRES

- Pointure

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Pointure	Standard	Version courte
XS	33 - 35.5	W0200BLK	W0300BLK
S	36 - 39	W0400BLK	W0500BLK
M	39.5 - 44	W0600BLK	W0700BLK
L	44.5 - 46.5	W0800BLK	W0900BLK
XL	47 - 50	W1000BLK	W1100BLK

ACCESSOIRES

CONSOMMABLES

Taille	Standard	Version courte
XS	WKSG200BLK	
S	WKSG400BLK	WKSG500BLK
M	WKSG600BLK	WKSG700BLK
L	WKSG800BLK	WKSG900BLK
XL	WKSG1000BLK	WKSG1100BLK

AUTRES ACCESSOIRES

Description	Réf.
Extension pour doublure (10 cm)	WKSG-1BLK
Plaque tibia et mollet quand une immobilisation supplémentaire est requise	WKSP100
Kit de talonnettes pour botte de marche XS-S	AWK0001
Kit de talonnettes pour botte de marche M	AWK0005
Kit de talonnettes pour botte de marche L-XL	AWK0009
Semelle intérieure adhésive pour talonnette	WHW-W0107

PEDIATRIC WALKER

LPPR HT: € 61.04 | LPPR TTC: € 64.40
2161530 | Code individuel fabricant à venir

INDICATIONS D'UTILISATION

Atteintes du pied et de la cheville pouvant nécessiter une limitation de mouvement telle que les suivantes :

- Entorses de la cheville (de stades 2 et 3)
- Fractures stables

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Protection en mousse dense dans la semelle pour offrir confort et maintien
- Semelle amortissante pour améliorer le confort et protéger l'utilisateur des glissades, offrant une sécurité supplémentaire à chaque pas
- Les montants offrent une stabilité supplémentaire en limitant le mouvement de la jambe
- La conception légère permet aux enfants de rester actifs
- Convient aux pieds gauche et droit
- Semelle incurvée



MESURES NÉCESSAIRES

- Pointure

INFORMATIONS DE COMMANDE

PEDIATRIC WALKER

Taille	Pointure	Réf.
S	23 - 26	PEW0400
M	27 - 32	PEW0600
L	33 - 34	PEW0800

MOUSSE DE REMPLACEMENT

Taille	Pointure	Réf.
S	23 - 26	PEW0001
M	27 - 32	PEW0002
L	33 - 34	PEW0003

FORMFIT® PRO ANKLE

LPPR HT: € 26.01 | LPPR TTC: € 27.44
2107972 | Code individuel fabricant à venir

Össur Formfit® Pro Ankle est une gaine compressive pour cheville avec 2 coussinets de malléole intégrés. Elle est conçue pour être portée suite à des blessures légères de la cheville. Le tissu 3-D MotionTech™ dynamique apporte un support et est conforme aux exigences de compression de qualité médicale certifiée. Reconnue supérieure aux marques principales en termes d'évacuation de l'humidité et de pouvoir respirant, cette gaine maintient votre cheville au frais lorsque vous la portez. La technologie CoolVent™ à l'avant de la cheville améliore encore le pouvoir respirant et le confort.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

INDICATIONS D'UTILISATION

Problèmes à la cheville qui peuvent nécessiter une compression :

- Entorse ou foulure
- Rééducation après une blessure à la cheville
- Légère instabilité

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser chez les personnes pour lesquelles la compression est contre-indiquée

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- MotionTech™ pour la compression et un ajustement dynamique avec une évacuation de l'humidité et une respirabilité supérieures, gardant votre cheville au frais pendant le port
- Compression certifiée de qualité médicale (20-30 mmHg)
- La technologie CoolVent™ à l'avant de la cheville améliore encore la respirabilité et le confort
- 2 SmartPads™ pour malléoles intégrés pour un soutien et un amorti ciblés
- Système breveté FoldLock™ pour une application plus facile et plus sûre

MESURES NÉCESSAIRES



Circonférence de la cheville

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Circonférence de la cheville	Gauche	Droite
XS	18 - 20 cm	FP200201	FP200101
S	20 - 23 cm	FP200202	FP200102
M	23 - 26 cm	FP200203	FP200103
L	26 - 29 cm	FP200204	FP200104
XL	29 - 32 cm	FP200205	FP200105

FORMFIT® ANKLE BRACE

LPPR HT: € 26.01 | LPPR TTC: € 27.44
2107972 | Code individuel fabricant à venir

La cheville Formfit® Ankle assure la stabilité et la protection de la cheville, qu'elle soit utilisée à titre prophylactique, pour une instabilité chronique ou suite à un traumatisme. Hybride entre un étrier de cheville rigide et un soutien de cheville souple, Formfit® Ankle assure un ajustement serré qui limite les mouvements d'inversion, d'éversion, de flexion et d'extension. Le design discret s'intègre facilement dans les chaussures et le laçage rapide permet de l'enfiler et de la retirer facilement. Le matériau respirant permet de la porter confortablement toute la journée. Formfit® Ankle avec sa sangle croisée offre un niveau de soutien encore supérieur en limitant davantage l'amplitude articulaire de la cheville.



Formfit® Ankle Brace avec sangle supplémentaire

INDICATIONS D'UTILISATION


- Rééducation/Immobilisation de traumatismes de cheville (entorses stade I/II)
- Soutien pour une instabilité chronique
- Utilisation prophylactique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Matériau respirant
- Laçage rapide
- Contrôle de l'inversion/éversion
- Sangle croisée

MESURES NÉCESSAIRES

- Circonférence de la cheville

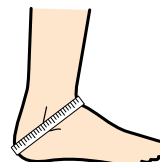

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	Circonférence de la cheville	Formfit® Ankle Brace avec sangle en 8
XS	28 - 30.5 cm	B-212000001
S	30.5 - 33 cm	B-212000002
M	33 - 35.5 cm	B-212000003
L	35.5 - 38 cm	B-212000004
XL	38 - 40.5 cm	B-212000005

FORMFIT® ANKLE STIRRUPS

LPPR HT: € 26.01 | LPPR TTC: € 27.44
2107972 | Code individuel fabricant à venir

Les étriers de cheville Formfit® sont légers et robustes. Qu'ils soient portés pour soulager un traumatisme aigu, une instabilité chronique ou après une immobilisation plâtrée, les étriers de cheville Formfit® stabilisent les chevilles blessées en limitant le mouvement d'inversion/d'éversion. La conception universelle a été minutieusement pensée pour accueillir les malléoles des deux côtés et assure un ajustement adapté et confortable. La sangle de talon antidérapante peut être ajustée pour s'adapter à la plupart des chevilles. Notre surmoulage exclusif Flex-Edge™ entoure la coque extérieure de l'étrier pour protéger la peau du patient de tout bord dur et contribuer au confort de l'étrier.



INDICATIONS D'UTILISATION

Situations nécessitant une restriction d'inversion/éversion. Celles-ci peuvent comprendre :

- Entorse bénigne à grave de la cheville
- Instabilité chronique de la cheville
- Stabilisation après un plâtre ou une orthèse
- Usages en rééducation post-traumatique de la cheville et/ou post-traumatique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Coque universelle soigneusement conçue pour s'adapter aux chevilles gauche et droite
- Surmoulage doux Soft Flex-Edge™ pour un meilleur confort
- Sangle de talon réglable pour optimiser l'ajustement et le confort du patient
- Points de silicone antidérapants pour réduire le glissement et stabiliser le pied à l'intérieur de la chaussure
- 2 sangles en Velcro bidirectionnelles assurent un ajustement sûr et stable
- Disponible en tailles Adulte et Jeune

MESURES NÉCESSAIRES

- Taille corporelle

INFORMATIONS DE COMMANDE



Taille	Taille corporelle	Formfit Air Ankle Stirrup	Formfit Gel Ankle Stirrup	Formfit Foam Ankle Stirrup
Adultes	Supérieure à 1,60 m	70350	70351	70352
Enfants	Inférieure à 1,60 m	71350	71351	71352

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES

FRANCE METROPOLITAINE, DOM TOM ET MONACO

1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Conformément aux articles L 441-6 (modifiés par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 – art 68) et L441-7 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers doit communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de Produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle.

Les présentes conditions générales de vente (ci-après désignées par les « CGV ») constituent, conformément aux dispositions du Code de Commerce, le socle unique de la négociation commerciale entre la société ÖSSUR FRANCE ci-après désignée par le Fournisseur, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel orthopédique (ci-après désignée par « ÖSSUR FRANCE ») et les clients professionnels tels que définis à l'article 1.2 des présentes. Ces CGV sont applicables à compter du 1er janvier 2024 et valides jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle version qui pourrait s'y substituer. Ces CGV se substituent à partir de cette date aux conditions générales de vente précédemment en vigueur.

1.1.

DEFINITIONS

Les « Produits » s'entendent de tout produit vendu par ÖSSUR et référencé dans :

- Le catalogue général orthèses ÖSSUR comprenant les marques Össur, FormFit, Rebound, Miami ainsi que toutes les marques citées au catalogue.
- Tous autres supports, relatif au catalogue, édités par le Fournisseur après le 1er janvier 2024 (additifs catalogues, etc.) et remis au Client.

Le « Client » s'entend de tout client professionnel dont l'activité est médicale ou paramédicale entrant dans la définition des orthoprothésistes et orthopédistes au sens du Code de la santé publique, signataire d'une charte éthique valorisant la distribution des dispositifs médicaux au sens du titre 2 chapitre 1 et chapitre 7 de la LPP.

Ainsi le Client est celui qui se présente à ÖSSUR FRANCE comme un professionnel de la santé assurant une activité exclusive :

- De vente au détail des Produits auprès des utilisateurs finaux agrémentée d'un conseil personnalisé dispensé par un professionnel diplômé en orthopédie permettant la bonne observance.
- Magasins orthopédiques de détail et/ou spécialisés dans la vente au détail de produits et matériel médicaux, soit indépendants soit adhérents ou membres d'un groupement professionnel ayant signé un contrat de partenariat commercial avec ÖSSUR FRANCE en cours de validité.
- ÖSSUR FRANCE se réserve le droit de ne pas accepter la commande si le client ne respecte pas les exigences dictées par le code de la santé publique, et notamment les conditions liées à l'obtention d'un diplôme particulier pour la dispensation et l'application des dispositifs médicaux, les clauses faisant référence à un aménagement de locaux adaptés et les exigences légales liées à la communication des produits remboursés par la sécurité sociale.
- De même toute communication qui tout en respectant les exigences du code de la santé publique ne respecterait pas la charte Graphique d'ÖSSUR FRANCE ou utiliserait un élément graphique interne de quelque nature qu'il soit sans l'autorisation expresse d'ÖSSUR FRANCE sera de nature à légitimer un refus de vente.

1.2.

Les présentes CGV s'appliquent à tous les contrats, propositions techniques et/ou commerciales ou commandes liant ÖSSUR FRANCE et le Client en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM TOM) et Monaco pour l'acquisition des Produits par le Client.

Toute commande de Produits implique, de la part du Client, l'acceptation entière et sans réserve des présentes CGV.

Les présentes CGV prévalent sur tous les documents du Client tels que notamment les conditions générales d'achat.

En revanche, les contrats annuels signés entre ÖSSUR FRANCE et le Client dans le cadre de conditions particulières de vente prévalent sur les présentes CGV.

Les conditions générales de vente ÖSSUR FRANCE, comprennent :

- Les conditions de vente.
- Les Tarifs (associés aux Catalogues proposés par le Fournisseur aux Détaillants).
- Les conditions de règlement.
- Les conditions de livraison et de retour.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES

2 - COMMANDE

2.1.

Acceptation de commande : Toute commande de Produits par le Client à ÖSSUR FRANCE peut s'effectuer par mail, téléphone, télétransmission EDI ou saisies auprès de l'un des responsables commerciaux ou au service clientèle ÖSSUR FRANCE.

Toutes les coordonnées d'ÖSSUR FRANCE nécessaires pour passer commande figurent dans les catalogues ÖSSUR FRANCE remis au Client.

ÖSSUR FRANCE n'est pas tenue d'accuser réception des commandes ; l'exécution des commandes par ÖSSUR FRANCE vaut acceptation et accusé de réception des commandes.

La commande est réputée parfaite à l'issue d'un délai de 7 jours au cours duquel ÖSSUR FRANCE peut, pour quelque raison que ce soit, notamment en cas de rupture de stock, refuser la commande passée par le Client.

Par ailleurs, ÖSSUR FRANCE peut refuser toute commande d'un Client :

- En cas d'insolvabilité du Client et/ou de créances échues impayées au jour de la passation de commande
- En cas de défaut de paiement d'une commande précédente.
- En cas de manquement du Client à l'une des dispositions des présentes CGV.
- Dans le cas où le Client utiliserait un élément graphique interne de quelque nature qu'il soit sans l'autorisation expresse d'ÖSSUR FRANCE ou en cas de violation de la Charte graphique d'ÖSSUR FRANCE.
- ÖSSUR FRANCE se réserve le droit de ne pas accepter la commande si le Client ne respecte pas les exigences dictées par le code de la santé publique, et notamment les conditions liées à l'obtention d'un diplôme particulier pour la dispensation des dispositifs médicaux, les clauses faisant référence à un aménagement de locaux adaptés et les exigences légales liées à la communication des produits remboursés par la sécurité sociale.

2.2.

Modification de commande : Toute modification de commande par le Client ne peut être réalisée sans l'accord express et écrit du Fournisseur.

En cas de modification demandée par le Client à l'issue du commencement de l'exécution par le Fournisseur de ladite commande, le Client pourra être tenu de payer les frais engagés par le Fournisseur tels que notamment la remise en stock, les frais de logistique, de contrôle...

2.3.

Annulation de commande : La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Aucune annulation de commande ne peut être prise en considération si elle n'a pas été expressément acceptée par le Fournisseur. Dans ce cas, le Client remboursera au Fournisseur tous les frais engagés et toutes les conséquences directes ou indirectes qui en découlent.

3 - TARIFS ET CONDITIONS COMMERCIALES APPLICABLES AU CLIENT

3.1.

Les produits issus du catalogue orthèses ÖSSUR sont appréciés en prix nets. Se référer au tarif en vigueur.

3.2.

Les prix de vente des Produits sont ceux mentionnés sur les catalogues et documents y afférents en vigueur à la date de passation de la commande, édités par le Fournisseur et remis au Client ou les accords contractuels négociés avec le Client ou par l'intermédiaire de groupements professionnels auxquels le Client est Adhérent.

3.3.

le Fournisseur peut proposer au Client des promotions ponctuelles au cas par cas.

Un document commercial faisant l'objet de ces promotions sera remis au Client. Ce document indiquera les modalités de la promotion ainsi que le délai pendant lequel elle s'applique. Ce document pourra prendre une forme dématérialisée.

3.4.

Les prix s'entendent hors taxes et hors frais de transport et/ou administratifs et ne sont valables que pour un seul point de vente en un seul et même lieu de livraison et de facturation. Le minimum de commande pour une livraison gratuite : 150 € (cent cinquante euros) HT nets. Si la commande est inférieure à 150 € HT nets, une majoration administrative de 15 € (quinze euros) HT sera appliquée. Aucune livraison ne sera honorée en dessous de 20€ (vingt euros) HT nets.

Conditions particulières de vente :

Une négociation individualisée peut faire l'objet d'un contrat spécifique précisant les obligations et les engagements annuels des deux parties.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES

Cette négociation sera formalisée au plus tard le 28 février de chaque année pour les clients. Les conditions commerciales négociées par ÖSSUR FRANCE avec un groupement professionnel seront communiquées au Client, indépendamment des présentes CGV, par le groupement auquel il appartient et par les responsables commerciaux ÖSSUR FRANCE.

Les accords de partenariat signés entre le Fournisseur et un Groupement Partenaire s'appliquent pendant leur durée de validité.

Le Client a intérêt à informer le Fournisseur de sa qualité d'adhérent d'un Groupement Partenaire (ou de l'arrêt de sa qualité d'adhérent), afin de bénéficier des avantages conférés aux adhérents des Groupements Partenaires.

Le bénéfice de ces avantages débute à compter du premier jour du mois suivant la date d'encodage par le service clientèle d'ÖSSUR FRANCE de l'avis d'acquisition de cette qualité de membre adressé par le Groupement Partenaire concerné dans le cadre des envois de listes périodiques de mise à jour de ses membres ou adhérents.

Dans le cas où un Client viendrait, au cours d'une même période, à être simultanément adhérent de plusieurs groupements professionnels ayant signé une convention de partenariat commercial avec ÖSSUR FRANCE, le Client devra faire connaître au plus tôt à ÖSSUR FRANCE son option quant au choix du groupement auquel il souhaite adhérer pour ÖSSUR FRANCE.

ÖSSUR FRANCE pourra demander au Client à tout moment de justifier de son appartenance à un seul groupement partenaire.

4 – MODALITES DE PAIEMENT

4.1.

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date d'émission de la facture conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce, cette facture pouvant être une facture périodique.

Le paiement du Client au fournisseur devra être effectué par virement bancaire ou par chèque le cas échéant.

Tout escompte doit faire l'objet de validation par ÖSSUR FRANCE. Tout escompte indûment déduit par le Client sera considéré comme un impayé à concurrence du montant retenu.

Pour des commandes d'un montant supérieur à 1500€, ÖSSUR FRANCE se réserve le droit de demander au Client un acompte faisant l'objet d'une facture d'acompte, le solde étant exigible à réception par le Client des produits objets de la commande.

4.2.

Le défaut d'un seul paiement à son échéance rend exigible, de plein droit et sans mise en demeure, toutes les factures en cours avec le Client. ÖSSUR FRANCE se réserve le droit d'exiger le paiement à la commande pour les Clients connaissant des difficultés financières avérées pouvant résulter notamment d'une dégradation des en-cours du Client ou encore d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation prononcée à l'encontre du Client.

Tout retard de paiement entraînera l'application, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, calculé à compter du jour suivant la date d'échéance du paiement et jusqu'au jour auquel le compte d'ÖSSUR FRANCE sera crédité, sans préjudice d'autres conséquences.

Conformément aux dispositions prévues à l'article L 441-6 et suivants du code du commerce, pour chaque facture impayée ÖSSUR FRANCE pourra facturer au Client en sus des pénalités, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ minimum, sans préjudice de tous frais de recouvrement exposés en sus de ce montant. Si les frais de recouvrement réellement engagés par ÖSSUR FRANCE sont supérieurs au montant forfaitaire de 40€, ÖSSUR FRANCE pourra demander au Client, sur justifications, une indemnisation complémentaire.

5 - LIVRAISONS / RETOUR DE PRODUITS

5.1.

LIVRAISONS

Les commandes sont livrées au lieu indiqué par le Client lors de la passation de commande dans la limite des stocks disponibles, étant précisé qu'en cas de stock insuffisant ÖSSUR FRANCE peut procéder à des livraisons partielles après en avoir informé le Client.

Les délais de livraison annoncés lors de la passation des commandes sont indicatifs ; un retard de livraison n'excédant pas 15 jours ouvrables par rapport au délai convenu ne peut donner lieu à aucune indemnité, pénalité et/ou annulation d'une commande.

Il appartient au Client, en cas d'avaries des Produits livrés ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves sur le bordereau auprès du transporteur. Toute réclamation liée à des manquants et/ou à des vices apparents doit à ce titre être adressée au transporteur avec copie à ÖSSUR FRANCE dans les 72h (non compris les jours fériés) suivant la livraison des Produits.

A défaut, les Produits seront considérés acceptés par le Client.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES

5.2.

GESTION DES RETOURS

Dans les 3 mois suivant la réception du Produit, le Client peut être amené à procéder à un retour des produits livrés en cas d'erreur de livraison, de saisie ou de préparation de commande imputables au Fournisseur ou en cas de non-conformité du Produit par rapport aux spécificités visées dans la notice technique remise au Client avec le Produit. Les retours peuvent s'effectuer selon les conditions suivantes :

- L'auteur de la commande a annoncé au fournisseur le retour au préalable par écrit.
- Les marchandises sont renvoyées dans leur emballage original et sont retournées dans un état sans faille (aucune trace d'utilisation) (les frais de transport sont à la charge de l'auteur de la commande).
- Une copie du bon de livraison ou une copie de la facture et un formulaire de retour rempli sont joints aux marchandises jointes.

Tous les retours sont soumis à l'accord préalable du service clientèle SAV ÖSSUR FRANCE (00 800 35 39 36 68 ou +33 (0)9 70 01 96 09).

Le Client sera au préalable informé des dispositions prises lors de la réception de sa réclamation par le service clientèle d'ÖSSUR FRANCE.

La responsabilité d'ÖSSUR FRANCE est limitée, après analyse, à la réparation ou au remplacement du Produit. La livraison totale de la commande pourra être contestée uniquement dans le cas où la responsabilité du Fournisseur serait engagée.

Dans le cas où le Client émet une demande de retour Produit pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas liées à un défaut de conformité allégué, erreur de livraison, de saisie ou de préparation de la commande imputable à ÖSSUR FRANCE, les conditions de reprises appliquées par ÖSSUR FRANCE sont les suivantes :

Les retours ne peuvent concerner que les produits en cours de validité inscrits au catalogue nécessitant un ajustement de stock, dont le produit et le conditionnement sont en parfait état et dont la fabrication est inférieure à 48 mois (attestée par No de lot).

6 - RESERVE DE PROPRIETE

Les Produits restent la propriété de ÖSSUR FRANCE jusqu'au paiement complet du prix, en principal et accessoires suivi de l'encaissement des sommes correspondantes, ce même en cas de d'octroi de délai de paiement. Ainsi, ÖSSUR FRANCE se réserve un droit de propriété sur les Produits vendus lui permettant de reprendre possession desdits Produits en cas de non-paiement par le Client. Toutes les sommes déjà versées par le Client restent acquises à ÖSSUR FRANCE à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client. Le Client pourra disposer des Produits livrés dans le cadre de son activité normale, le Client sera notamment autorisé à revendre les Produits à ses clients, mais ne pourra en aucun cas les donner en gage ou en transférer la propriété à titre de garantie.

La revendication des Produits impayés par ÖSSUR FRANCE entraînera de plein droit la résolution de la vente. Tous les frais de reprises des Produits impayés seront supportés par le Client.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du Client et sous réserve des dispositions légales applicables, ÖSSUR FRANCE pourra de plein droit résilier les commandes en cours et si celles-ci ont été livrées, ÖSSUR FRANCE pourra revendiquer les Produits.

7 - TRANSFERT DES RISQUES

Les Produits sont vendus départ usine du Fournisseur, emballage gratuit pour le Client. Les Produits voyagent aux risques et périls du Client.

Les Produits sont livrés EWX (Incoterms 2010) sauf dispositions contraires convenues entre les parties. Les Produits, même s'ils sont expédiés franco, voyagent aux risques et périls du Client auquel il appartient de vérifier l'état des Produits dès la livraison dans les conditions fixées aux présentes. Par conséquent, dès l'expédition, l'assurance des Produits contre risques et dommages de toutes sortes incombe au Client, même si l'expédition est faite franco de port. Ces dispositions sont applicables à toutes expéditions, même les livraisons partielles.

8 - FORCE MAJEURE

En cas d'évènements de force majeure, les parties s'engagent à s'informer immédiatement, à prendre toutes les mesures pour limiter les effets et à reprendre l'exécution de leurs engagements à la disparition de l'évènement. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit au sens de l'article 1148 du Code Civil, les évènements indépendants de la volonté des parties tels que définis par la jurisprudence des tribunaux français notamment, ceux que le fournisseur ne pouvait raisonnablement être tenu de prévoir, et qu'il ne pouvait raisonnablement surmonter ou éviter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES

Les conflits sociaux, le mauvais fonctionnement ou une interruption du réseau informatique, les grèves notamment sont considérées comme des causes extérieures au sens du présent article.

Aucune indemnité ne sera due en cas d'inexécution par l'une des parties de ses engagements au cours de cette période.

Si toutefois, celle-ci devait se poursuivre pendant une durée de deux mois à compter de la date d'information de l'évènement, la vente pourra être résiliée avec effet immédiat par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception.

9 - GARANTIES

Les Produits sont garantis au titre de la garantie fabricant et de la garantie légale des vices cachés.

L'étendue, la durée et les modalités de mise en œuvre de la garantie fabricant figurent, pour chaque produit, dans sa notice technique remise au Client avec le Produit. Le produit doit être utilisé conformément à la notice technique qui fait foi.

Au titre de la garantie légale des vices cachés, le Client peut demander la résolution de la vente ou la réduction du prix dans un délai de deux ans à compter de la découverte du ou des vice(s) cachés. Afin d'invoquer ce ou ces vice(s), le Client devra cumulativement démontrer que le vice était non apparent, qu'il rendait le Produit commandé impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuait fortement son usage et que le vice existait au moment de la vente.

La garantie porte, au choix du Fournisseur, sur le remboursement ou le remplacement des Produits défectueux.

Les garanties ne couvrent pas l'usure normale et les défauts résultant d'un emploi et/ou stockage non conforme aux instructions et/ou recommandations d'ÖSSUR FRANCE et/ou du fabricant indiquées dans la notice technique remise au Client avec le Produit.

Le fait d'invoquer pour le Client un défaut de Produit au titre de la garantie n'interrompt en aucun cas le délai de la garantie accordée par le fabricant.

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'ensemble des documents diffusés par ÖSSUR FRANCE (catalogue, tarifs documents commerciaux, marketing, techniques) auprès du Client demeurent la propriété exclusive d'ÖSSUR FRANCE.

Les supports publicitaires sont la propriété d'ÖSSUR FRANCE.

A ce titre, la reproduction et/ou l'utilisation de tous signes distinctifs et/ou de toutes références à ÖSSUR FRANCE, sans l'obtention d'une autorisation écrite et préalable d'ÖSSUR FRANCE, tels que notamment les sigles, logos, dessins, les prix sont interdites.

Tous les droits de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire appartenant à ÖSSUR FRANCE et incorporés dans les Produits livrés et/ou les documents livrés, réalisés et fournis au Client sont et restent la propriété exclusive d'ÖSSUR FRANCE. Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire au profit du Client devra impérativement faire l'objet d'un contrat entre ÖSSUR FRANCE et le Client. ÖSSUR FRANCE se réserve le droit de disposer et d'utiliser son savoir-faire et sa technologie propre, développés à l'occasion de la fourniture des Produits.

11 - DONNEES PERSONNELLES

D'une manière générale, les Parties garantissent qu'elles ont procédé à l'ensemble des obligations qui leur incombent au terme des lois et règlements applicables et notamment du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel n°2016/679 dit « RGPD ».

Le Client est informé que dans le cadre de la gestion de ses données clients et fournisseurs, ÖSSUR FRANCE agit en tant que responsable de traitement au sens du RGPD.

A ce titre, ÖSSUR FRANCE informe d'ores et déjà le Client, que les données collectées telles que les nom, prénom, RIB, adresse mail et numéro de téléphone des interlocuteurs pourront être conservées pour les besoins du traitement et le temps du contrat, ce que le Client reconnaît et accepte à la signature des présentes.

Ces données collectées sont destinées aux fins de référencement et de gestion des clients et fournisseurs de ÖSSUR FRANCE, et notamment :

- La réalisation de toute opération administrative liée aux échanges, aux contrats, commandes, aux factures, aux règlements et à la comptabilité ;
- Le traitement des titres de paiement ;
- La mise en œuvre de dispositifs de contrôles, notamment en matière de lutte contre la fraude et la corruption ;
- La réalisation de toute opération liée au transport des Produits commandés

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – GAMME ÖSSUR ORTHESES

A ce titre, le Client déclare être informé de la présente politique de traitement des données personnelles mise en place par ÖSSUR FRANCE et l'accepter. Le cas échéant, le Client reconnaît également qu'il a informé et obtenu le consentement des personnes physiques (interlocuteurs/utilisateurs) concernées de l'usage qui est fait desdites données personnelles.

Il appartient au Client de procéder aux démarches administratives, demandes d'autorisation, analyses d'impact prévues par les lois et règlements en vigueur concernant les traitements qu'il effectue et les données traitées. Le Client garantit ÖSSUR FRANCE contre tout recours, plainte ou réclamation émanant d'une personne physique dont les données personnelles seraient reproduites et hébergées dans le cadre des présentes.

Par ailleurs, le Client est informé que chaque interlocuteur/utilisateur est en droit de demander de mettre à jour, de s'opposer, supprimer ou rectifier les données le concernant, pour motif légitime. Il s'engage à informer chacun des interlocuteur/utilisateur qu'il peut exercer ses droits sous réserve de la fourniture d'une pièce justificative d'identité auprès d'ÖSSUR FRANCE, aux coordonnées du DPO suivantes dpo@ossur.com.

ÖSSUR FRANCE s'engage à assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, et informe le Client et les interlocuteurs/utilisateurs qu'il fait appel à un hébergeur tiers pour l'hébergement des données, ce que ÖSSUR FRANCE reconnaît et accepte et que, dans l'hypothèse où des données devaient être transférées à l'étranger dans le cadre de ce traitement, ÖSSUR FRANCE garantit sa conformité aux exigences légales et réglementaires en la matière et notamment concernant la mise en place des exigences du RGPD sur les transferts internationaux de données.

12 - RESPONSABILITE

La responsabilité totale du Fournisseur pour toute réclamation, responsabilité ou frais, quelle qu'en soit la nature, est limitée au montant de la commande objet du litige.

Les préjudices indirects subis par le Client sont exclus de toute demande d'indemnisation. Sont qualifiés de préjudices indirects, sans que cette liste soit limitative, notamment la perte de chiffre d'affaires, la perte d'exploitation, le préjudice commercial, le manque à gagner ou toute prétention formulée par un tiers quel qu'il soit à l'encontre du Client.

Les parties reconnaissent que les dispositions de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de conclure le présent contrat et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les parties et la limitation de responsabilité en résultant.

13 - TOLERANCE

Le fait qu'ÖSSUR FRANCE ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une des clauses des présentes CGV ne saurait être interprété comme valant renonciation ultérieure à l'une quelconques des conditions ou dispositions fixées dans les dites CGV.

14 - SOUS-TRAITANCE

ÖSSUR FRANCE pourra sous-traiter l'exécution d'une partie de ses obligations à un ou plusieurs sous-traitants de son choix. Le Fournisseur reste responsable des prestations réalisées par ses sous-traitants.

15 - ELECTION DE DOMICILE ET DIVERS

ÖSSUR FRANCE élit domicile à son siège social. Les présentes CGV sont régies par le droit français.

Tout différend au sujet de l'application des conditions générales de vente, de leur interprétation, exécution, et des contrats de vente conclus par ÖSSUR FRANCE, sera porté devant le tribunal de commerce du siège d'ÖSSUR FRANCE, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. L'attribution de compétence est générale et s'applique qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

Siège Social France :
Össur France
21 chemin de la Sauvegarde
69130 Ecully
France

Retour des produits :
Össur Europe B.V.
De Schakel 70
5651 GH Eindhoven
Pays-Bas

TEL 00800 35 39 36 68
FAX 00800 35 39 32 99
EMAIL orders.france@ossur.com

WWW.OSSUR.FR

