

NAVII®

UNITY®
COMPATIBLE

INTRODUCCIÓN

Navii es una rodilla con microprocesador duradera y resistente al agua, diseñada para mantener el movimiento en cualquier entorno. El potente actuador de Navii proporciona soporte en el descenso de rampas y escaleras. Ya sea caminando, de pie o en bajadas, Navii ofrece seguridad y comodidad en cualquier terreno. El suave balanceo favorece la dinámica natural de la marcha y la libertad de movimiento. Las 5 coloridas cubiertas protectoras inspiradas en la naturaleza son intercambiables con un rápido cierre magnético de presión para adaptarse a cualquier tipo de jornada, atuendo, ocasión o estado de ánimo. Con su intuitiva interfaz, la aplicación Össur Logic sirve como centro neurálgico de Navii para adaptar los ajustes personalizados a las distintas actividades al tiempo que se realiza un seguimiento del progreso. Los siete ejercicios de entrenamiento funcional ofrecen información en tiempo real. El entrenamiento funcional puede realizarse tanto en la clínica como en casa. El asistente de configuración le guiará a lo largo del proceso de ajuste y minimiza la necesidad de realizar cambios manuales gracias a un eficaz ajuste automático. El bloqueo mecánico puede bloquearse en tres posiciones diferentes, que el usuario puede activar mientras está sentado. Esta función facilita un bloqueo seguro de la rodilla al estar de pie durante mucho tiempo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Actuador robusto con innovadora tecnología de control y suave dinámica de balanceo.
- Diseño resistente al agua (IP68, piscina, mar, playa y arena).
- Cubiertas protectoras extraíbles por el paciente y disponibles en 3 tamaños. Tamaños medio y largo fácilmente ajustables a varias longitudes. Tamaño estándar disponible en 5 colores diferentes.
- Bloqueo mecánico de posición variable en 0°, 10° y 20°.
- Centro de control con la aplicación Össur Logic para todos los dispositivos biónicos Össur.
- Configuración y ajuste sencillos con el asistente de configuración y el eficaz ajuste automático.
- Ejercicios de entrenamiento funcional paso a paso para entrenar en la clínica y en casa con la aplicación Össur Logic.
- Seguimiento del progreso mediante informes de actividad imprimibles.
- Funciones de alta actividad (ascenso paso a paso, reconocimiento automático de pedaleo, transición fluida a carrera).



RECOMENDADO CON



Seal-In® X TF liner



Pro-Flex® Terra



Proprio Foot®



Pro-Flex® LP



Pro-Flex® XC

NAVII®




Información del usuario		
Nivel de amputación:	Transfemoral, desarticulación de rodilla, desarticulación de rodilla	
Osteointegración:	Sí	
Bilateral:	Sí	
Niveles de impacto:	Bajo a moderado	Alto
Peso máximo del usuario:	136 kg	110 kg


Información de la rodilla	
Peso neto:	1,8 kg sin cubierta protectora 2,0 kg con cubierta protectora
Altura de montaje:	236 mm
Flexión de rodilla:	-2 to 120°
Resistente al agua:	IP68, sal, cloro, arena, jabón, fluidos corporales

DIMENSIONES

DIMENSIONES SIN CUBIERTA PROTECTORA

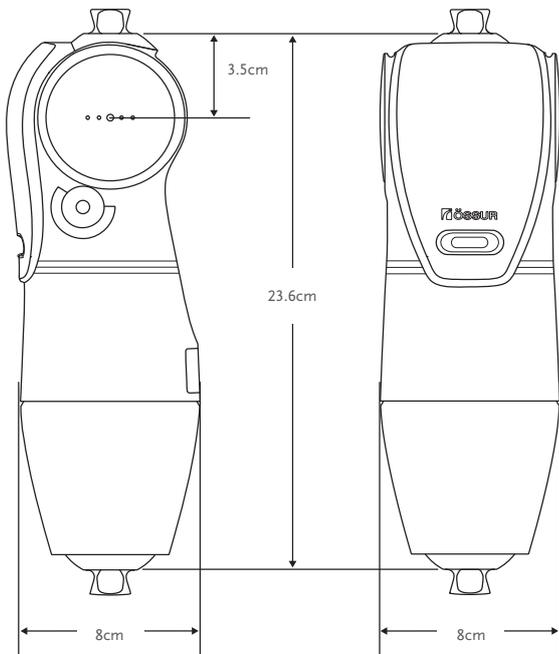

DIMENSIONES CON CUBIERTA PROTECTORA

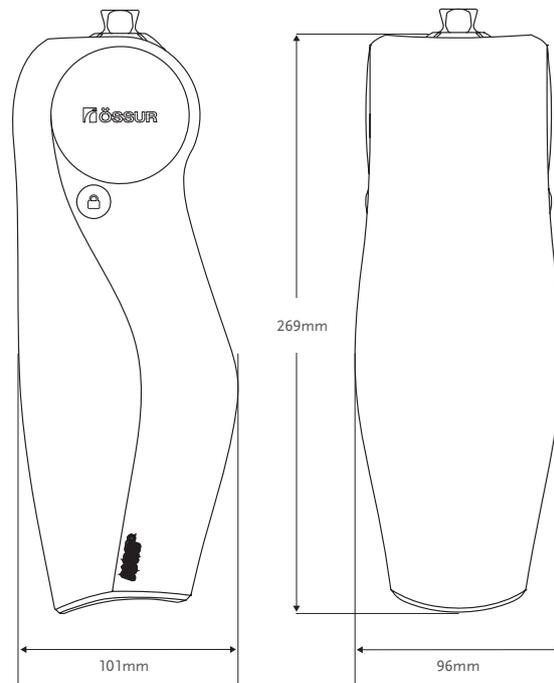

NAVII®

KITS

KITS NAVII

Ref.	Descripción
NAV01003	Garantía de Navii de 3 años
NAV01005	Garantía de Navii de 5 años
NAV01006	Garantía de Navii de 6 años

Incluye:

- Navii (incluida la cubierta protectora negra estándar)
- Fuente de alimentación de Navii con enchufe
- Instrucciones de uso
- NAV01005 y NAV01006 incluyen la revisión técnica a los 40 meses



KIT NAVII CON ADAPTADOR SUPERIOR DE ROSCA:

Navii con adaptador superior de rosca es la solución ideal para amputaciones con desarticulación de rodilla y para usuarios con muñones largos.

Para pedir Navii con adaptador superior de rosca, pida el kit Navii y añada al pedido el inserto de pirámide hembra de Össur.

Ref.	Descripción	Altura	Peso
A-145310	Inserto de pirámide hembra/Adaptador superior de rosca	9mm	33g



KIT NAVII CON ADAPTADOR DE TRASLACIÓN DE FLEXIÓN:

Navii con adaptador de traslación de flexión es la solución ideal para ajustes de flexión del encaje superiores a los que permiten los tornillos de fijación.

Para pedir Navii con adaptador de traslación de flexión, pida el kit Navii y añada al pedido el adaptador doble macho-hembra de Össur con desplazamiento de 8 mm y ángulo de 10°.

Ref.	Descripción	Material	Altura	Altura de montaje	Peso
A-554700	Adaptador doble macho-hembra	Acero inoxidable	40mm	24mm	153g



NAVII®

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

Ref.	Descripción
NAV01GE3Y	Ampliación de garantía de Navii de 3 años

La ampliación de la garantía incluye una revisión programada a los 40 meses. La ampliación de la garantía puede añadirse a los kits Navii NAV01002 y NAV01003, y puede adquirirse en cualquier momento mientras el producto siga en garantía. El periodo máximo total de garantía es de 6 años.

REVISIONES TÉCNICAS

Ref.	Descripción
NAV01SC40	Revisión técnica de Navii obligatoria a los 40 meses

Las opciones de servicio técnico pueden adquirirse por separado.

PIEZAS DE REPUESTO

CUBIERTA PROTECTORA NAVII

Ref.	Descripción
NAV01PC01S-BLK	Cubierta protectora Navii, estándar, negra
NAV01PC01S-GRY	Cubierta protectora Navii, estándar, gris
NAV01PC01S-BLU	Cubierta protectora Navii, estándar, azul
NAV01PC01S-GRN	Cubierta protectora Navii, estándar, verde
NAV01PC01S-RED	Cubierta protectora Navii, estándar, roja
NAV01PC01M-BLK	Cubierta protectora Navii, mediana, negra
NAV01PC01L-BLK	Cubierta protectora Navii, larga, negra

Las cubiertas protectoras incluyen una garantía de 6 meses.



UNITY

KITS UNITY

Ref.	Descripción	Kits de pie compatibles
UTF0001	Kit de válvula Unity TF	Todos



COMPONENTES

KIT DE CARGADOR DOBLE

El kit de cargador doble es opcional y permite la carga simultánea de dos combinaciones cualesquiera de Navii y Proprio Foot.

Ref.	Descripción
CME10110	Fuente de alimentación y accesorio de cable

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Ref.	Descripción
CME50110	Cable de alimentación con enchufe

