

PRO-FLEX® TERRA



Pro-Flex Terra è un piede protesico multilamina dotato di un'innovativa lamina superiore precompressa. Offre una combinazione davvero unica di morbidezza e flessibilità dei piedi poco attivi e un potente ritorno di energia di quelli molto attivi.

Le caratteristiche di Pro-Flex Terra permettono agli utenti di avere il pieno controllo, indipendentemente dalla velocità. Con un tallone morbido e un rapido adattamento a terreni irregolari e pendii, il design e il range di movimento si uniscono con la morbidezza e la potenza, consentendo agli utenti di pensare oltre il passo successivo.

Con un nuovo livello di versatilità, Pro-Flex Terra è il partner fidato per chi lavora in ufficio, fa sport con i bambini o fa escursioni con gli amici, offrendo grandi prestazioni a seconda delle diverse esigenze quotidiane. Si adatta a tutti i vestiti, da quelli per l'attività fisica e il nuoto, agli abiti da lavoro.

Una cover piede a scatto, facile da usare, offre agli utenti la possibilità di rimuoverla rapidamente per la pulizia, dopo una giornata in spiaggia, aver lavorato in giardino o aver camminato sulle foglie autunnali. È disponibile SandalFix, un accessorio che consente agli utenti di indossare in modo sicuro calzature aperte come i sandali, fissando saldamente il tallone della cover piede al sandalo.



Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transtibiale e Transfemorale
Livello di attività:	Basso ad Alto
Limite peso:	166kg



LEVA PLANTARE SU TUTTA LA LUNGHEZZA



ADEGUAMENTO MULTIASSIALE AL TERRENO



LAMINA DIVISA



COSMETICO INFRADITO



TECNOLOGIA PRE-CARICO



UTILIZZO DI UNA COVER PIEDE RIMOVIBILE



WATERPROOF

Nota: Pro-Flex Terra è escluso dal periodo di prova di 30 giorni.


Informazioni piede	
Categoria:	1-9
Misure:	22-30
Peso del piede: (misura 27)	870g con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza: (misura 27)	179mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatori:	Giunto piramidale maschio

PRO-FLEX® TERRA

GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Livello di attività basso										
Misure 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misure 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Livello di attività moderato										
Misure 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Misure 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Livello di attività alto										
Misure 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Misure 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Misure 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


INGOMBRO

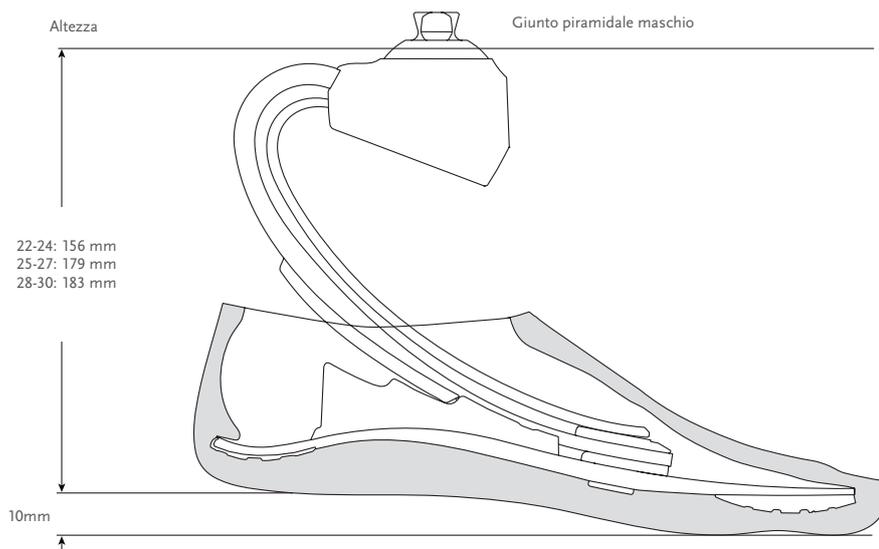

PRO-FLEX® TERRA

KIT

PRO-FLEX TERRA CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO

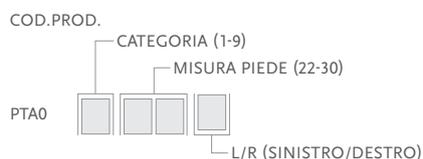

Sono inclusi:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Cover per il piede rimovibile*
- Calza Spectra sottile

*Per Pro-Flex Terra con la cover marrone, aggiungere il suffisso "BR" nella parte #. Per la cover nera aggiungere il suffisso "BL" nella parte #.

RIVESTIMENTO COSMETICO

KIT COVER PIEDE PRO-FLEX TERRA, CHIARO, MARRONE*



Sono inclusi:

- Modulo piede*
- Calza Spectra sottile

*Per la cover marrone, aggiungere il suffisso "BR" nella parte del numero.

KIT COVER PIEDE PRO-FLEX TERRA, CHIARO, MARRONE E NERO*



Sono inclusi:

- Modulo piede*
- Calza Spectra sottile

*Per la cover marrone, aggiungere il suffisso "BR" nella parte del numero. Per la cover nera aggiungere il suffisso "BL" nella parte #.

PRO-FLEX TERRA CUNEO DEL TALLONE

Per regolare la rigidità del tallone.

Cod. prod.	Descrizione	Misura	Colore
PTA50051	Kit cuneo per tallone taglie	22-24	Nero
PTA50052	Kit cuneo per tallone taglie	25-27	Nero
PTA50053	Kit cuneo per tallone taglie	28-30	Nero



Sono inclusi:

- Cuneo per tallone morbido (+)
- Cuneo per tallone medio (++)
- Cuneo per tallone rigido (+++)

PRO-FLEX® TERRA

RIVESTIMENTO COSMETICO

SANDALFIX

Per fissare in modo sicuro le calzature aperte alla cover del piede.

Cod. prod.	Descrizione
FSW50011	SandalFix
FSW50013	SandalFix 3 pezzi
FSW50015	SandalFix 10 pezzi



CALZA SPECTRA SOTTILE

Utilizzato per coprire il modulo piede in carbonio, per proteggerlo ed eliminare il rumore tra il modulo e la cover.

Cod. prod.	Descrizione	Misura	Colore
FCX65022	Calza Spectra sottile – small	22-25	Nero
FCX65026	Calza Spectra sottile – large	26-30	Nero

