

RE-FLEX SHOCK™

UNITY®
COMPATIBLE



Re-Flex Shock assicura un buon assorbimento verticale degli urti.

Progettato per gli utenti attivi, questo piede assicura reattività ed una dinamica restituzione d'energia.

La molla anteriore in composito assicura un assorbimento degli urti ottimale, riducendo l'impatto sul corpo.

Gli utenti percepiscono un maggiore controllo ed un maggior comfort durante la camminata e altre attività.

Össur consiglia di utilizzare Re-Flex Shock in combinazione con il sistema di sospensione a vuoto attivo senza ginocchiera Unity®. Questo aggiunge solo un peso minimo, non altera l'altezza strutturale e non interferisce con la dinamicità del piede protesico. Unity è progettato per fornire una sospensione sicura in combinazione con la tecnologia Icross Seal-In®, stabilizzando al contempo le fluttuazioni di volume e mantenendo una vestibilità dell'invasatura confortevole durante il giorno.



Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transtibiale e Transfemorale
Livello di attività:	Basso - Moderato - Alto
Limite peso:	166kg



WEATHERPROOF



PROGRESSIONE
TIBIALE ATTIVA



TUBO VERTICALE
AMMORTIZZANTE



LAMINA DIVISA

Informazioni piede	
Categoria:	1-9
Misure:	22-30
Peso del piede: (Misura 27, Cat. 2)	1076g con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza Standard: (Misura 27)	210 - 238mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza Profilo Alto: (Misura 27)	255 - 288mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza tallone:	10mm, per modulo Standard (19mm su ordine speciale)
Opzioni adattatori:	Giunto piramidale maschio

Informazioni sul sistema Unity	
Depressione massima:	23inHg (600mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-16inHg a -20inHg
Peso aggiuntivo del sistema:	130g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

RE-FLEX SHOCK™

INFORMAZIONI ORDINI


PER UN PIEDE COMPLETO CON PIRAMIDE MASCHIO*



Unity può essere ordinato con Re-Flex Shock, con modulo piede ad altezza standard. Si prega di selezionare al momento dell'ordine il kit piede con Unity appropriato, l'unità verrà premontata sul piede. Per maggiore comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per le schede di selezione delle cuffie e per i codici prodotto, fare riferimento alle pagine di Iceross Seal-In.

PER UN PIEDE COMPLETO CON UNITY

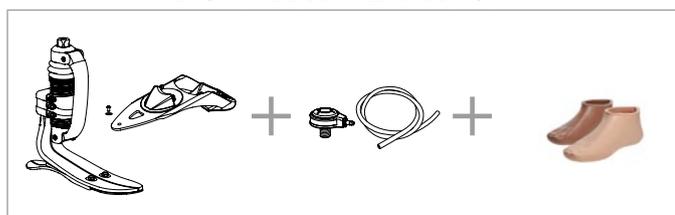

GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148 - 166
---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	-----------

Livello di attività basso

Misura 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Misura 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misura 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9

Livello di attività moderato

Misura 22-24	1	2	3	4	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Misura 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Misura 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A


Livello di attività alto

Misura 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Misura 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A
Misura 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A


RE-FLEX SHOCK™

INGOMBRO

MODULO PIEDE STANDARD CON AMMORTIZZATORE E PIRAMIDE MASCHIO

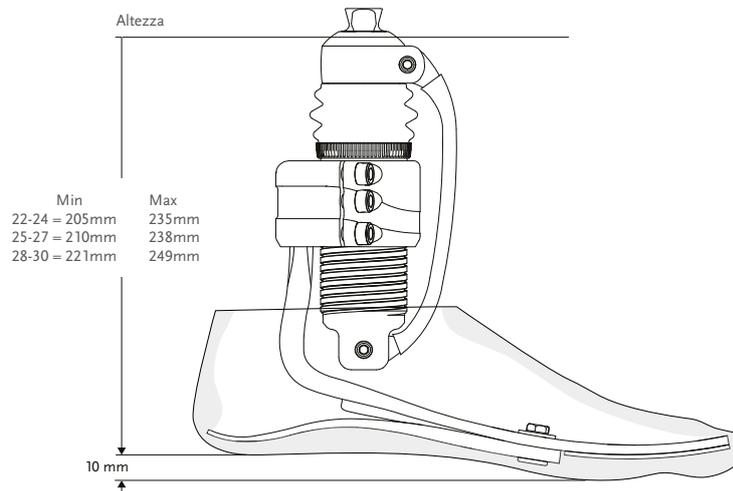

MODULO PIEDE ALTO CON AMMORTIZZATORE E PIRAMIDE MASCHIO

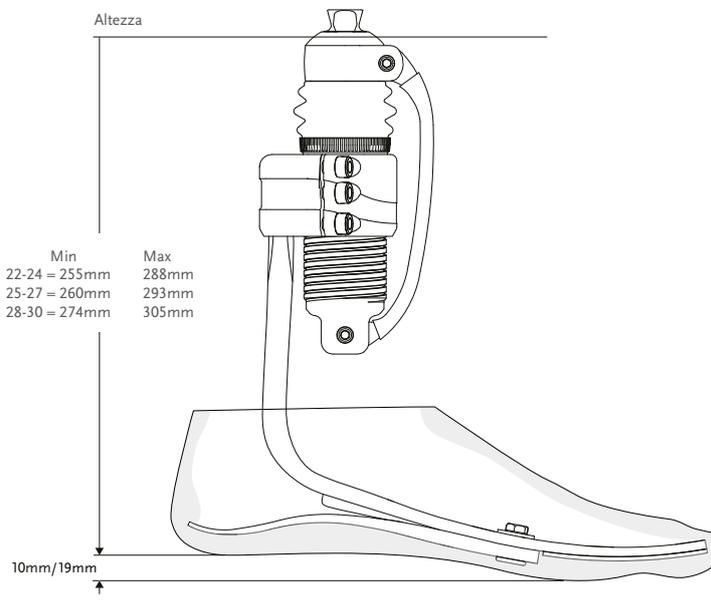

*Tutte le misure sono riferite ad un tacco di 10mm
 Nota: Re-Flex Shock con Unity ha la stessa altezza


RE-FLEX SHOCK™

KITS

MODULO PIEDE STANDARD

AMMORTIZZATORE E PIRAMIDE MASCHIO


COD. PROD.

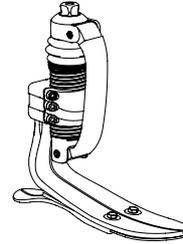

MODULO PIEDE ALTO

AMMORTIZZATORE E PIRAMIDE MASCHIO

COD. PROD.

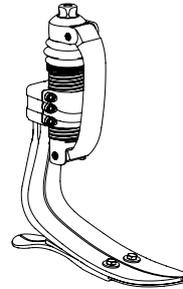

COD. PROD.



Include:

- Modulo piede
- Ammortizzatore con molla frontale
- Cunei tallone

L'ammortizzatore include:


- Ammortizzatori con piramide maschio
- Loctite

Nota:

- Il piede con tallone 19mm è un ordine speciale
- Il piede con punta solida con tallone 10mm e 19mm è un ordine speciale.

MODULO PIEDE STANDARD SENZA AMMORTIZZATORE

COD. PROD.

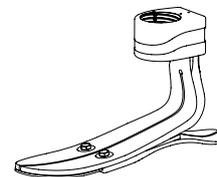


Nota: Il piede profilo standard (misure 25-30) con un tallone 19mm costituisce un ordine speciale.

RE-FLEX SHOCK™


KITS

MODULO PIEDE ALTO SENZA AMMORTIZZATORE

COD. PROD.

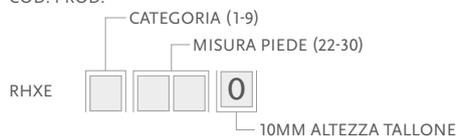

COD. PROD.

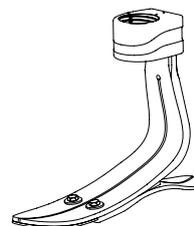

Include:

- Modulo piede

Nota:


- Il piede con tallone 19mm è un ordine speciale
- Il piede con punta solida con tallone 10mm e 19mm è un ordine speciale.



KITS AMMORTIZZATORE

KITS AMMORTIZZATORE MASCHIO

COD. PROD.

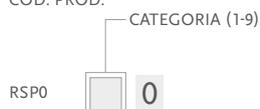


KIT PIEDI CON UNITY

RE-FLEX SHOCK™ MODULO PIEDE STANDARD E POMPA UNITY

CON AMMORTIZZATORE E GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO

COD. PROD.

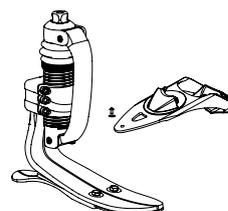

Cautela: Dato lo spazio limitato disponibile con Re-Flex Shock con modulo di ammortizzazione e Unity, i kit SSPE* consentono solo 2 giri completi di regolazione verso il basso a partire dall'impostazione più alta. Re-Flex Rotate può essere regolato su qualsiasi altezza, entro i limiti dei singoli prodotti.



Nota: Unity verrà premontato sul piede. I kit valvola devono essere ordinati separatamente.

RE-FLEX SHOCK™

UNITY

KITS UNITY

Foto	Cod. prod.	Descrizione	Kit piedi per Unity
1	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
2	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
3	UTF0006	Kit tubo Unity TF	Tutti
4	L-544611	Kit Icelock 544	Tutti
5	UTT1103	Confezione di filtri dell'aria della valvola Unity (10 p.)	Tutti

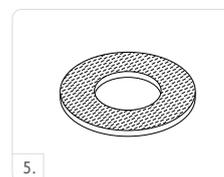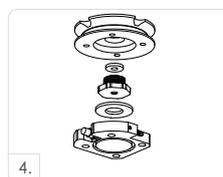


COMPONENTI DI RICAMBIO

Cod. prod.	Descrizione
URS00021	Componenti Unity RS, 22-24
URS00022	Componenti Unity RS, 25-30

Include:

- Membrana
- Valvole unidirezionali
- Fascetta per tubo
- Tubo
- Raccordo spinato
- Cuneo tallone

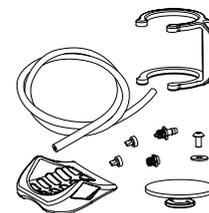

COMPONENTI

KIT CUNEI TALLONE

Per modulo piede profilo alto e standard	Misura piede	Cat.
CM150011	22-30	Tutti

Include:

- 3 Cunei
- Adesivo




Cod. prod.	Descrizione
CM160025	Loctite 243

RE-FLEX SHOCK™

COMPONENTI

MOLLA FRONTALE

Cod. prod.	Cat.
RSS44001	1
RSS44002	2
RSS44003	3
RSS44004	4
RSS44005	5
RSS44006	6
RSS44007	7
RSS44008	8

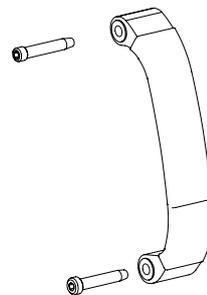

Include:


- Molla frontale
- 2 Perni

KIT PERNI E BOCCOLE

Cod. prod.	Descrizione
RSS00001	Kit perni e boccole

Include:

- 4 Boccole
- 2 Perni
- 2 molle a disco

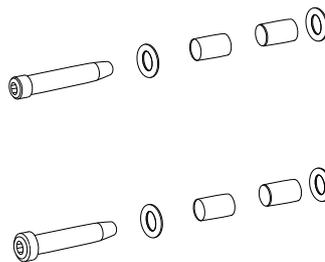

ANELLO INFERIORE

Cod. prod.	Descrizione
RSS40011	Re-Flex Shock Soffietto
RSS40012	Re-Flex Shock Collare

UTENSILE

CHIAVE DINANOMETRICA

Cod. prod.	Descrizione
FFC7980001	Chiave dinanometrica 3Nm

RE-FLEX SHOCK™

RIVESTIMENTO COSMETICO

KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*

COD. PROD.



Include:

- Cover piede
- Calza Flex-Foot
- Piastra di collegamento

*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

CALZA FLEX-FOOT


Utilizzato per coprire il modulo piede in carbonio, per proteggerlo ed eliminare il rumore tra modulo piede e cover piede.

Part#	Description	Size	Color
FSEL60001	Calza Flex-Foot Small	22-25	Nera
FSEL60002	Calza Flex-Foot Large	26-30	Nera
FSEL60001-15	15 Calze Flex-Foot Small	22-25	Nera
FSEL60002-15	15 Calze Flex-Foot Large	26-30	Nera



RE-FLEX SHOCK™

INGOMBRO

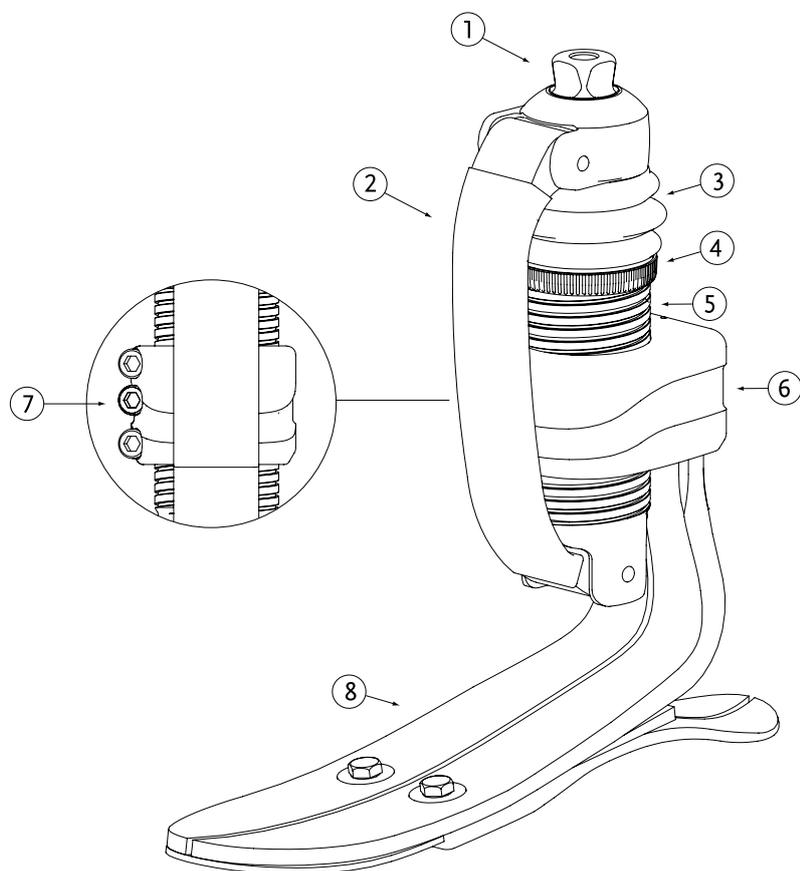

	Descrizione
1.	Giunto piramidale maschio
2.	Molla frontale
3.	Soffietto
4.	Collare
5.	Tubo esterno filettato
6.	Morsetto di fissaggio
7.	Viti per morsetto di fissaggio
8.	Modulo piede