


## ÖSSUR BRACING & SUPPORT

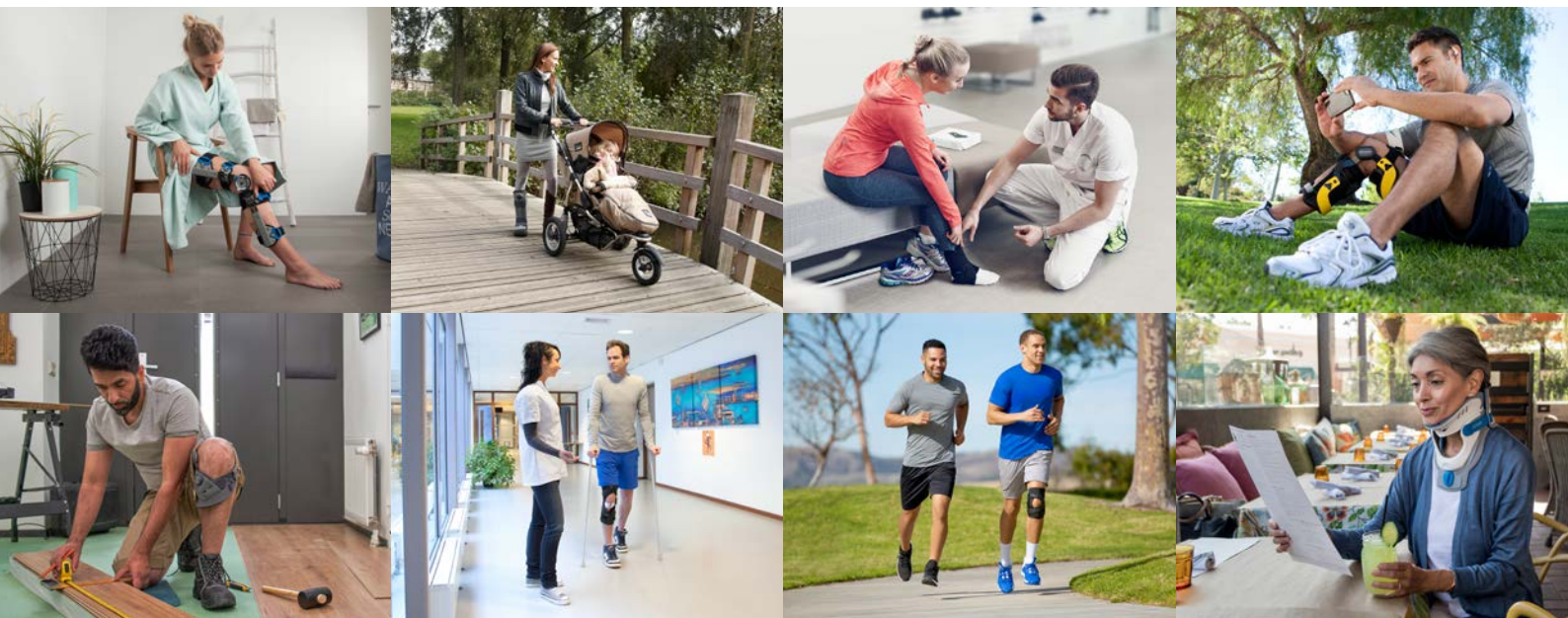



# ÖSSUR BRACING & SUPPORT

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| INTRODUKTION .....                                | 6  |
| NACKE & RYGG .....                                | 9  |
| RIKTLINJER FÖR ÖSSURS SPINALA ORTOSER .....       | 10 |
| MIAMI J® .....                                    | 12 |
| MIAMI J® SELECT .....                             | 14 |
| MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION .....               | 15 |
| OCCIAN® BACK .....                                | 16 |
| MIAMI Jr® .....                                   | 17 |
| PAPOOSE® .....                                    | 18 |
| PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR ..... | 19 |
| PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR .....            | 20 |
| NECLOC® .....                                     | 21 |
| NECLOC® KIDS .....                                | 22 |
| MIAMI LSO™ .....                                  | 23 |
| MIAMI TLSO 464 .....                              | 25 |
| MIAMI TLSO 456 .....                              | 27 |
| MIAMI LUMBAR® POSTEO .....                        | 29 |
| MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE .....            | 30 |
| FORMFIT® PRO BACK .....                           | 31 |
| FORMFIT® BACK SUPPORT AIR .....                   | 32 |
| FORMFIT® BACK SUPPORT .....                       | 33 |
| ORTOSLINNE .....                                  | 34 |
| HÖFT .....                                        | 35 |
| REBOUND® HIP .....                                | 36 |
| UNLOADER® HIP .....                               | 38 |
| AXEL, ARM & HAND .....                            | 41 |
| FORMFIT® SHOULDER .....                           | 42 |
| PREMIUM SHOULDER IMMOBILIZER .....                | 43 |
| AXELLÅS .....                                     | 43 |
| AXELLÅS TVÅDELAD .....                            | 44 |
| FRONT CLOSURE CLAVICLE SUPPORT .....              | 44 |
| FORMFIT® PRO ELBOW .....                          | 45 |
| REBOUND® POST-OP ELBOW .....                      | 46 |
| FORMFIT® TENNIS ELBOW .....                       | 48 |
| FORMFIT® PRO WRIST .....                          | 49 |
| SPECTRA HANDLEDSORTOS .....                       | 50 |
| FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM .....   | 51 |
| FORMFIT® UNIVERSAL WRIST & THUMB .....            | 52 |
| FORMFIT® TUMORTOS .....                           | 53 |
| FORMFIT® BARNORTOS .....                          | 54 |
| LYCRAFLEECE BARNORTOS .....                       | 54 |
| EXOFORM® HANDLEDSORTOS .....                      | 55 |
| EXOFORM® CTS HANDLEDSORTOS .....                  | 55 |

# ÖSSUR BRACING & SUPPORT

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE & SVART .....       | 56        |
| LYCRAFLEECE HANDLEDSORTOS.....                      | 56        |
| ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE & SVART .....              | 57        |
| ALFA HANDLEDSORTOS WIDE BEIGE.....                  | 58        |
| ALFA HANDLEDSORTOS WIDE SVART.....                  | 58        |
| ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR BEIGE.....                | 59        |
| ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR SVART.....                | 59        |
| UNIVERSAL THUMB SPLINT .....                        | 60        |
| ALFA TUMORTOS BEIGE & SVART .....                   | 60        |
| ALFA CMC TUMORTOS BEIGE & SVART.....                | 61        |
| AIR X TUMORTOS.....                                 | 61        |
| LYCRAFLEECE TUMORTOS.....                           | 62        |
| VENTOPRENE TUMORTOS .....                           | 62        |
| <b>KNÄ.....</b>                                     | <b>63</b> |
| UNLOADER® - FÖR ALLA GRADER AV OA.....              | 64        |
| UNLOADER ONE® X .....                               | 65        |
| UNLOADER ONE® .....                                 | 71        |
| UNLOADER ONE® PLUS .....                            | 75        |
| UNLOADER ONE® CUSTOM .....                          | 77        |
| REBOUND® CARTILAGE .....                            | 80        |
| CTI® OA.....                                        | 82        |
| REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST..... | 83        |
| REBOUND® PCL.....                                   | 85        |
| REBOUND® ACL.....                                   | 87        |
| REBOUND® ACL CUSTOM .....                           | 90        |
| CTI® OTS.....                                       | 93        |
| CTI® CUSTOM .....                                   | 96        |
| MEASUREMENT FORM CTI® CUSTOM BRACE .....            | 99        |
| CTi®3 .....                                         | 102       |
| C180™ ROCKET .....                                  | 104       |
| REBOUND® POST-OP KNEE.....                          | 105       |
| FORMFIT® POST-OP KNEE .....                         | 106       |
| REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL .....           | 107       |
| REBOUND® KNEE BRACE.....                            | 108       |
| FORMFIT® KNEE ROM .....                             | 109       |
| FORMFIT® KNEE HINGED.....                           | 110       |
| FORMFIT® KNEE MCL .....                             | 111       |
| VENTOPRENE SK/VK.....                               | 112       |
| LYCRAFLEECE PATELLA LUX.....                        | 112       |
| FORMFIT® HINGED LATERAL J.....                      | 113       |
| FORMFIT® TRACKER.....                               | 114       |
| FORMFIT® PRO KNEE.....                              | 115       |
| FORMFIT® PRO KNEE FLITE.....                        | 117       |



# ÖSSUR BRACING & SUPPORT

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>FOT &amp; ANKEL</b> .....           | <b>119</b> |
| REBOUND® DIABETIC WALKER.....          | 120        |
| DH OFFLOADING WALKER® .....            | 122        |
| REBOUND® AIR WALKER .....              | 123        |
| FORMFIT® WALKER AIR .....              | 125        |
| FORMFIT® WALKER .....                  | 126        |
| AFO DYNAMIC .....                      | 127        |
| AFO LIGHT.....                         | 129        |
| AFO LEAF SPRING .....                  | 130        |
| REBOUND FOOT-UP® .....                 | 131        |
| BOXIA AFO DROP FOOT .....              | 132        |
| FOOT-UP® .....                         | 133        |
| REBOUND® ANKLE BRACE.....              | 134        |
| FORMFIT® ANKLE BRACE .....             | 135        |
| FORMFIT® ANKLE WITH SPEEDLACE .....    | 136        |
| FORMFIT® PRO ANKLE .....               | 137        |
| FORMFIT® ANKLE STIRRUPS .....          | 139        |
| EXOFORM® DORSAL NIGHT SPLINT .....     | 140        |
| FORMFIT® NIGHT SPLINT.....             | 141        |
| MPO 2000 .....                         | 142        |
| DH OFFLOADING POST-OP STYLE SHOE ..... | 143        |
| SOFT TOP POST-OP SHOE.....             | 144        |
| CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE .....   | 144        |
| INLÄGG .....                           | 145        |
| <b>MATERIAL &amp; TILLBEHÖR</b> .....  | <b>149</b> |
| ORTHOTIC SOCK, AFO/KAFO.....           | 150        |
| TOELESS FRACTURE SOCK .....            | 151        |
| COMPRESSION STOCKINET .....            | 151        |
| CAST-RITE FRACTURE/ORTHOTIC SOCK.....  | 151        |
| <b>CASCADE DAFO</b> .....              | <b>153</b> |
| FAST FIT® CHIPMUNK® .....              | 154        |
| FAST FIT® CRICKET® .....               | 154        |
| JUMPSTART® LEAP FROG® .....            | 155        |
| JUMPSTART® BUNNY® .....                | 155        |
| JUMPSTART® KANGAROO® .....             | 156        |
| <b>GENERELL INFORMATION</b> .....      | <b>157</b> |
| ÖSSUR SERVICES .....                   | 158        |
| TVÄTTRÅD .....                         | 159        |
| ANTECKNINGAR.....                      | 160        |

## ÖSSUR OA SOLUTIONS


### För bättre livskvalitet och rörlighet hos personer med artros.

Dessa produktlösningar har skapats under decennier av erfarenhet och utvecklats för att förbättra livskvaliteten hos människor som lever med osteoartrit genom att minska smärtan och öka rörligheten. Genom OA-expertis, ledarskap i innovation samt partnerskap med medicinska yrkespersoner, erbjuder vi övergripande, beprövade och effektiva behandlingsalternativ.

## UNLOADER®

Varumärket Össur Unloader® har blivit synonymt med osteoartrit-ortoser och representerar OA-lösningars teknologi som blivit industri-standard och vars effektivitet har bevisats i fler än 15 kliniska studier.

Össur vill bibehålla sin ställning som innovationsledare för OA-lösningar genom att fortsätta att utveckla enkla men effektiva, kliniskt testade behandlingslösningar som förbättrar människors livskvalitet.

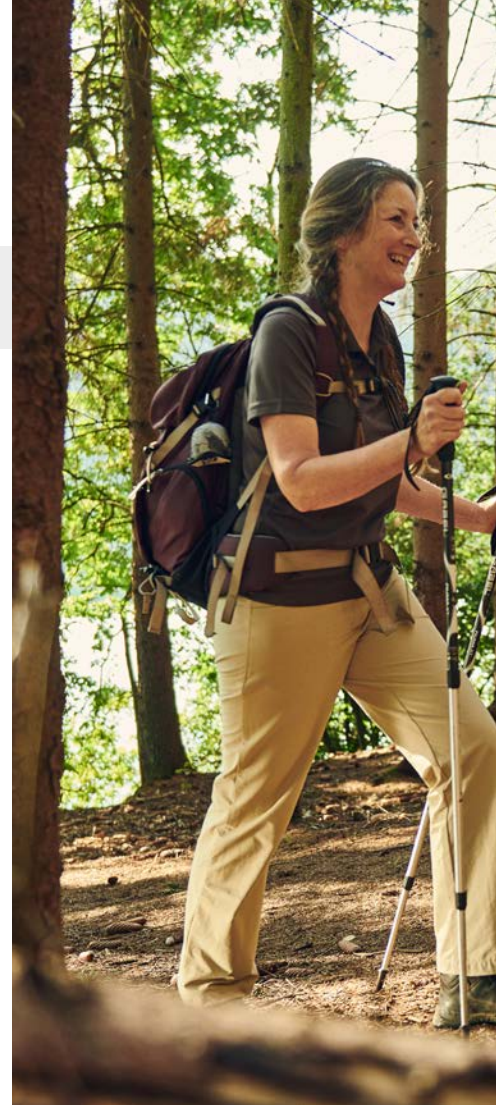



## ÖSSUR INJURY SOLUTIONS

För personer som återhämtar sig från frakturer och ligamentskador eller som är i behov av postoperativa behandlingslösningar.

Dessa produktlösningar har tagits fram efter årtionden av praktik och är utformade för att förbättra läkningen av frakturer och mjukvävnadsskador. Genom innovativt ledarskap, beprövade biomekaniska metoder och samarbete med läkare strävar vi efter att erbjuda omfattande och effektiva behandlingsalternativ.

Össurs lösningar för skador är globalt erkända, främst under varumärkesnamnen CTi®, Rebound® and Miami® och har utvecklats för att underlätta läkningsprocessen och förbättra människors livskvalitet.

Vår expertis inom lösningar för skador har sporrat oss att ta nästa steg framåt genom att utveckla indikationsspecifika produkter som är utformade för att optimera läkningsprocessen samtidigt som funktion och rörlighet upprätthålls. Dessa funktionella läkningsprodukter innefattar Össurs egenutvecklade teknik och är utformade för att förbättra kliniskt relevanta resultat.



FUNCTIONAL HEALING - WHERE  
MOBILITY MEANS RECOVERY.









# RIKTLINJER FÖR ÖSSURS SPINALA ORTOSER

Hög support
 
 Medelsupport
 
 Låg support
 
 Vid användning med JTO

Miami JTO®



Miami J® Select



Miami J®



Miami Jr®



Miami TLSO™ 456  
Miami TLSO™ 464



Miami Lumbar®  
Posteo




MP45  
Hyperextension Brace



Miami LSO™



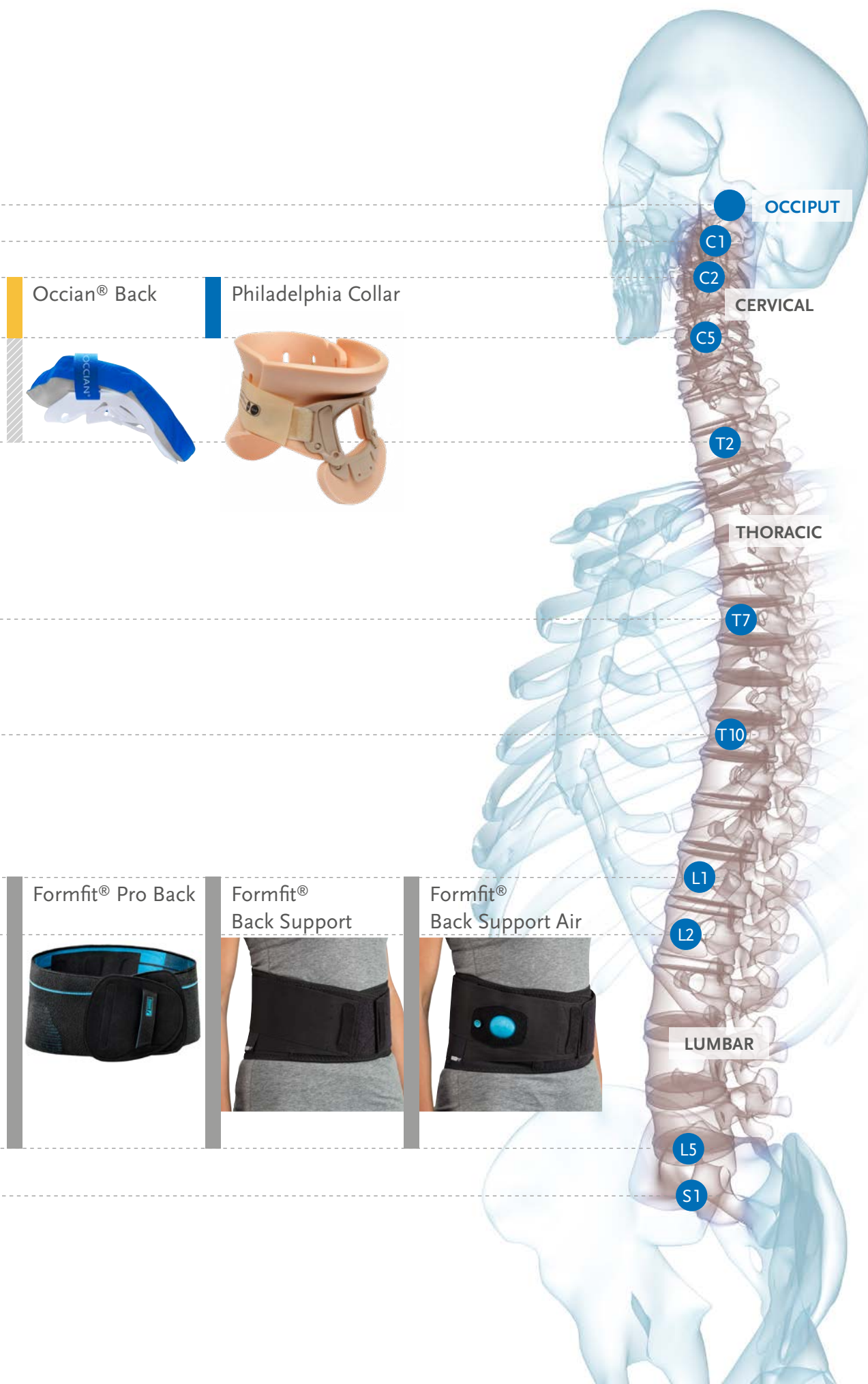



## MIAMI J®

Miami J har i ett flertal oberoende studier visat sig ge överlägsen immobilisering av halsryggraden. Den patenterade konstruktionen möter de specialiserade behoven hos alla patienter med cervikal-skador. Den utmärkta immobiliseringen, förebyggandet av trycksår och patientkomforten hos Miami J ger bättre patientacceptans och snabbare tillfrisknande.



## INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt



**Video:** Miami J -  
Clinician Fitting Instructions  
(6 min 36 sec)


## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antibakteriell Sorbatex™-polstring som vid kliniska studier konstaterats förebygga bakterietillväxt, vilket ger bättre komfort och säkerställer patientacceptansen
- Designad med särskilt fokus på att minimera tryckpunkter i utsatta områden: Bakhuvud, haka, trapezius och nyckelben
- Knappar för bekväm justering mot bakhuvudet, sternalstödet kan tas bort när patienten ligger eller äter
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Sex storlekar baserade på kroppstypen säkerställer korrekt passform och optimal immobilisering

Välj kragstorlek baseras på patientens nackhöjd, inte kroppstorlek. Det baseras på kroppstypen och minskar felmarginalen vid utprovningen. Varje krage är utformad för den specifika kroppstypen vilket säkerställer optimal immobilisering. För barnstorlekar se Miami Jr.

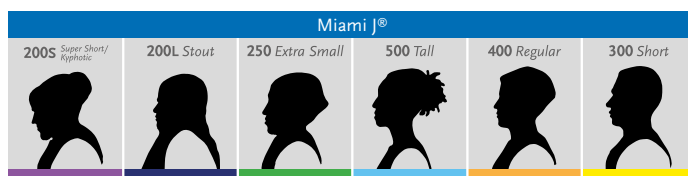



# MIAMI J®

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek     | Krage Set* | Krage   | Bakstycke | Framstycke |
|-------------|------------|---------|-----------|------------|
| Super Short | MJR-200S   | MJ-200S | MJ-400BK  | MJ-200SFRT |
| Stout       | MJR-200L   | MJ-200L | MJ-200LBK | MJ-200LFRT |
| XS          | MJR-250    | MJ-250  | MJ-250BK  | MJ-250FRT  |
| Short       | MJR-300    | MJ-300  | MJ-300BK  | MJ-300FRT  |
| Regular     | MJR-400    | MJ-400  | MJ-400BK  | MJ-400FRT  |
| Tall        | MJR-500    | MJ-500  | MJ-500BK  | MJ-500FRT  |

Miami J's fram- och bakstycke kan kombineras valfritt.

Välj kragstorlek baserat på patientens nackhöjd, inte kroppstorlek.

\*Varje set levereras med en extra polstringssats.

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

| Storlek     | Art.nr.  |
|-------------|----------|
| Super Short | MJP-100  |
| Stout       | MJP-200L |
| XS          | MJP-250  |
| Short       | MJP-100  |
| Regular     | MJP-100  |
| Tall        | MJP-100  |

## MIAMI J® SELECT

Miami J Select-halskragen från Össur har flest möjligheter till höjdjustering på marknaden med en enda universell utformning som ger den komfort, immobilisering och kvalitet du förväntar dig av en Miami J-produkt. Miami J Select har en patenterad låsmekanism som var först på marknaden och som uppmuntrar patienten att följa instruktionerna. Den har dessutom antimikrobiell Sorbatex-polstring och bidrar aktivt till framgångsrika patientresultat.



### INDIKATIONER

Tillstånd som kräver allmän immobilisering av halsryggen, vilket kan omfatta:

- före och efter halsryggsoperation
- som försiktighetsåtgärd för traumapatienter med nackskador



Video: Miami J -  
Clinician Fitting Instructions  
(5 min 47 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel höjdjustering med en manipuleringsäker låsmekanism - Left-to-lock: För till vänster för att låsa
- Antimikrobiell och biokompatibl Sorbatex™-polstring förhindrar bakterietillväxt.
- Universell utformning som inte äventyrar immobilisering eller komfort.
- 7 exakta inpassningsstorlekar som kan finjusteras.
- Miami J®-inspirerat hakstöd.
- Anatomiskt utformad kragbaksida i ett stycke med Flex Edge® som minskar trycket på nacken.
- Enkel att ta på och av med det patenterade Reproducible Fit-alternativet.
- Intuitiva blå inställningspunkter för patienten som ger patienterna trygghet - Blue is You™.
- Förenklade komfortjusteringar med integrerat och patenterat bröstbensavlastningsvred.
- Stor trakealöppning - förbättrad funktion för IVA-patienter.
- Enkel att rengöra och lätt att byta polstringen.
- Röntgen- och CT-transparent, MR-säker.
- Kompatibel med Occian® Back & Miami JTO®-tillbehör.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### KRAGSET

| Beskrivning                                                         | Art.nr.  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Miami J Select- kragset. Innehåller: krage och extra polstringssats | MJSR-101 |

#### MIAMI J SELECT-KRAGE

| Beskrivning          | Art.nr. |
|----------------------|---------|
| Miami J Select-krage | MJS-101 |

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                                      | Art.nr.  |
|--------------------------------------------------|----------|
| Extra polstringssats till Miami J Select         | MJSP-101 |
| Miami J Select Reproducible Fit-flikar (10-pack) | MJST-101 |

## MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION

JTO Thoraxförlängning är framtagen i samråd med ledande kirurger, ortopedingenjörer och sjuksköterskor. Ortosen kan användas med samtliga Miami J halskragar när det krävs extra stabilitet i den cervikala övergången.



### INDIKATIONER

- Skador i nedre delen av halsryggraden och övre delen av bröstryggraden
- Immobilisering före och efter operation på nedre delen av halsryggraden och övre delen av bröstryggraden
- Andra tillstånd som kräver immobilisering av nedre delen av halsryggraden och/eller övre delen av bröstryggraden



**Video:** Miami J - Adjustments & Accessories (6 min 26 sec)  
[Miami JTO från 3:35.](#)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Patenterad konstruktion med "flytande ryggdel" som tillåter maximal immobilisering och eliminerar kompensatoriska rörelser
- Enkel att applicera utan verktyg
- Antibakteriell Sorbatex-polstring som vid kliniska studier konstaterats förebygga mikrobtiltväxt, vilket ger bättre komfort och säkerställer patientacceptansen
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Beskrivning                  | Art.nr. |
|------------------------------|---------|
| Miami JTO                    | MT-900  |
| Miami JTO med polstringssats | MTR-900 |

Kompatibel med samtliga storlekar av Miami J® och P3 Miami Jr®  
Halskrage beställs separat

### TILLBEHÖR

| Beskrivning          | Art.nr. |
|----------------------|---------|
| Extra polstringssats | MTP-950 |

## OCCIAN® BACK

Bakstycket Occian Back är avsett för de särskilda krav som ställs av multitrauma-patienter på IVA. Occian Back finns i en universalstorlek. Polstringen är ett extra tryckavlastande viskoelastiskt material från Tempur®. Bakstycket underlättar vården av patienter med cervikala problem som löper stor risk för occipital kollaps.



## INDIKATIONER

- Patienter som inte har vaknat inom 24 - 48 timmar från intagningen
- Patienter med tidigare hudskador och/eller lacerationer i huvud/nacke/hals
- Brännskadepatienter som måste använda krage
- Elektiva kirurgipatienter som önskar ökad postoperativ komfort nattetid
- Patienter som måste vara sängliggande längre tider på grund av andnings-, neurologisk eller hemodynamisk instabilitet



[Video: Miami J - Adjustments & Accessories \(6 min 26 sec\)](#)  
[Occian Back från 3:05.](#)

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Intuitech tryckavlastande minnesskum eliminerar risken för occipitala trycksår
- Upprätthåller stabilitet i halsryggraden
- Ger unik tryckavlastande komfort; ersätter vid behov bakstycket på Miami J halskrage
- Kliniska prover visar att Occian back praktiskt taget eliminerar occipitala trycksår utan att äventyra stabiliteten i halsryggraden
- Enkel att rengöra
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Beskrivning        | Art.nr. |
|--------------------|---------|
| Occian Back -      | ACB-100 |
| Occian Back Junior | ACB-200 |

Kompatibel med samtliga storlekar av Miami J®, Miami J® Advanced och med Miami Jr®. Kragens frontpanel beställs separat.





## MIAMI Jr®

Barnhalskragen Miami Jr är designad för att passa barn upp till 12 år. Produktlinjen Miami Jr omspannar alla perioder i barnets tillväxt. Miami Jr är den enda kragen som tar hänsyn till skillnader i anatomin hos barn och vuxna.



## INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Innovativ krage avsedd för barn upp till 12 år
- Hudvänlig Sorbatex™-polstring skyddar huden under långvarig användning
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ålder

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### MIAMI JR

| Storlek        | Krage set* | Krage |
|----------------|------------|-------|
| 0 - 6 månader  | MJR-P0     | MJ-P0 |
| 6 - 24 månader | MJR-P1     | MJ-P1 |
| 2 - 6 år       | MJR-P2     | MJ-P2 |
| 6 - 12 år      | MJR-P3     | MJ-P3 |

\*OBS! Varje set levereras med en extra polstringssats.

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

| Storlek        | Art.nr. |
|----------------|---------|
| 0 - 6 månader  | MJP-P0  |
| 6 - 24 månader | MJP-P1  |
| 2 - 6 år       | MJP-P2  |
| 6 - 12 år      | MJP-P3  |

## PAPOOSE®

Papoose är en innovativ halskrage för de yngsta och mest krävande patienterna, nämligen nyfödda barn. Papoose omsluter och immobiliserar säkert och varsamt barnets huvud och rygg, medan luftvägarna hålls fria och ryggraden hålls i rät linje för att säkerställa bästa möjliga resultat.



### INDIKATIONER

- Immobilisering av ryggraden
- Spinala frakturer

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Immobiliserar säkert och varsamt barnets huvud och rygg, medan luftvägarna hålls fria och ryggraden hålls i rät linje
- Utformningen av det occipitala stödet skyddar mot positionell plagiocefali
- Immobilisering av halsryggraden hos barn upp till 3 månader
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

### BESTÄLLNINGSGRUPP

#### PAPOOSE

| Beskrivning                                          | Art.nr. |
|------------------------------------------------------|---------|
| Papoose utan P0 framstycke                           | PO-100  |
| Papoose utan P0 framstycke med ersättnings polstring | POR-100 |
| Papoose med P0 framstycke                            | PA-100  |
| Papoose med P0 framstycke med ersättnings polstring  | PAR-100 |

### TILLBEHÖR

#### POLSTRINGSSATS

| Beskrivning                              | Art.nr. |
|------------------------------------------|---------|
| Papoose och P0 framstycke polstringssats | PAP-100 |
| Papoose polstringssats                   | POP-100 |

## PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR

Philadelphia-halskragar har varit en industristandard i årtionden. Philadelphia Adjustable har samma konstruktion och material som originalet dock med den möjligheten att höjden kan justeras.

### INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar i omkrets och höjd; en storlek passar de flesta
- Anatomiskt format Plastazote®-skumplast (latexfritt, icke-toxiskt och hypoallergent för att minimera hudirritation) ger utrymme för cervikala vener  
Totalt stöd av halsryggradens böjning bibehåller halsryggraden i korrekt ställning
- Vattenavstötande, lämplig för bad och vattenterapi
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universa - en storlek



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Beskrivning                                 | Art.nr. |
|---------------------------------------------|---------|
| Philadelphia Trakeotomikrage, justeringsbar | PHP-AA  |

## PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR

Philadelphia Tracheotomy Collar är en sjukhus- och rehabiliteringskrage som är utformad för att upprätthålla neutral inriktning av halsryggen efter en nackskada. Kragen har en stor trakealöppning, vilket tillåter halspulsövervakning och akut trakeotomi.

### INDIKATIONER


- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Latexfritt, giftfritt och hypoallergent Plastazote® skummaterial minskar risken för hudirritation
- Totalt stöd av halsryggradens böjning bibehåller halsryggraden i korrekt ställning
- Vattenavstötande, lämplig vid bad och vattenterapi

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets nacke, höjd mellan skuldra och haka

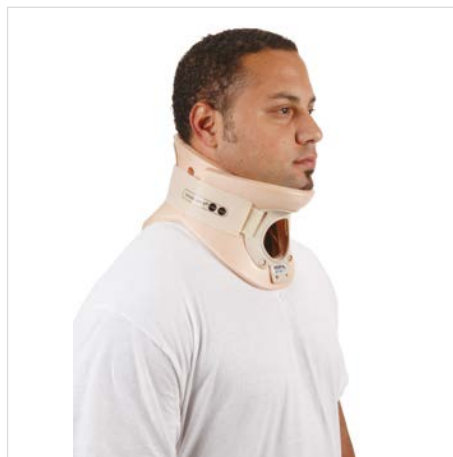

## BESTÄLLNINGSGRUPP

| STORLEK | OMKRETS RUNT NACKEN | HÖJD 6 CM | HÖJD 8 CM | HÖJD 11 CM | HÖJD 13 CM |
|---------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Barn    | 20 - 28 cm          | PHP-TP    | Barn      | 20 - 28 cm | PHP-TP     |
| S       | 25 - 33 cm          | PHP-T2S   | PHP-T3S   | PHP-T4S    | PHP-T5S    |
| M       | 33 - 41 cm          | PHP-T2M   | PHP-T3M   | PHP-T4M    | PHP-T5M    |
| L       | 41 - 48 cm          | PHP-T2L   | PHP-T3L   | PHP-T4L    | PHP-T5L    |
| XL      | > 48 cm             | PHP-T2XL  | PHP-T3XL  | PHP-T4XL   | PHP-T5XL   |

| Storlek    | Omkrets runt nacken | Art.nr. |
|------------|---------------------|---------|
| Infant     | 15 - 20 cm          | PHP-TI  |
| Paediatric | 20 - 28 cm          | PHP-TP  |

## TILLBEHÖR

### PHILADELPHIA COOLMAX POLSTRING

| Storlek | Omkrets runt nacken | Art.nr. |
|---------|---------------------|---------|
| Barn    | 20 - 28 cm          | PHP-LCP |
| S       | 25 - 33 cm          | PHP-LCS |
| M       | 33 - 41 cm          | PHP-LCM |
| L       | 41 - 48 cm          | PHP-LCL |

### PHILADELPHIA TRACHEOTOMY TILLBEHÖR

| Storlek | Stabilizer | Halo    |
|---------|------------|---------|
| Vuxen   | PHP-OS     | PHP-OH  |
| Barn    | PHP-OSP    | PHP-OHP |

## NECLOC®

### INDIKATIONER

- Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt utformad tvådelad halskrage som säkerställer flexion under applicering
- Fem storlekar som utgår från kroppstyp gör storleksvalet enkelt
- Minimal manipulering av patienten under applicering
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent


### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Valet av storlek baseras på fem olika kroppstyper; säkerställer god passform och optimal immobilisering



### STORLEKAR

- Fenotypstorlekssystemet underlättar storleksvalet och minskar avsevärt felmarginalen vid inprovning på patienten. Varje krage har biotekniska, storleksspecifika fram- och bakdelar som är avsedda att fungera tillsammans för att säkerställa optimal immobilisering. För barnstorlekar, se NecLoc Kids.

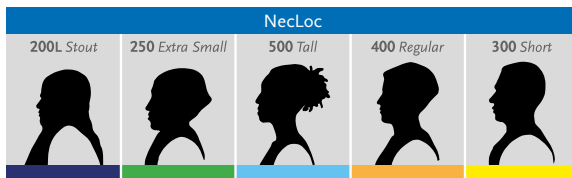

### BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek* | Art.nr.  |
|----------|----------|
| Stout    | NL-200EL |
| XS       | NL-250E  |
| S        | NL-300E  |
| M        | NL-400E  |
| L        | NL-500E  |

\* Se storleksöversikt Miami J.



## NECLOC® KIDS

### INDIKATIONER

- Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt utformad tvådelad halskrage som säkerställer flexion under applicering
- Tre barnstorlekar
- Minimal manipulering av patienten under applicering
- Möter de krav som ställs av det växande barnets unika anatomi
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ålder



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek   | Art.nr. |
|-----------|---------|
| 0 - 2 år  | NL-P1   |
| 2 - 6 år  | NL-P2   |
| 6 - 12 år | NL-P3   |

## MIAMI LSO™

Miami LSO är en lättanvänd ländryggsortos för postkirurgisk immobilisering, smärtlindring och skydd av skadade ligament och muskler. Dess anatomiska form följer ryggradens konturer och ger immobilisering och patientkomfort. Ortosen kan byggas i moduler, vilket möjliggör nedtrappning av immobiliseringen under rehabiliteringsprocessen, samt har band som enkelt kan justeras efter behov.



## INDIKATIONER

Skador/diagnoser som kräver immobilisering av lumbala delen av ryggen såsom:

- Stabila, icke-dislokerade spinala fakturer (L1-L5)
- Spinalstenos
- Diskbräck
- Degenerativa spinala sjukdomar
- Spondylolisthesis
- Spondylolysis
- Kontraindikation: Instabila dislokerade spinala frakturer



**Video:** Miami LSO - Clinician Quick-Fit Instructions (2 min 22 sec)

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidigt, ventilerat material
- Beprövat dubbeldragssystem med längdjustering
- Injusteringsverktyg för enkel och förbättrad anpassning direkt på användare
- Universalbälte som passar midjemått upp till 178 cm
- Formade posteriora paneler i stl S-XL för precis, anatomisk passform
- Quick-Fit handtag

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja

# MIAMI LSO™

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### MIAMI LSO BÄLTE

| Storlek                 | Omkrets midja | Art.nr  |
|-------------------------|---------------|---------|
| 6" Universal (Slim)     | 66 - 127 cm   | MLSO-1E |
| 8" Universal (Standard) | 66 - 127 cm   | MLSO-2E |

### STANDARD POSTERIOR PANEL

| Storlek  | Art.nr   |
|----------|----------|
| Standard | MLSO-P56 |

Standard posterior panelen rekommenderas alltid när ingen annan posterior panel används.



### CONTOURED POSTERIOR PANEL

| Storlek | Omkrets midja | Art.nr   |
|---------|---------------|----------|
| S       | 66 - 86 cm    | MLSO-P11 |
| M       | 86 - 96 cm    | MLSO-P21 |
| L       | 96 - 127 cm   | MLSO-P31 |
| XL      | 127 - 167 cm  | MLSO-P41 |



### CONTOURED POSTERIOR PANEL MED LATERAL SUPPORT

| Storlek | Omkrets midja | Art.nr   |
|---------|---------------|----------|
| S       | 66 - 86 cm    | MLSO-P12 |
| M       | 86 - 96 cm    | MLSO-P22 |
| L       | 96 - 127 cm   | MLSO-P32 |
| XL      | 127 - 167 cm  | MLSO-P42 |



## TILLBEHÖR

### ANTERIOR PANEL

| Storlek             | Art.nr   |
|---------------------|----------|
| 6" Panel (Slim)     | MLSO-PA6 |
| 8" Panel (Standard) | MLSO-PA8 |



### ÖSSUR FIT TOOL

| Beskrivning    | Art.nr      |
|----------------|-------------|
| Össur Fit Tool | B-040100000 |



### BÄLTESFÖRLÄNGNING

| Storlek                          | Omkrets midja | Art.nr    |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| 6" (Slim) Bältesförlängning*     | 66 - 177 cm   | MLSO-1EXT |
| 8" (Standard) Bältesförlängning* | 66 - 177 cm   | MLSO-2EXT |

\* Bältesförlängning kan enbart användas i kombination med Miami LSO bälte.

## MIAMI TLSO 464

Miami TLSO från Össur är svaret på våra kunders och ortoped-ingenjörers behov, med förenklade förberedelser utan att behöva göra avkall på passform eller prestanda. Denna lättanvända förmonterade Miami TLSO-ortosen är en tre-i-ett-lösning.

**Användning:** Kan enkelt appliceras över axeln eller under armen och på- och avtagningen förenklas ytterligare tack vare de praktiskt placerade snabbspännena.

**Justerbarhet:** Med universalbältesdesignerna kan du ställa in patientens bälteslängd för en mer exakt dimensionering.

**Komfort:** Utformningen är gjord för att passa anatomin och den anatomiskt konturerade designen förstärker ryggraden och patientens komfort maximeras.

**Lätt att använda:** Miami TLSO-ortosen kräver minimala förberedelser och är konstruerad för att ge optimal patientkomfort.



## INDIKATIONER

Tillstånd som kräver kraftig immobilisering av bröstkorgs- och ländryggsregionen såsom:

- Postoperativ immobilisering
- TLSO för spinalt stöd upp till T7
- Spinal stenosis
- Diskbräck
- Degenerativa ryggradsfrakturer
- Spondylolistes
- Spondylolys



**Video:** Miami TLSO 464 -  
Clinician Fitting Instructions  
(5 min 32 sec)

## KONTRAINDIKATIONER

- Instabila, förskjutna frakturer

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen komfort och enkel på- och avtagning.
- Färdigmonterad för enkel inpassning.
- För personer mellan 155 och 193 cm
- Bakre bröstförlängning med ergonomiskt axillärband.
- Kan bytas mot en LSO senare under rehabiliteringen.
- Främre bröstförlängningsdel som justeras med ett enda tryck, med enkelt eller dubbelt gångjärn.
- En universalmodell i en storlek eller individanpassad anatomisk design.
- Förbättrad komfort och immobilisering med flera bandalternativ och avtagbara ankare.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät omkretsen på bälten mitt emellan de nedersta revbenen och den övre höftbenskammen. Stående.

| Storlek   | Midjemått i cm |
|-----------|----------------|
| S         | 66 - 86        |
| M         | 86 - 96        |
| L         | 96 - 127       |
| XL        | 127 - 167      |
| Universal | 66 - 127       |

\* För omkretsar på 127 - 167 cm krävs en bältesförlängning

# MIAMI TLSO 464

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

### ATE/PTE, LORDOTISK

| Storlek   | Art.nr.    |
|-----------|------------|
| Universal | MTLSO-2351 |
| S         | MTLSO-2111 |
| M         | MTLSO-2121 |
| L         | MTLSO-2131 |
| XL        | MTLSO-2141 |

\*Icke-lateral och icke-lordotisk version finns tillgänglig på begäran

### ATE/PTE, LORDOTISK, SMAL

| Storlek   | Art.nr.    |
|-----------|------------|
| Universal | MTLSO-1351 |
| S         | MTLSO-1111 |
| M         | MTLSO-1121 |
| L         | MTLSO-1131 |
| XL        | MTLSO-1141 |

## ANDRA TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                                                                   | Art.nr.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 mm insexnyckel                                                                                              | MTLSO-0004  |
| Tillbehörssats för axillärband                                                                                | MTLSO-0003  |
| Snabbinspassningsverktyg                                                                                      | B-040100000 |
| Bältesförlängning, standard<br>(Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.) | MLSO-2EXT   |
| Bältesförlängning, smal<br>(Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)     | MLSO-1EXT   |

## MIAMI TLSO 456

Miami TLSO 456 från Össur är svaret på våra kunders och ortoped-ingenjörers behov, med förenklade förberedelser utan att behöva göra avkall på passform eller prestanda. Den här lättanvända och förmonterade Miami TLSO-ortosen ger samma bekvämlighet som en universaldesign i en storlek eller en individanpassad anatomisk design.

Användning: Intuitiva blå inställningspunkter som ger patienterna trygghet - Blue is You™.

Justerbarhet: Med universalbältesdesignerna kan du ställa in patientens bälteslängd för en mer exakt dimensionering. Värmeformbara posteriora paneler möjliggör en anpassad passform och den modulära designen möjliggör stegvis minskad behandling med stöd för LSO.

Komfort: Med Miami LSO™ Advanced Compression-remskiva med avkänningsbar ländryggskompression och en anatomisk konturdesign som förstärker ryggraden samtidigt som du maximerar patientens komfort.

Enkel användning: Miami TLSO-ortos med axelband som är enkla att använda, minimal förberedelse och konstruktion för att ge optimal patientkomfort.



## INDIKATIONER

Tillstånd som kräver kraftig immobilisering av bröstkorgs- och ländryggsregionen såsom:

- Postkirurgisk immobilisering
- TLSO för spinalt stöd upp till T7
- Spinal stenosis
- Diskbräck
- Degenerativa ryggradsfrakturer
- Spondylolistes
- Spondylolys



Video: Miami TLSO 456 -  
Clinician Fitting Instructions  
(5 min 32 sec)

## KONTRAINDIKATIONER

- Unstable, displaced fractures

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen komfort och enkel på-/avtagning (jämfört med Miami Lumbar TLSO).
- Färdigmonterad för enkel inpassning.
- För personer mellan 155 och 193 cm.
- Kan bytas mot en LSO senare under rehabiliteringen.
- En universalmodell i en storlek eller individanpassad anatomisk design.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Midjemått

| Storlek   | Midjemått i cm |
|-----------|----------------|
| S         | 66 - 89        |
| M         | 86 - 96        |
| L         | 96 - 127       |
| XL        | 127 - 167      |
| Universal | 66 - 127       |

\* För omkretsar på 127 - 167 cm krävs en bältesförlängning



# MIAMI TLSO 456

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### PTE, LORDOTISK

| Storlek   | Art.nr.    |
|-----------|------------|
| Universal | MTLSO-2352 |
| S         | MTLSO-2112 |
| M         | MTLSO-2122 |
| L         | MTLSO-2132 |
| XL        | MTLSO-2142 |

### PTE, LORDOTISK, SMAL

| Storlek   | Art.nr.    |
|-----------|------------|
| Universal | MTLSO-1352 |
| S         | MTLSO-1112 |
| M         | MTLSO-1122 |
| L         | MTLSO-1132 |
| XL        | MTLSO-1142 |

\*Icke-lateral och icke-lordotisk version tillgänglig på begäran.

## ANDRA TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                                                                   | Art.nr.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Snabbinpassningsverktyg                                                                                       | B-040100000 |
| Bältesförlängning, standard<br>(Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.) | MLSO-2EXT   |
| Bältesförlängning, smal<br>(Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)     | MLSO-1EXT   |

## MIAMI LUMBAR® POSTEO

Miami Lumbar Posteo ger smärtlindring vid frakturer i ryggraden och förkortar rehabiliteringen. Gördeln har utvecklats med särskilt fokus på komfort och patientacceptans. Det lumbala kompressionssystemet dämpar smärtan genom aktiv avlastning av ryggraden. Samtidigt förbättras passformen, vilket underlättar användningen och höjer acceptansen. Miami Lumbar Posteo är en innovativ rygggördel som är lätt att ta på och behaglig att bära.



### INDIKATIONER

- Smärta orsakad av stabila kompressionsfrakturer i ryggraden



Video: Miami Lumbar Posteo - Clinician Custom-Fit Modifications (3 min 57 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Aktiv avlastning genom thorakal förlängningsdel och lumbal kompression
- Integrerat kompressionssystem för enkel åtdragning och optimal passform
- Trimbara, justerbara axelband för optimal stabilitet
- Kallformbar posterior thorakal förlängning (PTE) i aluminium
- Extra polstring runt aluminiumskenan skyddar huden

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ryggens längd från korsbenets övre kant till kota C7 längs ryggradens böjning

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### MIAMI LUMBAR POSTEO

| Storlek | PTE längd | Längd, rygg | Omkrets höft | Art.nr        |
|---------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| XS      | 36 cm     | 37 - 44 cm  | 66-76 cm     | LMB-POSTEO-XS |
| S       | 43 cm     | 44 - 51 cm  | 76-86 cm     | LMB-POSTEO-SM |
| M       | 49 cm     | 49 - 56 cm  | 86-96 cm     | LMB-POSTEO-MD |
| L       | 56 cm     | 55 - 61 cm  | 96-106 cm    | LMB-POSTEO-LG |

### TILLBEHÖR/TILLVAL

| Beskrivning  | Art.nr           |
|--------------|------------------|
| Rempolstring | LMB-POSTEO ST PD |

### STORLEK

Observera att Miami Lumbar Posteo har ett universellt ländbälte som kan kapas till lämplig storlek.

| Omkrets midja | Storlek bälte |
|---------------|---------------|
| 66 - 76 cm    | XS            |
| 76 - 86 cm    | S             |
| 86 - 96 cm    | M             |
| 96 - 106 cm   | L             |
| 106 - 116 cm  | XL            |

| Omkrets midja | Storlek bälte |
|---------------|---------------|
| 116 - 127 cm  | 2XL           |
| 127 - 137 cm  | 3XL           |
| 137 - 147 cm  | 4XL           |
| 147 - 157 cm  | 5XL           |
| 157 - 167 cm  | 6XL           |

# MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE

## INDIKATIONER

- Post-operativ
- Post-trauma

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Lättviktsram i aluminium
- Aluminiumbyglar med mjuk polstring för bästa komfort
- Bröstbygelns vinkel kan enkelt justeras för att optimalt ligga an mot sternum (tandad skiva för vinkeljustering i steg om 5°)
- Den thorakolumbala pelotten kan anläggas antingen vertikalt eller horisontalt
- Den unika, fjädrande bäckenbygel följ hela tiden patientens växlingar mellan stående och sittande – bygel rör sig, inte ortosen, och säkerställer därmed ortosens funktion
- Glidspänne i stål
- Polstrad bäckenbygel, kan fixeras



## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets höft

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek  | Omkrets höft | Min/Max längd | Art.nr   |
|----------|--------------|---------------|----------|
| S        | 60 - 75 cm   | 40 - 44 cm    | MP45/S   |
| M        | 79 - 90 cm   | 43 - 47 cm    | MP45/M   |
| L        | 90 - 105 cm  | 47 - 51 cm    | MP45/L   |
| L/Short  | 90 - 105 cm  | 43 - 47 cm    | MP45/LS  |
| XL       | 105 - 115 cm | 50 - 54 cm    | MP45/XL  |
| XL/Short | 105 - 115 cm | 47 - 51 cm    | MP45/XLS |

## FORMFIT® PRO BACK

Össur Formfit® Pro Back ger lindring till personer som lider av smärta och sträckningar i ländryggen. Våra bälten tillverkas med vår dynamiska 3D MotionTech™-vävteknik, och är därför överlägsna när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga. I den patenterade ryggpaneldesignen används vår StayBilizer™-teknik som ger optimal följsamhet och passform, och smart placerade fingeröglor gör det enkelt att ta på sig dem. SmartPad™ ger punktstöd och vaddering, och kan tas bort om så önskas.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

### INDIKATIONER

Ländryggstillstånd som kan förbättras av kompression och begränsning av stora rörelser, t.ex.:

- Smärta i ländryggen (lumbago)
- Lumbosakral stukning/sträckning
- Degenerativ ledsjukdom


### KONTRAINDIKATIONER

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- Löstagbar SmartPad™ i ländryggen för punktstöd och vaddering
- Lätta, formbara stöd i aluminium formas efter ländrygge

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

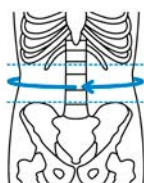

Mät omkretsen runt bälten mitt emellan de nedersta revbenen och höftbenskammen. Stående.

### BESTÄLLNINGSGRUPP

#### SVART

| Storlek | Art.nr.  | Omkrets midja |
|---------|----------|---------------|
| XS      | FP500001 | 70 - 80 cm    |
| S       | FP500002 | 80 - 90 cm    |
| M       | FP500003 | 90 - 100 cm   |
| L       | FP500004 | 100 - 115 cm  |
| XL      | FP500005 | 115 - 130 cm  |

## FORMFIT® BACK SUPPORT AIR

Formfit Back Support Air ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen. Det integrerade luftsystemet är intuitivt och behändigt placerat så att justeringar kan göras då kroppens påfrestningar förändras under dagen. Omlottdesignen förbättrar kompressionen samtidigt som slitstarka fingeröglor gör det lätt att sätta på ortosen. Formfit Back Support är tillverkat av ett ventilerande material och ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen.

### INDIKATIONER

Ländryggstillstånd som kan förbättras av begränsning av stora rörelser, till exempel:

- Muskulär ryggsmärta
- Lumbosakrala sträckningar
- Kronisk ländryggssmärta
- Ischias

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Luftsystem med låg profil som är lätt att använda
- Nätpaneler och ventilationshål ökar ventilationsförmågan och förbättrar komforten
- Överlappande dubbla dragband ger extra stöd för ländryggen och buken
- Flexibla fjädrar ger optimalt stöd för ländryggen och buken
- Gripband förhindrar glidning
- Justerbar luftblåsa ger anpassad passform och fokuserad kompression för ländryggen

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets midja | Art.nr. |
|---------|---------------|---------|
| S       | 63 - 76 cm    | 209133  |
| M       | 76 - 86 cm    | 209135  |
| L       | 86 - 97 cm    | 209137  |
| XL      | 97 - 107 cm   | 209138  |
| XXL     | 107 - 142 cm  | 209139  |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning              | Art.nr. |
|--------------------------|---------|
| Hot/Cold Therapy Gel pad | GB28    |

## FORMFIT® BACK SUPPORT

Formfit Back Support är tillverkat av material med ventilationsförmåga och ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen. Omlottdesignen förbättrar kompressionen samtidigt som de slitstarka fingeröglorna gör det lätt att sätta på ortosen.

### INDIKATIONER

- Muskulär ryggsmärta
- Lumbosakrala sträckningar
- Kronisk ryggsmärta
- Ischias

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antiglidsystem som reducerar ortosrörelse
- Dubbla överlappande dragband för förbättrad kompression
- Ortosen har insydda handtag för enklare påtagning
- Behandlingen kan kompletteras med värmande/kylande effekt, se tillbehör

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets midja | Art.nr. |
|---------|---------------|---------|
| S       | 64 - 76 cm    | 209143  |
| M       | 76 - 86 cm    | 209145  |
| L       | 86 - 97 cm    | 209147  |
| XL      | 97 - 107 cm   | 209148  |
| XXL     | 107 - 142 cm  | 209149  |
| XXXL    | 142 - 152 cm  | 209151  |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning              | Art.nr. |
|--------------------------|---------|
| Hot/Cold Therapy Gel Pad | GB28    |

## ORTOSLINNE

Kan användas för alla typer av spinala ortoser, body jackets etc. Tillverkad i rundstickad Coolmax/Lycra (vitt) och X-Static/Lycra (grått), helt utan sömmar, vilket tillsammans garanterar hög komfort och god passform. Båda dessa material från Knit-Rite ger effektiv bekämpning av dålig lukt och bakterier. Elasticiteten gör att linnet följer kroppens konturer effektivt och veckar sig minimalt.

- Alla modeller är fria från latex.
- Finns både med v-hals och rund halsringning, med och utan vingar.
- Finns nu även i ny, tunnare Lightweight variant i både vitt och silver/X-Static.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



Ortoslinne, rundad hals #352952

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### ORTOSLINNE, RUNDAD HALS

| Storlek | Omkrets Midja | Längd | VIT     |          | SILVER  |          |
|---------|---------------|-------|---------|----------|---------|----------|
|         |               |       | Coolmax | X-Static | Coolmax | X-Static |
| S       | 35 - 45 cm    | 40 cm | 352952  | 352992   |         |          |
| M       | 45 - 60 cm    | 45 cm | 352953  | 352993   |         |          |
| L       | 55 - 75 cm    | 50 cm | 352954  | 352994   |         |          |
| XL      | 65 - 95 cm    | 60 cm | 352955  | 352995   |         |          |

### ORTOSLINNE MED VINGAR, V-HALS

| Storlek | Omkrets Midja | Längd | VIT     |          | SILVER  |          |
|---------|---------------|-------|---------|----------|---------|----------|
|         |               |       | Coolmax | X-Static | Coolmax | X-Static |
| S       | 35 - 45 cm    | 40 cm | 352972  | 352942   |         |          |
| M       | 45 - 60 cm    | 45 cm | 352973  | 352943   |         |          |
| L       | 55 - 75 cm    | 50 cm | 352974  | 352944   |         |          |
| XL      | 65 - 95 cm    | 60 cm | 352975  | 352945   |         |          |

### ORTOSLINNE LIGHTWEIGHT, V-HALS

| Storlek | Omkrets Midja | Längd | VIT     |          | SILVER  |          |
|---------|---------------|-------|---------|----------|---------|----------|
|         |               |       | Coolmax | X-Static | Coolmax | X-Static |
| S       | 35 - 45 cm    | 40 cm | 352922  | 352932   |         |          |
| M       | 45 - 60 cm    | 45 cm | 352923  | 352933   |         |          |
| L       | 55 - 75 cm    | 50 cm | 352924  | 352934   |         |          |
| XL      | 65 - 95 cm    | 60 cm | 352925  | 352935   |         |          |



Ortoslinne med vingar #352972



HÖFT

---

HÖFT  
BRACING & SUPPORT



## REBOUND® HIP

Låg profil och lätt konstruktion som ger patientkomfort och skapar förutsättningar för hög compliance. Ortosen ger en kontrollerad kraft och effektiv, funktionell ROM-begränsning för både extension/flexion samt abduction/adduktion.



### INDIKATIONER

- I preventivt syfte när det finns risk för höftdislokation
- Konventionell behandling efter dislokation/reduktion
- Postoperativt efter (total) höftartroplastik
- Postoperativt efter (total) höftartroplastikrevision
- Postoperativ höftartroskopi
- Postoperativt efter artroskopi för impingement i höften (FAI, femoroacetabular impingement)
- Postoperativt efter operation av gluteus maximus
- Postoperativt efter operation av hamstringsmusklerna
- Inoperabla höftabnormiteter



**Video:** Rebound Hip -  
Clinician Fitting Instructions  
Modifications (5 min 26 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ortos med låg profil och låg vikt som ger följsamhet och patientkomfort.
- Snabbblås för enkel justering av rörligheten för optimal återhämtning efter operation.
- Enkelt att anpassa längden med teleskopfunktion på ramen.
- Justerbar ROM-led ger adduktion/abduktion från 0° till 10°, 20° eller 30° (tillval)

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vid höftbenskammen
- Avstånd från trochanter major till mitten av patella

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### REBOUND HIP

| Beskrivning                       | Vänster  | Höger    |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Rebound Hip                       | 980130RB | 980135RB |
| Rebound Hip med justerbar ROM-led | 980120RB | 980125RB |

Ram, Polstring: Universal anpassning till 122 cm höftomkrets

# REBOUND® HIP

## TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                    | Art.nr.     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Bältesförlängare (anpassningsbar för 122 - 170 cm höftomkrets) | 980121RB    |
| Rotationsrem                                                   | RHK-100024  |
| Inpassningsverktyg                                             | B-040100000 |

## UNLOADER® HIP

Unloader Hip är utformad för att minska smärta genom optimerad avlastning och proprioceptiv kontroll för patienter med mild till måttlig artros i höftleden. Bidrar till större stabiliteten i höften och förbättrar rörligheten.



### INDIKATIONER

- Mild till måttlig artros i höftleden
- Tillstånd där patienten har nytta av korrigering av höftens position och/eller kompression kring trochanter major.



**Video:** Unloader Hip - Clinician Fitting Instructions (5 min 59 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamic Rotation Straps-remmarna med SmartDosing-ratt ger användaren möjlighet att justera den externa rotationskraften individuellt för optimal smärtlindring
- Lätt att ta på och av tack vare smart fastsättningssystem och blixtlås
- Kompressionssystemet förbättrar proprioceptionen och känslan av säkerhet
- Andas och har bra passform tack vare lycra av bästa kvalitet


### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Höftomkretsen vid främre övre tarmbenskammen. Se ritning.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### UNLOADER HIP

| Storlek | Höftomkrets  | Kvinnor     | Män         |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| S       | 80 - 88 cm   | B-465350030 | B-465350031 |
| M       | 88 - 96 cm   | B-465350032 | B-465350033 |
| L       | 96 - 104 cm  | B-465350034 | B-465350035 |
| XL      | 104 - 114 cm | B-465350036 | B-465350037 |
| XXL     | 114 - 124 cm | B-465350038 | B-465350039 |

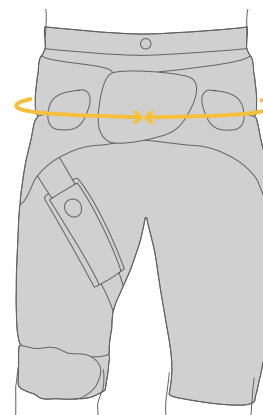

\*Mät höftomkretsen vid främre övre tarmbenskammen.

# UNLOADER® HIP

## TILLBEHÖR/TILLVAL

### UTBYTES BYXOR

| Beskrivning                       | Art.nr.     |
|-----------------------------------|-------------|
| Unloader Hip Men's S Trousers     | B-465350078 |
| Unloader Hip Men's M Trousers     | B-465350080 |
| Unloader Hip Men's L Trousers     | B-465350082 |
| Unloader Hip Men's XL Trousers    | B-465350084 |
| Unloader Hip Men's XXL Trousers   | B-465350086 |
| Unloader Hip Women's S Trousers   | B-465350077 |
| Unloader Hip Women's M Trousers   | B-465350079 |
| Unloader Hip Women's L Trousers   | B-465350081 |
| Unloader Hip Women's XL Trousers  | B-465350083 |
| Unloader Hip Women's XXL Trousers | B-465350085 |

## ÖVRIGA TILLBEHÖR

| Beskrivning         | Art.nr.     |
|---------------------|-------------|
| Rotation strap kit  | B-465350064 |
| Washbag kit         | B-465350065 |
| Trochanter pad kit  | B-465350066 |
| Thigh strap kit S   | B-465350067 |
| Thigh strap kit M   | B-465350068 |
| Thigh strap kit L   | B-465350069 |
| Thigh strap kit XL  | B-465350070 |
| Thigh strap kit XXL | B-465350071 |
| Bilateral kit S     | B-465350072 |
| Bilateral kit M     | B-465350073 |
| Bilateral kit L     | B-465350074 |
| Bilateral kit XL    | B-465350075 |
| Bilateral kit XXL   | B-465350076 |





## AXEL, ARM & HAND

---

AXEL, ARM & HAND  
BRACING & SUPPORT





## FORMFIT® SHOULDER

FormFit Shoulder är en axelortos som är utformad för att ge immobilisering efter axelskada eller axel-operation. Den smidiga designen och goda andnings-förmåga ger överlägsen komfort samtidigt som ortosen är enkel att använda. Precis som föregångaren SmartSling®, ger Formfit Shoulder abduction (när abduktionskudden används) eller utåtrotation (när utåtrationskudden används) av axeln.

Armhålekudden (finns som tillval) fördelar vikten över en större yta och minskar trycket mot armbågsnerven.

### INDIKATIONER

- Efter reparation av rotatorkuffskador
- Efter Bankartoperation
- Efter kapselplastik
- Efter glenohumeral dislokation/subluxation
- Efter sträckning/reparation av skada i mjukdelar
- Instabilitet/skada i axeln
- Postkirurgisk rehabilitering

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Snabblås
- Avlastningsrem
- Tumögla i universalmodell

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mått från olekranon till änden av den slutna näven



Formfit Shoulder

Armhålekudde



**Video:** Formfit Shoulder  
Brace with Abduction -  
Clinician Fitting Instructions  
(1 min 31 sec)

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### FORMFIT® SHOULDER (MED ABDUKTIONSKUDDE)

| Storlek | Mått från olekranon till änden av den slutna näven | Art.nr. |
|---------|----------------------------------------------------|---------|
| S       | upp till 29 cm                                     | SSS     |
| Regular | 29 - 40 cm                                         | SSR     |
| L       | 40 - 44,5 cm                                       | SSL     |

### FORMFIT® SHOULDER (UTAN ABDUKTIONSKUDDE)

| Storlek | Mått från olekranon till änden av den slutna näven | Art.nr. |
|---------|----------------------------------------------------|---------|
| S       | upp till 29 cm                                     | SSS-SO  |
| Regular | 29 - 40 cm                                         | SSR-SO  |
| L       | 40 - 44,5 cm                                       | SSL-SO  |

## TILLBEHÖR

### UTÅTROTATIONSKIT

| Storlek | Längd          | Art.nr. |
|---------|----------------|---------|
| S       | upp till 29 cm | SSS-ER  |
| M       | 29 - 40 cm     | SSR-ER  |
| L       | 40 - 44,5 cm   | SSL-ER  |

| Beskrivning  | Art.nr. |
|--------------|---------|
| Armhålekudde | SSAXP   |

## PREMIUM SHOULDER IMMOBILIZER

### INDIKATIONER

- Efter skador och postoperativt i axel/skuldra

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kontrollerar effektivt abduktion och rotation
- Humerusmanchett, handledsmanchett och axelband kan placeras i önskat läge för maximal komfort och passform

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Beskrivning                     | Art.nr. |
|---------------------------------|---------|
| Premium Shoulder Immobiliser    | 0380    |
| Premium Shoulder Immobiliser XL | 0380XL  |

## AXELLÅS

### INDIKATIONER

- Efter skador eller postoperativt i axel/skuldra

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Humerusmanchett, handledsmanchett och axelband kan placeras i önskat läge för maximal komfort och passform.
- Kontrollerar effektivt abduktion och rotation.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt bröstet.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets runt bröstet | Art.nr. |
|---------|----------------------|---------|
| S       | 60 - 80 cm           | 4097-03 |
| M       | 80 - 110 cm          | 4097-05 |
| L       | 110 - 140 cm         | 4097-07 |

## AXELLÅS TVÅDELAD

### INDIKATIONER

- Skulderskador
- Postoperativt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Bekväm ortos för patienter som ska ha armen intill kroppen

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mått tas runt bröstet inkl. överarm



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Mått tas runt bröstet inkl. överarmen | Art.nr. |
|---------|---------------------------------------|---------|
| S       | 60 - 80 cm                            | 4096-03 |
| M       | 80 - 95 cm                            | 4096-05 |
| L       | 95 - 115 cm                           | 4096-07 |
| XL      | 115 - 145 cm                          | 4096-08 |

## FRONT CLOSURE CLAVICLE SUPPORT

### INDIKATIONER

- Nyckelbensfrakturer och dislokationer
- Hållningsstöd
- Skador i mjukdelar

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Fastsättning framtill för enkel på-/avtagning

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt bröstet



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets bröstorg | Art.nr. |
|---------|------------------|---------|
| XS      | 51 - 61 cm       | 205032  |
| S       | 61 - 76 cm       | 205033  |
| M       | 76 - 91 cm       | 205035  |
| L       | 91 - 107 cm      | 205037  |
| XL      | 107 - 122 cm     | 205038  |
| XXL     | 122 - 137 cm     | 205039  |

## FORMFIT® PRO ELBOW

Össur Formfit® Pro Elbow ger lindring vid smärta i armbågen. Den här kompressiva 3D-armbågsleeven tillverkas med vår MotionTech™-teknik och har två integrerade SmartPads™ vid armbågen för punktstöd och vaddering. RadialStrap™ ger ytterligare kompression och stöd.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

### INDIKATIONER

Armbågsbesvär som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Smärta och svullnad i armbågen
- Medial och lateral epikondylit (golfarmbåge respektive tennisarmbåge)


### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3D MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- SmartPads™ vid armbågen för punktstöd och vaddering
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och mer säker applicering
- RadialStrap™ för extra kompression och stöd

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

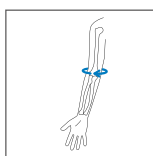

Mät armens omkrets exakt där armbågen är. Armbågen skall vara i full sträckning.

### BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek | Omkrets armbåge | Art.nr.  |
|---------|-----------------|----------|
| XS      | 17 - 20 cm      | FP300001 |
| S       | 20 - 23 cm      | FP300002 |
| M       | 23 - 26 cm      | FP300003 |
| L       | 26 - 29 cm      | FP300004 |
| XL      | 29 - 32 cm      | FP300005 |



## REBOUND® POST-OP ELBOW

Rebound® Post-Op Elbow kombinerar intuitiva funktioner för ortopedingenjörer och användare med en design som syftar till att förbättra den post-operativa upplevelsen. Genom att kombinera drop-lock leden och fyra teleskopiska manchetter, kan individuella post-op-protokoll lätt följas. Rebound Post-Op Elbow är användarvänlig och lättast i sitt slag. Ortosen finns i höger/vänster passform med formbara stabiliserande manchetter. De blå inställningspunkterna är till för att förenkla hanteringen för patienterna.



### INDIKATIONER

Indikationer som kräver immobilisering av armbågen och/eller begränsning av rörelseomfånget. Detta kan omfatta:

- Stabila frakturer i armbågen, distala humerus, proximala radius eller ulna
- Sen- och ligamentskador eller -kirurgi
- Rekonstruktion av kollateralligament
- Hyperextension i armbågen
- Tricepssenekirurgi
- Kroniska armbågsskador
- Lindring vid tennisarmbåge

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Konstruerad till att vara den lättaste ortosen på marknaden
- Teleskopiska paddlar kan flyttas efter individuell längd så att operationsområdena hålls fria
- Enkel inlärning för användare med intuitiva inställningspunkter för patienten, inklusive Blue is You™-spännen och numrerat remsystem
- Drop-Lock-gångjärn ger ett säkert rörelseomfång med stötdämpande dragjusteringsstopp och valfri ROM-låsningsfunktion
- Formbara stabilitetsmanschetter konstruerade för individuell anpassning som ger bättre passform och stöd
- Bandguiderna bibehåller bandplaceringen för extra säkerhet och komfort
- Universell passform för både vänster/höger armbåge

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal, en storlek

# REBOUND® POST-OP ELBOW

## BESTÄLLNINGSGINFORMATION

| Sida    | Art.nr.   |
|---------|-----------|
| Vänster | B-8391680 |
| Höger   | B-8391580 |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning             | Art.nr.   |
|-------------------------|-----------|
| Elbow Wrist Control Kit | B-8390003 |
| Elbow ROM Locks Kit     | B-8390005 |

## RESERVDELAR

| Beskrivning               | Art.nr.   |
|---------------------------|-----------|
| Elbow Liner Kit           | B-8390002 |
| Elbow Sling Kit           | B-8390004 |
| Strap Tab Kit             | B-8390006 |
| Adhesive Hook Sticker Kit | B-8390007 |
| Anti-Migration Pad Kit    | B-8390008 |
| Elbow Strap Kit           | B-8390009 |



## FORMFIT® TENNIS ELBOW

Formfit Tennis Elbow är tillverkad av patenterad, ergonomiskt formad plast. Det finns dubbla blå kuddar med räfflad yta på var sida som minskar sendrag. Design och material med slitstyrka möjliggör dagligt bruk för både arbete och idrottsaktiviteter.

### INDIKATIONER

- Tennisarmbåge
- Förebyggande vid arbete, vardagsliv och idrott
- Golfarmbåge

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar rem
- Patenterad ergonomiskt formad plast eliminerar behovet av kompressor i samband med traditionella utformningar.
- Dubbla blå kuddar ger motvikt och minskar sendrag och därmed inflammation
- Ribbed surfaces reduce vibration to the tendon, increasing comfort
- Räfflade ytor minskar vibration mot ligament och ger ökad komfort

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Armbågens omkrets



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets    | Art.nr.     |
|---------|------------|-------------|
| S       | 22 - 26 cm | B-247000002 |
| M       | 27 - 32 cm | B-247000003 |
| L       | 33 - 38 cm | B-247000004 |

## FORMFIT® PRO WRIST

Össur Formfit Pro Wrist är stickad med 3D MotionTech™-teknik. Passar bra för skador som har fördel av kompression. Formbara skenor i aluminium kan anpassas för att följa handledens anatomi. CoolVent™-teknik vid tumbasen för bättre ventilation och komfort.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



FoldLock™



### INDIKATIONER

Handledsbesvär som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Reumatoid artrit (RA) och andra kroniska smärttillstånd
- Stukningar och sträckningar av handleden
- Överbelastning och smärta
- Handledstendinit


### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform har visat sig vara överlägsen när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga, så att användaren hålls sval under användning.
- Formbar skena i aluminium för individuell anpassning
- CoolVent™-teknik vid tumbasen för god ventilation och komfort

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

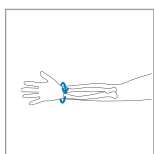

Omkretsmått vid handledens bas vid neutral sträckning (0° flexion).

### BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek | Omkrets vrist | Vänster  | Höger    |
|---------|---------------|----------|----------|
| XS      | 14 - 15 cm    | FP400201 | FP400101 |
| S       | 15 - 16 cm    | FP400202 | FP400102 |
| M       | 16 - 17 cm    | FP400203 | FP400103 |
| L       | 17 - 18 cm    | FP400204 | FP400104 |
| XL      | 18 - 19 cm    | FP400205 | FP400105 |
| XXL     | 19 - 20 cm    | FP400206 | FP400106 |



## SPECTRA HANDLEDSORTOS

Ett stabilt och mycket behagligt handledsstöd som är lätt att ta av och på. Spectra är tillverkad i ett moccamaterial med ett mjukt tygfoder. Enkel snörning med ett avslutande kardborreband som även stabiliserar handleden. Spectra har aluminiumska placerad dorsalt och volart.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar
- Behandling efter borttagning av gips

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Remmar med kardborrfäste
- Justerbar volar för finjustering vid behov

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Storlek | Omkrets handled | Vänster | Höger   |
|---------|-----------------|---------|---------|
| XS      | 12 - 14 cm      | 6602210 | 6602315 |
| S       | 14 - 16 cm      | 6602422 | 6602535 |
| M       | 16 - 18 cm      | 6602624 | 6602734 |
| L       | 18 - 20 cm      | 6602755 | 6602793 |
| XL      | 20 - 22 cm      | 6602826 | 6602932 |

## FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM

Formfit Wrist och Formfit Wrist & Forearm ger immobilisering och skydd för patienter med tendinit eller vissa typer av skador i mjukdelar, stukningar och sträckningar. Ortosen kan användas vid behandling efter borttagning av gips. Lätt material som andas och anatomiskt anpassad passform gör den här bekväma produkten till ett bra val.



### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Behandling efter borttagning av gips
- Skador i mjukdelar

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Anatomiskt anpassad passform
- Remmar med kardborrfäste
- Anpassningsbara stödskenor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### FORMFIT WRIST & FOREARM

| Storlek | Omkrets handled | Vänster | Höger  | Vänster | Höger  |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
|         |                 | 20 cm   |        | 25 cm   |        |
| XS      | 13 - 16 cm      | 317082  | 317072 | 617082  | 617072 |
| S       | 16 - 18,5 cm    | 317083  | 317073 | 617083  | 617073 |
| M       | 18,5 - 20,5 cm  | 317085  | 317075 | 617085  | 617075 |
| L       | 20,5 - 23,5 cm  | 317087  | 317077 | 617087  | 617077 |
| XL      | 23,5 - 25,5 cm  | 317088  | 317078 | 617088  | 617078 |

## TILLBEHÖR

### GELKUDDE FÖR VÄRME-/KYLBEHANDLING

| Storlek  | Vänster | Höger |
|----------|---------|-------|
| XS, S    | GB20L   | GB20R |
| M, L, XL | GB22L   | GB22R |



\* Fits XS/S. For M-XL, please use Form Forearm 10" part numbers



## FORMFIT® UNIVERSAL WRIST & THUMB

Formfit Universal handleds- och tumprodukter är utformade för att begränsa rörligheten i handled och tumme. Den ger immobilisering och skydd mot vissa mjukvävnadsskador samt lindriga till måttliga stukningar och sträckningar, inklusive skidåkartumme och läkning efter gipsbehandling. Den lätta universella designen innebär också lägre lagernivå.

### INDIKATIONER

- Lindriga till måttliga stukningar och sträckningar
- Seninflammation
- Läkning efter gipsbehandling
- Andra mjukvävnadsskador

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Quick-Pull-fästremmar
- Lägesbetingad dorsalskena
- Anpassningsbar tumskena
- Formbar palmarskena

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



## BESTÄLLNINGSGRUPP

### FORMFIT WRIST

| Storlek      | Omkrets handled | Vänster     | Höger       |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Paediatric   | 9 - 13 cm       | B-252603301 | B-252603300 |
| 8" Universal | 11 - 24 cm      | B-252603109 | B-252503109 |
| 8" XL        | 19 - 28 cm      | B-252603106 | B-252603105 |

### FORMFIT WRIST & FOREARM UNIVERSAL

| Storlek       | Omkrets handled | Vänster     | Höger       |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 10" Universal | 11 - 24 cm      | B-252603210 | B-252603209 |

### FORMFIT THUMB SPICA UNIVERSAL

| Storlek      | Omkrets handled | Vänster     | Höger       |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Paediatric   | 9 - 13 cm       | B-253603301 | B-253603300 |
| 8" Universal | 11 - 24 cm      | B-253603109 | B-253503109 |
| 8" XL        | 19 - 28 cm      | B-253603106 | B-253603105 |

## FORMFIT® TUMORTOS

Formfit® tumortos är utformad för att begränsa rörligheten i handled och tumme. Den ger immobilisering och skydd för patienter med tendinit (t.ex. Morbus de Quervain), skador i mjukdelar samt medelsvåra stukningar och sträckningar. Ortosen kan användas vid behandling efter borttagning av gips. Lätt material som andas och anatomiskt passform gör den här bekväma produkten till ett bra val.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit t.ex. Morbus de Quervain
- Behandling efter borttagning av gips
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar t.ex. skada på tummens ulnara kollateralligament

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Anatomiskt passform
- Remmar med kardborrfäste
- Anpassningsbara stödskenor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

Längd: 20 cm.



## BESTÄLLNINGSGENOMFÖRNING

| Storlek | Omkrets handled | Vänster | Höger |
|---------|-----------------|---------|-------|
| XS      | 13 - 16 cm      | 3020    | 3120  |
| S       | 16 - 18,5 cm    | 3030    | 3130  |
| M       | 18,5 - 20,5 cm  | 3050    | 3150  |
| L       | 20,5 - 23,5 cm  | 3070    | 3170  |
| XL      | 23,5 - 25,5 cm  | 3080    | 3180  |

## TILLBEHÖR

### GELKUDDE FÖR VÄRME-/KYLBEHANDLING

| Storlek                     | Vänster | Höger |
|-----------------------------|---------|-------|
| Avsedd för storlek XS, S    | GB20L   | GB20R |
| Avsedd för storlek M, L, XL | GB22L   | GB22R |



## FORMFIT® BARNORTOS

Formfit Universal Wrist & Thumb-produkterna har utformats för att begränsa rörligheten för handled och tumme. De ger god immobilisering av handled och tumme vilket gör produkterna till ett bra val för rehabilitering och läkning av handleds- och tumskador, för skydd vid vissa typer av skador i mjukdelar, lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar, skador på tummens ulnara kollateralligament samt för läkning efter gipsbehandling. Den lätta universaldesignen underlättar också din lagerhållning.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Behandling efter borttagning av gips
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar
- Formbar handskena

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Quick-Pull-fästremmar
- Positionell dorsal stödskena
- Anpassningsbar tumskena

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster     | Höger       | Beskrivning           | Omkrets handled |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| B-252603301 | B-252603300 | Formfit handledsortos | 9 - 12 cm       |
| B-253603301 | B-253603300 | Formfit tumortos      | 9 - 12 cm       |

## LYCRAFLEECE BARNORTOS

Behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece. Formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

LycraFleece är tillverkat av polyester, nylon och elastan.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster  | Höger    | Storlek | Omkrets handled |
|----------|----------|---------|-----------------|
| 3510C-12 | 3510C-22 | XS      | 8 - 10 cm       |
| 3510C-13 | 3510C-23 | S       | 10 - 12 cm      |
| 3510C-15 | 3510C-25 | M       | 12 - 14 cm      |
| 3510C-17 | 3510C-27 | L       | 14 - 16 cm      |



## EXOFORM® HANDLEDSORTOS

### INDIKATIONER

- Karpaltunnelsyndrom
- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Behandling efter bort tagning av gips
- Tendinit, Bursit
- Reumatoid artrit/Osteoartrit

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt utformat foder för bästa passform och komfort.
- Styva plaststöd på ovan- och undersida följer handens och handledens anatomi och ger ytterligare stöd och



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

| Vänster | Höger  | Storlek | Omkrets handled |
|---------|--------|---------|-----------------|
| 507082  | 507072 | XS      | 13 - 16 cm      |
| 507083  | 507073 | S       | 16 - 18,5 cm    |
| 507085  | 507075 | M       | 18,5 - 20,5 cm  |
| 507087  | 507077 | L       | 20,5 - 23,5 cm  |
| 507088  | 507078 | XL      | 23,5 - 25,5 cm  |

## EXOFORM® CTS HANDLEDSORTOS

### INDIKATIONER

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendinit

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mer rum vid tumbas, palmarveck och 5:e MP för full
- MP-flexion.
- Anatomiskt korrekt utformad, låg profil.
- Avsedd att ge ett mjukt, kontrollerat motstånd vid rörelser i extremlägen.
- Ger avlastning av radius och styloideus ulna.
- Insidan är 3D-gjuten för bästa komfort.
- Fabriksjusterad i neutralt läge för bekväm begränsning av rörelse/flexibilitet.



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled, runt handflata

| Vänster | Höger  | Storlek | Omkrets handled | Omkrets runt handflata |
|---------|--------|---------|-----------------|------------------------|
| 517083  | 517073 | S       | 13 - 16,5 cm    | 17 - 20,5 cm           |
| 517085  | 517075 | M       | 16,5 - 19 cm    | 20,5 - 23,5 cm         |
| 517087  | 517077 | L       | 19 - 25,5 cm    | 23,5 - 26 cm           |

## ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE & SVART

Kort handledsbandage i behaglig resår med markerad midja och utan skena. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige
- TB302-40, Extraband 5 cm, SVART

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3105-12 | 3105-22 | XS      | 12 - 14 cm      | Beige |
| 3105-13 | 3105-23 | S       | 14 - 16 cm      | Beige |
| 3105-15 | 3105-25 | M       | 16 - 18 cm      | Beige |
| 3105-17 | 3105-27 | L       | 18 - 20 cm      | Beige |
| 3105-18 | 3105-28 | XL      | 20 - 22 cm      | Beige |

### ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT SVART

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3105-32 | 3105-42 | XS      | 12 - 14 cm      | Svart |
| 3105-33 | 3105-43 | S       | 14 - 16 cm      | Svart |
| 3105-35 | 3105-45 | M       | 16 - 18 cm      | Svart |
| 3105-37 | 3105-47 | L       | 18 - 20 cm      | Svart |
| 3105-38 | 3105-48 | XL      | 20 - 22 cm      | Svart |

## LYCRAFLEECE HANDLEDSORTOS

Behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece. Formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

LycraFleece är tillverkat av polyester, nylon och elastan.

### TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 3510-32 | 3510-42 | XS      | 12 - 14 cm      |
| 3510-33 | 3510-43 | S       | 14 - 16 cm      |
| 3510-35 | 3510-45 | M       | 16 - 18 cm      |
| 3510-37 | 3510-47 | L       | 18 - 20 cm      |
| 3510-38 | 3510-48 | XL      | 20 - 22 cm      |

## ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE & SVART

Handledsortos i behaglig resår med formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning på hand-ryggen och reglerbart tumgrepp.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige
- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3110-12 | 3110-22 | XS      | 12 - 14 cm      | Beige |
| 3110-13 | 3110-23 | S       | 14 - 16 cm      | Beige |
| 3110-15 | 3110-25 | M       | 16 - 18 cm      | Beige |
| 3110-17 | 3110-27 | L       | 18 - 20 cm      | Beige |
| 3110-18 | 3110-28 | XL      | 20 - 22 cm      | Beige |
| 3110-19 | 3110-29 | XXL     | 22 - 24 cm      | Beige |

### ALFA HANDLEDSORTOS SVART

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3110-32 | 3110-42 | XS      | 12 - 14 cm      | Svart |
| 3110-33 | 3110-43 | S       | 14 - 16 cm      | Svart |
| 3110-35 | 3110-45 | M       | 16 - 18 cm      | Svart |
| 3110-37 | 3110-47 | L       | 18 - 20 cm      | Svart |
| 3110-38 | 3110-48 | XL      | 20 - 22 cm      | Svart |
| 3110-39 | 3110-49 | XXL     | 22 - 24 cm      | Svart |

*Tips! Tvättråd för våra ortoser finns i slutet av katalogen.*

## ALFA HANDLEDSORTOS WIDE BEIGE

Samma utförande som art.nr 3110 men utvidgad proximalt för patienter med kraftiga underarmar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, 5 cm, beige

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



#3110 Normal

#3110W Wide/bred

| Vänster  | Höger    | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|----------|----------|---------|-----------------|-------|
| 3110W-12 | 3110W-22 | XS      | 12 - 14 cm      | Beige |
| 3110W-13 | 3110W-23 | S       | 14 - 16 cm      | Beige |
| 3110W-15 | 3110W-25 | M       | 16 - 18 cm      | Beige |
| 3110W-17 | 3110W-27 | L       | 18 - 20 cm      | Beige |
| 3110W-18 | 3110W-28 | XL      | 20 - 22 cm      | Beige |

## ALFA HANDLEDSORTOS WIDE SVART

Samma utförande som art.nr 3110 men utvidgad proximalt för patienter med kraftiga underarmar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster  | Höger    | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|----------|----------|---------|-----------------|-------|
| 3110W-32 | 3110W-42 | XS      | 12 - 14 cm      | Svart |
| 3110W-33 | 3110W-43 | S       | 14 - 16 cm      | Svart |
| 3110W-35 | 3110W-45 | M       | 16 - 18 cm      | Svart |
| 3110W-37 | 3110W-47 | L       | 18 - 20 cm      | Svart |
| 3110W-38 | 3110W-48 | XL      | 20 - 22 cm      | Svart |

## ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR BEIGE

Handledsortos i behaglig resår med extra bred och stadig volar aluminiumskena. Högt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning med två breda och två smala kardborreband på handryggen och reglerbart tumgrepp. Stor tumöppning och bred handform.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 3116-12 | 3116-22 | XS      | 12 - 14 cm      |
| 3116-13 | 3116-23 | S       | 14 - 16 cm      |
| 3116-15 | 3116-25 | M       | 16 - 18 cm      |
| 3116-17 | 3116-27 | L       | 18 - 20 cm      |
| 3116-18 | 3116-28 | XL      | 20 - 22 cm      |

## ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR SVART

Handledsortos i behaglig resår med volar skena som är bred och extra stadig. Högt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning med två breda och två smala kardborreband på handryggen och reglerbart tumgrepp. Stor tumöppning och bred handform.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 3116-32 | 3116-42 | XS      | 12 - 14 cm      |
| 3116-33 | 3116-43 | S       | 14 - 16 cm      |
| 3116-35 | 3116-45 | M       | 16 - 18 cm      |
| 3116-37 | 3116-47 | L       | 18 - 20 cm      |
| 3116-38 | 3116-48 | XL      | 20 - 22 cm      |

## UNIVERSAL THUMB SPLINT

Kombinerad handled och tumskena för immobilisering av MCP och CMC led. Passar höger och vänster hand.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal

| Art.nr. | Beskrivning            |
|---------|------------------------|
| 30000   | Universal Thumb Splint |



## ALFA TUMORTOS BEIGE & SVART

Tumortos i behaglig resår med uttagbar tumskena. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA TUMORTOS II BEIGE

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3143-12 | 3143-22 | XS      | 12 - 14 cm      | Beige |
| 3143-13 | 3143-23 | S       | 14 - 16 cm      | Beige |
| 3143-15 | 3143-25 | M       | 16 - 18 cm      | Beige |
| 3143-17 | 3143-27 | L       | 18 - 20 cm      | Beige |
| 3143-18 | 3143-28 | XL      | 20 - 22 cm      | Beige |

### ALFA TUMORTOS II SVART

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3143-32 | 3143-42 | XS      | 12 - 14 cm      | Svart |
| 3143-33 | 3143-43 | S       | 14 - 16 cm      | Svart |
| 3143-35 | 3143-45 | M       | 16 - 18 cm      | Svart |
| 3143-37 | 3143-47 | L       | 18 - 20 cm      | Svart |
| 3143-38 | 3143-48 | XL      | 20 - 22 cm      | Svart |

## ALFA CMC TUMORTOS BEIGE & SVART

Tumortos i behaglig resår, modell utan skena. Stödjer och lyfter CMC från thenar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA CMC TUMORTOS BEIGE

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3145-12 | 3145-22 | XS      | 12 - 14 cm      | Beige |
| 3145-13 | 3145-23 | S       | 14 - 16 cm      | Beige |
| 3145-15 | 3145-25 | M       | 16 - 18 cm      | Beige |
| 3145-17 | 3145-27 | L       | 18 - 20 cm      | Beige |

### ALFA CMC TUMORTOS SVART

| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled | Färg  |
|---------|---------|---------|-----------------|-------|
| 3145-32 | 3145-42 | XS      | 12 - 14 cm      | Svart |
| 3145-33 | 3145-43 | S       | 14 - 16 cm      | Svart |
| 3145-35 | 3145-45 | M       | 16 - 18 cm      | Svart |
| 3145-37 | 3145-47 | L       | 18 - 20 cm      | Svart |

## AIR X TUMORTOS

En tumortos som ger justerbart stöd till tummens CMC-led. Ortosen är optimal vid behandling av osteoartrit och medial subluxation. Det justerbara bandet kan lindas runt CMC1- och MCP1-lederna.

Materialet Air X transporterar bort fukt och materialet andas, vilket minimerar risken för hudirritation.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster | Höger   | Storlek  | Omkrets handled |
|---------|---------|----------|-----------------|
| 3605-11 | 3605-21 | Spädbarn | 11 - 14 cm      |
| 3605-12 | 3605-22 | Barn     | 14 - 17 cm      |
| 3605-13 | 3605-23 | S        | 15 - 18 cm      |
| 3605-15 | 3605-25 | M        | 18 - 20 cm      |
| 3605-17 | 3605-27 | L        | 20 - 23 cm      |
| 3605-18 | 3605-28 | XL       | 23 - 25 cm      |



## LYCRAFLEECE TUMORTOS

Tumortos i behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece och med uttagbar tumskena. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led.

LycraFleece är tillverkad av polyester, nylon och elastan.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal



| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 3543-32 | 3543-42 | XS      | 12 - 14 cm      |
| 3543-33 | 3543-43 | S       | 14 - 16 cm      |
| 3543-35 | 3543-45 | M       | 16 - 18 cm      |
| 3543-37 | 3543-47 | L       | 18 - 20 cm      |
| 3543-38 | 3543-48 | XL      | 20 - 22 cm      |

## VENTOPRENE TUMORTOS

Tumortos i mjukt perforerad neoprene som ger värme och låter huden andas. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led. Har en uttagbar tumskena.

Tumortosen kan användas i våta miljöer som t. ex. vid bassängträning.

Tillverkad i perforerad neoprene klädd med polyester.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



| Vänster | Höger   | Storlek | Omkrets handled |
|---------|---------|---------|-----------------|
| 3743-12 | 3743-22 | XS      | 12 - 14 cm      |
| 3743-13 | 3743-23 | S       | 14 - 16 cm      |
| 3743-15 | 3743-25 | M       | 16 - 18 cm      |
| 3743-17 | 3743-27 | L       | 18 - 20 cm      |
| 3743-18 | 3743-28 | XL      | 20 - 22 cm      |



KNÄ





## UNLOADER® - FÖR ALLA GRADER AV OA

### UNLOADER - AVLASTANDE ORTOSER VID KNÄARTROS

Effektiva ortoser byggda på bevisad teknik som reducerar knäsmärta till följd av ensidig knäartros och som ofta kan fördröja tiden fram till kirurgiska ingrepp.



#### UNLOADER ONE®

- Måttlig till svår unikompartmentell knäartros
- Unikompartmentella knätillstånd som kräver avlastning, såsom vid broskskada, avaskulär nekros eller tibiaplatåfraktur



#### UNLOADER ONE® X

- Utöver de indikationer som gäller för Unloader One, kan Unloader One X även användas vid degenerativa meniskförändringar

### DEFINITION AV GRAD AV OA BASERAT PÅ RÖNTGENOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR



MILD OA



MÅTTLIG OA



SVÅR OA

Genom slätröntgen av knälederna graderar man hur mycket ledspringan har minskat (som ett tecken på att brosket blivit tunnare) och hur mycket benpålgringar (osteofyter) som kan ses. En av de vanligaste graderingarna som innefattar både ledspringevidden och benpålgringen utvecklades för cirka femtio år sedan av läkarna Kellgren och Lawrence i Manchester i England. Skalan går från 0-4 där fyra är en mer allvarlig ledpåverkan som kan vara aktuell för operation medan grad 1-2 är en lätt ledpåverkan som ofta har en god prognos.

## UNLOADER ONE<sup>®</sup> X

Unloader One X förbättrar rörligheten genom att ge smärtlindring vid knäartros, degenerativ meniskruptur och andra unikompartimentella knätillstånd som kan förbättras av avlastning.

Den har Össurs unika patenterade och kliniskt beprövade 3-punkts-hävtångssystem som ger unikompartimentell avlastning av knäleden.

Finns i anpassade och OTS-versioner för patienter med olika benskillnader.



### INDIKATIONER

- Måttlig till svår ensidig knäartros
- Degenerativa meniskrupturer
- Andra unikompartimentella knätillstånd som kan förbättras av avlastning, till exempel:
  - Rekonstruktion vid ledbroskskador
  - Meniskkirurgi
  - Osteonekros
  - Kondylära benmärgsskador
  - Tibiaplatåfrakturer

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3-punkts-hävtångssystem som består av två DFS-remmar, styvt skal och en enda upprätt led bidrar till en unikompartimentell avlastning av knäleden
- Verktygsfria SmartDosing<sup>®</sup>-rattar gör det möjligt för patienten att kontrollera sin smärtnivå genom att finjustera remspänningen
- Hudvänliga liners och kuddar samt en slät insida på skalen minskar risken för tryckpunkter. Vadmuskelremmen är placerad över den bredaste delen av vaden för att förhindra glidning
- Färgkodade inställningspunkter och Quick-Fit Buckles ökar användarvänligheten.
- Inpassningsguide på leden underlättar korrekt placering på benet
- En smal perforerad ram med mjuka kanter, följer enkelt individuella kroppsformer och förblir diskret, oavsett om den bärs över eller under kläder.
- Hela ortosen är tvättbar i maskin (tvättpåse medföljer)
- Kan servas på plats.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT: UNLOADER ONE X CUSTOM

För att ta mått för beställning av Unloader X Custom använd dig av: Smartmeasure

### SMARTMEASURE<sup>®</sup>


Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos




| Beskrivning                | Art.nr.     |
|----------------------------|-------------|
| SmartMeasure Measuring Kit | CMS0000     |
| Constant Force Caliper     | B-312000000 |

# UNLOADER ONE® X

## NÖDVÄNDIGA MÅTT: UNLOADER ONE X OTS

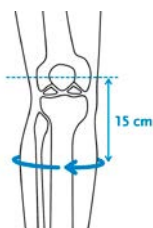

Mät benlängden från golv till ljumske.

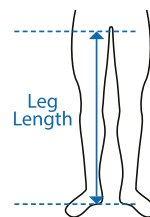

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.

| Storlek | Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella |
|---------|-------------------------------------------------|
| XS - M  | 25 - 43                                         |
| L - XL  | 43 - 62                                         |

| Modell   | Benlängd |
|----------|----------|
| Standard | > 85 cm  |
| Short    | ≤ 85 cm  |

## FÄRGER

### CUSTOM VALBARA STANDARDFÄRGER



Svart ortos / svarta komponenter



Blå ortos / svarta komponenter



Grafitgrå ortos / grå komponenter



Röd ortos / svarta komponenter



Vit ortos / grå komponenter



Gul ortos / svarta komponenter

### OTS FÄRG



Grafitgrå ortos / grå komponenter

Färgavvikelser kan förekomma

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Leden är placerad på den drabbade sidan av leden.

Kort version rekommenderas för patienter med en benlängd på ≤ 85 cm.

### CUSTOM

| Beskrivning | Art.nr. |
|-------------|---------|
| Höger       | UOX0R   |
| Vänster     | UOX0L   |

### OTS

| Standard | Höger medial | Höger lateral | Vänster medial | Vänster lateral |
|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| XS - M   | UOX0518713   | UOX0528713    | UOX0618713     | UOX0628713      |
| L - XL   | UOX0518715   | UOX0528715    | UOX0618715     | UOX0628715      |

| Kort   | Höger medial | Höger lateral | Vänster medial | Vänster lateral |
|--------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| XS - M | UOX1518713   | UOX1528713    | UOX1618713     | UOX1628713      |
| L - XL | UOX1518715   | UOX1528715    | UOX1618715     | UOX1628715      |


# UNLOADER ONE® X

## OTS - UTAN FÖRPACKNING

| Standard | Höger medial | Höger lateral | Vänster medial | Vänster lateral |
|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| XS - M   | UOX0518718   | UOX0528718    | UOX0618718     | UOX0628718      |
| L - XL   | UOX0518719   | UOX0528719    | UOX0618719     | UOX0628719      |


| Kort   | Höger medial | Höger lateral | Vänster medial | Vänster lateral |
|--------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| XS - M | UOX1518718   | UOX1528718    | UOX1618718     | UOX1628718      |
| L - XL | UOX1518719   | UOX1528719    | UOX1618719     | UOX1628719      |

## ÖVERSIKT - TILLBEHÖR

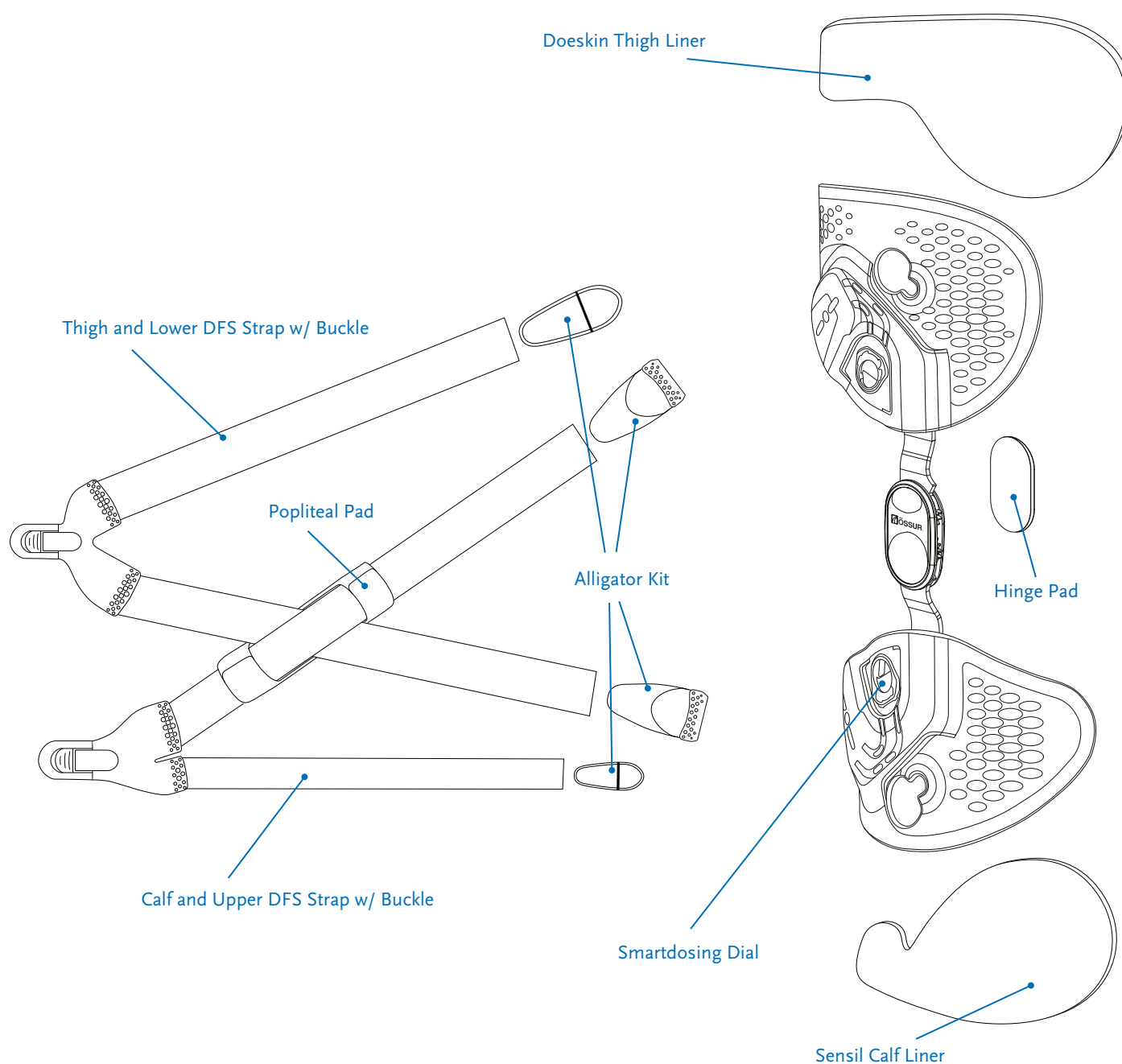

# UNLOADER ONE® X

## TILLBEHÖR

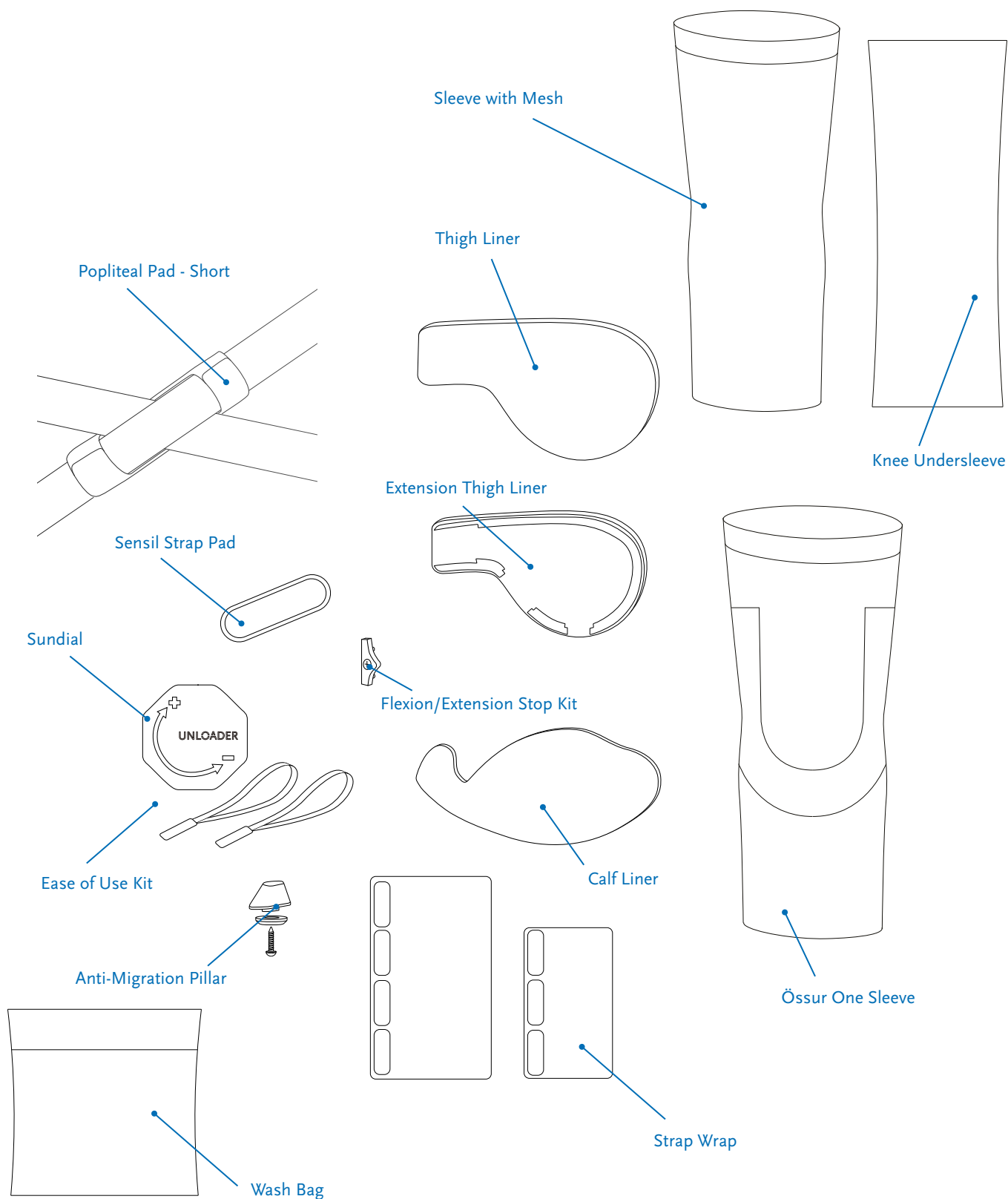



# UNLOADER ONE® X

| LÄRLINERS      | LÄR,<br>Höger medial,<br>Vänster lateral | LÄR,<br>Höger lateral,<br>Vänster medial | LÄRFÖRLÄNGNING,<br>Höger medial,<br>Vänster lateral | LÄRFÖRLÄNGNING,<br>Höger lateral,<br>Vänster medial |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Svart, Sensil  | UOX526801                                | UOX525801                                | NA                                                  | NA                                                  |
| Svart, Doeskin | UOX526901                                | UOX525901                                | UOX546901                                           | UOX545901                                           |
| Grå, Sensil    | UOX526201                                | UOX525201                                | NA                                                  | NA                                                  |
| Grå, Doeskin   | UOX526101                                | UOX525101                                | UOX546101                                           | UOX545101                                           |

| VADLINERS           | Höger medial, Vänster lateral | Höger lateral, Vänster medial |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Svart, Sensil XS-M  | UOX516952                     | UOX515952                     |
| Svart, Sensil L-XL  | UOX516962                     | UOX515962                     |
| Svart, Doeskin XS-M | UOX516951                     | UOX515951                     |
| Svart, Doeskin L-XL | UOX516961                     | UOX515961                     |
| Grå, Sensil XS-M    | UOX516152                     | UOX515152                     |
| Grå, Sensil L-XL    | UOX516162                     | UOX515162                     |
| Grå, Doeskin XS-M   | UOX516151                     | UOX515151                     |
| Grå, Doeskin L-XL   | UOX516161                     | UOX515161                     |

| THIGH & LOWER DFS STRAP* | Höger medial, Vänster lateral | Höger lateral, Vänster medial |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Svart                    | UOX406902                     | UOX405902                     |
| Grå                      | UOX406102                     | UOX405102                     |

\* Innehåller: Thigh and DFS Strap with buckle

| CALF & UPPER DFS STRAP* | Höger medial, Vänster lateral | Höger lateral, Vänster medial |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Svart                   | UOX406901                     | UOX405901                     |
| Grå                     | UOX406101                     | UOX405101                     |

\* Innehåller: Calf and DFS Strap with buckle

| UOX SERVICE KIT* | Höger medial, Vänster lateral | Höger lateral, Vänster medial |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Svart, XS-M      | UOX416901                     | UOX415901                     |
| Svart, L-XL      | UOX416911                     | UOX415911                     |
| Grå, XS-M        | UOX416101                     | UOX415101                     |
| Grå, L-XL        | UOX416111                     | UOX415111                     |

\* Innehåller: Doeskin Thigh Liner, Sensil Calf Liner, Thigh & Lower DFS Strap with Buckle, Calf & Upper DFS Strap with Buckle, Hinge Pad, Popliteal Pad, & Alligator Kit

| ANTI-MIGRATION PILLAR | Höger medial, Vänster lateral | Höger lateral, Vänster medial |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Svart                 | UOX700015                     | UOX700035                     |
| Grå                   | UOX700025                     | UOX700045                     |

# UNLOADER ONE® X

## TILLBEHÖR

| Beskrivning                  | Svart      | Grå        |
|------------------------------|------------|------------|
| Alligator Kit*               | UOX900001  | UOX900002  |
| Hinge Pad                    | UOX700091  | UOX700011  |
| Popliteal Pad                | UOX700012  | UOX700092  |
| Popliteal Pad - Short        | UOX700022  | UOX700082  |
| Sensil Strap Pad             | UON0181    | UON0182    |
| Sensil Strap Pad - 10 Pieces | UOX700113  | UOX700193  |
| Smartdosing Dial             | UOX1000001 | UOX1000002 |
| Strap Wrap Set               | UOX700014  | UOX700094  |

\* Innehåller: 4 Alligator Clips: 2 DFS, 1 Thigh & 1 Calf

| Beskrivning                           | Art.nr.     |
|---------------------------------------|-------------|
| Ease of Use Kit*                      | UOX800001   |
| Flexion/Extension Stop Kit**          | B-301040053 |
| Flexion/Extension Stop Kit** - 5 Sets | B-301040055 |
| Sundial                               | UOX1200001  |
| Wash Bag                              | UON60200    |

\* Innehåller: Sundial & 4 buckle finger-loops

\*\* Innehåller: 0°, 5°, 10°, 15°, 30° Extension Stops, 90° Flexion Stop

## ÖSSUR ONE SLEEVES\*

| Storlek | Vadens omkrets 15 cm<br>nedanför mitten av patella | Larets omkrets 15 cm<br>ovanför mitten av patella | Grå      | Svart    |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 2XS     | 25 - 29cm                                          | 31 - 36cm                                         | OSO60011 | OSO60021 |
| XS      | 29 - 33cm                                          | 36 - 42cm                                         | OSO60012 | OSO60022 |
| S       | 33 - 37cm                                          | 42 - 48cm                                         | OSO60013 | OSO60023 |
| M       | 37 - 42cm                                          | 48 - 55cm                                         | OSO60014 | OSO60024 |
| L       | 42 - 47cm                                          | 55 - 62cm                                         | OSO60015 | OSO60025 |
| XL      | 47 - 52cm                                          | 62 - 70cm                                         | OSO60016 | OSO60026 |
| XXL     | 52 - 57cm                                          | 70 - 78cm                                         | OSO60017 | OSO60027 |
| 3XL     | 57 - 62cm                                          | 78 - 86cm                                         | OSO60018 | OSO60028 |

\* Össur One: 51% Tencel™/30% Polyamide/19% Elastane

## SLEEVE WITH MESH\*

| Storlek | Mått      | Art.nr.  |
|---------|-----------|----------|
| XS      | < 43cm    | SLV60011 |
| S       | 43 - 46cm | SLV60012 |
| M       | 46 - 51cm | SLV60013 |
| L       | 51 - 53cm | SLV60014 |
| XL      | 53 - 56cm | SLV60015 |
| XXL     | 56 - 61cm | SLV60016 |

\* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester  
- Band: 80% Polyester/20% Spandex

## ÖSSUR KNEE UNDERSLEEVE\*

| Storlek | Mått          | Grå         | Svart       |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| XS      | 30.5 - 38cm   | B-250150201 | B-250150101 |
| S       | 38.1 - 45cm   | B-250150202 | B-250150102 |
| M       | 45.1 - 49.5cm | B-250150203 | B-250150103 |
| L       | 49.6 - 54.5cm | B-250150204 | B-250150104 |
| XL      | 54.6 - 62cm   | B-250150205 | B-250150105 |
| XXL     | 62 - 71cm     | B-250150206 | B-250150106 |

Note: When using an undersleeve we advice to use the Silicone AMS (Anti-Migration System) to minimize migration.

\* Össur Knee Undersleeve: 80% Nylon/20% Spandex

## UNLOADER ONE®

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



### INDIKATIONER

- Mild till svår enkompartments knäartros
- Andra knäskador som kan dra nytta av ensidig avlastning



**Video:** Unloader One with SmartDosing - Clinician Fitting Instructions (7 min 41 sec)



**Video:** Unloader One with SmartDosing - Clinician Custom-Fit Modifications (5 min 8 sec)



**Video:** Unloader One - Clinician Fitting Instructions (7 min 7 sec)


### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dubbla DFS-band minskar trycket på känsliga områden runt knäet, vilket innebär minskad smärta.
- SmartDosing™ låter brukaren själv finjustera avlastningen. Inga verktyg behövs och inställningsratten kan hanteras genom kläder.
- Färgkodade snabbkopplingsspännen gör ortosen enkel att ta på och av.
- Patenterade Sensil®-liners eliminerar glidning.
- Flexibel skena med låg profil som följer patientens anatomi gör det möjligt att använda ortosen under kläderna.
- Perforerad lättviktsram för flexibilitet och ventilation

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

| Storlek | Mått           |
|---------|----------------|
| S       | 31 - 35.5 cm   |
| M       | 35.5 - 42.5 cm |
| L       | 42.5 - 51 cm   |
| XL      | 51 - 61.5 cm   |

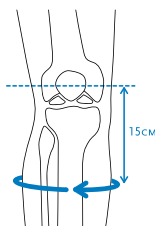

# UNLOADER ONE®

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### UNLOADER ONE SMARTDOSING

|         |                | MEDIAL AVLASTNING |             | LATERAL AVLASTNING |             |
|---------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Storlek | Omkrets        | Vänster           | Höger       | Vänster            | Höger       |
| S       | 31 - 35,5 cm   | B-240618712       | B-240518712 | B-240628712        | B-240528712 |
| M       | 35,5 - 42,5 cm | B-240618713       | B-240518713 | B-240628713        | B-240528713 |
| L       | 42,5 - 51 cm   | B-240618714       | B-240518714 | B-240628714        | B-240528714 |
| XL      | 51 - 61,5 cm   | B-240618715       | B-240518715 | B-240628715        | B-240528715 |

### UNLOADER ONE SHORT SMARTDOSING

|         |                | MEDIAL AVLASTNING |             | LATERAL AVLASTNING |             |
|---------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| STORLEK | OMKRETS        | VÄNSTER           | HÖGER       | VÄNSTER            | HÖGER       |
| XS      | 25 - 31 cm     | B-241618711       | B-241518711 | B-241628711        | B-241528711 |
| S       | 31 - 35.5 cm   | B-241618712       | B-241518712 | B-241628712        | B-241528712 |
| M       | 35.5 - 42.5 cm | B-241618713       | B-241518713 | B-241628713        | B-241528713 |
| L       | 42.5 - 51 cm   | B-241618714       | B-241518714 | B-241628714        | B-241528714 |
| XL      | 51 - 61.5 cm   | B-241618715       | B-241518715 | B-241628715        | B-241528715 |

### UNLOADER ONE (RATCHET)

|         |                | MEDIAL AVLASTNING |             | LATERAL AVLASTNING |             |
|---------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Storlek | Omkrets        | Vänster           | Höger       | Vänster            | Höger       |
| S       | 31 - 35,5 cm   | B-240619712       | B-240519712 | B-240629712        | B-240529712 |
| M       | 35,5 - 42,5 cm | B-240619713       | B-240519713 | B-240629713        | B-240529713 |
| L       | 42,5 - 51 cm   | B-240619714       | B-240519714 | B-240629714        | B-240529714 |
| XL      | 51 - 61,5 cm   | B-240619715       | B-240519715 | B-240629715        | B-240529715 |

### UNLOADER ONE SHORT (RATCHET)

|         |                | MEDIAL AVLASTNING |             | LATERAL AVLASTNING |             |
|---------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| STORLEK | OMKRETS        | VÄNSTER           | HÖGER       | VÄNSTER            | HÖGER       |
| XS      | 25 - 31 cm     | B-241619711       | B-241519711 | B-241629711        | B-241529711 |
| S       | 31 - 35.5 cm   | B-241619712       | B-241519712 | B-241629712        | B-241529712 |
| M       | 35.5 - 42.5 cm | B-241619713       | B-241519713 | B-241629713        | B-241529713 |
| L       | 42.5 - 51 cm   | B-241619714       | B-241519714 | B-241629714        | B-241529714 |
| XL      | 51 - 61.5 cm   | B-241619715       | B-241519715 | B-241629715        | B-241529715 |

Standard rekommenderas till patienter som är 165 cm och längre.  
Short rekommenderas till patienter som är 165 cm och kortare.  
Leden placeras på den affekterade sidan

# UNLOADER ONE®

## TILLBEHÖR

| Kit                                         | Smartdosing - Grå |                   | Ratchet Grå      |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Beskrivning                                 | Hö. Med./Vä Lat.  | Hö. Lat./Vä. Med. | Hö. Med./Vä Lat. | Hö. Lat./Vä. Med. |
| Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit        | B-705277003       | B-705278003       | B-701217008      | B-701218008       |
| Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit, Short | B-705277004       | B-705277005       | -                | -                 |
| Strap & Strap Pad Kit                       | B-705270003       |                   | B-701210006      |                   |
| Strap & Strap Pad Kit, Short                | B-705277006       |                   | B-701240004      |                   |
| DFS Strap Kit, Standard                     | B-701240002       |                   | -                | -                 |
| DFS Strap Kit, Short                        | B-701240012       |                   | -                | -                 |
| Pad Kit                                     | -                 | -                 | B-702210003      |                   |

| Beskrivning                     | Hö. Med / vä. Lat | Hö. Lat / vä. Med |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Buckle Clasp kit                | B-708217003       | B-708218003       |
| Alligator Tab (4 stk)           | B-704210003       |                   |
| Alligator Tab                   | B-310005334       |                   |
| Extension Stop Kit              | B-301040046       |                   |
| Velcro Twist-Fit Attachment Kit | B-721240003       |                   |
| Hinge screws                    | B-301010076       |                   |
| Post                            | B-301010075       |                   |

### ÖSSUR KNEE UNDERSLEEVE\*

|                                                                                     | Storlek | Omkrets<br>15 cm ovanför mitten av patella | Grå         | Svart       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | XS      | 25,4 cm - 30,9 cm                          | B-250150201 | B-250150101 |
|                                                                                     | S       | 30,9 cm - 35,6 cm                          | B-250150202 | B-250150102 |
|                                                                                     | M       | 35,6 cm - 42,5 cm                          | B-250150203 | B-250150103 |
|                                                                                     | L       | 42,5 cm - 50,8 cm                          | B-250150204 | B-250150104 |
|                                                                                     | XL      | 50,8 cm - 61,0 cm                          | B-250150205 | B-250150105 |
|                                                                                     | XXL     | 61,0 cm - 81,3 cm                          | B-250150206 | B-250150106 |

\* När Össur Knee Undersleeve används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera risken att undersleeven glider

### SUSPENSION STRAP KIT

|                                                                                     | Beskrivning                                                                     | Grå      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Rekommenderas vid användning av polstring i sämskskinn (tibia) samt undersleeve | UNL00212 |

### PADS

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Hinge Pads                    | B-304120301 |
| Popliteal Pad/ strap Grey 6in | B-304010103 |

# UNLOADER ONE®

## TILLBEHÖR

### SENSIL LINERS

|                                                                                   |         | VAD             |                 | LÅR             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | Storlek | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med |
|  | XS      | B-419700311     | B-419800311     | B-409700321     | B-409800321     |
|                                                                                   | S       | B-419700312     | B-419800312     | B-409700322     | B-409800322     |
|                                                                                   | M       | B-419700313     | B-419800313     | B-409700323     | B-409800323     |
|                                                                                   | L       | B-419700314     | B-419800314     | B-409700324     | B-409800324     |
|                                                                                   | XL      | B-419700315     | B-419800315     | B-409700325     | B-409800325     |

### DOESKIN LINERS

|                                                                                   |         | VAD             |                 | LÅR             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | Storlek | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med |
|  | XS      | B-424703721     | B-424803721     | B-412701721     | B-412801721     |
|                                                                                   | S       | B-424703722     | B-424803722     | B-412701722     | B-412801722     |
|                                                                                   | M       | B-424703723     | B-424803723     | B-412701723     | B-412801723     |
|                                                                                   | L       | B-424703724     | B-424803724     | B-412701724     | B-412801724     |
|                                                                                   | XL      | B-424703725     | B-424803725     | B-412701725     | B-412801725     |

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

### SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

|                                                                                     | Storlek | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
|  | XS      | B-715217031     | B-715218031     |
|                                                                                     | S       | B-715217032     | B-715218032     |
|                                                                                     | M       | B-715217033     | B-715218033     |
|                                                                                     | L       | B-715217034     | B-715218034     |
|                                                                                     | XL      | B-715217035     | B-715218035     |



## UNLOADER ONE® PLUS

Många som lider av knäartros är överviktiga. För dessa patienter är det extra viktigt med komfort och effektivt stöd. Därför har Unloader One Plus en bredare lårrem än standardmodellen samt en vadmuskelrem som ser till att ortosen sitter på plats. Eftersom större ben kräver mer stöd har vi en stadigare upprätt modell med Adjustable Dynamic Joint-led som ger ytterligare stöd för optimal smärthantering. Flertalet referentgranskade kliniska och biomekaniska studier har påvisat den här teknikens effektivitet.



### INDIKATIONER

- Måttlig till svår unikompartmentell knäartros
- Degenerativa meniskrupturer
- Andra knästillstånd som kan dra nytta av lokal (unikompartmentell) avlastning, såsom rekonstruktion vid ledbrotskador, osteonekros, tibiaplatåfrakturer, benmärgslesioner (benmärgsödem)



**Video:** Unloader One Plus - Clinician Fitting Instructions (9 min 5 sec)



**Video:** Unloader One Plus - Clinician Custom-Fit Modifications (5 min 47 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3-punktshävsstängssystemet tillhandahåller klinisk relevant smärtlindring av den påverkade sidan
- Smärtlindringen kan enkelt justeras med SmartDosing-vredet
- Hjälper patienten att vara rörlig under dagliga aktiviteter
- Med diskret led- och sleeve-design syns den inte under kläderna
- Låg vikt och lätt att använda

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella och vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### UNLOADER ONE PLUS STANDARD VERSION (15.5")

| Storlek | Omkrets lår | Omkrets vad | Vänster     | Höger       | Vänster     | Höger       |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| L       | 53 - 64 cm  | 36 - 43 cm  | B-245610004 | B-245510004 | B-245620004 | B-245520004 |
| XL      | 64 - 74 cm  | 43 - 51 cm  | B-245610005 | B-245510005 | B-245620005 | B-245520005 |

#### MEDIAL AVLASTNING

#### LATERAL AVLASTNING

Leden placeras på den affekterade sidan

# UNLOADER ONE® PLUS

## TILLBEHÖR

### SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

| Storlek | Höger Medial/Vänster Lateral | Höger lateral, vänster medial |
|---------|------------------------------|-------------------------------|
| L       | B-715237034                  | B-715238034                   |
| XL      | B-715237035                  | B-715238035                   |

### LINERS

|         | Vad - Sensil                  |                               | Lår - Doeskin                 |                               |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Storlek | Höger medial, vänster lateral | Höger lateral, vänster medial | Höger medial, vänster lateral | Höger lateral, vänster medial |
| L       | B-413700314                   | B-413800314                   | B-414700324                   | B-414800324                   |
| XL      | B-413700314                   | B-413800315                   | B-414700325                   | B-414800325                   |

### TILLBEHÖR - SATSER

| Beskrivning                                  | Höger medial, vänster lateral | Höger lateral, vänster medial |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Strap & Strap Pad & Buckle Clasp kit         | B-701237008                   | B-701238008                   |
| Strap & Strap Pad kit                        | B-701230006                   |                               |
| Strap kit                                    | B-701230004                   |                               |
| Pad kit                                      | B-702230003                   |                               |
| Buckle Clasp Kit                             | B-708237003                   | B-708238003                   |
| Alligator Clip Kit (ingår i alla bandsatser) | B-704210003                   |                               |
| Gastroc Kit                                  | B-705230001                   |                               |
| Elastiskt lårband 20 cm                      | B-701237083                   | B-701238083                   |
| Elastiskt lårband 25 cm                      | B-701237103                   | B-701238103                   |

## UNLOADER ONE® CUSTOM

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### UNLOADER ONE SMARTDOSING CUSTOM

| Färg  | Omkrets lår    | Omkrets vad  | Vänster     | Höger       |
|-------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Svart | 34,3 - 73,5 cm | 25 - 61,5 cm | B-115600112 | B-115500112 |
| Grå   | 34,3 - 73,5 cm | 25 - 61,5 cm | B-115601712 | B-115501712 |

#### UNLOADER ONE CUSTOM

| Färg  | Omkrets lår    | Omkrets vad  | Vänster     | Höger       |
|-------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Svart | 34,3 - 73,5 cm | 25 - 61,5 cm | B-115600111 | B-115500111 |
| Grå   | 34,3 - 73,5 cm | 25 - 61,5 cm | B-115601711 | B-115501711 |

#### MÄTVERKTYG

| Beskrivning              | Art.nr.     |
|--------------------------|-------------|
| Fjäderbelastat skjutmått | B-312000000 |



### SMARTMEASURE®

Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



#### VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| Red        | Pink       | Silver    |
| Orange     | Black      | White     |
| Yellow     | Navy Blue  | Champagne |
| Lime Green | Ocean Blue | Charcoal  |

#### FÖRSLAG PÅ VALBARA MÖNSTER\*



Unloader One® Custom går även att få med motiv. Kontakta kundtjänst för mer information och prisuppgift.

\*Kontakta Kundsupport, +46 (0) 18 18 22 00, för prisuppgift

# UNLOADER ONE® CUSTOM

## TILLBEHÖR

### SENSIL LINERS

|                                                                                   | Storlek | Färg  | VAD             |                 | LÅR             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   |         |       | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med |
|  | XS      | Grå   | B-419700311     | B-419800311     | B-409700321     | B-409800321     |
|                                                                                   | S       | Grå   | B-419700312     | B-419800312     | B-409700322     | B-409800322     |
|                                                                                   | M       | Grå   | B-419700313     | B-419800313     | B-409700323     | B-409800323     |
|                                                                                   | L       | Grå   | B-419700314     | B-419800314     | B-409700324     | B-409800324     |
|                                                                                   | XL      | Grå   | B-419700315     | B-419800315     | B-409700325     | B-409800325     |
|                                                                                   | XS      | Svart | B-419700111     | B-419800111     | B-409700121     | B-409800121     |
|                                                                                   | S       | Svart | B-419700112     | B-419800112     | B-409700122     | B-409800122     |
|                                                                                   | M       | Svart | B-419700113     | B-419800113     | B-409700123     | B-409800123     |
|                                                                                   | L       | Svart | B-419700114     | B-419800114     | B-409700124     | B-409800124     |
|                                                                                   | XL      | Svart | B-419700115     | B-419800115     | B-409700125     | B-409800125     |

### DOESKIN LINERS

|                                                                                    | Storlek | Färg  | VAD             |                 | LÅR             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    |         |       | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med | Hö. Med/vä. Lat | Hö. Lat/vä. Med |
|  | XS      | Grå   | B-424703721     | B-424803721     | B-412701721     | B-412801721     |
|                                                                                    | S       | Grå   | B-424703722     | B-424803722     | B-412701722     | B-412801722     |
|                                                                                    | M       | Grå   | B-424703723     | B-424803723     | B-412701723     | B-412801723     |
|                                                                                    | L       | Grå   | B-424703724     | B-424803724     | B-412701724     | B-412801724     |
|                                                                                    | XL      | Grå   | B-424703725     | B-424803725     | B-412701725     | B-412801725     |
|                                                                                    | XS      | Svart | B-424702121     | B-424802121     | B-412700121     | B-412800121     |
|                                                                                    | S       | Svart | B-424702122     | B-424802122     | B-412700122     | B-412800122     |
|                                                                                    | M       | Svart | B-424702123     | B-424802123     | B-412700123     | B-412800123     |
|                                                                                    | L       | Svart | B-424702124     | B-424802124     | B-412700124     | B-412800124     |
|                                                                                    | XL      | Svart | B-424702125     | B-424802125     | B-412700125     | B-412800125     |

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

### SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

|                                                                                     | Storlek | Grå                  |                      | Svart                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     |         | Hö medial/Vä lateral | Hö lateral/Vä medial | Hö medial/Vä lateral | Hö lateral/Vä medial |
|  | X-Small | B-715217031          | B-715218031          | B-715217011          | B-715218011          |
|                                                                                     | Small   | B-715217032          | B-715218032          | B-715217012          | B-715218012          |
|                                                                                     | Medium  | B-715217033          | B-715218033          | B-715217013          | B-715218013          |
|                                                                                     | Large   | B-715217034          | B-715218034          | B-715217014          | B-715218014          |
|                                                                                     | X-Large | B-715217035          | B-715218035          | B-715217015          | B-715218015          |

# UNLOADER ONE® CUSTOM

## TILLBEHÖR

### SUSPENSION STRAP KIT

| Beskrivning          | Grå      | Svart    |
|----------------------|----------|----------|
| Suspension Strap Kit | UNL00212 | UNL00211 |

### UNLOADER ONE SMARTDOSING CUSTOM – TILLBEHÖR

| Beskrivning                                      | Grå                      | Svart                    | Grå                      | Svart                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  | Hö medial/<br>Vä lateral | Hö lateral/<br>Vä medial | Hö medial/<br>Vä lateral | Hö lateral/<br>Vä medial |
| SmartDosing Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit | B-705277003              | B-705278003              | B-705277001              | B-705278001              |
| Strap & Strap Pad Kit                            | B-705270003              |                          | B-705270001              |                          |
| Strap Kit                                        | B-701270013              |                          | B-701270011              |                          |

### UNLOADER ONE (RATCHET) CUSTOM – TILLBEHÖR

|                                      | Grå                      | Svart                    | Grå                      | Svart                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beskrivning                          | Hö medial/<br>Vä lateral | Hö lateral/<br>Vä medial | Hö medial/<br>Vä lateral | Hö lateral/<br>Vä medial |
| Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit | B-701217008              | B-701218008              | B-701217009              | B-701218009              |
| Strap & Strap Pad Kit                | B-701210006              |                          | B-701210007              |                          |
| Strap Kit                            | B-701210004              |                          | B-701210005              |                          |
| Pad Kit                              | B-702210003              |                          | B-702210001              |                          |
| Ratchet Complete Strap Set           | B-701210004              |                          |                          |                          |

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

|                                                 | Grå                      | Svart                    | Grå                      | Svart                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beskrivning                                     | Hö medial/<br>Vä lateral | Hö lateral/<br>Vä medial | Hö medial/<br>Vä lateral | Hö lateral/<br>Vä medial |
| Buckle Clasp Kit                                | B-708217003              | B-708218003              | B-708217001              | B-708218001              |
| Alligator Clip Kit (included in all strap kits) | B-704210003              |                          | B-704210001              |                          |
| Alligator Tab                                   | B-310005334              |                          | B-310005335              |                          |
| Extension Stop Kit                              | B-301040046              |                          | B-301040047              |                          |
| Velcro Twist-Fit Attachment Kit                 | B-721240003              |                          | B-721240001              |                          |

## REBOUND® CARTILAGE

Hur bra en ledbroskreparation lyckas beror på hur bra patienten medverkar i rehabiliteringsprocessen. Protokollet baserar sig på begränsad broskbelastning i kombination med gradvis ökad aktivitet. Kryckor ger en viss avlastning och rekommenderas normalt i de flesta behandlingsprotokoll. Under sökningar visar dock att många patienter inte använder kryckorna rätt och därför inte får den avlastning som behövs.

Rebound Cartilage är en skyddande funktionell lösning som utvecklats för att stödja knäbroskets regenerering efter reparationsåtgärder såsom mikrofrakturkirurgi, OATS och (M)ACI. Med hjälp av det kliniskt testade 3-punktsstödet och de patenterade DFS-banden upprätthålls ledavlastningen under flexion för att skydda brosket under läkningsprocessen.

FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY



### INDIKATIONER

- Traumatisk broskskada i knät
  - Meniskreparation
  - Avaskulär nekros
- Benmärgsödem



**Video:** Rebound Cartilage - Clinician Fitting Instructions (2 min 59 sec)



**Video:** Rebound Cartilage - Clinician Custom-Fit Modifications (4 min 02 sec)




**Video:** Rebound Cartilage with Flexion Control - Clinician Fitting Instructions (3 min 16 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dual Cartilage Protection Straps™-skyddsremmar bibehåller ledavlastningen vid flexion vilket skyddar brosket under läkningsprocessen.
- Wraparound sleeve med andasfunktion.
- Sensil®-silikon vad- och låropolstring för säkerställd suspension.
- Färgkodade Quick Fit-spännen gör det lätt att ta på och ta av ortosen
- Flexionskontroll kan fås som tillbehör om rehabiliteringsprotokollet förutsätter begränsning av rörelseomfånget

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

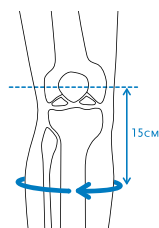

# REBOUND® CARTILAGE

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND CARTILAGE

| Storlek | Omkrets*       | Vänster medial avlastning | Höger medial avlastning | Vänster lateral avlastning | Höger lateral avlastning |
|---------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| S       | 31 - 35,5 cm   | B-254610002               | B-254510002             | B-254620002                | B-254520002              |
| M       | 35,5 - 42,5 cm | B-254610003               | B-254510003             | B-254620003                | B-254520003              |
| L       | 42,5 - 51 cm   | B-254610004               | B-254510004             | B-254620004                | B-254520004              |
| XL      | 51 - 61,5 cm   | B-254610005               | B-254510005             | B-254620005                | B-254520005              |

\* Omkrets: mått tas 15 cm nedanför mitten av patella

### REBOUND CARTILAGE MED FLEXIONSKONTROLL

| Storlek | Omkrets        | Vänster medial avlastning | Höger medial avlastning | Vänster lateral avlastning | Höger lateral avlastning |
|---------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| S       | 31 - 35,5 cm   | B-254810002               | B-254710002             | B-254820002                | B-254720002              |
| M       | 35,5 - 42,5 cm | B-254810003               | B-254710003             | B-254820003                | B-254720003              |
| L       | 42,5 - 51 cm   | B-254810004               | B-254710004             | B-254820004                | B-254720004              |
| XL      | 51 - 61,5 cm   | B-254810005               | B-254710005             | B-254820005                | B-254720005              |

Min/max brukarmått: Omkrets lår 34,3 - 73,5 cm. Omkrets vad 25 - 61,5 cm.

## TILLBEHÖR

### REBOUND CARTILAGE BAND OCH SLEEVES

| Storlek | Wraparound sleeve*<br>Vänster medial/höger lateral | Wraparound sleeve<br>Höger medial/vänster lateral | Strap kit<br>Inkl. 4 Band | Cps kit<br>Inkl. 2 Band |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| S       | B-254900082                                        | B-254900072                                       | B-701290002               | B-700290002             |
| M       | B-254900083                                        | B-254900073                                       | B-701290003               | B-700290003             |
| L       | B-254900084                                        | B-254900074                                       | B-701290004               | B-700290004             |
| XL      | B-254900085                                        | B-254900075                                       | B-701290005               | B-700290005             |

\* Wraparound sleeve inkluderar integrerad silikon vadlinjer and doeskin lårliner

| Beskrivning         | Vänster medial | Höger medial | Vänster lateral | Höger lateral |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| Flexion Control Kit | B-705296100    | B-705295100  | B-705296200     | B-705295200   |

| Beskrivning                                              | Vänster medial/<br>höger lateral | Höger medial/<br>vänster lateral |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Silikon vadlinjer, doeskin lårliner, polstringskuddar    | B-254900080                      | B-254900070                      |
| Doeskin vad- och lår liner, Bandsatser, polstringskuddar | B-427705001                      | B-427705000                      |





## CTi® OA

CTi har i 30 år satt standarden för måttbeställda knäortoser för ligamentskador. Lägg till varus- eller valguskorrigering till denna klassiker och du får en utmärkt, dubbelledad knäortos för både osteoartrit och ligamentskador för dina mer aktiva patienter. Inkluderar patenterad Sensil®-polstring som eliminerar glidning, en flexibel nedre medial manschett för bättre skydd mot rotationskrafter och hudvänlig SensEdge-beläggning på sprutformade delar för att undvika tryckpunkter



### INDIKATIONER

- Mild till svår unikompartmentell artros
- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Krävande vardagliga aktiviteter

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Rigid kolfiberram
- Måttillverkad efter varje patients unika anatomi med upp till 7° varus-/valguskorrigering inbyggd i ramen
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Beskrivning | Vänster     | Höger       |
|-------------|-------------|-------------|
| CTi OA      | B-116630010 | B-116530010 |

Se tillbehör och mätverktyg under CTi custom.

### SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

## REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST

Rebound DUAL Basic och Rebound DUAL Basic ST erbjuder det värde och den enkelhet du behöver för att navigera i komplexa landskap. Rebound DUAL kollektionen är mångsidig och gör att Össur kan erbjuda högkvalitativa one-stop-lösningar från en och samma källa för att hjälpa användaren att övergå till en lyckad återhämtning.



Rebound DUAL Basic

Rebound DUAL Basic ST  
(Step-Through)

### INDIKATIONER

Rebound Dual Basic och Rebound Dual Basic ST är avsedda för kombinerade och icke-kombinerade instabiliteter i följande ligament:

- Främre korsbandet (ACL)
- Mediala kollateralligamentet (MCL)
- Lateral kollateralligamentet (LCL)
- Bakre korsbandet (PCL)
- Tillstånd som kan dra nytta av unicompartmental avlastning av knäet (endast möjligt med Rebound Dual Basic)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Med en topp ram som är multifunktionell och justerbar, ger den möjligheten att förlänga eller förkorta ramen enligt längden på patienten eller justerbar till varus/valgus position i knäet (gäller endast Rebound DUAL Basic)
- Inpassningsguiden till leden underlättar korrekt placering av ortosen i förhållande till benet
- Diskret och lätt aluminiumram
- Lårliner i sämskinn för komfort och halkfri Activegrip™-remkudde
- Lätt anpassningsbara/klippbara remmar med numrering på
- Polycentrisk led med låg profil och stoppalternativ för stabilitet och begränsning av rörelseomfång
- Finns tillgänglig i design som patienten kliver i eller med främre ram i storlek XS-3XL
- Lämplig för sporter med låg till hög aktivitetsnivå och glidsport
- Valfritt PCL-tillbehörskit för att stödja flera ligament

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 15 cm över mitten av patella

# REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

**X** = 5 (höger)  
 6 (vänster)  
**Y** = 1 (Rebound DUAL Basic)  
 2 (Rebound DUAL Basic ST)

| Beskrivning                                     | Storlek | M/L mått*     | Omkrets lår   | Art.nr.      |
|-------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| Rebound DUAL Basic eller Rebound DUAL Basic ST* | XS      | 7.6 - 8.9cm   | 38.1 - 41.9cm | B-242XY0001B |
|                                                 | S       | 8.9 - 10.2cm  | 41.9 - 47cm   | B-242XY0002B |
|                                                 | M       | 10.2 - 11.4cm | 47 - 52.1cm   | B-242XY0003B |
|                                                 | L       | 11.4 - 12.7cm | 52.1 - 57.2cm | B-242XY0004B |
|                                                 | XL      | 12.7 - 14cm   | 57.2 - 62.2cm | B-242XY0005B |
|                                                 | 2XL     | 14 - 15.2cm   | 62.2 - 69.9cm | B-242XY0006B |
|                                                 | 3XL     | 15.2 - 16.5cm | 69.9 - 76cm   | B-242XY0007B |

## UTBYTESPOLSTRING TILLBEHÖR

| Storlek | Basic Liner Art.nr. | Basic ST Liner Art.nr. |
|---------|---------------------|------------------------|
| XS      | B-701090130         | B-701090140            |
| S       | B-701090131         | B-701090141            |
| M       | B-701090132         | B-701090142            |
| L       | B-701090133         | B-701090143            |
| XL      | B-701090134         | B-701090144            |
| 2XL     | B-701090135         | B-701090145            |
| 3XL     | B-701090136         | B-701090146            |

## RESERVDELAR

| Storlek                         | Art.nr.     |
|---------------------------------|-------------|
| RDUAL Basic Strap Kit XS-L      | B-701090137 |
| RDUAL Basic Strap Kit XL-3XL    | B-701090138 |
| RDUAL Basic ST Strap Kit XS-L   | B-701090147 |
| RDUAL Basic ST Strap Kit XL-3XL | B-701090148 |
| RDUAL Basic ROM Stop Kit        | B-701090109 |
| Condyle Pad Kit                 | B-701090009 |

## TILLBEHÖR

| Storlek                             | Art.nr.     |
|-------------------------------------|-------------|
| RDUAL Basic ROM Stop Kit            | B-701090109 |
| RDUAL Basic PCL Strap Kit XS-L      | B-701090057 |
| RDUAL Basic PCL Strap Kit XL-3XL    | B-701090058 |
| RDUAL Basic ST PCL Strap Kit XS-L   | B-701090065 |
| RDUAL Basic ST PCL Strap Kit XL-3XL | B-701090066 |

\* Rebound DUAL Basic ST är 35.5 cm

## REBOUND® PCL

PCL har till skillnad från ACL förmågan att läka efter en skada. PCL utsätts för olika typer av tånjningar när knäet böjs. Otillräcklig läkning efter en PCL-ruptur kan leda till besvär som kronisk anterior knäsmärta eller knäartros. Om PCL tillåts läka i en utsträckt position kan det leda till kronisk instabilitet och funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att hålla PCL i en korrekt fysiologisk position under konservativ eller postkirurgisk rehabilitering.

Rebound PCL är världens första dynamiska PCL-ortos. Den applicerar en fysiologiskt korrekt dynamisk kraft på PCL under rehabiliteringen.

**FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY**



## INDIKATIONER

- Nkada på bakre korsbandet (PCL), både vid post - operativ behandling av rekonstruerande PCL eller vid funktionell icke-kirurgisk rehabilitering av PCL.



**Video:** Rebound PCL - Clinician Fitting Instructions (5 min 57 sec)

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- DTS (Dynamic Tension System) är framtaget för att gradvis öka belastningen på tibia när knäet böjs genom att applicera anterior dragkraft som avlastar PCL och underlättar läkningen.
- Skruvnycklarna ger tre olika alternativ för att anpassa den standardiserade och biomekaniskt korrekta posteriora belastningen på tibia efter varje enskild patient. Nycklarna ger även möjlighet att justera den posteriora belastningen på tibia, t.ex. vid svullnad.
- Lättviktsortos med patenterad vadlinier i Sensil®-silikon och lärliner i doeskin som förhindrar glidning och ger komfort åt patienten.
- Specialtillverkad posterior ram för bästa möjliga passform och stöd med öppning framtill för enkel på- och avtagning.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position.
- Omkrets: mått tas 15 cm ovanför och nedanför mitten av patella
- Använd SmartMeasure för måttanpassad ortos.

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG


| Storlek | M/L Mått       | Tibia*       | Femur**       | Vänster       | Höger         |
|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| S       | 8.9 - 10.2 cm  | 29 - 34.5 cm | 42 - 45 cm    | B-124501161   | B-124501158   |
| M       | 10.2 - 11.4 cm | 34.5 - 38 cm | 45 - 51cm     | B-124501162   | B-124501159   |
| L       | 11.4 - 12.7 cm | 38 - 42 cm   | 51 - 58.5cm   | B-124501163   | B-124501160   |
| XL      | 12.7 - 14.0 cm | 42 - 45.7 cm | 58.5 - 66.7cm | B-124501155XL | B-124501154XL |

\* Omkrets: mått tas 15 cm nedanför mitten av patella

\*\* Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

Jämförelse av posterior belastning på tibia från en statisk PCL-ortos respektive den dynamiska Rebound PCL-ortosen. Bearbetning av diagram från LaPrade et al.5

LaPrade RF, Smith SD, Wilson KJ, Wijdicks CA. "Quantification of functional brace forces for posterior cruciate ligament injuries on the knee joint: an in vivo investigation." Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc [Internet]. 2014 Aug 22 [cited 2014 Dec 11]; Se: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145947>

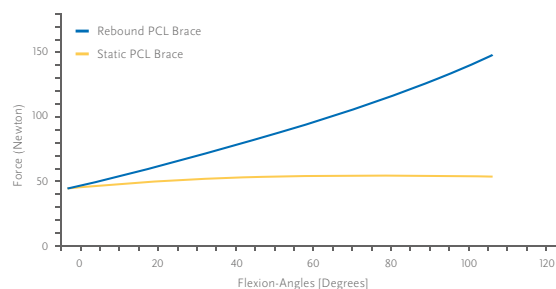

# REBOUND® PCL

## REBOUND PCL CUSTOM

### MÄTTBEGRÄNSNING

| 15 cm ovanför mitten av patella | 15 cm nedanför mitten av patella | Vänster     | Höger       |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 36,8 - 77,5 cm                  | 22,9 - 57,2 cm                   | B-124501155 | B-124501154 |

Minsta längd innanlär (mått från mitten av patella till perineum): 28 cm  
TIPS! Använd Össur SmartMeasure app till iPhone/iPad för att beställa en Custom-version.

### SMARTMEASURE®

Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



### TILLBEHÖR

#### BAND

| Storlek  | Art.nr.  |
|----------|----------|
| XS - L   | PCL00061 |
| XL - XXL | PCL00062 |



Shear Knob Kit

#### TILLVAL

| Beskrivning                                                                                          | Art.nr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Extension Stop Kit - möjliggör låsning vid 0°, 5°, 10°, 20°, 30° och 40° extension                   | B-705130042 |
| Flexion Stop Kit - möjliggör låsning vid 0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90° och 105° flexion | B-705130043 |
| Shear Knob Kit                                                                                       | B-465350087 |
| Kondylkuddar Kit                                                                                     | B-705130046 |
| PCL Pad                                                                                              | B-705000036 |

| Standard upper liner kit | S           | M           | L           |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vänster                  | B-124501171 | B-124501172 | B-124501173 |
| Höger                    | B-124501165 | B-124501166 | B-124501167 |

| Standard lower liner kit | S           | M           | L           |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vänster                  | B-124601177 | B-124601178 | B-124601179 |
| Höger                    | B-124501177 | B-124501178 | B-124501179 |

| Doeskin lower liner kit | S           | M           | L           |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vänster                 | B-124601183 | B-124601184 | B-124601185 |
| Höger                   | B-124501183 | B-124501184 | B-124501185 |

### VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| Red        | Pink       | Silver    |
| Orange     | Black      | White     |
| Yellow     | Navy Blue  | Champagne |
| Lime Green | Ocean Blue | Charcoal  |

## REBOUND® ACL

Rebound ACL är ett framsteg inom ortoser och är utformad för att på ett bekvämt sätt applicera en anatomiskt korrekt och dynamisk belastning på det främre korsbandet. Oavsett om den används vid konservativ eller kirurgisk behandling kan Rebound ACL komplettera protokoll och ge knäleden optimala biomekaniska omständigheter som en grund för långsiktiga och lyckade patientresultat. Innovativ teknik i Rebound® Dynamic Tension System (DTS) möjliggör personanpassade och justerbara inställningar som minskar belastningen på ett läkande främre korsband.



### INDIKATIONER

- Tillstånd som förbättras av agonistisk kraft som varierar under flexion i proportion till spänningen i det främre korsbandet, som appliceras på skenben och lårben i sagittalplanet. Dessa kan omfatta följande:
  - skada på främre korsband (ACL)
  - rekonstruktion
  - icke-kirurgisk behandling.



**Video:** Rebound ACL - Clinician Fitting Instructions (5 min 57 sec)



**Video:** Rebound ACL - Clinician Custom-Fit Modifications (2 min 45 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR


- Dynamisk teknik för knästabilitet, med Dynamic Tension System™ som ger det främre korsbandet en agonistisk, dynamisk kraft som är beroende av flexionsvinkeln (LaPrade et al., 2017) och utformad för att reducera främre draglåda och främja knästabiliteten.
- Specifik belastningsanpassning efter patientens individuella anatomi och rehabiliteringskrav
- Med stöd från kliniska och biomekaniska studier har Rebound ACL visat sig minska belastningen på det främre korsbandet under aktivitet och avsevärt minska belastningen på menisken i knän med bristfälligt främre korsband (Tomescu et al., 2017).
- Biokompatibelt och högteknologiskt material, inklusive Blue is You™-inställningspunkter för patienten och ActiveGrip™-liners, främjar passform och komfort
- Lätt aluminiumram av flygplanskvalitet
- Finns i storlek SM–XL
- Begränsning av rörelseomfång för flexion och extension är möjligt vid behov
- Den bakre ramen är optimerad för passform och stöd, med en öppen framsida för enkel på- och avtagning
- Rebound® Dynamic Tension System (DTS) är kliniskt testad för komfort och validerad av slutanvändare. Tack vare data om belastningskartläggning som samlats in under rehabiliteringsaktiviteter ger den en bekväm belastning på det bakre låret och främre skenbenet.

# REBOUND® ACL

## NÖDVÄNDIGA MÅTT



M/L-mått tas i knäleden i normal, vikt bärande position.

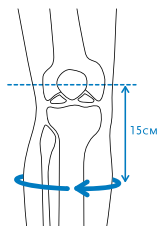

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### STANDARD

| Storlek | Vänster     | Höger       | M/L-mått     | Omkretsmått 15 cm nedanför mitten av patella | Omkretsmått 15 cm ovanför mitten av patella |
|---------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S       | B-124601191 | B-124501191 | 8.9-10.2 cm  | 29.2-34.3 cm                                 | 41.9-47.0 cm                                |
| M       | B-124601192 | B-124501192 | 10.2-11.4 cm | 34.3-39.4 cm                                 | 47.0-52.1 cm                                |
| L       | B-124601193 | B-124501193 | 11.4-12.7 cm | 39.4-44.5 cm                                 | 52.1-57.2 cm                                |
| XL      | B-124601194 | B-124501194 | 12.7-14.0 cm | 44.5-49.5 cm                                 | 57.2-62.2 cm                                |

Rekommenderas för patienter som är 156 cm eller längre.

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                          | Art.nr.     | Beskrivning     | Art.nr.     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Extensionsstoppsats (0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°)                     | B-124702035 | Shear Knob Kit  | B-705130051 |
| Flexionsstoppsats (0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90°, 105°) | B-124702034 | Condyle Pad Kit | B-701090009 |
| S/M Bandsats                                                         | B-124702030 | Tibial Pad      | B-124702032 |
| LG/XL Bandsats                                                       | B-124702031 | Tibial Hex Pad  | B-124702033 |




#B-124702035



#B-124702034




#B-705130051

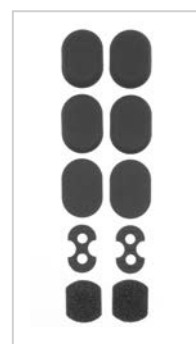

#B-701090009



#B-124702030

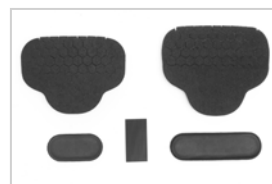

#B-124702032



#B-124702033 Close Up



## REBOUND® ACL

## TILLBEHÖR

## ANTI-MIGRATION WRAP

| Storlek  | Höger       | Vänster     |
|----------|-------------|-------------|
| S/M      | B-124501195 | B-124601195 |
| S/M HEX  | B-124501196 | B-124601196 |
| L/XL     | B-124501197 | B-124601197 |
| L/XL HEX | B-124501198 | B-124601198 |

## UPPER DOESKIN LINER KIT

| Storlek | Höger       | Vänster     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | B-124702004 | B-124702000 |
| M       | B-124702005 | B-124702001 |
| L       | B-124702006 | B-124702002 |
| XL      | B-124702007 | B-124702003 |

## LOWER ACTIVEGRIP LINER KIT

| Storlek | Höger       | Vänster     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | B-124702014 | B-124702010 |
| M       | B-124702015 | B-124702011 |
| L       | B-124702016 | B-124702012 |
| XL      | B-124702017 | B-124702013 |

## LOWER DOESKIN LINER KIT

| Storlek | Höger       | Vänster     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | B-124702024 | B-124702020 |
| M       | B-124702025 | B-124702021 |
| L       | B-124702026 | B-124702022 |
| XL      | B-124702027 | B-124702023 |



Upper Doeskin Liner Kit#B-124702003



Lower Activegrip Liner Kit#B-124702013

## SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

| Beskrivning              | Art.nr.     |
|--------------------------|-------------|
| Fjäderbelastat skjutmått | B-312000000 |

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

## REBOUND® ACL CUSTOM

Rebound ACL är ett framsteg inom ortoser och är utformad för att på ett bekvämt sätt applicera en anatomiskt korrekt och dynamisk belastning på det främre korsbandet. Oavsett om den används vid konservativ eller kirurgisk behandling kan Rebound ACL komplettera protokoll och ge knäleden optimala biomekaniska omständigheter som en grund för långsiktiga och lyckade patientresultat. Innovativ teknik i Rebound® Dynamic Tension System (DTS) möjliggör personanpassade och justerbara inställningar som minskar belastningen på ett läkande främre korsband.



### INDIKATIONER

- Tillstånd som förbättras av agonistisk kraft som varierar under flexion i proportion till spänningen i det främre korsbandet, som appliceras på skenben och lårben i sagittalplanet. Dessa kan omfatta följande:
  - skada på främre korsband (ACL)
  - rekonstruktion
  - icke-kirurgisk behandling

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamisk teknik för knästabilitet, med Dynamic Tension System™ som ger det främre korsbandet en agonistisk, dynamisk kraft som är flexionsvinkelberoende (LaPrade et al., 2017) och utformad för att reducera främre draglåda och främja knästabiliteten.
- Specifik belastningsanpassning efter patientens individuella anatomi och rehabiliteringskrav
- Med stöd från kliniska och biomekaniska studier har Rebound ACL visat sig minska belastningen på det främre korsbandet under aktivitet och avsevärt minska belastningen på menisken i knän med bristfälligt främre korsband (Tomescu et al., 2017).
- Biokompatibelt och högteknologiskt material, inklusive Blue is You™-inställningspunkter för patienten och ActiveGrip™-liners, främjar passform och komfort
- Lätt aluminiumram av flygplanskvalitet
- Finns i storlek SM–XL
- Rörelseomfångslås för flexion och extension
- Den bakre ramen är optimerad för passform och stöd, med en öppen framsida för enkel på- och avtagning
- Rebound® Dynamic Tension System (DTS) är kliniskt testad komfort och validerad av slutanvändare. Tack vare data om belastningskartläggning som samlats in under rehabiliteringsaktiviteter ger den en bekväm belastning på det bakre låret och främre skenbenet.

# REBOUND® ACL CUSTOM

## SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

| Beskrivning              | Art.nr.     |
|--------------------------|-------------|
| Fjäderbelastat skjutmått | B-312000000 |

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vad 15 cm under mitten av patella
- Omkrets vad 20 cm under mitten av patella
- Omkrets vad 7,5 cm under mitten av patella
- M/L-mått
- Omkrets lår 15 cm över mitten av patella
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella
- Omkrets lår 7,5 cm över mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### CUSTOM

| Art.nr.     | Sida    | Min/Max<br>M/L-mått* | Min/Max omkrets ovanför<br>mitten av patella** | Min/Max omkrets nedanför<br>mitten av patella*** | Mätmetod              |
|-------------|---------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| B-124701000 | Höger   | 8.9 - 14 cm          | 41.9 - 62.2 cm                                 | 29.2-49.5 cm                                     | SmartMeasure,<br>gips |
| B-124701001 | Vänster |                      |                                                |                                                  |                       |

\*Knäets M/L-mått

\*\*Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

\*\*\*Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

Rekommenderas för patienter som är 156 cm eller längre.

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                           | Art.nr.     | Beskrivning     | Art.nr.     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Extensionsstopp, kit (0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°)                     | B-124702035 | Shear Knob Kit  | B-705130051 |
| Flexionsstopp, kit (0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90°, 105°) | B-124702034 | Condyle Pad Kit | B-701090009 |
| S/M Bandsats                                                          | B-124702030 | Tibial Pad      | B-124702032 |
| LG/XL Bandsats                                                        | B-124702031 | Tibial Hex Pad  | B-124702033 |

# REBOUND® ACL CUSTOM

## TILLBEHÖR

### ANTI-MIGRATION WRAP

| Storlek  | Höger       | Vänster     |
|----------|-------------|-------------|
| S/M      | B-124501195 | B-124601195 |
| S/M HEX  | B-124501196 | B-124601196 |
| L/XL     | B-124501197 | B-124601197 |
| L/XL HEX | B-124501198 | B-124601198 |

### UPPER DOESKIN LINER KIT

| Storlek | Höger       | Vänster     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | B-124702004 | B-124702000 |
| M       | B-124702005 | B-124702001 |
| L       | B-124702006 | B-124702002 |
| XL      | B-124702007 | B-124702003 |

### LOWER ACTIVEGRIP LINER KIT

| Storlek | Höger       | Vänster     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | B-124702014 | B-124702010 |
| M       | B-124702015 | B-124702011 |
| L       | B-124702016 | B-124702012 |
| XL      | B-124702017 | B-124702013 |

### LOWER DOESKIN LINER KIT

| Storlek | Höger       | Vänster     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | B-124702024 | B-124702020 |
| M       | B-124702025 | B-124702021 |
| L       | B-124702026 | B-124702022 |
| XL      | B-124702027 | B-124702023 |

## BIOMEKANIK UNDER KNÄFLEXION - ACL

I ett friskt knä är krafterna på de främre ligamenten relaterade till knävinkeln. Krafterna är högst under de sista 35 graderna tills dess att full extension erhålls.

Grafen visar förhållandet "angle-force", publicerad av Smith et al. 2013 i artikeln "Functional bracing of ACL injuries: Current state and future directions", Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 27 april 2013

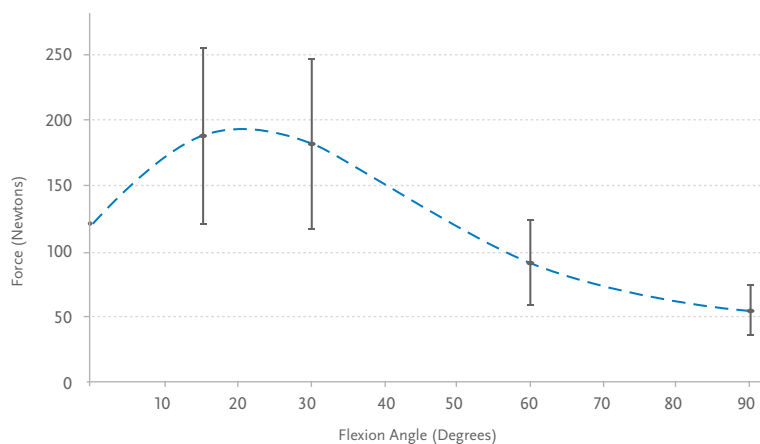


Fig. 2 Graph of the average anterior-posterior in situ force of the ACL in vivo experienced during walking, squatting, single leg lunge, isometric extension, and isokinetic extension.

## CTi® OTS

Den rigida CTi-knäortosens beprövade teknologi kan fås som en färdig lösning som erbjuder justeringsmöjligheter och utmärkt passform samtidigt som den bibehåller den höga stöd- och skyddsnivå som du förväntar dig av en CTi-ortos. CTi:s vridstyva och starka kolfiberram som utrustats med anatomiskt korrekta Accutrac®-leder och flexibla underskal ger ett rigit exoskelett som stabiliserar knäleden. Polstring med andasfunktion och beläggning av bioinert Össur Sensil® Silicone säkerställer att CTi OTS hålls i rätt position på benet så att ortosen fungerar optimalt.



## INDIKATIONER

- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet



**Video:** CTi OTS - Clinician Fitting Instructions  
(2 min 54 sec)



**Video:** CTi OTS - Clinician Custom-Fit Modification  
(6 min 45 sec)

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Flexibla byglar och justerbart skenbensband (ATS) håller fast tibia och tillåter justering av ortosledens djup för bättre individuell anpassning
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter
- Standardmodellen avsedd för medel till hög stötnivå. Pro-Sport-modell för aktiviteter med högsta stötnivå

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Bredd: M/L-mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position
- Omkrets: mått tas strax nedanför patellas distala kant



# CTI® OTS

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| CTI     |                |            | Standard    |             | Pro Sport   |             |
|---------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Storlek | M/L-mått*      | Omkrets**  | Vänster     | Höger       | Vänster     | Höger       |
| S       | 8.9 - 10.2 cm  | 28 - 34 cm | B-238600112 | B-238500112 | B-239600112 | B-239500112 |
| M       | 10.2 - 11.4 cm | 34 - 38 cm | B-238600113 | B-238500113 | B-239600113 | B-239500113 |
| L       | 11.4 - 12.7 cm | 38 - 41 cm | B-238600114 | B-238500114 | B-239600114 | B-239500114 |
| XL      | 12.7 - 14.0 cm | 41 - 44 cm | B-238600115 | B-238500115 | B-239600115 | B-239500115 |
| XXL     | 14.0 - 15.2 cm | 44 - 48 cm | B-238600116 | B-238500116 | B-239600116 | B-239500116 |

\* M/L-mått: Tas vid knäleden i belastat läge \*\* Omkrets: Tas precis distalt om patella.

## TILLBEHÖR/TILLVAL

### POLSTRING

| Storlek | Silicone tibia | Silicone tibia | Silicone femur | Lycra femur |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| M       | B-304030030    | B-425580002    | B-425571002    | B-425570002 |
| L       |                | B-425580004    | B-425571004    | B-425570004 |
| XL, XXL |                | B-425580005    | B-425571004    | B-425570004 |

### AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

| Beskrivning                  | Art.nr.     |
|------------------------------|-------------|
| Silicone AMS Wrap S, M       | B-715260002 |
| Silicone AMS Wrap L, XL, XXL | B-715260004 |
| AMS Wrap S, M                | B-410000001 |
| AMS Wrap L, XL               | B-410000002 |

### BANDSATSER

| Storlek    | Art.nr.     |
|------------|-------------|
| S, M       | B-701140103 |
| L, XL, XXL | B-701140104 |

### PCL KITS

| Storlek    | Art.nr.     |
|------------|-------------|
| S, M       | B-705000132 |
| L, XL, XXL | B-705000235 |

### BANDPOLSTRING

| Storlek | Art.nr.     |
|---------|-------------|
| S       | B-304010057 |
| M, L    | B-304010058 |
| XL, XXL | B-304010059 |

## CTI® OTS

### TILLBEHÖR

#### MX GEAR

| Beskrivning                                                       | Art.nr.     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Patella Cup                                                       | B-711130011 |
| Gear Guards                                                       | B-705000003 |
| MX Kit S (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)   | B-711140002 |
| MX Kit M (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)   | B-711140003 |
| MX Kit L (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)   | B-711140004 |
| MX Kit XL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)  | B-711140005 |
| MX Kit XXL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers) | B-711140006 |



#### SLEEVES

| Omkrets*       | Sofsleeve | Undersleeve | Oversleeve | Storlek | Omkrets*   | Sleeve with Mesh |
|----------------|-----------|-------------|------------|---------|------------|------------------|
| < 38 cm        | 20643     | 20251       | 20051      | XS      | < 43 cm    | SLV60011         |
| 38 - 45 cm     | 20644     | 20252       | 20052      | S       | 43 - 46 cm | SLV60012         |
| 45 - 49,5 cm   | 20645     | 20253       | 20053      | M       | 46 - 51 cm | SLV60013         |
| 49,5 - 54,5 cm | 20646     | 20254       | 20054      | L       | 51 - 54 cm | SLV60014         |
| 54,5 - 62 cm   | 20647     | 20255       | 20055      | XL      | 54 - 56 cm | SLV60015         |
| 62 - 71 cm     | 20647     | 20256       | 20056      | XXL     | 56 - 61 cm | SLV60016         |
| 71 - 86 cm     | 20647     | 20257       | 20057      |         |            |                  |

\* Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

### TILLBEHÖR

| Beskrivning             | Art.nr.     |
|-------------------------|-------------|
| CTi D-Ring Kit Standard | B-704132600 |
| CTi D-Ring Kit          | B-704132602 |
| CTi Condyle Pad Kit     | B-704130150 |
| Extension Stop Kit      | 22130       |
| Flexion Stop Kit        | 19254       |

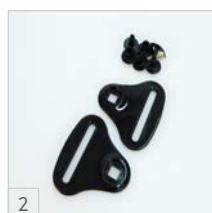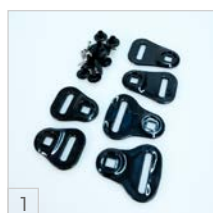



## CTi® CUSTOM

CTi Custom används när behovet av stabilitet är stort och man inte vill ge avkall på komfort och hållbarhet. Jämfört med OTS ger den större möjligheter till exakt passform om benet har en problematisk form. CTi:s vridstyva och starka kolfiberram som utrustats med anatomiskt korrekta Accutrac®-leder och flexibla underskal ger ett rigit exoskelett som stabiliserar knäleden. Foder med andasfunktion och beläggning av Össur Sensil® Silicone säkerställer att CTi Custom hålls i rätt position på benet så att ortosen fungerar optimalt.



## INDIKATIONER

- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Måttillverkad efter den enskilda patientens unika anatomi
- Handlaminerad, Rigid pre-preg kolfiberram
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter
- Möjlighet att välja färg
- Standardmodellen avsedd för medel till hög stötnivå
- Pro-Sportmodell för aktiviteter med högsta stötnivå (med extra lager av kolfiber jämfört med Standardmodellen)
- Vapor-modell för låg till medelhög stötnivå

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

### VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD



### SPECIALFÄRGER



CTi® Custom går även att få med motiv. Kontakta kundtjänst för mer information och prisuppgift.

## CTI® CUSTOM

### BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

| Standard    |             | Pro sport   |             | Vapor       |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vänster     | Höger       | Vänster     | Höger       | Vänster     | Höger       |
| B-116600010 | B-116500010 | B-117600010 | B-117500010 | B-118600010 | B-118500010 |

#### MÄTVERKTYG

| Beskrivning            | Art.nr.     |
|------------------------|-------------|
| Constant Force Caliper | B-312000000 |



### SMARTMEASURE®

Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

### TILLBEHÖR/TILLVAL

#### TIBIAPOLSTRING

| Beskrivning          | Art.nr.     |
|----------------------|-------------|
| CTI custom polstring | B-411500115 |

#### AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

| Beskrivning                          | Art.nr. |
|--------------------------------------|---------|
| AMS Wrap EVA                         | 22095   |
| AMS Wrap Neo                         | 22094   |
| AMS Wrap Neo XL (omkrets vad >43 cm) | 22152   |

#### BANDSATSER

| Storlek    | Art.nr.     |
|------------|-------------|
| S, M       | B-701140103 |
| L, XL, XXL | B-701140104 |

#### PCL KITS

| Storlek    | Art.nr.     |
|------------|-------------|
| S, M       | B-705000132 |
| L, XL, XXL | B-705000235 |

## CTI® CUSTOM

### TILLBEHÖR

#### BANDPOLSTRING

| Storlek | Art.nr.     |
|---------|-------------|
| S       | B-304010057 |
| M, L    | B-304010058 |
| XL, XXL | B-304010059 |



Strap pads

#### AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

| Beskrivning     | Art.nr. |
|-----------------|---------|
| AMS Wrap EVA    | 22095   |
| AMS Wrap Neo    | 22094   |
| AMS Wrap Neo XL | 22152   |



AMS Wrap

#### MX GEAR

| Beskrivning                                                       | Omkrets*   | Art.nr.     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Patella Cup                                                       |            | B-711130011 |
| Gear Guards                                                       |            | B-705000003 |
| MX Kit S (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)   | 43 - 46 cm | B-711140002 |
| MX Kit M (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)   | 46 - 51 cm | B-711140003 |
| MX Kit L (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)   | 51 - 54 cm | B-711140004 |
| MX Kit XL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)  | 54 - 56 cm | B-711140005 |
| MX Kit XXL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers) | 56 - 61 cm | B-711140006 |

MX Kit



#### SLEEVES

| Storlek | Omkrets*       | Softsleeve | Undersleeve | Oversleeve |
|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| S       | < 38 cm        | 20643      | 20251       | 20051      |
| M       | 38 - 45 cm     | 20644      | 20252       | 20052      |
| L       | 45 - 49.5 cm   | 20644      | 20253       | 20053      |
| XL      | 49.5 - 54.5 cm | 20645      | 20254       | 20054      |
| XXL     | 54.5 - 62 cm   | 20645      | 20255       | 20055      |
| XXXL    | 62 - 71 cm     | 20646      | 20256       | 20056      |
| XXXXL   | 71 - 86 cm     | 20647      | 20257       | 20057      |

| Storlek | Omkrets*   | Sleeve with Mesh |
|---------|------------|------------------|
| XS      | < 43 cm    | SLV60011         |
| S       | 43 - 46 cm | SLV60012         |
| M       | 46 - 51 cm | SLV60013         |
| L       | 51 - 54 cm | SLV60014         |
| XL      | 54 - 56 cm | SLV60015         |
| XXL     | 56 - 61 cm | SLV60016         |

\* Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

#### ANDRA TILLBEHÖR

| Beskrivning                                         | Art.nr.     |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| CTi D-Ring Kit Standard 2 x 1" and 2 x 1.5" D-rings | B-704132600 |
| CTi D-Ring Kit 2" 2x 2" D-rings                     | B-704132602 |
| CTi Condyle Pad Kit                                 | B-704130150 |
| Extension Stop Kit                                  | 22130       |
| Flexion Stop Kit                                    | 19254       |

# MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE

## CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM

Date: \_\_\_\_\_ Customer #: \_\_\_\_\_ Purchase order #: \_\_\_\_\_

### Required patient information

Patient ID: \_\_\_\_\_ Diagnosis: \_\_\_\_\_

Height: \_\_\_\_\_ cm. Weight: \_\_\_\_\_ kg. Date of Birth: \_\_\_\_\_ Sex(m/f): \_\_\_\_\_ ☐ Left leg ☐ Right leg

☐ Bilats - l/r

### Customer:

Contact: \_\_\_\_\_ Prescribing consultant: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_ Clinic: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Please fill out all mandatory fields  
(marked in bold)

### ☐ VAPOR

(For low to medium impact levels)

### ☐ STANDARD\*

(For medium to high impact levels)

### ☐ PRO SPORT

(For highest impact levels)

### OPTIONS

#### D-ring attachment

☐ Screwed ☐ Riveted\*

☐ Internal ☐ External\*

#### Thigh Liner

☐ None\* ☐ Sensil

☐ Evazote/Foam

#### Calf Liner

☐ Sensil\* ☐ Evazote/Foam

#### Extension Stops

☐ 0° ☐ 10°\* ☐ 20° ☐ 30° ☐ 40°

### SPECIAL MODIFICATIONS

(Additional charges may apply)

#### ☐ Flexion Stop Kit

\_\_\_\_\_° (0-90° installed)

#### ☐ PCL System

(Helps reduce posterior drawer)

#### ☐ ACL Cable Kit (Additional stability in ext)

#### ☐ Hyperextension Straps (5th strap added)

#### ☐ Ski Boot Attachment (Brace-to-boot)

☐ Other: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### SPECIAL NOTES:

☐ Please contact me about this order

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*This configuration is delivered by default, if nothing is filled in.

### SPECIAL CONDITIONS:

#### ☐ OA (Osteoarthritis unloading)

☐ Medial

☐ Lateral \_\_\_\_\_°

(Choose 1° to 7° of unloading, 4°\*)

#### ☐ Prominent VMO

#### ☐ Prominent VLO

#### ☐ Hockey Quads

#### ☐ Prominent Tibialis Anterior

#### ☐ Prominent Fibular Head

#### ☐ RTM

(Rounded Tibial Member)

#### ☐ Osgood-Schlatters Disease

#### ☐ Super Short

(For 1.60m and under)

#### ☐ Shorten Frame Component

Tibial ☐ 1.3cm ☐ 2.6cm ☐ 3.9cm

Femoral ☐ 1.3cm ☐ 2.6cm ☐ 3.9cm

### COLORS:

Select finish:

☐ MATTE\* ☐ GLOSS

Select color:

☐ Black\* ☐ Yellow

☐ Ocean Blue ☐ Orange

☐ White ☐ Lime Green

☐ Silver ☐ Pink

☐ Red ☐ Charcoal

☐ Champagne ☐ Navy Blue

### ACCESSORIES:

(Bolded are free with initial order only)

#### ☐ AMS WRAP

☐ Neoprene\* ☐ Evazote

#### ☐ Sofsleeve

#### ☐ Neoprene Undersleeve

#### ☐ Neoprene Oversleeve

#### ☐ Padded Sports Oversleeve

#### ☐ Sport Sleeve

#### ☐ MX Patella Cup

#### ☐ MX Gear Guards

#### ☐ MX Complete Kit

(Patella Cup, Gear Guards, Sport Sleeve)

☐ Other: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### CUSTOM PAINT:

(Additional fee plus extra delivery time)

Select custom finish:

☐ MATTE\* ☐ GLOSS

Select custom color:

☐ Hibiscus ☐ Sports Equipment

☐ Flag ☐ Camouflage

☐ Flames ☐ Single Color

☐ Metal ☐ 2-color Fade

☐ Sponge ☐ 2-color Half & Half

☐ Celestial ☐ Sports Fan

#### ☐ Special

(Provide design file with order)

# MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE

## CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM

### CUSTOM MEASURING SYSTEM

☐ Left leg ☐ Right leg

1: \_\_\_\_\_ Hinge Width

2: \_\_\_\_\_ Hinge Depth

**LATERAL MEASUREMENTS**

3: \_\_\_\_\_ Contour

4: \_\_\_\_\_ A-P

5: \_\_\_\_\_ Contour

6: \_\_\_\_\_ A-P

7: \_\_\_\_\_ Contour

8: \_\_\_\_\_ A-P

9: \_\_\_\_\_ Tibia

10: \_\_\_\_\_ Tibia

11: \_\_\_\_\_ Contour

12: \_\_\_\_\_ A-P

13: \_\_\_\_\_ Tibia

**MEDIAL CONTOURS**

14: \_\_\_\_\_ Contour

15: \_\_\_\_\_ Contour

**JOINT SPACE**

16: \_\_\_\_\_ Contour

17: \_\_\_\_\_ Contour

**CIRCUMFERENCES (in centimeters)**

18. Level A \_\_\_\_\_

19. Level B \_\_\_\_\_

20. Level C \_\_\_\_\_

21. Level E \_\_\_\_\_

22. Distal Border of Patella \_\_\_\_\_

23.

Caliper measurement at joint space (1.6 - 2.0 cm less than #1)  
Take measurement in a weight bearing position at full extension

**SHORTEN TIBIA COMPONENT/ SKI BOOT MEASUREMENT**

\_\_\_\_\_ cm from the distal border of the patella to the top of the boot. Ski boot attachment is not available if the measurement is less than 18cm.

### CMS INSTRUCTIONS

Patient should not be wearing shoes for the measurement procedure.

There should be no space between the block and the back of the knee. The system will not be accurate if the knee is measured in a flexed position.

1. Slide the lateral pad to the knee. Tighten to patient's individual comfort level. This measurement will be the actual width of the patient's knee brace.

2. Pre-set hinge depth at approximately 3.5cm, adjust if needed.

3. – 13. Patient should remain still with foot dorsiflexed throughout the lateral measurements and recording process.

9., 10. and 13. Measure using the horizontal bar of the tool measure the position of the highest point of the tibialis anterior.

• 9. As reference take the #1 hinge width / 2 - 1 = ...  
(for example 13cm / 2 - 1 = 5.5cm)

• 10. should be 0.5cm less than 9.

• 13. should be 1cm less than 9.


14. – 17. The patient may now relax throughout measuring the medial contours from the contracted position. Please note that with larger legs this measurement may be a negative value. Please read the numbers carefully and record negative values if necessary, such as -0.5 or -1.5

18. – 22. Take the measurements with a soft measuring tape ensuring that the tape is snug but not too loose/tight.


# MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE

## CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM


### SPECIAL CONDITIONS REFERENCES

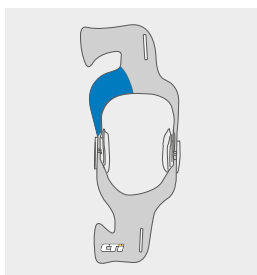


Prominent VLO

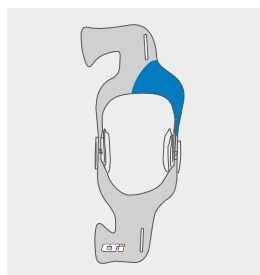


Prominent VMO

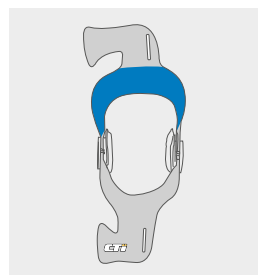


Hockey Quads

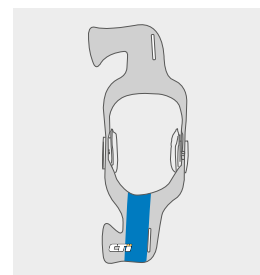


Prominent Tibialis Anterior

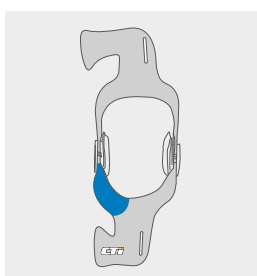


Prominent Fibular Head

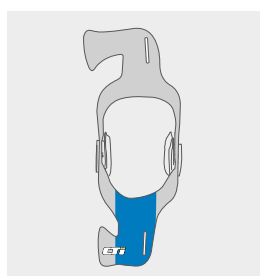


RTM  
(Rounded Tibial Member)

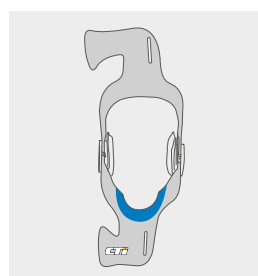


Osgood-Schlatters Disease

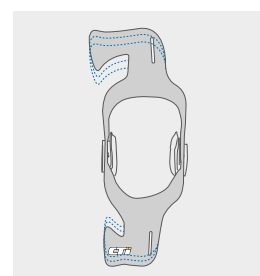

Shorten Femoral Component  
Shorten Tibial Component

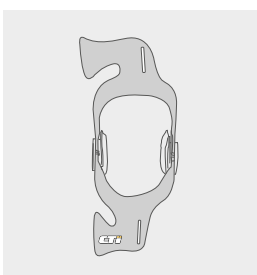

Super Short

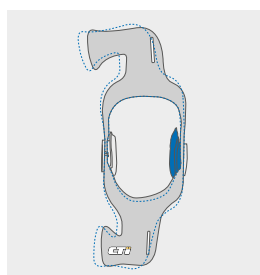

Osteoarthritis Unloading

## CTi®3

CTi®3 ger ett nytt perspektiv på dubbla upprätta knäortoser. Innovativ teknik gör CTi3 till ett utmärkt alternativ för de flesta av dina patienter. CTi3 är lämplig för både vardagsaktiviteter och sport, och erbjuder hög kvalitet med sin förbättrade konstruktion och anatomiska passform för ökad komfort.



## INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet och skydd kring knäet, till exempel skador på främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL), samt roterande och kombinerade instabiliteter.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Förbättrad konstruktion – Lätta, höghållfasta ramar i kolkomposit ger optimal styvhet i relation till vikt
- Anatomisk passform – Utformad för att passa fler benformer och införlivar ett Accutrac®-ledstycke som följer knäets anatomiska rörelse.
- Förbättrad komfort – Unika foder förbättrar komforten med sina speciellt sydda blockmönster, som ger en balans mellan dämpning och ventilation.
- Tillbehör och reservdelar som är lätta att använda, inklusive MX-satser, ersättningssatser med remmar, foder och flexionsstopp.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### CTi3

| Storlek | M/L-Mått | Omkrest  | Vänster   | Höger     |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| S       | 8-10 cm  | 40-47 cm | CTI-23002 | CTI-22002 |
| M       | 10-11 cm | 45-55 cm | CTI-23003 | CTI-22003 |
| L       | 11-13 cm | 52-61 cm | CTI-23004 | CTI-22004 |
| XL      | 13-14 cm | 58-67 cm | CTI-23005 | CTI-22005 |

Innehåller: Kondylkuddeset och sträckstoppsset (0° sträckstopp och standardkondylplatta är förinstallerade).

Notera: M/L-mätningar är den föredragna och mest exakta mätningen för CTi. Mätning av låromkrets ska användas när M/L-måtten är mellan olika storlekar.



## CTi<sup>®</sup>3

### TILLBEHÖR & RESERVDELAR

#### CTi3 MX KIT

| Storlek | Vänster   | Höger     |
|---------|-----------|-----------|
| S       | CTI-23132 | CTI-22132 |
| M       | CTI-23133 | CTI-22133 |
| L       | CTI-23134 | CTI-22134 |
| XL      | CTI-23135 | CTI-22135 |

Innehåller: Impact guard, Mesh-Sleeve, (CTi-Dekaler) och produktväska.

#### POLSTRING

| Storlek | Vänster   | Höger     |
|---------|-----------|-----------|
| S       | CTI-23322 | CTI-22322 |
| M       | CTI-23323 | CTI-22323 |
| L       | CTI-23324 | CTI-22324 |
| XL      | CTI-23325 | CTI-22325 |

#### HOOK SET

| Storlek | Vänster   | Höger     |
|---------|-----------|-----------|
| S       | CTI-23332 | CTI-22332 |
| M       | CTI-23333 | CTI-22333 |
| L       | CTI-23334 | CTI-22334 |
| XL      | CTI-23335 | CTI-22335 |



#### BANDSATSER

| Storlek | Art.nr.   |
|---------|-----------|
| S       | CTI-24222 |
| M       | CTI-24223 |
| L       | CTI-24224 |
| XL      | CTI-24225 |

#### TILLBEHÖR

| Beskrivning                                | Art.nr.   |
|--------------------------------------------|-----------|
| Guard Elastic Cord                         | CTI-24130 |
| Guard Screws                               | CTI-24140 |
| Tibial Wedge Pad                           | 22077     |
| Condyle Pad Set (Thin, Standard, Thick)    | CTI-24320 |
| Extension Stop Set (0°, 5°, 10°, 20°, 30°) | CTI-24430 |
| Flexion Stop Set (0°, 60°, 75°, 90°)       | CTI-24440 |
| Hinge Sticker Set                          | CTI-24450 |
| D-Ring Set                                 | CTI-24510 |

#### MESH-SLEEVE

| Storlek | Art.nr.  |
|---------|----------|
| S       | SLV60012 |
| M       | SLV60013 |
| L       | SLV60014 |
| XL      | SLV60015 |

## C180™ ROCKET

Med mindre storlek och Accutrac®-leder som är modifierade för att passa unga knän ger den lättviktiga C180 Rocket stöd för barn med ligamentinstabilitet.

### INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet kring knäet, till exempel roterande och kombinerade instabiliteter i främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med lättanvända extensionsstopp
- Halvstyv ram bestående av en vävd kolfiberram fylld med matrismaterial av akryl som är värmeformbar för att kunna anpassas



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position.
- Omkrets: strax under knäskålens distala gräns

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Skjutmått     | Omkrets        | Vänster  | Höger    |
|---------|---------------|----------------|----------|----------|
| S       | 7.6 - 8.9 cm  | 24.1 - 27.9 cm | C180KSL  | C180KSR  |
| L       | 8.3 - 9.5 cm  | 26 - 29.8 cm   | C180KLL  | C180KLR  |
| XL      | 8.9 - 10.2 cm | 27.9 - 32.1 cm | C1802XSL | C1802XSR |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning         | Art.nr.     |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| Motocross kit S / L | 10833       |           |
| Motocross kit XL    | B-705130072 |           |
| Patella Cup S / L   | 25029       |           |
| Patella Cup XL      | B-711130000 |           |
| Calf Liner S        | 25061 (L)   | 26062 (R) |
| Calf Liner L        | 25057 (L)   | 26058 (R) |
| Calf Liner XL       | 25106 (L)   | 25107 (R) |
| Thigh Liner S       | 25060 (L)   | 26063 (R) |
| Thigh Liner L       | 25056 (L)   | 26059 (R) |
| Thigh Liner XL      | 25104 (L)   | 25105 (R) |

## REBOUND® POST-OP KNEE

En enkel, mångsidig, postoperativ ortos som är lättanvänd för alla. Oavsett om du justerar ROM eller skenans längd, kommer du uppskatta enkelheten hos Rebound Post-op Knee.



Video: Rebound Post-Op Knee -  
Clinician Fitting instructions  
(3 min 42 sec)



### INDIKATIONER

- ACL, PCL, MCL, LCL skador/rekonstruktion
- Meniskkirurgi
- Kondylära frakturer
- Patellasenekirurgi
- Hög tibia osteotomi (HTO)
- Osteokondrala frakturer
- Tibiaplatå fraktur (Partiella eller totala) ledbandsrupturer i knät

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kräver inga verktyg, multifunktionell Smart-Fit™ förpackning
- Finns som universal, höger/vänster, contour och pediatric
- OneTouch™ -låsknapp för enkel justering av ROM med lock-out-funktion.
- Teleskop-ram med OneTouch™
- Färgkodning, Blue is You™, och numrering för banden indikerar vad patienten kan justera själv
- Quick-fit-spänne för enkel applicering

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### REBOUND POST-OP KNEE

| Storlek                    | Omkrets lår    | Cool      | Täckande polstring |
|----------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| Pediatric                  | 30,5 - 63,5 cm | B-8381470 |                    |
| Universal, Left contoured  | 41 - 81 cm     | B-8381680 | B-8382680          |
| Universal, Right contoured | 41 - 81 cm     | B-8381580 | B-8382580          |
| Universal                  | 41 - 81 cm     | B-8381480 | B-8382480          |
| Universal XL               | 41 - 96,5 cm   | B-8381490 | B-8382490          |

#### TILLBEHÖR

| Beskrivning                                  | Art.nr.   | Beskrivning               | Art.nr.   |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| ROM- lås, kit                                | B-8380005 | Standard buckle & pad kit | B-8381096 |
| Alligator velcro kit                         | B-8380006 | AMS Kit Paediatric        | B-8381093 |
| Adhesive velcro kit pediatric                | B-8380008 | AMS Kit Regular           | B-8381094 |
| Adhesive velcro kit universal / universal XL | B-8380007 | AMS Kit XL                | B-8381095 |

#### POLSTRING

| De Beskrivning scription | Art.nr.   | Täckande polstring |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| Pediatric                | B-8381072 |                    |
| Universal*               | B-8381082 | B-8382082          |
| Universal XL             | B-8381092 | B-8382092          |

\*Passar till universal, left contoured, right contoured

## FORMFIT POST-OP KNEE

### INDIKATIONER

- Efter operation/skada, kontroll av rörelseomfång eller immobilisering
- Indicerad för ligament- och frakturrelaterade operationer och när ett kontrollerat rörelseomfång är nödvändigt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stag som kan brytas loss för en enkel längdjustering utan verktyg
- OneTouch™ – ROM-led som är enkel att justera med låsningsfunktion från -10° till 30° (steg om 10°)
- Extensionskontroll från -10° till 90° (steg om 10°)
- Flexionskontroll från 0° till 120° (steg om 10°)
- Finns med svalt tyg eller skummodell, i 3 längder och två storlekar (Regular och XL)



### NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

| Storlek | Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella |
|---------|------------------------------------------------|
| XL      | 69 - 89cm                                      |
| Regular | 0 - 69cm                                       |

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek         | Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella | Cool       | Full Foam  |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Knee PO 61cm    | UP TO 69cm                                     | FPOK403100 | FPOK403200 |
| Knee PO XL 61cm | 69 - 89cm                                      | FPOK403102 | FPOK403202 |
| Knee PO 71cm    | UP TO 69cm                                     | FPOK403101 | FPOK403201 |
| Knee PO XL 71cm | 69 - 89cm                                      | FPOK403103 | FPOK403203 |
| Knee PO 41cm    | 69cm                                           | -          | FPOK403300 |
| Knee PO XL 41cm | 69 - 89cm                                      | -          | FPOK403301 |

### UTBYTESPOLSTRING

| Beskrivning                        | Cool   | Full Foam |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Replacement Softgood, Regular      | 403175 | 403275    |
| Replacement Softgood, XL           | 403176 | 403277    |
| Replacement Softgood, Regular Long | 403276 | 403278    |

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ROM stop locks (set of 20 lock clips) | B-8380005 |
| Strap Reduction Kit Cool              | 403199    |
| Strap Reduction Kit Full Foam         | 403299    |

## REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL

Rebound® Knee Immobilizer Universal har en universell design med 3 paneler som kan justeras för att passa de flesta bens omkrets. Med en klassificering som MR\*-villkorlig kan patienter säkert skannas i ett MR-system samtidigt som immobilisering bibehålls.

\*Se bruksanvisning för mer information.



### INDIKATIONER

- Akut immobilisering
- Immobilisering av knä före och efter kirurgi
- Traumatiska knäskador

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbara mediala/lateral stag och styva bakre stag begränsar knäets rörelser
- Universell design i 3 delar som förenklar lagerbehoven
- MR\*-villkorlig: skanna patienter säkert i ett MR-system samtidigt som immobilisering bibehålls.
- Min. låromkrets: 26 cm
- Max. låromkrets: 67,31 cm

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Längd | Art.nr |
|-------|--------|
| 30 cm | 210012 |
| 35 cm | 210014 |
| 40 cm | 210016 |
| 45 cm | 210018 |
| 50 cm | 210020 |
| 55 cm | 210022 |
| 60 cm | 210024 |

### TILLBEHÖR

| Beskrivning              | Art.nr      |
|--------------------------|-------------|
| Hot/Cold Therapy Gel Pad | GB7         |
| PCL Pad                  | B-705000036 |



PCL Pad

# REBOUND® KNEE BRACE

## INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Lätta till medelsvåra rupturer i främre korsbandet (ACL) eller bakre korsbandet (PCL)
- Rupturer i mediant kollateralligament (MCL) eller lateralt kollateralligament (LCL)

## FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Aerospacer-mateiral med suverän andasfunktion, avleder värme och ger ökad patientkomfort
- Lågprofilleder, möjlighet till extensions- och flexionsstopp (ROM-versionen). Formbara skenor för skräddarsydd pass-form och kontroll över knäets rörlighet
- Lätt svängd form och smidigt material bidrar till att före-bygga
- veckbildning och hudirritation i poplitealområdet
- Kan tas på och av från höger eller vänster sida tack vare löstagbara band. Enkel att ta på och av.
- Alla sleevemodeller kommer med en universalpelott för individuellt patellastöd



## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND ROM KNEE

| Storlek | Omkrets    | SLEEVE |        | WRAP   |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|
|         |            | Lång   | Kort   | Lång   | Kort   |
| XS      | 29 - 35 cm | 708152 | 708052 | 707152 | 707052 |
| S       | 35 - 41 cm | 708153 | 708053 | 707153 | 707053 |
| M       | 41 - 46 cm | 708155 | 708055 | 707155 | 707055 |
| L       | 46 - 52 cm | 708157 | 708057 | 707157 | 707057 |
| XL      | 52 - 57 cm | 708158 | 708058 | 707158 | 707058 |
| XXL     | 57 - 63 cm | 708159 | 708059 | 707159 | 707059 |
| XXXL    | 63 - 72 cm | -      | -      | 707160 | 707060 |

### REBOUND KNEE

| Storlek | Omkrets    | SLEEVE |  | WRAP   |  |
|---------|------------|--------|--|--------|--|
|         |            | Kort   |  | Kort   |  |
| XS      | 29 - 35 cm | 704052 |  | 703052 |  |
| S       | 35 - 41 cm | 704053 |  | 703053 |  |
| M       | 41 - 46 cm | 704055 |  | 703055 |  |
| L       | 46 - 52 cm | 704057 |  | 703057 |  |
| XL      | 52 - 57 cm | 704058 |  | 703058 |  |
| XXL     | 57 - 63 cm | 704059 |  | 703059 |  |
| XXXL    | 63 - 72 cm | -      |  | 703060 |  |

## FORMFIT® KNEE ROM

Formfit® ROM knäortoser är utformade för patienter med lätta till medelsvåra stukningar, sträckningar och/eller ligamentskador i knät. Den ger överlägsen stabilitet, skydd och kompression under rehabilitering efter skada.

Ortosen finns i fyra varianter, alla lika enkla att ta på. Det gör att du enkelt kan välja exakt rätt nivå av stöd för just din patient.

Ortosen är tillverkad i kraftiga material som andas och ger därmed både god komfort och hållbarhet.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra ACL- och PCL-skador
- MCL- och LCL-skador
- Kombinerade lätta sträckningar och stukningar i knäet

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Formbara, rigida och inställningsbara leder
- Universalpelott ingår till alla sleeve-versioner
- Öppen i knävecket

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### Formfit ROM KNEE SLEEVE

| Storlek | Omkrets    | Lång   | Kort   |
|---------|------------|--------|--------|
| XS      | 33 - 39 cm | 508352 | 508252 |
| S       | 39 - 47 cm | 508353 | 508253 |
| M       | 47 - 53 cm | 508355 | 508255 |
| L       | 53 - 60 cm | 508357 | 508257 |
| XL      | 60 - 67 cm | 508358 | 508258 |
| XXL     | 67 - 75 cm | 508359 | 508259 |

### Formfit ROM KNEE WRAP

| Storlek | Omkrets    | Lång   | Kort   |
|---------|------------|--------|--------|
| XS      | 33 - 39 cm | 507352 | 507252 |
| S       | 39 - 47 cm | 507353 | 507253 |
| M       | 47 - 53 cm | 507355 | 507255 |
| L       | 53 - 60 cm | 507357 | 507257 |
| XL      | 60 - 67 cm | 507358 | 507258 |
| XXL     | 67 - 75 cm | 507359 | 507259 |
| XXXL    | 75 - 81 cm | 507360 | 507260 |



Formfit ROM Knee Sleeve, kort modell



Formfit Knee Wrap, lång modell



## FORMFIT® KNEE HINGED

Formfit® knäortos är avsedd för patienter med lätta till medelsvåra stukningar, sträckningar eller ligamentskador. Den ger överlägsen stabilitet, skydd och kompression under rehabilitering efter skada. Ortosen är tillverkad i material som andas och ger därmed både god komfort och hållbarhet. Den är öppen i knävecket vilket ger minskad veckbildning och lägre risk för hudirritation, samtidigt som de styva men formbara skenor ger bästa möjliga passform.

Formfit knäortos finns i två versioner: Wraparound eller Sleeve

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra ligamentskador
- Kombinerade lätta sträckningar och stukningar i knät
- Instabiliteter i knät

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Universalpelott
- Enkel att ta på
- Öppen i knävecket
- Formbara leder

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### Formfit KNEE SLEEVE

| Storlek | Omkrets    | Kort   |
|---------|------------|--------|
| XS      | 33 - 39 cm | 504252 |
| S       | 39 - 47 cm | 504253 |
| M       | 47 - 53 cm | 504255 |
| L       | 53 - 60 cm | 504257 |
| XL      | 60 - 67 cm | 504258 |
| XXL     | 67 - 75 cm | 504259 |

### Formfit KNEE WRAP

| Storlek | Omkrets    | Kort   |
|---------|------------|--------|
| XS      | 33 - 39 cm | 503252 |
| S       | 39 - 47 cm | 503253 |
| M       | 47 - 53 cm | 503255 |
| L       | 53 - 60 cm | 503257 |
| XL      | 60 - 67 cm | 503258 |
| XXL     | 67 - 75 cm | 503259 |
| XXXL    | 75 - 81 cm | 503260 |



Formfit Knee Hinged, Sleeve



Formfit Knee Hinged, Wrap

## FORMFIT® KNEE MCL

Formfit Knee MCL ger yttre stabilitet och skydd vid aktiviteter med liten till medelstor kontakt/påverkan och under återhämtning efter skada. En unik, enkelledad överdrags-/sleevehybriddesign som skiljer den här ortosen från konkurrenterna. Ledens laterala rörelseomfång gör att den mediala sidan kan röra sig obehindrat. Dynamic Force Strap hjälper till att förhindra valguskraft under knäförlängning, medan den justerbara skenbensremmen förbättrar suspension genom att minimera glidning.

### INDIKATIONER

- Lindrigt till måttligt medialt kollateralligament (MCL) (grad I och grad II)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- En lateral ROM-led av stål (0° eller 20° sträckstopp, 70° flexionsstopp)
- Dynamic Force Strap förhindrar valguskraft
- Överdrags-/sleevehybrid för enkel påtagning
- Justerbar skenbensrem för förbättrad suspension

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Knäets omkrets på patellas mitt



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets lår | Vänster     | Höger       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| XS      | 33 - 39 cm  | B-237600001 | B-237500001 |
| S       | 39 - 47 cm  | B-237600002 | B-237500002 |
| M       | 47 - 53 cm  | B-237600003 | B-237500003 |
| L       | 53 - 60 cm  | B-237600004 | B-237500004 |
| XL      | 60 - 67 cm  | B-237600005 | B-237500005 |

## VENTOPRENE SK/VK

### INDIKATIONER

- Mild artros, sidostabilitet
- Översträckningsskydd (komplettera med översträckningskors)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Wraparound, lätt att applicera
- Ventilerad
- SK - normal längd
- VK - lång modell för ökad stabilitet

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets: mått tas vid mitten av patella



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets    | Sk      | Vk      |
|---------|------------|---------|---------|
| XS      | 25 - 28 cm | 6745-02 | 6747-02 |
| S       | 28 - 36 cm | 6745-03 | 6747-03 |
| M       | 33 - 41 cm | 6745-05 | 6747-05 |
| L       | 38 - 46 cm | 6745-07 | 6747-07 |
| XL      | 45 - 55 cm | 6745-08 | 6747-08 |
| XXL     | 55 - 65 cm | 6745-09 | 6747-09 |

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                | Art.nr. |
|----------------------------|---------|
| Översträckningskors, beige | TB601   |

## LYCRAFLEECE PATELLA LUX

### INDIKATIONER

- Patella luxation
- Patellofemorala smärtsymptom

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar pelott för individuellt tryck mot patella

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets: mått tas vid mitten av patella



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets    | Art.nr. |
|---------|------------|---------|
| XS      | 25 - 28 cm | 6525-02 |
| S       | 28 - 36 cm | 6525-03 |
| M       | 33 - 41 cm | 6525-05 |
| L       | 38 - 46 cm | 6525-07 |
| XL      | 45 - 55 cm | 6525-08 |

## FORMFIT® HINGED LATERAL J

Formfit® Hinged Lateral J är framtagen för användare som behöver stöd för/korrigering av patella. Ortosen har en sleeve design samt har löstagbara skenor.

### INDIKATIONER

- Stöd för/korrigering av patella vid tex.
  - Lateral patella luxation/subluxation
  - Lateral patellofemoral malalignment

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppet poplitea område
- Enkel att dra på och av
- Material som andas

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
- Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### FORMFIT HINGED LATERAL J

| Storlek | Omkrets lår | Omkrets vad | Höger  | Vänster |
|---------|-------------|-------------|--------|---------|
| XS      | 33 - 39 cm  | 25 - 30 cm  | 709152 | 709162  |
| S       | 39 - 47 cm  | 30 - 35 cm  | 709154 | 709164  |
| M       | 47 - 53 cm  | 35 - 40 cm  | 709155 | 709165  |
| L       | 53 - 60 cm  | 40 - 46 cm  | 709157 | 709167  |
| XL      | 60 - 67 cm  | 46 - 51 cm  | 709158 | 709168  |
| XXL     | 67 - 75 cm  | 51 - 56 cm  | 709159 | 709169  |

## FORMFIT® TRACKER

Formfit® Tracker med mikrojusterbart ReflexWing™-stöd riktar in patella och ger ett dynamiskt, lateralt stöd vid vanliga knäbesvär. Det lättviktiga FlyWeight™-tyget har andningsförmåga och en lågprofildesign som känns skön mot huden och minimerar glidning. PowerLock™-banden fungerar parallellt med värmeformbara CustomFit™-gångjärn för att ge anpassningsbart stöd för patienten.

### INDIKATIONER

För knätillstånd som kan förbättras av att rikta in knäskålen och/eller patienter som behöver extra sidostöd till knäskålen, t.ex:


- lateral subluxation/dislokation av knäskålen
- lateral felställning

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- CustomFit™-gångjärn för anpassad passform och stöd
- Anti-Migration Tech™ minimerar glidning
- PowerLock™-remmar för säkert sidostöd
- ReflexWing™-stöd för bekväm inriktning av knäskålen
- Mjukt FlyWeight™-tyg med andningsförmåga
- Hållbar, kan tvättas i maskin.



## NÖDVÄNDIGA MÅTT OCH BESTÄLLNINGSGRUPP

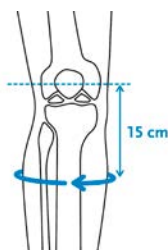

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

## BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek | Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella | Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella | Vänster | Höger  |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|
| XS      | 25 - 30 cm                               | 33 - 39 cm                              | 719162  | 719152 |
| S       | 30 - 35 cm                               | 39 - 47 cm                              | 719163  | 719153 |
| M       | 35 - 40 cm                               | 47 - 53 cm                              | 719164  | 719154 |
| L       | 40 - 46 cm                               | 53 - 60 cm                              | 719165  | 719155 |
| XL      | 46 - 51 cm                               | 60 - 67 cm                              | 719166  | 719156 |
| XXL     | 51 - 56 cm                               | 67 - 75 cm                              | 719167  | 719157 |
| 3XL     | 56 - 61 cm                               | 75 - 81 cm                              | 719168  | 719158 |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning          | Art.nr |
|----------------------|--------|
| ReflexWing™ Buttress | 719100 |

## FORMFIT® PRO KNEE

Össur Formfit® Pro Knee är en kompressiv knäslieve med SmartPad™-stöd för punktstöd och vaddering. Med vår patenterade design riktas knäskålen in, vilket gör den lämplig vid tillstånd som patellatendinit (hopparknä) och chondromalacia patellae.

Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande, uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav och har visat sig vara överlägset de ledande märkena när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga, så att knäet hålls svalt under användning. Lätta, löstagbara spiralstöd säkerställer att följsamheten och passformen blir optimal, medan tydliga markeringar på knäskålen gör den lätt att ta på sig.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



SmartPad™



### INDIKATIONER

Knätillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Lindriga sträckningar och stukningar
- Smärta i knäet
- Patellatendinit
- Känsla av instabilitet
- Chondromalacia patellae


### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller knäet svalt under användning
- Certifierad medicinsk kompression (20 - 30 mmHg)
- CoolVent™-teknik i knävecket för god ventilationsförmåga och komfort
- Patenterad SmartPad™ för målinriktat stöd och dämpning
- Markeringar på knäskålen för enkel placering
- Patenterat FoldLock™-system för enkel och säker påtagning
- Lätta, löstagbara spiralstöd i stål

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

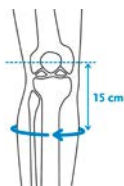

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

| Storlek | Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella | Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| XS      | 26 - 31 cm                                      | 36 - 41 cm                                     |
| S       | 31 - 36 cm                                      | 41 - 46 cm                                     |
| M       | 36 - 41 cm                                      | 46 - 51 cm                                     |
| L       | 41 - 46 cm                                      | 51 - 56 cm                                     |
| XL      | 46 - 50 cm                                      | 56 - 60 cm                                     |

# FORMFIT® PRO KNEE

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| SVART   |          | BLÅ     |          |
|---------|----------|---------|----------|
| Storlek | Art.nr.  | Storlek | Art.nr.  |
| XS      | FP100001 | XS      | FP101001 |
| S       | FP100002 | S       | FP101002 |
| M       | FP100003 | M       | FP101003 |
| L       | FP100004 | L       | FP101004 |
| XL      | FP100005 | XL      | FP101005 |



# FORMFIT® PRO KNEE FLITE

## INDIKATIONER

För knästillstånd som kan förbättras av kompression, till exempel:


- Lindriga stukningar och sträckningar
- Smärta i knäet
- Känsla av instabilitet

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller knäet svalt under användning
- CoolVent™-teknik i knävecket för god ventilationsförmåga och komfort
- Patenterat FoldLock™-system för enkel och säker påtagning
- Lätta, löstagbara spiralstöd i stål



## NÖDVÄNDIGA MÅTT

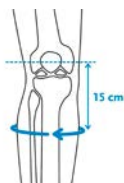

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

| Storlek | Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. | Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| XS      | 26 - 31 cm                                | 36 - 41 cm                               |
| S       | 31 - 36 cm                                | 41 - 46 cm                               |
| M       | 36 - 41 cm                                | 46 - 51 cm                               |
| L       | 41 - 46 cm                                | 51 - 56 cm                               |
| XL      | 46 - 50 cm                                | 56 - 60 cm                               |

## BESTÄLLNINGSGRUPP

### BLÅ

| Storlek | Art.nr.  |
|---------|----------|
| XS      | FP141001 |
| S       | FP141002 |
| M       | FP141003 |
| L       | FP141004 |
| XL      | FP141005 |



### SVART

| Storlek | Art.nr.  |
|---------|----------|
| XS      | FP140001 |
| S       | FP140002 |
| M       | FP140003 |
| L       | FP140004 |
| XL      | FP140005 |







## REBOUND® DIABETIC WALKER

Avlastning av plantarområdet i allmänhet och sårområdet i synnerhet har bevisats vara en viktig faktor vid behandling av fotsår.

Rebound Diabetic Walker är särskilt utformad för effektiv behandling av plantara fotsår. Den är enkel att ta av och sätta tillbaka under sårbehandlingen, samtidigt som den möjliggör patientens rörlighet under läkningstiden.

Rebound Diabetic Walker har stora fördelar jämfört med diabetes-skor och skoinlägg vad gäller läkningseffektivitet och fungerar även bättre än gipsning tack vare att ortosen är användarvänlig, lätt att applicera och medför låga kostnader.

### FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY

### INDIKATIONER

- Plantara fotsår som behöver avlastas.



**Video:** Rebound Diabetic Walker - Clinician Fitting Instructions (5 min 34 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Effektiv innersula laminerad i tre lager med stötupptagande, borttagbara hexagonala delar som avlastar såret i kombination med en värmeformbar ovansida i plastazote som distribuerar trycket och minimerar friktion.
- Unik övertrycksventil som förhindrar för högt tryck och balanserar kompression med en anpassad passform.
- Placeringsportaler gör att klinikern kan kontrollera att walkerortosen sitter som den ska i hälen för en korrekt placering av foten.
- Ett anatomiskt anpassat ytterskal som minimerar krafterna genom att immobilisera foten och vristen i 90 graders vinkel och samtidigt skydda foten.
- FlexEdge®-teknik som motverkar tryckpunkter.
- Rocker Bottom-sula för en jämn roll-over som ger en individuell, naturlig gång.
- Mjuk och ventilerande liner med låg friktion som kan tvättas för en bättre hygien och för att förhindra infektioner.
- Manipuleringsskyddat band för övervakning av acceptans.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



# REBOUND® DIABETIC WALKER

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND DIABETIC WALKER

| Storlek | Skostorlek  | Art.nr.     |
|---------|-------------|-------------|
| S       | 36 - 39     | B-242500002 |
| M       | 39,5 - 44   | B-242500003 |
| L       | 44,5 - 46,5 | B-242500004 |
| XL      | 47 - 50     | B-242500005 |

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

| Storlek | Liner       | Inlägg      | Evenup |
|---------|-------------|-------------|--------|
| S       | B-418500102 | B-418500202 | 10350  |
| M       | B-418500103 | B-418500203 | 10351  |
| L       | B-418500104 | B-418500204 | 10352  |
| XL      | B-418500105 | B-418500205 |        |



Evenup

### WALKER SKYDD

| Storlek | Sulskydd (2 st.) | Täckande överdrag | Täckande överdrag engångsskydd (20 st.) |
|---------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| S       | B-418500602      | B-418500502       | B-418500512                             |
| M       | B-418500603      | B-418500503       |                                         |
| L       | B-418500604      | B-418500504       | B-418500514                             |
| XL      | B-418500605      | B-418500505       |                                         |



Sulskydd

### STRUMPOR (2 ST.)

| Storlek            | Art.nr.     |
|--------------------|-------------|
| Rebound Sock SM/MD | B-41850070  |
| Rebound Sock LG/XL | B-418500704 |



Täckande överdrag

### COMPLIANCEBAND (5 ST.)

| Storlek   | Art.nr.     |
|-----------|-------------|
| Universal | B-418500300 |



Täckande överdrag  
Engångsskydd



Complianceband

## DH OFFLOADING WALKER®

### INDIKATIONER

- Plantara fotsår som behöver avlastas

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Reducerar skjuvkrafter genom att stabilisera fot och fotled i 90°
- Bred och låg rullsula ger mjuk rullning och ökad stabilitet
- Polstringens patenterade innersko förhindrar att foten glider
- Designad utifrån Össurs unika Active Offloading Insole
- Erbjuder en säker miljö för samtidigt bruk av sårvårdsmaterial
- Enkel att ta på och justera
- Möjlighet att skapa en snabb immobilisering med 5 cm bred gipstejp för ytterligare ordinationsföljsamhet



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Skostorlek  | Art.nr.   |
|---------|-------------|-----------|
| XS      | 33-35,5     | DH0200BLK |
| S       | 36 - 39     | DH0400BLK |
| M       | 40,5 - 44   | DH0600BLK |
| L       | 44,5 - 46,5 | DH0800BLK |
| XL      | 47-50       | DH1000BLK |

## TILLBEHÖR

### ERSÄTTNINGSDETALJER

| Storlek | Polstring | Aktiv offloading sula |
|---------|-----------|-----------------------|
| XS      | -         | 11742C                |
| S       | 10958     | PP04C                 |
| M       | 10959     | PP06C                 |
| L       | 10960     | 11740C                |
| XL      | -         | 11741C                |



## REBOUND® AIR WALKER

Rebound Air Walker har en mängd egenskaper som syftar till att ge ökat skydd, överlägsen kompression, enkel applicering och användning, förbättrad komfort och sist men inte minst lyckade vårdresultat.



### INDIKATIONER

- Stukningar av grad 2 och 3
- Posttraumatiskt
- Stabila frakturer
- Rehabilitering
- Postoperativt
- Mjukdelsskador
- Efter achillesseneruptur

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Helt omslutande skal med skyddande tåparti
- Soft FlexEdge™ för reduktion av tryckpunkter
- Den låga och breda rullsulan ger ökad stabilitet och underlättar normal gång
- Flexibel skalkonstruktion för optimal passform utan modifiering
- Skalet kan vid behov justeras vid vaden för ökad komfort
- Material som transporterar bort fukt och en tjock, bekväm polstring som tar upp stötar och andas
- Sammankopplade mediala/lateral blåsor för enkel uppblåsning och jämn kompression
- Integrerad och lätt åtkomlig pump och luftventil
- 1 par strumpor medföljer för ombyte

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



# REBOUND® AIR WALKER

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

### REBOUND AIR WALKER

| Storlek | Skostorlek  | Standard     | Low top      |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| XS      | 33 - 35.5   | B-242900001E | B-242900061E |
| S       | 36 - 39     | B-242900002E | B-242900062E |
| M       | 39.5 - 44   | B-242900003E | B-242900063E |
| L       | 44.5 - 46.5 | B-242900004E | B-242900064E |
| XL      | 47 - 50     | B-242900005E | B-242900065E |

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

### STANDARD

### SLIM

| Storlek | Standard    | Low top     | Standard    | Low top     |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| XS      | B-418000101 | B-418000161 | B-418030101 | B-418030161 |
| S       | B-418000102 | B-418000162 | B-418030102 | B-418030162 |
| M       | B-418000103 | B-418000163 | B-418030103 | B-418030163 |
| L       | B-418000104 | B-418000164 | B-418030104 | B-418030164 |
| XL      | B-418000105 | B-418000165 | B-418030105 | B-418030165 |

### OTHER ACCESSORIES

| Beskrivning                      | Art.nr.     |
|----------------------------------|-------------|
| Rebound Achilles Wedge Kit XS/S  | AWK0001     |
| Rebound Achilles Wedge Kit M     | AWK0005     |
| Rebound Achilles Wedge Kit L/XL  | AWK0009     |
| 5 layer Wedge kit                | AWK00015    |
| Självhäftande sula för hälkil    | WHW-W0107   |
| Rebound Hightop Sock SM/MD (2st) | B-418500703 |
| Rebound Hightop Sock LG/XL (2st) | B-418500704 |
| Rebound Lowtop Sock SM/MD (2st)  | B-418500903 |
| Rebound Lowtop Sock LG/XL (2st)  | B-418500904 |
| Remförlängningar                 | B-502100101 |

| Storlek | Evenup |
|---------|--------|
| S       | 10350  |
| M       | 10351  |
| L       | 10352  |



EVENUP

### WALKER SKYDD

| Storlek | Sulskydd (2 st.) | Täckande överdrag | Täckande överdrag engångsskydd (20 st.) |
|---------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| S       | B-418500602      | B-418500502       | B-418500512                             |
| M       | B-418500603      | B-418500503       |                                         |
| L       | B-418500604      | B-418500504       | B-418500514                             |
| XL      | B-418500605      | B-418500505       |                                         |

## FORMFIT® WALKER AIR

Formfit® Walker Air ger extra stabilisering för patienter med skador i mjukdelar, stukningar av grad 2 och 3 samt stabila frakturer. Det patenterade pneumatiska systemet ger god komfort även när svullnader uppstår under rehabiliteringsprocessen, och den intuitiva pumpen och tydligt markerade dekomprimerings-ventilen gör det enkelt att justera luft/tryck.

### INDIKATIONER

- Mjukdelsskador
- Stukningar av grad 2 och 3
- Stabila frakturer
- Postoperativ stabilisering av fotleden
- Trauma och rehabilitering

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Tillgänglig i låg eller standardhöjd
- Anatomiskt formade byglar för bättre passform och komfort
- Unik stöddämpande sula reducerar effektivt hälstöten vid gång
- Låg och bred rullsula ger ökad stabilitet och underlättar normal gång
- Rullsula med låg profil och bred bas för extra stabilitet

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek | Skostorlek  | Standard   | Low Top    |
|---------|-------------|------------|------------|
| XS      | 33 - 35,5   | A-W0200BLK | A-W0300BLK |
| S       | 36 - 39     | A-W0400BLK | A-W0500BLK |
| M       | 39,5 - 44   | A-W0600BLK | A-W0700BLK |
| L       | 44,5 - 46,5 | A-W0800BLK | A-W0900BLK |
| XL      | 47 - 50     | A-W1000BLK | A-W1100BLK |

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

| Storlek | Standard | Low Top |
|---------|----------|---------|
| XS      | 12349    | 12356   |
| S       | 10675    | 12357   |
| M       | 10678    | 12358   |
| L       | 10681    | 12359   |
| XL      | 10647    | 12360   |

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                | Art.nr.   |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 cm tygextension på bredden                              | WKSG-1BLK |
| Skenbens- och vadplattor när det behövs ytterligare skenor | WKSP100   |
| Varm-/kylbehandling för säker och återanvändbar kryoterapi | WKGEL100  |
| 5 layer Wedge Kit Universal                                | AWK00015  |
| Självhäftande inläggssula för hälkil                       | WHW-W0107 |



## FORMFIT® WALKER

Formfit® Walker ger immobilisering för patienter med skador i mjukdelar, vid stukningar av grad 2 och 3 samt stabila frakturer.

### INDIKATIONER

- Skador i mjukdelar
- Stukningar av grad 2 och 3
- Stabila frakturer

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- High top- och Low top-version
- Stötdämpande sula fördelar krafterna vid hälisättning
- Låg, bred rullsula som ger en stabil och naturlig gång
- Sömlös liner med andasfunktion



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Skostorlek  | Standard | Low Top  |
|---------|-------------|----------|----------|
| XS      | 33 - 35,5   | W0200BLK | W0300BLK |
| S       | 36 - 39     | W0400BLK | W0500BLK |
| M       | 40 - 44     | W0600BLK | W0700BLK |
| L       | 44,5 - 46,5 | W0800BLK | W0900BLK |
| XL      | 47 - 50     | W1000BLK | W1100BLK |

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

| Storlek | Standard    | Low Top     |
|---------|-------------|-------------|
| XS      | WKSG200BLK  | WKSG0300BLK |
| S       | WKSG400BLK  | WKSG500BLK  |
| M       | WKSG600BLK  | WKSG700BLK  |
| L       | WKSG800BLK  | WKSG900BLK  |
| XL      | WKSG1000BLK | WKSG1100BLK |

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                | Art.nr.   |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 cm tygextension på bredden                              | WKSG-1BLK |
| Skenbens- och vadplattor när det behövs ytterligare skenor | WKSP100   |
| Varm-/kylbehandling för säker och återanvändbar kryoterapi | WKGEL100  |
| 5 layer Wedge kit                                          | AWK00015  |
| Självhäftande inläggssula för hälkil                       | WHW-W0107 |

## AFO DYNAMIC

AFO Dynamic är en stark och lätt lösning för patienter med varierande grad av droppfot till följd av neurologiska tillstånd. Össur har infört kolfibertekniken från Flex-Foot®-produkterna i denna nya AFO Dynamic, som ger förbättrat stöd jämfört med traditionella ankel-/fotortoser. Kolfibern ger proportionell energiåtergivning mot tillförd kraft. Ett idealiskt material för denna dynamiska fotleds-ortos. AFO Dynamic ger ett mer effektivt gångmönster och lämpar sig även för aktiva människor.



### INDIKATIONER

- Droppfot sekundärt till:
  - MS
  - CVA
  - Charcot Marie Tothts sjukdom
  - Perifera pareser och andra neurologiska tillstånd
  - Skador efter överbelastning av nedre extremitet

### KONTRAINDIKATIONER

- Grav deformitet i fot/fotled
- Fluktuerande ödem
- Grav spasticitet

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kolfibern medför utmärkt förhållande mellan vikt och styrka samt dynamisk rörelse
- Den avsmalnande kolfiberhålen lagrar energi och tar upp krafter vid hälstöten
- Fullängdstå ger utmärkt stöd i energilagringsfasen samt reducerar stöteffekten i det andra benet
- Ger M-L-stabilitet i mitten av stödfasen
- Minskar energiförbrukningen genom att höften inte behöver lyftas vid gång
- Medial bygel gör ortosen mindre framträdande
- Öppet främre tibialt skal ger överlägsen anatomisk passform samt minskar värmeutveckling
- Rekommenderad vikt: upp till 120 kg

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd



# AFO DYNAMIC

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Höjdmått*  | Fotlängd   | Vänster  | Höger    |
|---------|------------|------------|----------|----------|
| XS      | 30 - 34 cm | 21 - 23 cm | O-102021 | O-102011 |
| S       | 32 - 36 cm | 24 - 25 cm | O-102022 | O-102012 |
| M       | 34 - 38 cm | 26 - 27 cm | O-102024 | O-102014 |
| L       | 36 - 40 cm | 28 - 29 cm | O-102026 | O-102016 |

\* Höjdmått tas från golvet upp till bredaste stället på vaden.

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSATS

| Storlek | Art.nr.  |
|---------|----------|
| XS      | O-102101 |
| S       | O-102102 |
| M       | O-102104 |
| L       | O-102106 |

OBS! Polstringssats levereras med övre och nedre fästband

## AFO LIGHT

AFO Light ger stöd endast på de ställen där det behövs, har ingen onödigt volym och ger ett kosmetiskt tilltalande utseende. Den bästa Flex-Foot®-teknologin och kolfibers energiåtergivande egenskaper gör AFO Dynamic till en stark och lätt lösning för människor med lätt till måttlig droppfot.



### INDIKATIONER

- Lätt till måttlig droppfot
- Charcot Marie Tooth disease (HMSN)
- Förslitningsskador på nedre extremiteter
- Kontraindikationer:
  - Grava ankel-/fotdeformiteter
  - Fluktuerand ödem
  - Svår spasticitet
  - Neuropati

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Proportionell respons mot tillförd kraft vid toe-off
- Stödjer foten så att den går fri från marken under svingfasen
- Kolfibertechniken medför utmärkt förhållande mellan vikt och styrka samt dynamisk rörelse
- Gradvis plantarflexion vid hälisättning
- Graderad styvhet vid häl och fot korresponderar mot reaktionskraften från marken
- Lätt att ta på och av
- Rekommenderad vikt: upp till 100 kg

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Höjdmått*  | Fotlängd   | Vänster  | Höger    |
|---------|------------|------------|----------|----------|
| S       | 32 - 36 cm | 22 - 26 cm | O-121022 | O-121012 |
| M       | 34 - 38 cm | 24 - 28 cm | O-121024 | O-121014 |
| L       | 36 - 40 cm | 26 - 30 cm | O-121026 | O-121016 |
| XL      | 38 - 42 cm | 28 - 32 cm | O-121028 | O-121018 |

\* Höjdmått tas från golvet upp till bredaste stället på vaden.

### TILLBEHÖR

| Beskrivning             | Art.nr.  |
|-------------------------|----------|
| AFO Light Accessory Kit | O-122101 |

# AFO LEAF SPRING

## INDIKATIONER

- Droppfot sekundärt till CVA
- Lätt droppfot sekundärt till andra neurologiska tillstånd

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Injektionsgjuten polypropylen - låg vikt
- Tunn, flexibel fotdel kan enkelt trimmas med vanlig sax
- Urtag vid hälen ger ytterligare komfort och att den passar i de flesta skor

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek | Skostorlek | Höjd  | Vänster  | Höger    |
|---------|------------|-------|----------|----------|
| S/M     | 36 - 39    | 27 cm | O-110227 | O-110127 |
| L       | 40 - 45    | 30 cm | O-110230 | O-110130 |

## REBOUND FOOT-UP®

Rebound Foot-Up® är en lättvikts vrist-/fotortos (AFO) som ger dynamiskt stöd till droppfot eller relaterade problem som kräver stöd för dorsalflexion.



### INDIKATIONER

- Droppfot




**Video:** Rebound Foot-Up and Foot Wrap - User Instructions (7 min 20 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamisk och diskret stöd för droppfot eller relaterade problem som kräver stöd för dorsalflexion.
- Förbättrad funktion, lätt att använda, bekväm och hög produktkvalitet.
- Möjliggör plantarflexion enligt individuella förutsättningar.
- Justerbar för medialt eller lateralt stöd.
- Formgiven för att följa fotens form.
- Justerbar bandlängd.
- Smart klämma gör det lätt att ta av och på ortosen.
- Rebound Foot-Up® Foot Wrap är tillval och kan användas när man är barfota, med öppna skor eller med sandaler

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt fotleden, mäts runt fotknölnarna

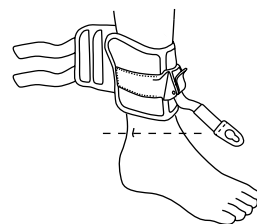


### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### REBOUND FOOT-UP ANKLE CUFF

| Storlek | Omkrets fotled | Art.nr.  |
|---------|----------------|----------|
| S/M     | 18 - 25 cm     | RFU50001 |
| L/XL    | 26 - 33 cm     | RFU50002 |

#RFU50001

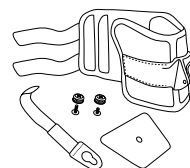


### TILLVAL

#### REBOUND FOOT-UP FOOT WRAP

| Storlek     | Omkrets fotled | Art.nr.  |
|-------------|----------------|----------|
| One Storlek | 20 - 28 cm     | RFU50101 |


#RFU50101

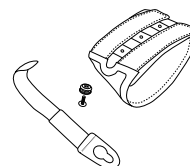

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                                                                                   | Art.nr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rebound Foot-Up Attachment Kit<br>Består av elastiskt band, inlägg, 1 mutter och 1 lång skruv | RFU50201 |
| Rebound Foot-Up Nuts & Bolts<br>Består av 5 muttrar, 3 långa och 2 korta skruvar              | RFU50202 |

#RFU50201

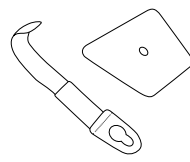

#RFU50202



## BOXIA AFO DROP FOOT

Boxia är en lätt och smidig AFO som ger dynamiskt stöd vid droppfot och liknande besvär. Boxia stödjer och stabiliserar foten under de moment i gångcykeln där ökad dorsalflexion behövs.

### INDIKATIONER

- Droppfot
- Stöd för bättre dorsalflexion

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidig och lätt design
- Låg vikt
- Kosmetisk tilltalande
- Enkel anpassning
- Elastisk justerbar rem för att styra kraft samt pronation/supination
- Gelpolstrad baksida på vristdel för minskad för ökad komfort, motverkad friktion samt minimerad kompression
- Även tillgänglig i modell där sko inte behövs

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets ovan malleolerna



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets    | Art.nr. |
|---------|------------|---------|
| XS      | 13 - 17 cm | AB010   |
| S       | 17 - 21 cm | AB011   |
| M       | 21 - 25 cm | AB012   |
| L       | 25 - 29 cm | AB013   |



## TILLBEHÖR

| Beskrivning                             | Art.nr. Vä | Art.nr. Hö |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Stöd för det inre fotvalvet S           | AB12I1     | AB12D1     |
| Stöd för det inre fotvalvet M           | AB12I2     | AB12D2     |
| Stöd för det inre fotvalvet L           | AB12I3     | AB12D3     |
| S-krokar för Boxia (2 st)               |            | AB13       |
| Elastisk dragrem för Boxia (1 st) Stl 1 |            | AB101      |
| Elastisk dragrem för Boxia (1 st) Stl 2 |            | AB102      |
| Elastisk dragrem för Boxia (1 st) Stl 3 |            | AB103      |
| Fästhake för Boxia (2 st)               |            | AB11       |



Stöd för det inre fotvalvet

**OBS! Denna produkt distribueras bara i Sverige.**



## FOOT-UP®

Foot-Up är en lätt ankelortos som ger dynamiskt stöd vid droppfot och liknande besvär. Denna revolutionerande ortos ger synlig förbättring i gång genom att ge stöd åt foten på det ögonblick som den lyfts upp.



Inlägg



Tillbehör utan sko



## INDIKATIONER

- Droppfot
- Stöd för bättre dorsalflexion

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidig design
- Låg vikt
- Osynlig vid användning
- Komfortabel
- Material som andas
- Polstrad
- Enkel anpassning
- Separata inlägg finns tillgängliga
- Även tillgänglig i modell utan sko

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt fotleden, mätt runt fotknölna
- Shoeless Foot-Up (Foot-Up utan sko): Omkrets runt vidaste delen på foten

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Omkrets vristen | Beige    | SVART   |
|---------|-----------------|----------|---------|
| M       | 18 - 21 cm      | 07811 -1 | 07810-1 |
| L       | 22 - 26 cm      | 07811 -2 | 07810-2 |
| XL      | 27 - 33 cm      | 07811 -3 | 07810-3 |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning                                    | Beige | SVART |
|------------------------------------------------|-------|-------|
| Separat inlägg till Foot-Up, universal storlek | 17811 | 17810 |

## TILLBEHÖR (UTAN SKO)

| Storlek | OMKRETS FOT | Beige   | SVART   |
|---------|-------------|---------|---------|
| S       | < 20 cm     | 27811-1 | 27810-1 |
| M       | 20 - 24 cm  | 27811-2 | 27810-2 |
| L       | 24 - 28 cm  | 27811-3 | 27810-3 |
| XL      | > 28 cm     | 27811-4 | 27810-4 |

## REBOUND® ANKLE BRACE

### INDIKATIONER

- Nedtrappning efter användning av Walker eller gips.
- Vid återgång till träning efter fotledsskada
- Stukningar av 1, 2 och 3 graden
- Kroniskt instabil fotled efter rehabilitering
- Förebyggande behandling

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Juster- och expanderbart vadbånd för bättre passform
- Öppen front, stabiliseringsband ger enkel och säker på- och avtagning
- Modellen med stabiliseringsband erbjuder ett flertal fästalternativ för varierande grad av stabilisering.
- Tillåter nedtrappning i takt med att rehabiliteringen framskrider

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

|         |            | Utan stabiliseringsband |             | Med stabiliseringsband |             |
|---------|------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Storlek | Skostorlek | Vänster                 | Höger       | Vänster                | Höger       |
| S       | 35 - 39,5  | B-231600012             | B-231500012 | B-231602512            | B-231502512 |
| M       | 39,5 - 42  | B-231600013             | B-231500013 | B-231602513            | B-231502513 |
| L       | 42+        | B-231600014             | B-231500014 | B-231602514            | B-231502514 |

## TILLBEHÖR

| Storlek       | Art.nr.     |
|---------------|-------------|
| Breddningskit | B-231900000 |
| Stödrem       | B-701160080 |

## FORMFIT® ANKLE BRACE

Formfit® fotledsortos ger stabilitet och stöd för fotleden. Den kan användas profylaktiskt, vid kronisk instabilitet eller vid reha-bilitering efter skada. Formfit fotledsortos är en hybrid mellan en styv ortos med byglar och ett mjukt fotledsstöd. Det ger en mycket bra passform som begränsar inversion, eversion, flexion och extension. Lågprofildesignen är enkel att använda med skor, och snabbsnörningen gör att det går snabbt att ta av och på ortosen. Material som andas gör att ortosen kan bäras hela dagen med god komfort. Formfit fotledsortos med figur-8 band utökat stöd begränsar fotledens rörlighet i större grad.

### INDIKATIONER


- Stukningar och sträckningar av grad I-II
- Kroniska instabiliteter
- I förebyggande syfte

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Snabbsnörning
- Inversions-/eversionskontroll
- Modell med figur-8 band

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Spannmått

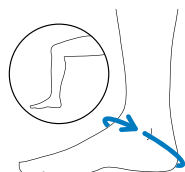

[Video: Formfit Ankle Brace - Fitting Instructions \(46 sec\)](#)

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Spannmått    | Standard    | Med figur 8 band |
|---------|--------------|-------------|------------------|
| XS      | 28 - 30,5 cm | B-212010001 | B-212000001      |
| S       | 30,5 - 33 cm | B-212010002 | B-212000002      |
| M       | 33 - 35,5 cm | B-212010003 | B-212000003      |
| L       | 35,5 - 38 cm | B-212010004 | B-212000004      |
| XL      | 38 - 40,5 cm | B-212010005 | B-212000005      |

## FORMFIT® ANKLE WITH SPEEDLACE

Formfit® fotledsortos med Speedlace ger stabilitet och stöd för fotleden. Den kan användas profylaktiskt, vid kronisk instabilitet eller vid rehabilitering efter skada. Ortosen är tillverkad i hållbara material och lågprofildesignen med snabbsnörning är smidig och enkel att bära med skor.

### INDIKATIONER


- Rehabilitering/mobilisering av skadad fotled (stukningar av grad I/II)
- För kroniska instabiliteter
- Förebyggande behandling

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel snörning och justering utan att skon behöver tas av
- Figur-8 band, efterliknar idrottstejpning för stöd vid inversion/eversion
- Uttagbara Skenor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Spannmått

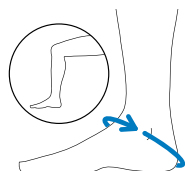

[Video: Formfit Ankle w/ Speedlace - Fitting Instructions \(58 sec\)](#)

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Spannmått    | Med skenor |
|---------|--------------|------------|
| XXS     | 23 - 25.5 cm | W-10621    |
| XS      | 25.5 - 28 cm | W-10622    |
| S       | 28 - 30.5 cm | W-10623    |
| M       | 30.5 - 33 cm | W-10625    |
| L       | 33 - 35.5 cm | W-10627    |
| XL      | 35.5 - 38 cm | W-10628    |
| XXL     | 38 - 40.5 cm | W-10629    |

## FORMFIT® PRO ANKLE

Össur Formfit® Pro Ankle är en kompressiv fotledsorto med två integrerade vristkuddar, och är avsedd att användas efter lindringa fotledsskador. Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande och uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav. Tack vare överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga jämfört med ledande märken, hålls fotleden sval under användning. CoolVent™-teknik på framsidan av fotleden ökar ventilationsförmågan och komforten ytterligare.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™



### INDIKATIONER

Fotledstillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Lindriga stukningar och sträckningar
- Rehabilitering av fotledsskada
- Lindrig instabilitet


### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller fotleden sval under användning
- Certifierad medicinsk kompression (20 - 30 mmHg)
- CoolVent™-teknik på framsidan av fotleden för extra ventilationsförmåga och komfort
- Två integrerade SmartPads™ på vristen för punktstöd och vaddering
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och mer säker applicering

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

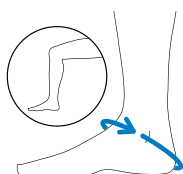

Spannmått. Ankeln i 90°.

| Storlek | Omkrets fotled |
|---------|----------------|
| XS      | 18 - 20 cm     |
| S       | 20 - 23 cm     |
| M       | 23 - 26 cm     |
| L       | 26 - 29 cm     |
| XL      | 29 - 32 cm     |

## FORMFIT® PRO ANKLE

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Vänster  | Höger    |
|---------|----------|----------|
| XS      | FP200201 | FP200101 |
| S       | FP200202 | FP200102 |
| M       | FP200203 | FP200103 |
| L       | FP200204 | FP200104 |
| XL      | FP200205 | FP200105 |



## FORMFIT® ANKLE STIRRUPS

Formfit® Ankle Stirrups är lätta och robusta. Oavsett om de bärs för att stödja en akut skada, kronisk instabilitet eller läkning efter gipsning, stabiliserar Formfit® Ankle Stirrups skadade fotleder genom att begränsa inversion/eversion-rörelsen.

Universaldesignen är noggrant konstruerad för att rymma malleolus på båda sidor och säkerställer en bra, bekväm passform. Det hals säkra hälbandet kan justeras för att passa de flesta fotleder. Vår unika Flex-Edge™ övergjutning omger bygelns ytterhölje och skyddar patientens hud från hårda kanter, vilket ger en ännu bekvämare passform. Den universella bygelkonstruktionen finns med två olika foderalternativ: uppblåsbar luft eller skum, vilket erbjuder varje patient en lösning som bäst passar dennes behov.

### INDIKATIONER

Situationer som kräver begränsad inversion/eversion. Dessa kan omfatta följande:

- Lindriga till måttliga stukningar av fotleden
- Kronisk instabilitet i fotleden
- Stöd efter borttagning av gips och användning av kryckor
- Rehabilitering av fotledsskador och/eller efter kirurgi

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Universalhölje, noggrant utformad för att passa både höger och vänster fotled
- Soft Flex-Edge™ övergjutning ger ökad komfort
- Justerbart hälband för att optimera passform och komfort för patienten
- Hals säkra silikonprickar som hjälper till att minska glidning och stabilisera foten inuti skon
- 2 dubbelriktade kardborreband säkerställer en säker och stabil passform
- Finns med uppblåsbart foder eller skumfoder i enlighet med dina behov
- Finns i storlekar för vuxna och ungdom

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Patientens höjd



| Storlek | Patientens höjd | Formfit Air Ankle Stirrup | Formfit Foam Ankle Stirrup |
|---------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Vuxen   | Över 160 cm     | 70350                     | 70352                      |
| Ungdom  | Under 160 cm    | 71350                     | 71352                      |

# EXOFORM® DORSAL NIGHT SPLINT

## INDIKATIONER

- Plantarfasciit
- Smärta efter statisk belastning
- Allmän hälsmärta
- Droppfot
- Achillestendinit
- Skador efter överbelastning av nedre extremitet

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Exoform-ortosens skal är förinställt på 85 till 90 grader för maximal terapeutisk nytta
- Justerbar aluminiumskena ger möjlighet till ytterligare 5 - 10 graders flexion vid behov
- Fotremmarna fångar upp framfoten och tåspetsarna för maximal sträckning av plantarfascian
- Foten omges av patenterad 3D-gjuten polstring som säker-ställer patientkomforten
- Flex Edge™ eliminerar skarpa kanter
- Hälremmen håller ortosen på plats
- Formbart dorsalt skal omger underbenet och förebygger rotation
- Antihalksula förebygger halkning vid normal gång

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGRUPP

| Storlek | Skostorlek  | Art.nr. |
|---------|-------------|---------|
| M       | 37,5 - 42,5 | W-50085 |
| L       | 43 - 48,5   | W-50087 |



## FORMFIT® NIGHT SPLINT

### INDIKATIONER

- Plantar Fascit
- Skador efter överbelastning av nedre extremitet
- Achilles Tendinit

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ställbara flexionsband ger justerbar flexion för stretch av plantarfaschian
- Användarvänliga snabbspännen framtill förenklar applicering
- Patenterad 3-dimensionell form säkerställer bra komfort och passform med polstring där det behövs
- Mjuk behaglig polstring med lycraytskikt, tvättbar. Minskar värme uppbyggnad



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Skostorlek | Med anti-halsula |
|---------|------------|------------------|
| S       | - 38       | 50023            |
| M       | 38,5 - 43  | 50025            |
| L       | 43,5+      | 50027            |

### TILLBEHÖR

| Beskrivning      | Art.nr. |
|------------------|---------|
| Kil i skumplast  | 10700   |
| Polstringssats S | 11760   |
| Polstringssats M | 11761   |
| Polstringssats L | 11762   |

## MPO 2000

### INDIKATIONER

- Hälavlastning vid hälsår
- Bibehållande av dorsalflexion
- Förhindra rotation av höft och ben

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Plastkomponenter i Kydex
- Vridbart skaft ger möjlighet att kontrollera fotens rotation

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Fotlängd   | Art.nr. |
|---------|------------|---------|
| S       | 15 - 19 cm | 251802  |
| M       | 19 - 23 cm | 251803  |
| L       | 23 - 26 cm | 251804  |
| XL      | 26 - 28 cm | 251805  |

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

| Storlek | Fotlängd   | Art.nr. |
|---------|------------|---------|
| S       | 15 - 19 cm | 251812  |
| M       | 19 - 23 cm | 251813  |
| L       | 23 - 26 cm | 251814  |
| XL      | 26 - 28 cm | 251815  |

# DH OFFLOADING POST-OP STYLE SHOE

## INDIKATIONER

- Plantara sår

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Passar både höger och vänster fot
- Designad utifrån Össurs unika Active Offloading Insole
- Rymmer förband
- Ytterst mjuk ovansida i nylon och förstärkt hälkappa för bästa komfort och stabilitet
- Patenterade löstagbara tåstycken bidrar till åtkomst till såret för daglig inspektion
- Semirigid rullsula

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Skostorlek  | Art.nr. |
|---------|-------------|---------|
| S       | 35,5 - 39   | 10340   |
| M       | 39,5 - 42   | 10341   |
| L       | 42,5 - 45   | 10342   |
| XL      | 45,5 - 48,5 | 10343   |

## TILLBEHÖR

### SULA

| Storlek | Art.nr. |
|---------|---------|
| S       | 12365   |
| M       | 12366   |
| L       | 12367   |
| XL      | 12368   |

## SOFT TOP POST-OP SHOE

### INDIKATIONER

- För användning efter mjukdelsskada, trauma

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ovansidan i bomull/polypropylen låter patientens fot andas och ger utmärkt komfort
- Fästremmarna är lätta att använda och gör skon lätt att ta på och av

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

|         | Skostorlek  |             | Art.nr |       |
|---------|-------------|-------------|--------|-------|
| Storlek | Herr        | Dam         | Herr   | Dam   |
| S       | 35,5 - 38   | 35 - 36     | 18013  | 18003 |
| M       | 38,5 - 42   | 37,5 - 38,5 | 18015  | 18005 |
| L       | 43 - 45     | 40+         | 18017  | 18007 |
| XL      | 45,5 - 48,5 | -           | 18018  | -     |

## CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE

### INDIKATIONER

- För användning med kort bengips

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stötdämpande gipssko med rullsula
- Kardborrefäste, öppen tå

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Innersulans längd



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek | Sulans längd   | Blå       | SVART   |
|---------|----------------|-----------|---------|
| XS      | 18 cm          | 308XS     | -       |
| S       | 19 - 23 cm     | 308SM     | B308SM  |
| S/M     | 23 - 25 cm     | 308SM/MED | B308S/M |
| M       | 25,5 - 26,5 cm | 308MED    | B308MED |
| M/L     | 26,5 - 28 cm   | 308MLG    | B308MLG |
| L       | 28 - 30,5 cm   | 308LG     | B308LG  |
| XL      | 30,5 - 35 cm   | 308XLG    | B308XLG |

## INLÄGG

Novatherm är tunna och smidiga inlägg med en mjuk och behaglig ovansida av Alcantara. Kanterna är mjuka och flexibla, vilket gör inläggen komfortabla och lättanpassade. En formfast termoplastbotten ger inläggen stabilitet och styrka. Materialet är formbart vid 110°C, vilket möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.

### NOVATHERM LANGE

Traditionell Lange-modell med extra höga och stabila kanter. Finns i junior storlekar, från strl. 19/20.

#### NOVATHERM LANGE

| Storlek       | Art.nr.          |
|---------------|------------------|
| 19/20 - 47/48 | 981 289 0 + strl |



### NOVATHERM COMFORT

Novatherm Comfort är ett tunt, smidigt och formbart inlägg och ett utmärkt alternativ i kombination med de flesta skomodeller.

#### NOVATHERM COMFORT, LÅNG OCH BRED

| Storlek | Art.nr.           |
|---------|-------------------|
| 35 - 48 | 985146-454 + strl |



### NOVATHERM COMFORT MED PPT

Tunt, smidigt och formbart inlägg i likhet med övriga inlägg i Novatherm-serien. Här i utförande med ett tunt lager stötdämpande PPT under toppskiktet av beige Alcantara. Lång modell.

| Storlek | Art.nr.           |
|---------|-------------------|
| 35 - 48 | 985361-197 + strl |



## INLÄGG

### NOVATHERM AKTIV

Samma karakteristiska funktioner som Novatherm Comfort men med högre kanter. Gjord på en lästform för effektivare utnyttjande av fotsulans fettkudde.

#### NOVATHERM AKTIV

| Storlek | Art.nr.           |
|---------|-------------------|
| 35 - 48 | 986543-454 + strl |



### NOVATHERM AKTIV MED PPT

Novatherm Aktiv med PPT har samma funktioner som Novatherm Aktiv. Här i utförande med ett tunt lager stötdämpande PPT under toppskiktet av svart Alcantara.

#### NOVATHERM COMFORT, LÅNG OCH BRED

| Storlek | Art.nr.       |
|---------|---------------|
| 35 - 48 | 986539 + strl |



### KOLFIBERINLÄGG

Förformade kolfiberinlägg.

| Storlek | Tjocklek | Art.nr.         |
|---------|----------|-----------------|
| 36 - 48 | 1,6 mm   | 047950 0 + strl |
| 36 - 47 | 1,9 mm   | 047955 0 + strl |



### DIABETIC WALKER INSOLE

Passar till Rebound Diabetic Walker.

| Storlek | Höger         | Vänster       |
|---------|---------------|---------------|
| S       | 972659-006-S  | 972759-006-S  |
| M       | 972659-006-M  | 972759-006-M  |
| L       | 972659-006-L  | 972759-006-L  |
| XL      | 972659-006-XL | 972759-006-XL |



# INLÄGG

## DIABETIC INSOLE

Temporära inlägg för behandlingsskor.

| Storlek | Art.nr.           |
|---------|-------------------|
| 35 - 47 | 970058-000 + strl |









# ORTHOTIC SOCK, AFO/KAFO

## INDIKATIONER

- Komfort och skydd under ortos

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Rundstickad strumpa med DuPont Coolmax material med lycra spandex vilket gör strumporna väldigt mjuka och elastiska
- Materialet transporterar effektivt bort svett från huden
- X-static - ett nytt material som innehåller silverpartiklar vilket ger en effektiv bekämpning av dålig lukt och bakterier



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| ORTOSSTRUMPA AFO - X-STATIC - FÄRG: SILVER |             |         |
|--------------------------------------------|-------------|---------|
| Storlek                                    | Mått        | Art.nr. |
| Spädbarn                                   | 5,0 x 23 cm | 204821  |
| Barn, S                                    | 5,5 x 28 cm | 204822  |
| Barn, M                                    | 6,5 x 36 cm | 204823  |
| Vuxen, S                                   | 7,5 x 46 cm | 204824  |
| Vuxen, M                                   | 9,0 x 51 cm | 204825  |

| ORTOSSTRUMPA AFO - FÄRG: VIT |             |         |
|------------------------------|-------------|---------|
| Storlek                      | Mått        | Art.nr. |
| Spädbarn                     | 5,0 x 23 cm | 204801  |
| Barn, S                      | 5,5 x 28 cm | 204802  |
| Barn, M                      | 6,5 x 36 cm | 204803  |
| Vuxen, S                     | 7,5 x 46 cm | 204804  |
| Vuxen, M                     | 9,0 x 51 cm | 204805  |

| ORTOSSTRUMPA AFO - FÄRG: SVART |             |         |
|--------------------------------|-------------|---------|
| Storlek                        | Mått        | Art.nr. |
| Spädbarn                       | 5,0 x 23 cm | 2048012 |
| Barn, S                        | 5,5 x 28 cm | 2048022 |
| Barn, M                        | 6,0 x 36 cm | 2048032 |
| Vuxen, S                       | 7,5 x 46 cm | 2048042 |
| Vuxen, M                       | 9,0 x 51 cm | 2048052 |

| ORTOSSTRUMPA KAFO - FÄRG: VIT |                   |         |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| Storlek                       | Mått              | Art.nr. |
| Barn, lång                    | 6,5 x 46 cm       | 204851  |
| Vuxen, S                      | 10 x 6,5 x 61 cm* | 204852  |
| Vuxen, M                      | 15 x 9 x 71 cm*   | 204853  |

\*Säljes styckvis

## TOELESS FRACTURE SOCK

### INDIKATIONER

- Används oftast i kombination med frakturortos eller annan typ av post operativ behandlingsortos, då viss kompression är önskad

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mycket elastisk strumpa av tjock och härlig kvalitet
- Den konturerade formen ger strumpan en avvägd och behaglig kompression

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Storlek         | Längd | Mått        | Art.nr. |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| Kort / Underben | 51 cm | 5,0 x 22 cm | 204952  |
| Lång / Helben   | 71 cm | 5,5 x 27 cm | 204954  |



## COMPRESSION STOCKINET

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kompressionstrika för avgjutning av exempelvis stäskal, lårbensprotes, korsett etc.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| Bredd | Längd | Art.nr. |
|-------|-------|---------|
| 30 cm | 10 m  | 6041012 |



## CAST-RITE FRACTURE/ORTHOTIC SOCK

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kan användas som skydd vid avgjutning eller under ortos.
- Anpassar sig väl till armens kontur. Kan tvättas.
- Material/tjocklek: Acryl/Lycra. 1-ply.
- Måtten nedan är tagna med strumpan liggande på plant underlag.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

| BESKRIVNING                                 | Längd | BREDD     | Art.nr.        |
|---------------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Cast-Rite strumpa med hål för tumme (vuxen) | 25 cm | ca 7,5 cm | KR1AL1AO10     |
| Cast-Rite strumpa med hål för tumme (barn)  | 25 cm | ca 5 cm   | KR1AL1-AOCH-10 |







## FAST FIT® CHIPMUNK®

### INDIKATIONER


- För patienter med måttlig pronation och korrigerbar fotposition.
- Patienter med sänkt medialt fotvalv, måttlig framfotsabduktion och eversion i hälen.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som ett konturerat skoinlägg ger.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Hög medial trimlinje
- Liner i tyg
- Ytterskal i plast
- Platt tådel
- Definierat hålfotsstöd Prefabricerad
- Plantaryta

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50 - 9.50 inch. wide

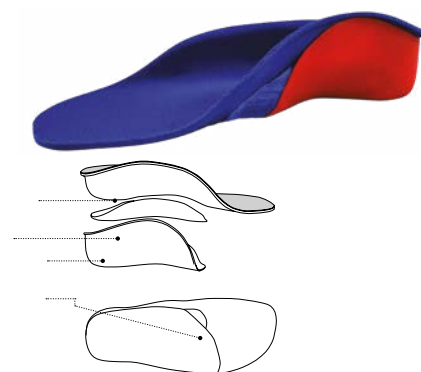

Moderate pronation, unstable foot position.

Improved foot alignment and steadier gait.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

| Chipmunk |   | Storlek inches |   | Sida (left/right) |   | Art.nr.   |
|----------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------|
| DAF10    | + | 6,25           | + | Left              | = | DAF10625L |



## FAST FIT® CRICKET®

### INDIKATIONER

- För patienter med korrigerbar fotposition
- Patienten med lätt till måttlig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter som behöver fri dorsalflexion och plantarflexion

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stadigt ytterskal
- Delvis omslutande inre liner
- Prefabricerad

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

| Cricket |   | Storlek inches |   | Sida (left/right) |   | Art.nr.   |
|---------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------|
| DAF40   | + | 6,25           | + | Left              | = | DAF40625L |



## JUMPSTART® LEAP FROG®

### INDIKATIONER

- Patienter med korrigierbar fotposition
- Patienter med måttlig till kraftig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter med behov av sensoriskåterkoppling som en helkonturerad fotsula ger
- Patienter som behöver fri dorsalflexion och plantarflexion.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppen vristtrimlinje
- Helt omslutande inre liner
- Stadigt ytterskal
- Prefabricerad

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

| Leap frog |   | Storlek inches |   | Sida (left/right) |   | Art.nr.   |
|-----------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------|
| DAF30     | + | 6,25           | + | Left              | = | DAF30625L |



## JUMPSTART® BUNNY®

### INDIKATIONER

- Patienter med korrigierbar fotposition
- Patienter med måttlig till kraftig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter med lätt instabilitet i svängfasen eller överdriven plantarflexion som yttrar sig som lätt tågång eller hyperextension i knäet.
- Patienter som behöver visst motstånd mot plantarflexion.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Helt omslutande inre liner
- Proximal bakre elastisk rem



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

| Bunny |   | Storlek inches |   | Sida (left/right) |   | Art.nr.   |
|-------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------|
| DAF20 | + | 6,25           | + | Left              | = | DAF20625L |





# JUMPSTART® KANGAROO®

## INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition.
- Patienter med måttlig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter med motverka överdriven plantarflexion som yttrar sig som kraftig tågång eller hyperextension i knäet.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter som behöver fri dorsalflexion

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppen främre del
- Stadigt ytterskal och bakre bändel
- Prefabricerad
- Helt omslutande inre liner

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

| Kangaroo |   | Storlek inches |   | Sida (left/right) |   | Art.nr.   |
|----------|---|----------------|---|-------------------|---|-----------|
| DAF50    | + | 6,25           | + | Left              | = | DAF50625L |



No casting needed!





# ÖSSUR SERVICES

## FÖRETAGSINFORMATION

### POSTADRESS

Össur Nordic  
Box 7080  
SE-164 07 Kista

### BESÖKSADRESS

Kistagången 12, 2 tr  
SE-164 40 Kista

tel: +46 (0) 18 18 22 00  
fax: +46 (0) 18 18 22 18  
e-mail: info@ossur.com

ÖSSUR NORDIC STÅR FÖR FRAKTEN VID FÖLJANDE RETURER:

- Reklamationsärenden inom garantin
- Reparationer inom garantin

## RETURER

VAROR KREDITERAS ENLIGT FÖLJANDE:

- Äldre än 365 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
- Custom Made-produkter återtages ej.
- Produkter i osäljbart skick återtages ej.

Vid retur till Össur behöver du ha ett RSA-nummer. Detta nummer får du genom att kontakta Össur Nordics Kundsupport via: info@ossur.com eller +46 (0) 18 18 22 00.

För bästa och snabbaste service vill vi att du vid kontakten har dessa uppgifter framtagna:

- Kundnamn/Kundnummer
- Artikelnummer
- Ev. LOT eller Serienummer
- Fakturanummer
- Anledning till retur

Össur återkommer med ett RSA-nummer. Detta RSA-nummer ska skrivas tydligt utanpå godset.

ÖNSKAR NI ATT SKICKA RETUREN SJÄLV, SÅ SKICKAS DEN TILL:

UPS SCS Sweden AB  
To: Össur  
Stensättravägen 5-7  
127 39 Skärholmen  
SWEDEN

alternativt till:

Össur Europe B.V.  
Receiving Department  
De Schakel 70  
Eindhoven  
5651 GH  
NETHERLANDS

OBS! Returer utan RSA-nummer återtages ej.

## FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

LEVERANSVILLKOR: Fritt vårt lager.

BETALNINGSVILLKOR: 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Össurs registrerade varumärken är registrerade i USA och utvalda länder.

## TVÄTTRÅD

### TVÄTTRÅD FÖR:

Exoform handledsortos, Exoform CTS handleds ortos, Formfit handledsortos, Spectra och Spectra Air handledsortos, Formfit tumortos, Universal thumb splint.

Produkten kan rengöras med mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Handflatans aluminiumstöd ska avlägsnas innan tvätt. Använd inte blekningsmedel eller starkt rengöringsmedel. Tvätta inte i tvättmaskin.

Lufttorkas enbart. Krama eller vrid inte ur ortosen. Placera inte i en torktumlare eller i närheten av ett element.



### TVÄTTRÅD FÖR:

Samtliga Alfa-, Lycrafleece-, och Ventroprene ortoser.

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråd nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



## ANTECKNINGAR

---

## ANTECKNINGAR

---

## ANTECKNINGAR

---





FOLLOW ÖSSUR ON



TEL +46 18 18 22 00  
info@ossur.com

WWW.OSSUR.SE

