


ÖSSUR LOGIC

Guía para profesionales sanitarios

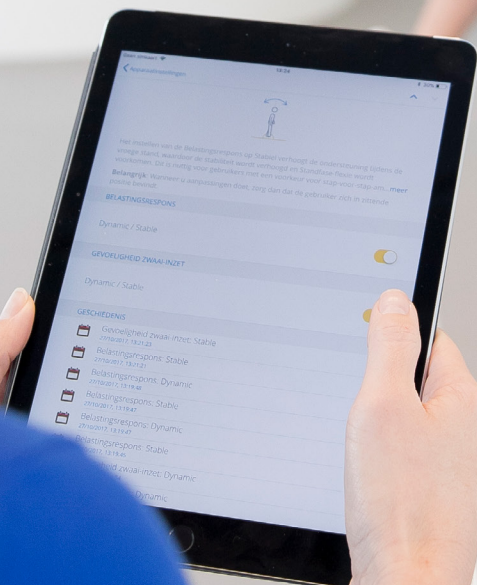

1 Descargar Össur Logic

Descargue la aplicación Össur Logic en la App Store de Apple.
Compruebe que su iPad o iPhone está conectado a Internet y que RHEO KNEE® está encendida.



Logic - Guía del usuario



¿Ya tiene una cuenta Össur Logic? | INICIAR SESIÓN |

2 A Crear una cuenta/Iniciar sesión

Si es la primera conexión: Pulse “REGISTRAR”.

B Si ya tiene una cuenta:

Pulse “INICIAR SESIÓN” e introduzca sus datos de acceso.

A continuación, vaya al paso 5.

3 A Rellenar sus datos

Si es un profesional sanitario, introduzca su **número de cliente**, que encontrará en sus facturas de Össur (ES/PT0XXX).

En caso de dificultad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

B Para usuarios de RHEO KNEE®

Si es un usuario, pulse **Omitir**.



Nombre

Apellido

Correo electrónico

4 Crear sus datos de acceso

Rellene los campos y elija una contraseña.
Para finalizar su registro, confirme su dirección de correo electrónico con el enlace que habrá recibido en dicha dirección.

Autorice la conexión Bluetooth.

5

Añadir la Rho Knee

Pulse Añadir dispositivo.




Dispositivos Editar +

No se ha encontrado ningún dispositivo

O todavía no ha añadido un dispositivo, o se han eliminado todos los dispositivos

Añadir dispositivo

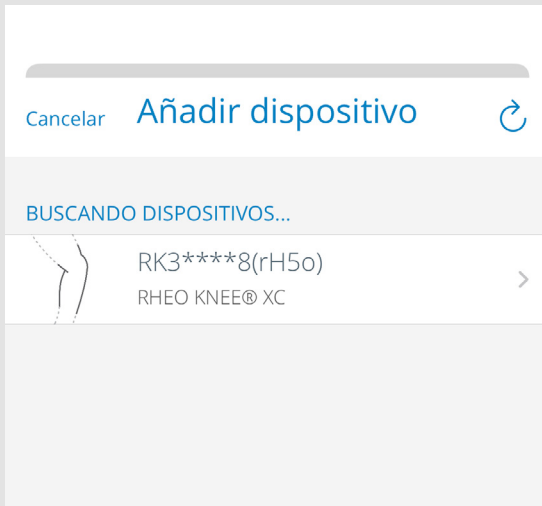

B Seleccionar el dispositivo


Aparecerán todas las prótesis biónicas Össur que se encuentren dentro del alcance y encendidas. Su RHEO KNEE® aparecerá con el formato **RK3******

Si su RHEO KNEE® no aparece: es posible que su dispositivo iOS esté emparejado con demasiados dispositivos. Salga de Össur Logic y vaya a la Configuración/Bluetooth. Borre los que ya no necesite y vuelva a intentarlo.

C Especificar el código de emparejamiento

Especifique el código de emparejamiento, que se corresponde con los 6 últimos dígitos del número de serie que aparece en la parte posterior de RHEO KNEE®: “HFXXXXXX”.

La rodilla emitirá un pitido cuando esté emparejada.

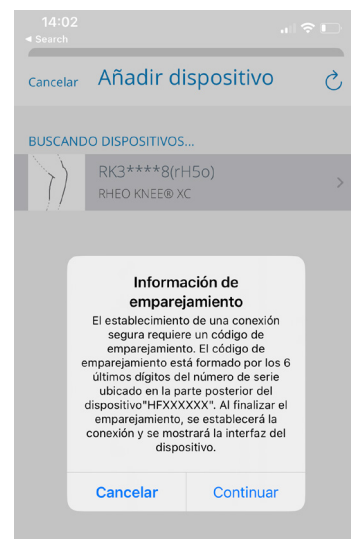

Conexión correcta

La rodilla está ahora conectada a Össur Logic; puede acceder a los diferentes ajustes de la rodilla y del usuario.

6

A Realizar la calibración


- Pulse el icono de ajustes del dispositivo.
- Coloque la rodilla en posición vertical, sin el encaje.

No debe aplicarse ninguna carga sobre la pirámide superior de la rodilla.

B Pulse Calibración

- A continuación
- Iniciar

La calibración se realizará automáticamente.

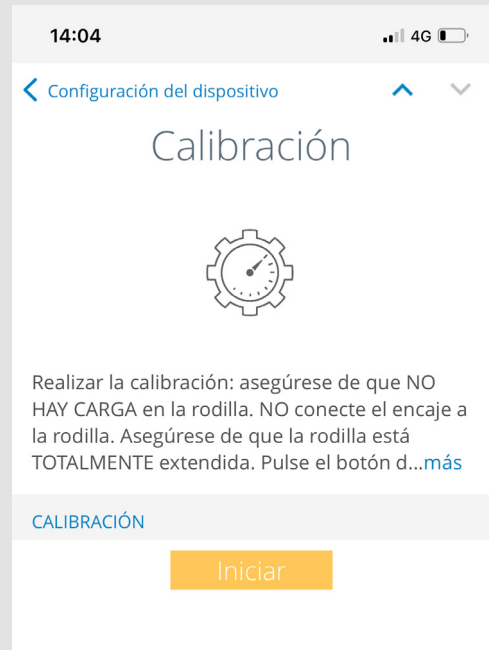

14:05

4G

Configuración del dispositivo

Ajuste Automático



Ajuste automático del dispositivo: pida al usuario que se siente, pulse el botón de "Inicio", haga que el usuario camine 30 pasos. Una vez completado el ajuste automático, puede r...más

AJUSTE AUTOMÁTICO

Iniciar

7

Realizar el ajuste automático

- Vuelva a la página anterior (ajustes del dispositivo).
 - Pulse Ajuste automático.
 - Coloque la prótesis al usuario.
 - Compruebe la alineación estática.
 - Compruebe la alineación dinámica.
- Los ajustes de fábrica permiten comprobar la alineación dinámica con seguridad.*
- Pulse el botón de inicio.
 - Pida al usuario que camine 30 pasos a su velocidad habitual por suelo llano. Con esto se realizará el ajuste automático.

¡Eso es todo!

RHEO KNEE® ya está lista para el uso.

También puede realizar ajustes manuales mediante las diferentes opciones de la sección **Ajustes avanzados**.

