


ÖSSUR BRACING & SUPPORT

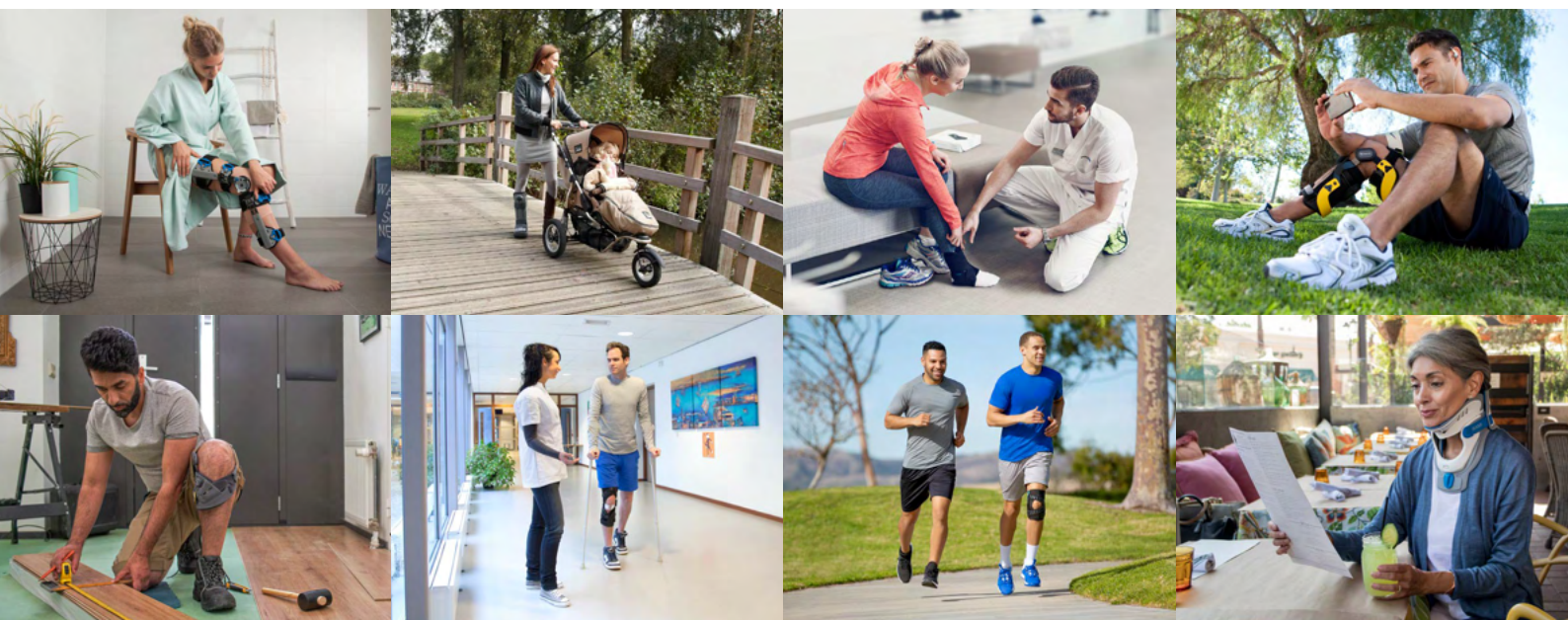

ÖSSUR BRACING & SUPPORT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION	6
NACKE & RYGG	9
RIKTLINJER FÖR ÖSSURS SPINALA ORTOSER	10
MIAMI J®	12
MIAMI J® SELECT	14
MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION	15
OCCIAN® BACK	16
MIAMI Jr®	17
PAPOOSE®	18
PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR	19
PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR	20
NECLOC®	21
NECLOC® KIDS	22
MIAMI LSO™	23
MIAMI TLSO 464	25
MIAMI TLSO 456	27
MIAMI LUMBAR® POSTEO	29
MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE	30
FORMFIT® PRO BACK	31
FORMFIT® BACK SUPPORT AIR	32
FORMFIT® BACK SUPPORT	33
ORTOSLINNE	34
HÖFT	35
REBOUND® HIP	36
UNLOADER® HIP	38
AXEL, ARM & HAND	41
FORMFIT® SHOULDER	42
PREMIUM SHOULDER IMMOBILIZER	43
AXELLÅS	43
AXELLÅS TVÅDELAD	44
FRONT CLOSURE CLAVICLE SUPPORT	44
FORMFIT® PRO ELBOW	45
REBOUND® POST-OP ELBOW	46
FORMFIT® TENNIS ELBOW	48
FORMFIT® PRO WRIST	49
SPECTRA HANDLEDSORTOS	50
FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM	51
FORMFIT® UNIVERSAL WRIST & THUMB	52
FORMFIT® TUMORTOS	53
FORMFIT® BARNORTOS	54
LYCRAFLEECE BARNORTOS	54
EXOFORM® HANDLEDSORTOS	55
EXOFORM® CTS HANDLEDSORTOS	55

ÖSSUR BRACING & SUPPORT

ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE & SVART	56
LYCRAFLEECE HANDLEDSORTOS.....	56
ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE & SVART	57
ALFA HANDLEDSORTOS WIDE BEIGE.....	58
ALFA HANDLEDSORTOS WIDE SVART.....	58
ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR BEIGE.....	59
ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR SVART.....	59
UNIVERSAL THUMB SPLINT	60
ALFA TUMORTOS BEIGE & SVART	60
ALFA CMC TUMORTOS BEIGE & SVART.....	61
AIR X TUMORTOS.....	61
LYCRAFLEECE TUMORTOS.....	62
VENTOPRENE TUMORTOS	62
KNÄ.....	63
UNLOADER® - FÖR ALLA GRADER AV OA.....	64
UNLOADER ONE® X	65
UNLOADER ONE®	71
UNLOADER ONE® PLUS	75
UNLOADER ONE® CUSTOM	77
REBOUND® CARTILAGE	80
CTI® OA.....	82
REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST.....	83
REBOUND® PCL.....	85
REBOUND® ACL.....	87
REBOUND® ACL CUSTOM	90
CTI® OTS.....	93
CTI® CUSTOM	96
MEASUREMENT FORM CTI® CUSTOM BRACE	99
CTi®3	102
C180™ ROCKET	104
REBOUND® POST-OP KNEE.....	105
FORMFIT® POST-OP KNEE	106
REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL	107
REBOUND® KNEE BRACE.....	108
FORMFIT® KNEE ROM	109
FORMFIT® KNEE HINGED.....	110
FORMFIT® KNEE MCL	111
VENTOPRENE SK/VK.....	112
LYCRAFLEECE PATELLA LUX.....	112
FORMFIT® HINGED LATERAL J.....	113
FORMFIT® TRACKER.....	114
FORMFIT® PRO KNEE.....	115
FORMFIT® PRO KNEE FLITE.....	117

ÖSSUR BRACING & SUPPORT

FOT & ANKEL	119
REBOUND® DIABETIC WALKER.....	120
DH OFFLOADING WALKER®	122
REBOUND® AIR WALKER	123
FORMFIT® WALKER AIR	125
FORMFIT® WALKER	126
AFO DYNAMIC	127
AFO LIGHT.....	129
AFO LEAF SPRING	130
REBOUND FOOT-UP®	131
BOXIA AFO DROP FOOT	132
FOOT-UP®	133
REBOUND® ANKLE BRACE.....	134
FORMFIT® ANKLE BRACE	135
FORMFIT® ANKLE WITH SPEEDLACE	136
FORMFIT® PRO ANKLE	137
FORMFIT® ANKLE STIRRUPS	139
EXOFORM® DORSAL NIGHT SPLINT	140
FORMFIT® NIGHT SPLINT.....	141
MPO 2000	142
DH OFFLOADING POST-OP STYLE SHOE.....	143
SOFT TOP POST-OP SHOE.....	144
CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE	144
INLÄGG	145
MATERIAL & TILLBEHÖR	149
ORTHOTIC SOCK, AFO/KAFO.....	150
TOELESS FRACTURE SOCK	151
COMPRESSION STOCKINET	151
CAST-RITE FRACTURE/ORTHOTIC SOCK.....	151
CASCADE DAFO	153
FAST FIT® CHIPMUNK®	154
FAST FIT® CRICKET®	154
JUMPSTART® LEAP FROG®	155
JUMPSTART® BUNNY®	155
JUMPSTART® KANGAROO®	156
GENERELL INFORMATION.....	157
ÖSSUR SERVICES	158
TVÄTTRÅD	159
ANTECKNINGAR.....	160

ÖSSUR OA SOLUTIONS


För bättre livskvalitet och rörlighet hos personer med artros.

Dessa produktlösningar har skapats under decennier av erfarenhet och utvecklats för att förbättra livskvaliteten hos människor som lever med osteoartrit genom att minska smärtan och öka rörligheten. Genom OA-expertis, ledarskap i innovation samt partnerskap med medicinska yrkespersoner, erbjuder vi övergripande, beprövade och effektiva behandlingsalternativ.

UNLOADER®

Varumärket Össur Unloader® har blivit synonymt med osteoartrit-ortoser och representerar OA-lösningars teknologi som blivit industri-standard och vars effektivitet har bevisats i fler än 15 kliniska studier.

Össur vill bibehålla sin ställning som innovationsledare för OA-lösningar genom att fortsätta att utveckla enkla men effektiva, kliniskt testade behandlingslösningar som förbättrar människors livskvalitet.

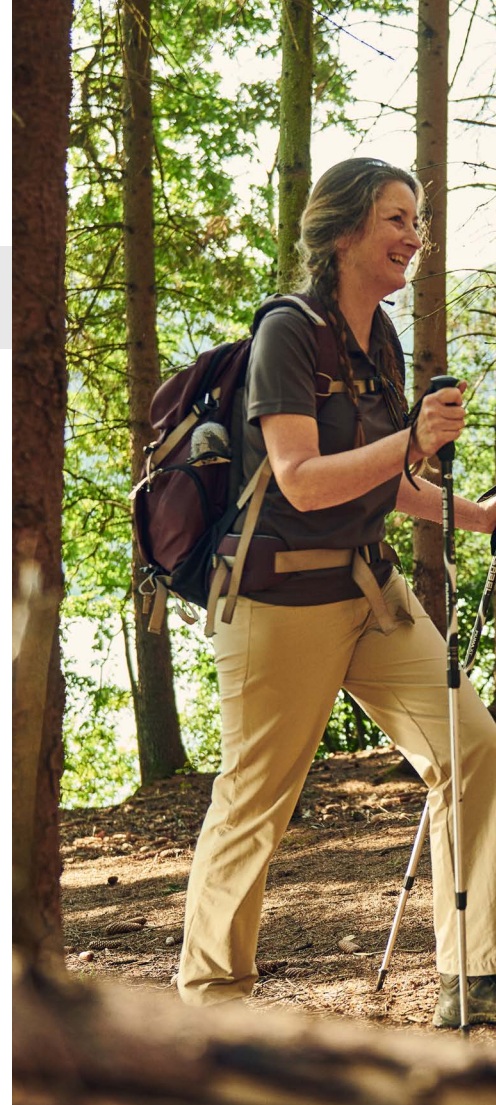



ÖSSUR INJURY SOLUTIONS

För personer som återhämtar sig från frakturer och ligamentskador eller som är i behov av postoperativa behandlingslösningar.

Dessa produktlösningar har tagits fram efter årtionden av praktik och är utformade för att förbättra läkningen av frakturer och mjukvävnadsskador. Genom innovativt ledarskap, beprövade biomekaniska metoder och samarbete med läkare strävar vi efter att erbjuda omfattande och effektiva behandlingsalternativ.

Össurs lösningar för skador är globalt erkända, främst under varumärkesnamnen CTi®, Rebound® and Miami® och har utvecklats för att underlätta läkningsprocessen och förbättra människors livskvalitet.

Vår expertis inom lösningar för skador har sporrat oss att ta nästa steg framåt genom att utveckla indikationsspecifika produkter som är utformade för att optimera läkningsprocessen samtidigt som funktion och rörlighet upprätthålls. Dessa funktionella läkningsprodukter innefattar Össurs egenutvecklade teknik och är utformade för att förbättra kliniskt relevanta resultat.



FUNCTIONAL HEALING - WHERE
MOBILITY MEANS RECOVERY.



NACKE & RYGG

NACKE & RYGG
BRACING & SUPPORT



RIKTLINJER FÖR ÖSSURS SPINALA ORTOSER

Hög support
 Medelsupport
 Låg support
 Vid användning med JTO

Miami JTO®



Miami J® Select



Miami J®



Miami Jr®



Miami TLSO™ 456
Miami TLSO™ 464



Miami Lumbar®
Posteo




MP45
Hyperextension Brace



Miami LSO™



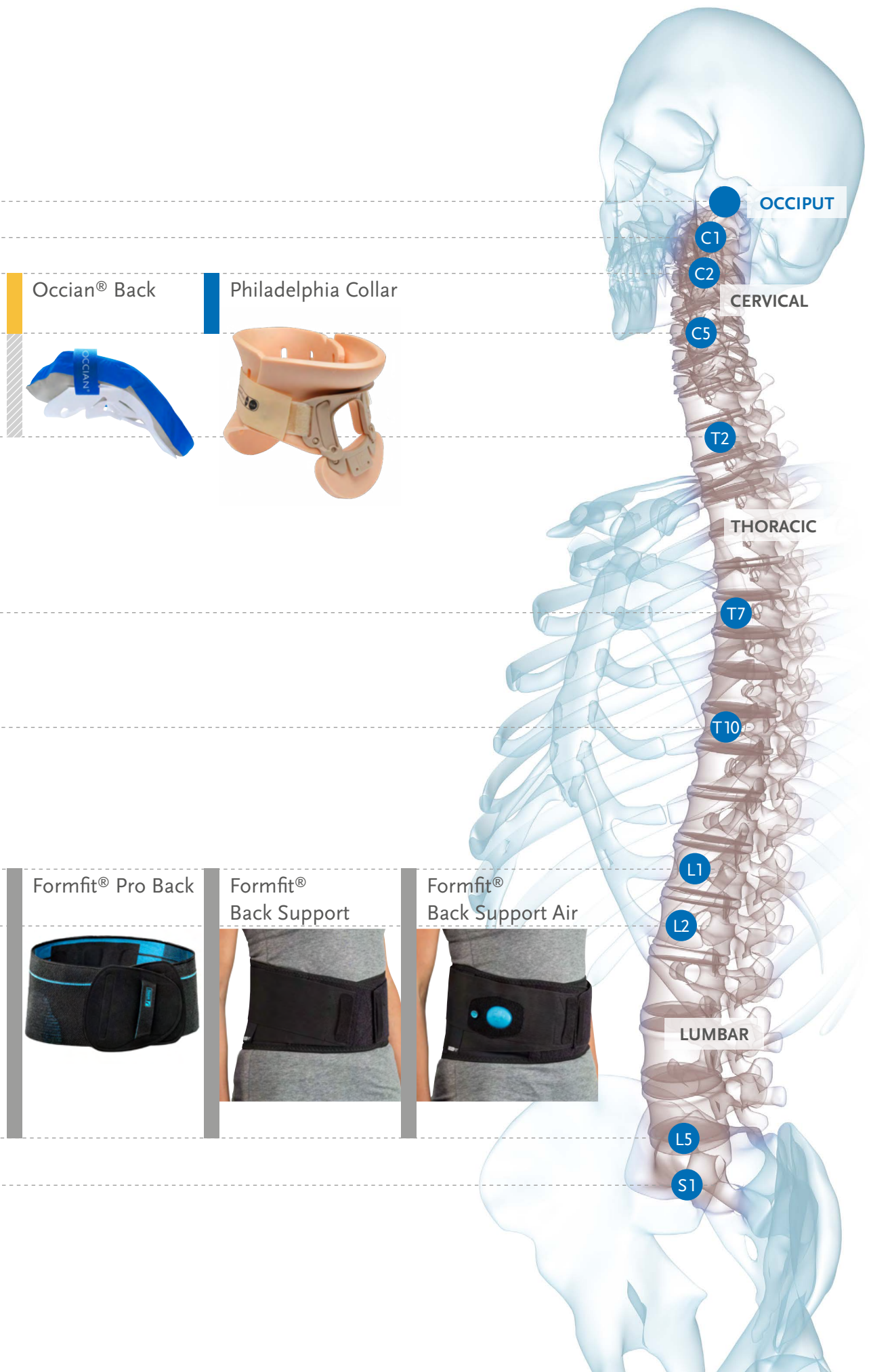

MIAMI J®

Miami J har i ett flertal oberoende studier visat sig ge överlägsen immobilisering av halsryggraden. Den patenterade konstruktionen möter de specialiserade behoven hos alla patienter med cervikal-skador. Den utmärkta immobiliseringen, förebyggandet av trycksår och patientkomforten hos Miami J ger bättre patientacceptans och snabbare tillfrisknande.



INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
 - Pre och postoperativt
 - Posttraumatiskt



Video: Miami J -
Clinician Fitting Instructions
(6 min 36 sec)


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antibakteriell Sorbatex™-polstring som vid kliniska studier konstaterats förebygga bakterietillväxt, vilket ger bättre komfort och säkerställer patientacceptansen
- Designad med särskilt fokus på att minimera tryckpunkter i utsatta områden: Bakhuvud, haka, trapezius och nyckelben
- Knappar för bekväm justering mot bakhuvudet, sternalstödet kan tas bort när patienten ligger eller äter
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Sex storlekar baserade på kroppstypen säkerställer korrekt passform och optimal immobilisering

Välj kragstorlek baseras på patientens nackhöjd, inte kroppstorlek. Det baseras på kroppstypen och minskar felmarginalen vid utprovningen. Varje krage är utformad för den specifika kroppstypen vilket säkerställer optimal immobilisering. För barnstorlekar se Miami Jr.

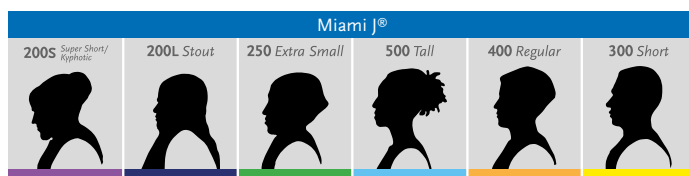

MIAMI J®

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Krage Set*	Krage	Bakstycke	Framstycke
Super Short	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Stout	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200LBK	MJ-200LFRT
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250FRT
Short	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
Regular	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
Tall	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT

Miami J's fram- och bakstycke kan kombineras valfritt.

Välj kragstorlek baserat på patientens nackhöjd, inte kroppstorlek.

*Varje set levereras med en extra polstringssats.

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Storlek	Art.nr.
Super Short	MJP-100
Stout	MJP-200L
XS	MJP-250
Short	MJP-100
Regular	MJP-100
Tall	MJP-100

MIAMI J® SELECT

Miami J Select-halskragen från Össur har flest möjligheter till höjdjustering på marknaden med en enda universell utformning som ger den komfort, immobilisering och kvalitet du förväntar dig av en Miami J-produkt. Miami J Select har en patenterad låsmekanism som var först på marknaden och som uppmuntrar patienten att följa instruktionerna. Den har dessutom antimikrobiell Sorbatex-polstring och bidrar aktivt till framgångsrika patientresultat.



INDIKATIONER

Tillstånd som kräver allmän immobilisering av halsryggen, vilket kan omfatta:

- före och efter halsryggsoperation
- som försiktighetsåtgärd för traumapatienter med nackskador



Video: Miami J -
Clinician Fitting Instructions
(5 min 47 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel höjdjustering med en manipuleringsäker låsmekanism - Left-to-lock: För till vänster för att låsa
- Antimikrobiell och biokompatibl Sorbatex™-polstring förhindrar bakterietillväxt.
- Universell utformning som inte äventyrar immobilisering eller komfort.
- 7 exakta inpassningsstorlekar som kan finjusteras.
- Miami J®-inspirerat hakstöd.
- Anatomiskt utformad kragbaksida i ett stycke med Flex Edge® som minskar trycket på nacken.
- Enkel att ta på och av med det patenterade Reproducible Fit-alternativet.
- Intuitiva blå inställningspunkter för patienten som ger patienterna trygghet - Blue is You™.
- Förenklade komfortjusteringar med integrerat och patenterat bröstbensavlastningsvred.
- Stor trakealöppning - förbättrad funktion för IVA-patienter.
- Enkel att rengöra och lätt att byta polstringen.
- Röntgen- och CT-transparent, MR-säker.
- Kompatibel med Occian® Back & Miami JTO®-tillbehör.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

KRAGSET

Beskrivning	Art.nr.
Miami J Select- kragset. Innehåller: krage och extra polstringssats	MJSR-101

MIAMI J SELECT-KRAGE

Beskrivning	Art.nr.
Miami J Select-krage	MJS-101

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Extra polstringssats till Miami J Select	MJSP-101
Miami J Select Reproducible Fit-flikar (10-pack)	MJST-101

MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION

JTO Thoraxförlängning är framtagen i samråd med ledande kirurger, ortopedingenjörer och sjuksköterskor. Ortosen kan användas med samtliga Miami J halskragar när det krävs extra stabilitet i den cervikala övergången.



INDIKATIONER

- Skador i nedre delen av halsryggraden och övre delen av bröstryggraden
- Immobilisering före och efter operation på nedre delen av halsryggraden och övre delen av bröstryggraden
- Andra tillstånd som kräver immobilisering av nedre delen av halsryggraden och/eller övre delen av bröstryggraden



Video: Miami J - Adjustments & Accessories (6 min 26 sec)
[Miami JTO från 3:35.](#)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Patenterad konstruktion med "flytande ryggdel" som tillåter maximal immobilisering och eliminerar kompensatoriska rörelser
- Enkel att applicera utan verktyg
- Antibakteriell Sorbatex-polstring som vid kliniska studier konstaterats förebygga mikrobtiltväxt, vilket ger bättre komfort och säkerställer patientacceptansen
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Miami JTO	MT-900
Miami JTO med polstringssats	MTR-900

Kompatibel med samtliga storlekar av Miami J® och P3 Miami Jr®
Halskrage beställs separat

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Extra polstringssats	MTP-950

OCCIAN® BACK

Bakstycket Occian Back är avsett för de särskilda krav som ställs av multitrauma-patienter på IVA. Occian Back finns i en universalstorlek. Polstringen är ett extra tryckavlastande viskoelastiskt material från Tempur®. Bakstycket underlättar vården av patienter med cervikala problem som löper stor risk för occipital kollaps.



INDIKATIONER

- Patienter som inte har vaknat inom 24 - 48 timmar från intagningen
- Patienter med tidigare hudskador och/eller lacerationer i huvud/nacke/hals
- Brännskadepatienter som måste använda krage
- Elektiva kirurgipatienter som önskar ökad postoperativ komfort nattetid
- Patienter som måste vara sängliggande längre tider på grund av andnings-, neurologisk eller hemodynamisk instabilitet



[Video: Miami J - Adjustments & Accessories \(6 min 26 sec\)](#)
[Occian Back från 3:05.](#)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Intuitech tryckavlastande minnesskum eliminerar risken för occipitala trycksår
- Upprätthåller stabilitet i halsryggraden
- Ger unik tryckavlastande komfort; ersätter vid behov bakstycket på Miami J halskrage
- Kliniska prover visar att Occian back praktiskt taget eliminerar occipitala trycksår utan att äventyra stabiliteten i halsryggraden
- Enkel att rengöra
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Occian Back -	ACB-100
Occian Back Junior	ACB-200

Kompatibel med samtliga storlekar av Miami J®, Miami J® Advanced och med Miami Jr®. Kragens frontpanel beställs separat.



MIAMI Jr®

Barnhalskragen Miami Jr är designad för att passa barn upp till 12 år. Produktlinjen Miami Jr omspannar alla perioder i barnets tillväxt. Miami Jr är den enda kragen som tar hänsyn till skillnader i anatomin hos barn och vuxna.



INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
 - Pre och postoperativt
 - Posttraumatiskt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Innovativ krage avsedd för barn upp till 12 år
- Hudvänlig Sorbatex™-polstring skyddar huden under långvarig användning
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ålder

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

MIAMI JR

Storlek	Krage set*	Krage
0 - 6 månader	MJR-P0	MJ-P0
6 - 24 månader	MJR-P1	MJ-P1
2 - 6 år	MJR-P2	MJ-P2
6 - 12 år	MJR-P3	MJ-P3

*OBS! Varje set levereras med en extra polstringssats.

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Storlek	Art.nr.
0 - 6 månader	MJP-P0
6 - 24 månader	MJP-P1
2 - 6 år	MJP-P2
6 - 12 år	MJP-P3

PAPOOSE®

Papoose är en innovativ halskrage för de yngsta och mest krävande patienterna, nämligen nyfödda barn. Papoose omsluter och immobiliserar säkert och varsamt barnets huvud och rygg, medan luftvägarna hålls fria och ryggraden hålls i rät linje för att säkerställa bästa möjliga resultat.



INDIKATIONER

- Immobilisering av ryggraden
- Spinala frakturer

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Immobiliserar säkert och varsamt barnets huvud och rygg, medan luftvägarna hålls fria och ryggraden hålls i rät linje
- Utformningen av det occipitala stödet skyddar mot positionell plagiocefali
- Immobilisering av halsryggraden hos barn upp till 3 månader
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

BESTÄLLNINGSGRUPP

PAPOOSE

Beskrivning	Art.nr.
Papoose utan P0 framstycke	PO-100
Papoose utan P0 framstycke med ersättnings polstring	POR-100
Papoose med P0 framstycke	PA-100
Papoose med P0 framstycke med ersättnings polstring	PAR-100

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Beskrivning	Art.nr.
Papoose och P0 framstycke polstringssats	PAP-100
Papoose polstringssats	POP-100

PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR

Philadelphia-halskragar har varit en industristandard i årtionden. Philadelphia Adjustable har samma konstruktion och material som originalet dock med den möjligheten att höjden kan justeras.

INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
 - Pre och postoperativt
 - Posttraumatiskt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar i omkrets och höjd; en storlek passar de flesta
- Anatomiskt format Plastazote®-skumplast (latexfritt, icke-toxiskt och hypoallergent för att minimera hudirritation) ger utrymme för cervikala vener
Totalt stöd av halsryggradens böjning bibehåller halsryggraden i korrekt ställning
- Vattenavstötande, lämplig för bad och vattenterapi
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universa - en storlek



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Philadelphia Trakeotomikrage, justeringsbar	PHP-AA

PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR

Philadelphia Tracheotomy Collar är en sjukhus- och rehabiliteringskrage som är utformad för att upprätthålla neutral inriktning av halsryggen efter en nackskada. Kragen har en stor trakealöppning, vilket tillåter halspulsövervakning och akut trakeotomi.

INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
 - Pre och postoperativt
 - Posttraumatiskt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Latexfritt, giftfritt och hypoallergent Plastazote® skummaterial minskar risken för hudirritation
- Totalt stöd av halsryggradens böjning bibehåller halsryggraden i korrekt ställning
- Vattenavstötande, lämplig vid bad och vattenterapi

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets nacke, höjd mellan skuldra och haka



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

STORLEK	OMKRETS RUNT NACKEN	HÖJD 6 CM	HÖJD 8 CM	HÖJD 11 CM	HÖJD 13 CM
Barn	20 - 28 cm	PHP-TP	Barn	20 - 28 cm	PHP-TP
S	25 - 33 cm	PHP-T2S	PHP-T3S	PHP-T4S	PHP-T5S
M	33 - 41 cm	PHP-T2M	PHP-T3M	PHP-T4M	PHP-T5M
L	41 - 48 cm	PHP-T2L	PHP-T3L	PHP-T4L	PHP-T5L
XL	> 48 cm	PHP-T2XL	PHP-T3XL	PHP-T4XL	PHP-T5XL

Storlek	Omkrets runt nacken	Art.nr.
Infant	15 - 20 cm	PHP-TI
Paediatric	20 - 28 cm	PHP-TP

TILLBEHÖR

PHILADELPHIA COOLMAX POLSTRING

Storlek	Omkrets runt nacken	Art.nr.
Barn	20 - 28 cm	PHP-LCP
S	25 - 33 cm	PHP-LCS
M	33 - 41 cm	PHP-LCM
L	41 - 48 cm	PHP-LCL

PHILADELPHIA TRACHEOTOMY TILLBEHÖR

Storlek	Stabilizer	Halo
Vuxen	PHP-OS	PHP-OH
Barn	PHP-OSP	PHP-OHP

NECLOC®

INDIKATIONER

- Posttraumatiskt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt utformad tvådelad halskrage som säkerställer flexion under applicering
- Fem storlekar som utgår från kroppstyp gör storleksvalet enkelt
- Minimal manipulering av patienten under applicering
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent


NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Valet av storlek baseras på fem olika kroppstyper; säkerställer god passform och optimal immobilisering



STORLEKAR

- Fenotypstorlekssystemet underlättar storleksvalet och minskar avsevärt felmarginalen vid inprovning på patienten. Varje krage har biotekniska, storleksspecifika fram- och bakdelar som är avsedda att fungera tillsammans för att säkerställa optimal immobilisering. För barnstorlekar, se NecLoc Kids.

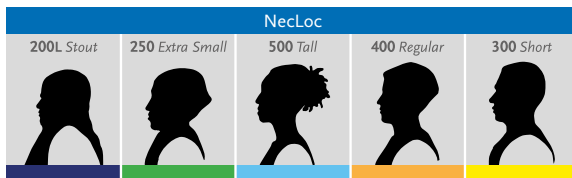

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek*	Art.nr.
Stout	NL-200EL
XS	NL-250E
S	NL-300E
M	NL-400E
L	NL-500E

* Se storleksöversikt Miami J.

NECLOC® KIDS

INDIKATIONER

- Posttraumatiskt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt utformad tvådelad halskrage som säkerställer flexion under applicering
- Tre barnstorlekar
- Minimal manipulering av patienten under applicering
- Möter de krav som ställs av det växande barnets unika anatomi
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ålder



BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Art.nr.
0 - 2 år	NL-P1
2 - 6 år	NL-P2
6 - 12 år	NL-P3

MIAMI LSO™

Miami LSO är en lättanvänd ländryggsortos för postkirurgisk immobilisering, smärtlindring och skydd av skadade ligament och muskler. Dess anatomiska form följer ryggradens konturer och ger immobilisering och patientkomfort. Ortosen kan byggas i moduler, vilket möjliggör nedtrappning av immobiliseringen under rehabiliteringsprocessen, samt har band som enkelt kan justeras efter behov.



INDIKATIONER

Skador/diagnoser som kräver immobilisering av lumbala delen av ryggen såsom:

- Stabila, icke-dislokerade spinala fakturer (L1-L5)
- Spinalstenos
- Diskbräck
- Degenerativa spinala sjukdomar
- Spondylolisthesis
- Spondylolysis
- Kontraindikation: Instabila dislokerade spinala frakturer



Video: Miami LSO - Clinician Quick-Fit Instructions (2 min 22 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidigt, ventilerat material
- Beprövat dubbeldragssystem med längdjustering
- Injusteringsverktyg för enkel och förbättrad anpassning direkt på användare
- Universalbälte som passar midjemått upp till 178 cm
- Formade posteriora paneler i stl S-XL för precis, anatomisk passform
- Quick-Fit handtag

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja

MIAMI LSO™

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

MIAMI LSO BÄLTE

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
6" Universal (Slim)	66 - 127 cm	MLSO-1E
8" Universal (Standard)	66 - 127 cm	MLSO-2E

STANDARD POSTERIOR PANEL

Storlek	Art.nr
Standard	MLSO-P56

Standard posterior panelen rekommenderas alltid när ingen annan posterior panel används.



CONTOURED POSTERIOR PANEL

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
S	66 - 86 cm	MLSO-P11
M	86 - 96 cm	MLSO-P21
L	96 - 127 cm	MLSO-P31
XL	127 - 167 cm	MLSO-P41



CONTOURED POSTERIOR PANEL MED LATERAL SUPPORT

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
S	66 - 86 cm	MLSO-P12
M	86 - 96 cm	MLSO-P22
L	96 - 127 cm	MLSO-P32
XL	127 - 167 cm	MLSO-P42



TILLBEHÖR

ANTERIOR PANEL

Storlek	Art.nr
6" Panel (Slim)	MLSO-PA6
8" Panel (Standard)	MLSO-PA8



ÖSSUR FIT TOOL

Beskrivning	Art.nr
Össur Fit Tool	B-040100000



BÄLTESFÖRLÄNGNING

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
6" (Slim) Bältesförlängning*	66 - 177 cm	MLSO-1EXT
8" (Standard) Bältesförlängning*	66 - 177 cm	MLSO-2EXT

* Bältesförlängning kan enbart användas i kombination med Miami LSO bälte.

MIAMI TLSO 464

Miami TLSO från Össur är svaret på våra kunders och ortoped-ingenjörers behov, med förenklade förberedelser utan att behöva göra avkall på passform eller prestanda. Denna lättanvända förmonterade Miami TLSO-ortosen är en tre-i-ett-lösning.

Användning: Kan enkelt appliceras över axeln eller under armen och på- och avtagningen förenklas ytterligare tack vare de praktiskt placerade snabbspännena.

Justerbarhet: Med universalbältesdesignerna kan du ställa in patientens bälteslängd för en mer exakt dimensionering.

Komfort: Utformningen är gjord för att passa anatomin och den anatomiskt konturerade designen förstärker ryggraden och patientens komfort maximeras.

Lätt att använda: Miami TLSO-ortosen kräver minimala förberedelser och är konstruerad för att ge optimal patientkomfort.



INDIKATIONER

Tillstånd som kräver kraftig immobilisering av bröstkorgs- och ländryggsregionen såsom:

- Postoperativ immobilisering
- TLSO för spinalt stöd upp till T7
- Spinal stenosis
- Diskbräck
- Degenerativa ryggradsfrakturer
- Spondylolistes
- Spondylolys



Video: Miami TLSO 464 -
Clinician Fitting Instructions
(5 min 32 sec)

KONTRAINDIKATIONER

- Instabila, förskjutna frakturer

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen komfort och enkel på- och avtagning.
- Färdigmonterad för enkel inpassning.
- För personer mellan 155 och 193 cm
- Bakre bröstförlängning med ergonomiskt axillärband.
- Kan bytas mot en LSO senare under rehabiliteringen.
- Främre bröstförlängningsdel som justeras med ett enda tryck, med enkelt eller dubbelt gångjärn.
- En universalmodell i en storlek eller individanpassad anatomisk design.
- Förbättrad komfort och immobilisering med flera bandalternativ och avtagbara ankare.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät omkretsen på bälten mitt emellan de nedersta revbenen och den övre höftbenskammen. Stående.

Storlek	Midjemått i cm
S	66 - 86
M	86 - 96
L	96 - 127
XL	127 - 167
Universal	66 - 127

* För omkretsar på 127 - 167 cm krävs en bältesförlängning

MIAMI TLSO 464

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ATE/PTE, LORDOTISK

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-2351
S	MTLSO-2111
M	MTLSO-2121
L	MTLSO-2131
XL	MTLSO-2141

*Icke-lateral och icke-lordotisk version finns tillgänglig på begäran

ATE/PTE, LORDOTISK, SMAL

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-1351
S	MTLSO-1111
M	MTLSO-1121
L	MTLSO-1131
XL	MTLSO-1141

ANDRA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
5 mm insexnyckel	MTLSO-0004
Tillbehörssats för axillärband	MTLSO-0003
Snabbinspänningsverktyg	B-040100000
Bältesförlängning, standard (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-2EXT
Bältesförlängning, smal (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-1EXT

MIAMI TLSO 456

Miami TLSO 456 från Össur är svaret på våra kunders och ortoped-ingenjörers behov, med förenklade förberedelser utan att behöva göra avkall på passform eller prestanda. Den här lättanvända och förmonterade Miami TLSO-ortosen ger samma bekvämlighet som en universaldesign i en storlek eller en individanpassad anatomisk design.

Användning: Intuitiva blå inställningspunkter som ger patienterna trygghet - Blue is You™.

Justerbarhet: Med universalbältesdesignerna kan du ställa in patientens bälteslängd för en mer exakt dimensionering. Värmeformbara posteriora paneler möjliggör en anpassad passform och den modulära designen möjliggör stegvis minskad behandling med stöd för LSO.

Komfort: Med Miami LSO™ Advanced Compression-remskiva med avkänningsbar ländryggskompression och en anatomisk konturdesign som förstärker ryggraden samtidigt som du maximerar patientens komfort.

Enkel användning: Miami TLSO-ortos med axelband som är enkla att använda, minimal förberedelse och konstruktion för att ge optimal patientkomfort.



INDIKATIONER

Tillstånd som kräver kraftig immobilisering av bröstkorgs- och ländryggsregionen såsom:

- Postkirurgisk immobilisering
- TLSO för spinalt stöd upp till T7
- Spinal stenosis
- Diskbräck
- Degenerativa ryggradsfrakturer
- Spondylolistes
- Spondylolys



Video: Miami TLSO 456 -
Clinician Fitting Instructions
(5 min 32 sec)

KONTRAINDIKATIONER

- Unstable, displaced fractures

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen komfort och enkel på-/avtagning (jämfört med Miami Lumbar TLSO).
- Färdigmonterad för enkel inpassning.
- För personer mellan 155 och 193 cm.
- Kan bytas mot en LSO senare under rehabiliteringen.
- En universalmodell i en storlek eller individanpassad anatomisk design.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Midjemått

Storlek	Midjemått i cm
S	66 - 89
M	86 - 96
L	96 - 127
XL	127 - 167
Universal	66 - 127

* För omkretsar på 127 - 167 cm krävs en bältesförlängning

MIAMI TLSO 456

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

PTE, LORDOTISK

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-2352
S	MTLSO-2112
M	MTLSO-2122
L	MTLSO-2132
XL	MTLSO-2142

PTE, LORDOTISK, SMAL

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-1352
S	MTLSO-1112
M	MTLSO-1122
L	MTLSO-1132
XL	MTLSO-1142

*Icke-lateral och icke-lordotisk version tillgänglig på begäran.

ANDRA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Snabbinpassningsverktyg	B-040100000
Bältesförlängning, standard (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-2EXT
Bältesförlängning, smal (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-1EXT

MIAMI LUMBAR® POSTEO

Miami Lumbar Posteo ger smärtlindring vid frakturer i ryggraden och förkortar rehabiliteringen. Gördeln har utvecklats med särskilt fokus på komfort och patientacceptans. Det lumbala kompressionssystemet dämpar smärtan genom aktiv avlastning av ryggraden. Samtidigt förbättras passformen, vilket underlättar användningen och höjer acceptansen. Miami Lumbar Posteo är en innovativ rygggördel som är lätt att ta på och behaglig att bära.



INDIKATIONER

- Smärta orsakad av stabila kompressionsfrakturer i ryggraden



Video: Miami Lumbar Posteo - Clinician Custom-Fit Modifications (3 min 57 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Aktiv avlastning genom thorakal förlängningsdel och lumbal kompression
- Integrerat kompressionssystem för enkel åtdragning och optimal passform
- Trimbara, justerbara axelband för optimal stabilitet
- Kallformbar posterior thorakal förlängning (PTE) i aluminium
- Extra polstring runt aluminiumskenan skyddar huden

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ryggens längd från korsbenets övre kant till kota C7 längs ryggradens böjning

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

MIAMI LUMBAR POSTEO

Storlek	PTE längd	Längd, rygg	Omkrets höft	Art.nr
XS	36 cm	37 - 44 cm	66-76 cm	LMB-POSTEO-XS
S	43 cm	44 - 51 cm	76-86 cm	LMB-POSTEO-SM
M	49 cm	49 - 56 cm	86-96 cm	LMB-POSTEO-MD
L	56 cm	55 - 61 cm	96-106 cm	LMB-POSTEO-LG

TILLBEHÖR/TILLVAL

Beskrivning	Art.nr
Rempolstring	LMB-POSTEO ST PD

STORLEK

Observera att Miami Lumbar Posteo har ett universellt ländbälte som kan kapas till lämplig storlek.

Omkrets midja	Storlek bälte
66 - 76 cm	XS
76 - 86 cm	S
86 - 96 cm	M
96 - 106 cm	L
106 - 116 cm	XL

Omkrets midja	Storlek bälte
116 - 127 cm	2XL
127 - 137 cm	3XL
137 - 147 cm	4XL
147 - 157 cm	5XL
157 - 167 cm	6XL

MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE

INDIKATIONER

- Post-operativ
- Post-trauma

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Lättviktsram i aluminium
- Aluminiumbyglar med mjuk polstring för bästa komfort
- Bröstbygelns vinkel kan enkelt justeras för att optimalt ligga an mot sternum (tandad skiva för vinkeljustering i steg om 5°)
- Den thorakolumbala pelotten kan anläggas antingen vertikalt eller horisontalt
- Den unika, fjädrande bäckenbygel följer hela tiden patientens växlingar mellan stående och sittande – bygelns rör sig, inte ortosen, och säkerställer därmed ortosens funktion
- Glidspänne i stål
- Polstrad bäckenbygel, kan fixeras



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets höft

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets höft	Min/Max längd	Art.nr
S	60 - 75 cm	40 - 44 cm	MP45/S
M	79 - 90 cm	43 - 47 cm	MP45/M
L	90 - 105 cm	47 - 51 cm	MP45/L
L/Short	90 - 105 cm	43 - 47 cm	MP45/LS
XL	105 - 115 cm	50 - 54 cm	MP45/XL
XL/Short	105 - 115 cm	47 - 51 cm	MP45/XLS

FORMFIT® PRO BACK

Össur Formfit® Pro Back ger lindring till personer som lider av smärta och sträckningar i ländryggen. Våra bälten tillverkas med vår dynamiska 3D MotionTech™-vävteknik, och är därför överlägsna när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga. I den patenterade ryggpaneldesignen används vår StayBilizer™-teknik som ger optimal följsamhet och passform, och smart placerade fingeröglor gör det enkelt att ta på sig dem. SmartPad™ ger punktstöd och vaddering, och kan tas bort om så önskas.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

INDIKATIONER

Ländryggstillstånd som kan förbättras av kompression och begränsning av stora rörelser, t.ex.:

- Smärta i ländryggen (lumbago)
- Lumbosakral stukning/sträckning
- Degenerativ ledsjukdom


KONTRAINDIKATIONER

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- Löstagbar SmartPad™ i ländryggen för punktstöd och vaddering
- Lätta, formbara stöd i aluminium formas efter ländrygge

NÖDVÄNDIGA MÅTT

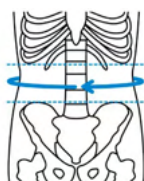

Mät omkretsen runt bälten mitt emellan de nedersta revbenen och höftbenskammen. Stående.

BESTÄLLNINGSGRUPP

SVART

Storlek	Art.nr.	Omkrets midja
XS	FP500001	70 - 80 cm
S	FP500002	80 - 90 cm
M	FP500003	90 - 100 cm
L	FP500004	100 - 115 cm
XL	FP500005	115 - 130 cm

FORMFIT® BACK SUPPORT AIR

Formfit Back Support Air ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen. Det integrerade luftsystemet är intuitivt och behandligt placerat så att justeringar kan göras då kroppens påfrestningar förändras under dagen. Omlottdesignen förbättrar kompressionen samtidigt som slitstarka fingeröglor gör det lätt att sätta på ortosen. Formfit Back Support är tillverkat av ett ventilerande material och ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen.

INDIKATIONER

Ländryggstillstånd som kan förbättras av begränsning av stora rörelser, till exempel:

- Muskulär ryggsmärta
- Lumbosakrala sträckningar
- Kronisk ländryggssmärta
- Ischias

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Luftsystem med låg profil som är lätt att använda
- Nätpaneler och ventilationshål ökar ventilationsförmågan och förbättrar komforten
- Överlappande dubbla dragband ger extra stöd för ländryggen och buken
- Flexibla fjädrar ger optimalt stöd för ländryggen och buken
- Gripband förhindrar glidning
- Justerbar luftblåsa ger anpassad passform och fokuserad kompression för ländryggen

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets midja	Art.nr.
S	63 - 76 cm	209133
M	76 - 86 cm	209135
L	86 - 97 cm	209137
XL	97 - 107 cm	209138
XXL	107 - 142 cm	209139

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Hot/Cold Therapy Gel pad	GB28

FORMFIT® BACK SUPPORT

Formfit Back Support är tillverkat av material med ventilationsförmåga och ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen. Omlottdesignen förbättrar kompressionen samtidigt som de slitstarka fingeröglorna gör det lätt att sätta på ortosen.

INDIKATIONER

- Muskulär ryggsmärta
- Lumbosakrala sträckningar
- Kronisk ryggsmärta
- Ischias

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antiglidsystem som reducerar ortosrörelse
- Dubbla överlappande dragband för förbättrad kompression
- Ortosen har insydda handtag för enklare påtagning
- Behandlingen kan kompletteras med värmande/kylande effekt, se tillbehör

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets midja	Art.nr.
S	64 - 76 cm	209143
M	76 - 86 cm	209145
L	86 - 97 cm	209147
XL	97 - 107 cm	209148
XXL	107 - 142 cm	209149
XXXL	142 - 152 cm	209151

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Hot/Cold Therapy Gel Pad	GB28

ORTOSLINNE

Kan användas för alla typer av spinala ortoser, body jackets etc.
Tillverkad i rundstickad Coolmax/Lycra (vitt) och X-Static/Lycra (grått), helt utan sömmar, vilket tillsammans garanterar hög komfort och god passform. Båda dessa material från Knit-Rite ger effektiv bekämpning av dålig lukt och bakterier. Elasticiteten gör att linnet följer kroppens konturer effektivt och veckar sig minimalt.

- Alla modeller är fria från latex.
- Finns både med v-hals och rund halsringning, med och utan vingar.
- Finns nu även i ny, tunnare Lightweight variant i både vitt och silver/X-Static.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



Ortoslinne, rundad hals #352952

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ORTOSLINNE, RUNDAD HALS


Storlek	Omkrets Midja	Längd	VIT		SILVER	
			Coolmax	X-Static	Coolmax	X-Static
S	35 - 45 cm	40 cm	352952	352992		
M	45 - 60 cm	45 cm	352953	352993		
L	55 - 75 cm	50 cm	352954	352994		
XL	65 - 95 cm	60 cm	352955	352995		

ORTOSLINNE MED VINGAR, V-HALS

Storlek	Omkrets Midja	Längd	VIT		SILVER	
			Coolmax	X-Static	Coolmax	X-Static
S	35 - 45 cm	40 cm	352972	352942		
M	45 - 60 cm	45 cm	352973	352943		
L	55 - 75 cm	50 cm	352974	352944		
XL	65 - 95 cm	60 cm	352975	352945		

ORTOSLINNE LIGHTWEIGHT, V-HALS

Storlek	Omkrets Midja	Längd	VIT		SILVER	
			Coolmax	X-Static	Coolmax	X-Static
S	35 - 45 cm	40 cm	352922	352932		
M	45 - 60 cm	45 cm	352923	352933		
L	55 - 75 cm	50 cm	352924	352934		
XL	65 - 95 cm	60 cm	352925	352935		

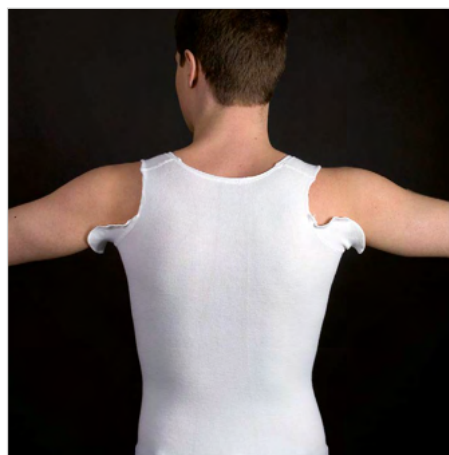

Ortoslinne med vingar #352972

HÖFT

HÖFT
BRACING & SUPPORT



REBOUND® HIP

Låg profil och lätt konstruktion som ger patientkomfort och skapar förutsättningar för hög compliance. Ortosen ger en kontrollerad kraft och effektiv, funktionell ROM-begränsning för både extension/flexion samt abduction/adduktion.



INDIKATIONER

- I preventivt syfte när det finns risk för höftdislokation
- Konventionell behandling efter dislokation/reduktion
- Postoperativt efter (total) höftartroplastik
- Postoperativt efter (total) höftartroplastikrevision
- Postoperativ höftartroskopi
- Postoperativt efter artroskopi för impingement i höften (FAI, femoroacetabular impingement)
- Postoperativt efter operation av gluteus maximus
- Postoperativt efter operation av hamstringsmusklerna
- Inoperabla höftabnormiteter



Video: Rebound Hip - Clinician Fitting Instructions Modifications (5 min 26 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ortos med låg profil och låg vikt som ger följsamhet och patientkomfort.
- Snabblås för enkel justering av rörligheten för optimal återhämtning efter operation.
- Enkelt att anpassa längden med teleskopfunktion på ramen.
- Justerbar ROM-led ger adduktion/abduktion från 0° till 10°, 20° eller 30° (tillval)

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vid höftbenskammen
- Avstånd från trochanter major till mitten av patella

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

REBOUND HIP

Beskrivning	Vänster	Höger
Rebound Hip	980130RB	980135RB
Rebound Hip med justerbar ROM-led	980120RB	980125RB

Ram, Polstring: Universal anpassning till 122 cm höftomkrets

REBOUND® HIP

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Bältesförlängare (anpassningsbar för 122 - 170 cm höftomkrets)	980121RB
Rotationsrem	RHK-100024
Inpassningsverktyg	B-040100000

UNLOADER® HIP

Unloader Hip är utformad för att minska smärta genom optimerad avlastning och proprioceptiv kontroll för patienter med mild till måttlig artros i höftleden. Bidrar till större stabiliteten i höften och förbättrar rörligheten.



INDIKATIONER

- Mild till måttlig artros i höftleden
- Tillstånd där patienten har nytta av korrigering av höftens position och/eller kompression kring trochanter major.



Video: Unloader Hip - Clinician Fitting Instructions (5 min 59 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamic Rotation Straps-remmarna med SmartDosing-ratt ger användaren möjlighet att justera den externa rotationskraften individuellt för optimal smärtlindring
- Lätt att ta på och av tack vare smart fastsättningssystem och blixtlås
- Kompressionssystemet förbättrar proprioceptionen och känslan av säkerhet
- Andas och har bra passform tack vare lycra av bästa kvalitet


NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Höftomkretsen vid främre övre tarmbenskammen. Se ritning.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

UNLOADER HIP

Storlek	Höftomkrets	Kvinnor	Män
S	80 - 88 cm	B-465350030	B-465350031
M	88 - 96 cm	B-465350032	B-465350033
L	96 - 104 cm	B-465350034	B-465350035
XL	104 - 114 cm	B-465350036	B-465350037
XXL	114 - 124 cm	B-465350038	B-465350039

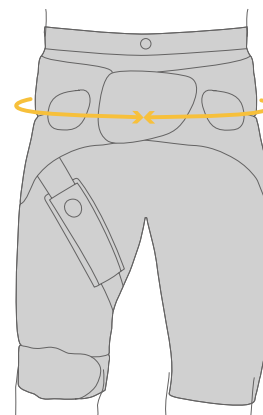

*Mät höftomkretsen vid främre övre tarmbenskammen.

UNLOADER® HIP

TILLBEHÖR/TILLVAL

UTBYTES BYXOR

Beskrivning	Art.nr.
Unloader Hip Men's S Trousers	B-465350078
Unloader Hip Men's M Trousers	B-465350080
Unloader Hip Men's L Trousers	B-465350082
Unloader Hip Men's XL Trousers	B-465350084
Unloader Hip Men's XXL Trousers	B-465350086
Unloader Hip Women's S Trousers	B-465350077
Unloader Hip Women's M Trousers	B-465350079
Unloader Hip Women's L Trousers	B-465350081
Unloader Hip Women's XL Trousers	B-465350083
Unloader Hip Women's XXL Trousers	B-465350085

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Rotation strap kit	B-465350064
Washbag kit	B-465350065
Trochanter pad kit	B-465350066
Thigh strap kit S	B-465350067
Thigh strap kit M	B-465350068
Thigh strap kit L	B-465350069
Thigh strap kit XL	B-465350070
Thigh strap kit XXL	B-465350071
Bilateral kit S	B-465350072
Bilateral kit M	B-465350073
Bilateral kit L	B-465350074
Bilateral kit XL	B-465350075
Bilateral kit XXL	B-465350076

AXEL, ARM & HAND

AXEL, ARM & HAND
BRACING & SUPPORT



FORMFIT® SHOULDER

FormFit Shoulder är en axelortos som är utformad för att ge immobilisering efter axelskada eller axel-operation. Den smidiga designen och goda andnings-förmåga ger överlägsen komfort samtidigt som ortosen är enkel att använda. Precis som föregångaren SmartSling®, ger Formfit Shoulder abduction (när abduktionskudden används) eller utåtrotation (när utåtrationskudden används) av axeln.

Armhålekudden (finns som tillval) fördelar vikten över en större yta och minskar trycket mot armbågsnerven.

INDIKATIONER

- Efter reparation av rotatorkuffskador
- Efter Bankartoperation
- Efter kapselplastik
- Efter glenohumeral dislokation/subluxation
- Efter sträckning/reparation av skada i mjukdelar
- Instabilitet/skada i axeln
- Postkirurgisk rehabilitering

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Snabblås
- Avlastningsrem
- Tumögla i universalmodell

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mått från olekranon till änden av den slutna näven



Formfit Shoulder

Armhålekudde



Video: Formfit Shoulder
Brace with Abduction -
Clinician Fitting Instructions
(1 min 31 sec)

BESTÄLLNINGSGRUPP

FORMFIT® SHOULDER (MED ABDUKTIONSKUDDE)

Storlek	Mått från olekranon till änden av den slutna näven	Art.nr.
S	upp till 29 cm	SSS
Regular	29 - 40 cm	SSR
L	40 - 44,5 cm	SSL

FORMFIT® SHOULDER (UTAN ABDUKTIONSKUDDE)

Storlek	Mått från olekranon till änden av den slutna näven	Art.nr.
S	upp till 29 cm	SSS-SO
Regular	29 - 40 cm	SSR-SO
L	40 - 44,5 cm	SSL-SO

TILLBEHÖR

UTÅTROTATIONSKIT

Storlek	Längd	Art.nr.
S	upp till 29 cm	SSS-ER
M	29 - 40 cm	SSR-ER
L	40 - 44,5 cm	SSL-ER

Beskrivning	Art.nr.
Armhålekudde	SSAXP

PREMIUM SHOULDER IMMOBILIZER

INDIKATIONER


- Efter skador och postoperativt i axel/skuldra

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kontrollerar effektivt abduktion och rotation
- Humerusmanchett, handledsmanchett och axelband kan placeras i önskat läge för maximal komfort och passform

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal

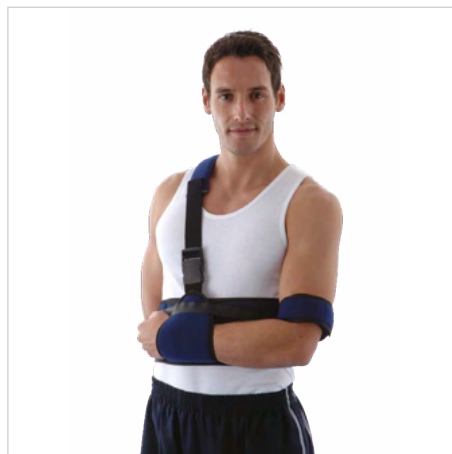

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Premium Shoulder Immobiliser	0380
Premium Shoulder Immobiliser XL	0380XL

AXELLÅS

INDIKATIONER

- Efter skador eller postoperativt i axel/skuldra

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Humerusmanchett, handledsmanchett och axelband kan placeras i önskat läge för maximal komfort och passform.
- Kontrollerar effektivt abduktion och rotation.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt bröstet.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets runt bröstet	Art.nr.
S	60 - 80 cm	4097-03
M	80 - 110 cm	4097-05
L	110 - 140 cm	4097-07

AXELLÅS TVÅDELAD

INDIKATIONER

- Skulderskador
- Postoperativt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Bekväm ortos för patienter som ska ha armen intill kroppen

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mått tas runt bröstet inkl. överarm



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Mått tas runt bröstet inkl. överarmen	Art.nr.
S	60 - 80 cm	4096-03
M	80 - 95 cm	4096-05
L	95 - 115 cm	4096-07
XL	115 - 145 cm	4096-08

FRONT CLOSURE CLAVICLE SUPPORT

INDIKATIONER


- Nyckelbensfrakturer och dislokationer
- Hållningsstöd
- Skador i mjukdelar

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Fastsättning framtill för enkel på-/avtagning

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt bröstet

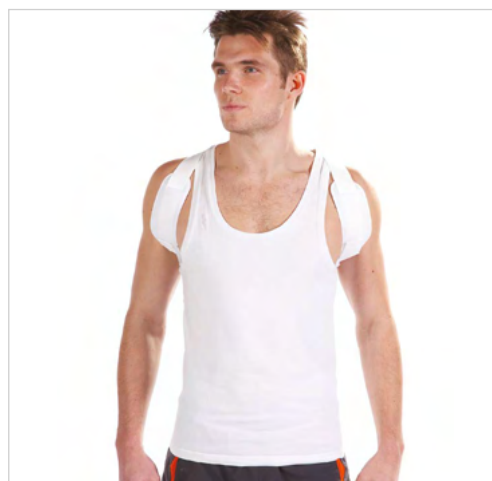

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets bröstkorg	Art.nr.
XS	51 - 61 cm	205032
S	61 - 76 cm	205033
M	76 - 91 cm	205035
L	91 - 107 cm	205037
XL	107 - 122 cm	205038
XXL	122 - 137 cm	205039

FORMFIT® PRO ELBOW

Össur Formfit® Pro Elbow ger lindring vid smärta i armbågen. Den här kompressiva 3D-armbågsleeven tillverkas med vår MotionTech™-teknik och har två integrerade SmartPads™ vid armbågen för punktstöd och vaddering. RadialStrap™ ger ytterligare kompression och stöd.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

INDIKATIONER

Armbågsbesvär som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Smärta och svullnad i armbågen
- Medial och lateral epikondylit (golfarmbåge respektive tennisarmbåge)


KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3D MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- SmartPads™ vid armbågen för punktstöd och vaddering
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och mer säker applicering
- RadialStrap™ för extra kompression och stöd

NÖDVÄNDIGA MÅTT

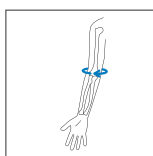

Mät armens omkrets exakt där armbågen är. Armbågen skall vara i full sträckning.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets armbåge	Art.nr.
XS	17 - 20 cm	FP300001
S	20 - 23 cm	FP300002
M	23 - 26 cm	FP300003
L	26 - 29 cm	FP300004
XL	29 - 32 cm	FP300005



REBOUND® POST-OP ELBOW

Rebound® Post-Op Elbow kombinerar intuitiva funktioner för ortopedingenjörer och användare med en design som syftar till att förbättra den post-operativa upplevelsen. Genom att kombinera drop-lock leden och fyra teleskopiska manchetter, kan individuella post-op-protokoll lätt följas. Rebound Post-Op Elbow är användarvänlig och lättast i sitt slag. Ortosen finns i höger/vänster passform med formbara stabiliserande manchetter. De blå inställningspunkterna är till för att förenkla hanteringen för patienterna.



INDIKATIONER

Indikationer som kräver immobilisering av armbågen och/eller begränsning av rörelseomfånget. Detta kan omfatta:

- Stabila frakturer i armbågen, distala humerus, proximala radius eller ulna
- Sen- och ligamentskador eller -kirurgi
- Rekonstruktion av kollateralligament
- Hyperextension i armbågen
- Tricepssenekirurgi
- Kroniska armbågsskador
- Lindring vid tennisarmbåge

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Konstruerad till att vara den lättaste ortosen på marknaden
- Teleskopiska paddlar kan flyttas efter individuell längd så att operationsområdena hålls fria
- Enkel inlärning för användare med intuitiva inställningspunkter för patienten, inklusive Blue is You™-spännen och numrerat remsystem
- Drop-Lock-gångjärn ger ett säkert rörelseomfång med stötdämpande dragjusteringsstopp och valfri ROM-låsningfunktion
- Formbara stabilitetsmanschetter konstruerade för individuell anpassning som ger bättre passform och stöd
- Bandguiderna bibehåller bandplaceringen för extra säkerhet och komfort
- Universell passform för både vänster/höger armbåge

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal, en storlek

REBOUND® POST-OP ELBOW

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

Sida	Art.nr.
Vänster	B-8391680
Höger	B-8391580

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Elbow Wrist Control Kit	B-8390003
Elbow ROM Locks Kit	B-8390005

RESERVDELAR

Beskrivning	Art.nr.
Elbow Liner Kit	B-8390002
Elbow Sling Kit	B-8390004
Strap Tab Kit	B-8390006
Adhesive Hook Sticker Kit	B-8390007
Anti-Migration Pad Kit	B-8390008
Elbow Strap Kit	B-8390009

FORMFIT® TENNIS ELBOW

Formfit Tennis Elbow är tillverkad av patenterad, ergonomiskt formad plast. Det finns dubbla blå kuddar med räfflad yta på var sida som minskar sendrag. Design och material med slitstyrka möjliggör dagligt bruk för både arbete och idrottsaktiviteter.

INDIKATIONER

- Tennisarmbåge
- Förebyggande vid arbete, vardagsliv och idrott
- Golfarmbåge

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar rem
- Patenterad ergonomiskt formad plast eliminerar behovet av kompressor i samband med traditionella utformningar.
- Dubbla blå kuddar ger motvikt och minskar sendrag och därmed inflammation
- Ribbed surfaces reduce vibration to the tendon, increasing comfort
- Räfflade ytor minskar vibration mot ligament och ger ökad komfort

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Armbågens omkrets



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Art.nr.
S	22 - 26 cm	B-247000002
M	27 - 32 cm	B-247000003
L	33 - 38 cm	B-247000004

FORMFIT® PRO WRIST

Össur Formfit Pro Wrist är stickad med 3D MotionTech™-teknik. Passar bra för skador som har fördel av kompression. Formbara skenor i aluminium kan anpassas för att följa handledens anatomi. CoolVent™-teknik vid tumbasen för bättre ventilation och komfort.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



FoldLock™



INDIKATIONER

Handledsbesvär som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Reumatoid artrit (RA) och andra kroniska smärttillstånd
- Stukningar och sträckningar av handleden
- Överbastning och smärta
- Handledstendinit


KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform har visat sig vara överlägsen när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga, så att användaren hålls sval under användning.
- Formbar skena i aluminium för individuell anpassning
- CoolVent™-teknik vid tumbasen för god ventilation och komfort

NÖDVÄNDIGA MÅTT

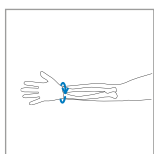

Omkretsmått vid handledens bas vid neutral sträckning (0° flexion).

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

Storlek	Omkrets vrist	Vänster	Höger
XS	14 - 15 cm	FP400201	FP400101
S	15 - 16 cm	FP400202	FP400102
M	16 - 17 cm	FP400203	FP400103
L	17 - 18 cm	FP400204	FP400104
XL	18 - 19 cm	FP400205	FP400105
XXL	19 - 20 cm	FP400206	FP400106



SPECTRA HANDLEDSORTOS

Ett stabilt och mycket behagligt handledsstöd som är lätt att ta av och på. Spectra är tillverkad i ett moccamaterial med ett mjukt tygfoder. Enkel snörning med ett avslutande kardborreband som även stabiliserar handleden. Spectra har aluminiumska placerad dorsalt och volart.

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar
- Behandling efter borttagning av gips

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Remmar med kardborrfäste
- Justerbar volar för finjustering vid behov

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
XS	12 - 14 cm	6602210	6602315
S	14 - 16 cm	6602422	6602535
M	16 - 18 cm	6602624	6602734
L	18 - 20 cm	6602755	6602793
XL	20 - 22 cm	6602826	6602932

FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM

Formfit Wrist och Formfit Wrist & Forearm ger immobilisering och skydd för patienter med tendinit eller vissa typer av skador i mjukdelar, stukningar och sträckningar. Ortosen kan användas vid behandling efter borttagning av gips. Lätt material som andas och anatomiskt anpassad passform gör den här bekväma produkten till ett bra val.

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Behandling efter borttagning av gips
- Skador i mjukdelar

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Anatomiskt anpassad passform
- Remmar med kardborrfäste
- Anpassningsbara stödskenor

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



BESTÄLLNINGSGRUPP

FORMFIT WRIST & FOREARM

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger	Vänster	Höger
		20 cm		25 cm	
XS	13 - 16 cm	317082	317072	617082	617072
S	16 - 18,5 cm	317083	317073	617083	617073
M	18,5 - 20,5 cm	317085	317075	617085	617075
L	20,5 - 23,5 cm	317087	317077	617087	617077
XL	23,5 - 25,5 cm	317088	317078	617088	617078

TILLBEHÖR

GELKUDDE FÖR VÄRME-/KYLBEHANDLING

Storlek	Vänster	Höger
XS, S	GB20L	GB20R
M, L, XL	GB22L	GB22R



* Fits XS/S. For M-XL, please use Form Forearm 10" part numbers



FORMFIT® UNIVERSAL WRIST & THUMB

Formfit Universal handleds- och tumprodukter är utformade för att begränsa rörligheten i handled och tumme. Den ger immobilisering och skydd mot vissa mjukvävnadsskador samt lindriga till måttliga stukningar och sträckningar, inklusive skidåkartumme och läkning efter gipsbehandling. Den lätta universella designen innebär också lägre lagernivå.

INDIKATIONER

- Lindriga till måttliga stukningar och sträckningar
- Seninflammation
- Läkning efter gipsbehandling
- Andra mjukvävnadsskador

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Quick-Pull-fästremmar
- Lägesbetingad dorsalskena
- Anpassningsbar tumskena
- Formbar palmarskena

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FORMFIT WRIST

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
Paediatric	9 - 13 cm	B-252603301	B-252603300
8" Universal	11 - 24 cm	B-252603109	B-252503109
8" XL	19 - 28 cm	B-252603106	B-252603105

FORMFIT WRIST & FOREARM UNIVERSAL

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
10" Universal	11 - 24 cm	B-252603210	B-252603209

FORMFIT THUMB SPICA UNIVERSAL

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
Paediatric	9 - 13 cm	B-253603301	B-253603300
8" Universal	11 - 24 cm	B-253603109	B-253503109
8" XL	19 - 28 cm	B-253603106	B-253603105

FORMFIT® TUMORTOS

Formfit® tumortos är utformad för att begränsa rörligheten i handled och tumme. Den ger immobilisering och skydd för patienter med tendinit (t.ex. Morbus de Quervain), skador i mjukdelar samt medelsvåra stukningar och sträckningar. Ortosen kan användas vid behandling efter borttagning av gips. Lätt material som andas och anatomiskt passform gör den här bekväma produkten till ett bra val.

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit t.ex. Morbus de Quervain
- Behandling efter borttagning av gips
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar t.ex. skada på tummens ulnara kollateralligament

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Anatomiskt passform
- Remmar med kardborrfäste
- Anpassningsbara stödskenor

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

Längd: 20 cm.



BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
XS	13 - 16 cm	3020	3120
S	16 - 18,5 cm	3030	3130
M	18,5 - 20,5 cm	3050	3150
L	20,5 - 23,5 cm	3070	3170
XL	23,5 - 25,5 cm	3080	3180

TILLBEHÖR

GELKUDDE FÖR VÄRME-/KYLBEHANDLING

Storlek	Vänster	Höger
Avsedd för storlek XS, S	GB20L	GB20R
Avsedd för storlek M, L, XL	GB22L	GB22R



FORMFIT® BARNORTOS

Formfit Universal Wrist & Thumb-produkterna har utformats för att begränsa rörligheten för handled och tumme. De ger god immobilisering av handled och tumme vilket gör produkterna till ett bra val för rehabilitering och läkning av handleds- och tummskador, för skydd vid vissa typer av skador i mjukdelar, lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar, skador på tummens ulnara kollateralligament samt för läkning efter gipsbehandling. Den lätta universaldesignen underlättar också din lagerhållning.

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Behandling efter borttagning av gips
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar
- Formbar handskena

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Quick-Pull-fästremmar
- Positionell dorsal stödskena
- Anpassningsbar tumskena

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Beskrivning	Omkrets handled
B-252603301	B-252603300	Formfit handledsortos	9 - 12 cm
B-253603301	B-253603300	Formfit tumortos	9 - 12 cm

LYCRAFLEECE BARNORTOS

Behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece. Formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

LycraFleece är tillverkat av polyester, nylon och elastan.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3510C-12	3510C-22	XS	8 - 10 cm
3510C-13	3510C-23	S	10 - 12 cm
3510C-15	3510C-25	M	12 - 14 cm
3510C-17	3510C-27	L	14 - 16 cm

EXOFORM® HANDLEDSORTOS

INDIKATIONER

- Karpaltunnelsyndrom
- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Behandling efter bort tagning av gips
- Tendinit, Bursit
- Reumatoid artrit/Osteoartrit

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt utformat foder för bästa passform och komfort.
- Styva plaststöd på ovan- och undersida följer handens och handledens anatomi och ger ytterligare stöd och



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
507082	507072	XS	13 - 16 cm
507083	507073	S	16 - 18,5 cm
507085	507075	M	18,5 - 20,5 cm
507087	507077	L	20,5 - 23,5 cm
507088	507078	XL	23,5 - 25,5 cm

EXOFORM® CTS HANDLEDSORTOS

INDIKATIONER

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendinit

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mer rum vid tumbas, palmarveck och 5:e MP för full
- MP-flexion.
- Anatomiskt korrekt utformad, låg profil.
- Avsedd att ge ett mjukt, kontrollerat motstånd vid rörelser i extremlägen.
- Ger avlastning av radius och styloideus ulna.
- Insidan är 3D-gjuten för bästa komfort.
- Fabriksjusterad i neutralt läge för bekväm begränsning av rörelse/flexibilitet.



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled, runt handflata

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Omkrets runt handflata
517083	517073	S	13 - 16,5 cm	17 - 20,5 cm
517085	517075	M	16,5 - 19 cm	20,5 - 23,5 cm
517087	517077	L	19 - 25,5 cm	23,5 - 26 cm

ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE & SVART

Kort handledsbandage i behaglig resår med markerad midja och utan skena. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige
- TB302-40, Extraband 5 cm, SVART

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3105-12	3105-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3105-13	3105-23	S	14 - 16 cm	Beige
3105-15	3105-25	M	16 - 18 cm	Beige
3105-17	3105-27	L	18 - 20 cm	Beige
3105-18	3105-28	XL	20 - 22 cm	Beige

ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3105-32	3105-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3105-33	3105-43	S	14 - 16 cm	Svart
3105-35	3105-45	M	16 - 18 cm	Svart
3105-37	3105-47	L	18 - 20 cm	Svart
3105-38	3105-48	XL	20 - 22 cm	Svart

LYCRAFLEECE HANDLEDSORTOS

Behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece. Formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

LycraFleece är tillverkat av polyester, nylon och elastan.

TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3510-32	3510-42	XS	12 - 14 cm
3510-33	3510-43	S	14 - 16 cm
3510-35	3510-45	M	16 - 18 cm
3510-37	3510-47	L	18 - 20 cm
3510-38	3510-48	XL	20 - 22 cm

ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE & SVART

Handledsortos i behaglig resår med formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning på hand-ryggen och reglerbart tumgrepp.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige
- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110-12	3110-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3110-13	3110-23	S	14 - 16 cm	Beige
3110-15	3110-25	M	16 - 18 cm	Beige
3110-17	3110-27	L	18 - 20 cm	Beige
3110-18	3110-28	XL	20 - 22 cm	Beige
3110-19	3110-29	XXL	22 - 24 cm	Beige

ALFA HANDLEDSORTOS SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110-32	3110-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3110-33	3110-43	S	14 - 16 cm	Svart
3110-35	3110-45	M	16 - 18 cm	Svart
3110-37	3110-47	L	18 - 20 cm	Svart
3110-38	3110-48	XL	20 - 22 cm	Svart
3110-39	3110-49	XXL	22 - 24 cm	Svart

Tips! Tvättråd för våra ortoser finns i slutet av katalogen.

ALFA HANDLEDSORTOS WIDE BEIGE

Samma utförande som art.nr 3110 men utvidgad proximalt för patienter med kraftiga underarmar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

TILLBEHÖR

- TB302-00, 5 cm, beige

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



#3110 Normal

#3110W Wide/bred

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110W-12	3110W-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3110W-13	3110W-23	S	14 - 16 cm	Beige
3110W-15	3110W-25	M	16 - 18 cm	Beige
3110W-17	3110W-27	L	18 - 20 cm	Beige
3110W-18	3110W-28	XL	20 - 22 cm	Beige

ALFA HANDLEDSORTOS WIDE SVART

Samma utförande som art.nr 3110 men utvidgad proximalt för patienter med kraftiga underarmar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110W-32	3110W-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3110W-33	3110W-43	S	14 - 16 cm	Svart
3110W-35	3110W-45	M	16 - 18 cm	Svart
3110W-37	3110W-47	L	18 - 20 cm	Svart
3110W-38	3110W-48	XL	20 - 22 cm	Svart

ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR BEIGE

Handledsortos i behaglig resår med extra bred och stadig volar aluminiumskena. Högt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning med två breda och två smala kardborreband på handryggen och reglerbart tumgrepp. Stor tumöppning och bred handform.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3116-12	3116-22	XS	12 - 14 cm
3116-13	3116-23	S	14 - 16 cm
3116-15	3116-25	M	16 - 18 cm
3116-17	3116-27	L	18 - 20 cm
3116-18	3116-28	XL	20 - 22 cm

ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR SVART

Handledsortos i behaglig resår med volar skena som är bred och extra stadig. Högt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning med två breda och två smala kardborreband på handryggen och reglerbart tumgrepp. Stor tumöppning och bred handform.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3116-32	3116-42	XS	12 - 14 cm
3116-33	3116-43	S	14 - 16 cm
3116-35	3116-45	M	16 - 18 cm
3116-37	3116-47	L	18 - 20 cm
3116-38	3116-48	XL	20 - 22 cm

UNIVERSAL THUMB SPLINT

Kombinerad handled och tumskena för immobilisering av MCP och CMC led. Passar höger och vänster hand.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal

Art.nr.	Beskrivning
30000	Universal Thumb Splint



ALFA TUMORTOS BEIGE & SVART

Tumortos i behaglig resår med uttagbar tumskena. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



ALFA TUMORTOS II BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3143-12	3143-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3143-13	3143-23	S	14 - 16 cm	Beige
3143-15	3143-25	M	16 - 18 cm	Beige
3143-17	3143-27	L	18 - 20 cm	Beige
3143-18	3143-28	XL	20 - 22 cm	Beige

ALFA TUMORTOS II SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3143-32	3143-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3143-33	3143-43	S	14 - 16 cm	Svart
3143-35	3143-45	M	16 - 18 cm	Svart
3143-37	3143-47	L	18 - 20 cm	Svart
3143-38	3143-48	XL	20 - 22 cm	Svart

ALFA CMC TUMORTOS BEIGE & SVART

Tumortos i behaglig resår, modell utan skena. Stödjer och lyfter CMC från thenar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



ALFA CMC TUMORTOS BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3145-12	3145-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3145-13	3145-23	S	14 - 16 cm	Beige
3145-15	3145-25	M	16 - 18 cm	Beige
3145-17	3145-27	L	18 - 20 cm	Beige

ALFA CMC TUMORTOS SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3145-32	3145-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3145-33	3145-43	S	14 - 16 cm	Svart
3145-35	3145-45	M	16 - 18 cm	Svart
3145-37	3145-47	L	18 - 20 cm	Svart

AIR X TUMORTOS

En tumortos som ger justerbart stöd till tummens CMC-led. Ortosen är optimal vid behandling av osteoartrit och medial subluxation. Det justerbara bandet kan lindas runt CMC1- och MCP1-lederna.

Materialet Air X transporterar bort fukt och materialet andas, vilket minimerar risken för hudirritation.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3605-11	3605-21	Spädbarn	11 - 14 cm
3605-12	3605-22	Barn	14 - 17 cm
3605-13	3605-23	S	15 - 18 cm
3605-15	3605-25	M	18 - 20 cm
3605-17	3605-27	L	20 - 23 cm
3605-18	3605-28	XL	23 - 25 cm

LYCRAFLEECE TUMORTOS

Tumortos i behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece och med uttagbar tumskena. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led.

LycraFleece är tillverkad av polyester, nylon och elastan.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3543-32	3543-42	XS	12 - 14 cm
3543-33	3543-43	S	14 - 16 cm
3543-35	3543-45	M	16 - 18 cm
3543-37	3543-47	L	18 - 20 cm
3543-38	3543-48	XL	20 - 22 cm

VENTOPRENE TUMORTOS

Tumortos i mjukt perforerad neoprene som ger värme och låter huden andas. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led. Har en uttagbar tumskena.

Tumortosen kan användas i våta miljöer som t. ex. vid bassängträning.

Tillverkad i perforerad neoprene klädd med polyester.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3743-12	3743-22	XS	12 - 14 cm
3743-13	3743-23	S	14 - 16 cm
3743-15	3743-25	M	16 - 18 cm
3743-17	3743-27	L	18 - 20 cm
3743-18	3743-28	XL	20 - 22 cm

KNA



KNA
BRACING & SUPPORT

UNLOADER® - FÖR ALLA GRADER AV OA

UNLOADER - AVLASTANDE ORTOSER VID KNÄARTROS

Effektiva ortoser byggda på bevisad teknik som reducerar knäsmärta till följd av ensidig knäartros och som ofta kan fördröja tiden fram till kirurgiska ingrepp.



UNLOADER ONE®


- Måttlig till svår unikompartmentell knäartros
- Unikompartmentella knätillstånd som kräver avlastning, såsom vid broskskada, avaskulär nekros eller tibiaplatåfraktur



UNLOADER ONE® X

- Utöver de indikationer som gäller för Unloader One, kan Unloader One X även användas vid degenerativa meniskförändringar


DEFINITION AV GRAD AV OA BASERAT PÅ RÖNTGENOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR

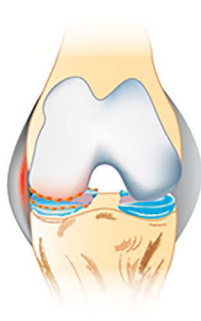

MILD OA



MÅTTLIG OA

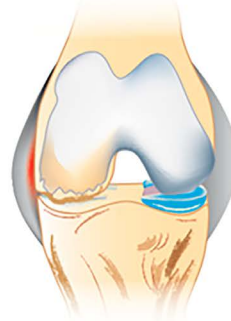

SVÅR OA

Genom slätröntgen av knälederna graderar man hur mycket ledspringan har minskat (som ett tecken på att brosket blivit tunnare) och hur mycket benpålgningar (osteofyter) som kan ses. En av de vanligaste graderingarna som innefattar både ledspringevidden och benpålgningen utvecklades för cirka femtio år sedan av läkarna Kellgren och Lawrence i Manchester i England. Skalan går från 0-4 där fyra är en mer allvarlig ledpåverkan som kan vara aktuell för operation medan grad 1-2 är en lätt ledpåverkan som ofta har en god prognos.

UNLOADER ONE[®] X

Unloader One X förbättrar rörligheten genom att ge smärtlindring vid knäartros, degenerativ meniskruptur och andra unikompartimentella knätillstånd som kan förbättras av avlastning.

Den har Össurs unika patenterade och kliniskt beprövade 3-punkts-hävtångssystem som ger unikompartimentell avlastning av knäleden.

Finns i anpassade och OTS-versioner för patienter med olika benskillnader.



INDIKATIONER

- Måttlig till svår ensidig knäartros
- Degenerativa meniskrupturer
- Andra unikompartimentella knätillstånd som kan förbättras av avlastning, till exempel:
 - Rekonstruktion vid ledbrotskador
 - Meniskkirurgi
 - Osteonekros
 - Kondylära benmärgsskador
 - Tibiaplatåfrakturer

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3-punkts-hävtångssystem som består av två DFS-remmar, styvt skal och en enda upprätt led bidrar till en unikompartimentell avlastning av knäleden
- Verktygsfria SmartDosing[®]-rattar gör det möjligt för patienten att kontrollera sin smärtnivå genom att finjustera remspänningen
- Hudvänliga liners och kuddar samt en slät insida på skalen minskar risken för tryckpunkter. Vadmuskelremmen är placerad över den bredaste delen av vaden för att förhindra glidning
- Färgkodade inställningspunkter och Quick-Fit Buckles ökar användarvänligheten.
- Inpassningsguide på leden underlättar korrekt placering på benet
- En smal perforerad ram med mjuka kanter, följer enkelt individuella kroppsformer och förblir diskret, oavsett om den bärs över eller under kläder.
- Hela ortosen är tvättbar i maskin (tvättpåse medföljer)
- Kan servas på plats.

NÖDVÄNDIGA MÅTT: UNLOADER ONE X CUSTOM

För att ta mått för beställning av Unloader X Custom använd dig av: Smartmeasure

SMARTMEASURE[®]


Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos



Beskrivning	Art.nr.
SmartMeasure Measuring Kit	CMS0000
Constant Force Caliper	B-312000000


UNLOADER ONE® X

NÖDVÄNDIGA MÅTT: UNLOADER ONE X OTS

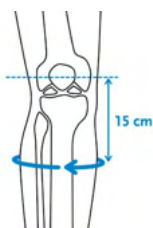

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Mät benlängden från golv till ljumske.

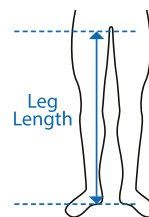

Storlek	Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella
XS - M	25 - 43
L - XL	43 - 62

Modell	Benlängd
Standard	> 85 cm
Short	≤ 85 cm

FÄRGER

CUSTOM VALBARA STANDARDFÄRGER



Svart ortos / svarta komponenter



Blå ortos / svarta komponenter



Grafitgrå ortos / grå komponenter



Röd ortos / svarta komponenter



Vit ortos / grå komponenter



Gul ortos / svarta komponenter

OTS FÄRG



Grafitgrå ortos / grå komponenter

Färgavvikelse kan förekomma

BESTÄLLNINGSGRUPP

Leden är placerad på den drabbade sidan av leden.
Kort version rekommenderas för patienter med en benlängd på ≤ 85 cm.

CUSTOM

Beskrivning	Art.nr.
Höger	UOX0R
Vänster	UOX0L

OTS

Standard	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX0518713	UOX0528713	UOX0618713	UOX0628713
L - XL	UOX0518715	UOX0528715	UOX0618715	UOX0628715

Kort	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX1518713	UOX1528713	UOX1618713	UOX1628713
L - XL	UOX1518715	UOX1528715	UOX1618715	UOX1628715


UNLOADER ONE® X

OTS - UTAN FÖRPACKNING

Standard	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX0518718	UOX0528718	UOX0618718	UOX0628718
L - XL	UOX0518719	UOX0528719	UOX0618719	UOX0628719


Kort	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX1518718	UOX1528718	UOX1618718	UOX1628718
L - XL	UOX1518719	UOX1528719	UOX1618719	UOX1628719

ÖVERSIKT - TILLBEHÖR

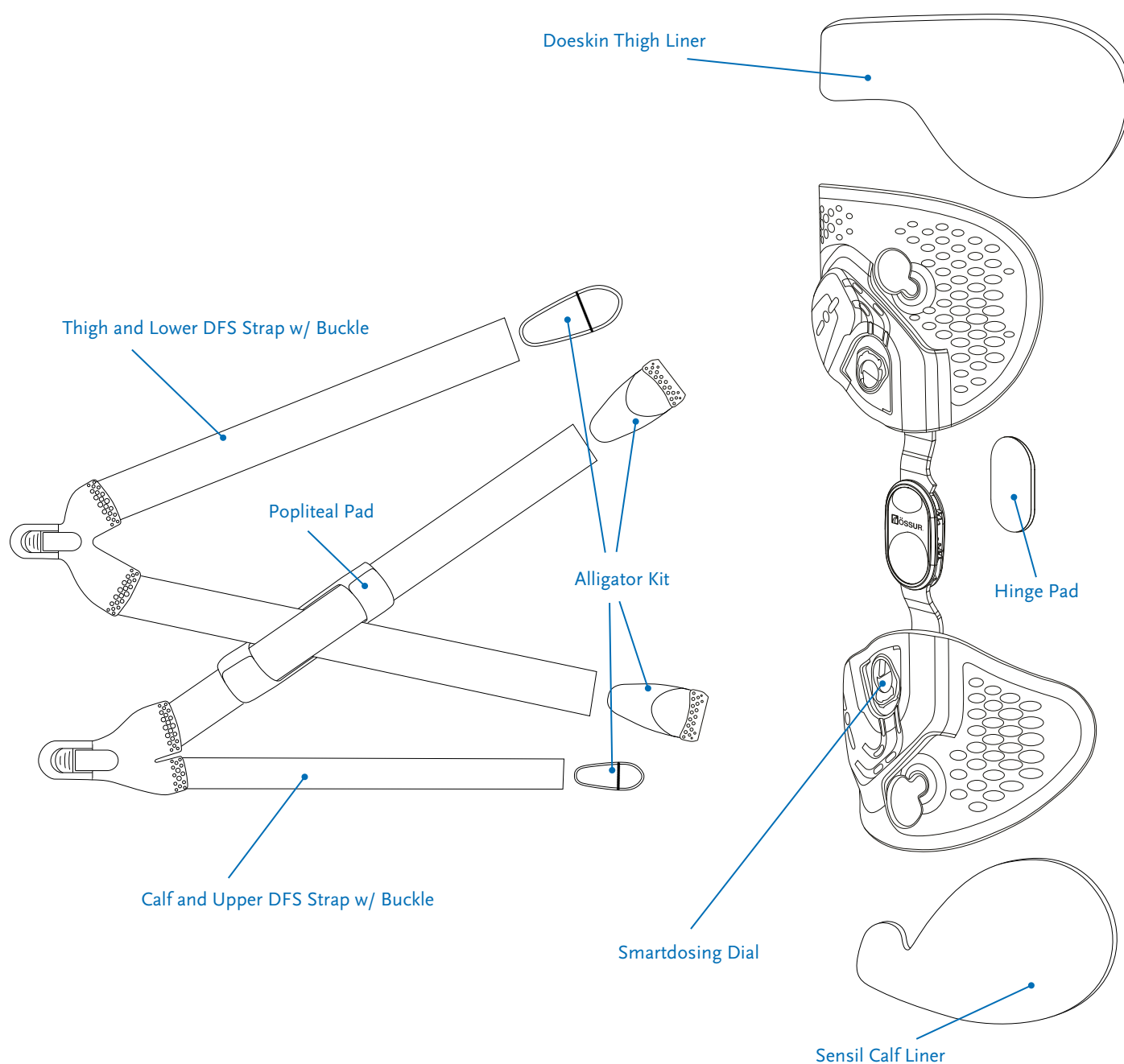

UNLOADER ONE® X

TILLBEHÖR

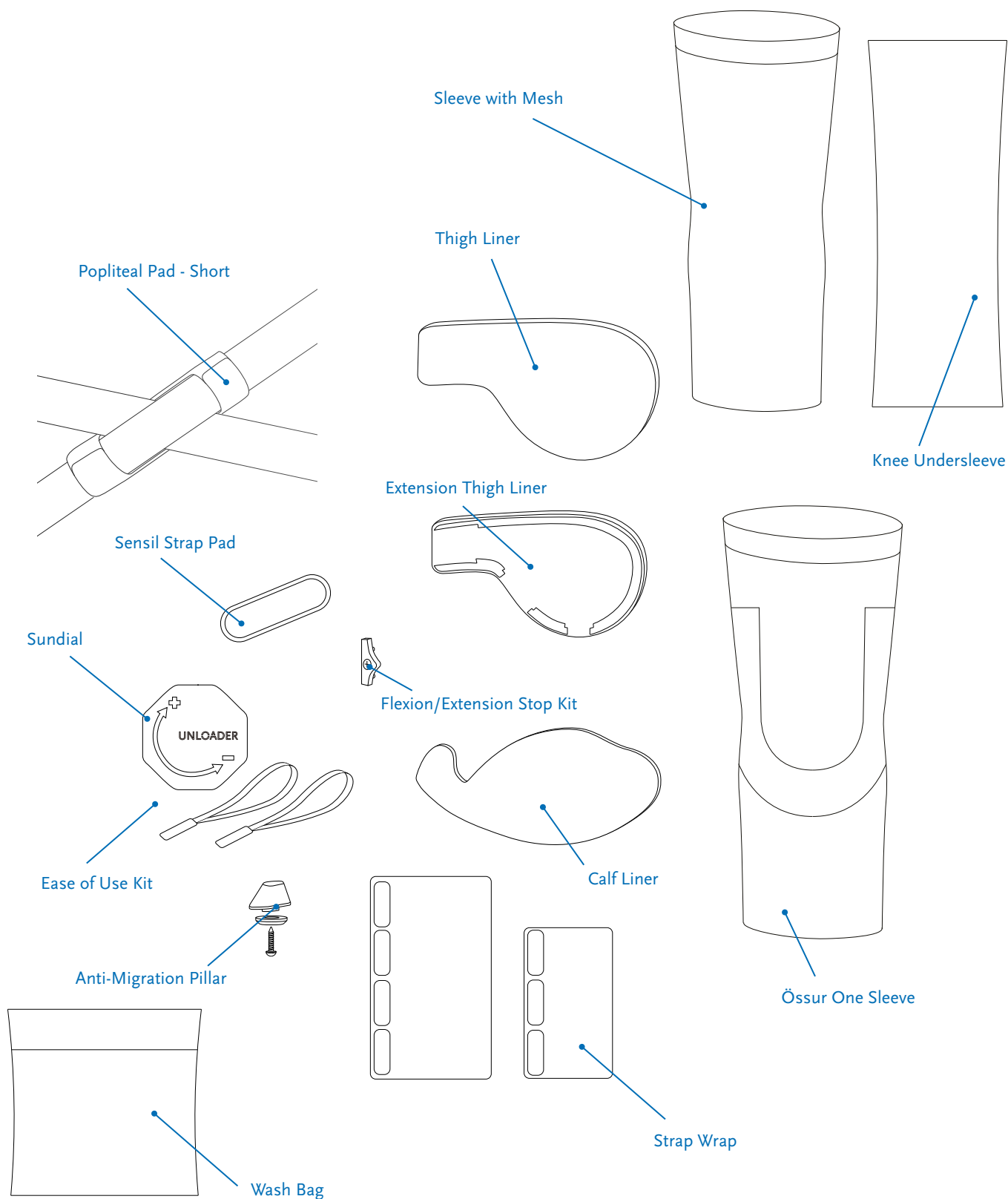

UNLOADER ONE® X

LÄRLINERS	LÄR, Höger medial, Vänster lateral	LÄR, Höger lateral, Vänster medial	LÄRFÖRLÄNGNING, Höger medial, Vänster lateral	LÄRFÖRLÄNGNING, Höger lateral, Vänster medial
Svart, Sensil	UOX526801	UOX525801	NA	NA
Svart, Doeskin	UOX526901	UOX525901	UOX546901	UOX545901
Grå, Sensil	UOX526201	UOX525201	NA	NA
Grå, Doeskin	UOX526101	UOX525101	UOX546101	UOX545101

VADLINERS	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart, Sensil XS-M	UOX516952	UOX515952
Svart, Sensil L-XL	UOX516962	UOX515962
Svart, Doeskin XS-M	UOX516951	UOX515951
Svart, Doeskin L-XL	UOX516961	UOX515961
Grå, Sensil XS-M	UOX516152	UOX515152
Grå, Sensil L-XL	UOX516162	UOX515162
Grå, Doeskin XS-M	UOX516151	UOX515151
Grå, Doeskin L-XL	UOX516161	UOX515161

THIGH & LOWER DFS STRAP*	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart	UOX406902	UOX405902
Grå	UOX406102	UOX405102

* Innehåller: Thigh and DFS Strap with buckle

CALF & UPPER DFS STRAP*	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart	UOX406901	UOX405901
Grå	UOX406101	UOX405101

* Innehåller: Calf and DFS Strap with buckle

UOX SERVICE KIT*	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart, XS-M	UOX416901	UOX415901
Svart, L-XL	UOX416911	UOX415911
Grå, XS-M	UOX416101	UOX415101
Grå, L-XL	UOX416111	UOX415111

* Innehåller: Doeskin Thigh Liner, Sensil Calf Liner, Thigh & Lower DFS Strap with Buckle, Calf & Upper DFS Strap with Buckle, Hinge Pad, Popliteal Pad, & Alligator Kit

ANTI-MIGRATION PILLAR	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart	UOX700015	UOX700035
Grå	UOX700025	UOX700045

UNLOADER ONE® X

TILLBEHÖR

Beskrivning	Svart	Grå
Alligator Kit*	UOX900001	UOX900002
Hinge Pad	UOX700091	UOX700011
Popliteal Pad	UOX700012	UOX700092
Popliteal Pad - Short	UOX700022	UOX700082
Sensil Strap Pad	UON0181	UON0182
Sensil Strap Pad - 10 Pieces	UOX700113	UOX700193
Smartdosing Dial	UOX1000001	UOX1000002
Strap Wrap Set	UOX700014	UOX700094

* Innehåller: 4 Alligator Clips: 2 DFS, 1 Thigh & 1 Calf

Beskrivning	Art.nr.
Ease of Use Kit*	UOX800001
Flexion/Extension Stop Kit**	B-301040053
Flexion/Extension Stop Kit** - 5 Sets	B-301040055
Sundial	UOX1200001
Wash Bag	UON60200

* Innehåller: Sundial & 4 buckle finger-loops

** Innehåller: 0°, 5°, 10°, 15°, 30° Extension Stops, 90° Flexion Stop

ÖSSUR ONE SLEEVES*

Storlek	Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Larets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Grå	Svart
2XS	25 - 29cm	31 - 36cm	OSO60011	OSO60021
XS	29 - 33cm	36 - 42cm	OSO60012	OSO60022
S	33 - 37cm	42 - 48cm	OSO60013	OSO60023
M	37 - 42cm	48 - 55cm	OSO60014	OSO60024
L	42 - 47cm	55 - 62cm	OSO60015	OSO60025
XL	47 - 52cm	62 - 70cm	OSO60016	OSO60026
XXL	52 - 57cm	70 - 78cm	OSO60017	OSO60027
3XL	57 - 62cm	78 - 86cm	OSO60018	OSO60028

* Össur One: 51% Tencel™/30% Polyamide/19% Elastane

SLEEVE WITH MESH*

Storlek	Mått	Art.nr.
XS	< 43cm	SLV60011
S	43 - 46cm	SLV60012
M	46 - 51cm	SLV60013
L	51 - 53cm	SLV60014
XL	53 - 56cm	SLV60015
XXL	56 - 61cm	SLV60016

* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester
- Band: 80% Polyester/20% Spandex

ÖSSUR KNEE UNDERSLEEVE*

Storlek	Mått	Grå	Svart
XS	30.5 - 38cm	B-250150201	B-250150101
S	38.1 - 45cm	B-250150202	B-250150102
M	45.1 - 49.5cm	B-250150203	B-250150103
L	49.6 - 54.5cm	B-250150204	B-250150104
XL	54.6 - 62cm	B-250150205	B-250150105
XXL	62 - 71cm	B-250150206	B-250150106

Note: When using an undersleeve we advice to use the Silicone AMS (Anti-Migration System) to minimize migration.

* Össur Knee Undersleeve: 80% Nylon/20% Spandex

UNLOADER ONE®

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



INDIKATIONER

- Mild till svår enkompartments knäartros
- Andra knäskador som kan dra nytta av ensidig avlastning



Video: Unloader One with SmartDosing - Clinician Fitting Instructions (7 min 41 sec)



Video: Unloader One with SmartDosing - Clinician Custom-Fit Modifications (5 min 8 sec)



Video: Unloader One - Clinician Fitting Instructions (7 min 7 sec)


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dubbla DFS-band minskar trycket på känsliga områden runt knäet, vilket innebär minskad smärta.
- SmartDosing™ låter brukaren själv finjustera avlastningen. Inga verktyg behövs och inställningsratten kan hanteras genom kläder.
- Färgkodade snabbkopplingsspännen gör ortosen enkel att ta på och av.
- Patenterade Sensil®-liners eliminerar glidning.
- Flexibel skena med låg profil som följer patientens anatomi gör det möjligt att använda ortosen under kläderna.
- Perforerad lättviktsram för flexibilitet och ventilation

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

Storlek	Mått
S	31 - 35.5 cm
M	35.5 - 42.5 cm
L	42.5 - 51 cm
XL	51 - 61.5 cm

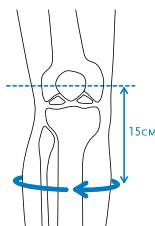

UNLOADER ONE®

BESTÄLLNINGSGENOMGÅEN

UNLOADER ONE SMARTDOSING

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
Storlek	Omkrets	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	31 - 35,5 cm	B-240618712	B-240518712	B-240628712	B-240528712
M	35,5 - 42,5 cm	B-240618713	B-240518713	B-240628713	B-240528713
L	42,5 - 51 cm	B-240618714	B-240518714	B-240628714	B-240528714
XL	51 - 61,5 cm	B-240618715	B-240518715	B-240628715	B-240528715

UNLOADER ONE SHORT SMARTDOSING

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
STORLEK	OMKRETS	VÄNSTER	HÖGER	VÄNSTER	HÖGER
XS	25 - 31 cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31 - 35.5 cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	35.5 - 42.5 cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	42.5 - 51 cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51 - 61.5 cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

UNLOADER ONE (RATCHET)

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
Storlek	Omkrets	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	31 - 35,5 cm	B-240619712	B-240519712	B-240629712	B-240529712
M	35,5 - 42,5 cm	B-240619713	B-240519713	B-240629713	B-240529713
L	42,5 - 51 cm	B-240619714	B-240519714	B-240629714	B-240529714
XL	51 - 61,5 cm	B-240619715	B-240519715	B-240629715	B-240529715

UNLOADER ONE SHORT (RATCHET)

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
STORLEK	OMKRETS	VÄNSTER	HÖGER	VÄNSTER	HÖGER
XS	25 - 31 cm	B-241619711	B-241519711	B-241629711	B-241529711
S	31 - 35.5 cm	B-241619712	B-241519712	B-241629712	B-241529712
M	35.5 - 42.5 cm	B-241619713	B-241519713	B-241629713	B-241529713
L	42.5 - 51 cm	B-241619714	B-241519714	B-241629714	B-241529714
XL	51 - 61.5 cm	B-241619715	B-241519715	B-241629715	B-241529715

Standard rekommenderas till patienter som är 165 cm och längre.
Short rekommenderas till patienter som är 165 cm och kortare.
Leden placeras på den affekterade sidan

UNLOADER ONE®

TILLBEHÖR

Kit	Smartdosing - Grå		Ratchet Grå	
Beskrivning	Hö. Med./Vä Lat.	Hö. Lat./Vä. Med.	Hö. Med./Vä Lat.	Hö. Lat./Vä. Med.
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-705277003	B-705278003	B-701217008	B-701218008
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit, Short	B-705277004	B-705277005	-	-
Strap & Strap Pad Kit	B-705270003		B-701210006	
Strap & Strap Pad Kit, Short	B-705277006		B-701240004	
DFS Strap Kit, Standard	B-701240002		-	-
DFS Strap Kit, Short	B-701240012		-	-
Pad Kit	-	-	B-702210003	

Beskrivning	Hö. Med / vä. Lat	Hö. Lat / vä. Med
Buckle Clasp kit	B-708217003	B-708218003
Alligator Tab (4 stk)	B-704210003	
Alligator Tab	B-310005334	
Extension Stop Kit	B-301040046	
Velcro Twist-Fit Attachment Kit	B-721240003	
Hinge screws	B-301010076	
Post	B-301010075	

ÖSSUR KNEE UNDERSLEEVE*

	Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Grå	Svart
	XS	25,4 cm - 30,9 cm	B-250150201	B-250150101
	S	30,9 cm - 35,6 cm	B-250150202	B-250150102
	M	35,6 cm - 42,5 cm	B-250150203	B-250150103
	L	42,5 cm - 50,8 cm	B-250150204	B-250150104
	XL	50,8 cm - 61,0 cm	B-250150205	B-250150105
	XXL	61,0 cm - 81,3 cm	B-250150206	B-250150106

* När Össur Knee Undersleeve används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera risken att undersleeven glider

SUSPENSION STRAP KIT

	Beskrivning	Grå
	Rekommenderas vid användning av polstring i sämskskinn (tibia) samt undersleeve	UNL00212

PADS

Hinge Pads	B-304120301
Popliteal Pad/ strap Grey 6in	B-304010103

UNLOADER ONE®

TILLBEHÖR

SENSIL LINERS

	Storlek	VAD		LÅR	
		Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
	S	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
	M	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
	L	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
	XL	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325

DOESKIN LINERS

	Storlek	VAD		LÅR	
		Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
	S	B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
	M	B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
	L	B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
	XL	B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

	Storlek	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
		Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	B-715217031	B-715218031
	S	B-715217032	B-715218032
	M	B-715217033	B-715218033
	L	B-715217034	B-715218034
	XL	B-715217035	B-715218035

UNLOADER ONE® PLUS

Många som lider av knäartros är överviktiga. För dessa patienter är det extra viktigt med komfort och effektivt stöd. Därför har Unloader One Plus en bredare lårrem än standardmodellen samt en vadmuskelrem som ser till att ortosen sitter på plats. Eftersom större ben kräver mer stöd har vi en stadigare upprätt modell med Adjustable Dynamic Joint-led som ger ytterligare stöd för optimal smärthantering. Flertalet referentgranskade kliniska och biomekaniska studier har påvisat den här teknikens effektivitet.



INDIKATIONER

- Måttlig till svår unikompartmentell knäartros
- Degenerativa meniskrupturer
- Andra knästillstånd som kan dra nytta av lokal (unikompartmentell) avlastning, såsom rekonstruktion vid ledbrotskador, osteonekros, tibiaplatåfrakturer, benmärgslesioner (benmärgsödem)



Video: Unloader One Plus - Clinician Fitting Instructions (9 min 5 sec)



Video: Unloader One Plus - Clinician Custom-Fit Modifications (5 min 47 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3-punktshävsstängssystemet tillhandahåller klinisk relevant smärtlindring av den påverkade sidan
- Smärtlindringen kan enkelt justeras med SmartDosing-vredet
- Hjälper patienten att vara rörlig under dagliga aktiviteter
- Med diskret led- och sleeve-design syns den inte under kläderna
- Låg vikt och lätt att använda

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella och vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

UNLOADER ONE PLUS STANDARD VERSION (15.5")

Storlek	Omkrets lår	Omkrets vad	Vänster	Höger	Vänster	Höger
L	53 - 64 cm	36 - 43 cm	B-245610004	B-245510004	B-245620004	B-245520004
XL	64 - 74 cm	43 - 51 cm	B-245610005	B-245510005	B-245620005	B-245520005

MEDIAL AVLASTNING

LATERAL AVLASTNING

Leden placeras på den affekterade sidan

UNLOADER ONE® PLUS

TILLBEHÖR

SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Storlek	Höger Medial/Vänster Lateral	Höger lateral, vänster medial
L	B-715237034	B-715238034
XL	B-715237035	B-715238035

LINERS

	Vad - Sensil		Lår - Doeskin	
Storlek	Höger medial, vänster lateral	Höger lateral, vänster medial	Höger medial, vänster lateral	Höger lateral, vänster medial
L	B-413700314	B-413800314	B-414700324	B-414800324
XL	B-413700314	B-413800315	B-414700325	B-414800325

TILLBEHÖR - SATSER

Beskrivning	Höger medial, vänster lateral	Höger lateral, vänster medial
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp kit	B-701237008	B-701238008
Strap & Strap Pad kit	B-701230006	
Strap kit	B-701230004	
Pad kit	B-702230003	
Buckle Clasp Kit	B-708237003	B-708238003
Alligator Clip Kit (ingår i alla bandsatser)	B-704210003	
Gastroc Kit	B-705230001	
Elastiskt lårband 20 cm	B-701237083	B-701238083
Elastiskt lårband 25 cm	B-701237103	B-701238103

UNLOADER ONE® CUSTOM

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

UNLOADER ONE SMARTDOSING CUSTOM

Färg	Omkrets lår	Omkrets vad	Vänster	Höger
Svart	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115600112	B-115500112
Grå	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115601712	B-115501712

UNLOADER ONE CUSTOM

Färg	Omkrets lår	Omkrets vad	Vänster	Höger
Svart	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115600111	B-115500111
Grå	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115601711	B-115501711

MÄTVERKTYG

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000



SMARTMEASURE®

Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD

Red	Pink	Silver
Orange	Black	White
Yellow	Navy Blue	Champagne
Lime Green	Ocean Blue	Charcoal

FÖRSLAG PÅ VALBARA MÖNSTER*



Unloader One® Custom går även att få med motiv. Kontakta kundtjänst för mer information och prisuppgift.

*Kontakta Kundsupport, +46 (0) 18 18 22 00, för prisuppgift

UNLOADER ONE® CUSTOM

TILLBEHÖR

SENSIL LINERS

	Storlek	Färg	VAD		LÅR	
			Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	Grå	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
	S	Grå	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
	M	Grå	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
	L	Grå	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
	XL	Grå	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325
	XS	Svart	B-419700111	B-419800111	B-409700121	B-409800121
	S	Svart	B-419700112	B-419800112	B-409700122	B-409800122
	M	Svart	B-419700113	B-419800113	B-409700123	B-409800123
	L	Svart	B-419700114	B-419800114	B-409700124	B-409800124
	XL	Svart	B-419700115	B-419800115	B-409700125	B-409800125

DOESKIN LINERS

	Storlek	Färg	VAD		LÅR	
			Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	Grå	B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
	S	Grå	B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
	M	Grå	B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
	L	Grå	B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
	XL	Grå	B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725
	XS	Svart	B-424702121	B-424802121	B-412700121	B-412800121
	S	Svart	B-424702122	B-424802122	B-412700122	B-412800122
	M	Svart	B-424702123	B-424802123	B-412700123	B-412800123
	L	Svart	B-424702124	B-424802124	B-412700124	B-412800124
	XL	Svart	B-424702125	B-424802125	B-412700125	B-412800125

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

	Storlek	Grå		Svart	
		Hö medial/Vä lateral	Hö lateral/Vä medial	Hö medial/Vä lateral	Hö lateral/Vä medial
	X-Small	B-715217031	B-715218031	B-715217011	B-715218011
	Small	B-715217032	B-715218032	B-715217012	B-715218012
	Medium	B-715217033	B-715218033	B-715217013	B-715218013
	Large	B-715217034	B-715218034	B-715217014	B-715218014
	X-Large	B-715217035	B-715218035	B-715217015	B-715218015

UNLOADER ONE® CUSTOM

TILLBEHÖR

SUSPENSION STRAP KIT

Beskrivning	Grå	Svart
Suspension Strap Kit	UNL00212	UNL00211

UNLOADER ONE SMARTDOSING CUSTOM – TILLBEHÖR

Beskrivning	Grå	Svart	Grå	Svart
	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial
SmartDosing Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-705277003	B-705278003	B-705277001	B-705278001
Strap & Strap Pad Kit	B-705270003		B-705270001	
Strap Kit	B-701270013		B-701270011	

UNLOADER ONE (RATCHET) CUSTOM – TILLBEHÖR

	Grå	Svart	Grå	Svart
Beskrivning	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-701217008	B-701218008	B-701217009	B-701218009
Strap & Strap Pad Kit	B-701210006		B-701210007	
Strap Kit	B-701210004		B-701210005	
Pad Kit	B-702210003		B-702210001	
Ratchet Complete Strap Set	B-701210004			

ÖVRIGA TILLBEHÖR

	Grå	Svart	Grå	Svart
Beskrivning	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial
Buckle Clasp Kit	B-708217003	B-708218003	B-708217001	B-708218001
Alligator Clip Kit (included in all strap kits)	B-704210003		B-704210001	
Alligator Tab	B-310005334		B-310005335	
Extension Stop Kit	B-301040046		B-301040047	
Velcro Twist-Fit Attachment Kit	B-721240003		B-721240001	

REBOUND® CARTILAGE

Hur bra en ledbroskreparation lyckas beror på hur bra patienten medverkar i rehabiliteringsprocessen. Protokollet baserar sig på begränsad broskbelastning i kombination med gradvis ökad aktivitet. Kryckor ger en viss avlastning och rekommenderas normalt i de flesta behandlingsprotokoll. Under sökningar visar dock att många patienter inte använder kryckorna rätt och därför inte får den avlastning som behövs.

Rebound Cartilage är en skyddande funktionell lösning som utvecklats för att stödja knäbroskets regenerering efter reparationsåtgärder såsom mikrofrakturkirurgi, OATS och (M)ACI. Med hjälp av det kliniskt testade 3-punktsstödet och de patenterade DFS-banden upprätthålls ledavlastningen under flexion för att skydda brosket under läkningsprocessen.

FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY



INDIKATIONER

- Traumatisk broskskada i knät
 - Meniskreparation
 - Avaskulär nekros
- Benmärgsödem



Video: Rebound Cartilage - Clinician Fitting Instructions (2 min 59 sec)



Video: Rebound Cartilage - Clinician Custom-Fit Modifications (4 min 02 sec)




Video: Rebound Cartilage with Flexion Control - Clinician Fitting Instructions (3 min 16 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dual Cartilage Protection Straps™-skyddsremmar bibehåller ledavlastningen vid flexion vilket skyddar brosket under läkningsprocessen.
- Wraparound sleeve med andasfunktion.
- Sensil®-silikon vad- och låropolstring för säkerställd suspension.
- Färgkodade Quick Fit-spännen gör det lätt att ta på och ta av ortosen
- Flexionskontroll kan fås som tillbehör om rehabiliteringsprotokollet förutsätter begränsning av rörelseomfånget

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

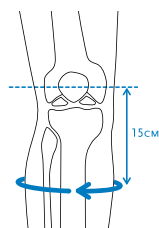

REBOUND® CARTILAGE

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

REBOUND CARTILAGE

Storlek	Omkrets*	Vänster medial avlastning	Höger medial avlastning	Vänster lateral avlastning	Höger lateral avlastning
S	31 - 35,5 cm	B-254610002	B-254510002	B-254620002	B-254520002
M	35,5 - 42,5 cm	B-254610003	B-254510003	B-254620003	B-254520003
L	42,5 - 51 cm	B-254610004	B-254510004	B-254620004	B-254520004
XL	51 - 61,5 cm	B-254610005	B-254510005	B-254620005	B-254520005

* Omkrets: mått tas 15 cm nedanför mitten av patella

REBOUND CARTILAGE MED FLEXIONSKONTROLL

Storlek	Omkrets	Vänster medial avlastning	Höger medial avlastning	Vänster lateral avlastning	Höger lateral avlastning
S	31 - 35,5 cm	B-254810002	B-254710002	B-254820002	B-254720002
M	35,5 - 42,5 cm	B-254810003	B-254710003	B-254820003	B-254720003
L	42,5 - 51 cm	B-254810004	B-254710004	B-254820004	B-254720004
XL	51 - 61,5 cm	B-254810005	B-254710005	B-254820005	B-254720005

Min/max brukarmått: Omkrets lår 34,3 - 73,5 cm. Omkrets vad 25 - 61,5 cm.

TILLBEHÖR

REBOUND CARTILAGE BAND OCH SLEEVES

Storlek	Wraparound sleeve* Vänster medial/höger lateral	Wraparound sleeve Höger medial/vänster lateral	Strap kit Inkl. 4 Band	Cps kit Inkl. 2 Band
S	B-254900082	B-254900072	B-701290002	B-700290002
M	B-254900083	B-254900073	B-701290003	B-700290003
L	B-254900084	B-254900074	B-701290004	B-700290004
XL	B-254900085	B-254900075	B-701290005	B-700290005

* Wraparound sleeve inkluderar integrerad silikon vadlinjer and doeskin lårliner

Beskrivning	Vänster medial	Höger medial	Vänster lateral	Höger lateral
Flexion Control Kit	B-705296100	B-705295100	B-705296200	B-705295200

Beskrivning	Vänster medial/ höger lateral	Höger medial/ vänster lateral
Silikon vadlinjer, doeskin lårliner, polstringskuddar	B-254900080	B-254900070
Doeskin vad- och lår liner, Bandsatser, polstringskuddar	B-427705001	B-427705000



CTi® OA

CTi har i 30 år satt standarden för måttbeställda knäortoser för ligamentskador. Lägg till varus- eller valguskorrigerande till denna klassiker och du får en utmärkt, dubbelledad knäortos för både osteoartrit och ligamentskador för dina mer aktiva patienter. Inkluderar patenterad Sensil®-polstring som eliminerar glidning, en flexibel nedre medial manschett för bättre skydd mot rotationskrafter och hudvänlig SensEdge-beläggning på sprutformade delar för att undvika tryckpunkter



INDIKATIONER

- Mild till svår unikompartmentell artros
- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Krävande vardagliga aktiviteter

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Rigid kolfiberram
- Måttillverkad efter varje patients unika anatomi med upp till 7° varus-/valguskorrigerande inbyggd i ramen
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Vänster	Höger
CTi OA	B-116630010	B-116530010

Se tillbehör och mätverktyg under CTi custom.

SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST

Rebound DUAL Basic och Rebound DUAL Basic ST erbjuder det värde och den enkelhet du behöver för att navigera i komplexa landskap. Rebound DUAL kollektionen är mångsidig och gör att Össur kan erbjuda högkvalitativa one-stop-lösningar från en och samma källa för att hjälpa användaren att övergå till en lyckad återhämtning.



Rebound DUAL Basic

Rebound DUAL Basic ST
(Step-Through)

INDIKATIONER

Rebound Dual Basic och Rebound Dual Basic ST är avsedda för kombinerade och icke-kombinerade instabiliteter i följande ligament:

- Främre korsbandet (ACL)
- Mediala kollateralligamentet (MCL)
- Lateral kollateralligamentet (LCL)
- Bakre korsbandet (PCL)
- Tillstånd som kan dra nytta av unicompartmental avlastning av knäet (endast möjligt med Rebound Dual Basic)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Med en topp ram som är multifunktionell och justerbar, ger den möjligheten att förlänga eller förkorta ramen enligt längden på patienten eller justerbar till varus/valgus position i knäet (gäller endast Rebound DUAL Basic)
- Inpassningsguiden till leden underlättar korrekt placering av ortosen i förhållande till benet
- Diskret och lätt aluminiumram
- Lårliner i sämskinn för komfort och halkfri Activegrip™-remkudde
- Lätt anpassningsbara/klippbara remmar med numrering på
- Polycentrisk led med låg profil och stoppalternativ för stabilitet och begränsning av rörelseomfång
- Finns tillgänglig i design som patienten kliver i eller med främre ram i storlek XS-3XL
- Lämplig för sporter med låg till hög aktivitetsnivå och glidsport
- Valfritt PCL-tillbehörskit för att stödja flera ligament

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 15 cm över mitten av patella

REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

X = 5 (höger)
6 (vänster)
Y = 1 (Rebound DUAL Basic)
2 (Rebound DUAL Basic ST)

Beskrivning	Storlek	M/L mått*	Omkrets lår	Art.nr.
Rebound DUAL Basic eller Rebound DUAL Basic ST*	XS	7.6 - 8.9cm	38.1 - 41.9cm	B-242XY0001B
	S	8.9 - 10.2cm	41.9 - 47cm	B-242XY0002B
	M	10.2 - 11.4cm	47 - 52.1cm	B-242XY0003B
	L	11.4 - 12.7cm	52.1 - 57.2cm	B-242XY0004B
	XL	12.7 - 14cm	57.2 - 62.2cm	B-242XY0005B
	2XL	14 - 15.2cm	62.2 - 69.9cm	B-242XY0006B
	3XL	15.2 - 16.5cm	69.9 - 76cm	B-242XY0007B

UTBYTESPOLSTRING TILLBEHÖR

Storlek	Basic Liner Art.nr.	Basic ST Liner Art.nr.
XS	B-701090130	B-701090140
S	B-701090131	B-701090141
M	B-701090132	B-701090142
L	B-701090133	B-701090143
XL	B-701090134	B-701090144
2XL	B-701090135	B-701090145
3XL	B-701090136	B-701090146

RESERVDELAR

Storlek	Art.nr.
RDUAL Basic Strap Kit XS-L	B-701090137
RDUAL Basic Strap Kit XL-3XL	B-701090138
RDUAL Basic ST Strap Kit XS-L	B-701090147
RDUAL Basic ST Strap Kit XL-3XL	B-701090148
RDUAL Basic ROM Stop Kit	B-701090109
Condyle Pad Kit	B-701090009

TILLBEHÖR

Storlek	Art.nr.
RDUAL Basic ROM Stop Kit	B-701090109
RDUAL Basic PCL Strap Kit XS-L	B-701090057
RDUAL Basic PCL Strap Kit XL-3XL	B-701090058
RDUAL Basic ST PCL Strap Kit XS-L	B-701090065
RDUAL Basic ST PCL Strap Kit XL-3XL	B-701090066

* Rebound DUAL Basic ST är 35.5 cm

REBOUND® PCL

PCL har till skillnad från ACL förmågan att läka efter en skada. PCL utsätts för olika typer av tånjningar när knäet böjs. Otillräcklig läkning efter en PCL-ruptur kan leda till besvär som kronisk anterior knäsmärta eller knäartros. Om PCL tillåts läka i en utsträckt position kan det leda till kronisk instabilitet och funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att hålla PCL i en korrekt fysiologisk position under konservativ eller postkirurgisk rehabilitering.

Rebound PCL är världens första dynamiska PCL-ortos. Den applicerar en fysiologiskt korrekt dynamisk kraft på PCL under rehabiliteringen.

FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY



INDIKATIONER

- Nkada på bakre korsbandet (PCL), både vid post - operativ behandling av rekonstruerande PCL eller vid funktionell icke-kirurgisk rehabilitering av PCL.



Video: Rebound PCL - Clinician Fitting Instructions (5 min 57 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- DTS (Dynamic Tension System) är framtaget för att gradvis öka belastningen på tibia när knäet böjs genom att applicera anterior dragkraft som avlastar PCL och underlättar läkningen.
- Skruvnycklarna ger tre olika alternativ för att anpassa den standardiserade och biomekaniskt korrekta posteriora belastningen på tibia efter varje enskild patient. Nycklarna ger även möjlighet att justera den posteriora belastningen på tibia, t.ex. vid svullnad.
- Lättviktsortos med patenterad vadlinier i Sensil®-silikon och lärliner i doeskin som förhindrar glidning och ger komfort åt patienten.
- Specialtillverkad posterior ram för bästa möjliga passform och stöd med öppning framtill för enkel på- och avtagning.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position.
- Omkrets: mått tas 15 cm ovanför och nedanför mitten av patella
- Använd SmartMeasure för måttanpassad ortos.

BESTÄLLNINGSPERIOD


Storlek	M/L Mått	Tibia*	Femur**	Vänster	Höger
S	8.9 - 10.2 cm	29 - 34.5 cm	42 - 45 cm	B-124501161	B-124501158
M	10.2 - 11.4 cm	34.5 - 38 cm	45 - 51cm	B-124501162	B-124501159
L	11.4 - 12.7 cm	38 - 42 cm	51 - 58.5cm	B-124501163	B-124501160
XL	12.7 - 14.0 cm	42 - 45.7 cm	58.5 - 66.7cm	B-124501155XL	B-124501154XL

* Omkrets: mått tas 15 cm nedanför mitten av patella

** Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

Jämförelse av posterior belastning på tibia från en statisk PCL-ortos respektive den dynamiska Rebound PCL-ortosen. Bearbetning av diagram från LaPrade et al.5

LaPrade RF, Smith SD, Wilson KJ, Wijdicks CA. "Quantification of functional brace forces for posterior cruciate ligament injuries on the knee joint: an in vivo investigation." Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc [Internet]. 2014 Aug 22 [cited 2014 Dec 11]; Se: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145947>

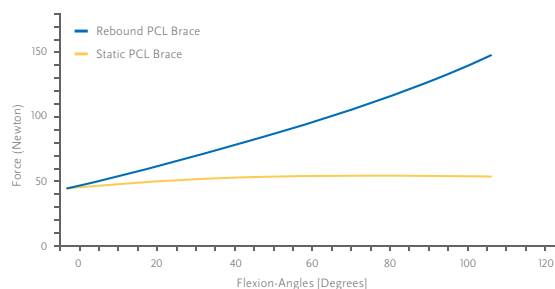

REBOUND® PCL

REBOUND PCL CUSTOM

MÄTTBEGRÄNSNING

15 cm ovanför mitten av patella	15 cm nedanför mitten av patella	Vänster	Höger
36,8 - 77,5 cm	22,9 - 57,2 cm	B-124501155	B-124501154

Minsta längd innanlär (mått från mitten av patella till perineum): 28 cm
TIPS! Använd Össur SmartMeasure app till iPhone/iPad för att beställa en Custom-version.

SMARTMEASURE®

Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



TILLBEHÖR

BAND

Storlek	Art.nr.
XS - L	PCL00061
XL - XXL	PCL00062



Shear Knob Kit

TILLVAL

Beskrivning	Art.nr.
Extension Stop Kit - möjliggör låsning vid 0°, 5°, 10°, 20°, 30° och 40° extension	B-705130042
Flexion Stop Kit - möjliggör låsning vid 0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90° och 105° flexion	B-705130043
Shear Knob Kit	B-465350087
Kondylkuddar Kit	B-705130046
PCL Pad	B-705000036

Standard upper liner kit	S	M	L
Vänster	B-124501171	B-124501172	B-124501173
Höger	B-124501165	B-124501166	B-124501167

Standard lower liner kit	S	M	L
Vänster	B-124601177	B-124601178	B-124601179
Höger	B-124501177	B-124501178	B-124501179

Doeskin lower liner kit	S	M	L
Vänster	B-124601183	B-124601184	B-124601185
Höger	B-124501183	B-124501184	B-124501185

VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD

Red	Pink	Silver
Orange	Black	White
Yellow	Navy Blue	Champagne
Lime Green	Ocean Blue	Charcoal

REBOUND® ACL

Rebound ACL är ett framsteg inom ortoser och är utformad för att på ett bekvämt sätt applicera en anatomiskt korrekt och dynamisk belastning på det främre korsbandet. Oavsett om den används vid konservativ eller kirurgisk behandling kan Rebound ACL komplettera protokoll och ge knäleden optimala biomekaniska omständigheter som en grund för långsiktiga och lyckade patientresultat. Innovativ teknik i Rebound® Dynamic Tension System (DTS) möjliggör personanpassade och justerbara inställningar som minskar belastningen på ett läkande främre korsband.



INDIKATIONER

- Tillstånd som förbättras av agonistisk kraft som varierar under flexion i proportion till spänningen i det främre korsbandet, som appliceras på skenben och lårben i sagittalplanet. Dessa kan omfatta följande:
 - skada på främre korsband (ACL)
 - rekonstruktion
 - icke-kirurgisk behandling.



Video: Rebound ACL - Clinician Fitting Instructions (5 min 57 sec)




Video: Rebound ACL - Clinician Custom-Fit Modifications (2 min 45 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR


- Dynamisk teknik för knästabilitet, med Dynamic Tension System™ som ger det främre korsbandet en agonistisk, dynamisk kraft som är beroende av flexionsvinkeln (LaPrade et al., 2017) och utformad för att reducera främre draglåda och främja knästabiliteten.
- Specifik belastningsanpassning efter patientens individuella anatomi och rehabiliteringskrav
- Med stöd från kliniska och biomekaniska studier har Rebound ACL visat sig minska belastningen på det främre korsbandet under aktivitet och avsevärt minska belastningen på menisken i knän med bristfälligt främre korsband (Tomescu et al., 2017).
- Biokompatibelt och högteknologiskt material, inklusive Blue is You™-inställningspunkter för patienten och ActiveGrip™-liners, främjar passform och komfort
- Lätt aluminiumram av flygplanskvalitet
- Finns i storlek SM–XL
- Begränsning av rörelseomfång för flexion och extension är möjligt vid behov
- Den bakre ramen är optimerad för passform och stöd, med en öppen framsida för enkel på- och avtagning
- Rebound® Dynamic Tension System (DTS) är kliniskt testad för komfort och validerad av slutanvändare. Tack vare data om belastningskartläggning som samlats in under rehabiliteringsaktiviteter ger den en bekväm belastning på det bakre låret och främre skenbenet.

REBOUND® ACL

NÖDVÄNDIGA MÅTT

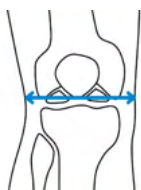

M/L-mått tas i knäleden i normal, vikt bärande position.

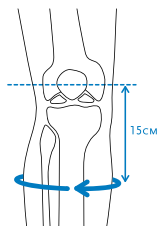

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

STANDARD

Storlek	Vänster	Höger	M/L-mått	Omkretsmått 15 cm nedanför mitten av patella	Omkretsmått 15 cm ovanför mitten av patella
S	B-124601191	B-124501191	8.9-10.2 cm	29.2-34.3 cm	41.9-47.0 cm
M	B-124601192	B-124501192	10.2-11.4 cm	34.3-39.4 cm	47.0-52.1 cm
L	B-124601193	B-124501193	11.4-12.7 cm	39.4-44.5 cm	52.1-57.2 cm
XL	B-124601194	B-124501194	12.7-14.0 cm	44.5-49.5 cm	57.2-62.2 cm

Rekommenderas för patienter som är 156 cm eller längre.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.
Extensionsstoppsats (0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°)	B-124702035	Shear Knob Kit	B-705130051
Flexionsstoppsats (0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90°, 105°)	B-124702034	Condyle Pad Kit	B-701090009
S/M Bandsats	B-124702030	Tibial Pad	B-124702032
LG/XL Bandsats	B-124702031	Tibial Hex Pad	B-124702033




#B-124702035



#B-124702034




#B-705130051

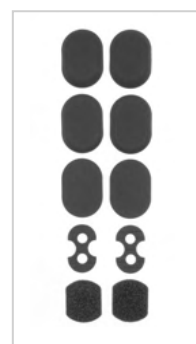

#B-701090009



#B-124702030

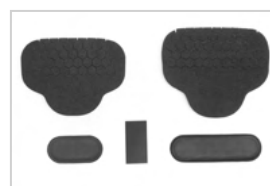

#B-124702031



#B-124702033 Close Up

REBOUND® ACL

TILLBEHÖR

ANTI-MIGRATION WRAP

Storlek	Höger	Vänster
S/M	B-124501195	B-124601195
S/M HEX	B-124501196	B-124601196
L/XL	B-124501197	B-124601197
L/XL HEX	B-124501198	B-124601198

UPPER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702004	B-124702000
M	B-124702005	B-124702001
L	B-124702006	B-124702002
XL	B-124702007	B-124702003

LOWER ACTIVEGRIP LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702014	B-124702010
M	B-124702015	B-124702011
L	B-124702016	B-124702012
XL	B-124702017	B-124702013

LOWER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702024	B-124702020
M	B-124702025	B-124702021
L	B-124702026	B-124702022
XL	B-124702027	B-124702023



Upper Doeskin Liner Kit#B-124702003



Lower Activegrip Liner Kit#B-124702013

SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

REBOUND® ACL CUSTOM

Rebound ACL är ett framsteg inom ortoser och är utformad för att på ett bekvämt sätt applicera en anatomiskt korrekt och dynamisk belastning på det främre korsbandet. Oavsett om den används vid konservativ eller kirurgisk behandling kan Rebound ACL komplettera protokoll och ge knäleden optimala biomekaniska omständigheter som en grund för långsiktiga och lyckade patientresultat. Innovativ teknik i Rebound® Dynamic Tension System (DTS) möjliggör personanpassade och justerbara inställningar som minskar belastningen på ett läkande främre korsband.



INDIKATIONER

- Tillstånd som förbättras av agonistisk kraft som varierar under flexion i proportion till spänningen i det främre korsbandet, som appliceras på skenben och lårben i sagittalplanet. Dessa kan omfatta följande:
 - skada på främre korsband (ACL)
 - rekonstruktion
 - icke-kirurgisk behandling

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamisk teknik för knästabilitet, med Dynamic Tension System™ som ger det främre korsbandet en agonistisk, dynamisk kraft som är flexionsvinkelberoende (LaPrade et al., 2017) och utformad för att reducera främre draglåda och främja knästabiliteten.
- Specifik belastningsanpassning efter patientens individuella anatomi och rehabiliteringskrav
- Med stöd från kliniska och biomekaniska studier har Rebound ACL visat sig minska belastningen på det främre korsbandet under aktivitet och avsevärt minska belastningen på menisken i knän med bristfälligt främre korsband (Tomescu et al., 2017).
- Biokompatibelt och högteknologiskt material, inklusive Blue is You™-inställningspunkter för patienten och ActiveGrip™-liners, främjar passform och komfort
- Lätt aluminiumram av flygplanskvalitet
- Finns i storlek SM–XL
- Rörelseomfångslås för flexion och extension
- Den bakre ramen är optimerad för passform och stöd, med en öppen framsida för enkel på- och avtagning
- Rebound® Dynamic Tension System (DTS) är kliniskt testad komfort och validerad av slutanvändare. Tack vare data om belastningskartläggning som samlats in under rehabiliteringsaktiviteter ger den en bekväm belastning på det bakre låret och främre skenbenet.

REBOUND® ACL CUSTOM

SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vad 15 cm under mitten av patella
- Omkrets vad 20 cm under mitten av patella
- Omkrets vad 7,5 cm under mitten av patella
- M/L-mått
- Omkrets lår 15 cm över mitten av patella
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella
- Omkrets lår 7,5 cm över mitten av patella

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

CUSTOM

Art.nr.	Sida	Min/Max M/L-mått*	Min/Max omkrets ovanför mitten av patella**	Min/Max omkrets nedanför mitten av patella***	Mätmetod
B-124701000	Höger	8.9 - 14 cm	41.9 - 62.2 cm	29.2-49.5 cm	SmartMeasure, gips
B-124701001	Vänster				

*Knäets M/L-mått

**Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

***Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

Rekommenderas för patienter som är 156 cm eller längre.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.
Extensionsstopp, kit (0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°)	B-124702035	Shear Knob Kit	B-705130051
Flexionsstopp, kit (0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90°, 105°)	B-124702034	Condyle Pad Kit	B-701090009
S/M Bandsats	B-124702030	Tibial Pad	B-124702032
LG/XL Bandsats	B-124702031	Tibial Hex Pad	B-124702033

REBOUND® ACL CUSTOM

TILLBEHÖR

ANTI-MIGRATION WRAP

Storlek	Höger	Vänster
S/M	B-124501195	B-124601195
S/M HEX	B-124501196	B-124601196
L/XL	B-124501197	B-124601197
L/XL HEX	B-124501198	B-124601198

UPPER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702004	B-124702000
M	B-124702005	B-124702001
L	B-124702006	B-124702002
XL	B-124702007	B-124702003

LOWER ACTIVEGRIP LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702014	B-124702010
M	B-124702015	B-124702011
L	B-124702016	B-124702012
XL	B-124702017	B-124702013

LOWER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702024	B-124702020
M	B-124702025	B-124702021
L	B-124702026	B-124702022
XL	B-124702027	B-124702023

BIOMEKANIK UNDER KNÄFLEXION - ACL

I ett friskt knä är krafterna på de främre ligamenten relaterade till knävinkeln. Krafterna är högst under de sista 35 graderna tills dess att full extension erhålls.

Grafen visar förhållandet "angle-force", publicerad av Smith et al. 2013 i artikeln "Functional bracing of ACL injuries: Current state and future directions", Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 27 april 2013

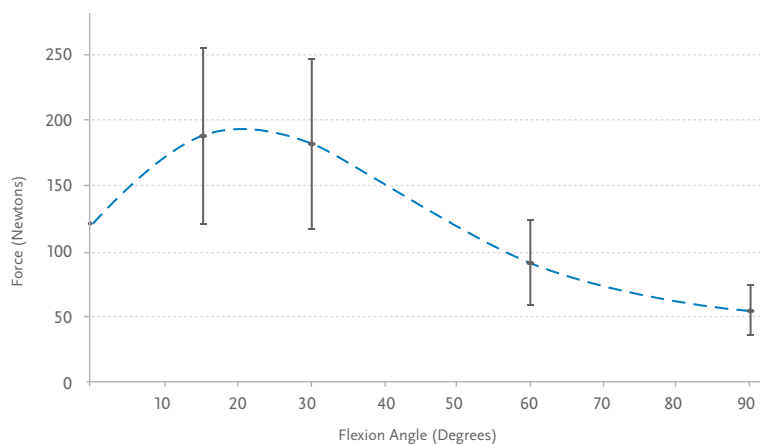


Fig. 2 Graph of the average anterior-posterior in situ force of the ACL in vivo experienced during walking, squatting, single leg lunge, isometric extension, and isokinetic extension.

CTi® OTS

Den rigida CTi-knäortosens beprövade teknologi kan fås som en färdig lösning som erbjuder justeringsmöjligheter och utmärkt passform samtidigt som den bibehåller den höga stöd- och skyddsnivå som du förväntar dig av en CTi-ortos. CTi:s vridstyva och starka kolfiberram som utrustats med anatomiskt korrekta Accutrac®-leder och flexibla underskal ger ett rigit exoskelett som stabiliserar knäleden. Polstring med andasfunktion och beläggning av bioinert Össur Sensil® Silicone säkerställer att CTi OTS hålls i rätt position på benet så att ortosen fungerar optimalt.



INDIKATIONER

- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet



Video: CTi OTS - Clinician Fitting Instructions
(2 min 54 sec)



Video: CTi OTS - Clinician Custom-Fit Modification
(6 min 45 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Flexibla byglar och justerbart skenbensband (ATS) håller fast tibia och tillåter justering av ortosledens djup för bättre individuell anpassning
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter
- Standardmodellen avsedd för medel till hög stötnivå. Pro-Sport-modell för aktiviteter med högsta stötnivå

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Bredd: M/L-mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position
- Omkrets: mått tas strax nedanför patellas distala kant



CTI® OTS

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

CTI			Standard		Pro Sport	
Storlek	M/l-mått*	Omkrets**	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	8.9 - 10.2 cm	28 - 34 cm	B-238600112	B-238500112	B-239600112	B-239500112
M	10.2 - 11.4 cm	34 - 38 cm	B-238600113	B-238500113	B-239600113	B-239500113
L	11.4 - 12.7 cm	38 - 41 cm	B-238600114	B-238500114	B-239600114	B-239500114
XL	12.7 - 14.0 cm	41 - 44 cm	B-238600115	B-238500115	B-239600115	B-239500115
XXL	14.0 - 15.2 cm	44 - 48 cm	B-238600116	B-238500116	B-239600116	B-239500116

* M/L-mått: Tas vid knäleden i belastat läge ** Omkrets: Tas precis distalt om patella.

TILLBEHÖR/TILLVAL

POLSTRING

Storlek	Silicone tibia	Silicone tibia	Silicone femur	Lycra femur
M	B-304030030	B-425580002	B-425571002	B-425570002
L		B-425580004	B-425571004	B-425570004
XL, XXL		B-425580005	B-425571004	B-425570004

AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Beskrivning	Art.nr.
Silicone AMS Wrap S, M	B-715260002
Silicone AMS Wrap L, XL, XXL	B-715260004
AMS Wrap S, M	B-410000001
AMS Wrap L, XL	B-410000002

BANDSATSER

Storlek	Art.nr.
S, M	B-701140103
L, XL, XXL	B-701140104

PCL KITS

Storlek	Art.nr.
S, M	B-705000132
L, XL, XXL	B-705000235

BANDPOLSTRING

Storlek	Art.nr.
S	B-304010057
M, L	B-304010058
XL, XXL	B-304010059

CTI® OTS

TILLBEHÖR

MX GEAR

Beskrivning	Art.nr.
Patella Cup	B-711130011
Gear Guards	B-705000003
MX Kit S (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	B-711140002
MX Kit M (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	B-711140003
MX Kit L (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	B-711140004
MX Kit XL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	B-711140005
MX Kit XXL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	B-711140006



SLEEVES

Omkrets*	Sofsleeve	Undersleeve	Oversleeve	Storlek	Omkrets*	Sleeve with Mesh
< 38 cm	20643	20251	20051	XS	< 43 cm	SLV60011
38 - 45 cm	20644	20252	20052	S	43 - 46 cm	SLV60012
45 - 49,5 cm	20645	20253	20053	M	46 - 51 cm	SLV60013
49,5 - 54,5 cm	20646	20254	20054	L	51 - 54 cm	SLV60014
54,5 - 62 cm	20647	20255	20055	XL	54 - 56 cm	SLV60015
62 - 71 cm	20647	20256	20056	XXL	56 - 61 cm	SLV60016
71 - 86 cm	20647	20257	20057			

* Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
CTi D-Ring Kit Standard	B-704132600
CTi D-Ring Kit	B-704132602
CTi Condyle Pad Kit	B-704130150
Extension Stop Kit	22130
Flexion Stop Kit	19254

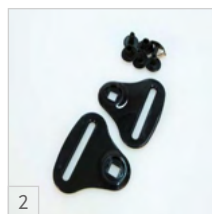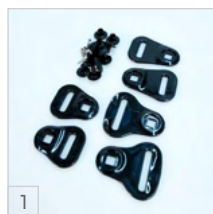

CTi® CUSTOM

CTi Custom används när behovet av stabilitet är stort och man inte vill ge avkall på komfort och hållbarhet. Jämfört med OTS ger den större möjligheter till exakt passform om benet har en problematisk form. CTi:s vridstyva och starka kolfiberram som utrustats med anatomiskt korrekta Accutrac®-leder och flexibla underskal ger ett rigit exoskelett som stabiliserar knäleden. Foder med andasfunktion och beläggning av Össur Sensil® Silicone säkerställer att CTi Custom hålls i rätt position på benet så att ortosen fungerar optimalt.



INDIKATIONER

- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Måttillverkad efter den enskilda patientens unika anatomi
- Handlaminerad, Rigid pre-preg kolfiberram
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter
- Möjlighet att välja färg
- Standardmodellen avsedd för medel till hög stötnivå
- Pro-Sportmodell för aktiviteter med högsta stötnivå (med extra lager av kolfiber jämfört med Standardmodellen)
- Vapor-modell för låg till medelhög stötnivå

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD



SPECIALFÄRGER



CTi® Custom går även att få med motiv. Kontakta kundtjänst för mer information och prisuppgift.

CTI® CUSTOM

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Standard		Pro sport		Vapor	
Vänster	Höger	Vänster	Höger	Vänster	Höger
B-116600010	B-116500010	B-117600010	B-117500010	B-118600010	B-118500010

MÄTVERKTYG

Beskrivning	Art.nr.
Constant Force Caliper	B-312000000



SMARTMEASURE®

Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

TILLBEHÖR/TILLVAL

TIBIAPOLSTRING

Beskrivning	Art.nr.
CTI custom polstring	B-411500115

AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Beskrivning	Art.nr.
AMS Wrap EVA	22095
AMS Wrap Neo	22094
AMS Wrap Neo XL (omkrets vad >43 cm)	22152

BANDSATSER

Storlek	Art.nr.
S, M	B-701140103
L, XL, XXL	B-701140104

PCL KITS

Storlek	Art.nr.
S, M	B-705000132
L, XL, XXL	B-705000235

CTI® CUSTOM

TILLBEHÖR

BANDPOLSTRING


Storlek	Art.nr.
S	B-304010057
M, L	B-304010058
XL, XXL	B-304010059



Strap pads

AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Beskrivning	Art.nr.
AMS Wrap EVA	22095
AMS Wrap Neo	22094
AMS Wrap Neo XL	22152

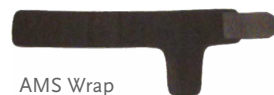

AMS Wrap

MX GEAR

Beskrivning	Omkrets*	Art.nr.
Patella Cup		B-711130011
Gear Guards		B-705000003
MX Kit S (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	43 - 46 cm	B-711140002
MX Kit M (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	46 - 51 cm	B-711140003
MX Kit L (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	51 - 54 cm	B-711140004
MX Kit XL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	54 - 56 cm	B-711140005
MX Kit XXL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	56 - 61 cm	B-711140006

MX Kit



SLEEVES

Storlek	Omkrets*	Softsleeve	Undersleeve	Oversleeve
S	< 38 cm	20643	20251	20051
M	38 - 45 cm	20644	20252	20052
L	45 - 49.5 cm	20644	20253	20053
XL	49.5 - 54.5 cm	20645	20254	20054
XXL	54.5 - 62 cm	20645	20255	20055
XXXL	62 - 71 cm	20646	20256	20056
XXXXL	71 - 86 cm	20647	20257	20057

Storlek	Omkrets*	Sleeve with Mesh
XS	< 43 cm	SLV60011
S	43 - 46 cm	SLV60012
M	46 - 51 cm	SLV60013
L	51 - 54 cm	SLV60014
XL	54 - 56 cm	SLV60015
XXL	56 - 61 cm	SLV60016

* Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

ANDRA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
CTi D-Ring Kit Standard 2 x 1" and 2 x 1.5" D-rings	B-704132600
CTi D-Ring Kit 2" 2x 2" D-rings	B-704132602
CTi Condyle Pad Kit	B-704130150
Extension Stop Kit	22130
Flexion Stop Kit	19254

MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE

CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM

Date: _____ Customer #: _____ Purchase order #: _____

Required patient information

Patient ID: _____ Diagnosis: _____

Height: _____ cm. Weight: _____ kg. Date of Birth: _____ Sex(m/f): _____ ☐ Left leg ☐ Right leg

☐ Bilats - l/r

Customer:

Contact: _____ Prescribing consultant: _____

Phone: _____ Clinic: _____

Company: _____

Please fill out all mandatory fields
(marked in bold)

☐ **VAPOR**
(For low to medium impact levels)

☐ **STANDARD***
(For medium to high impact levels)

☐ **PRO SPORT**
(For highest impact levels)

OPTIONS

D-ring attachment

☐ Screwed ☐ Riveted*
☐ Internal ☐ External*

Thigh Liner

☐ None* ☐ Sensil
☐ Evazote/Foam

Calf Liner

☐ Sensil* ☐ Evazote/Foam

Extension Stops

☐ 0° ☐ 10°* ☐ 20° ☐ 30° ☐ 40°

SPECIAL MODIFICATIONS

(Additional charges may apply)

☐ Flexion Stop Kit
_____° (0-90° installed)

☐ PCL System
(Helps reduce posterior drawer)

☐ ACL Cable Kit (Additional stability in ext)

☐ Hyperextension Straps (5th strap added)

☐ Ski Boot Attachment (Brace-to-boot)

☐ Other: _____

SPECIAL NOTES:

☐ Please contact me about this order

*This configuration is delivered by default, if nothing is filled in.

SPECIAL CONDITIONS:

☐ OA (Osteoarthritis unloading)
☐ Medial
☐ Lateral _____°
(Choose 1° to 7° of unloading, 4°*)

☐ Prominent VMO

☐ Prominent VLO

☐ Hockey Quads

☐ Prominent Tibialis Anterior

☐ Prominent Fibular Head

☐ RTM

(Rounded Tibial Member)

☐ Osgood-Schlatters Disease

☐ Super Short

(For 1.60m and under)

☐ Shorten Frame Component

Tibial ☐ 1.3cm ☐ 2.6cm ☐ 3.9cm

Femoral ☐ 1.3cm ☐ 2.6cm ☐ 3.9cm

COLORS:

Select finish:

☐ **MATTE*** ☐ **GLOSS**

Select color:

☐ Black* ☐ Yellow
☐ Ocean Blue ☐ Orange
☐ White ☐ Lime Green
☐ Silver ☐ Pink
☐ Red ☐ Charcoal
☐ Champagne ☐ Navy Blue

ACCESSORIES:

(**Bolded** are free with initial order only)

☐ **AMS WRAP**

☐ **Neoprene*** ☐ **Evazote**

☐ **Sofsleeve**

☐ Neoprene Undersleeve

☐ Neoprene Oversleeve

☐ Padded Sports Oversleeve

☐ Sport Sleeve

☐ MX Patella Cup

☐ MX Gear Guards

☐ MX Complete Kit
(Patella Cup, Gear Guards, Sport Sleeve)

☐ Other: _____

CUSTOM PAINT:

(Additional fee plus extra delivery time)

Select custom finish:

☐ **MATTE*** ☐ **GLOSS**

Select custom color:

☐ Hibiscus ☐ Sports Equipment
☐ Flag ☐ Camouflage
☐ Flames ☐ Single Color
☐ Metal ☐ 2-color Fade
☐ Sponge ☐ 2-color Half & Half
☐ Celestial ☐ Sports Fan

☐ Special

(Provide design file with order)

MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE

CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM

CUSTOM MEASURING SYSTEM

☐ Left leg ☐ Right leg

1: _____ Hinge Width

2: _____ Hinge Depth

LATERAL MEASUREMENTS

3: _____ Contour

4: _____ A-P

5: _____ Contour

6: _____ A-P

7: _____ Contour

8: _____ A-P

9: _____ Tibia

10: _____ Tibia

11: _____ Contour

12: _____ A-P

13: _____ Tibia

MEDIAL CONTOURS

14: _____ Contour

15: _____ Contour

JOINT SPACE

16: _____ Contour

17: _____ Contour

CIRCUMFERENCES (in centimeters)

18. Level A _____

19. Level B _____

20. Level C _____

21. Level E _____

22. Distal Border of Patella _____

23.

Caliper measurement at joint space (1.6 - 2.0 cm less than #1)
Take measurement in a weight bearing position at full extension

SHORTEN TIBIA COMPONENT/ SKI BOOT MEASUREMENT

_____ cm from the distal border of the patella to the top of the boot. Ski boot attachment is not available if the measurement is less than 18cm.

CMS INSTRUCTIONS

Patient should not be wearing shoes for the measurement procedure.

There should be no space between the block and the back of the knee. The system will not be accurate if the knee is measured in a flexed position.

1. Slide the lateral pad to the knee. Tighten to patient's individual comfort level. This measurement will be the actual width of the patient's knee brace.

2. Pre-set hinge depth at approximately 3.5cm, adjust if needed.

3. – 13. Patient should remain still with foot dorsiflexed throughout the lateral measurements and recording process.

9., 10. and 13. Measure using the horizontal bar of the tool measure the position of the highest point of the tibialis anterior.

• 9. As reference take the #1 hinge width / 2 - 1 = ...

(for example 13cm / 2 - 1 = 5.5cm)

• 10. should be 0.5cm less than 9.

• 13. should be 1cm less than 9.


14. – 17. The patient may now relax throughout measuring the medial contours from the contracted position. Please note that with larger legs this measurement may be a negative value. Please read the numbers carefully and record negative values if necessary, such as -0.5 or -1.5

18. – 22. Take the measurements with a soft measuring tape ensuring that the tape is snug but not too loose/tight.


MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE

CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM


SPECIAL CONDITIONS REFERENCES

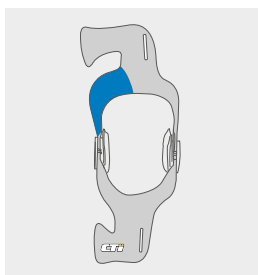


Prominent VLO

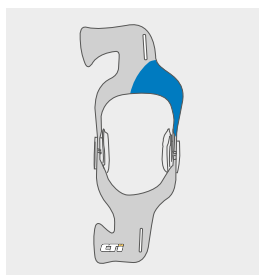


Prominent VMO

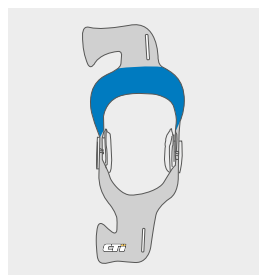


Hockey Quads

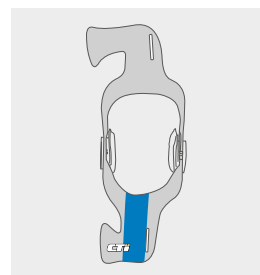


Prominent Tibialis Anterior

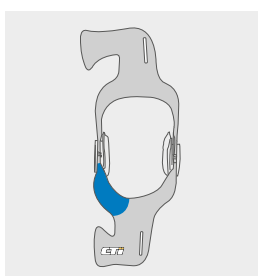


Prominent Fibular Head

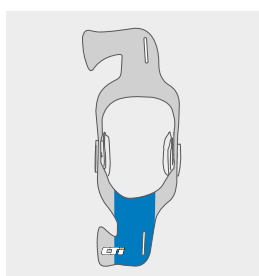

RTM
(Rounded Tibial Member)

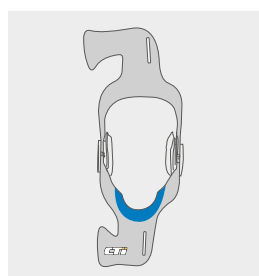


Osgood-Schlatters Disease

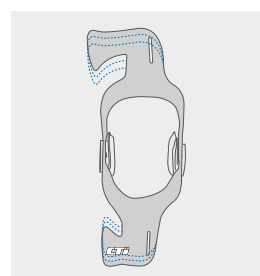

Shorten Femoral Component
Shorten Tibial Component



Super Short

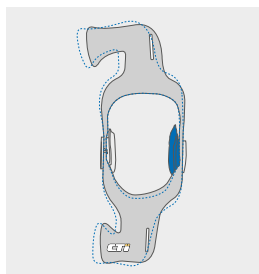

Osteoarthritis Unloading

CTi®3

CTi®3 ger ett nytt perspektiv på dubbla upprätta knäortoser. Innovativ teknik gör CTi3 till ett utmärkt alternativ för de flesta av dina patienter. CTi3 är lämplig för både vardagsaktiviteter och sport, och erbjuder hög kvalitet med sin förbättrade konstruktion och anatomiska passform för ökad komfort.



INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet och skydd kring knäet, till exempel skador på främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL), samt roterande och kombinerade instabiliteter.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Förbättrad konstruktion – Lätta, höghållfasta ramar i kolkomposit ger optimal styvhet i relation till vikt
- Anatomisk passform – Utformad för att passa fler benformer och införlivar ett Accutrac®-ledstykke som följer knäets anatomiska rörelse.
- Förbättrad komfort – Unika foder förbättrar komforten med sina speciellt sydda blockmönster, som ger en balans mellan dämpning och ventilation.
- Tillbehör och reservdelar som är lätta att använda, inklusive MX-satser, ersättningssatser med remmar, foder och flexionsstopp.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella

BESTÄLLNINGSGRUPP

CTi3

Storlek	M/L-Mått	Omkrest	Vänster	Höger
S	8-10 cm	40-47 cm	CTI-23002	CTI-22002
M	10-11 cm	45-55 cm	CTI-23003	CTI-22003
L	11-13 cm	52-61 cm	CTI-23004	CTI-22004
XL	13-14 cm	58-67 cm	CTI-23005	CTI-22005

Innehåller: Kondylkuddeset och sträckstoppset (0° sträckstopp och standardkondylplatta är förinstallerade).

Notera: M/L-mätningar är den föredragna och mest exakta mätningen för CTi. Mätning av låromkrets ska användas när M/L-måtten är mellan olika storlekar.

CTi[®]3

TILLBEHÖR & RESERVDELAR

CTi3 MX KIT

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23132	CTI-22132
M	CTI-23133	CTI-22133
L	CTI-23134	CTI-22134
XL	CTI-23135	CTI-22135

Innehåller: Impact guard, Mesh-Sleeve, (CTi-Dekaler) och produktväska.

POLSTRING

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23322	CTI-22322
M	CTI-23323	CTI-22323
L	CTI-23324	CTI-22324
XL	CTI-23325	CTI-22325

HOOK SET

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23332	CTI-22332
M	CTI-23333	CTI-22333
L	CTI-23334	CTI-22334
XL	CTI-23335	CTI-22335



BANDSATSER

Storlek	Art.nr.
S	CTI-24222
M	CTI-24223
L	CTI-24224
XL	CTI-24225

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Guard Elastic Cord	CTI-24130
Guard Screws	CTI-24140
Tibial Wedge Pad	22077
Condyle Pad Set (Thin, Standard, Thick)	CTI-24320
Extension Stop Set (0°, 5°, 10°, 20°, 30°)	CTI-24430
Flexion Stop Set (0°, 60°, 75°, 90°)	CTI-24440
Hinge Sticker Set	CTI-24450
D-Ring Set	CTI-24510

MESH-SLEEVE

Storlek	Art.nr.
S	SLV60012
M	SLV60013
L	SLV60014
XL	SLV60015

C180™ ROCKET

Med mindre storlek och Accutrac®-leder som är modifierade för att passa unga knän ger den lättviktiga C180 Rocket stöd för barn med ligamentinstabilitet.

INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet kring knäet, till exempel roterande och kombinerade instabiliteter i främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med lättanvända extensionsstopp
- Halvstyv ram bestående av en vävd kolfiberram fylld med matrismaterial av akryl som är värmeformbar för att kunna anpassas



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position.
- Omkrets: strax under knäskålens distala gräns

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skjutmått	Omkrets	Vänster	Höger
S	7.6 - 8.9 cm	24.1 - 27.9 cm	C180KSL	C180KSR
L	8.3 - 9.5 cm	26 - 29.8 cm	C180KLL	C180KLR
XL	8.9 - 10.2 cm	27.9 - 32.1 cm	C1802XSL	C1802XSR

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	
Motocross kit S / L	10833	
Motocross kit XL	B-705130072	
Patella Cup S / L	25029	
Patella Cup XL	B-711130000	
Calf Liner S	25061 (L)	26062 (R)
Calf Liner L	25057 (L)	26058 (R)
Calf Liner XL	25106 (L)	25107 (R)
Thigh Liner S	25060 (L)	26063 (R)
Thigh Liner L	25056 (L)	26059 (R)
Thigh Liner XL	25104 (L)	25105 (R)

REBOUND® POST-OP KNEE

En enkel, mångsidig, postoperativ ortos som är lättanvänd för alla. Oavsett om du justerar ROM eller skenans längd, kommer du uppskatta enkelheten hos Rebound Post-op Knee.



Video: Rebound Post-Op Knee -
Clinician Fitting instructions
(3 min 42 sec)



INDIKATIONER

- ACL, PCL, MCL, LCL skador/rekonstruktion
- Meniskkirurgi
- Kondylära frakturer
- Patellasenekirurgi
- Hög tibia osteotomi (HTO)
- Osteokondrala frakturer
- Tibiaplatå fraktur (Partiella eller totala) ledbandsrupturer i knät

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kräver inga verktyg, multifunktionell Smart-Fit™ förpackning
- Finns som universal, höger/vänster, contour och pediatric
- OneTouch™ -låsknapp för enkel justering av ROM med lock-out-funktion.
- Teleskop-ram med OneTouch™
- Färgkodning, Blue is You™, och numrering för banden indikerar vad patienten kan justera själv
- Quick-fit-spänne för enkel applicering

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

BESTÄLLNINGSPOLSTRING

REBOUND POST-OP KNEE

Storlek	Omkrets lår	Cool	Täckande polstring
Pediatric	30,5 - 63,5 cm	B-8381470	
Universal, Left contoured	41 - 81 cm	B-8381680	B-8382680
Universal, Right contoured	41 - 81 cm	B-8381580	B-8382580
Universal	41 - 81 cm	B-8381480	B-8382480
Universal XL	41 - 96,5 cm	B-8381490	B-8382490

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.
ROM- lås, kit	B-8380005	Standard buckle & pad kit	B-8381096
Alligator velcro kit	B-8380006	AMS Kit Paediatric	B-8381093
Adhesive velcro kit pediatric	B-8380008	AMS Kit Regular	B-8381094
Adhesive velcro kit universal / universal XL	B-8380007	AMS Kit XL	B-8381095

POLSTRING

De Beskrivning scription	Art.nr.	Täckande polstring
Pediatric	B-8381072	
Universal*	B-8381082	B-8382082
Universal XL	B-8381092	B-8382092

*Passar till universal, left contoured, right contoured

FORMFIT POST-OP KNEE

INDIKATIONER

- Efter operation/skada, kontroll av rörelseomfång eller immobilisering
- Indicerad för ligament- och frakturrelaterade operationer och när ett kontrollerat rörelseomfång är nödvändigt

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stag som kan brytas loss för en enkel längdjustering utan verktyg
- OneTouch™ – ROM-led som är enkel att justera med låsningsfunktion från -10° till 30° (steg om 10°)
- Extensionskontroll från -10° till 90° (steg om 10°)
- Flexionskontroll från 0° till 120° (steg om 10°)
- Finns med svalt tyg eller skummodell, i 3 längder och två storlekar (Regular och XL)



NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Storlek	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
XL	69 - 89cm
Regular	0 - 69cm

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Cool	Full Foam
Knee PO 61cm	UP TO 69cm	FPOK403100	FPOK403200
Knee PO XL 61cm	69 - 89cm	FPOK403102	FPOK403202
Knee PO 71cm	UP TO 69cm	FPOK403101	FPOK403201
Knee PO XL 71cm	69 - 89cm	FPOK403103	FPOK403203
Knee PO 41cm	69cm	-	FPOK403300
Knee PO XL 41cm	69 - 89cm	-	FPOK403301

UTBYTESPOLSTRING

Beskrivning	Cool	Full Foam
Replacement Softgood, Regular	403175	403275
Replacement Softgood, XL	403176	403277
Replacement Softgood, Regular Long	403276	403278

TILLBEHÖR

Beskrivning	
ROM stop locks (set of 20 lock clips)	B-8380005
Strap Reduction Kit Cool	403199
Strap Reduction Kit Full Foam	403299

REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL

Rebound® Knee Immobilizer Universal har en universell design med 3 paneler som kan justeras för att passa de flesta bens omkrets. Med en klassificering som MR*-villkorlig kan patienter säkert skannas i ett MR-system samtidigt som immobilisering bibehålls.

*Se bruksanvisning för mer information.



INDIKATIONER

- Akut immobilisering
- Immobilisering av knä före och efter kirurgi
- Traumatiska knäskador

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbara mediala/lateral stag och styva bakre stag begränsar knäets rörelser
- Universell design i 3 delar som förenklar lagerbehoven
- MR*-villkorlig: skanna patienter säkert i ett MR-system samtidigt som immobilisering bibehålls.
- Min. låromkrets: 26 cm
- Max. låromkrets: 67,31 cm

BESTÄLLNINGSGRUPP

Längd	Art.nr
30 cm	210012
35 cm	210014
40 cm	210016
45 cm	210018
50 cm	210020
55 cm	210022
60 cm	210024

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr
Hot/Cold Therapy Gel Pad	GB7
PCL Pad	B-705000036



PCL Pad

REBOUND® KNEE BRACE

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Lätta till medelsvåra rupturer i främre korsbandet (ACL) eller bakre korsbandet (PCL)
- Rupturer i medialt kollateralligament (MCL) eller lateralt kollateralligament (LCL)

FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Aerospacer-mateiral med suverän andasfunktion, avleder värme och ger ökad patientkomfort
- Lågprofilleder, möjlighet till extensions- och flexionsstopp (ROM-versionen). Formbara skenor för skräddarsydd pass-form och kontroll över knäets rörlighet
- Lätt svängd form och smidigt material bidrar till att före-bygga
- veckbildning och hudirritation i poplitealområdet
- Kan tas på och av från höger eller vänster sida tack vare löstagbara band. Enkel att ta på och av.
- Alla sleeve modeller kommer med en universalpelott för individuellt patellastöd



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

REBOUND ROM KNEE

Storlek	Omkrets	SLEEVE		WRAP	
		Lång	Kort	Lång	Kort
XS	29 - 35 cm	708152	708052	707152	707052
S	35 - 41 cm	708153	708053	707153	707053
M	41 - 46 cm	708155	708055	707155	707055
L	46 - 52 cm	708157	708057	707157	707057
XL	52 - 57 cm	708158	708058	707158	707058
XXL	57 - 63 cm	708159	708059	707159	707059
XXXL	63 - 72 cm	-	-	707160	707060

REBOUND KNEE

Storlek	Omkrets	SLEEVE		WRAP	
		Kort		Kort	
XS	29 - 35 cm	704052		703052	
S	35 - 41 cm	704053		703053	
M	41 - 46 cm	704055		703055	
L	46 - 52 cm	704057		703057	
XL	52 - 57 cm	704058		703058	
XXL	57 - 63 cm	704059		703059	
XXXL	63 - 72 cm	-		703060	

FORMFIT® KNEE ROM

Formfit® ROM knäortoser är utformade för patienter med lätta till medelsvåra stukningar, sträckningar och/eller ligamentskador i knät. Den ger överlägsen stabilitet, skydd och kompression under rehabilitering efter skada.

Ortosen finns i fyra varianter, alla lika enkla att ta på. Det gör att du enkelt kan välja exakt rätt nivå av stöd för just din patient.

Ortosen är tillverkad i kraftiga material som andas och ger därmed både god komfort och hållbarhet.

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra ACL- och PCL-skador
- MCL- och LCL-skador
- Kombinerade lätta sträckningar och stukningar i knäet

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Formbara, rigida och inställningsbara leder
- Universalpelott ingår till alla sleeve-versioner
- Öppen i knävecket

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Formfit ROM KNEE SLEEVE

Storlek	Omkrets	Lång	Kort
XS	33 - 39 cm	508352	508252
S	39 - 47 cm	508353	508253
M	47 - 53 cm	508355	508255
L	53 - 60 cm	508357	508257
XL	60 - 67 cm	508358	508258
XXL	67 - 75 cm	508359	508259

Formfit ROM KNEE WRAP

Storlek	Omkrets	Lång	Kort
XS	33 - 39 cm	507352	507252
S	39 - 47 cm	507353	507253
M	47 - 53 cm	507355	507255
L	53 - 60 cm	507357	507257
XL	60 - 67 cm	507358	507258
XXL	67 - 75 cm	507359	507259
XXXL	75 - 81 cm	507360	507260



Formfit ROM Knee Sleeve, kort modell



Formfit Knee Wrap, lång modell

FORMFIT® KNEE HINGED

Formfit® knäortos är avsedd för patienter med lätta till medelsvåra stukningar, sträckningar eller ligamentskador. Den ger överlägsen stabilitet, skydd och kompression under rehabilitering efter skada. Ortosen är tillverkad i material som andas och ger därmed både god komfort och hållbarhet. Den är öppen i knävecket vilket ger minskad veckbildning och lägre risk för hudirritation, samtidigt som de styva men formbara skenor ger bästa möjliga passform.

Formfit knäortos finns i två versioner: Wraparound eller Sleeve

INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra ligamentskador
- Kombinerade lätta sträckningar och stukningar i knät
- Instabiliteter i knät

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Universalpelott
- Enkel att ta på
- Öppen i knävecket
- Formbara leder

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Formfit KNEE SLEEVE

Storlek	Omkrets	Kort
XS	33 - 39 cm	504252
S	39 - 47 cm	504253
M	47 - 53 cm	504255
L	53 - 60 cm	504257
XL	60 - 67 cm	504258
XXL	67 - 75 cm	504259

Formfit KNEE WRAP

Storlek	Omkrets	Kort
XS	33 - 39 cm	503252
S	39 - 47 cm	503253
M	47 - 53 cm	503255
L	53 - 60 cm	503257
XL	60 - 67 cm	503258
XXL	67 - 75 cm	503259
XXXL	75 - 81 cm	503260



Formfit Knee Hinged, Sleeve



Formfit Knee Hinged, Wrap

FORMFIT® KNEE MCL

Formfit Knee MCL ger yttre stabilitet och skydd vid aktiviteter med liten till medelstor kontakt/påverkan och under återhämtning efter skada. En unik, enkelledad överdrags-/sleevehybriddesign som skiljer den här ortosen från konkurrenterna. Ledens laterala rörelseomfång gör att den mediala sidan kan röra sig obehindrat. Dynamic Force Strap hjälper till att förhindra valguskraft under knäförlängning, medan den justerbara skenbensremmen förbättrar suspension genom att minimera glidning.

INDIKATIONER

- Lindrigt till måttligt medialt kollateralligament (MCL) (grad I och grad II)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- En lateral ROM-led av stål (0° eller 20° sträckstopp, 70° flexionsstopp)
- Dynamic Force Strap förhindrar valguskraft
- Överdrags-/sleevehybrid för enkel påtagning
- Justerbar skenbensrem för förbättrad suspension

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Knäets omkrets på patellas mitt



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets lår	Vänster	Höger
XS	33 - 39 cm	B-237600001	B-237500001
S	39 - 47 cm	B-237600002	B-237500002
M	47 - 53 cm	B-237600003	B-237500003
L	53 - 60 cm	B-237600004	B-237500004
XL	60 - 67 cm	B-237600005	B-237500005

VENTOPRENE SK/VK

INDIKATIONER

- Mild artros, sidostabilitet
- Översträckningsskydd (komplettera med översträckningskors)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Wraparound, lätt att applicera
- Ventilerad
- SK - normal längd
- VK - lång modell för ökad stabilitet

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets: mått tas vid mitten av patella



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Sk	Vk
XS	25 - 28 cm	6745-02	6747-02
S	28 - 36 cm	6745-03	6747-03
M	33 - 41 cm	6745-05	6747-05
L	38 - 46 cm	6745-07	6747-07
XL	45 - 55 cm	6745-08	6747-08
XXL	55 - 65 cm	6745-09	6747-09

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Översträckningskors, beige	TB601

LYCRAFLEECE PATELLA LUX

INDIKATIONER

- Patella luxation
- Patellofemorala smärtsymptom

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar pelott för individuellt tryck mot patella

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets: mått tas vid mitten av patella



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Art.nr.
XS	25 - 28 cm	6525-02
S	28 - 36 cm	6525-03
M	33 - 41 cm	6525-05
L	38 - 46 cm	6525-07
XL	45 - 55 cm	6525-08

FORMFIT® HINGED LATERAL J

Formfit® Hinged Lateral J är framtagen för användare som behöver stöd för/korrigering av patella. Ortosen har en sleeve design samt har löstagbara skenor.

INDIKATIONER

- Stöd för/korrigering av patella vid tex.
 - Lateral patella luxation/subluxation
 - Lateral patellofemoral malalignment

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppet poplitea område
- Enkel att dra på och av
- Material som andas

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
- Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

FORMFIT HINGED LATERAL J

Storlek	Omkrets lår	Omkrets vad	Höger	Vänster
XS	33 - 39 cm	25 - 30 cm	709152	709162
S	39 - 47 cm	30 - 35 cm	709154	709164
M	47 - 53 cm	35 - 40 cm	709155	709165
L	53 - 60 cm	40 - 46 cm	709157	709167
XL	60 - 67 cm	46 - 51 cm	709158	709168
XXL	67 - 75 cm	51 - 56 cm	709159	709169

FORMFIT® TRACKER

Formfit® Tracker med mikrojusterbart ReflexWing™-stöd riktar in patella och ger ett dynamiskt, lateralt stöd vid vanliga knäbesvär. Det lättviktiga FlyWeight™-tyget har andningsförmåga och en lågprofildesign som känns skön mot huden och minimerar glidning. PowerLock™-banden fungerar parallellt med värmeformbara CustomFit™-gångjärn för att ge anpassningsbart stöd för patienten.

INDIKATIONER

För knätillstånd som kan förbättras av att rikta in knäskålen och/eller patienter som behöver extra sidostöd till knäskålen, t.ex:


- lateral subluxation/dislokation av knäskålen
- lateral felställning

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- CustomFit™-gångjärn för anpassad passform och stöd
- Anti-Migration Tech™ minimerar glidning
- PowerLock™-remmar för säkert sidostöd
- ReflexWing™-stöd för bekväm inriktning av knäskålen
- Mjukt FlyWeight™-tyg med andningsförmåga
- Hållbar, kan tvättas i maskin.



NÖDVÄNDIGA MÅTT OCH BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

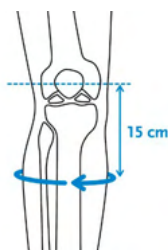

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Vänster	Höger
XS	25 - 30 cm	33 - 39 cm	719162	719152
S	30 - 35 cm	39 - 47 cm	719163	719153
M	35 - 40 cm	47 - 53 cm	719164	719154
L	40 - 46 cm	53 - 60 cm	719165	719155
XL	46 - 51 cm	60 - 67 cm	719166	719156
XXL	51 - 56 cm	67 - 75 cm	719167	719157
3XL	56 - 61 cm	75 - 81 cm	719168	719158

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr
ReflexWing™ Buttress	719100

FORMFIT® PRO KNEE

Össur Formfit® Pro Knee är en kompressiv knäslieve med SmartPad™-stöd för punktstöd och vaddering. Med vår patenterade design riktas knäskålen in, vilket gör den lämplig vid tillstånd som patellatendinit (hopparknä) och chondromalacia patellae.

Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande, uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav och har visat sig vara överlägset de ledande märkena när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga, så att knäet hålls svalt under användning. Lätta, löstagbara spiralstöd säkerställer att följsamheten och passformen blir optimal, medan tydliga markeringar på knäskålen gör den lätt att ta på sig.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



SmartPad™



INDIKATIONER

Knätillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Lindriga sträckningar och stukningar
- Smärta i knäet
- Patellatendinit
- Känsla av instabilitet
- Chondromalacia patellae


KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller knäet svalt under användning
- Certifierad medicinsk kompression (20 - 30 mmHg)
- CoolVent™-teknik i knävecket för god ventilationsförmåga och komfort
- Patenterad SmartPad™ för målinriktat stöd och dämpning
- Markeringar på knäskålen för enkel placering
- Patenterat FoldLock™-system för enkel och säker påtagning
- Lätta, löstagbara spiralstöd i stål

NÖDVÄNDIGA MÅTT

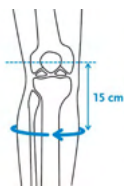

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Storlek	Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
XS	26 - 31 cm	36 - 41 cm
S	31 - 36 cm	41 - 46 cm
M	36 - 41 cm	46 - 51 cm
L	41 - 46 cm	51 - 56 cm
XL	46 - 50 cm	56 - 60 cm

FORMFIT® PRO KNEE

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

SVART		BLÅ	
Storlek	Art.nr.	Storlek	Art.nr.
XS	FP100001	XS	FP101001
S	FP100002	S	FP101002
M	FP100003	M	FP101003
L	FP100004	L	FP101004
XL	FP100005	XL	FP101005



FORMFIT® PRO KNEE FLITE

INDIKATIONER

För knästillstånd som kan förbättras av kompression, till exempel:


- Lindriga stukningar och sträckningar
- Smärta i knäet
- Känsla av instabilitet

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller knäet svalt under användning
- CoolVent™-teknik i knävecket för god ventilationsförmåga och komfort
- Patenterat FoldLock™-system för enkel och säker påtagning
- Lätta, löstagbara spiralstöd i stål



NÖDVÄNDIGA MÅTT

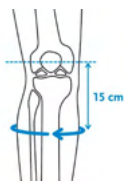

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Storlek	Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella.	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella.
XS	26 - 31 cm	36 - 41 cm
S	31 - 36 cm	41 - 46 cm
M	36 - 41 cm	46 - 51 cm
L	41 - 46 cm	51 - 56 cm
XL	46 - 50 cm	56 - 60 cm

BESTÄLLNINGSGRUPP

BLÅ

Storlek	Art.nr.
XS	FP141001
S	FP141002
M	FP141003
L	FP141004
XL	FP141005



SVART

Storlek	Art.nr.
XS	FP140001
S	FP140002
M	FP140003
L	FP140004
XL	FP140005



REBOUND® DIABETIC WALKER

Avlastning av plantarområdet i allmänhet och sårområdet i synnerhet har bevisats vara en viktig faktor vid behandling av fotsår.

Rebound Diabetic Walker är särskilt utformad för effektiv behandling av plantara fotsår. Den är enkel att ta av och sätta tillbaka under sårbehandlingen, samtidigt som den möjliggör patientens rörlighet under läkningstiden.

Rebound Diabetic Walker har stora fördelar jämfört med diabetes-skor och skoinlägg vad gäller läkningseffektivitet och fungerar även bättre än gipsning tack vare att ortosen är användarvänlig, lätt att applicera och medför låga kostnader.

FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY

INDIKATIONER

- Plantara fotsår som behöver avlastas.



Video: Rebound Diabetic Walker - Clinician Fitting Instructions (5 min 34 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Effektiv innersula laminerad i tre lager med stötupptagande, borttagbara hexagonala delar som avlastar såret i kombination med en värmeformbar ovansida i plastazote som distribuerar trycket och minimerar friktion.
- Unik övertrycksventil som förhindrar för högt tryck och balanserar kompression med en anpassad passform.
- Placeringsportaler gör att klinikern kan kontrollera att walkerortosen sitter som den ska i hälen för en korrekt placering av foten.
- Ett anatomiskt anpassat ytterskal som minimerar krafterna genom att immobilisera foten och vristen i 90 graders vinkel och samtidigt skydda foten.
- FlexEdge®-teknik som motverkar tryckpunkter.
- Rocker Bottom-sula för en jämn roll-over som ger en individuell, naturlig gång.
- Mjuk och ventilerande liner med låg friktion som kan tvättas för en bättre hygien och för att förhindra infektioner.
- Manipuleringsskyddat band för övervakning av acceptans.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



REBOUND® DIABETIC WALKER

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

REBOUND DIABETIC WALKER

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
S	36 - 39	B-242500002
M	39,5 - 44	B-242500003
L	44,5 - 46,5	B-242500004
XL	47 - 50	B-242500005

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Storlek	Liner	Inlägg	Evenup
S	B-418500102	B-418500202	10350
M	B-418500103	B-418500203	10351
L	B-418500104	B-418500204	10352
XL	B-418500105	B-418500205	



Evenup

WALKER SKYDD

Storlek	Sulskydd (2 st.)	Täckande överdrag	Täckande överdrag engångsskydd (20 st.)
S	B-418500602	B-418500502	B-418500512
M	B-418500603	B-418500503	
L	B-418500604	B-418500504	B-418500514
XL	B-418500605	B-418500505	



Sulskydd

STRUMPOR (2 ST.)

Storlek	Art.nr.
Rebound Sock SM/MD	B-41850070
Rebound Sock LG/XL	B-418500704



Täckande överdrag

COMPLIANCEBAND (5 ST.)

Storlek	Art.nr.
Universal	B-418500300



Täckande överdrag
Engångsskydd



Complianceband

DH OFFLOADING WALKER®

INDIKATIONER

- Plantara fotsår som behöver avlastas

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Reducerar skjuvkrafter genom att stabilisera fot och fotled i 90°
- Bred och låg rullsula ger mjuk rullning och ökad stabilitet
- Polstringens patenterade innersko förhindrar att foten glider
- Designad utifrån Össurs unika Active Offloading Insole
- Erbjuder en säker miljö för samtidigt bruk av sårvårdsmaterial
- Enkel att ta på och justera
- Möjlighet att skapa en snabb immobilisering med 5 cm bred gipstejp för ytterligare ordinationsföljsamhet



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
XS	33-35,5	DH0200BLK
S	36 - 39	DH0400BLK
M	49,5 - 44	DH0600BLK
L	44,5 - 46,5	DH0800BLK
XL	47-50	DH1000BLK

TILLBEHÖR

ERSÄTTNINGSDETALJER

Storlek	Polstring	Aktiv offloading sula
XS	-	11742C
S	10958	PP04C
M	10959	PP06C
L	10960	11740C
XL	-	11741C

REBOUND® AIR WALKER

Rebound Air Walker har en mängd egenskaper som syftar till att ge ökat skydd, överlägsen kompression, enkel applicering och användning, förbättrad komfort och sist men inte minst lyckade vårdresultat.



INDIKATIONER

- Stukningar av grad 2 och 3
- Posttraumatiskt
- Stabila frakturer
- Rehabilitering
- Postoperativt
- Mjukdelsskador
- Efter achillesseneruptur

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Helt omslutande skal med skyddande tåparti
- Soft FlexEdge™ för reduktion av tryckpunkter
- Den låga och breda rullsulan ger ökad stabilitet och underlättar normal gång
- Flexibel skalkonstruktion för optimal passform utan modifiering
- Skalet kan vid behov justeras vid vaden för ökad komfort
- Material som transporterar bort fukt och en tjock, bekväm polstring som tar upp stötar och andas
- Sammankopplade mediala/laterala blåsor för enkel uppblåsning och jämn kompression
- Integrerad och lätt åtkomlig pump och luftventil
- 1 par strumpor medföljer för ombyte

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



REBOUND® AIR WALKER

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

REBOUND AIR WALKER

Storlek	Skostorlek	Standard	Low top
XS	33 - 35.5	B-242900001E	B-242900061E
S	36 - 39	B-242900002E	B-242900062E
M	39.5 - 44	B-242900003E	B-242900063E
L	44.5 - 46.5	B-242900004E	B-242900064E
XL	47 - 50	B-242900005E	B-242900065E

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

STANDARD

SLIM

Storlek	Standard	Low top	Standard	Low top
XS	B-418000101	B-418000161	B-418030101	B-418030161
S	B-418000102	B-418000162	B-418030102	B-418030162
M	B-418000103	B-418000163	B-418030103	B-418030163
L	B-418000104	B-418000164	B-418030104	B-418030164
XL	B-418000105	B-418000165	B-418030105	B-418030165

OTHER ACCESSORIES

Beskrivning	Art.nr.
Rebound Achilles Wedge Kit XS/S	AWK0001
Rebound Achilles Wedge Kit M	AWK0005
Rebound Achilles Wedge Kit L/XL	AWK0009
5 layer Wedge kit	AWK00015
Självhäftande sula för hälkil	WHW-W0107
Rebound Hightop Sock SM/MD (2st)	B-418500703
Rebound Hightop Sock LG/XL (2st)	B-418500704
Rebound Lowtop Sock SM/MD (2st)	B-418500903
Rebound Lowtop Sock LG/XL (2st)	B-418500904
Remförlängningar	B-502100101

Storlek	Evenup
S	10350
M	10351
L	10352



EVENUP

WALKER SKYDD

Storlek	Sulskydd (2 st.)	Täckande överdrag	Täckande överdrag engångsskydd (20 st.)
S	B-418500602	B-418500502	B-418500512
M	B-418500603	B-418500503	
L	B-418500604	B-418500504	B-418500514
XL	B-418500605	B-418500505	

FORMFIT® WALKER AIR

Formfit® Walker Air ger extra stabilisering för patienter med skador i mjukdelar, stukningar av grad 2 och 3 samt stabila frakturer. Det patenterade pneumatiska systemet ger god komfort även när svullnader uppstår under rehabiliteringsprocessen, och den intuitiva pumpen och tydligt markerade dekomprimerings-ventilen gör det enkelt att justera luft/tryck.

INDIKATIONER

- Mjukdelsskador
- Stukningar av grad 2 och 3
- Stabila frakturer
- Postoperativ stabilisering av fotleden
- Trauma och rehabilitering

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Tillgänglig i låg eller standardhöjd
- Anatomiskt formade byglar för bättre passform och komfort
- Unik stöddämpande sula reducerar effektivt hälstöten vid gång
- Låg och bred rullsula ger ökad stabilitet och underlättar normal gång
- Rullsula med låg profil och bred bas för extra stabilitet

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Standard	Low Top
XS	33 - 35,5	A-W0200BLK	A-W0300BLK
S	36 - 39	A-W0400BLK	A-W0500BLK
M	39,5 - 44	A-W0600BLK	A-W0700BLK
L	44,5 - 46,5	A-W0800BLK	A-W0900BLK
XL	47 - 50	A-W1000BLK	A-W1100BLK

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Storlek	Standard	Low Top
XS	12349	12356
S	10675	12357
M	10678	12358
L	10681	12359
XL	10647	12360

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
10 cm tygextension på bredden	WKSG-1BLK
Skenbens- och vadplattor när det behövs ytterligare skenor	WKSP100
Varm-/kylbehandling för säker och återanvändbar kryoterapi	WKGEL100
5 layer Wedge Kit Universal	AWK00015
Självhäftande inläggssula för hälkil	WHW-W0107

FORMFIT® WALKER

Formfit® Walker ger immobilisering för patienter med skador i mjukdelar, vid stukningar av grad 2 och 3 samt stabila frakturer.

INDIKATIONER

- Skador i mjukdelar
- Stukningar av grad 2 och 3
- Stabila frakturer

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- High top- och Low top-version
- Stötdämpande sula fördelar krafterna vid hälisättning
- Låg, bred rullsula som ger en stabil och naturlig gång
- Sömlös liner med andasfunktion



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Skostorlek	Standard	Low Top
XS	33 - 35,5	W0200BLK	W0300BLK
S	36 - 39	W0400BLK	W0500BLK
M	40 - 44	W0600BLK	W0700BLK
L	44,5 - 46,5	W0800BLK	W0900BLK
XL	47 - 50	W1000BLK	W1100BLK

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Storlek	Standard	Low Top
XS	WKSG200BLK	WKSG0300BLK
S	WKSG400BLK	WKSG500BLK
M	WKSG600BLK	WKSG700BLK
L	WKSG800BLK	WKSG900BLK
XL	WKSG1000BLK	WKSG1100BLK

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
10 cm tygextension på bredden	WKSG-1BLK
Skenbens- och vadplattor när det behövs ytterligare skenor	WKSP100
Varm-/kylbehandling för säker och återanvändbar kryoterapi	WKGEL100
5 layer Wedge kit	AWK00015
Självhäftande inläggssula för hälkil	WHW-W0107

AFO DYNAMIC

AFO Dynamic är en stark och lätt lösning för patienter med varierande grad av droppfot till följd av neurologiska tillstånd. Össur har infört kolfibertekniken från Flex-Foot®-produkterna i denna nya AFO Dynamic, som ger förbättrat stöd jämfört med traditionella ankel-/fotortoser. Kolfibern ger proportionell energiåtergivning mot tillförd kraft. Ett idealiskt material för denna dynamiska fotleds-ortos. AFO Dynamic ger ett mer effektivt gångmönster och lämpar sig även för aktiva människor.



INDIKATIONER

- Droppfot sekundärt till:
 - MS
 - CVA
 - Charcot Marie Toth's sjukdom
 - Perifera pareser och andra neurologiska tillstånd
 - Skador efter överbelastning av nedre extremitet

KONTRAINDIKATIONER


- Grav deformitet i fot/fotled
- Fluktuerande ödem
- Grav spasticitet

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kolfibern medför utmärkt förhållande mellan vikt och styrka samt dynamisk rörelse
- Den avsmalnande kolfiberhålen lagrar energi och tar upp krafter vid hälstöten
- Fullängdstå ger utmärkt stöd i energilagringsfasen samt reducerar stöteffekten i det andra benet
- Ger M-L-stabilitet i mitten av stödfasen
- Minskar energiförbrukningen genom att höften inte behöver lyftas vid gång
- Medial bygel gör ortosen mindre framträdande
- Öppet främre tibialt skal ger överlägsen anatomisk passform samt minskar värmeutveckling
- Rekommenderad vikt: upp till 120 kg

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd

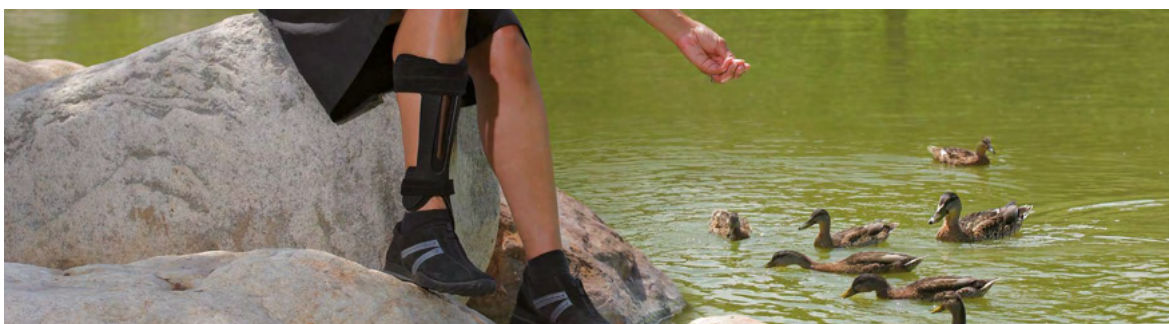

AFO DYNAMIC

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Höjdmått*	Fotlängd	Vänster	Höger
XS	30 - 34 cm	21 - 23 cm	O-102021	O-102011
S	32 - 36 cm	24 - 25 cm	O-102022	O-102012
M	34 - 38 cm	26 - 27 cm	O-102024	O-102014
L	36 - 40 cm	28 - 29 cm	O-102026	O-102016

* Höjdmått tas från golvet upp till bredaste stället på vaden.

TILLBEHÖR

POLSTRINGSATS

Storlek	Art.nr.
XS	O-102101
S	O-102102
M	O-102104
L	O-102106

OBS! Polstringssats levereras med övre och nedre fästband

AFO LIGHT

AFO Light ger stöd endast på de ställen där det behövs, har ingen onödigt volym och ger ett kosmetiskt tilltalande utseende. Den bästa Flex-Foot®-teknologin och kolfibers energiåtergivande egenskaper gör AFO Dynamic till en stark och lätt lösning för människor med lätt till måttlig droppfot.



INDIKATIONER

- Lätt till måttlig droppfot
- Charcot Marie Tooth disease (HMSN)
- Förslitningsskador på nedre extremiteter
- Kontraindikationer:
 - Grava ankel-/fotdeformiteter
 - Fluktuerande ödem
 - Svår spasticitet
 - Neuropati

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Proportionell respons mot tillförd kraft vid toe-off
- Stödjer foten så att den går fri från marken under svingfasen
- Kolfibertechniken medför utmärkt förhållande mellan vikt och styrka samt dynamisk rörelse
- Gradvis plantarflexion vid hälsättning
- Graderad styvhet vid häl och fot korresponderar mot reaktionskraften från marken
- Lätt att ta på och av
- Rekommenderad vikt: upp till 100 kg

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd

BESTÄLLNINGSPERINFORMATION

Storlek	Höjdmått*	Fotlängd	Vänster	Höger
S	32 - 36 cm	22 - 26 cm	O-121022	O-121012
M	34 - 38 cm	24 - 28 cm	O-121024	O-121014
L	36 - 40 cm	26 - 30 cm	O-121026	O-121016
XL	38 - 42 cm	28 - 32 cm	O-121028	O-121018

* Höjdmått tas från golvet upp till bredaste stället på vaden.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
AFO Light Accessory Kit	O-122101

AFO LEAF SPRING

INDIKATIONER

- Droppfot sekundärt till CVA
- Lätt droppfot sekundärt till andra neurologiska tillstånd

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Injektionsgjuten polypropylen - låg vikt
- Tunn, flexibel fotdel kan enkelt trimmas med vanlig sax
- Urtag vid hälen ger ytterligare komfort och att den passar i de flesta skor

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Skostorlek	Höjd	Vänster	Höger
S/M	36 - 39	27 cm	O-110227	O-110127
L	40 - 45	30 cm	O-110230	O-110130

REBOUND FOOT-UP®

Rebound Foot-Up® är en lättvikts vrist-/fotortos (AFO) som ger dynamiskt stöd till droppfot eller relaterade problem som kräver stöd för dorsalflexion.



INDIKATIONER

- Droppfot




Video: Rebound Foot-Up and Foot Wrap - User Instructions (7 min 20 sec)

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamisk och diskret stöd för droppfot eller relaterade problem som kräver stöd för dorsalflexion.
- Förbättrad funktion, lätt att använda, bekväm och hög produktkvalitet.
- Möjliggör plantarflexion enligt individuella förutsättningar.
- Justerbar för medialt eller lateralt stöd.
- Formgiven för att följa fotens form.
- Justerbar bandlängd.
- Smart klämma gör det lätt att ta av och på ortosen.
- Rebound Foot-Up® Foot Wrap är tillval och kan användas när man är barfota, med öppna skor eller med sandaler

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt fotleden, mäts runt fotknölnarna

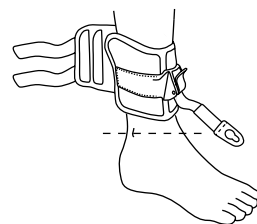


BESTÄLLNINGSPERIOD

REBOUND FOOT-UP ANKLE CUFF

Storlek	Omkrets fotled	Art.nr.
S/M	18 - 25 cm	RFU50001
L/XL	26 - 33 cm	RFU50002

#RFU50001

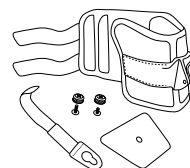


TILLVAL

REBOUND FOOT-UP FOOT WRAP

Storlek	Omkrets fotled	Art.nr.
One Storlek	20 - 28 cm	RFU50101


#RFU50101

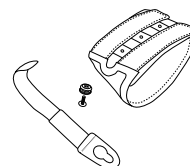

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Rebound Foot-Up Attachment Kit Består av elastiskt band, inlägg, 1 mutter och 1 lång skruv	RFU50201
Rebound Foot-Up Nuts & Bolts Består av 5 muttrar, 3 långa och 2 korta skruvar	RFU50202

#RFU50201

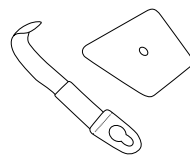

#RFU50202



BOXIA AFO DROP FOOT

Boxia är en lätt och smidig AFO som ger dynamiskt stöd vid droppfot och liknande besvär. Boxia stödjer och stabiliserar foten under de moment i gångcykeln där ökad dorsalflexion behövs.

INDIKATIONER

- Droppfot
- Stöd för bättre dorsalflexion

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidig och lätt design
- Låg vikt
- Kosmetisk tilltalande
- Enkel anpassning
- Elastisk justerbar rem för att styra kraft samt pronation/supination
- Gelpolstrad baksida på vristdel för minskad för ökad komfort, motverkad friktion samt minimerad kompression
- Även tillgänglig i modell där sko inte behövs

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets ovan malleolerna



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Art.nr.
XS	13 - 17 cm	AB010
S	17 - 21 cm	AB011
M	21 - 25 cm	AB012
L	25 - 29 cm	AB013



TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr. Vä	Art.nr. Hö
Stöd för det inre fotvalvet S	AB12I1	AB12D1
Stöd för det inre fotvalvet M	AB12I2	AB12D2
Stöd för det inre fotvalvet L	AB12I3	AB12D3
S-krokar för Boxia (2 st)		AB13
Elastisk dragrem för Boxia (1 st) Stl 1		AB101
Elastisk dragrem för Boxia (1 st) Stl 2		AB102
Elastisk dragrem för Boxia (1 st) Stl 3		AB103
Fästhake för Boxia (2 st)		AB11



Stöd för det inre fotvalvet

OBS! Denna produkt distribueras bara i Sverige.

FOOT-UP®

Foot-Up är en lätt ankelortos som ger dynamiskt stöd vid droppfot och liknande besvär. Denna revolutionerande ortos ger synlig förbättring i gång genom att ge stöd åt foten på det ögonblick som den lyfts upp.



Inlägg



Tillbehör utan sko



INDIKATIONER

- Droppfot
- Stöd för bättre dorsalflexion

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidig design
- Låg vikt
- Osynlig vid användning
- Komfortabel
- Material som andas
- Polstrad
- Enkel anpassning
- Separata inlägg finns tillgängliga
- Även tillgänglig i modell utan sko

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt fotleden, mätt runt fotknölarna
- Shoeless Foot-Up (Foot-Up utan sko): Omkrets runt vidaste delen på foten

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets vristen	Beige	SVART
M	18 - 21 cm	07811-1	07810-1
L	22 - 26 cm	07811-2	07810-2
XL	27 - 33 cm	07811-3	07810-3

TILLBEHÖR

Beskrivning	Beige	SVART
Separat inlägg till Foot-Up, universal storlek	17811	17810

TILLBEHÖR (UTAN SKO)

Storlek	OMKRETS FOT	Beige	SVART
S	< 20 cm	27811-1	27810-1
M	20 - 24 cm	27811-2	27810-2
L	24 - 28 cm	27811-3	27810-3
XL	> 28 cm	27811-4	27810-4

REBOUND® ANKLE BRACE

INDIKATIONER

- Nedtrappning efter användning av Walker eller gips.
- Vid återgång till träning efter fotledsskada
- Stukningar av 1, 2 och 3 graden
- Kroniskt instabil fotled efter rehabilitering
- Förebyggande behandling

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Juster- och expanderbart vadbånd för bättre passform
- Öppen front, stabiliseringsband ger enkel och säker på- och avtagning
- Modellen med stabiliseringsband erbjuder ett flertal fästalternativ för varierande grad av stabilisering.
- Tillåter nedtrappning i takt med att rehabiliteringen framskrider

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



BESTÄLLNINGSGRUPP

		Utan stabiliseringsband		Med stabiliseringsband	
Storlek	Skostorlek	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	35 - 39,5	B-231600012	B-231500012	B-231602512	B-231502512
M	39,5 - 42	B-231600013	B-231500013	B-231602513	B-231502513
L	42+	B-231600014	B-231500014	B-231602514	B-231502514

TILLBEHÖR

Storlek	Art.nr.
Breddningskit	B-231900000
Stödrem	B-701160080

FORMFIT® ANKLE BRACE

Formfit® fotledsortos ger stabilitet och stöd för fotleden. Den kan användas profylaktiskt, vid kronisk instabilitet eller vid reha-bilitering efter skada. Formfit fotledsortos är en hybrid mellan en styv ortos med byglar och ett mjukt fotledsstöd. Det ger en mycket bra passform som begränsar inversion, eversion, flexion och extension. Lågprofildesignen är enkel att använda med skor, och snabbsnörningen gör att det går snabbt att ta av och på ortosen. Material som andas gör att ortosen kan bäras hela dagen med god komfort. Formfit fotledsortos med figur-8 band utökat stöd begränsar fotledens rörlighet i större grad.

INDIKATIONER


- Stukningar och sträckningar av grad I-II
- Kroniska instabiliteter
- I förebyggande syfte

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Snabbsnörning
- Inversions-/eversionskontroll
- Modell med figur-8 band

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Spannmått

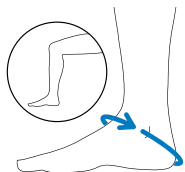

[Video: Formfit Ankle Brace - Fitting Instructions \(46 sec\)](#)

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Spannmått	Standard	Med figur 8 band
XS	28 - 30,5 cm	B-212010001	B-212000001
S	30,5 - 33 cm	B-212010002	B-212000002
M	33 - 35,5 cm	B-212010003	B-212000003
L	35,5 - 38 cm	B-212010004	B-212000004
XL	38 - 40,5 cm	B-212010005	B-212000005

FORMFIT® ANKLE WITH SPEEDLACE

Formfit® fotledsortos med Speedlace ger stabilitet och stöd för fotleden. Den kan användas profylaktiskt, vid kronisk instabilitet eller vid rehabilitering efter skada. Ortosen är tillverkad i hållbara material och lågprofildesignen med snabbsnörning är smidig och enkel att bära med skor.

INDIKATIONER


- Rehabilitering/mobilisering av skadad fotled (stukningar av grad I/II)
- För kroniska instabiliteter
- Förebyggande behandling

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel snörning och justering utan att skon behöver tas av
- Figur-8 band, efterliknar idrottstejpning för stöd vid inversion/eversion
- Uttagbara Skenor

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Spannmått

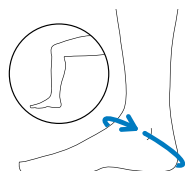

Video: Formfit Ankle w/
Speedlace - Fitting Instructions
(58 sec)

BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Spannmått	Med skenor
XXS	23 - 25.5 cm	W-10621
XS	25.5 - 28 cm	W-10622
S	28 - 30.5 cm	W-10623
M	30.5 - 33 cm	W-10625
L	33 - 35.5 cm	W-10627
XL	35.5 - 38 cm	W-10628
XXL	38 - 40.5 cm	W-10629

FORMFIT® PRO ANKLE

Össur Formfit® Pro Ankle är en kompressiv fotledsorto med två integrerade vristkuddar, och är avsedd att användas efter lindringa fotledsskador. Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande och uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav. Tack vare överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga jämfört med ledande märken, hålls fotleden sval under användning. CoolVent™-teknik på framsidan av fotleden ökar ventilationsförmågan och komforten ytterligare.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™



INDIKATIONER

Fotledstillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Lindriga stukningar och sträckningar
- Rehabilitering av fotledsskada
- Lindrig instabilitet


KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller fotleden sval under användning
- Certifierad medicinsk kompression (20 - 30 mmHg)
- CoolVent™-teknik på framsidan av fotleden för extra ventilationsförmåga och komfort
- Två integrerade SmartPads™ på vristen för punkbstöd och vaddering
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och mer säker applicering

NÖDVÄNDIGA MÅTT

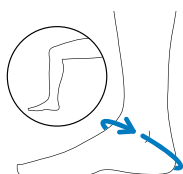

Spannmått. Ankeln i 90°.

Storlek	Omkrets fotled
XS	18 - 20 cm
S	20 - 23 cm
M	23 - 26 cm
L	26 - 29 cm
XL	29 - 32 cm

FORMFIT® PRO ANKLE

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Vänster	Höger
XS	FP200201	FP200101
S	FP200202	FP200102
M	FP200203	FP200103
L	FP200204	FP200104
XL	FP200205	FP200105



FORMFIT® ANKLE STIRRUPS

Formfit® Ankle Stirrups är lätta och robusta. Oavsett om de bärs för att stödja en akut skada, kronisk instabilitet eller läkning efter gipsning, stabiliserar Formfit® Ankle Stirrups skadade fotleder genom att begränsa inversion/eversion-rörelsen.

Universaldesignen är noggrant konstruerad för att rymma malleolus på båda sidor och säkerställer en bra, bekväm passform. Det halksäkra hälbandet kan justeras för att passa de flesta fotleder. Vår unika Flex-Edge™ övergjutning omger bygelns ytterhölje och skyddar patientens hud från hårda kanter, vilket ger en ännu bekvämare passform. Den universella bygelkonstruktionen finns med två olika foderalternativ: uppblåsbar luft eller skum, vilket erbjuder varje patient en lösning som bäst passar dennes behov.

INDIKATIONER

Situationer som kräver begränsad inversion/eversion. Dessa kan omfatta följande:

- Lindriga till måttliga stukningar av fotleden
- Kronisk instabilitet i fotleden
- Stöd efter borttagning av gips och användning av kryckor
- Rehabilitering av fotledsskador och/eller efter kirurgi

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Universalhölje, noggrant utformad för att passa både höger och vänster fotled
- Soft Flex-Edge™ övergjutning ger ökad komfort
- Justerbart hälband för att optimera passform och komfort för patienten
- Halksäkra silikonprickar som hjälper till att minska glidning och stabilisera foten inuti skon
- 2 dubbelriktade kardborreband säkerställer en säker och stabil passform
- Finns med uppblåsbart foder eller skumfoder i enlighet med dina behov
- Finns i storlekar för vuxna och ungdom

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Patientens höjd



Storlek	Patientens höjd	Formfit Air Ankle Stirrup	Formfit Foam Ankle Stirrup
Vuxen	Över 160 cm	70350	70352
Ungdom	Under 160 cm	71350	71352

EXOFORM® DORSAL NIGHT SPLINT

INDIKATIONER

- Plantarfasciit
- Smärta efter statisk belastning
- Allmän hälsmärta
- Droppfot
- Achillestendinit
- Skador efter överbelastning av nedre extremitet

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Exoform-ortosens skal är förinställt på 85 till 90 grader för maximal terapeutisk nytta
- Justerbar aluminiumskena ger möjlighet till ytterligare 5 - 10 graders flexion vid behov
- Fotremmarna fångar upp framfoten och tåspetsarna för maximal sträckning av plantarfascian
- Foten omges av patenterad 3D-gjuten polstring som säker-ställer patientkomforten
- Flex Edge™ eliminerar skarpa kanter
- Hälremmen håller ortosen på plats
- Formbart dorsalt skal omger underbenet och förebygger rotation
- Antihalksula förebygger halkning vid normal gång

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
M	37,5 - 42,5	W-50085
L	43 - 48,5	W-50087

FORMFIT® NIGHT SPLINT

INDIKATIONER

- Plantar Fascit
- Skador efter överbelastning av nedre extremitet
- Achilles Tendinit

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ställbara flexionsband ger justerbar flexion för stretch av plantarfaschian
- Användarvänliga snabbspännen framtill förenklar applicering
- Patenterad 3-dimensionell form säkerställer bra komfort och passform med polstring där det behövs
- Mjuk behaglig polstring med lycraytskikt, tvättbar. Minskar värme uppbyggnad



NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Med anti-halsula
S	- 38	50023
M	38,5 - 43	50025
L	43,5+	50027

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Kil i skumplast	10700
Polstringssats S	11760
Polstringssats M	11761
Polstringssats L	11762

MPO 2000

INDIKATIONER

- Hälavlastning vid hälsår
- Bibehållande av dorsalflexion
- Förhindra rotation av höft och ben

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Plastkomponenter i Kydex
- Vridbart skaft ger möjlighet att kontrollera fotens rotation

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Fotlängd	Art.nr.
S	15 - 19 cm	251802
M	19 - 23 cm	251803
L	23 - 26 cm	251804
XL	26 - 28 cm	251805

TILLBEHÖR

POLSTRINGSSATS

Storlek	Fotlängd	Art.nr.
S	15 - 19 cm	251812
M	19 - 23 cm	251813
L	23 - 26 cm	251814
XL	26 - 28 cm	251815

DH OFFLOADING POST-OP STYLE SHOE

INDIKATIONER

- Plantara sår

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Passar både höger och vänster fot
- Designad utifrån Össurs unika Active Offloading Insole
- Rymmer förband
- Ytterst mjuk ovansida i nylon och förstärkt hälkappa för bästa komfort och stabilitet
- Patenterade löstagbara tåstycken bidrar till åtkomst till såret för daglig inspektion
- Semirigid rullsula

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
S	35,5 - 39	10340
M	39,5 - 42	10341
L	42,5 - 45	10342
XL	45,5 - 48,5	10343

TILLBEHÖR

SULA

Storlek	Art.nr.
S	12365
M	12366
L	12367
XL	12368

SOFT TOP POST-OP SHOE

INDIKATIONER

- För användning efter mjukdelsskada, trauma

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ovansidan i bomull/polypropylen låter patientens fot andas och ger utmärkt komfort
- Fästremmarna är lätta att använda och gör skon lätt att ta på och av

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

	Skostorlek		Art.nr	
Storlek	Herr	Dam	Herr	Dam
S	35,5 - 38	35 - 36	18013	18003
M	38,5 - 42	37,5 - 38,5	18015	18005
L	43 - 45	40+	18017	18007
XL	45,5 - 48,5	-	18018	-

CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE

INDIKATIONER

- För användning med kort bengips

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stötdämpande gipssko med rullsula
- Kardborrefäste, öppen tå

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Innersulans längd



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Sulans längd	Blå	SVART
XS	18 cm	308XS	-
S	19 - 23 cm	308SM	B308SM
S/M	23 - 25 cm	308SM/MED	B308S/M
M	25,5 - 26,5 cm	308MED	B308MED
M/L	26,5 - 28 cm	308MLG	B308MLG
L	28 - 30,5 cm	308LG	B308LG
XL	30,5 - 35 cm	308XLG	B308XLG

INLÄGG

Novatherm är tunna och smidiga inlägg med en mjuk och behaglig ovansida av Alcantara. Kanterna är mjuka och flexibla, vilket gör inläggen komfortabla och lättanpassade. En formfast termoplastbotten ger inläggen stabilitet och styrka. Materialet är formbart vid 110°C, vilket möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.

NOVATHERM LANGE

Traditionell Lange-modell med extra höga och stabila kanter. Finns i junior storlekar, från strl. 19/20.

NOVATHERM LANGE

Storlek	Art.nr.
19/20 - 47/48	981 289 0 + strl



NOVATHERM COMFORT

Novatherm Comfort är ett tunt, smidigt och formbart inlägg och ett utmärkt alternativ i kombination med de flesta skomodeller.

NOVATHERM COMFORT, LÅNG OCH BRED

Storlek	Art.nr.
35 - 48	985146-454 + strl



NOVATHERM COMFORT MED PPT

Tunt, smidigt och formbart inlägg i likhet med övriga inlägg i Novatherm-serien. Här i utförande med ett tunt lager stötdämpande PPT under toppskiktet av beige Alcantara. Lång modell.

Storlek	Art.nr.
35 - 48	985361-197 + strl



INLÄGG

NOVATHERM AKTIV

Samma karakteristiska funktioner som Novatherm Comfort men med högre kanter. Gjord på en lästform för effektivare utnyttjande av fotsulans fettkudde.

NOVATHERM AKTIV

Storlek	Art.nr.
35 - 48	986543-454 + strl



NOVATHERM AKTIV MED PPT

Novatherm Aktiv med PPT har samma funktioner som Novatherm Aktiv. Här i utförande med ett tunt lager stötdämpande PPT under toppskiktet av svart Alcantara.

NOVATHERM COMFORT, LÅNG OCH BRED

Storlek	Art.nr.
35 - 48	986539 + strl



KOLFIBERINLÄGG

Förformade kolfiberinlägg.

Storlek	Tjocklek	Art.nr.
36 - 48	1,6 mm	047950 0 + strl
36 - 47	1,9 mm	047955 0 + strl



DIABETIC WALKER INSOLE

Passar till Rebound Diabetic Walker.

Storlek	Höger	Vänster
S	972659-006-S	972759-006-S
M	972659-006-M	972759-006-M
L	972659-006-L	972759-006-L
XL	972659-006-XL	972759-006-XL



INLÄGG

DIABETIC INSOLE

Temporära inlägg för behandlingsskor.

Storlek	Art.nr.
35 - 47	970058-000 + strl





ORTHOTIC SOCK, AFO/KAFO

INDIKATIONER

- Komfort och skydd under ortos

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Rundstickad strumpa med DuPont Coolmax material med lycra spandex vilket gör strumporna väldigt mjuka och elastiska
- Materialet transporterar effektivt bort svett från huden
- X-static - ett nytt material som innehåller silverpartiklar vilket ger en effektiv bekämpning av dålig lukt och bakterier



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ORTOSSTRUMPA AFO - X-STATIC - FÄRG: SILVER		
Storlek	Mått	Art.nr.
Spädbarn	5,0 x 23 cm	204821
Barn, S	5,5 x 28 cm	204822
Barn, M	6,5 x 36 cm	204823
Vuxen, S	7,5 x 46 cm	204824
Vuxen, M	9,0 x 51 cm	204825

ORTOSSTRUMPA AFO - FÄRG: VIT		
Storlek	Mått	Art.nr.
Spädbarn	5,0 x 23 cm	204801
Barn, S	5,5 x 28 cm	204802
Barn, M	6,5 x 36 cm	204803
Vuxen, S	7,5 x 46 cm	204804
Vuxen, M	9,0 x 51 cm	204805

ORTOSSTRUMPA AFO - FÄRG: SVART		
Storlek	Mått	Art.nr.
Spädbarn	5,0 x 23 cm	2048012
Barn, S	5,5 x 28 cm	2048022
Barn, M	6,0 x 36 cm	2048032
Vuxen, S	7,5 x 46 cm	2048042
Vuxen, M	9,0 x 51 cm	2048052

ORTOSSTRUMPA KAFO - FÄRG: VIT		
Storlek	Mått	Art.nr.
Barn, lång	6,5 x 46 cm	204851
Vuxen, S	10 x 6,5 x 61 cm*	204852
Vuxen, M	15 x 9 x 71 cm*	204853

*Säljes styckvis

TOELESS FRACTURE SOCK

INDIKATIONER

- Används oftast i kombination med frakturortos eller annan typ av post operativ behandlingsortos, då viss kompression är önskad

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mycket elastisk strumpa av tjock och härlig kvalitet
- Den konturerade formen ger strumpan en avvägd och behaglig kompression

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

Storlek	Längd	Mått	Art.nr.
Kort / Underben	51 cm	5,0 x 22 cm	204952
Lång / Helben	71 cm	5,5 x 27 cm	204954



COMPRESSION STOCKINET

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kompressionstrika för avgjutning av exempelvis stäskal, lårbensprotes, korsett etc.

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

Bredd	Längd	Art.nr.
30 cm	10 m	6041012



CAST-RITE FRACTURE/ORTHOTIC SOCK

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kan användas som skydd vid avgjutning eller under ortos.
- Anpassar sig väl till armens kontur. Kan tvättas.
- Material/tjocklek: Acryl/Lycra. 1-ply.
- Måtten nedan är tagna med strumpan liggande på plant underlag.



BESTÄLLNINGSGINFORMATION

BESKRIVNING	Längd	BREDD	Art.nr.
Cast-Rite strumpa med hål för tumme (vuxen)	25 cm	ca 7,5 cm	KR1AL1AO10
Cast-Rite strumpa med hål för tumme (barn)	25 cm	ca 5 cm	KR1AL1-AOCH-10



FAST FIT® CHIPMUNK®

INDIKATIONER


- För patienter med måttlig pronation och korregerbar fotposition.
- Patienter med sänkt medialt fotvalv, måttlig framfotsabduktion och eversion i hälen.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som ett konturerat skoinlägg ger.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Hög medial trimlinje
- Liner i tyg
- Ytterskal i plast
- Platt tådel
- Definierat hålfotsstöd Prefabricerad
- Plantaryta

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50 - 9.50 inch. wide

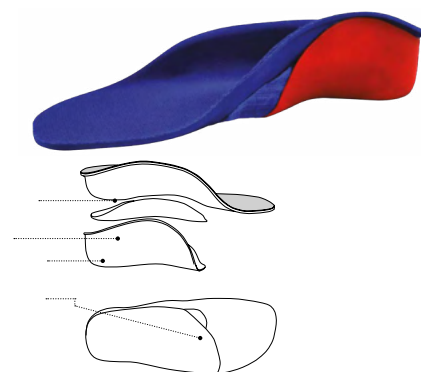

Moderate pronation, unstable foot position.

Improved foot alignment and steadier gait.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Chipmunk		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF10	+	6,25	+	Left	=	DAF10625L



FAST FIT® CRICKET®

INDIKATIONER


- För patienter med korregerbar fotposition
- Patienten med lätt till måttlig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter som behöver fri dorsalflexion och plantarflexion

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stadigt ytterskal
- Delvis omslutande inre liner
- Prefabricerad

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide

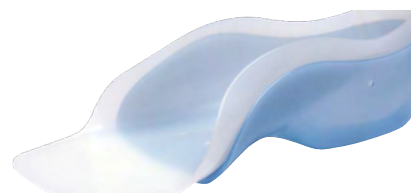

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Cricket		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF40	+	6,25	+	Left	=	DAF40625L



JUMPSTART® LEAP FROG®

INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition
- Patienter med måttlig till kraftig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter med behov av sensoriskåterkoppling som en helkonturerad fotsula ger
- Patienter som behöver fri dorsalflexion och plantarflexion.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppen vristtrimlinje
- Helt omslutande inre liner
- Stadigt ytterskal
- Prefabricerad

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Leap frog		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF30	+	6,25	+	Left	=	DAF30625L



JUMPSTART® BUNNY®

INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition
- Patienter med måttlig till kraftig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter med lätt instabilitet i svingfasen eller överdriven plantarflexion som yttrar sig som lätt tågång eller hyperextension i knäet.
- Patienter som behöver visst motstånd mot plantarflexion.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Helt omslutande inre liner
- Proximal bakre elastisk rem



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Bunny		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF20	+	6,25	+	Left	=	DAF20625L



JUMPSTART® KANGAROO®

INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition.
- Patienter med måttlig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter med motverka överdriven plantarflexion som yttrar sig som kraftig tågång eller hyperextension i knäet.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter som behöver fri dorsalflexion

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppen främre del
- Stadigt ytterskal och bakre bändel
- Prefabricerad
- Helt omslutande inre liner

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Kangaroo		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF50	+	6,25	+	Left	=	DAF50625L



No casting needed!



ÖSSUR SERVICES

FÖRETAGSINFORMATION

POSTADRESS

Össur Nordic
Box 7080
SE-164 07 Kista

BESÖKSADRESS

Kistagången 12, 2 tr
SE-164 40 Kista

tel: +46 (0) 18 18 22 00
fax: +46 (0) 18 18 22 18
e-mail: info@ossur.com

ÖSSUR NORDIC STÅR FÖR FRAKTEN VID FÖLJANDE RETURER:

- Reklamationsärenden inom garantin
- Reparationer inom garantin

GARANTIFÖRFARANDE

Alla Össurs produkter har garanti mot material- eller tillverkningsfel, från och med dagen för köpet. Varje produkt som konstaterats vara defekt under normal och korrekt användning ersätts utan kostnad med samma vara. Om en vara behöver ersättas när garantin gäller, skickas den ersättande varan så snabbt som möjligt och hela återförsäljningspriset faktureras. När garantiartikeln mottagits, sker återbetalning enligt gällande villkor.

CUSTOM KNÄORTOS	Ram och leder: Livstid för den ursprungliga patienten. Polstring, liners och band: 6 månader
OTS ORTOSER	Ram och leder: 24 månader Polstring, liners och band: 6 månader
POSTOPERATIVA ORTOSER	Skal och leder: 3 månader Polstring och band: 30 dagar
ÖVRIGA PRODUKTER	6 månader, om inget annat uppges på förpackning och etikett.
AVGJUTNING OCH SKENOR	36 månader

RETURER

VAROR KREDITERAS ENLIGT FÖLJANDE:

- Äldre än 365 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
- Custom Made-produkter återtages ej.
- Produkter i osäljbart skick återtages ej.

Vid retur till Össur behöver du ha ett RSA-nummer. Detta nummer får du genom att kontakta Össur Nordics Kundsupport via: info@ossur.com eller +46 (0) 18 18 22 00.

För bästa och snabbaste service vill vi att du vid kontakten har dessa uppgifter framtagna:

- Kundnamn/Kundnummer
- Artikelnummer
- Ev. LOT eller Serienummer
- Fakturanummer
- Anledning till retur

Össur återkommer med ett RSA-nummer. Detta RSA-nummer ska skrivas tydligt utanpå godset.

ÖSSUR SERVICES

RETURER

ÖNSKAR NI ATT SKICKA RETUREN SJÄLV, SÅ SKICKAS DEN TILL:

UPS SCS Sweden AB
To: Össur
Stensättravägen 5-7
127 39 Skärholmen
SWEDEN

alternativt till:

Össur Europe B.V.
Receiving Department
De Schakel 70
Eindhoven
5651 GH
NETHERLANDS

OBS! Returer utan RSA-nummer återtages ej.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

LEVERANSVILLKOR: Fritt vårt lager.

BETALNINGSVILLKOR: 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Össurs registrerade varumärken är registrerade i USA och utvalda länder.

TVÄTTRÅD

TVÄTTRÅD FÖR:

Exoform handledsortos, Exoform CTS handleds ortos, Formfit handledsortos, Spectra och Spectra Air handledsortos, Formfit tumortos, Universal thumb splint.

Produkten kan rengöras med mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Handflatans aluminiumstöd ska avlägsnas innan tvätt. Använd inte blekningsmedel eller starkt rengöringsmedel. Tvätta inte i tvättmaskin.

Lufttorkas enbart. Krama eller vrid inte ur ortosen. Placera inte i en torktumlare eller i närheten av ett element.



TVÄTTRÅD FÖR:

Samtliga Alfa-, Lycrafleece-, och Ventroprene ortoser.

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråd nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR



FOLLOW ÖSSUR ON



TEL +46 18 18 22 00
info@ossur.com

WWW.OSSUR.SE



ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS