

# Bracing & Support





# ÖSSUR BRACING & SUPPORT

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION .....	6
<b>NACKE &amp; RYGG</b> .....	<b>9</b>
RIKTLINJER FÖR ÖSSURS SPINALA ORTOSER .....	10
MIAMI J® .....	12
MIAMI J® SELECT .....	14
MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION .....	15
OCCIAN® BACK .....	16
MIAMI Jr® .....	17
PAPOOSE® .....	18
PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR .....	19
PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR .....	20
NECLOC® .....	21
NECLOC® KIDS .....	22
MIAMI LSO™ .....	23
MIAMI TLSO 464 .....	25
MIAMI TLSO 456 .....	27
MIAMI LUMBAR® POSTEO .....	29
MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE .....	30
FORMFIT® PRO BACK .....	31
FORMFIT® BACK SUPPORT AIR .....	32
FORMFIT® BACK SUPPORT .....	33
ORTOSLINNE .....	34
<b>HÖFT</b> .....	<b>35</b>
REBOUND® HIP .....	36
UNLOADER® HIP .....	38
<b>AXEL, ARM &amp; HAND</b> .....	<b>41</b>
FORMFIT® SHOULDER .....	42
PREMIUM SHOULDER IMMOBILIZER .....	43
AXELLÅS .....	43
AXELLÅS TVÅDELAD .....	44
FRONT CLOSURE CLAVICLE SUPPORT .....	44
FORMFIT® PRO ELBOW .....	45
REBOUND® POST-OP ELBOW .....	46
FORMFIT® TENNIS ELBOW .....	48
FORMFIT® PRO WRIST .....	49
SPECTRA HANDLEDSORTOS .....	50
FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM .....	51
FORMFIT® UNIVERSAL WRIST & THUMB .....	52
FORMFIT® TUMORTOS .....	53
FORMFIT® BARNORTOS .....	54
LYCRAFLEECE BARNORTOS .....	54
EXOFORM® HANDLEDSORTOS .....	55
EXOFORM® CTS HANDLEDSORTOS .....	55
ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE & SVART .....	56

# ÖSSUR BRACING & SUPPORT

---

LYCRAFLEECE HANDLEDSORTOS.....	56
ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE & SVART .....	57
ALFA HANDLEDSORTOS WIDE BEIGE.....	58
ALFA HANDLEDSORTOS WIDE SVART .....	58
ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR BEIGE.....	59
ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR SVART.....	59
UNIVERSAL THUMB SPLINT .....	60
ALFA TUMORTOS BEIGE & SVART .....	60
ALFA CMC TUMORTOS BEIGE & SVART.....	61
AIR X TUMORTOS.....	61
LYCRAFLEECE TUMORTOS.....	62
VENTOPRENE TUMORTOS .....	62
<b>KNÄ.....</b>	<b>63</b>
UNLOADER® - FÖR ALLA GRADER AV OA.....	64
UNLOADER ONE® X .....	65
UNLOADER ONE® .....	71
UNLOADER ONE® CUSTOM .....	75
FORMFIT® PRO KNEE OA .....	78
OA EASE.....	79
REBOUND® DUAL .....	81
REBOUND® DUAL ST.....	85
REBOUND® DUAL CUSTOM .....	88
REBOUND® CARTILAGE .....	90
CTI® CUSTOM .....	93
CTi®3 .....	96
CTI® OA.....	98
REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST.....	99
REBOUND® PCL.....	101
REBOUND® ACL.....	103
REBOUND® ACL CUSTOM .....	106
MEASUREMENT FORM CTi® CUSTOM BRACE .....	109
C180™ ROCKET .....	112
REBOUND® POST-OP KNEE.....	113
FORMFIT POST-OP KNEE .....	114
REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL .....	115
REBOUND® KNEE BRACE .....	116
FORMFIT® KNEE ROM .....	117
FORMFIT® KNEE HINGED .....	118
VENTOPRENE SK/VK.....	119
LYCRAFLEECE PATELLA LUX.....	119
FORMFIT® HINGED LATERAL J.....	120
FORMFIT® TRACKER.....	121
FORMFIT® PRO KNEE.....	122
FORMFIT® PRO KNEE FLITE .....	124

<b>FOT &amp; ANKEL</b> .....	<b>125</b>
REBOUND® DIABETIC WALKER.....	126
DH OFFLOADING WALKER® .....	128
REBOUND® AIR WALKER.....	129
FORMFIT® WALKER AIR .....	131
FORMFIT® WALKER .....	132
AFO DYNAMIC .....	133
AFO LIGHT.....	135
AFO LEAF SPRING .....	136
REBOUND FOOT-UP® .....	137
FOOT-UP® .....	138
REBOUND® ANKLE BRACE.....	139
FORMFIT® ANKLE BRACE .....	140
FORMFIT® ANKLE WITH SPEEDLACE .....	141
FORMFIT® PRO ANKLE .....	142
FORMFIT® ANKLE STIRRUPS .....	144
EXOFORM® DORSAL NIGHT SPLINT .....	145
FORMFIT® NIGHT SPLINT.....	146
MPO 2000 .....	147
DH OFFLOADING POST-OP STYLE SHOE.....	148
SOFT TOP POST-OP SHOE.....	149
CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE .....	149
INLÄGG .....	150
<b>MATERIAL &amp; TILLBEHÖR</b> .....	<b>153</b>
ORTHOTIC SOCK, AFO/KAFO.....	154
COMPRESSION STOCKINET .....	155
CAST-RITE FRACTURE/ORTHOTIC SOCK.....	155
<b>CASCADE DAFO</b> .....	<b>157</b>
FAST FIT® CHIPMUNK® .....	158
FAST FIT® CRICKET® .....	158
JUMPSTART® LEAP FROG®.....	159
JUMPSTART® BUNNY®.....	159
JUMPSTART® KANGAROO® .....	160
<b>GENERELL INFORMATION</b> .....	<b>161</b>
ÖSSUR SERVICES.....	162
ANTECKNINGAR.....	164

## ÖSSUR OA SOLUTIONS

För bättre livskvalitet och rörlighet hos personer med artros.

Dessa produktlösningar har skapats under decennier av erfarenhet och utvecklats för att förbättra livskvaliteten hos människor som lever med osteoartrit genom att minska smärtan och öka rörligheten. Genom OA-expertis, ledarskap i innovation samt partnerskap med medicinska yrkespersoner, erbjuder vi övergripande, beprövade och effektiva behandlingsalternativ.

## UNLOADER®

Varumärket Össur Unloader® har blivit synonymt med osteoartrit-ortoser och representerar OA-lösningars teknologi som blivit industristandard och vars effektivitet har bevisats i fler än 15 kliniska studier.

Össur vill bibehålla sin ställning som innovationsledare för OA-lösningar genom att fortsätta att utveckla enkla men effektiva, kliniskt testade behandlingslösningar som förbättrar människors livskvalitet.



## ÖSSUR INJURY SOLUTIONS

För personer som återhämtar sig från frakturer och ligamentskador eller som är i behov av postoperativa behandlingslösningar.

Dessa produktlösningar har tagits fram efter årtionden av praktik och är utformade för att förbättra läkningen av frakturer och mjukvävnadsskador. Genom innovativt ledarskap, beprövade biomekaniska metoder och samarbete med läkare strävar vi efter att erbjuda omfattande och effektiva behandlingsalternativ.

Össurs lösningar för skador är globalt erkända, främst under varumärkesnamnen CTi®, Rebound® and Miami® och har utvecklats för att underlätta läkningsprocessen och förbättra människors livskvalitet.

Vår expertis inom lösningar för skador har sporrat oss att ta nästa steg framåt genom att utveckla indikationsspecifika produkter som är utformade för att optimera läkningsprocessen samtidigt som funktion och rörlighet upprätthålls. Dessa funktionella läkningsprodukter innefattar Össurs egenutvecklade teknik och är utformade för att förbättra kliniskt relevanta resultat.



FUNCTIONAL HEALING - WHERE  
MOBILITY MEANS RECOVERY.







# RIKTLINJER FÖR ÖSSURS SPINALA ORTOSER

Hög support
 
 Medelsupport
 
 Låg support
 
 Vid användning med JTO

Miami JTO®



Miami J® Select



Miami J®



Miami Jr®



Miami TLSO™ 456  
Miami TLSO™ 464



Miami Lumbar®  
Posteo




MP45  
Hyperextension Brace



Miami LSO™



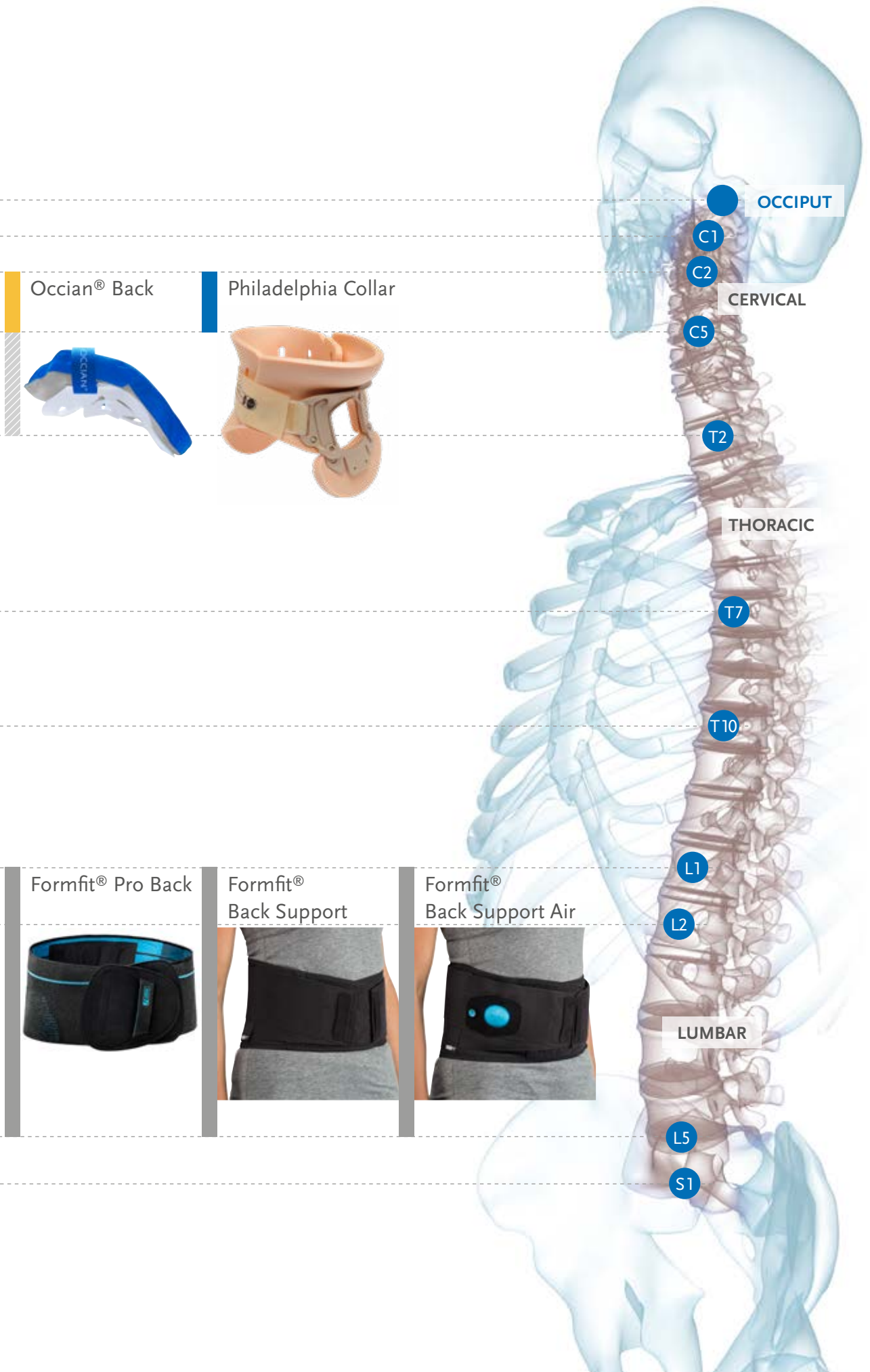

Occian® Back

Philadelphia Collar

Formfit® Pro Back

Formfit®  
Back Support

Formfit®  
Back Support Air

## MIAMI J®

Miami J har i ett flertal oberoende studier visat sig ge överlägsen immobilisering av halsryggraden. Den patenterade konstruktionen möter de specialiserade behoven hos alla patienter med cervikal-skador. Den utmärkta immobiliseringen, förebyggandet av trycksår och patientkomforten hos Miami J ger bättre patientacceptans och snabbare tillfrisknande.



### INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt



Video: Miami J - Clinician Fitting Instructions (6 min 36 sec)


### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antibakteriell Sorbatex-polstring som vid kliniska studier konstaterats förebygga bakterietillväxt, vilket ger bättre komfort och säkerställer patientacceptansen
- Designad med särskilt fokus på att minimera tryckpunkter i utsatta områden: Bakhuvud, haka, trapezius och nyckelben
- Knappar för bekväm justering mot bakhuvudet, sternalstödet kan tas bort när patienten ligger eller äter
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Sex storlekar baserade på kroppstypen säkerställer korrekt passform och optimal immobilisering

Välj kragstorlek baseras på patientens nackhöjd, inte kroppstorlek. Det baseras på kroppstypen och minskar felmarginalen vid utprovningen. Varje krage är utformad för den specifika kroppstypen vilket säkerställer optimal immobilisering. För barnstorlekar se Miami Jr.

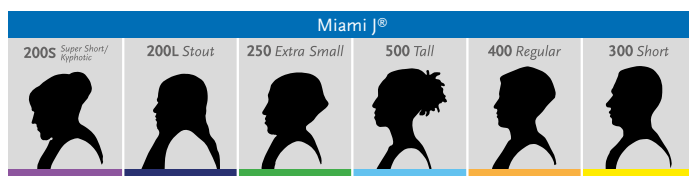

# MIAMI J<sup>®</sup>

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Krage Set*	Krage	Bakstycke	Framstycke
Super Short	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Stout	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200LBK	MJ-200LFRT
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250FRT
Short	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
Regular	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
Tall	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT

Miami J's fram- och bakstycke kan kombineras valfritt.  
Välj kragstorlek baserat på patientens nackhöjd, inte kroppstorlek.  
\*Varje set levereras med en extra polstringssats.

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

Storlek	Art.nr.
Super Short	MJP-100
Stout	MJP-200L
XS	MJP-250
Short	MJP-100
Regular	MJP-100
Tall	MJP-100

## MIAMI J® SELECT

Miami J Select-halskragen från Össur har flest möjligheter till höjdjustering på marknaden med en enda universell utformning som ger den komfort, immobilisering och kvalitet du förväntar dig av en Miami J-produkt. Miami J Select har en patenterad låsmekanism som var först på marknaden och som uppmuntrar patienten att följa instruktionerna. Den har dessutom antimikrobiell Sorbatex-polstring och bidrar aktivt till framgångsrika patientresultat.



### INDIKATIONER

Tillstånd som kräver allmän immobilisering av halsryggen, vilket kan omfatta:

- före och efter halsryggsoperation
- som försiktighetsåtgärd för traumapatienter med nackskador



Video: Miami J - Clinician Fitting Instructions (5 min 47 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel höjdjustering med en manipulerings säker låsmekanism - Left-to-lock: För till vänster för att låsa
- Antimikrobiell och biokompatibl Sorbatex-polstring förhindrar bakterietillväxt.
- Universell utformning som inte äventyrar immobilisering eller komfort.
- 7 exakta inpassningsstorlekar som kan finjusteras.
- Miami J®-inspirerat hakstöd.
- Anatomiskt utformad kragbaksida i ett stycke med Flex Edge® som minskar trycket på nacken.
- Enkel att ta på och av med det patenterade Reproducible Fit-alternativet.
- Intuitiva blå inställningspunkter för patienten som ger patienterna trygghet - Blue is You™.
- Förenklade komfortjusteringar med integrerat och patenterat bröstbensavlastningsvred.
- Stor trakealöppning - förbättrad funktion för IVA-patienter.
- Enkel att rengöra och lätt att byta polstringen.
- Röntgen- och CT-transparent, MR-säker.
- Kompatibel med Occian® Back & Miami JTO®-tillbehör.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### KRAGSET

Beskrivning	Art.nr.
Miami J Select- kragset. Innehåller: krage och extra polstringssats	MJSR-101

#### MIAMI J SELECT-KRAGE

Beskrivning	Art.nr.
Miami J Select-krage	MJS-101

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Extra polstringssats till Miami J Select	MJSP-101
Miami J Select Reproducible Fit-flikar (10-pack)	MJST-101

## MIAMI JTO® THORACIC EXTENSION

JTO Thoraxförlängning är framtagen i samråd med ledande kirurger, ortopedingenjörer och sjuksköterskor. Ortosen kan användas med samtliga Miami J halskragar när det krävs extra stabilitet i den cervikala övergången.



### INDIKATIONER

- Skador i nedre delen av halsryggraden och övre delen av bröstryggraden
- Immobilisering före och efter operation på nedre delen av halsryggraden och övre delen av bröstryggraden
- Andra tillstånd som kräver immobilisering av nedre delen av halsryggraden och/eller övre delen av bröstryggraden



Video: Miami J - Adjustments & Accessories (6 min 26 sec)  
Miami JTO från 3:35.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Patenterad konstruktion med "flytande ryggdal" som tillåter maximal immobilisering och eliminerar kompensatoriska rörelser
- Enkel att applicera utan verktyg
- Antibakteriell Sorbatex-polstring som vid kliniska studier konstaterats förebygga mikrotillväxt, vilket ger bättre komfort och säkerställer patientacceptansen
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beskrivning	Art.nr.
Miami JTO	MT-900
Miami JTO med polstringssats	MTR-900

Kompatibel med samtliga storlekar av Miami J® och P3 Miami Jr®  
Halskrage beställs separat

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Extra polstringssats	MTP-950

## OCCIAN® BACK

Bakstycket Occian Back är avsett för de särskilda krav som ställs av multitrauma-patienter på IVA. Occian Back finns i en universalstorlek. Polstringen är ett extra tryckavlastande viskoelastiskt material från Tempur®. Bakstycket underlättar vården av patienter med cervikala problem som löper stor risk för occipital kollaps.



### INDIKATIONER

- Patienter som inte har vaknat inom 24 - 48 timmar från intagningen
- Patienter med tidigare hudskador och/eller lacerationer i huvud/nacke/hals
- Brännskadepatienter som måste använda krage
- Elektiva kirurgipatienter som önskar ökad postoperativ komfort nattetid
- Patienter som måste vara sängliggande längre tider på grund av andnings-, neurologisk eller hemodynamisk instabilitet



Video: Miami J - Adjustments & Accessories (6 min 26 sec)  
[Occian Back från 3:05.](#)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Intuitech tryckavlastande minnesskum eliminerar risken för occipitala trycksår
- Upprätthåller stabilitet i halsryggraden
- Ger unik tryckavlastande komfort; ersätter vid behov bakstycket på Miami J halskrage
- Kliniska prover visar att Occian back praktiskt taget eliminerar occipitala trycksår utan att äventyra stabiliteten i halsryggraden
- Enkel att rengöra
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Occian Back -	ACB-100
Occian Back Junior	ACB-200

Kompatibel med samtliga storlekar av Miami J®, Miami J® Advanced och med Miami Jr®. Kragens frontpanel beställs separat.





## MIAMI Jr®

Barnhalskragen Miami Jr är designad för att passa barn upp till 12 år. Produktlinjen Miami Jr omspannar alla perioder i barnets tillväxt. Miami Jr är den enda kragen som tar hänsyn till skillnader i anatomin hos barn och vuxna.



### INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Innovativ krage avsedd för barn upp till 12 år
- Hudvänlig Sorbatex-polstring skyddar huden under långvarig användning
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ålder

### BESTÄLLNINGSGSINFORMATION

#### MIAMI JR

Storlek	Krage set*	Krage
0 - 6 månader	MJR-P0	MJ-P0
6 - 24 månader	MJR-P1	MJ-P1
2 - 6 år	MJR-P2	MJ-P2
6 - 12 år	MJR-P3	MJ-P3

\*OBS! Varje set levereras med en extra polstringssats.

### TILLBEHÖR

#### POLSTRINGSSATS

Storlek	Art.nr.
0 - 6 månader	MJP-P0
6 - 24 månader	MJP-P1
2 - 6 år	MJP-P2
6 - 12 år	MJP-P3

## PAPOOSE®

Papoose är en innovativ halskrage för de yngsta och mest krävande patienterna, nämligen nyfödda barn. Papoose omsluter och immobiliserar säkert och varsamt barnets huvud och rygg, medan luftvägarna hålls fria och ryggraden hålls i rät linje för att säkerställa bästa möjliga resultat.



### INDIKATIONER

- Immobilisering av ryggraden
- Spinala frakturer

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Immobiliserar säkert och varsamt barnets huvud och rygg, medan luftvägarna hålls fria och ryggraden hålls i rät linje
- Utformningen av det occipitala stödet skyddar mot positionell plagiocefali
- Immobilisering av halsryggraden hos barn upp till 3 månader
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal/en storlek

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### PAPOOSE

Beskrivning	Art.nr.
Papoose utan P0 framstycke	PO-100
Papoose utan P0 framstycke med ersättnings polstring	POR-100
Papoose med P0 framstycke	PA-100
Papoose med P0 framstycke med ersättnings polstring	PAR-100

### TILLBEHÖR

#### POLSTRINGSSATS

Beskrivning	Art.nr.
Papoose och P0 framstycke polstringssats	PAP-100
Papoose polstringssats	POP-100

## PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR

Philadelphia-halskragar har varit en industristandard i årtienden. Philadelphia Adjustable har samma konstruktion och material som orginalet dock med den möjligheten att höjden kan justeras.

### INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar i omkrets och höjd; en storlek passar de flesta
- Anatomiskt format Plastazote®-skumplast (latexfritt, icke-toxiskt och hypoallergent för att minimera hudirritation) ger utrymme för cervikala vener  
Totalt stöd av halsryggradens böjning bibehåller halsryggraden i korrekt ställning
- Vattenavstötande, lämplig för bad och vattenterapi
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universa - en storlek




## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Philadelphia Trakeotomikrage, justeringsbar	PHP-AA

# PHILADELPHIA® TRACHEOTOMY COLLAR

Philadelphia Tracheotomy Collar är en sjukhus- och rehabiliteringskrage som är utformad för att upprätthålla neutral inriktning av halsryggen efter en nackskada. Kragen har en stor trakealöppning, vilket tillåter halspulsövervakning och akut trakeotomi.

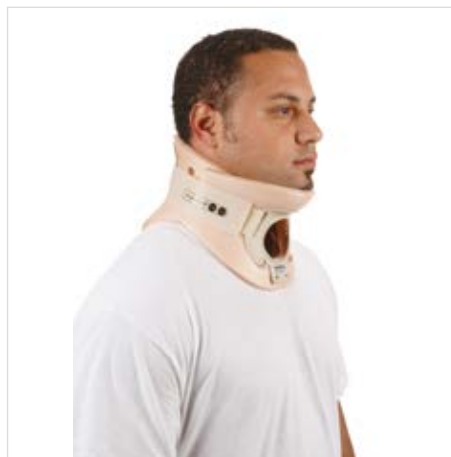

## INDIKATIONER

- Tillstånd som kräver immobilisering av halsryggraden, såsom:
  - Pre och postoperativt
  - Posttraumatiskt

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Latexfritt, giftfritt och hypoallergent Plastazote® skummaterial minskar risken för hudirritation
- Totalt stöd av halsryggradens böjning bibehåller halsryggraden i korrekt ställning
- Vattenavstötande, lämplig vid bad och vattenterapi

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets nacke, höjd mellan skuldra och haka

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

STORLEK	OMKRETS RUNT NACKEN	HÖJD 6 CM	HÖJD 8 CM	HÖJD 11 CM	HÖJD 13 CM
Barn	20 - 28 cm	PHP-TP	Barn	20 - 28 cm	PHP-TP
S	25 - 33 cm	PHP-T2S	PHP-T3S	PHP-T4S	PHP-T5S
M	33 - 41 cm	PHP-T2M	PHP-T3M	PHP-T4M	PHP-T5M
L	41 - 48 cm	PHP-T2L	PHP-T3L	PHP-T4L	PHP-T5L
XL	> 48 cm	PHP-T2XL	PHP-T3XL	PHP-T4XL	PHP-T5XL

Storlek	Omkrets runt nacken	Art.nr.
Infant	15 - 20 cm	PHP-TI
Paediatric	20 - 28 cm	PHP-TP

## TILLBEHÖR

### PHILADELPHIA COOLMAX POLSTRING

Storlek	Omkrets runt nacken	Art.nr.
Barn	20 - 28 cm	PHP-LCP
S	25 - 33 cm	PHP-LCS
M	33 - 41 cm	PHP-LCM
L	41 - 48 cm	PHP-LCL

### PHILADELPHIA TRACHEOTOMY TILLBEHÖR

Storlek	Stabilizer
Vuxen	PHP-OS
Barn	PHP-OSP

## NECLOC®

### INDIKATIONER

- Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt utformad tvådelad halskrage som säkerställer flexion under applicering
- Fem storlekar som utgår från kroppstyp gör storleksvalet enkelt
- Minimal manipulering av patienten under applicering
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent


### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Valet av storlek baseras på fem olika kroppstyper; säkerställer god passform och optimal immobilisering



## STORLEKAR

- Fenotypstorlekssystemet underlättar storleksvalet och minskar avsevärt felmarginalen vid inprovning på patienten. Varje krage har biotekniska, storleksspecifika fram- och bakdelar som är avsedda att fungera tillsammans för att säkerställa optimal immobilisering. För barnstorlekar, se NecLoc Kids.

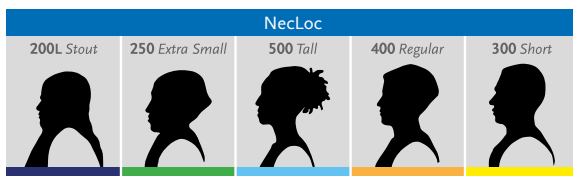

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek*	Art.nr.
Stout	NL-200EL
XS	NL-250E
S	NL-300E
M	NL-400E
L	NL-500E

\* Se storleksöversikt Miami J.

## NECLOC® KIDS

### INDIKATIONER

- Posttraumatiskt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt utformad tvådelad halskrage som säkerställer flexion under applicering
- Tre barnstorlekar
- Minimal manipulering av patienten under applicering
- Möter de krav som ställs av det växande barnets unika anatomi
- Röntgen-, MRI- och CT-transparent

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ålder



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Art.nr.
0 - 2 år	NL-P1
2 - 6 år	NL-P2
6 - 12 år	NL-P3

## MIAMI LSO™

Miami LSO är en lättanvänd ländryggsortos för postkirurgisk immobilisering, smärtlindring och skydd av skadade ligament och muskler. Dess anatomiska form följer ryggradens konturer och ger immobilisering och patientkomfort. Ortosen kan byggas i moduler, vilket möjliggör nedtrappning av immobiliseringen under rehabiliteringsprocessen, samt har band som enkelt kan justeras efter behov.



## INDIKATIONER

Skador/diagnoser som kräver immobilisering av lumbala delen av ryggen såsom:

- Stabila, icke-dislokerade spinala fakturer (L1-L5)
- Spinalstenos
- Diskbräck
- Degenerativa spinala sjukdomar
- Spondylolisthesis
- Spondylolysis
- Kontraindikation: Instabila dislokerade spinala frakturer



[Video: Miami LSO - Clinician Quick-Fit Instructions](#)  
(2 min 22 sec)

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidigt, ventilerat material
- Beprövat dubbeldragssystem med längdjustering
- Injusteringsverktyg för enkel och förbättrad anpassning direkt på användare
- Universalbälte som passar midjemått upp till 178 cm
- Formade posteriora paneler i stl S-XL för precis, anatomisk passform
- Quick-Fit handtag

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja

# MIAMI LSO™

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### MIAMI LSO BÄLTE

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
6" Universal (Slim)	66 - 127 cm	MLSO-1E
8" Universal (Standard)	66 - 127 cm	MLSO-2E

### STANDARD POSTERIOR PANEL

Storlek	Art.nr
Standard	MLSO-P56

Standard posterior panelen rekommenderas alltid när ingen annan posterior panel används.



### CONTOURED POSTERIOR PANEL

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
S	66 - 86 cm	MLSO-P11
M	86 - 96 cm	MLSO-P21
L	96 - 127 cm	MLSO-P31
XL	127 - 167 cm	MLSO-P41



### CONTOURED POSTERIOR PANEL MED LATERAL SUPPORT

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
S	66 - 86 cm	MLSO-P12
M	86 - 96 cm	MLSO-P22
L	96 - 127 cm	MLSO-P32
XL	127 - 167 cm	MLSO-P42



## TILLBEHÖR

### ANTERIOR PANEL

Storlek	Art.nr
6" Panel (Slim)	MLSO-PA6
8" Panel (Standard)	MLSO-PA8



### ÖSSUR FIT TOOL

Beskrivning	Art.nr
Össur Fit Tool	B-040100000



### BÄLTESFÖRLÄNGNING

Storlek	Omkrets midja	Art.nr
6" (Slim) Bältesförlängning*	66 - 177 cm	MLSO-1EXT
8" (Standard) Bältesförlängning*	66 - 177 cm	MLSO-2EXT

\* Bältesförlängning kan enbart användas i kombination med Miami LSO bälte.



## MIAMI TLSO 464

Miami TLSO från Össur är svaret på våra kunders och ortoped-ingenjörers behov, med förenklade förberedelser utan att behöva göra avkall på passform eller prestanda. Denna lättanvända förmonterade Miami TLSO-ortosen är en tre-i-ett-lösning.

Användning: Kan enkelt appliceras över axeln eller under armen och på- och avtagningen förenklas ytterligare tack vare de praktiskt placerade snabbspännena.

Justerbarhet: Med universalbältesdesignerna kan du ställa in patientens bälteslängd för en mer exakt dimensionering.

Komfort: Utformningen är gjord för att passa anatomin och den anatomiskt konturerade designen förstärker ryggraden och patientens komfort maximeras.

Lätt att använda: Miami TLSO-ortosen kräver minimala förberedelser och är konstruerad för att ge optimal patientkomfort.



## INDIKATIONER

Tillstånd som kräver kraftig immobilisering av bröstkorgs- och ländryggsregionen såsom:

- Postoperativ immobilisering
- TLSO för spinalt stöd upp till T7
- Spinal stenosis
- Diskbräck
- Degenerativa ryggradsfrakturer
- Spondylolistes
- Spondylolys



Video: Miami TLSO 464 -  
Clinician Fitting Instructions  
(5 min 32 sec)

## KONTRAIKATIONER

- Instabila, förskjutna frakturer

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen komfort och enkel på- och avtagning.
- Färdigmonterad för enkel inpassning.
- För personer mellan 155 och 193 cm
- Bakre bröstförlängning med ergonomiskt axillärband.
- Kan bytas mot en LSO senare under rehabiliteringen.
- Främre bröstförlängningsdel som justeras med ett enda tryck, med enkelt eller dubbelt gångjärn.
- En universalmodell i en storlek eller individanpassad anatomisk design.
- Förbättrad komfort och immobilisering med flera bandalternativ och avtagbara ankare.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät omkretsen på bälten mitt emellan de nedersta revbenen och den övre höftbenskammen. Stående.

Storlek	Midjemått i cm
S	66 - 86
M	86 - 96
L	96 - 127
XL	127 - 167
Universal	66 - 127

\* För omkretsar på 127 - 167 cm krävs en bältesförlängning

## MIAMI TLSO 464

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### ATE/PTE, LORDOTISK

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-2351
S	MTLSO-2111
M	MTLSO-2121
L	MTLSO-2131
XL	MTLSO-2141

\*Icke-lateral och icke-lordotisk version finns tillgänglig på begäran

#### ATE/PTE, LORDOTISK, SMAL

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-1351
S	MTLSO-1111
M	MTLSO-1121
L	MTLSO-1131
XL	MTLSO-1141

### ANDRA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
5 mm insexnyckel	MTLSO-0004
Tillbehörssats för axillärband	MTLSO-0003
Snabbinpassningsverktyg	B-040100000
Bältesförlängning, standard (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-2EXT
Bältesförlängning, smal (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-1EXT

## MIAMI TLSO 456

Miami TLSO 456 från Össur är svaret på våra kunders och ortoped-ingenjörers behov, med förenklade förberedelser utan att behöva göra avkall på passform eller prestanda. Den här lättanvända och förmonterade Miami TLSO-ortosen ger samma bekvämlighet som en universaldesign i en storlek eller en individanpassad anatomisk design.

Användning: Intuitiva blå inställningspunkter som ger patienterna trygghet - Blue is You™.

Justerbarhet: Med universalbältesdesignerna kan du ställa in patientens bälteslängd för en mer exakt dimensionering. Värmeformbara posteriora paneler möjliggör en anpassad passform och den modulära designen möjliggör stegvis minskad behandling med stöd för LSO.

Komfort: Med Miami LSO™ Advanced Compression-remskiva med avkänningsbar ländryggskompression och en anatomisk konturdesign som förstärker ryggraden samtidigt som du maximerar patientens komfort.

Enkel användning: Miami TLSO-ortos med axelband som är enkla att använda, minimal förberedelse och konstruktion för att ge optimal patientkomfort.



## INDIKATIONER

Tillstånd som kräver kraftig immobilisering av bröstkorgs- och ländryggsregionen såsom:

- Postkirurgisk immobilisering
- TLSO för spinalt stöd upp till T7
- Spinal stenos
- Diskbräck
- Degenerativa ryggradsfrakturer
- Spondylolistes
- Spondylolys



Video: Miami TLSO 456 -  
Clinician Fitting Instructions  
(5 min 32 sec)

## KONTRAINDIKATIONER

- Unstable, displaced fractures

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Överlägsen komfort och enkel på-/avtagning (jämfört med Miami Lumbar TLSO).
- Färdigmonterad för enkel inpassning.
- För personer mellan 155 och 193 cm.
- Kan bytas mot en LSO senare under rehabiliteringen.
- En universalmodell i en storlek eller individanpassad anatomisk design.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Midjemått

Storlek	Midjemått i cm
S	66 - 89
M	86 - 96
L	96 - 127
XL	127 - 167
Universal	66 - 127

\* För omkretsar på 127 - 167 cm krävs en bältesförlängning

# MIAMI TLSO 456

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### PTE, LORDOTISK

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-2352
S	MTLSO-2112
M	MTLSO-2122
L	MTLSO-2132
XL	MTLSO-2142

### PTE, LORDOTISK, SMAL

Storlek	Art.nr.
Universal	MTLSO-1352
S	MTLSO-1112
M	MTLSO-1122
L	MTLSO-1132
XL	MTLSO-1142

\*Icke-lateral och icke-lordotisk version tillgänglig på begäran.

## ANDRA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Snabbinpassningsverktyg	B-040100000
Bältesförlängning, standard (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-2EXT
Bältesförlängning, smal (Rekommenderas för midjemått på 127 - 167 cm.) Passar Miami LSO i storlek XL.)	MLSO-1EXT

## MIAMI LUMBAR® POSTEO

Miami Lumbar Posteo ger smärtlindring vid frakturer i ryggraden och förkortar rehabiliteringen. Gördeln har utvecklats med särskilt fokus på komfort och patientacceptans. Det lumbala kompressionssystemet dämpar smärtan genom aktiv avlastning av ryggraden. Samtidigt förbättras passformen, vilket underlättar användningen och höjer acceptansen. Miami Lumbar Posteo är en innovativ ryggördel som är lätt att ta på och behaglig att bära.



### INDIKATIONER

- Smärta orsakad av stabila kompressionsfrakturer i ryggraden



Video: Miami Lumbar Posteo - Clinician Custom-Fit Modifications (3 min 57 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Aktiv avlastning genom thorakal förlängningsdel och lumbal kompression
- Integrerat kompressionssystem för enkel åtdragning och optimal passform
- Trimbara, justerbara axelband för optimal stabilitet
- Kallformbar posterior thorakal förlängning (PTE) i aluminium
- Extra polstring runt aluminiumskenan skyddar huden

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Ryggens längd från korsbenets övre kant till kota C7 längs ryggradens böjning

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### MIAMI LUMBAR POSTEO

Storlek	PTE längd	Längd, rygg	Omkrets höft	Art.nr
XS	36 cm	37 - 44 cm	66-76 cm	LMB-POSTEO-XS
S	43 cm	44 - 51 cm	76-86 cm	LMB-POSTEO-SM
M	49 cm	49 - 56 cm	86-96 cm	LMB-POSTEO-MD
L	56 cm	55 - 61 cm	96-106 cm	LMB-POSTEO-LG

### TILLBEHÖR/TILLVAL

Beskrivning	Art.nr
Rempolstring	LMB-POSTEO ST PD

### STORLEK

Observera att Miami Lumbar Posteo har ett universellt länderbälte som kan kapas till lämplig storlek.

Omkrets midja	Storlek bälte
66 - 76 cm	XS
76 - 86 cm	S
86 - 96 cm	M
96 - 106 cm	L
106 - 116 cm	XL

Omkrets midja	Storlek bälte
116 - 127 cm	2XL
127 - 137 cm	3XL
137 - 147 cm	4XL
147 - 157 cm	5XL
157 - 167 cm	6XL

# MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE

## INDIKATIONER

- Post-operativ
- Post-trauma

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Lättviktsram i aluminium
- Aluminiumbyglar med mjuk polstring för bästa komfort
- Bröstbygelns vinkel kan enkelt justeras för att optimalt ligga an mot sternum (tandad skiva för vinkeljustering i steg om 5°)
- Den thorakolumbala pelotten kan anläggas antingen vertikalt eller horisontalt
- Den unika, fjädrande bäckenbygel följer hela tiden patientens växlingar mellan stående och sittande – bygel rör sig, inte ortosen, och säkerställer därmed ortosens funktion
- Glidspänne i stål
- Polstrad bäckenbygel, kan fixeras



## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets höft

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets höft	Min/Max längd	Art.nr
S	60 - 75 cm	40 - 44 cm	MP45/S
M	79 - 90 cm	43 - 47 cm	MP45/M
L	90 - 105 cm	47 - 51 cm	MP45/L
L/Short	90 - 105 cm	43 - 47 cm	MP45/LS
XL	105 - 115 cm	50 - 54 cm	MP45/XL
XL/Short	105 - 115 cm	47 - 51 cm	MP45/XLS

## FORMFIT® PRO BACK

Össur Formfit® Pro Back ger lindring till personer som lider av smärta och sträckningar i ländryggen. Våra bälten tillverkas med vår dynamiska 3D MotionTech™-vävteknik, och är därför överlägsna när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga. I den patenterade ryggpaneldesignen används vår StayBilizer™-teknik som ger optimal följsamhet och passform, och smart placerade fingeröglor gör det enkelt att ta på sig dem. SmartPad™ ger punktstöd och vaddering, och kan tas bort om så önskas.



MotionTech™



StayBilizer™



SmartPad™



CoolVent™

### INDIKATIONER

Ländryggstillstånd som kan förbättras av kompression och begränsning av stora rörelser, t.ex.:

- Smärta i ländryggen (lumbago)
- Lumbosakral stukning/sträckning
- Degenerativ ledsjukdom


### KONTRAIKATIONER

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- Löstagbar SmartPad™ i ländryggen för punktstöd och vaddering
- Lätta, formbara stöd i aluminium formas efter Ländryggen

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

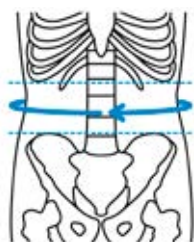

Mät omkretsen runt bälten mitt emellan de nedersta revbenen och höftbenskammen. Stående.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### SVART

Storlek	Omkrets midja	Art.nr.
XS	70 - 80 cm	FP500001
S	80 - 90 cm	FP500002
M	90 - 100 cm	FP500003
L	100 - 115 cm	FP500004
XL	115 - 130 cm	FP500005

## FORMFIT® BACK SUPPORT AIR

Formfit Back Support Air ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen. Det integrerade luftsystemet är intuitivt och behändigt placerat så att justeringar kan göras då kroppens påfrestningar förändras under dagen. Omlottdesignen förbättrar kompressionen samtidigt som slitstarka fingeröglor gör det lätt att sätta på ortosen. Formfit Back Support är tillverkat av ett ventilerande material och ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen.



### INDIKATIONER

Ländryggstillstånd som kan förbättras av begränsning av stora rörelser, till exempel:

- Muskulär ryggsmärta
- Lumbosakrala sträckningar
- Kronisk ländryggssmärta
- Ischias

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Luftsystem med låg profil som är lätt att använda
- Nätpaneler och ventilationshål ökar ventilationsförmågan och förbättrar komforten
- Överlappande dubbla dragband ger extra stöd för ländryggen och buken
- Flexibla fjädrar ger optimalt stöd för ländryggen och buken
- Gripband förhindrar glidning
- Justerbar luftblåsa ger anpassad passform och fokuserad kompression för ländryggen

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets midja	Art.nr.
S	63 - 76 cm	209133
M	76 - 86 cm	209135
L	86 - 97 cm	209137
XL	97 - 107 cm	209138
XXL	107 - 142 cm	209139

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Hot/Cold Therapy Gel pad	GB28



## FORMFIT® BACK SUPPORT

Formfit Back Support är tillverkat av material med ventilationsförmåga och ger kompression och stöd för personer som lider av smärta i ländryggen. Omlottdesignen förbättrar kompressionen samtidigt som de slitstarka fingeröglorna gör det lätt att sätta på ortosen.

### INDIKATIONER

- Muskulär ryggsmärta
- Lumbosakrala sträckningar
- Kronisk ryggsmärta
- Ischias

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Antiglidsystem som reducerar ortosrörelse
- Dubbla överlappande dragband för förbättrad kompression
- Ortosen har insydda handtag för enklare påtagning
- Behandlingen kan kompletteras med värmande/kylande effekt, se tillbehör

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets midja	Art.nr.
S	64 - 76 cm	209143
M	76 - 86 cm	209145
L	86 - 97 cm	209147
XL	97 - 107 cm	209148
XXL	107 - 142 cm	209149
XXXL	142 - 152 cm	209151

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Hot/Cold Therapy Gel Pad	GB28

# ORTOSLINNE

Kan användas för alla typer av spinala ortoser, body jackets etc. Tillverkad i rundstickad Coolmax/Lycra (vitt) och X-Static/Lycra (grått), helt utan sömmar, vilket tillsammans garanterar hög komfort och god passform. Båda dessa material från Knit-Rite ger effektiv bekämpning av dålig lukt och bakterier. Elasticiteten gör att linnet följer kroppens konturer effektivt och veckar sig minimalt.

- Alla modeller är fria från latex.
- Finns både med v-hals och rund halsringning, med och utan vingar.
- Finns nu även i ny, tunnare Lightweight variant i både vitt och silver/X-Static.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets midja



Ortoslinne, rundad hals #352952

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### ORTOSLINNE, RUNDAD HALS

VIT

Storlek	Omkrets Midja	Längd	Coolmax
S	35 - 45 cm	40 cm	352952
M	45 - 60 cm	45 cm	352953
L	55 - 75 cm	50 cm	352954
XL	65 - 95 cm	60 cm	352955

### ORTOSLINNE MED VINGAR, V-HALS

VIT

Storlek	Omkrets Midja	Längd	Coolmax
S	35 - 45 cm	40 cm	352972
M	45 - 60 cm	45 cm	352973
L	55 - 75 cm	50 cm	352974
XL	65 - 95 cm	60 cm	352975

### ORTOSLINNE LIGHTWEIGHT, V-HALS

VIT

Storlek	Omkrets Midja	Längd	Coolmax
S	35 - 45 cm	40 cm	352922
M	45 - 60 cm	45 cm	352923
L	55 - 75 cm	50 cm	352924
XL	65 - 95 cm	60 cm	352925



Ortoslinne med vingar #352972

HÖFT

HÖFT  
BRACING & SUPPORT



## REBOUND® HIP

Låg profil och lätt konstruktion som ger patientkomfort och skapar förutsättningar för hög compliance. Ortosen ger en kontrollerad kraft och effektiv, funktionell ROM-begränsning för både extension/flexion samt abduction/adduktion.



### INDIKATIONER

- I preventivt syfte när det finns risk för höftdislokation
- Konventionell behandling efter dislokation/reduktion
- Postoperativt efter (total) höftartroplastik
- Postoperativt efter (total) höftartroplastikrevision
- Postoperativ höftartroskopi
- Postoperativt efter artroskopi för impingement i höften (FAI, femoroacetabular impingement)
- Postoperativt efter operation av gluteus maximus
- Postoperativt efter operation av hamstringsmusklerna
- Inoperabla höftabnormiteter



Video: Rebound Hip - Clinician Fitting Instructions Modifications (5 min 26 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ortos med låg profil och låg vikt som ger följsamhet och patientkomfort.
- Snabblås för enkel justering av rörligheten för optimal återhämtning efter operation.
- Enkelt att anpassa längden med teleskopfunktion på ramen.
- Justerbar ROM-led ger adduktion/abduktion från 0° till 10°, 20° eller 30° (tillval)

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vid höftbenskammen
- Avstånd från trochanter major till mitten av patella

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### REBOUND HIP

Beskrivning	Vänster	Höger
Rebound Hip	980130RB	980135RB
Rebound Hip med justerbar ROM-led	980120RB	980125RB

Ram, Polstring: Universal anpassning till 122 cm höftomkrets

# REBOUND® HIP

---

## TILLBEHÖR

---

Beskrivning	Art.nr.
Bältesförlängare (anpassningsbar för 122 - 170 cm höftomkrets)	980121RB
Rotationsrem	RHK-100024
Inpassningsverktyg	B-040100000

## UNLOADER® HIP

Unloader Hip är utformad för att minska smärta genom optimerad avlastning och proprioceptiv kontroll för patienter med mild till måttlig artros i höftleden. Bidrar till större stabiliteten i höften och förbättrar rörligheten.



### INDIKATIONER

- Mild till måttlig artros i höftleden
- Tillstånd där patienten har nytta av korrigerande av höftens position och/eller kompression kring trochanter major.



Video: Unloader Hip - Clinician Fitting Instructions (5 min 59 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamic Rotation Straps-remmarna med SmartDosing-ratt ger användaren möjlighet att justera den externa rotationskraften individuellt för optimal smärtlindring
- Lätt att ta på och av tack vare smart fastsättningssystem och blixtlås
- Kompressionssystemet förbättrar proprioceptionen och känslan av säkerhet
- Andas och har bra passform tack vare lycra av bästa kvalitet


### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Höftomkretsen vid främre övre tarmbenskammen. Se ritning.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### UNLOADER HIP

Storlek	Höftomkrets	Kvinnor	Män
S	80 - 88 cm	B-465350030	B-465350031
M	88 - 96 cm	B-465350032	B-465350033
L	96 - 104 cm	B-465350034	B-465350035
XL	104 - 114 cm	B-465350036	B-465350037
XXL	114 - 124 cm	B-465350038	B-465350039

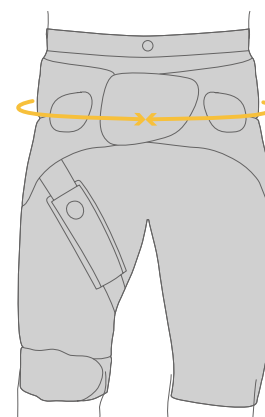

\*Mät höftomkretsen vid främre övre tarmbenskammen.

# UNLOADER® HIP

## TILLBEHÖR/TILLVAL

### UTBYTES BYXOR

Beskrivning	Art.nr.
Unloader Hip Men's S Trousers	B-465350078
Unloader Hip Men's M Trousers	B-465350080
Unloader Hip Men's L Trousers	B-465350082
Unloader Hip Men's XL Trousers	B-465350084
Unloader Hip Men's XXL Trousers	B-465350086
Unloader Hip Women's S Trousers	B-465350077
Unloader Hip Women's M Trousers	B-465350079
Unloader Hip Women's L Trousers	B-465350081
Unloader Hip Women's XL Trousers	B-465350083
Unloader Hip Women's XXL Trousers	B-465350085

## ÖVRIGA TILLBEHÖR


Beskrivning	Art.nr.
Rotation strap kit	B-465350064
Washbag kit	B-465350065
Trochanter pad kit	B-465350066
Thigh strap kit S	B-465350067
Thigh strap kit M	B-465350068
Thigh strap kit L	B-465350069
Thigh strap kit XL	B-465350070
Thigh strap kit XXL	B-465350071
Bilateral kit S	B-465350072
Bilateral kit M	B-465350073
Bilateral kit L	B-465350074
Bilateral kit XL	B-465350075
Bilateral kit XXL	B-465350076





## AXEL, ARM & HAND

---

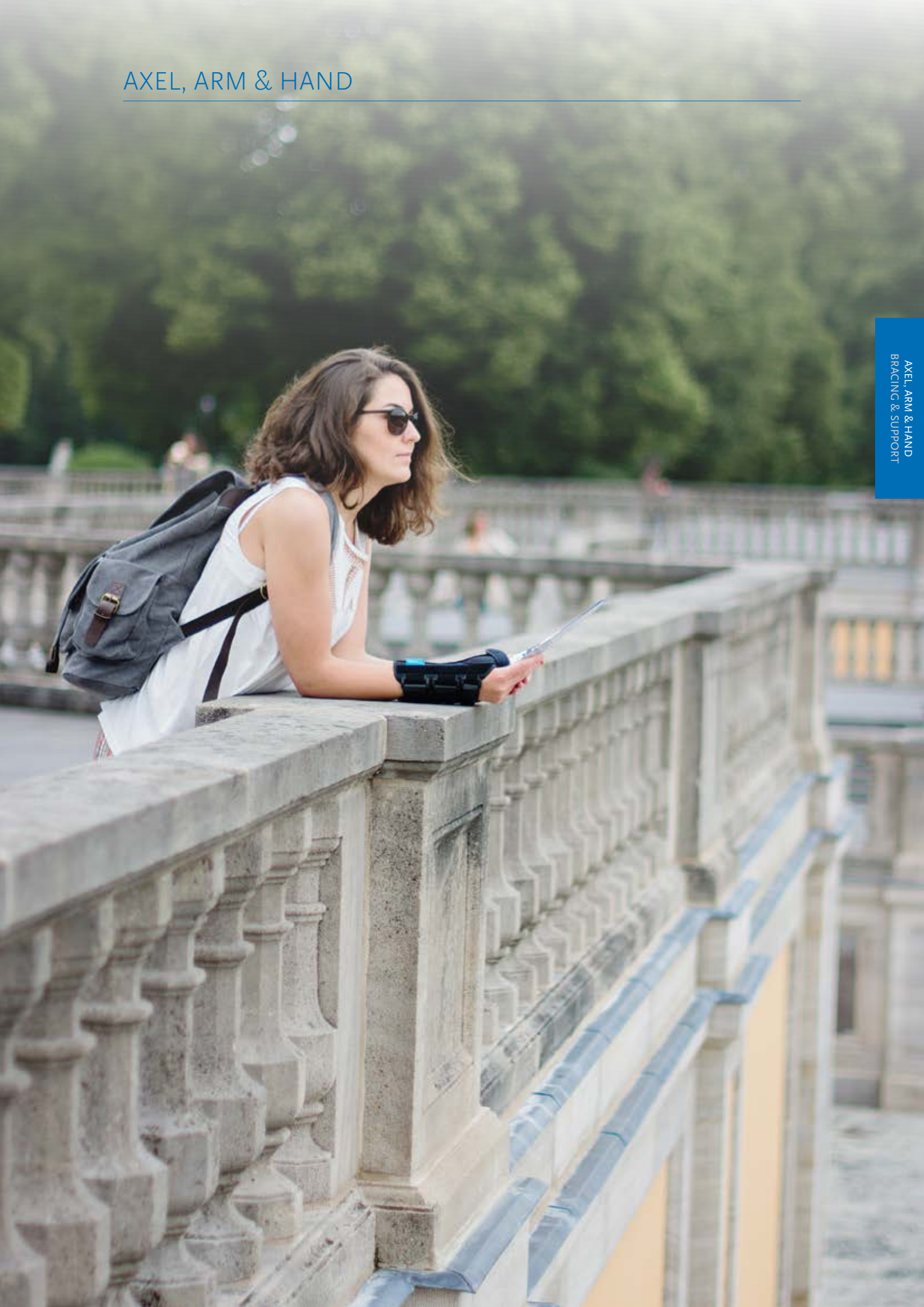

AXEL, ARM & HAND  
BRACING & SUPPORT

# FORMFIT® SHOULDER

FormFit Shoulder är en axelortos som är utformad för att ge immobilisering efter axelskada eller axel-operation. Den smidiga designen och goda andnings-Förmågan ger överlägsen komfort samtidigt som ortosen är enkel att använda. Precis som föregångaren SmartSling®, ger Formfit Shoulder abduktion (när abduktionskudden används) eller utåtrotation (när utåtrotionskudden används) av axeln.

Armhålekudden (finns som tillval) fördelar vikten över en större yta och minskar trycket mot armbågsnerven.

## INDIKATIONER

- Efter reparation av rotatorkuffskador
- Efter Bankartoperation
- Efter kapselplastik
- Efter glenohumeral dislokation/subluxation
- Efter sträckning/reparation av skada i mjukdelar
- Instabilitet/skada i axeln
- Postkirurgisk rehabilitering

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Snabblås
- Avlastningsrem
- Tumögla i universalmodell

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mått från olekranon till änden av den slutna näven



Formfit Shoulder

Armhålekudde



Video: Formfit Shoulder Brace with Abduction - Clinician Fitting Instructions (1 min 31 sec)

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### FORMFIT® SHOULDER (MED ABDUKTIONSKUDDE)

Storlek	Mått från olekranon till änden av den slutna näven	Art.nr.
S	upp till 29 cm	SSS
Regular	29 - 40 cm	SSR
L	40 - 44,5 cm	SSL

### FORMFIT® SHOULDER (UTAN ABDUKTIONSKUDDE)

Storlek	Mått från olekranon till änden av den slutna näven	Art.nr.
S	upp till 29 cm	SSS-SO
Regular	29 - 40 cm	SSR-SO
L	40 - 44,5 cm	SSL-SO

## TILLBEHÖR

### UTÅTROTATIONSKIT

Storlek	Längd	Art.nr.
S	upp till 29 cm	SSS-ER
M	29 - 40 cm	SSR-ER
L	40 - 44,5 cm	SSL-ER

Beskrivning	Art.nr.
Armhålekudde	SSAXP

## PREMIUM SHOULDER IMMOBILIZER

### INDIKATIONER

- Efter skador och postoperativt i axel/skuldra

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kontrollerar effektivt abduktion och rotation
- Humerusmanchett, handledsmanchett och axelband kan placeras i önskat läge för maximal komfort och passform

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Art.nr.
Premium Shoulder Immobiliser	0380
Premium Shoulder Immobiliser XL	0380XL

## AXELLÅS

### INDIKATIONER

- Efter skador eller postoperativt i axel/skuldra

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Humerusmanchett, handledsmanchett och axelband kan placeras i önskat läge för maximal komfort och passform.
- Kontrollerar effektivt abduktion och rotation.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt bröstet.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets runt bröstet	Art.nr.
S	60 - 80 cm	4097-03
M	80 - 110 cm	4097-05
L	110 - 140 cm	4097-07

## AXELLÅS TVÅDELAD

### INDIKATIONER

- Skulderskador
- Postoperativt

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Bekväm ortos för patienter som ska ha armen intill kroppen

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mått tas runt bröstet inkl. överarm



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Mått tas runt bröstet inkl. överarmen	Art.nr.
S	60 - 80 cm	4096-03
M	80 - 95 cm	4096-05
L	95 - 115 cm	4096-07
XL	115 - 145 cm	4096-08

## FRONT CLOSURE CLAVICLE SUPPORT

### INDIKATIONER


- Nyckelbensfrakturer och dislokationer
- Hållningsstöd
- Skador i mjukdelar

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Fastsättning framtill för enkel på-/avtagning

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt bröstet

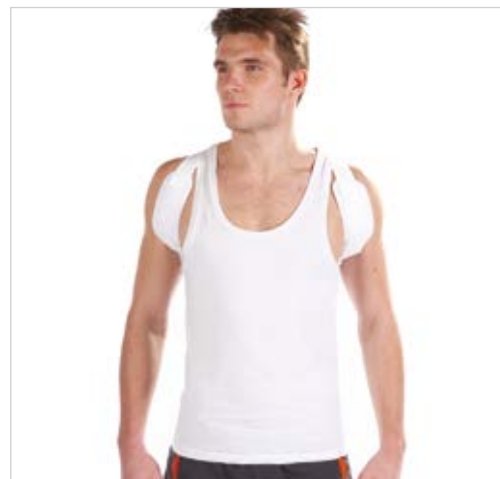

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets bröstorg	Art.nr.
XS	51 - 61 cm	205032
S	61 - 76 cm	205033
M	76 - 91 cm	205035
L	91 - 107 cm	205037
XL	107 - 122 cm	205038
XXL	122 - 137 cm	205039

## FORMFIT® PRO ELBOW

Össur Formfit® Pro Elbow ger lindring vid smärta i armbågen. Den här kompressiva 3D-armbågsleeven tillverkas med vår MotionTech™-teknik och har två integrerade SmartPads™ vid armbågen för punktstöd och vaddering. RadialStrap™ ger ytterligare kompression och stöd.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

### INDIKATIONER

Armbågsbesvär som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Smärta och svullnad i armbågen
- Medial och lateral epikondylit (golfarmbåge respektive tennisarmbåge)


### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3D MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- SmartPads™ vid armbågen för punktstöd och vaddering
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och mer säker applicering
- RadialStrap™ för extra kompression och stöd

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

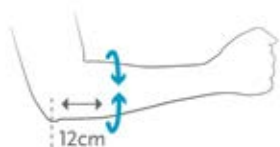

Mät armens omkrets 12 cm nedanför armbågen.

### BESTÄLLNINGSGRUPP

Storlek	Omkrets armbåge	Art.nr.
XS	17 - 20 cm	FP300001
S	20 - 23 cm	FP300002
M	23 - 26 cm	FP300003
L	26 - 29 cm	FP300004
XL	29 - 32 cm	FP300005



## REBOUND® POST-OP ELBOW

Rebound® Post-Op Elbow kombinerar intuitiva funktioner för ortopedingenjörer och användare med en design som syftar till att förbättra den post-operativa upplevelsen. Genom att kombinera drop-lock leden och fyra teleskopiska manchetter, kan individuella post-op-protokoll lätt följas. Rebound Post-Op Elbow är användarvänlig och lättast i sitt slag. Ortosen finns i höger/vänster passform med formbara stabiliserande manchetter. De blå inställningspunkterna är till för att förenkla hanteringen för patienterna.



### INDIKATIONER

Indikationer som kräver immobilisering av armbågen och/eller begränsning av rörelseomfånget. Detta kan omfatta:

- Stabila frakturer i armbågen, distala humerus, proximala radius eller ulna
- Sen- och ligamentskador eller -kirurgi
- Rekonstruktion av kollateralligament
- Hyperextension i armbågen
- Tricepsenekirurgi
- Kroniska armbågsskador
- Lindring vid tennisarmbåge

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Konstruerad till att vara den lättaste ortosen på marknaden
- Teleskopiska paddlar kan flyttas efter individuell längd så att operationsområdena hålls fria
- Enkel inlärning för användare med intuitiva inställningspunkter för patienten, inklusive Blue is You™-spännen och numererat remsystem
- Drop-Lock-gångjärn ger ett säkert rörelseomfång med stötdämpande dragjusteringsstopp och valfri ROM-låsningfunktion
- Formbara stabilitetsmanschetter konstruerade för individuell anpassning som ger bättre passform och stöd
- Bandguiderna bibehåller bandplaceringen för extra säkerhet och komfort
- Universell passform för både vänster/höger armbåge

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal, en storlek

# REBOUND® POST-OP ELBOW

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Sida	Art.nr.
Vänster	B-8391680
Höger	B-8391580

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Elbow Wrist Control Kit	B-8390003
Elbow ROM Locks Kit	B-8390005

## RESERVDELAR

Beskrivning	Art.nr.
Elbow Liner Kit	B-8390002
Elbow Sling Kit	B-8390004
Strap Tab Kit	B-8390006
Adhesive Hook Sticker Kit	B-8390007
Anti-Migration Pad Kit	B-8390008
Elbow Strap Kit	B-8390009

## FORMFIT® TENNIS ELBOW

Formfit Tennis Elbow är tillverkad av patenterad, ergonomiskt formad plast. Det finns dubbla blå kuddar med räfflad yta på var sida som minskar belastning på senan. Design och material med slitstyrka möjliggör dagligt bruk för både arbete och idrottsaktiviteter.

### INDIKATIONER

- Tennisarmbåge
- Förebyggande vid arbete, vardagsliv och idrott
- Golfarmbåge

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar rem
- Patenterad ergonomiskt formad plast eliminerar behovet av kompressor i samband med traditionella utformningar.
- Dubbla blå kuddar ger motvikt och minskar sendrag och därmed inflammation
- Ribbed surfaces reduce vibration to the tendon, increasing comfort
- Räfflade ytor minskar vibration mot ligament och ger ökad komfort

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Armbågens omkrets



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Art.nr.
S	22 - 26 cm	B-247000002
M	27 - 32 cm	B-247000003
L	33 - 38 cm	B-247000004



## FORMFIT® PRO WRIST

Össur Formfit Pro Wrist är stickad med 3D MotionTech™-teknik. Passar bra för skador som har fördel av kompression. Formbara skenor i aluminium kan anpassas för att följa handledens anatomi. CoolVent™-teknik vid tumbasen för bättre ventilation och komfort.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



FoldLock™



### INDIKATIONER

Handledsbesvär som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Reumatoid artrit (RA) och andra kroniska smärttillstånd
- Stukningar och sträckningar av handleden
- Överbelastning och smärta
- Handledstendinit


### KONTRAIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform har visat sig vara överlägsen när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga, så att användaren hålls sval under användning.
- Formbar skena i aluminium för individuell anpassning
- CoolVent™-teknik vid tumbasen för god ventilation och komfort

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

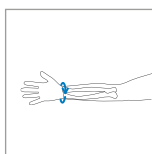

Omkretsmått vid handledens bas vid neutral sträckning (0° flexion).

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets vrist	Vänster	Höger
XS	14 - 15 cm	FP400201	FP400101
S	15 - 16 cm	FP400202	FP400102
M	16 - 17 cm	FP400203	FP400103
L	17 - 18 cm	FP400204	FP400104
XL	18 - 19 cm	FP400205	FP400105
XXL	19 - 20 cm	FP400206	FP400106



## SPECTRA HANDLEDSORTOS

Ett stabilt och mycket behagligt handledsstöd som är lätt att ta av och på. Spectra är tillverkad i ett moccamaterial med ett mjukt tygfoder. Enkel snörning med ett avslutande kardborreband som även stabiliserar handleden. Spectra har aluminiumska placerad dorsalt och volart.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar
- Behandling efter borttagning av gips

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Remmar med kardborrfäste
- Justerbar volar för finjustering vid behov

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
XS	12 - 14 cm	6602210	6602315
S	14 - 16 cm	6602422	6602535
M	16 - 18 cm	6602624	6602734
L	18 - 20 cm	6602755	6602793
XL	20 - 22 cm	6602826	6602932

## FORMFIT® WRIST / FORMFIT® WRIST & FOREARM

Formfit Wrist och Formfit Wrist & Forearm ger immobilisering och skydd för patienter med tendinit eller vissa typer av skador i mjukdelar, stukningar och sträckningar. Ortosen kan användas vid behandling efter borttagning av gips. Lätt material som andas och anatomiskt anpassad passform gör den här bekväma produkten till ett bra val.



### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Behandling efter borttagning av gips
- Skador i mjukdelar

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Anatomiskt anpassad passform
- Remmar med kardborrfäste
- Anpassningsbara stödskenor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### FORMFIT WRIST & FOREARM

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger	Vänster	Höger
		20 cm		25 cm	
XS	13 - 16 cm	317082	317072	617082	617072
S	16 - 18,5 cm	317083	317073	617083	617073
M	18,5 - 20,5 cm	317085	317075	617085	617075
L	20,5 - 23,5 cm	317087	317077	617087	617077
XL	23,5 - 25,5 cm	317088	317078	617088	617078

## TILLBEHÖR

### GELKUDDE FÖR VÄRME-/KYLBEHANDLING

Storlek	Vänster	Höger
XS, S	GB20L	GB20R
M, L, XL	GB22L	GB22R



\* Fits XS/S. For M-XL, please use Form Forearm 10" part numbers



## FORMFIT® UNIVERSAL WRIST & THUMB

Formfit Universal handleds- och tumprodukter är utformade för att begränsa rörligheten i handled och tumme. Den ger immobilisering och skydd mot vissa mjukvävnadsskador samt lindriga till måttliga stukningar och sträckningar, inklusive skidåkartumme och läkning efter gipsbehandling. Den lätta universella designen innebär också lägre lagernivå.



### INDIKATIONER

- Lindriga till måttliga stukningar och sträckningar
- Seninflammation
- Läkning efter gipsbehandling
- Andra mjukvävnadsskador

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Quick-Pull-fästremmar
- Lägesbetingad dorsalskena
- Anpassningsbar tumskena
- Formbar palmarskena

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### FORMFIT WRIST

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
Paediatric	9 - 13 cm	B-252603301	B-252603300
8" Universal	11 - 24 cm	B-252603109	B-252503109
8" XL	19 - 28 cm	B-252603106	B-252603105

### FORMFIT WRIST & FOREARM UNIVERSAL

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
10" Universal	11 - 24 cm	B-252603210	B-252603209

### FORMFIT THUMB SPICA UNIVERSAL

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
Paediatric	9 - 13 cm	B-253603301	B-253603300
8" Universal	11 - 24 cm	B-253603109	B-253503109
8" XL	19 - 28 cm	B-253603106	B-253603105

## FORMFIT® TUMORTOS

Formfit® tumortos är utformad för att begränsa rörligheten i handled och tumme. Den ger immobilisering och skydd för patienter med tendinit (t.ex. Morbus de Quervain), skador i mjukdelar samt medelsvåra stukningar och sträckningar. Ortosen kan användas vid behandling efter borttagning av gips. Lätt material som andas och anatomiskt passform gör den här bekväma produkten till ett bra val.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit t.ex. Morbus de Quervain
- Behandling efter borttagning av gips
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar t.ex. skada på tummens ulnara kollateralligament

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Anatomiskt passform
- Remmar med kardborrfäste
- Anpassningsbara stödskenor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

Längd: 20 cm.



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets handled	Vänster	Höger
XS	13 - 16 cm	3020	3120
S	16 - 18,5 cm	3030	3130
M	18,5 - 20,5 cm	3050	3150
L	20,5 - 23,5 cm	3070	3170
XL	23,5 - 25,5 cm	3080	3180

## TILLBEHÖR

### GELKUDDE FÖR VÄRME-/KYLBEHANDLING

Storlek	Vänster	Höger
Avsedd för storlek XS, S	GB20L	GB20R
Avsedd för storlek M, L, XL	GB22L	GB22R



## FORMFIT® BARNORTOS

Formfit Universal Wrist & Thumb-produkterna har utformats för att begränsa rörligheten för handled och tumme. De ger god immobilisering av handled och tumme vilket gör produkterna till ett bra val för rehabilitering och läkning av handleds- och tumskador, för skydd vid vissa typer av skador i mjukdelar, lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar, skador på tummens ulnara kollateralligament samt för läkning efter gipsbehandling. Den lätta universaldesignen underlättar också din lagerhållning.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Tendinit
- Behandling efter borttagning av gips
- Vissa andra typer av skador i mjukdelar
- Formbar handskena

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Quick-Pull-fästremmar
- Positionell dorsal stödskena
- Anpassningsbar tumskena

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Beskrivning	Omkrets handled
B-252603301	B-252603300	Formfit handledsortos	9 - 12 cm
B-253603301	B-253603300	Formfit tumortos	9 - 12 cm

## LYCRAFLEECE BARNORTOS

Behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece. Formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

LycraFleece är tillverkat av polyester, nylon och elastan.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3510C-12	3510C-22	XS	8 - 10 cm
3510C-13	3510C-23	S	10 - 12 cm
3510C-15	3510C-25	M	12 - 14 cm
3510C-17	3510C-27	L	14 - 16 cm

## EXOFORM® HANDLEDSORTOS

### INDIKATIONER

- Karpaltunnelsyndrom
- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Behandling efter bort tagning av gips
- Tendinit, Bursit
- Reumatoid artrit/Osteoartrit

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt utformat foder för bästa passform och komfort.
- Styva plaststöd på ovan- och undersida följer handens och handledens anatomi och ger ytterligare stöd och



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
507082	507072	XS	13 - 16 cm
507083	507073	S	16 - 18,5 cm
507085	507075	M	18,5 - 20,5 cm
507087	507077	L	20,5 - 23,5 cm
507088	507078	XL	23,5 - 25,5 cm

## EXOFORM® CTS HANDLEDSORTOS

### INDIKATIONER

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendinit

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mer rum vid tumbas, palmarveck och 5:e MP för full
- MP-flexion.
- Anatomiskt korrekt utformad, låg profil.
- Avsedd att ge ett mjukt, kontrollerat motstånd vid rörelser i extremlägen.
- Ger avlastning av radius och styloideus ulna.
- Insidan är 3D-gjuten för bästa komfort.
- Fabriksjusterad i neutralt läge för bekväm begränsning av rörelse/flexibilitet.



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled, runt handflata

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Omkrets runt handflata
517083	517073	S	13 - 16,5 cm	17 - 20,5 cm
517085	517075	M	16,5 - 19 cm	20,5 - 23,5 cm
517087	517077	L	19 - 25,5 cm	23,5 - 26 cm

## ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE & SVART

Kort handledsbandage i behaglig resår med markerad midja och utan skena. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, Beige
- TB302-40, Extraband 5 cm, Svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3105-12	3105-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3105-13	3105-23	S	14 - 16 cm	Beige
3105-15	3105-25	M	16 - 18 cm	Beige
3105-17	3105-27	L	18 - 20 cm	Beige
3105-18	3105-28	XL	20 - 22 cm	Beige

### ALFA HANDLEDSBANDAGE KORT SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3105-32	3105-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3105-33	3105-43	S	14 - 16 cm	Svart
3105-35	3105-45	M	16 - 18 cm	Svart
3105-37	3105-47	L	18 - 20 cm	Svart
3105-38	3105-48	XL	20 - 22 cm	Svart

## LYCRAFLEECE HANDLEDSORTOS

Behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece. Formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning på handryggen och reglerbart tumgrepp.

LycraFleece är tillverkat av polyester, nylon och elastan.

### TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3510-32	3510-42	XS	12 - 14 cm
3510-33	3510-43	S	14 - 16 cm
3510-35	3510-45	M	16 - 18 cm
3510-37	3510-47	L	18 - 20 cm
3510-38	3510-48	XL	20 - 22 cm



## ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE & SVART

Handledsortos i behaglig resår med formbar volar skena. Lågt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning på hand-ryggen och reglerbart tumgrepp.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige
- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA HANDLEDSORTOS BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110-12	3110-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3110-13	3110-23	S	14 - 16 cm	Beige
3110-15	3110-25	M	16 - 18 cm	Beige
3110-17	3110-27	L	18 - 20 cm	Beige
3110-18	3110-28	XL	20 - 22 cm	Beige
3110-19	3110-29	XXL	22 - 24 cm	Beige

### ALFA HANDLEDSORTOS SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110-32	3110-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3110-33	3110-43	S	14 - 16 cm	Svart
3110-35	3110-45	M	16 - 18 cm	Svart
3110-37	3110-47	L	18 - 20 cm	Svart
3110-38	3110-48	XL	20 - 22 cm	Svart
3110-39	3110-49	XXL	22 - 24 cm	Svart

*Tips! Tvättråd för våra ortoser finns i slutet av katalogen.*

## ALFA HANDLEDSORTOS WIDE BEIGE

Samma utförande som art.nr 3110 men utvidgad proximalt för patienter med kraftiga underarmar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, 5 cm, beige

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



#3110 Normal

#3110W Wide/bred

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110W-12	3110W-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3110W-13	3110W-23	S	14 - 16 cm	Beige
3110W-15	3110W-25	M	16 - 18 cm	Beige
3110W-17	3110W-27	L	18 - 20 cm	Beige
3110W-18	3110W-28	XL	20 - 22 cm	Beige

## ALFA HANDLEDSORTOS WIDE SVART

Samma utförande som art.nr 3110 men utvidgad proximalt för patienter med kraftiga underarmar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3110W-32	3110W-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3110W-33	3110W-43	S	14 - 16 cm	Svart
3110W-35	3110W-45	M	16 - 18 cm	Svart
3110W-37	3110W-47	L	18 - 20 cm	Svart
3110W-38	3110W-48	XL	20 - 22 cm	Svart

## ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR BEIGE

Handledsortos i behaglig resår med extra bred och stadig volar aluminiumskena. Högt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning med två breda och två smala kardborreband på handryggen och reglerbart tumgrepp. Stor tumöppning och bred handform.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-00, Extraband 5 cm, beige

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3116-12	3116-22	XS	12 - 14 cm
3116-13	3116-23	S	14 - 16 cm
3116-15	3116-25	M	16 - 18 cm
3116-17	3116-27	L	18 - 20 cm
3116-18	3116-28	XL	20 - 22 cm

## ALFA HANDLEDSORTOS CONTUR SVART

Handledsortos i behaglig resår med volar skena som är bred och extra stadig. Högt skuren dorsalt med markerad midja. Kardborrknäppning med två breda och två smala kardborreband på handryggen och reglerbart tumgrepp. Stor tumöppning och bred handform.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### TILLBEHÖR

- TB302-40, Extraband 5 cm, svart

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3116-32	3116-42	XS	12 - 14 cm
3116-33	3116-43	S	14 - 16 cm
3116-35	3116-45	M	16 - 18 cm
3116-37	3116-47	L	18 - 20 cm
3116-38	3116-48	XL	20 - 22 cm

## UNIVERSAL THUMB SPLINT

Kombinerad handled och tumskena för immobilisering av MCP och CMC led. Passar höger och vänster hand.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal

Art.nr.	Beskrivning
30000	Universal Thumb Splint



## ALFA TUMORTOS BEIGE & SVART

Tumortos i behaglig resår med uttagbar tumskena. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA TUMORTOS II BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3143-12	3143-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3143-13	3143-23	S	14 - 16 cm	Beige
3143-15	3143-25	M	16 - 18 cm	Beige
3143-17	3143-27	L	18 - 20 cm	Beige
3143-18	3143-28	XL	20 - 22 cm	Beige

### ALFA TUMORTOS II SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3143-32	3143-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3143-33	3143-43	S	14 - 16 cm	Svart
3143-35	3143-45	M	16 - 18 cm	Svart
3143-37	3143-47	L	18 - 20 cm	Svart
3143-38	3143-48	XL	20 - 22 cm	Svart

## ALFA CMC TUMORTOS BEIGE & SVART

Tumortos i behaglig resår, modell utan skena. Stödjer och lyfter CMC från thenar.

Alfaresåren är tillverkad av bomull, nylon och gummi.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



### ALFA CMC TUMORTOS BEIGE

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3145-12	3145-22	XS	12 - 14 cm	Beige
3145-13	3145-23	S	14 - 16 cm	Beige
3145-15	3145-25	M	16 - 18 cm	Beige
3145-17	3145-27	L	18 - 20 cm	Beige

### ALFA CMC TUMORTOS SVART

Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled	Färg
3145-32	3145-42	XS	12 - 14 cm	Svart
3145-33	3145-43	S	14 - 16 cm	Svart
3145-35	3145-45	M	16 - 18 cm	Svart
3145-37	3145-47	L	18 - 20 cm	Svart

## AIR X TUMORTOS

En tumortos som ger justerbart stöd till tummens CMC-led. Ortosen är optimal vid behandling av osteoartrit och medial subluxation. Det justerbara bandet kan lindas runt CMC1- och MCP1-lederna.

Materialet Air X transporterar bort fukt och materialet andas, vilket minimerar risken för hudirritation.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3605-11	3605-21	Spädbarn	11 - 14 cm
3605-12	3605-22	Barn	14 - 17 cm
3605-13	3605-23	S	15 - 18 cm
3605-15	3605-25	M	18 - 20 cm
3605-17	3605-27	L	20 - 23 cm
3605-18	3605-28	XL	23 - 25 cm

## LYCRAFLEECE TUMORTOS

Tumortos i behaglig och slitstark lycraresår med insida av tunn fleece och med uttagbar tumskena. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led.

LycraFleece är tillverkad av polyester, nylon och elastan.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Universal



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3543-32	3543-42	XS	12 - 14 cm
3543-33	3543-43	S	14 - 16 cm
3543-35	3543-45	M	16 - 18 cm
3543-37	3543-47	L	18 - 20 cm
3543-38	3543-48	XL	20 - 22 cm

## VENTOPRENE TUMORTOS

Tumortos i mjukt perforerad neoprene som ger värme och låter huden andas. Stabiliserar och lyfter tummens CMC- och MCP-led. Har en uttagbar tumskena.

Tumortosen kan användas i våta miljöer som t. ex. vid bassängträning.

Tillverkad i perforerad neoprene klädd med polyester.


### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets handled



Vänster	Höger	Storlek	Omkrets handled
3743-12	3743-22	XS	12 - 14 cm
3743-13	3743-23	S	14 - 16 cm
3743-15	3743-25	M	16 - 18 cm
3743-17	3743-27	L	18 - 20 cm
3743-18	3743-28	XL	20 - 22 cm


KNÄ

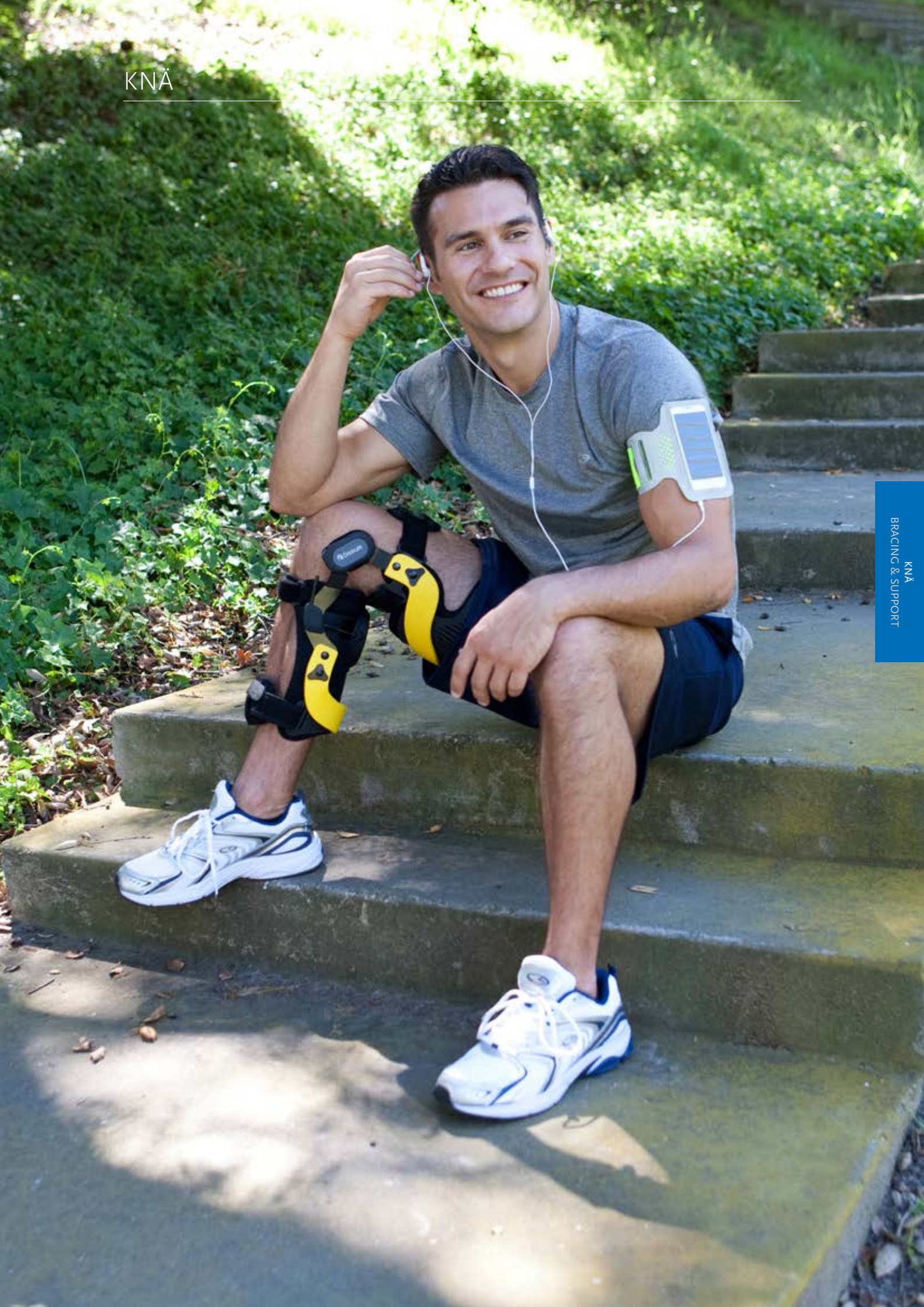

## UNLOADER® - FÖR ALLA GRADER AV OA


### UNLOADER - AVLASTANDE ORTOSER VID KNÄARTROS

Effektiva ortoser byggda på bevisad teknik som reducerar knäsmärta till följd av ensidig knäartros och som ofta kan fördröja tiden fram till kirurgiska ingrepp.



**UNLOADER ONE®**

- Måttlig till svår unikompartmentell knäartros
- Unikompartmentella knätillstånd som kräver avlastning, såsom vid broskskada, avaskulär nekros eller tibiaplatåfraktur



**UNLOADER ONE® X**

- Utöver de indikationer som gäller för Unloader One, kan Unloader One X även användas vid degenerativa meniskförändringar

### DEFINITION AV GRAD AV OA BASERAT PÅ RÖNTGENOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR



MILD OA



MÅTTLIG OA



SVÅR OA

Genom slätröntgen av knälederna graderar man hur mycket ledspringan har minskat (som ett tecken på att brosket blivit tunnare) och hur mycket benpålgningar (osteofyter) som kan ses. En av de vanligaste graderingarna som innefattar både ledspringevidden och benpålgningen utvecklades för cirka femtio år sedan av läkarna Kellgren och Lawrence i Manchester i England. Skalan går från 0-4 där fyra är mer allvarlig ledpåverkan som kan vara aktuell för operation medan grad 1-2 är en lätt ledpåverkan som ofta har en god prognos.



## UNLOADER ONE<sup>®</sup>X

Unloader One X förbättrar rörligheten genom att ge smärtlindring vid knäartros, degenerativ meniskruptur och andra unikompartimentella knätillstånd som kan förbättras av avlastning.

Den har Össurs unika patenterade och kliniskt beprövade 3-punkts-hävstångssystem som ger unikompartimentell avlastning av knäleden.

Finns i anpassade och OTS-versioner för patienter med olika benskinnader.



### INDIKATIONER

- Måttlig till svår ensidig knäartros
- Degenerativa meniskrupturer
- Andra unikompartimentella knätillstånd som kan förbättras av avlastning, till exempel:
  - Rekonstruktion vid ledbrotskador
  - Meniskkirurgi
  - Osteonekros
  - Kondylära benmärgsskador
  - Tibiaplatåfrakturer

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- 3-punkts-hävstångssystem som består av två DFS-remmar, styvt skal och en enda upprätt led bidrar till en unikompartimentell avlastning av knäleden
- Verktygsfria SmartDosing<sup>®</sup>-rattar gör det möjligt för patienten att kontrollera sin smärtnivå genom att finjustera remspänningen
- Verktygsfri – verktygsfri polycentrisk led med möjlighet till ROM-stopp för begränsning av rörelseomfång
- Hudvänliga liners och kuddar samt en slät insida på skalen minskar risken för tryckpunkter. Vadmuskelremmen är placerad över den bredaste delen av vaden för att förhindra glidning
- Färgkodade inställningspunkter och Quick-Fit Buckles ökar användarvänligheten.
- Inpassningsguide på leden underlättar korrekt placering på benet
- En smal perforerad ram med mjuka kanter, följer enkelt individuella kroppsformer och förblir diskret, oavsett om den bärs över eller under kläder.
- Hela ortosen är tvättbar i maskin (tvättpåse medföljer)
- Kan servas på plats.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT: UNLOADER ONE X CUSTOM

För att ta mått för beställning av Unloader One X Custom använd dig av: Smartmeasure

### SMARTMEASURE<sup>®</sup>



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.




Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-3 12000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.


# UNLOADER ONE® X

## NÖDVÄNDIGA MÅTT: UNLOADER ONE X OTS

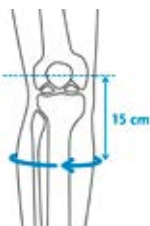

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Mät benlängden från golv till ljumske.

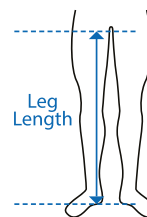

Storlek	Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella
XS - M	25 - 43
L - XL	43 - 62

Modell	Benlängd
Standard	> 85 cm
Short	≤ 85 cm

## FÄRGER

### CUSTOM VALBARA STANDARDFÄRGER



Svart ortos / svarta komponenter



Blå ortos / svarta komponenter



Grafitgrå ortos / svarta komponenter



Röd ortos / svarta komponenter



Vit ortos / svarta komponenter



Gul ortos / svarta komponenter

### OTS FÄRG



Svart ortos / svarta komponenter

Färgavvikelser kan förekomma

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Leden är placerad på den drabbade sidan av leden.  
Kort version rekommenderas för patienter med en benlängd på ≤ 85 cm.

### CUSTOM

Beskrivning	Art.nr.
Höger	UOX0R
Vänster	UOX0L

### OTS

Standard	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX0518713	UOX0528713	UOX0618713	UOX0628713
L - XL	UOX0518715	UOX0528715	UOX0618715	UOX0628715

Kort	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX1518713	UOX1528713	UOX1618713	UOX1628713
L - XL	UOX1518715	UOX1528715	UOX1618715	UOX1628715


# UNLOADER ONE® X

## OTS - UTAN FÖRPACKNING

Standard	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX0518718	UOX0528718	UOX0618718	UOX0628718
L - XL	UOX0518719	UOX0528719	UOX0618719	UOX0628719

Kort	Höger medial	Höger lateral	Vänster medial	Vänster lateral
XS - M	UOX1518718	UOX1528718	UOX1618718	UOX1628718
L - XL	UOX1518719	UOX1528719	UOX1618719	UOX1628719


## ÖVERSIKT - TILLBEHÖR

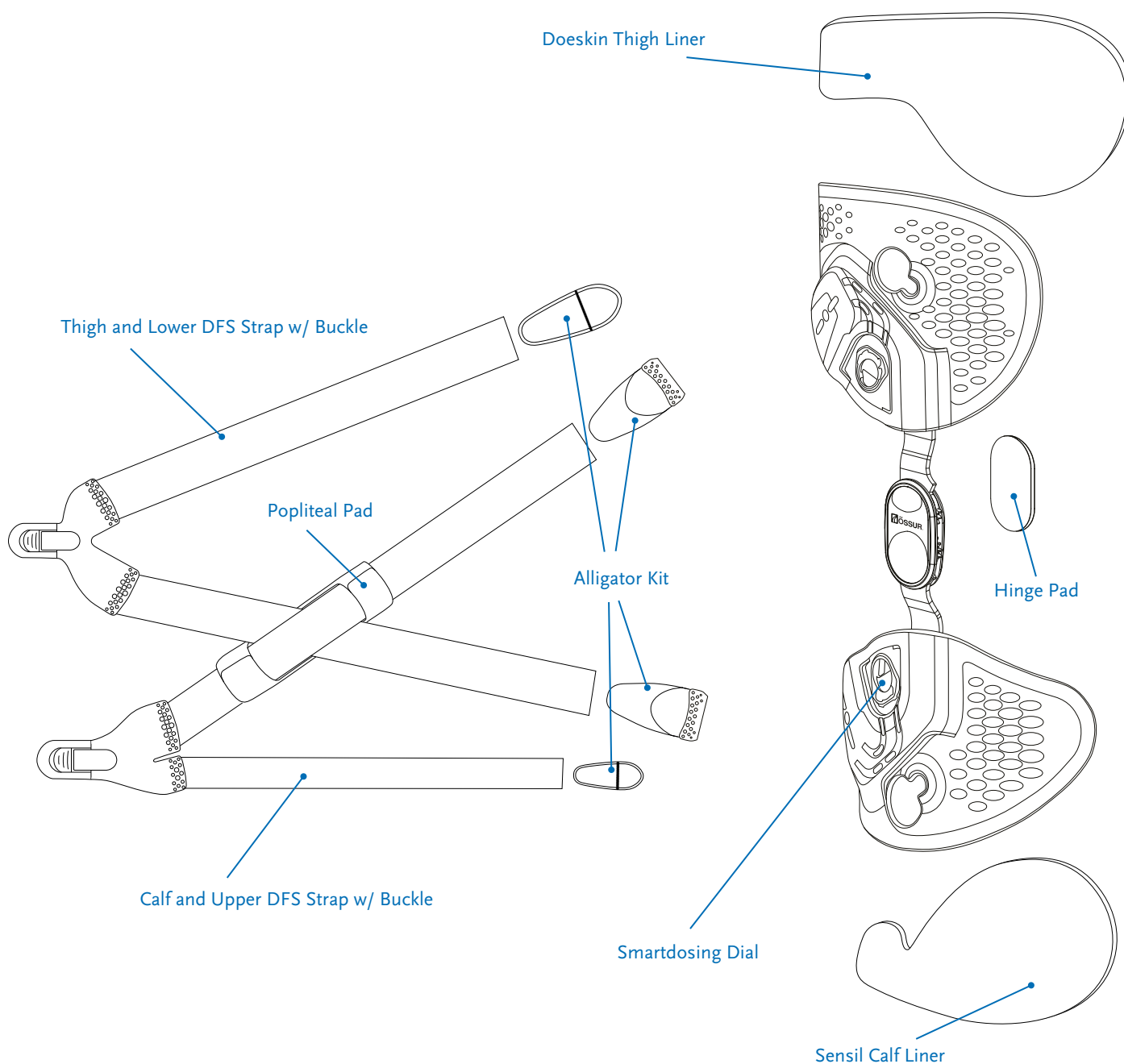

# UNLOADER ONE® X

## TILLBEHÖR

KNÄ  
BRACING & SUPPORT

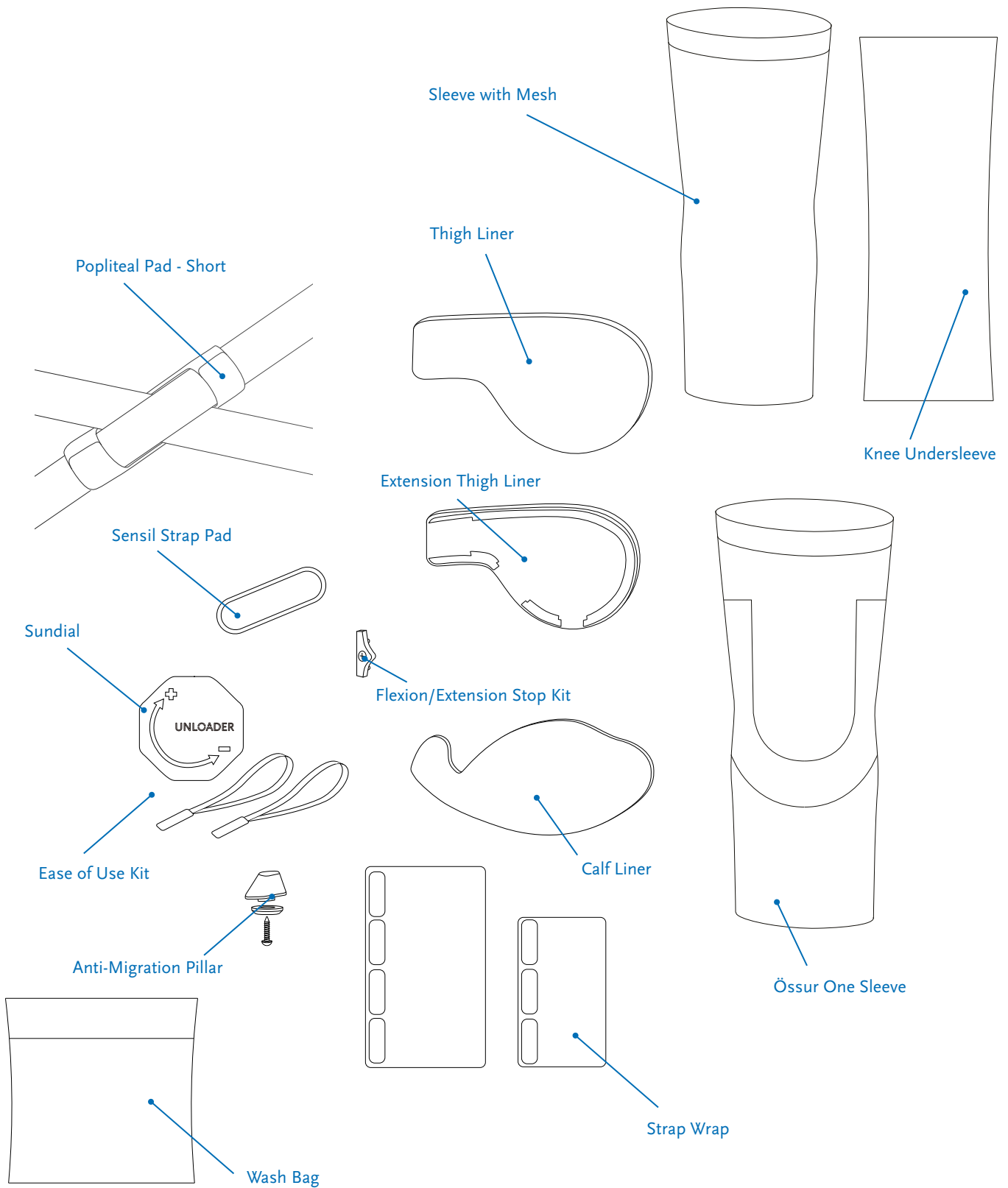

# UNLOADER ONE® X

LÄRLINERS	LÅR, Höger medial, Vänster lateral	LÅR, Höger lateral, Vänster medial	LÅRFÖRLÄNGNING, Höger medial, Vänster lateral	LÅRFÖRLÄNGNING, Höger lateral, Vänster medial
Svart, Sensil	UOX526801	UOX525801	NA	NA
Svart, Doeskin	UOX526901	UOX525901	UOX546901	UOX545901

VADLINERS	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart, Sensil XS-M	UOX516952	UOX515952
Svart, Sensil L-XL	UOX516962	UOX515962
Svart, Doeskin XS-M	UOX516951	UOX515951
Svart, Doeskin L-XL	UOX516961	UOX515961

LÅR & NEDRE DFS STRAP*	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart	UOX406902	UOX405902

\* Innehåller: Thigh and DFS Strap with buckle

VAD & ÖVRE DFS STRAP*	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart	UOX406901	UOX405901

\* Innehåller: Calf and DFS Strap with buckle

UOX SERVICE KIT*	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart, XS-M	UOX416901	UOX415901
Svart, L-XL	UOX416911	UOX415911

\* Innehåller: Doeskin Thigh Liner, Sensil Calf Liner, Thigh & Lower DFS Strap with Buckle, Calf & Upper DFS Strap with Buckle, Hinge Pad, Popliteal Pad, & Alligator Kit

ANTI-MIGRATION PILLAR	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral, Vänster medial
Svart	UOX700015	UOX700035

# UNLOADER ONE® X

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Svart	Grå
Alligator Kit*	UOX900001	UOX900002
Hinge Pad	UOX700091	UOX700011
Popliteal Pad	UOX700012	UOX700092
Popliteal Pad - Short	UOX700022	UOX700082
Sensil Strap Pad	UON0181	UON0182
Sensil Strap Pad - 10 Pieces	UOX700113	UOX700193
Smartdosing Dial	UOX1000001	UOX1000002
Strap Wrap Set	UOX700014	UOX700094

\* Innehåller: 4 Alligator Clips: 2 DFS, 1 Thigh & 1 Calf

Beskrivning	Art.nr.
Ease of Use Kit*	UOX800001
OA Hinge Extension Stop Tree (5°, 10°, 15°, 30°)	OAH40029
OA Hinge Flexion Stop Tree (0°, 30°, 60°, 90°)	OAH40039
Sundial	UOX1200001
Wash Bag	UON60200

\* Innehåller: Sundial & 2 buckle finger-loops

### SLEEVE WITH MESH\*

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Art.nr.
XS	< 43 cm	SLV60011
S	43 – 46 cm	SLV60012
M	46 – 51 cm	SLV60013
L	51 – 53 cm	SLV60014
XL	53 – 56 cm	SLV60015
XXL	56 – 61 cm	SLV60016

\* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester - Band: 80% Polyester/20% Spandex



## UNLOADER ONE®

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



### INDIKATIONER

- Mild till svår enkompartments knäartros
- Andra knäskador som kan dra nytta av ensidig avlastning



Video: Unloader One with SmartDosing - Clinician Fitting Instructions (7 min 41 sec)



Video: Unloader One with SmartDosing - Clinician Custom-Fit Modifications (5 min 8 sec)



Video: Unloader One - Clinician Fitting Instructions (7 min 7 sec)


### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dubbla DFS-band minskar trycket på känsliga områden runt knäet, vilket innebär minskad smärta.
- SmartDosing™ låter brukaren själv finjustera avlastningen. Inga verktyg behövs och inställningsratten kan hanteras genom kläder.
- Färgkodade snabbkopplingsspännen gör ortosen enkel att ta på och av.
- Patenterade Sensil®-liners eliminerar glidning.
- Flexibel skena med låg profil som följer patientens anatomi gör det möjligt att använda ortosen under kläderna.
- Perforerad lättviktsram för flexibilitet och ventilation

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

Storlek	Mått
S	31 - 35.5 cm
M	35.5 - 42.5 cm
L	42.5 - 51 cm
XL	51 - 61.5 cm

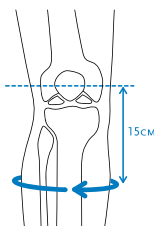

# UNLOADER ONE®

## BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

### UNLOADER ONE SMARTDOSING

### MEDIAL AVLASTNING

### LATERAL AVLASTNING

Storlek	Omkrets	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	31 - 35,5 cm	B-240618712	B-240518712	B-240628712	B-240528712
M	35,5 - 42,5 cm	B-240618713	B-240518713	B-240628713	B-240528713
L	42,5 - 51 cm	B-240618714	B-240518714	B-240628714	B-240528714
XL	51 - 61,5 cm	B-240618715	B-240518715	B-240628715	B-240528715

### UNLOADER ONE SHORT SMARTDOSING

### MEDIAL AVLASTNING

### LATERAL AVLASTNING

STORLEK	OMKRETS	VÄNSTER	HÖGER	VÄNSTER	HÖGER
XS	25 - 31 cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31 - 35.5 cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	35.5 - 42.5 cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	42.5 - 51 cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51 - 61.5 cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

### UNLOADER ONE (RATCHET)

### MEDIAL AVLASTNING

### LATERAL AVLASTNING

Storlek	Omkrets	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	31 - 35,5 cm	B-240619712	B-240519712	B-240629712	B-240529712
M	35,5 - 42,5 cm	B-240619713	B-240519713	B-240629713	B-240529713
L	42,5 - 51 cm	B-240619714	B-240519714	B-240629714	B-240529714
XL	51 - 61,5 cm	B-240619715	B-240519715	B-240629715	B-240529715

### UNLOADER ONE SHORT (RATCHET)

### MEDIAL AVLASTNING

### LATERAL AVLASTNING

STORLEK	OMKRETS	VÄNSTER	HÖGER	VÄNSTER	HÖGER
XS	25 - 31 cm	B-241619711	B-241519711	B-241629711	B-241529711
S	31 - 35.5 cm	B-241619712	B-241519712	B-241629712	B-241529712
M	35.5 - 42.5 cm	B-241619713	B-241519713	B-241629713	B-241529713
L	42.5 - 51 cm	B-241619714	B-241519714	B-241629714	B-241529714
XL	51 - 61.5 cm	B-241619715	B-241519715	B-241629715	B-241529715

Standard rekommenderas till patienter som är 165 cm och längre.  
 Short rekommenderas till patienter som är 165 cm och kortare.  
 Leden placeras på den affekterade sidan



# UNLOADER ONE®

## TILLBEHÖR

Kit	Smartdosing		Ratchet	
	Hö. Med./Vä Lat.	Hö. Lat./Vä. Med.	Hö. Med./Vä Lat.	Hö. Lat./Vä. Med.
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-705277003	B-705278003	B-701217008	B-701218008
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit, Short	B-705277004	B-705277005	-	-
Strap & Strap Pad Kit	B-705270003		B-701210006	
Strap & Strap Pad Kit, Short	B-705277006		B-701240004	
DFS Strap Kit, Standard	B-701240002		-	-
DFS Strap Kit, Short	B-701240012		-	-
Pad Kit	-	-	B-702210003	

### REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Description	Part#
OA Hinge Extension Stop Kit	OAH40029
OA Hinge Flexion Stop Kit	OAH40039

Beskrivning	Hö. Med / vä. Lat	Hö. Lat / vä. Med
Buckle Clasp kit	B-708217003	B-708218003
Alligator Tab (4 stk)	B-704210003	
Alligator Tab	B-310005334	
Velcro Twist-Fit Attachment Kit	B-721240003	
Hinge screws	B-301010076	
Post	B-301010075	

### ÖSSUR KNEE UNDERSLEEVE\*

	Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Grå	Svart
	XS	25,4 cm - 30,9 cm	B-250150201	B-250150101
S	30,9 cm - 35,6 cm	B-250150202	B-250150102	
M	35,6 cm - 42,5 cm	B-250150203	B-250150103	
L	42,5 cm - 50,8 cm	B-250150204	B-250150104	
XL	50,8 cm - 61,0 cm	B-250150205	B-250150105	
XXL	61,0 cm - 81,3 cm	B-250150206	B-250150106	

\* När Össur Knee Undersleeve används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera risken att undersleeven glider

### SUSPENSION STRAP KIT

	Beskrivning	Grå
	Rekommenderas vid användning av polstring i sämskskinn (tibia) samt undersleeve	UNL00212


### PADS

Hinge Pads	B-304120301
Popliteal Pad/ strap Grey 6in	B-304010103


# UNLOADER ONE®

## TILLBEHÖR

### SENSIL LINERS

	Storlek	Färg	VAD		LÅR	
			Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	Grå	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
	S	Grå	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
	M	Grå	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
	L	Grå	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
	XL	Grå	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325
	XS	Svart	UNL025111	UNL026111	UNL025121	UNL026121
	S	Svart	UNL025112	UNL026112	UNL025122	UNL026122
	M	Svart	UNL025113	UNL026113	UNL025123	UNL026123
	L	Svart	UNL025114	UNL026114	UNL025124	UNL026124
	XL	Svart	UNL025115	UNL026115	UNL025125	UNL026125

### DOESKIN LINERS

	Storlek	VAD		LÅR	
		Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
	S	B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
	M	B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
	L	B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
	XL	B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

### JERSEY LINERS

Storlek	Färg	VAD		LÅR	
		Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
XS	Svart	UNL015111	UNL016111	UNL015121	UNL016121
S	Svart	UNL015112	UNL016112	UNL015122	UNL016122
M	Svart	UNL015113	UNL016113	UNL015123	UNL016123
L	Svart	UNL015114	UNL016114	UNL015124	UNL016124
XL	Svart	UNL015115	UNL016115	UNL015125	UNL016125

### SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Storlek	Färg	Hö. Med/ vä. Lat	Hö. Lat/ vä. Med
XS	Svart	UNL035111	UNL036111
S	Svart	UNL035112	UNL036112
M	Svart	UNL035113	UNL036113
L	Svart	UNL035114	UNL036114
XL	Svart	UNL035115	UNL036115

# UNLOADER ONE® CUSTOM

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### UNLOADER ONE SMARTDOSING CUSTOM

Färg	Omkrets lår	Omkrets vad	Vänster	Höger
Svart	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115600112	B-115500112
Grå	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115601712	B-115501712

### UNLOADER ONE CUSTOM

Färg	Omkrets lår	Omkrets vad	Vänster	Höger
Svart	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115600111	B-115500111
Grå	34,3 - 73,5 cm	25 - 61,5 cm	B-115601711	B-115501711

### MÄTVERTYG

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000



## SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

### VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD



### FÖRSLAG PÅ VALBARA MÖNSTER\*




Unloader One® Custom går även att få med motiv. Kontakta kundtjänst för mer information och prisuppgift.

\*Kontakta Kundsupport, +46 (0) 18 18 22 00, för prisuppgift


# UNLOADER ONE® CUSTOM

## TILLBEHÖR

### SENSIL LINERS


			VAD		LÅR	
	Storlek	Färg	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	Grå	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
	S	Grå	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
	M	Grå	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
	L	Grå	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
	XL	Grå	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325
	XS	Svart	B-419700111	B-419800111	B-409700121	B-409800121
	S	Svart	B-419700112	B-419800112	B-409700122	B-409800122
	M	Svart	B-419700113	B-419800113	B-409700123	B-409800123
	L	Svart	B-419700114	B-419800114	B-409700124	B-409800124
	XL	Svart	B-419700115	B-419800115	B-409700125	B-409800125

### DOESKIN LINERS

			VAD		LÅR	
	Storlek	Färg	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	Grå	B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
	S	Grå	B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
	M	Grå	B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
	L	Grå	B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
	XL	Grå	B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725
	XS	Svart	B-424702121	B-424802121	B-412700121	B-412800121
	S	Svart	B-424702122	B-424802122	B-412700122	B-412800122
	M	Svart	B-424702123	B-424802123	B-412700123	B-412800123
	L	Svart	B-424702124	B-424802124	B-412700124	B-412800124
	XL	Svart	B-424702125	B-424802125	B-412700125	B-412800125

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

### SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

	Storlek	Grå		Svart	
		Hö medial/Vä lateral	Hö lateral/Vä medial	Hö medial/Vä lateral	Hö lateral/Vä medial
	X-Small	B-715217031	B-715218031	B-715217011	B-715218011
	Small	B-715217032	B-715218032	B-715217012	B-715218012
	Medium	B-715217033	B-715218033	B-715217013	B-715218013
	Large	B-715217034	B-715218034	B-715217014	B-715218014
	X-Large	B-715217035	B-715218035	B-715217015	B-715218015

# UNLOADER ONE® CUSTOM

## TILLBEHÖR

### SUSPENSION STRAP KIT

Beskrivning	Grå	Svart
Suspension Strap Kit	UNL00212	UNL00211

### UNLOADER ONE SMARTDOSING CUSTOM – TILLBEHÖR

Beskrivning	Grå	Svart	Grå	Svart
	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial
SmartDosing Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-705277003	B-705278003	B-705277001	B-705278001
Strap & Strap Pad Kit	B-705270003		B-705270001	
Strap Kit	B-701270013		B-701270011	

### UNLOADER ONE (RATCHET) CUSTOM – TILLBEHÖR

	Grå	Svart	Grå	Svart
Beskrivning	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-701217008	B-701218008	B-701217009	B-701218009
Strap & Strap Pad Kit	B-701210006		B-701210007	
Strap Kit	B-701210004		B-701210005	
Pad Kit	B-702210003		B-702210001	
Ratchet Complete Strap Set	B-701210004			

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

	Grå	Svart	Grå	Svart
Beskrivning	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial	Hö medial/ Vä lateral	Hö lateral/ Vä medial
Buckle Clasp Kit	B-708217003	B-708218003	B-708217001	B-708218001
Alligator Clip Kit (included in all strap kits)	B-704210003		B-704210001	
Alligator Tab	B-310005334		B-310005335	
Extension Stop Kit	B-301040046		B-301040047	
Velcro Twist-Fit Attachment Kit	B-721240003		B-721240001	

## FORMFIT® PRO KNEE OA

Össur Formfit® Pro Knee OA är en unik, kompressiv knäleeve med Dynamic Force Strap-systemet som har utvecklats för att ge smärtlindring vid osteoartros (OA) i ett tidigt stadium. Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande och uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav, och har visat sig vara överlägset de ledande märkena när det gäller fukttransport och andningsförmåga, så att knäet hålls svalt under användning. CoolVent™-teknik i knävecket ökar andningsförmågan och komforten, medan de tydliga markeringarna på knäskålen gör det enkelt att placera sleeveen rätt. Den integrerade StayBilizer™-leden, som tillverkas av lätt, flexibelt EVA-material, fungerar bra även vid sportande, t.ex. fotboll.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



FoldLock™



### INDIKATIONER

För osteoartros och andra knätillstånd som kan förbättras av avlastning och/eller kompression, t.ex.:

- Medial eller lateral knäsmärta
- Tidig eller mild ensidig osteoartros i knäet
- Symtomatisk ensidig degenerativ förändring i menisken

### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer med kontraindikation för kompression.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Patenterat DFS-system.
- Godkänd medicinsk kompressionsgrad (20–30 mmHg).
- Stickat CoolVent™-material med låg vikt i knävecket ger ytterligare andningsförmåga och komfort.
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och säkrare påtagning.
- Sportkompatibel StayBilizer™-led tillverkad av lätt, flexibelt EVA-material för optimal form och passform.
- Patella-grafik för intuitiv placering.
- Finns i 5 standardstorlekar och 3 komfortstorlekar.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

Storlek	Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Höger medial, Vänster lateral	Höger lateral Vänster medial
XS	26 - 31 cm	36 - 41 cm	FP110401	FP110301
S	31 - 36 cm	41 - 46 cm	FP110402	FP110302
M	36 - 41 cm	46 - 51 cm	FP110403	FP110303
M Comfort	36 - 41 cm	51 - 56 cm	FP110413	FP110313
L	41 - 46 cm	51 - 56 cm	FP110404	FP110304
L Comfort	41 - 46 cm	56 - 60 cm	FP110414	FP110314
XL	46 - 50 cm	56 - 60 cm	FP110405	FP110305
XL Comfort	46 - 50 cm	60 - 64 cm	FP110415	FP110315



Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

## OA EASE

OA Ease är en enkel ortos med Dynamic Force System™-rem som är utformad för att lindra smärta vid lindrig till måttlig ensidig knäartros (OA). Den omslutande designen är lätt att applicera och ta bort med hjälp av enkla dragknappar av gummi, färgkodade styrpunkter och indikatorlinjer för remspänning. Denna knäortos med låg profil är bekväm, lätt att använda och anpassar sig till en mängd olika benanatomier. OA Ease kan också tvättas i maskin för enkel skötsel.



### INDIKATIONER

- Ensidig osteoartros i knät
- Andra tillstånd som kan förbättras av lokal (unikompartmentell) avlastning, till exempel degenerativ förändring i menisken

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel omslutande design – Enkel dragknapp av gummi, färgkodade styrpunkter och en praktisk inriktningssguide för leden gör den enkel att sätta på och ta av.
- Lindrar OA-smärta – 3-punktshävstångssystem med Dynamic Force System™-remmar, styva höljen och leder med låg profil avlastar det berörda knäkompartimentet biomekaniskt.
- Maskintvättbart – Sträckbart, lätt och ventilerande tyg som känns bra mot huden och kan maskintvättas för enkel skötsel
- Verktygsfri – Verktygsfri polycentrisk led med tillgängliga ROM-stoppalternativ för begränsning av rörelseomfång
- Kontroll – Finjustera remspänningen för anpassad smärtlindring med markerade doseringsindikatorlinjer
- Förlängningskit finns tillgängliga för att ytterligare förbättra passform och komfort

### NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

# OA EASE

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Höger medial	Vänster medial	Höger lateral	Vänster lateral
XS	28 - 32 cm	36 - 41 cm	FOA0518711	FOA0618711	FOA0528711	FOA0628711
S	32 - 36 cm	41 - 46 cm	FOA0518712	FOA0618712	FOA0528712	FOA0628712
M	36 - 41 cm	46 - 53 cm	FOA0518713	FOA0618713	FOA0528713	FOA0628713
L	41 - 46 cm	53 - 60 cm	FOA0518714	FOA0618714	FOA0528714	FOA0628714
XL	46 - 51 cm	60 - 67 cm	FOA0518715	FOA0618715	FOA0528715	FOA0628715
XXL	51 - 56 cm	67 - 75 cm	FOA0518716	FOA0618716	FOA0528716	FOA0628716
3XL	56 - 61 cm	75 - 81 cm	FOA0518717	FOA0618717	FOA0528717	FOA0628717

Leden är placerad på den drabbade sidan av knäleden.

## RESERVDELAR


Beskrivning	Art.nr.
Alligator Clip (Right Medial/Left Lateral)	FOW00501
Alligator Clip (Right Lateral/Left Medial)	FOW00502
Hinge Pad	B-304120101

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Small Extension Kit 2 Pieces	FOA000301
Small Extension Kit 10 Pieces	FOA000302
Large Extension Kit XS-S (Right Medial/Left Lateral)	FOA000401
Large Extension Kit M-L (Right Medial/Left Lateral)	FOA000402
Large Extension Kit XL-3XL (Right Medial/Left Lateral)	FOA000403
Large Extension Kit XS-S (Right Lateral/Left Medial)	FOA000404
Large Extension Kit M-L (Right Lateral/Left Medial)	FOA000405
Large Extension Kit XL-3XL (Right Lateral/Left Medial)	FOA000406
Wash Bag	WB000001
Suspension Strap Kit	OAW00007
OA Hinge Extension Stop Kit (5°, 10°, 15°, 30°)	OAH40029
OA Hinge Flexion Stop Kit (0°, 30°, 60°, 90°)	OAH40039

### Small Extension Kit:

Ökar omkretsen på vaden och/eller låret med upp till 4,5 cm

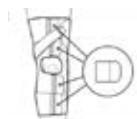

Small Extension Kit

### Large Extension Kit:

XS-S ökar låromkretsen med upp till 4 cm

M-L ökar låromkretsen med upp till 5 cm

XL-3XL ökar låromkretsen med upp till 6 cm



Large Extension Kit



## REBOUND® DUAL

Rebound® DUAL-sortimentet är en serie ramortoser i aluminium. Med Rebound DUAL får du en lösning som passar dig.



### INDIKATIONER

Ortosen är avsedd för kombinerade och icke-kombinerade instabiliteter i:

- Främre korsbandet (ACL)
- Mediala kollaterala ligamentet (MCL)
- Lateral kollaterala ligamentet (LCL)
- Bakre Korsbandet (PCL)
- Tillstånd som kräver unicompartmental avlastning (gäller ej ST modell)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kallformbar aluminiumram, remmar som kan trimmas och D-ringar som kan servas på plats passar de flesta patienters kroppsformer.
- Acculign™ övre ram kan justeras på höjden och varus/valgus
- Verktygsfri polycentrisk led med ROM-stoppalternativ för begränsning av rörelseomfång
- Össur ledinriktningssguide, Blue is You™-inställningspunkter och taktila, numrerade remflikar ger vägledning under passningsprocessen
- Tillvalbart SmartDosing®-kit ger en finjusterad lokal (unikompartmentell) avlastning
- PCL-tillbehörskit som tillval för stöd av flera ledband

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått: Över mitten av patella, i stående vikt bärande position
- 15cm ovanför mitten av patella

# REBOUND® DUAL

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND DUAL

Storlek	M/L mått*	Omkrets**	Höger	Vänster
XS	7.6 - 8.9 cm	38.1 - 41.9 cm	B-2425 10001	B-2426 10001
S	8.9 - 10.2 cm	41.9 - 47 cm	B-2425 10002	B-2426 10002
M	10.2 - 11.4 cm	47 - 52.1 cm	B-2425 10003	B-2426 10003
L	11.4 - 12.7cm	52.1 - 57.2 cm	B-2425 10004	B-2426 10004
XL	12.7 - 14cm	57.2 - 62.2 cm	B-2425 10005	B-2426 10005
XXL	14 - 15.2cm	62.2 - 69.9 cm	B-2425 10006	B-2426 10006
3XL	15.2 - 16.5 cm	69.9 - 76 cm	B-2425 10007	B-2426 10007

\*M/L mått: Tas vid knäleden i belastat läge

\*\*Omkrets: Mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

### REBOUND DUAL CUSTOM

Mätssystem	Höger	Vänster
SmartMeasure	B-1555 10001	B-1556 10001

## SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.




Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-3 12000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

## CUSTOM VALBARA STANDARDFÄRGER

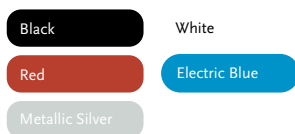

# REBOUND® DUAL

## TILLBEHÖR

### SERVICE KITS & LINER KITS

Storlek	Softgoods Kit, Svart*	Liner Kit, Svart**
XS	B-701090091	B-701090110
S	B-701090092	B-701090111
M	B-701090093	B-701090112
L	B-701090094	B-701090113
XL	B-701090095	B-701090114
XXL	B-701090096	B-701090115
3XL	B-701090097	B-701090116

\*Innehåller Doeskin lärliner, Active Grip vadlinor, straps, gastroc pad, tibial pad, numbered alligator tabs, hook strip

\*\*Innehåller Doeskin lärliner, Sensil vadlinor

### VADLINERS

Storlek	Doeskin, Silver	Active Grip, Svart	Active Grip, Silver
XS	B-701090028	B-701090160	B-701090017
S	B-701090029	B-701090161	B-701090018
M	B-701090030	B-701090162	B-701090019
L	B-701090031	B-701090163	B-701090020
XL	B-701090032	B-701090164	B-701090021
XXL	B-701090033	B-701090165	B-701090022
3XL	B-701090034	B-701090166	B-701090023

### LÄRLINERS

Storlek	Doeskin, Svart	Doeskin, Silver	Active Grip, Silver
XS	B-701090150	B-701090010	B-701090041
S	B-701090151	B-701090011	B-701090042
M	B-701090152	B-701090012	B-701090043
L	B-701090153	B-701090013	B-701090044
XL	B-701090154	B-701090014	B-701090045
XXL	B-701090155	B-701090015	B-701090046
3XL	B-701090156	B-701090016	B-701090047

### STRAP KITS & PAD KITS

Storlek	Replacement Strap Kit	PCL Strap Kit	Active Grip Strap Pad Kit
XS-L	B-701090105	B-701090057	B-701090039
XL-3XL	B-701090106	B-701090058	B-701090040

# REBOUND® DUAL

## TILLBEHÖR

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
SmartDosing Kit RM/LL	B-701090060
SmartDosing Kit RL/LM	B-701090061
Flexion/Extension Stop Set - Tool-Free Hinge	B-701090088
*Flexion Stop Set - Custom & Legacy	B-701090004
**Extension Stop Set - Custom & Legacy	B-701090008
D-Ring Kit	B-701090059
Tibial Wedge Kit	B-701090001
Condyle Pad Kit	B-701090009

\*Flexionsstoppssats: 45°, 60°, 75°, 90°

\*\*Extensionsstoppssats: 5°, 10°, 20°, 30°, 40° (0° och 10° ingår i ortosen)

### SLEEVES

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Neoprene undersleeve	Neoprene oversleeve
S	< 38 cm	20251	20051
M	38 – 45 cm	20252	20052
L	45 – 49.5 cm	20253	20053
XL	49.5 – 54.5 cm	20254	20054
XXL	54.5 – 62 cm	20255	20055
XXXL	62 – 71 cm	20256	20056
XXXXL	71 – 86 cm	20257	20057

### SLEEVE WITH MESH\*

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Sleeve with Mesh
XS	< 43 cm	SLV60011
S	43 – 46 cm	SLV60012
M	46 – 51 cm	SLV60013
L	51 – 53 cm	SLV60014
XL	53 – 56 cm	SLV60015
XXL	56 – 61 cm	SLV60016

\* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester - Band: 80% Polyester/20% Spandex



KNÄ  
BRACING & SUPPORT

## REBOUND® DUAL ST

Rebound® DUAL-familjen är en serie ramortoser i aluminium. Med Rebound DUAL får du en lösning som passar dig.



### INDIKATIONER

Ortosen är indikerad för kombinerade och icke-kombinerade instabiliteter i:

- Främre korsbandsligamentet (ACL)
- Mediala kollateralligamentet (MCL)
- Laterala kollateralligamentet (LCL)
- Bakre korsbandet (PCL)

Endast Acculign-modell: förhållanden som kräver ensidig belastningskontroll.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kallformbar aluminiumram, remmar som kan klippas till rätt längd och D-ringar som kan servas på plats passar de flesta patienternas kroppsformer
- Designen som användaren kliver in i flyttar ramens styva manschett bakom vaden
- Verktygsfri polycentrisk led med ROM-stoppalternativ för begränsning av rörelseomfång
- Össur ledinriktningssguide, Blue is You™-inställningspunkter och taktila, numrerade remflikar ger vägledning under monteringsprocessen
- PCL-tillbehörskit som tillval för stöd av flera ledband

### NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mått tas med skjutmått vid knäleden i belastat läge



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Storlek	M/L mått	Omkrets	Höger	Vänster
XS	7.6 - 8.9 cm	38.1 - 41.9 cm	B-242520001	B-242620001
S	8.9 - 10.2 cm	41.9 - 47 cm	B-242520002	B-242620002
M	10.2 - 11.4 cm	47 - 52.1 cm	B-242520003	B-242620003
L	11.4 - 12.7cm	52.1 - 57.2 cm	B-242520004	B-242620004
XL	12.7 - 14cm	57.2 - 62.2 cm	B-242520005	B-242620005
XXL	14 - 15.2cm	62.2 - 69.9 cm	B-242520006	B-242620006
3XL	15.2 - 16.5 cm	69.9 - 76 cm	B-242520007	B-242620007

# REBOUND® DUAL ST

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND DUAL ST CUSTOM

Mätssystem	Höger	Vänster
SmartMeasure	B-155520001	B-155620002

### SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

## TILLBEHÖR

### LINER KITS

Storlek	Liner Kit, Svart*
XS	B-701090120
S	B-701090121
M	B-701090122
L	B-701090123
XL	B-701090124
XXL	B-701090125
3XL	B-701090126

\*Innehåller Doeskin thigh liner, Sensil calf liner

### LÄRLINERS

Storlek	Doeskin, Svart	Doeskin, Silver
XS	B-701090170	B-701090067
S	B-701090171	B-701090068
M	B-701090172	B-701090069
L	B-701090173	B-701090070
XL	B-701090174	B-701090071
XXL	B-701090175	B-701090072
3XL	B-701090176	B-701090073

### VADLINERS

Storlek	Active Grip, Svart	Active Grip, Silver
XS	B-701090180	B-701090074
S	B-701090181	B-701090075
M	B-701090182	B-701090076
L	B-701090183	B-701090077
XL	B-701090184	B-701090078
XXL	B-701090185	B-701090079
3XL	B-701090186	B-701090080

# REBOUND® DUAL ST

## TILLBEHÖR

### STRAP KITS & PAD KITS

Storlek	Replacement Strap Kit	PCL Strap Kit	Active Grip Strap Pad Kit
XS-L	B-701090107	B-701090065	B-701090039
XL-3XL	B-701090108	B-701090066	B-701090040

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Flexion/Extension Stop Set - Tool-Free Hinge	B-701090088
*Flexion Stop Set - Custom & Legacy	B-701090004
**Extension Stop Set - Custom & Legacy	B-701090008
D-Ring Kit	B-701090059
Condyle Pad Kit	B-701090009

\*Flexionsstoppssats: 45°, 60°, 75°, 90°

\*\*Extensionsstoppssats: 5°, 10°, 20°, 30°, 40° (0° och 10° ingår i ortosen)

### SLEEVES

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Neoprene undersleeve	Neoprene oversleeve
S	< 38 cm	20251	20051
M	38 – 45 cm	20252	20052
L	45 – 49.5 cm	20253	20053
XL	49.5 – 54.5 cm	20254	20054
XXL	54.5 – 62 cm	20255	20055
XXXL	62 – 71 cm	20256	20056
XXXXL	71 – 86 cm	20257	20057

### SLEEVE WITH MESH\*

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Sleeve with Mesh
XS	< 43 cm	SLV60011
S	43 – 46 cm	SLV60012
M	46 – 51 cm	SLV60013
L	51 – 53 cm	SLV60014
XL	53 – 56 cm	SLV60015
XXL	56 – 61 cm	SLV60016

\* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester - Band: 80% Polyester/20% Spandex



## REBOUND® DUAL CUSTOM

Rebound® DUAL var från början en fristående ortos känd för sin lätta design som kan servas på plats, och har nu utvecklats till en komplett kollektion av premiumlösningar för knäligament. Oavsett om du väljer en elegant design som du kliver in i, en anpassning efter främre skenbenet eller en skräddarsydd kombinationsdesign är alla Rebound DUALknäortoser i premiumklass konstruerade med styrkan hos flygplansaluminium och tygdelar designade för exceptionell komfort och hållbarhet. Premiumkollektionen Rebound DUAL erbjuder en mångsidighet som kan stödja alla knän, samtidigt som den utnyttjar en intuitiv teknik som ger en enkel användarupplevelse.



### INDIKATIONER

Ortosen är indikerad för kombinerade och icke-kombinerade instabiliteter i:

- Främre korsbandet (ACL)
- Mediala kollateralligamentet (MCL)
- Lateral kollateralligamentet (LCL)
- Bakre korsbandet (PCL)

Endast Acculign-modell: förhållanden som kräver unikompartmentell belastningskontroll.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Acculign™-design: enkel anpassning av ortosens längd och varus-/valgusriktning, vilket säkerställer en snabb anpassning och perfekt profil
- Elegant, stark ram: kallformbar ram med låg profil med styrkan hos flygplansaluminium, lätt att anpassa efter konturerna av patientens unika anatomi
- Halkfri Activegrip™-vadlinor: kombinerar antigravitation med förbättrad ramtäckning och premiumdämpning för att minska glidning
- Korrekt placering: Össurs ledriktningssguide ger enkel och korrekt montering för användarna, vilket säkerställer korrekt placering av ortosen i förhållande till knäet
- Enkelt för alla: enkelt Blue is You™-remsystem och taktila, numrerade remflikar
- D-ringar som kan servas på plats: teknik för justeringar när du är på språng
- Bekväm kontroll: Doeskin-lårliner och passformade remmar och remkuddar optimerar komforten
- Color Pop! kan enkelt bytas ut eller anpassas för varje användare
- Dynamisk SmartDosing®-teknik: verktygsfritt tillbehör som tillval för finjusterad smärtlindring och avlastning
- PCL-tillbehörskit som tillval för stöd av flera ledband
- Polycentrisk led med låg profil och ROM-stoppalternativ för stabilitet och begränsning av rörelseomfång
- Anpassad: Begär en anpassning efter främre skenbenet eller en nedre ram som du kliver in i

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### STANDARD

Beskrivning	Art.nr.
Vänster	B-155610001
Höger	B-155510001

M/L mått: Tas vid knäleden i belastat läge.  
Lårets omkrets tas 15 cm ovanför mitten av patella



# REBOUND® DUAL CUSTOM

## TILLBEHÖR

### SLEEVES

Storlek	Circumference 15 cm above mid patella	Neoprene undersleeve	Neoprene oversleeve	Sport undersleeve	Vadderad sportöversleeve
S	< 38 cm	20251	20051	20682	20448
M	38 – 45 cm	20252	20052	20683	20448
L	45 – 49.5 cm	20253	20053	20684	20449
XL	49.5 – 54.5 cm	20254	20054	20685	20449
XXL	54.5 – 62 cm	20255	20055		
XXXL	62 – 71 cm	20256	20056		
XXXXL	71 – 86 cm	20257	20057		

### EXTENSION STOP KIT

Färg	Art.nr.
Svart	B-701090008

Inkluderar: 5°, 10°, 20°, 30°, 40 Extensionsstopp (0° och 10° ingår i ortosen).

### FLEXION STOP KIT

Storlek	Färg	Art.nr.
Universal	Svart	B-701090004

Inkluderar: 45°, 60°, 75°, 90° Flexionsstopp

### PCL STRAP KIT

Storlek	Art.nr.
XS-XL	B-701090057
XL-3XL	B-701090058

### SMARTDOSING® KITS

Beskrivning	Art.nr.
Right Medial, Left Lateral	B-701090060
Right Lateral, Left Medial	B-701090061

### TIBIAL WEDGE KIT

Storlek	Art.nr.
Universal	B-701090001

### LINER KIT

Art.nr.
B-701090050

### CONDYLE PAD KIT

Art.nr.
B-701090009

### FIELD SERVICABLE D-RING KIT

Art.nr.
B-701090059

### STRAP KIT

Storlek	Art.nr.
XS-L	B-701090105
XL-3XL	B-701090106

### LINERS

Storlek	Doeskin vadliner	ActiveGrip lårliner
XS	B-701090028	B-701090041
S	B-701090029	B-701090042
M	B-701090030	B-701090043
L	B-701090031	B-701090044
XL	B-701090032	B-701090045
XXL	B-701090033	B-701090046
3XL	B-701090034	B-701090047

### THERMOFORMED LINER KITS (STANDARD)

Storlek	Art.nr.
XS	B-701090110
S	B-701090111
M	B-701090112
L	B-701090113
XL	B-701090114
XXL	B-701090115
3XL	B-701090116

## REBOUND® CARTILAGE

Resultatet av ledbröskkirurgi beror på patientens behandlingsföljsamhet under rehabiliteringsprocessen, och protokollet baseras på begränsad belastning av ledbrösk i kombination med en gradvis ökande aktivitetsnivå. Många rehabiliteringsprotokoll indikerar partiell viktbelastning som behandlingsstandard för framgångsrika resultat. Patienternas förmåga att följa instruktioner om partiell viktbelastning med hjälp av kryckor har dock visat sig variera.

Rebound Cartilage är en skyddande, funktionell lösning som är utformad för att främja nybildning av ledbrösk i knäet efter kirurgiska ingrepp som mikrofrakturering, brosktransplantat med allograft eller autograft samt autolog broskcellstransplantation med broskceller som odlats på ett kollagenmembran. Ledavlastning upprätthålls i flexion för att skydda brosket under läkningsprocessen och baseras på det kliniskt beprövade systemet med 3 stödpunkter och våra patenterade Cartilage Protection Straps™.



### INDIKATIONER

För knätillstånd som kan förbättras av unikompartmentell avlastning eller begränsning av rörelseomfånget, som

- Rekonstruktion vid ledbröskskador
- Meniskkirurgi
- Osteonekros
- Kondylära benmärgslesioner (benmärgsödem)
- Tibiaplatåfrakturer
- Lindrig till svår unikompartmentell knäartros.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Tar liten plats på lagret – endast 4 konfigurationer för att passa de flesta av dina patienter
- Bekvämlig – hudvänlig liner som känns bra mot huden och minskar tryckpunkter.
- Antiglidteknik – remmarnas design fäster runt den tjockaste delen av vaden för att förhindra glidning under aktivitet.
- Kontroll – SmartDosing®-vred gör att du kan kontrollera din smärta genom att finjustera remspänningen, medan Cartilage Protection Straps ser till att leden är avlastad i flexion.
- Verktygsfri – verktygsfri polycentrisk led med valfritt ROM-stopp för begränsning av rörelseomfång.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vad 15 cm under mitten av patella

# REBOUND® CARTILAGE

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Rebound Cartilage	Vänster medial	Höger medial	Vänster lateral	Höger lateral
Universal 31 - 61.5 cm	B-254610006	B-254510006	B-254620006	B-254520006

Rebound Cartilage - No Box	Vänster medial	Höger medial	Vänster lateral	Höger lateral
Universal 31 - 61.5 cm	B-254610007	B-254510007	B-254620007	B-254520007

Rebound Cartilage - Custom	Vänster	Höger
Calf circumference 25 - 61.5 cm	B-154600001	B-154500001

## SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

### CUSTOM VALBARA STANDARDFÄRGER



### SPECIALFÄRGER



## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Suspension Strap Kit	UNL00211
OA Hinge Extension Stop Tree (5°, 10°, 15°, 30°)	OAH40029
OA Hinge Flexion Stop Tree (0°, 30°, 60°, 90°)	OAH40039
Wash Bag	UON60200

### SLEEVE WITH MESH\*

Size	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Part #
XS	< 43 cm	SLV60011
S	43 – 46 cm	SLV60012
M	46 – 51 cm	SLV60013
L	51 – 53 cm	SLV60014
XL	53 – 56 cm	SLV60015
XXL	56 – 61 cm	SLV60016



\* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester - Band: 80% Polyester/20% Spandex

# REBOUND® CARTILAGE

## RESERVDelar

Service Kit*	Höger medial Vänster lateral	Höger lateral Vänster medial
Svart, Service Kit	CRT416901	CRT415901

\*Innehåller: Jersey knit thigh liner, Sensil calf liner, Popliteal pad standard, Hinge pad & Strap Kit Complete

Lärliners	Höger medial Vänster lateral	Höger lateral Vänster medial
Svart, Jersey Knit	CRT526901	CRT525901

Vadliners	Höger medial Vänster lateral	Höger lateral Vänster medial
Svart, Sensil	CRT516952	CRT515952
Svart, Jersey Knit	CRT516951	CRT515951

Strap Kit Complete*	Art.nr.
Svart, Strap Kit Complete	B-701290005

\*Innehåller: 4 straps (1 Thigh, 1 Calf, 2 CPS), 5 Alligator tabs, 2 CPS Strap pads

CPS Strap Kit*	Art.nr.
Svart, CPS Kit	B-700290005

\*Innehåller: 2 CPS Straps, 2 Alligator tabs, 2 CPS Strap pads

Buckle Clasp Kit	Höger medial Vänster lateral	Höger lateral Vänster medial
Svart	B-708217001	B-708218001

Popliteal Pad	Art.nr.
Svart, Short	B-304010105
Svart, Standard	B-304010106

Andra reservdelar	Art.nr.
Velcro Twist-Fit Attachment Kit	B-705290000
Hinge Pad	B-304120101
Alligator Kit-8 Pieces	B-704210001

## CTI® CUSTOM

CTi Custom används när behovet av stabilitet är stort och man inte vill ge avkall på komfort och hållbarhet. Jämfört med CTi3 ger den större möjligheter till exakt passform om benet har en problematisk form. CTi:s vridstyva och starka kolfiberram som utrustats med anatomiskt korrekta Accutrac®-leder och flexibla underskal ger ett rigit exoskelett som stabiliserar knäleden. Foder med andasfunktion och beläggning av Össur Sensil® Silicone säkerställer att CTi Custom hålls i rätt position på benet så att ortosen fungerar optimalt.



### INDIKATIONER

- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Måttillverkad efter den enskilda patientens unika anatomi
- Handlaminerad, Rigid pre-preg kolfiberram
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter
- Möjlighet att välja färg
- Standardmodellen avsedd för medel till hög stötnivå
- Pro-Sportmodell för aktiviteter med högsta stötnivå (med extra lager av kolfiber jämfört med Standardmodellen)
- Vapor-modell för låg till medelhög stötnivå

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

#### VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD



#### SPECIALFÄRGER



CTi® Custom går även att få med motiv. Kontakta kundtjänst för mer information och prisuppgift.

# CTI® CUSTOM

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Standard		Pro sport		Vapor	
Vänster	Höger	Vänster	Höger	Vänster	Höger
B-116600010	B-116500010	B-117600010	B-117500010	B-118600010	B-118500010

### MÄTVERKTYG

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000



### SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

### TILLBEHÖR/TILLVAL

#### TIBIAPOLSTRING

Beskrivning	Art.nr.
CTI custom polstring	B-411500115

#### AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Beskrivning	Art.nr.
AMS Wrap EVA	22095
AMS Wrap Neo	22094
AMS Wrap Neo XL (omkrets vad >43 cm)	22152

#### BANDSATSER

Storlek	Art.nr.
S, M	B-701140103
L, XL, XXL	B-701140104

#### PCL KITS

Storlek	Art.nr.
S, M	B-705000132
L, XL, XXL	B-705000235

# CTI® CUSTOM

## TILLBEHÖR

### BANDPOLSTRING

Storlek	Art.nr.
S	B-304010057
M, L	B-304010058
XL, XXL	B-304010059



Strap pads

### AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Beskrivning	Art.nr.
AMS Wrap EVA	22095
AMS Wrap Neo	22094
AMS Wrap Neo XL	22152



AMS Wrap

### MX GEAR

Beskrivning	Omkrets*	Art.nr.
Patella Cup		B-711130011
Gear Guards		B-705000003
MX Kit S (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	43 - 46 cm	B-711140002
MX Kit M (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	46 - 51 cm	B-711140003
MX Kit L (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	51 - 54 cm	B-711140004
MX Kit XL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	54 - 56 cm	B-711140005
MX Kit XXL (patella cup, gear guards, Sleeve with Mesh, stickers)	56 - 61 cm	B-711140006



MX Kit

Gear guards

Patella cup

Unloader One X Sleeve

Stickers

Neopren under- or oversleeve

Softsleeve

Sleeve with Mesh

### SLEEVES

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Softsleeve	Neoprene undersleeve	Neoprene oversleeve
S	< 38 cm	20643	20251	20051
M	38 – 45 cm	20644	20252	20052
L	45 – 49.5 cm	20644	20253	20053
XL	49.5 – 54.5 cm	20645	20254	20054
XXL	54.5 – 62 cm	20645	20255	20055
XXXL	62 – 71 cm	20646	20256	20056
XXXXL	71 – 86 cm	20647	20257	20057

### SLEEVE WITH MESH\*

Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Sleeve with Mesh
XS	< 43 cm	SLV60011
S	43 – 46 cm	SLV60012
M	46 – 51 cm	SLV60013
L	51 – 53 cm	SLV60014
XL	53 – 56 cm	SLV60015
XXL	56 – 61 cm	SLV60016



\* Sleeve with Mesh: Main fabric: 92% Cotton/8% Spandex - Mesh: 100% Polyester - Band: 80% Polyester/20% Spandex

### ANDRA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
CTi D-Ring Kit Standard 2 x 1" and 2 x 1.5" D-rings	B-704132600
CTi D-Ring Kit 2" 2x 2" D-rings	B-704132602
CTi Condyle Pad Kit	B-704130150
Extension Stop Kit	22130
Flexion Stop Kit	19254

## CTi<sup>®</sup>3

CTi<sup>®</sup>3 ger ett nytt perspektiv på ramortoser. Innovativ teknik gör CTi3 till ett utmärkt alternativ för de flesta av dina patienter. CTi3 är lämplig för både vardagsaktiviteter och sport, och erbjuder hög kvalitet med sin förbättrade konstruktion och anatomiska passform för ökad komfort.



### INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet och skydd kring knäet, till exempel skador på främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL), samt roterande och kombinerade instabiliteter.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Förbättrad konstruktion – Lätta, höghållfasta ramar i kolkomposit ger optimal styvhet i relation till vikt
- Anatomisk passform – Utformad för att passa fler benformer och införlivar ett Accutrac<sup>®</sup>-ledstycke som följer knäets anatomiska rörelse.
- Förbättrad komfort – Unika foder förbättrar komforten med sina speciellt sydda blockmönster, som ger en balans mellan dämpning och ventilation.
- Tillbehör och reservdelar som är lätta att använda, inklusive MX-satser, ersättningssatser med remmar, foder och flexionsstopp.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

#### CTi3

Storlek	M/L-Mått	Omkrest	Vänster	Höger
S	8-10 cm	40-47 cm	CTI-23002	CTI-22002
M	10-11 cm	45-55 cm	CTI-23003	CTI-22003
L	11-13 cm	52-61 cm	CTI-23004	CTI-22004
XL	13-14 cm	58-67 cm	CTI-23005	CTI-22005

Innehåller: Kondylkuddeset och sträckstoppset (0° sträckstopp och standardkondylplatta är förinstallerade).

Notera: M/L-mätningar är den föredragna och mest exakta mätningen för CTi. Mätning av låromkrets ska användas när M/L-måtten är mellan olika storlekar.



# CTi<sup>®</sup>3

## TILLBEHÖR & RESERVDELAR

### CTi3 MX KIT

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23132	CTI-22132
M	CTI-23133	CTI-22133
L	CTI-23134	CTI-22134
XL	CTI-23135	CTI-22135

Innehåller: Impact guard, Mesh-Sleeve, (CTi-Dekaler) och produktväska.

### POLSTRING

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23322	CTI-22322
M	CTI-23323	CTI-22323
L	CTI-23324	CTI-22324
XL	CTI-23325	CTI-22325

### HOOK SET

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23332	CTI-22332
M	CTI-23333	CTI-22333
L	CTI-23334	CTI-22334
XL	CTI-23335	CTI-22335



### BANDSATSER

Storlek	Art.nr.
S	CTI-24222
M	CTI-24223
L	CTI-24224
XL	CTI-24225

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Guard Elastic Cord	CTI-24130
Guard Screws	CTI-24140
Tibial Wedge Pad	22077
Condyle Pad Set (Thin, Standard, Thick)	CTI-24320
Extension Stop Set (0°, 5°, 10°, 20°, 30°)	CTI-24430
Flexion Stop Set (0°, 60°, 75°, 90°)	CTI-24440
Hinge Sticker Set	CTI-24450
D-Ring Set	CTI-24510
CTi3 PCL Strap Kit	CTI-24520

### MESH-SLEEVE

Storlek	Art.nr.
S	SLV60012
M	SLV60013
L	SLV60014
XL	SLV60015

## CTI® OA

CTi har i 30 år satt standarden för måttbeställda knäortoser för ligamentskador. Lägg till varus- eller valguskorrigerande till denna klassiker och du får en utmärkt, dubbelledad knäortos för både osteoartrit och ligamentskador för dina mer aktiva patienter. Inkluderar patenterad Sensil®-polstring som eliminerar glidning, en flexibel medial manschett för bättre skydd mot rotationskrafter och hudvänlig SensEdge-beläggning på sprutformade delar för att undvika tryckpunkter



### INDIKATIONER

- Mild till svår unikompartmentell artros
- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Krävande vardagliga aktiviteter

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Rigid kolfiberram
- Måttillverkad efter varje patients unika anatomi med upp till 7° varus-/valguskorrigerande inbyggd i ramen
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

### BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Beskrivning	Vänster	Höger
CTi OA	B-116630010	B-116530010

Se tillbehör och mätverktyg under CTi custom.

### SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

## REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST

Rebound DUAL Basic och Rebound DUAL Basic ST erbjuder det värde och den enkelhet du behöver för att navigera i komplexa landskap. Rebound DUAL kollektionen är mångsidig och gör att Össur kan erbjuda högkvalitativa one-stop-lösningar från en och samma källa för att hjälpa användaren att övergå till en lyckad återhämtning.



Rebound DUAL Basic

Rebound DUAL Basic ST  
(Step-Through)

### INDIKATIONER

Rebound Dual Basic och Rebound Dual Basic ST är avsedda för kombinerade och icke-kombinerade instabiliteter i följande ligament:

- Främre korsbandet (ACL)
- Mediala kollateralligamentet (MCL)
- Lateral kollateralligamentet (LCL)
- Bakre korsbandet (PCL)
- Tillstånd som kan dra nytta av unicompartmental avlastning av knäet (endast möjligt med Rebound Dual Basic)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Med en topp ram som är multifunktionell och justerbar, ger den möjligheten att förlänga eller förkorta ramen enligt längden på patienten eller justerbar till varus/valgus position i knäet (gäller endast Rebound DUAL Basic)
- Inpassningsguiden till leden underlättar korrekt placering av ortosen i förhållande till benet
- Diskret och lätt aluminiumram
- Lårliner i sämskskinn för komfort och halkfri Activegrip™-remkudde
- Lätt anpassningsbara/klippbara remmar med numrering på
- Polycentrisk led med låg profil och stoppalternativ för stabilitet och begränsning av rörelseomfång
- Finns tillgänglig i design som patienten kliver i eller med främre ram i storlek XS-3XL
- Lämplig för sporter med låg till hög aktivitetsnivå och glidsport
- Valfritt PCL-tillbehörskit för att stödja flera ligament

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 15 cm över mitten av patella

# REBOUND® DUAL BASIC OCH REBOUND® DUAL BASIC ST

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

**X = 5** (höger)  
**6** (vänster)  
**Y = 1** (Rebound DUAL Basic)  
**2** (Rebound DUAL Basic ST)

Beskrivning	Storlek	M/L mått*	Omkrets lår	Art.nr.
Rebound DUAL Basic eller Rebound DUAL Basic ST*	XS	7.6 - 8.9cm	38.1 - 41.9cm	B-242XY0001B
	S	8.9 - 10.2cm	41.9 - 47cm	B-242XY0002B
	M	10.2 - 11.4cm	47 - 52.1cm	B-242XY0003B
	L	11.4 - 12.7cm	52.1 - 57.2cm	B-242XY0004B
	XL	12.7 - 14cm	57.2 - 62.2cm	B-242XY0005B
	2XL	14 - 15.2cm	62.2 - 69.9cm	B-242XY0006B
	3XL	15.2 - 16.5cm	69.9 - 76cm	B-242XY0007B

## UTBYTESPOLSTRING TILLBEHÖR

Storlek	Basic Liner Art.nr.	Basic ST Liner Art.nr.
XS	B-701090130	B-701090140
S	B-701090131	B-701090141
M	B-701090132	B-701090142
L	B-701090133	B-701090143
XL	B-701090134	B-701090144
2XL	B-701090135	B-701090145
3XL	B-701090136	B-701090146

## RESERVDELAR

Storlek	Art.nr.
RDUAL Basic Strap Kit XS-L	B-701090137
RDUAL Basic Strap Kit XL-3XL	B-701090138
RDUAL Basic ST Strap Kit XS-L	B-701090147
RDUAL Basic ST Strap Kit XL-3XL	B-701090148
RDUAL Basic ROM Stop Kit	B-701090109
Condyle Pad Kit	B-701090009

## TILLBEHÖR

Storlek	Art.nr.
RDUAL Basic ROM Stop Kit	B-701090109
RDUAL Basic PCL Strap Kit XS-L	B-701090057
RDUAL Basic PCL Strap Kit XL-3XL	B-701090058
RDUAL Basic ST PCL Strap Kit XS-L	B-701090065
RDUAL Basic ST PCL Strap Kit XL-3XL	B-701090066

\* Rebound DUAL Basic ST är 35.5 cm

## REBOUND® PCL

PCL har till skillnad från ACL förmågan att läka efter en skada. PCL utsätts för olika typer av tånjningar när knäet böjs. Otillräcklig läkning efter en PCL-ruptur kan leda till besvär som kronisk anterior knäsmärta eller knäartros. Om PCL tillåts läka i en utsträckt position kan det leda till kronisk instabilitet och funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att hålla PCL i en korrekt fysiologisk position under konservativ eller postkirurgisk rehabilitering.

Rebound PCL är världens första dynamiska PCL-ortos. Den applicerar en fysiologiskt korrekt dynamisk kraft på PCL under rehabiliteringen.

FUNCTIONAL HEALING - WHERE MOBILITY MEANS RECOVERY



### INDIKATIONER

- Skada på bakre korsbandet (PCL), både vid post - operativ behandling av rekonstruerande PCL eller vid funktionell icke-kirurgisk rehabilitering av PCL.



Video: Rebound PCL - Clinician Fitting Instructions (5 min 57 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- DTS (Dynamic Tension System) är framtaget för att gradvis öka belastningen på tibia när knäet böjs genom att applicera anterior dragkraft som avlastar PCL och underlättar läkningen.
- Skruvnycklarna ger tre olika alternativ för att anpassa den standardiserade och biomekaniskt korrekta posteriora belastningen på tibia efter varje enskild patient. Nycklarna ger även möjlighet att justera den posteriora belastningen på tibia, t.ex. vid svullnad.
- Lättviktsortos med patenterad vadlinjer i Sensil®-silikon och lärliner i doeskin som förhindrar glidning och ger komfort åt patienten.
- Specialtillverkad posterior ram för bästa möjliga passform och stöd med öppning fram till för enkel på- och avtagning.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position.
- Omkrets: mått tas 15 cm ovanför och nedanför mitten av patella
- Använd SmartMeasure för måttanpassad ortos.

### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING


Storlek	M/L Mått	Tibia*	Femur**	Vänster	Höger
S	8.9 - 10.2 cm	29 - 34.5 cm	42 - 45 cm	B-124501161	B-124501158
M	10.2 - 11.4 cm	34.5 - 38 cm	45 - 51cm	B-124501162	B-124501159
L	11.4 - 12.7 cm	38 - 42 cm	51 - 58.5cm	B-124501163	B-124501160
XL	12.7 - 14.0 cm	42 - 45.7 cm	58.5 - 66.7cm	B-124501155XL	B-124501154XL

\* Omkrets: mått tas 15 cm nedanför mitten av patella

\*\* Omkrets: mått tas 15 cm ovanför mitten av patella

Jämförelse av posterior belastning på tibia från en statisk PCL-ortos respektive den dynamiska Rebound PCL-ortosen. Bearbetning av diagram från LaPrade et al.5

LaPrade RF, Smith SD, Wilson KJ, Wijidicks CA. "Quantification of functional brace forces for posterior cruciate ligament injuries on the knee joint: an in vivo investigation." Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc [Internet]. 2014 Aug 22 [cited 2014 Dec 11]; Se: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145947>

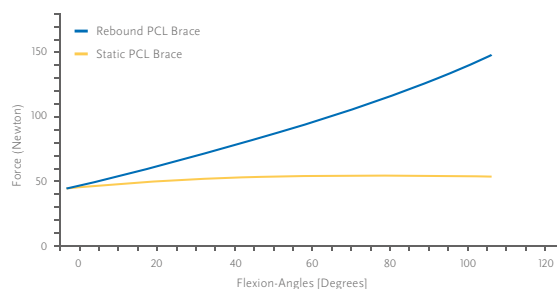

# REBOUND® PCL

## REBOUND PCL CUSTOM

### MÄTTBEGRÄNSNING

15 cm ovanför mitten av patella	15 cm nedanför mitten av patella	Vänster	Höger
36,8 - 77,5 cm	22,9 - 57,2 cm	B-124501155	B-124501154

Minsta längd innanlår (mätt från mitten av patella till perineum): 28 cm  
TIPS! Använd Össur SmartMeasure app till iPhone/iPad för att beställa en Custom-version.

### SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

### TILLBEHÖR

#### BAND

Storlek	Art.nr.
XS - L	PCL00061
XL - XXL	PCL00062



Shear Knob Kit

#### TILLVAL

Beskrivning	Art.nr.
Extension Stop Kit - möjliggör låsning vid 0°, 5°, 10°, 20°, 30° och 40° extension	B-705130042
Flexion Stop Kit - möjliggör låsning vid 0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90° och 105° flexion	B-705130043
Shear Knob Kit	B-465350087
Kondylkuddar Kit	B-705130046
PCL Pad	B-705000036

Standard upper liner kit	S	M	L
Vänster	B-124501171	B-124501172	B-124501173
Höger	B-124501165	B-124501166	B-124501167

Standard lower liner kit	S	M	L
Vänster	B-124601177	B-124601178	B-124601179
Höger	B-124501177	B-124501178	B-124501179

Doeskin lower liner kit	S	M	L
Vänster	B-124601183	B-124601184	B-124601185
Höger	B-124501183	B-124501184	B-124501185

#### VALBARA STANDARDFÄRGER UTAN EXTRA KOSTNAD



## REBOUND® ACL

Rebound ACL är ett framsteg inom ortoser och är utformad för att på ett bekvämt sätt applicera en anatomiskt korrekt och dynamisk belastning på det främre korsbandet. Oavsett om den används vid konservativ eller kirurgisk behandling kan Rebound ACL komplettera protokoll och ge knäleden optimala biomekaniska omständigheter som en grund för långsiktiga och lyckade patientresultat. Innovativ teknik i Rebound® Dynamic Tension System (DTS) möjliggör personanpassade och justerbara inställningar som minskar belastningen på ett läkande främre korsband.



### INDIKATIONER

- Tillstånd som förbättras av agonistisk kraft som varierar under flexion i proportion till spänningen i det främre korsbandet, som appliceras på skenben och lårben i sagittalplanet. Dessa kan omfatta följande:
  - skada på främre korsband (ACL)
  - rekonstruktion
  - icke-kirurgisk behandling.



**Video:** Rebound ACL - Clinician Fitting Instructions (5 min 57 sec)



**Video:** Rebound ACL - Clinician Custom-Fit Modifications (2 min 45 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR


- Dynamisk teknik för knästabilitet, med Dynamic Tension System™ som ger det främre korsbandet en agonistisk, dynamisk kraft som är beroende av flexionsvinkeln (LaPrade et al., 2017) och utformad för att reducera främre draglåda och främja knästabiliteten.
- Specifik belastningsanpassning efter patientens individuella anatomi och rehabiliteringskrav
- Med stöd från kliniska och biomekaniska studier har Rebound ACL visat sig minska belastningen på det främre korsbandet under aktivitet och avsevärt minska belastningen på menisken i knän med bristfälligt främre korsband (Tomescu et al., 2017).
- Biokompatibelt och högteknologiskt material, inklusive Blue is You™-inställningspunkter för patienten och ActiveGrip™-liners, främjar passform och komfort
- Lätt aluminiumram av flygplanskvalitet
- Finns i storlek SM–XL
- Begränsning av rörelseomfång för flexion och extension är möjligt vid behov
- Den bakre ramen är optimerad för passform och stöd, med en öppen framsida för enkel på- och avtagning
- Rebound® Dynamic Tension System (DTS) är kliniskt testad för komfort och validerad av slutanvändare. Tack vare data om belastningskartläggning som samlats in under rehabiliteringsaktiviteter ger den en bekväm belastning på det bakre låret och främre skenbenet.

# REBOUND® ACL

## NÖDVÄNDIGA MÅTT



M/L-mått tas i knäleden i normal, vikt bärande position.

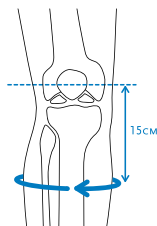

Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG


### STANDARD

Storlek	Vänster	Höger	M/L-mått	Omkretsmått 15 cm nedanför mitten av patella	Omkretsmått 15 cm ovanför mitten av patella
S	B-124601191	B-124501191	8.9-10.2 cm	29.2-34.3 cm	41.9-47.0 cm
M	B-124601192	B-124501192	10.2-11.4 cm	34.3-39.4 cm	47.0-52.1 cm
L	B-124601193	B-124501193	11.4-12.7 cm	39.4-44.5 cm	52.1-57.2 cm
XL	B-124601194	B-124501194	12.7-14.0 cm	44.5-49.5 cm	57.2-62.2 cm

Rekommenderas för patienter som är 156 cm eller längre.

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.
Extensionsstoppssats (0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°)	B-124702035	Shear Knob Kit	B-705130051
Flexionsstoppssats (0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90°, 105°)	B-124702034	Condyle Pad Kit	B-701090009
S/M Bandsats	B-124702030	Tibial Pad	B-124702032
LG/XL Bandsats	B-124702031	Tibial Hex Pad	B-124702033

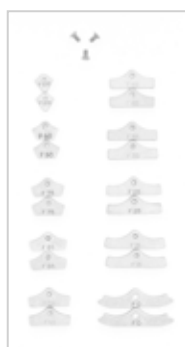


#B-124702035



#B-124702034




#B-705130051

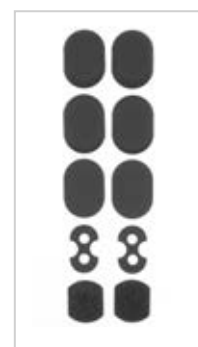

#B-701090009



#B-124702030

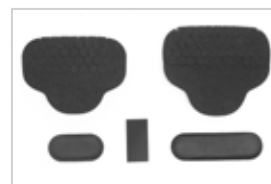

#B-124702033



#B-124702033 Close Up



# REBOUND® ACL

## TILLBEHÖR

### ANTI-MIGRATION WRAP

Storlek	Höger	Vänster
S/M	B-124501195	B-124601195
S/M HEX	B-124501196	B-124601196
L/XL	B-124501197	B-124601197
L/XL HEX	B-124501198	B-124601198

### UPPER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702004	B-124702000
M	B-124702005	B-124702001
L	B-124702006	B-124702002
XL	B-124702007	B-124702003

### LOWER ACTIVEGRIP LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702014	B-124702010
M	B-124702015	B-124702011
L	B-124702016	B-124702012
XL	B-124702017	B-124702013

### LOWER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702024	B-124702020
M	B-124702025	B-124702021
L	B-124702026	B-124702022
XL	B-124702027	B-124702023



Upper Doeskin Liner Kit#B-124702003



Lower Activegrip Liner Kit#B-124702013

## REBOUND® ACL CUSTOM

Rebound ACL är ett framsteg inom ortoser och är utformad för att på ett bekvämt sätt applicera en anatomiskt korrekt och dynamisk belastning på det främre korsbandet. Oavsett om den används vid konservativ eller kirurgisk behandling kan Rebound ACL komplettera protokoll och ge knäleden optimala biomekaniska omständigheter som en grund för långsiktiga och lyckade patientresultat. Innovativ teknik i Rebound® Dynamic Tension System (DTS) möjliggör personanpassade och justerbara inställningar som minskar belastningen på ett läkande främre korsband.



### INDIKATIONER

- Tillstånd som förbättras av agonistisk kraft som varierar under flexion i proportion till spänningen i det främre korsbandet, som appliceras på skenben och lårben i sagittalplanet. Dessa kan omfatta följande:
  - skada på främre korsband (ACL)
  - rekonstruktion
  - icke-kirurgisk behandling

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamisk teknik för knästabilitet, med Dynamic Tension System™ som ger det främre korsbandet en agonistisk, dynamisk kraft som är flexionsvinkelberoende (LaPrade et al., 2017) och utformad för att reducera främre draglåda och främja knästabiliteten.
- Specifik belastningsanpassning efter patientens individuella anatomi och rehabiliteringskrav
- Med stöd från kliniska och biomekaniska studier har Rebound ACL visat sig minska belastningen på det främre korsbandet under aktivitet och avsevärt minska belastningen på menisken i knän med bristfälligt främre korsband (Tomescu et al., 2017).
- Biokompatibelt och högteknologiskt material, inklusive Blue is You™-inställningspunkter för patienten och ActiveGrip™-liners, främjar passform och komfort
- Lätt aluminiumram av flygplanskvalitet
- Finns i storlek SM–XL
- Rörelseomfångslås för flexion och extension
- Den bakre ramen är optimerad för passform och stöd, med en öppen framsida för enkel på- och avtagning
- Rebound® Dynamic Tension System (DTS) är kliniskt testad komfort och validerad av slutanvändare. Tack vare data om belastningskartläggning som samlats in under rehabiliteringsaktiviteter ger den en bekväm belastning på det bakre låret och främre skenbenet.

# REBOUND® ACL CUSTOM

## SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)

Beskrivning	Art.nr.
Fjäderbelastat skjutmått	B-312000000

Scans och gips accepteras också. M/L-mått krävs.

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets vad 15 cm under mitten av patella
- Omkrets vad 20 cm under mitten av patella
- Omkrets vad 7,5 cm under mitten av patella
- M/L-mått
- Omkrets lår 15 cm över mitten av patella
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella
- Omkrets lår 7,5 cm över mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGEN

### CUSTOM

Art.nr.	Sida	Min/Max M/L-mått*	Min/Max omkrets ovanför mitten av patella**	Min/Max omkrets nedanför mitten av patella***	Mätmetod
B-124701000	Höger	8.9 - 14 cm	41.9 - 62.2 cm	29.2-49.5 cm	SmartMeasure, gips
B-124701001	Vänster				

\*Knäets M/L-mått

\*\*Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

\*\*\*Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

Rekommenderas för patienter som är 156 cm eller längre.

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.
Extensionsstopp, kit (0°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°)	B-124702035	Shear Knob Kit	B-705130051
Flexionsstopp, kit (0°, 15°, 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75°, 90°, 105°)	B-124702034	Condyle Pad Kit	B-701090009
S/M Bandsats	B-124702030	Tibial Pad	B-124702032
LG/XL Bandsats	B-124702031	Tibial Hex Pad	B-124702033

# REBOUND® ACL CUSTOM

## TILLBEHÖR

### ANTI-MIGRATION WRAP

Storlek	Höger	Vänster
S/M	B-124501195	B-124601195
S/M HEX	B-124501196	B-124601196
L/XL	B-124501197	B-124601197
L/XL HEX	B-124501198	B-124601198

### UPPER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702004	B-124702000
M	B-124702005	B-124702001
L	B-124702006	B-124702002
XL	B-124702007	B-124702003

### LOWER ACTIVEGRIP LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702014	B-124702010
M	B-124702015	B-124702011
L	B-124702016	B-124702012
XL	B-124702017	B-124702013

### LOWER DOESKIN LINER KIT

Storlek	Höger	Vänster
S	B-124702024	B-124702020
M	B-124702025	B-124702021
L	B-124702026	B-124702022
XL	B-124702027	B-124702023

## BIOMEKANIK UNDER KNÄFLEXION - ACL

I ett friskt knä är krafterna på de främre ligamenten relaterade till knävinkeln. Krafterna är högst under de sista 35 graderna tills dess att full extension erhålls.

Grafen visar förhållandet "angle-force", publicerad av Smith et al. 2013 i artikeln "Functional bracing of ACL injuries: Current state and future directions", Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 27 april 2013

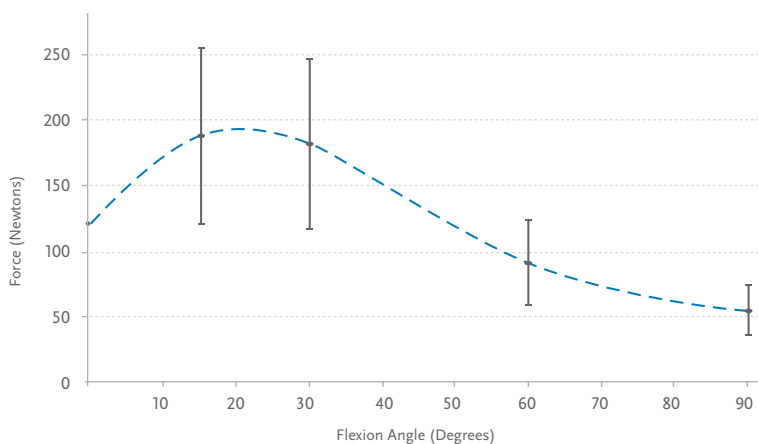


Fig. 2 Graph of the average anterior-posterior in situ force of the ACL in vivo experienced during walking, squatting, single leg lunge, isometric extension, and isokinetic extension.

# MEASUREMENT FORM CTi<sup>®</sup> CUSTOM BRACE

## CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM

Date: \_\_\_\_\_ Customer #: \_\_\_\_\_ Purchase order #: \_\_\_\_\_

### Required patient information

Patient ID: \_\_\_\_\_ Diagnosis: \_\_\_\_\_

Height: \_\_\_\_\_ cm. Weight: \_\_\_\_\_ kg. Date of Birth: \_\_\_\_\_ Sex(m/f): \_\_\_\_\_  Left leg  Right leg

Bilats - l/r

### Customer:

Contact: \_\_\_\_\_ Prescribing consultant: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_ Clinic: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Please fill out all mandatory fields (marked in bold)

- VAPOR**  
(For low to medium impact levels)
- STANDARD\***  
(For medium to high impact levels)
- PRO SPORT**  
(For highest impact levels)

### OPTIONS

#### D-ring attachment

- Screwed  Riveted\*
- Internal  External\*

#### Thigh Liner

- None\*  Sensil
- Evazote/Foam

#### Calf Liner

- Sensil\*  Evazote/Foam

#### Extension Stops

- 0°  10°\*  20°  30°  40°

### SPECIAL MODIFICATIONS

(Additional charges may apply)

- Flexion Stop Kit  
\_\_\_\_\_° (0-90° installed)
- PCL System  
(Helps reduce posterior drawer)
- ACL Cable Kit (Additional stability in ext)
- Hyperextension Straps (5th strap added)
- Ski Boot Attachment (Brace-to-boot)

Other: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### SPECIAL NOTES:

- Please contact me about this order

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*This configuration is delivered by default, if nothing is filled in.

### SPECIAL CONDITIONS:

- OA (Osteoarthritis unloading)
  - Medial
  - Lateral \_\_\_\_\_°  
(Choose 1° to 7° of unloading, 4°\*)
- Prominent VMO
- Prominent VLO
- Hockey Quads
- Prominent Tibialis Anterior
- Prominent Fibular Head
- RTM  
(Rounded Tibial Member)
- Osgood-Schlatters Disease
- Super Short  
(For 1.60m and under)
- Shorten Frame Component
  - Tibial  1.3cm  2.6cm  3.9cm
  - Femoral  1.3cm  2.6cm  3.9cm

### COLORS:

- Select finish:
- MATTE\***  **GLOSS**
- Select color:
- Black\*  Yellow
  - Ocean Blue  Orange
  - White  Lime Green
  - Silver  Pink
  - Red  Charcoal
  - Champagne  Navy Blue

### ACCESSORIES:

(**Bolded** are free with initial order only)

- AMS WRAP**
  - Neoprene\***  **Evazote**
- Sofsleeve**
  - Neoprene Undersleeve
  - Neoprene Oversleeve
  - Padded Sports Oversleeve
  - Sport Sleeve
  - MX Patella Cup
  - MX Gear Guards
  - MX Complete Kit  
(Patella Cup, Gear Guards, Sport Sleeve)

Other: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### CUSTOM PAINT:

(Additional fee plus extra delivery time)

Select custom finish:

- MATTE\***  **GLOSS**

Select custom color:

- Hibiscus  Sports Equipment
- Flag  Camouflage
- Flames  Single Color
- Metal  2-color Fade
- Sponge  2-color Half & Half
- Celestial  Sports Fan

Special

(Provide design file with order)

# MEASUREMENT FORM CTI® CUSTOM BRACE

## CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM

### CUSTOM MEASURING SYSTEM

Left leg  Right leg

1: \_\_\_\_\_ Hinge Width

2: \_\_\_\_\_ Hinge Depth

**LATERAL MEASUREMENTS**

3: \_\_\_\_\_ Contour

4: \_\_\_\_\_ A-P

5: \_\_\_\_\_ Contour

6: \_\_\_\_\_ A-P

7: \_\_\_\_\_ Contour

8: \_\_\_\_\_ A-P

9: \_\_\_\_\_ Tibia

10: \_\_\_\_\_ Tibia

11: \_\_\_\_\_ Contour

12: \_\_\_\_\_ A-P

13: \_\_\_\_\_ Tibia

**MEDIAL CONTOURS**

14: \_\_\_\_\_ Contour

15: \_\_\_\_\_ Contour

16: \_\_\_\_\_ Contour

17: \_\_\_\_\_ Contour

**CIRCUMFERENCES (in centimeters)**

18. Level A \_\_\_\_\_

19. Level B \_\_\_\_\_

20. Level C \_\_\_\_\_

21. Level E \_\_\_\_\_

22. Distal Border of Patella \_\_\_\_\_

**JOINT SPACE**

23.

Caliper measurement at joint space (1.6 - 2.0 cm less than #1) Take measurement in a weight bearing position at full extension

**SHORTEN TIBIA COMPONENT/ SKI BOOT MEASUREMENT**

\_\_\_\_\_ cm from the distal border of the patella to the top of the boot. Ski boot attachment is not available if the measurement is less than 18cm.

### CMS INSTRUCTIONS

Patient should not be wearing shoes for the measurement procedure.

There should be no space between the block and the back of the knee. The system will not be accurate if the knee is measured in a flexed position.

1. Slide the lateral pad to the knee. Tighten to patient's individual comfort level. This measurement will be the actual width of the patient's knee brace.

2. Pre-set hinge depth at approximately 3.5cm, adjust if needed.

3. – 13. Patient should remain still with foot dorsiflexed throughout the lateral measurements and recording process.

9., 10. and 13. Measure using the horizontal bar of the tool measure the position of the highest point of the tibialis anterior.

- 9. As reference take the #1 hinge width / 2 - 1 = ...  
(for example 13cm / 2 - 1 = 5.5cm)
- 10. should be 0.5cm less than 9.
- 13. should be 1cm less than 9.


14. – 17. The patient may now relax throughout measuring the medial contours from the contracted position. Please note that with larger legs this measurement may be a negative value. Please read the numbers carefully and record negative values if necessary, such as -0.5 or -1.5

18. – 22. Take the measurements with a soft measuring tape ensuring that the tape is snug but not to loose/tight.


# MEASUREMENT FORM CTI® CUSTOM BRACE

CUSTOM MEASUREMENT SYSTEM


## SPECIAL CONDITIONS REFERENCES

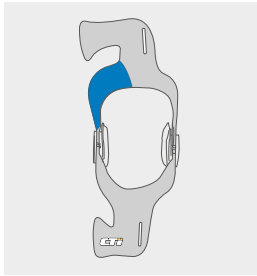


Prominent VLO

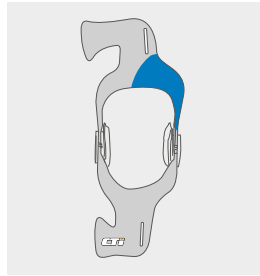


Prominent VMO

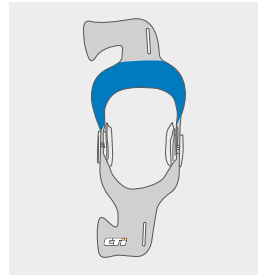


Hockey Quads

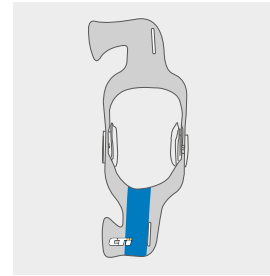


Prominent Tibialis Anterior

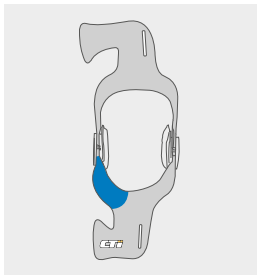


Prominent Fibular Head

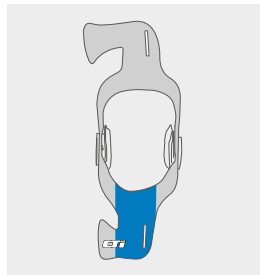

RTM  
(Rounded Tibial Member)

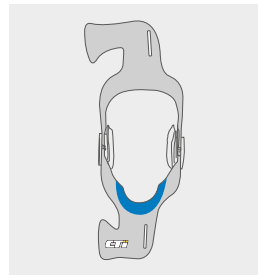


Osgood-Schlatters Disease

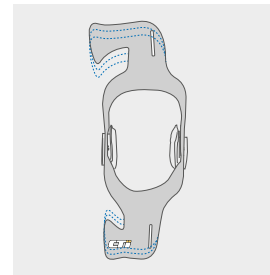

Shorten Femoral Component  
Shorten Tibial Component



Super Short

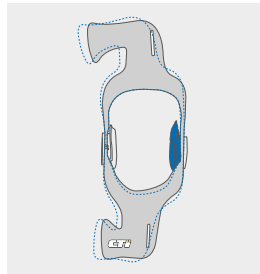

Osteoarthritis Unloading

## C180™ ROCKET

Med mindre storlek och Accutrac®-leder som är modifierade för att passa unga knän ger den lättviktiga C180 Rocket stöd för barn med ligamentinstabilitet.

### INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet kring knäet, till exempel roterande och kombinerade instabiliteter i främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med lättanvända extensionsstopp
- Halvstyv ram bestående av en vävd kolfiberram fylld med matrismaterial av akryl som är värmeformbar för att kunna anpassas



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- M/L mått tas vid knäleden i normal, vikt bärande position.
- Omkrets: strax under knäskålens distala gräns

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skjutmått	Omkrets	Vänster	Höger
S	7.6 - 8.9 cm	24.1 - 27.9 cm	C180KSL	C180KSR
L	8.3 - 9.5 cm	26 - 29.8 cm	C180KLL	C180KLR
XL	8.9 - 10.2 cm	27.9 - 32.1 cm	C1802XSL	C1802XSR

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	
Motocross kit S / L	10833	
Motocross kit XL	B-705130072	
Patella Cup S / L	25029	
Patella Cup XL	B-711130000	
Calf Liner S	25061 (L)	26062 (R)
Calf Liner L	25057 (L)	26058 (R)
Calf Liner XL	25106 (L)	25107 (R)
Thigh Liner S	25060 (L)	26063 (R)
Thigh Liner L	25056 (L)	26059 (R)
Thigh Liner XL	25104 (L)	25105 (R)



## REBOUND® POST-OP KNEE

En enkel, mångsidig, postoperativ ortos som är lättanvänd för alla. Oavsett om du justerar ROM eller skenans längd, kommer du uppskatta enkelheten hos Rebound Post-op Knee.



Video: Rebound Post-Op Knee - Clinician Fitting instructions (3 min 42 sec)



### INDIKATIONER

- ACL, PCL, MCL, LCL skador/rekonstruktion
- Meniskkirurgi
- Kondylära frakturer
- Patellasenekirurgi
- Hög tibia osteotomi (HTO)
- Osteokondrala frakturer
- Tibiaplatå fraktur (Partiella eller totala) ledbandsrupturer i knät

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kräver inga verktyg, multifunktionell Smart-Fit™ förpackning
- Finns som universal, höger/vänster, contour och pediatric
- OneTouch™ -låsknapp för enkel justering av ROM med lock-out-funktion.
- Teleskop-ram med OneTouch™
- Färgkodning, Blue is You™, och numrering för banden indikerar vad patienten kan justera själv
- Quick-fit-spänne för enkel applicering

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

### BESTÄLLNINGSPOLSTRING

#### REBOUND POST-OP KNEE

Storlek	Omkrets lår	Cool	Täckande polstring
Pediatric	30,5 - 63,5 cm	B-8381470	
Universal, Left contoured	41 - 81 cm	B-8381680	B-8382680
Universal, Right contoured	41 - 81 cm	B-8381580	B-8382580
Universal	41 - 81 cm	B-8381480	B-8382480
Universal XL	41 - 96,5 cm	B-8381490	B-8382490

#### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.	Beskrivning	Art.nr.
ROM- lås, kit	B-8380005	Standard buckle & pad kit	B-8381096
Alligator velcro kit	B-8380006	AMS Kit Paediatric	B-8381093
Adhesive velcro kit pediatric	B-8380008	AMS Kit Regular	B-8381094
Adhesive velcro kit universal / universal XL	B-8380007	AMS Kit XL	B-8381095

#### POLSTRING

De Beskrivning scription	Art.nr.	Täckande polstring
Pediatric	B-8381072	
Universal*	B-8381082	B-8382082
Universal XL	B-8381092	B-8382092

\*Passar till universal, left contoured, right contoured

# FORMFIT POST-OP KNEE

## INDIKATIONER

- Efter operation/skada, kontroll av rörelseomfång eller immobilisering
- Indicerad för ligament- och frakturrelaterade operationer och när ett kontrollerat rörelseomfång är nödvändigt

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stag som kan brytas loss för en enkel längdjustering utan verktyg
- OneTouch™ – ROM-led som är enkel att justera med låsningsfunktion från -10° till 30° (steg om 10°)
- Extensionskontroll från -10° till 90° (steg om 10°)
- Flexionskontroll från 0° till 120° (steg om 10°)
- Finns med svalt tyg eller skummodell, i 3 längder och två storlekar (Regular och XL)



## NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Storlek	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
XL	69 - 89cm
Regular	0 - 69cm

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Cool	Full Foam
Knee PO 61cm	UP TO 69cm	FPOK403100	FPOK403200
Knee PO XL 61cm	69 - 89cm	FPOK403102	FPOK403202
Knee PO 71cm	UP TO 69cm	FPOK403101	FPOK403201
Knee PO XL 71cm	69 - 89cm	FPOK403103	FPOK403203
Knee PO 41cm	69cm	-	FPOK403300
Knee PO XL 41cm	69 - 89cm	-	FPOK403301

## UTBYTESPOLSTRING

Beskrivning	Cool	Full Foam
Replacement Softgood, Regular	403175	403275
Replacement Softgood, XL	403176	403277
Replacement Softgood, Regular Long	403276	403278

## TILLBEHÖR

Beskrivning	
ROM stop locks (set of 20 lock clips)	B-8380005
Strap Reduction Kit Cool	403199
Strap Reduction Kit Full Foam	403299

## REBOUND® KNEE IMMOBILIZER UNIVERSAL

Rebound® Knee Immobilizer Universal har en universell design med 3 paneler som kan justeras för att passa de flesta bens omkrets. Med en klassificering som MR\*-villkorlig kan patienter säkert skannas i ett MR-system samtidigt som immobilisering bibehålls.

\*Se bruksanvisning för mer information.



### INDIKATIONER

- Akut immobilisering
- Immobilisering av knä före och efter kirurgi
- Traumatiska knäskador

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbara mediala/laterala stag och styva bakre stag begränsar knäets rörelser
- Universell design i 3 delar som förenklar lagerbehoven
- MR\*-villkorlig: skanna patienter säkert i ett MR-system samtidigt som immobilisering bibehålls.
- Min. låromkrets: 26 cm
- Max. låromkrets: 67,31 cm

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Längd	Art.nr
30 cm	210012
35 cm	210014
40 cm	210016
45 cm	210018
50 cm	210020
55 cm	210022
60 cm	210024

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr
Hot/Cold Therapy Gel Pad	GB7
PCL Pad	B-705000036



PCL Pad

# REBOUND® KNEE BRACE

## INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra stukningar och sträckningar
- Lätta till medelsvåra rupturer i främre korsbandet (ACL) eller bakre korsbandet (PCL)
- Rupturer i medialt kollateralligament (MCL) eller lateralt kollateralligament (LCL)

## FÖRDELAR OCH EGENSKAPER

- Aerospacer-mateiral med suverän andasfunktion, avleder värme och ger ökad patientkomfort
- Lågprofilleder, möjlighet till extensions- och flexionsstopp (ROM-versionen). Formbara skenor för skräddarsydd pass-form och kontroll över knäets rörlighet
- Lätt svängd form och smidigt material bidrar till att före-bygga
- veckbildning och hudirritation i poplitealområdet
- Kan tas på och av från höger eller vänster sida tack vare löstagbara band. Enkel att ta på och av.
- Alla sleeve modeller kommer med en universalpelott för individuellt patellastöd



## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND ROM KNEE

Storlek	Omkrets	SLEEVE		WRAP	
		Lång	Kort	Lång	Kort
XS	29 - 35 cm	708152	708052	707152	707052
S	35 - 41 cm	708153	708053	707153	707053
M	41 - 46 cm	708155	708055	707155	707055
L	46 - 52 cm	708157	708057	707157	707057
XL	52 - 57 cm	708158	708058	707158	707058
XXL	57 - 63 cm	708159	708059	707159	707059
XXXL	63 - 72 cm	708160	708060	707160	707060
XXXXL	72 - 81 cm			707161	707061

### REBOUND KNEE

Storlek	Omkrets	SLEEVE		WRAP	
		Kort	Kort	Kort	Kort
XS	29 - 35 cm	704052		703052	
S	35 - 41 cm	704053		703053	
M	41 - 46 cm	704055		703055	
L	46 - 52 cm	704057		703057	
XL	52 - 57 cm	704058		703058	
XXL	57 - 63 cm	704059		703059	
XXXL	63 - 72 cm	704060		703060	
XXXXL	72 - 81 cm			703060	

## FORMFIT® KNEE ROM

Formfit® ROM knäortoser är utformade för patienter med lätta till medelsvåra stukningar, sträckningar och/eller ligamentskador i knät. Den ger överlägsen stabilitet, skydd och kompression under rehabilitering efter skada.

Ortosen finns i fyra varianter, alla lika enkla att ta på. Det gör att du enkelt kan välja exakt rätt nivå av stöd för just din patient.

Ortosen är tillverkad i kraftiga material som andas och ger därmed både god komfort och hållbarhet.

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra ACL- och PCL-skador
- MCL- och LCL-skador
- Kombinerade lätta sträckningar och stukningar i knäet

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Formbara, rigida och inställningsbara leder
- Universalpelott ingår till alla sleeve-versioner
- Öppen i knävecket

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### Formfit ROM KNEE SLEEVE

Storlek	Omkrets	Lång	Kort
XS	33 - 39 cm	508352	508252
S	39 - 47 cm	508353	508253
M	47 - 53 cm	508355	508255
L	53 - 60 cm	508357	508257
XL	60 - 67 cm	508358	508258
XXL	67 - 75 cm	508359	508259

### Formfit ROM KNEE WRAP

Storlek	Omkrets	Lång	Kort
XS	33 - 39 cm	507352	507252
S	39 - 47 cm	507353	507253
M	47 - 53 cm	507355	507255
L	53 - 60 cm	507357	507257
XL	60 - 67 cm	507358	507258
XXL	67 - 75 cm	507359	507259
XXXL	75 - 81 cm	507360	507260



Formfit ROM Knee Sleeve, kort modell



Formfit Knee Wrap, lång modell

## FORMFIT® KNEE HINGED

Formfit® knäortos är avsedd för patienter med lätta till medelsvåra stukningar, sträckningar eller ligamentskador. Den ger överlägsen stabilitet, skydd och kompression under rehabilitering efter skada. Ortosen är tillverkad i material som andas och ger därmed både god komfort och hållbarhet. Den är öppen i knävecket vilket ger minskad veckbildning och lägre risk för hudirritation, samtidigt som de styva men formbara skenorna ger bästa möjliga passform.

Formfit knäortos finns i två versioner: Wraparound eller Sleeve

### INDIKATIONER

- Lätta till medelsvåra ligamentskador
- Kombinerade lätta sträckningar och stukningar i knät
- Instabiliteter i knät

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Universalpelott
- Enkel att ta på
- Öppen i knävecket
- Formbara leder

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### Formfit KNEE SLEEVE

Storlek	Omkrets	Kort
XS	33 - 39 cm	504252
S	39 - 47 cm	504253
M	47 - 53 cm	504255
L	53 - 60 cm	504257
XL	60 - 67 cm	504258
XXL	67 - 75 cm	504259

### Formfit KNEE WRAP

Storlek	Omkrets	Kort
XS	33 - 39 cm	503252
S	39 - 47 cm	503253
M	47 - 53 cm	503255
L	53 - 60 cm	503257
XL	60 - 67 cm	503258
XXL	67 - 75 cm	503259
XXXL	75 - 81 cm	503260



Formfit Knee Hinged, Sleeve



Formfit Knee Hinged, Wrap

## VENTOPRENE SK/VK

### INDIKATIONER

- Mild artros, sidostabilitet
- Översträckningskydd (komplettera med översträckningskors)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Wraparound, lätt att applicera
- Ventilerad
- SK - normal längd
- VK - lång modell för ökad stabilitet

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets: mått tas vid mitten av patella



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Sk	Vk
XS	25 - 28 cm	6745-02	6747-02
S	28 - 36 cm	6745-03	6747-03
M	33 - 41 cm	6745-05	6747-05
L	38 - 46 cm	6745-07	6747-07
XL	45 - 55 cm	6745-08	6747-08
XXL	55 - 65 cm	6745-09	6747-09

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Översträckningskors, beige	TB601

## LYCRAFLEECE PATELLA LUX

### INDIKATIONER

- Patella luxation
- Patellofemorala smärtsymptom

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Justerbar pelott för individuellt tryck mot patella

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets: mått tas vid mitten av patella



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets	Art.nr.
XS	25 - 28 cm	6525-02
S	28 - 36 cm	6525-03
M	33 - 41 cm	6525-05
L	38 - 46 cm	6525-07
XL	45 - 55 cm	6525-08

## FORMFIT® HINGED LATERAL J

Formfit® Hinged Lateral J är framtagen för användare som behöver stöd för/korrigering av patella. Ortosen har en sleeve design samt har löstagbara skenor.

### INDIKATIONER

- Stöd för/korrigering av patella vid tex.
  - Lateral patella luxation/subluxation
  - Lateral patellofemoral malalignment

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppet poplitea område
- Enkel att dra på och av
- Material som andas

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
- Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### FORMFIT HINGED LATERAL J

Storlek	Omkrets lår	Omkrets vad	Höger	Vänster
XS	33 - 39 cm	25 - 30 cm	709152	709162
S	39 - 47 cm	30 - 35 cm	709154	709164
M	47 - 53 cm	35 - 40 cm	709155	709165
L	53 - 60 cm	40 - 46 cm	709157	709167
XL	60 - 67 cm	46 - 51 cm	709158	709168
XXL	67 - 75 cm	51 - 56 cm	709159	709169



## FORMFIT® TRACKER

Formfit® Tracker med mikrojusterbart ReflexWing™-stöd riktar in patella och ger ett dynamiskt, lateralt stöd vid vanliga knäbesvär. Det lättviktiga FlyWeight™-tyget har andningsförmåga och en lågprofildesign som känns skön mot huden och minimerar glidning. PowerLock™-banden fungerar parallellt med värmeformbara CustomFit™-gångjärn för att ge anpassningsbart stöd för patienten.

### INDIKATIONER

För knästillstånd som kan förbättras av att rikta in knäskålen och/eller patienter som behöver extra sidostöd till knäskålen, t.ex:

- lateral subluxation/dislokation av knäskålen
- lateral felställning

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- CustomFit™-gångjärn för anpassad passform och stöd
- Anti-Migration Tech™ minimerar glidning
- PowerLock™-remmar för säkert sidostöd
- ReflexWing™-stöd för bekväm inriktning av knäskålen
- Mjukt FlyWeight™-tyg med andningsförmåga
- Hållbar, kan tvättas i maskin.



## NÖDVÄNDIGA MÅTT OCH BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG



Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Vänster	Höger
XS	25 - 30 cm	33 - 39 cm	719162	719152
S	30 - 35 cm	39 - 47 cm	719163	719153
M	35 - 40 cm	47 - 53 cm	719164	719154
L	40 - 46 cm	53 - 60 cm	719165	719155
XL	46 - 51 cm	60 - 67 cm	719166	719156
XXL	51 - 56 cm	67 - 75 cm	719167	719157
3XL	56 - 61 cm	75 - 81 cm	719168	719158

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr
ReflexWing™ Buttress	719100

## FORMFIT® PRO KNEE

Össur Formfit® Pro Knee är en kompressiv knäleeve med SmartPad™-stöd för punktstöd och vaddering. Med vår patenterade design riktas knäskålen in, vilket gör den lämplig vid tillstånd som patellatendinit (hopparknä) och chondromalacia patellae.

Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande, uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav och har visat sig vara överlägset de ledande märkena när det gäller fukttransport och ventilationsförmåga, så att knäet hålls svalt under användning. Lätta, löstagbara spiralstöd säkerställer att följsamheten och passformen blir optimal, medan tydliga markeringar på knäskålen gör den lätt att ta på sig.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



SmartPad™

### INDIKATIONER

Knätillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Lindriga sträckningar och stukningar
- Smärta i knäet
- Patellatendinit
- Känsla av instabilitet
- Chondromalacia patellae

### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller knäet svalt under användning
- Certifierad medicinsk kompression (20 - 30 mmHg)
- CoolVent™-teknik i knävecket för god ventilationsförmåga och komfort
- Patenterad SmartPad™ för målinriktat stöd och dämpning
- Markeringar på knäskålen för enkel placering
- Patenterat FoldLock™-system för enkel och säker påtagning
- Lätta, löstagbara spiralstöd i stål

### NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.

Storlek	Vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella	Lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella
XS	26 - 31 cm	36 - 41 cm
S	31 - 36 cm	41 - 46 cm
M	36 - 41 cm	46 - 51 cm
L	41 - 46 cm	51 - 56 cm
XL	46 - 50 cm	56 - 60 cm

# FORMFIT® PRO KNEE

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

SVART		BLÅ	
Storlek	Art.nr.	Storlek	Art.nr.
XS	FP100001	XS	FP101001
S	FP100002	S	FP101002
M	FP100003	M	FP101003
L	FP100004	L	FP101004
XL	FP100005	XL	FP101005



## FORMFIT® PRO KNEE FLITE

Össur Formfit® Pro Knee Flite är en 3D-stickad sleeve som är utformad med vårt specialtillverkade MotionTech™-garn för ökad andningsförmåga, fukttransportering och en åtsittande passform. Våra unika FoldLock™- och StayBilizer™-tekniker kombineras för att säkerställa att ortosen sitter ordentligt på plats.



MotionTech™



CoolVent™



StayBilizer™



FoldLock™

### INDIKATIONER

För knästillstånd som kan förbättras av kompression, till exempel:

- Lindriga stukningar och sträckningar
- Smärta i knäet
- Känsla av instabilitet.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform
- CoolVent™-material i knävecket för ytterligare andningsförmåga
- Patenterat FoldLock™-system för lätt och säker påtagning
- Lätta spiralstöd i stål

### KONTRAIKATIONER

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT



Mät vadens omkrets 15 cm nedanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Mät lårets omkrets 15 cm ovanför mitten av patella. Benet utsträckt.



Storlek	Calf circumference 15 cm below mid patella	Thigh circumference 15 cm above mid patella	Blå	Svart
XS	26 - 31 cm	36 - 41 cm	FP141001	FP140001
S	31 - 36 cm	41 - 46 cm	FP141002	FP140002
M	36 - 41 cm	46 - 51 cm	FP141003	FP140003
L	41 - 46 cm	51 - 56 cm	FP141004	FP140004
XL	46 - 50 cm	56 - 60 cm	FP141005	FP140005



## REBOUND® DIABETIC WALKER

Avlastning av plantarområdet i allmänhet och sårområdet i synnerhet har bevisats vara en viktig faktor vid behandling av fotsår.

Rebound Diabetic Walker är särskilt utformad för effektiv behandling av plantara fotsår. Den är enkel att ta av och sätta tillbaka under sårbehandlingen, samtidigt som den möjliggör patientens rörlighet under läkningstiden.

Rebound Diabetic Walker har stora fördelar jämfört med diabetes-skor och skoinlägg vad gäller läkningseffektivitet och fungerar även bättre än gipsning tack vare att ortosen är användarvänlig, lätt att applicera och medför låga kostnader.



### INDIKATIONER

- Plantara fotsår som behöver avlastas.



[Video: Rebound Diabetic Walker - Clinician Fitting Instructions \(5 min 34 sec\)](#)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Effektiv innersula laminerad i tre lager med stötpptagande, borttagbara hexagonala delar som avlastar såret i kombination med en värmeformbar ovansida i plastazote som distribuerar trycket och minimerar friktion.
- Unik övertrycksventil som förhindrar för högt tryck och balanserar kompression med en anpassad passform.
- Placeringsportaler gör att klinikern kan kontrollera att walkerortosen sitter som den ska i hälen för en korrekt placering av foten.
- Ett anatomiskt anpassat ytterskal som minimerar krafterna genom att immobilisera foten och vristen i 90 graders vinkel och samtidigt skydda foten.
- FlexEdge™-teknik som motverkar tryckpunkter.
- Rocker Bottom-sula för en jämn roll-over som ger en individuell, naturlig gång.
- Mjuk och ventilerande liner med låg friktion som kan tvättas för en bättre hygien och för att förhindra infektioner.
- Manipuleringskyddat band för övervakning av acceptans.

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



# REBOUND® DIABETIC WALKER

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND DIABETIC WALKER

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
S	36 - 39	B-242500002
M	39,5 - 44	B-242500003
L	44,5 - 46,5	B-242500004
XL	47 - 50	B-242500005

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

Storlek	Liner	Inlägg	Evenup
S	B-418500102	B-418500202	10350
M	B-418500103	B-418500203	10351
L	B-418500104	B-418500204	10352
XL	B-418500105	B-418500205	



Evenup

### WALKER SKYDD

Storlek	Sulskydd (2 st.)	Täckande överdrag	Täckande överdrag engångsskydd (20 st.)
S	B-418500602	B-418500502	B-418500512
M	B-418500603	B-418500503	
L	B-418500604	B-418500504	B-418500514
XL	B-418500605	B-418500505	



Inlägg



Sulskydd



Täckande överdrag



Täckande överdrag  
Engångsskydd

### STRUMPOR (2 ST.)

Storlek	Art.nr.
Rebound Sock S/M	B-41850070
Rebound Sock L/XL	B-418500704

## DH OFFLOADING WALKER®

### INDIKATIONER

- Plantara fotsår som behöver avlastas

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Reducerar skjuvkrafter genom att stabilisera fot och fotled i 90°
- Bred och låg rullsula ger mjuk rullning och ökad stabilitet
- Polstringens patenterade innersko förhindrar att foten glider
- Designad utifrån Össurs unika Active Offloading Insole
- Erbjuder en säker miljö för samtidigt bruk av sårvårdsmaterial
- Enkel att ta på och justera
- Möjlighet att skapa en snabb immobilisering med 5 cm bred gipstejp för ytterligare ordinationsföljsamhet



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
XS	33 - 35,5	DH0200BLK
S	36 - 39	DH0400BLK
M	39,5 - 44	DH0600BLK
L	44,5 - 46,5	DH0800BLK
XL	47 - 50	DH1000BLK

### TILLBEHÖR

#### ERSÄTTNINGSDETALJER

Storlek	Polstring	Aktiv offloading sula
XS	10958	11742C
S	10958	PP04C
M	10959	PP06C
L	10960	11740C
XL	10960	11741C



## REBOUND® AIR WALKER

Rebound Air Walker har en mängd egenskaper som syftar till att ge ökat skydd, överlägsen kompression, enkel applicering och användning, förbättrad komfort och sist men inte minst lyckade vårdresultat.



### INDIKATIONER

- Stukningar av grad 2 och 3
- Posttraumatiskt
- Stabila frakturer
- Rehabilitering
- Postoperativt
- Mjukdelsskador
- Efter achillesseneruptur

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Helt omslutande skal med skyddande tåparti
- Soft FlexEdge™ för reduktion av tryckpunkter
- Den låga och breda rullsulan ger ökad stabilitet och underlättar normal gång
- Flexibel skalkonstruktion för optimal passform utan modifiering
- Skalet kan vid behov justeras vid vaden för ökad komfort
- Material som transporterar bort fukt och en tjock, bekväm polstring som tar upp stötar och andas
- Sammankopplade mediala/laterala blåsor för enkel uppblåsning och jämn kompression
- Integrerad och lätt åtkomlig pump och luftventil
- 1 par strumpor medföljer för ombyte

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



# REBOUND® AIR WALKER

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

### REBOUND AIR WALKER

Storlek	Skostorlek	Standard	Low top
XS	33 - 35.5	B-242900001E	B-242900061E
S	36 - 39	B-242900002E	B-242900062E
M	39.5 - 44	B-242900003E	B-242900063E
L	44.5 - 46.5	B-242900004E	B-242900064E
XL	47 - 50	B-242900005E	B-242900065E

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

### STANDARD

### SLIM

Storlek	Standard	Low top	Standard	Low top
XS	B-418000101	B-418000161	B-418030101	B-418030161
S	B-418000102	B-418000162	B-418030102	B-418030162
M	B-418000103	B-418000163	B-418030103	B-418030163
L	B-418000104	B-418000164	B-418030104	B-418030164
XL	B-418000105	B-418000165	B-418030105	B-418030165

### OTHER ACCESSORIES

Beskrivning	Art.nr.
Rebound Achilles Wedge Kit XS/S	AWK0001
Rebound Achilles Wedge Kit M	AWK0005
Rebound Achilles Wedge Kit L/XL	AWK0009
5 layer Wedge kit	AWK00015
Självhäftande sula för hälkil	WHW-W0107
Rebound Hightop Sock SM/MD (2st)	B-418500703
Rebound Hightop Sock LG/XL (2st)	B-418500704
Rebound Lowtop Sock SM/MD (2st)	B-418500903
Rebound Lowtop Sock LG/XL (2st)	B-418500904
Remförlängningar	B-502100101

Storlek	Evenup
S	10350
M	10351
L	10352



EVENUP

### WALKER SKYDD

Storlek	Sulskydd (2 st.)	Täckande överdrag	Täckande överdrag engångsskydd (20 st.)
S	B-418500602	B-418500502	B-418500512
M	B-418500603	B-418500503	
L	B-418500604	B-418500504	B-418500514
XL	B-418500605	B-418500505	

## FORMFIT® WALKER AIR

Formfit® Walker Air ger extra stabilisering för patienter med skador i mjukdelar, stukningar av grad 2 och 3 samt stabila frakturer. Det patenterade pneumatiska systemet ger god komfort även när svullnader uppstår under rehabiliteringsprocessen, och den intuitiva pumpen och tydligt markerade dekomprimerings-ventilen gör det enkelt att justera luft/tryck.

### INDIKATIONER

- Mjukdelsskador
- Stukningar av grad 2 och 3
- Stabila frakturer
- Postoperativ stabilisering av fotleden
- Trauma och rehabilitering

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Tillgänglig i låg eller standardhöjd
- Anatomiskt formade byglar för bättre passform och komfort
- Unik stöddämpande sula reducerar effektivt hälstöten vid gång
- Låg och bred rullsula ger ökad stabilitet och underlättar normal gång
- Rullsula med låg profil och bred bas för extra stabilitet

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Standard	Low Top
XS	33 - 35,5	A-W0200BLK	A-W0300BLK
S	36 - 39	A-W0400BLK	A-W0500BLK
M	39,5 - 44	A-W0600BLK	A-W0700BLK
L	44,5 - 46,5	A-W0800BLK	A-W0900BLK
XL	47 - 50	A-W1000BLK	A-W1100BLK

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

Storlek	Standard	Low Top
XS	12349	12356
S	10675	12357
M	10678	12358
L	10681	12359
XL	10647	12360

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
10 cm tygextension på bredden	WKSG-1BLK
Skenbens- och vadplattor när det behövs ytterligare skenor	WKSP100
Varm-/kylbehandling för säker och återanvändbar kryoterapi	WKGEL100
5 layer Wedge Kit Universal	AWK00015
Självhäftande inläggssula för hälkil	WHW-W0107

## FORMFIT® WALKER

Formfit® Walker ger immobilisering för patienter med skador i mjukdelar, vid stukningar av grad 2 och 3 samt stabila frakturer.

### INDIKATIONER

- Skador i mjukdelar
- Stukningar av grad 2 och 3
- Stabila frakturer

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- High top- och Low top-version
- Stötdämpande sula fördelar krafterna vid hälisättning
- Låg, bred rullsula som ger en stabil och naturlig gång
- Sömlös liner med andasfunktion



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Standard	Low Top
XS	33 - 35,5	W0200BLK	W0300BLK
S	36 - 39	W0400BLK	W0500BLK
M	40 - 44	W0600BLK	W0700BLK
L	44,5 - 46,5	W0800BLK	W0900BLK
XL	47 - 50	W1000BLK	W1100BLK

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

Storlek	Standard	Low Top
XS	WKSG200BLK	WKSG0300BLK
S	WKSG400BLK	WKSG500BLK
M	WKSG600BLK	WKSG700BLK
L	WKSG800BLK	WKSG900BLK
XL	WKSG1000BLK	WKSG1100BLK

### ÖVRIGA TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
10 cm tygextension på bredden	WKSG-1BLK
Skenbens- och vadplattor när det behövs ytterligare skenor	WKSP100
Varm-/kylbehandling för säker och återanvändbar kryoterapi	WKGEL100
5 layer Wedge kit	AWK00015
Självhäftande inläggssula för hälkil	WHW-W0107

## AFO DYNAMIC

AFO Dynamic är en stark och lätt lösning för patienter med varierande grad av droppfot till följd av neurologiska tillstånd. Össur har infört kolfibertekniken från Flex-Foot®-produkterna i denna nya AFO Dynamic, som ger förbättrat stöd jämfört med traditionella ankel-/fotortoser. Kolfibern ger proportionell energiåtergivning mot tillförd kraft. Ett idealiskt material för denna dynamiska fotleds-ortos. AFO Dynamic ger ett mer effektivt gångmönster och lämpar sig även för aktiva människor.



### INDIKATIONER

- Droppfot sekundärt till:
  - MS
  - CVA
  - Charcot Marie Tothts sjukdom
  - Perifera pareser och andra neurologiska tillstånd
  - Skador efter överbelastning av nedre extremitet

### KONTRAINDIKATIONER

- Grav deformitet i fot/fotled
- Fluktuerande ödem
- Grav spasticitet

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kolfibern medför utmärkt förhållande mellan vikt och styrka samt dynamisk rörelse
- Den avsmalnande kolfiberhälen lagrar energi och tar upp krafter vid hälstöten
- Fullängdstå ger utmärkt stöd i energilagringsfasen samt reducerar stöteffekten i det andra benet
- Ger M-L-stabilitet i mitten av stödfasen
- Minskar energiförbrukningen genom att höften inte behöver lyftas vid gång
- Medial bygel gör ortosen mindre framträdande
- Öppet främre tibialt skal ger överlägsen anatomisk passform samt minskar värmeutveckling
- Rekommenderad vikt: upp till 120 kg

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd



# AFO DYNAMIC

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Höjdmått*	Fotlängd	Vänster	Höger
XS	30 - 34 cm	21 - 23 cm	O-102021	O-102011
S	32 - 36 cm	24 - 25 cm	O-102022	O-102012
M	34 - 38 cm	26 - 27 cm	O-102024	O-102014
L	36 - 40 cm	28 - 29 cm	O-102026	O-102016

\* Höjdmått tas från golvet upp till bredaste stället på vaden.

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSATS

Storlek	Art.nr.
XS	O-102101
S	O-102102
M	O-102104
L	O-102106

OBS! Polstringssats levereras med övre och nedre fästband

## AFO LIGHT

AFO Light ger stöd endast på de ställen där det behövs, har ingen onödigt volym och ger ett kosmetiskt tilltalande utseende. Den bästa Flex-Foot®-teknologin och kolfibers energiåtergivande egenskaper gör AFO Dynamic till en stark och lätt lösning för människor med lätt till måttlig droppfot.



### INDIKATIONER

- Lätt till måttlig droppfot
- Charcot Marie Tooth disease (HMSN)
- Förslitningsskador på nedre extremiteter
- Kontraindikationer:
  - Grava ankel-/fotdeformiteter
  - Fluktuerand ödem
  - Svår spasticitet
  - Neuropati

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Proportionell respons mot tillförd kraft vid toe-off
- Stödjer foten så att den går fri från marken under svingfasen
- Kolfibertechniken medför utmärkt förhållande mellan vikt och styrka samt dynamisk rörelse
- Gradvis plantarflexion vid hälsättning
- Graderad styvhet vid häl och fot korresponderar mot reaktionskraften från marken
- Lätt att ta på och av
- Rekommenderad vikt: upp till 100 kg

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd

### BESTÄLLNINGSPÅGIVNING

Storlek	Höjdmått*	Fotlängd	Vänster	Höger
S	32 - 36 cm	22 - 26 cm	O-121022	O-121012
M	34 - 38 cm	24 - 28 cm	O-121024	O-121014
L	36 - 40 cm	26 - 30 cm	O-121026	O-121016
XL	38 - 42 cm	28 - 32 cm	O-121028	O-121018

\* Höjdmått tas från golvet upp till bredaste stället på vaden.

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
AFO Light Accessory Kit	O-122101

## AFO LEAF SPRING

### INDIKATIONER

- Droppfot sekundärt till CVA
- Lätt droppfot sekundärt till andra neurologiska tillstånd

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Injektionsgjuten polypropylen - låg vikt
- Tunn, flexibel fotdel kan enkelt trimmas med vanlig sax
- Urtag vid hälen ger ytterligare komfort och att den passar i de flesta skor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Höjd	Vänster	Höger
S/M	36 - 39	27 cm	O-110227	O-110127
L	40 - 45	30 cm	O-110230	O-110130



## REBOUND FOOT-UP®

Rebound Foot-Up® är en lättvikts vrist-/fotortos (AFO) som ger dynamiskt stöd till droppfot eller relaterade problem som kräver stöd för dorsalflexion.



### INDIKATIONER

- Droppfot




Video: Rebound Foot-Up and Foot Wrap - User Instructions (7 min 20 sec)

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dynamisk och diskret stöd för droppfot eller relaterade problem som kräver stöd för dorsalflexion.
- Förbättrad funktion, lätt att använda, bekväm och hög produktkvalitet.
- Möjliggör plantarflexion enligt individuella förutsättningar.
- Justerbar för medialt eller lateralt stöd.
- Formgiven för att följa fotens form.
- Justerbar bandlängd.
- Smart klämma gör det lätt att ta av och på ortosen.
- Rebound Foot-Up® Foot Wrap är tillval och kan användas när man är barfota, med öppna skor eller med sandaler

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt fotleden, mäts runt fotknölar

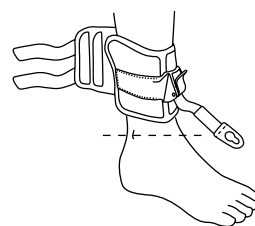


### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

#### REBOUND FOOT-UP ANKLE CUFF

Storlek	Omkrets fotled	Art.nr.
S/M	18 - 25 cm	RFU50001
L/XL	26 - 33 cm	RFU50002

#RFU50001

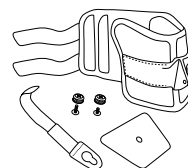


### TILLVAL

#### REBOUND FOOT-UP FOOT WRAP

Storlek	Omkrets fotled	Art.nr.
One Storlek	20 - 28 cm	RFU50101


#RFU50101

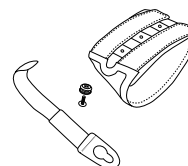

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Rebound Foot-Up Attachment Kit Består av elastiskt band, inlägg, 1 mutter och 1 lång skruv	RFU50201
Rebound Foot-Up Nuts & Bolts Består av 5 muttrar, 3 långa och 2 korta skruvar	RFU50202

#RFU50201

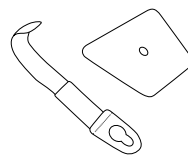

#RFU50202



## FOOT-UP®

Foot-Up är en lätt ankelortos som ger dynamiskt stöd vid droppfot och liknande besvär. Denna revolutionerande ortos ger synlig förbättring i gång genom att ge stöd åt foten på det ögonblick som den lyfts upp.



Inlägg



Tillbehör utan sko



### INDIKATIONER

- Droppfot
- Stöd för bättre dorsalflexion

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Smidig design
- Låg vikt
- Osynlig vid användning
- Komfortabel
- Material som andas
- Polstrad
- Enkel Anpassning
- Separata inlägg finns tillgängliga
- Även tillgänglig i modell utan sko

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets runt fotleden, mätt runt fotknölnarna
- Shoeless Foot-Up (Foot-Up utan sko): Omkrets runt vidaste delen på foten

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Omkrets vristen	Beige	SVART
M	18 - 21 cm	07811 -1	07810-1
L	22 - 26 cm	07811 -2	07810-2
XL	27 - 33 cm	07811 -3	07810-3

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Beige	SVART
Separat inlägg till Foot-Up, universal storlek	17811	17810

### TILLBEHÖR (UTAN SKO)

Storlek	OMKRETS FOT	Beige	SVART
S	< 20 cm	27811-1	27810-1
M	20 - 24 cm	27811-2	27810-2
L	24 - 28 cm	27811-3	27810-3
XL	> 28 cm	27811-4	27810-4

## REBOUND® ANKLE BRACE

### INDIKATIONER

- Nedtrappning efter användning av Walker eller gips.
- Vid återgång till träning efter fotledsskada
- Stukningar av 1, 2 och 3 graden
- Kroniskt instabil fotled efter rehabilitering
- Förebyggande behandling

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Juster- och expanderbart vadband för bättre passform
- Öppen front, stabiliseringsband ger enkel och säker på- och avtagning
- Modellen med stabiliseringsband erbjuder ett flertal fästalternativ för varierande grad av stabilisering.
- Tillåter nedtrappning i takt med att r rehabiliteringen framskrider

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Med stabiliseringsband

Storlek	Skostorlek	Vänster	Höger
S	35 - 39,5	B-23 16025 12	B-23 15025 12
M	39.5 - 42	B-23 16025 13	B-23 15025 13
L	42+	B-23 16025 14	B-23 15025 14

## TILLBEHÖR

Storlek	Art.nr.
Breddningskit	B-23 1900000
Stödrem	B-701160080

## FORMFIT® ANKLE BRACE

Formfit® fotledsortos ger stabilitet och stöd för fotleden. Den kan användas profylaktiskt, vid kronisk instabilitet eller vid reha-bilitering efter skada. Formfit fotledsortos är en hybrid mellan en styv ortos med byglar och ett mjukt fotledsstöd. Det ger en mycket bra passform som begränsar inversion, eversion, flexion och extension. Lågprofildesignen är enkel att använda med skor, och snabbsnörningen gör att det går snabbt att ta av och på ortosen. Material som andas gör att ortosen kan bäras hela dagen med god komfort. Formfit fotledsortos med figur-8 band utökat stöd begränsar fotledens rörlighet i större grad.

### INDIKATIONER


- Stukningar och sträckningar av grad I-II
- Kroniska instabiliteter
- I förebyggande syfte

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Material som andas
- Snabbsnörning
- Inversions-/eversionskontroll
- Modell med figur-8 band

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Spannmått

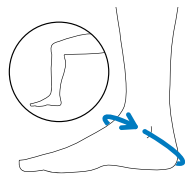

[Video: Formfit Ankle Brace - Fitting Instructions \(46 sec\)](#)

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Spannmått	Standard	Med figur 8 band
XS	28 - 30,5 cm	B-212010001	B-212000001
S	30,5 - 33 cm	B-212010002	B-212000002
M	33 - 35,5 cm	B-212010003	B-212000003
L	35,5 - 38 cm	B-212010004	B-212000004
XL	38 - 40,5 cm	B-212010005	B-212000005

## FORMFIT® ANKLE WITH SPEEDLACE

Formfit® fotledsortos med Speedlace ger stabilitet och stöd för fotleden. Den kan användas profylaktiskt, vid kronisk instabilitet eller vid rehabilitering efter skada. Ortosen är tillverkad i hållbara material och lågprofildesignen med snabbsnörning är smidig och enkel att bära med skor.

### INDIKATIONER


- Rehabilitering/mobilisering av skadad fotled (stukningar av grad I/II)
- För kroniska instabiliteter
- Förebyggande behandling

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkel snörning och justering utan att skon behöver tas av
- Figur-8 band, efterliknar idrottstejpning för stöd vid inversion/ eversion
- Uttagbara Skenor

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Spannmått

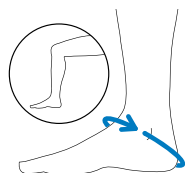

Video: Formfit Ankle w/  
Speedlace - Fitting Instructions  
(58 sec)

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Spannmått	Med skenor
XXS	23 - 25.5 cm	W-10621
XS	25.5 - 28 cm	W-10622
S	28 - 30.5 cm	W-10623
M	30.5 - 33 cm	W-10625
L	33 - 35.5 cm	W-10627
XL	35.5 - 38 cm	W-10628
XXL	38 - 40.5 cm	W-10629

## FORMFIT® PRO ANKLE

Össur Formfit® Pro Ankle är en kompressiv fotledsorto med två integrerade vristskuddar, och är avsedd att användas efter lindringa fotledsskador. Det dynamiska 3D MotionTech™-materialet är stödjande och uppfyller certifierade medicinska kompressionskrav. Tack vare överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga jämfört med ledande märken, hålls fotleden sval under användning. CoolVent™-teknik på framsidan av fotleden ökar ventilationsförmågan och komforten ytterligare.



MotionTech™



CoolVent™



SmartPad™



FoldLock™

### INDIKATIONER

Fotledstillstånd som kan förbättras av kompression, t.ex.:

- Lindriga stukningar och sträckningar
- Rehabilitering av fotledsskada
- Lindrig instabilitet

### KONTRAINDIKATION

- Får inte användas på personer för vilka kompression är kontraindicerad.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- MotionTech™ för kompression och dynamisk passform med överlägsen fukttransport och ventilationsförmåga, som håller fotleden sval under användning
- Certifierad medicinsk kompression (20 - 30 mmHg)
- CoolVent™-teknik på framsidan av fotleden för extra ventilationsförmåga och komfort
- Två integrerade SmartPads™ på vristen för punktstöd och vaddering
- Patenterat FoldLock™-system för enklare och mer säker applicering

### NÖDVÄNDIGA MÅTT



Measure ankle circumference.

Storlek	Omkrets fotled	Vänster	Höger
XS	18 - 20 cm	FP200201	FP200101
S	20 - 23 cm	FP200202	FP200102
M	23 - 26 cm	FP200203	FP200103
L	26 - 29 cm	FP200204	FP200104
XL	29 - 32 cm	FP200205	FP200105

# FORMFIT® PRO ANKLE

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Vänster	Höger
XS	FP200201	FP200101
S	FP200202	FP200102
M	FP200203	FP200103
L	FP200204	FP200104
XL	FP200205	FP200105



## FORMFIT® ANKLE STIRRUPS

Formfit® Ankle Stirrups är lätta och robusta. Oavsett om de bärs för att stödja en akut skada, kronisk instabilitet eller läkning efter gipsning, stabiliserar Formfit® Ankle Stirrups skadade fotleder genom att begränsa inversion/eversion-rörelsen.

Universaldesignen är noggrant konstruerad för att rymma malleolus på båda sidor och säkerställer en bra, bekväm passform. Det halksäkra hälbandet kan justeras för att passa de flesta fotleder. Vår unika Flex-Edge™ övergjutning omger bygelns ytterhölje och skyddar patientens hud från hårda kanter, vilket ger en ännu bekvämare passform. Den universella bygelkonstruktionen finns med två olika foderalternativ: uppblåsbar luft eller skum, vilket erbjuder varje patient en lösning som bäst passar dennes behov.

### INDIKATIONER

Situationer som kräver begränsad inversion/eversion. Dessa kan omfatta följande:

- Lindriga till måttliga stukningar av fotleden
- Kronisk instabilitet i fotleden
- Stöd efter borttagning av gips och användning av kryckor
- Rehabilitering av fotledsskador och/eller efter kirurgi

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Universalhölje, noggrant utformad för att passa både höger och vänster fotled
- Soft Flex-Edge™ övergjutning ger ökad komfort
- Justerbart hälband för att optimera passform och komfort för patienten
- Halksäkra silikonprickar som hjälper till att minska glidning och stabilisera foten inuti skon
- 2 dubbelriktade kardborreband säkerställer en säker och stabil passform
- Finns med uppblåsbart foder eller skumfoder i enlighet med dina behov
- Finns i storlekar för vuxna och ungdom

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Patientens höjd



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG



Storlek	Patientens höjd	Formfit Air Ankle Stirrup	Formfit Foam Ankle Stirrup
Vuxen	Över 160 cm	70350	70352
Ungdom	Under 160 cm	71350	71352



## EXOFORM® DORSAL NIGHT SPLINT

### INDIKATIONER

- Plantarfasciit
- Smärta efter statisk belastning
- Allmän hälsmärta
- Droppfot
- Achillestendinit
- Skador efter överbelastning av nedre extremitet

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Exoform-ortosens skal är förinställt på 85 till 90 grader för maximal terapeutisk nytta
- Justerbar aluminiumska ger möjlighet till ytterligare 5 - 10 graders flexion vid behov
- Fotremmarna fångar upp framfoten och tåspetsarna för maximal sträckning av plantarfascian
- Foten omges av patenterad 3D-gjuten polstring som säker-ställer patientkomforten
- Flex Edge™ eliminerar skarpa kanter
- Hälremmen håller ortosen på plats
- Formbart dorsalt skal omger underbenet och förebygger rotation
- Antihalksula förebygger halkning vid normal gång

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
M	37,5 - 42,5	W-50085
L	43 - 48,5	W-50087

## FORMFIT® NIGHT SPLINT

### INDIKATIONER

- Plantar Fascit
- Skador efter överbelastning av nedre extremitet
- Achilles Tendinit

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ställbara flexionsband ger justerbar flexion för stretch av plantarfascian
- Användarvänliga snabbspännen framtill förenklar applicering
- Patenterad 3-dimensionell form säkerställer bra komfort och passform med polstring där det behövs
- Mjuk behaglig polstring med lycraytskikt, tvättbar. Minskar värme uppbyggnad



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Med anti-halksula
S	- 38	50023
M	38,5 - 43	50025
L	43,5+	50027

### TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Kil i skumplast	10700
Polstringssats S	11760
Polstringssats M	11761
Polstringssats L	11762

## MPO 2000

### INDIKATIONER

- Hälavlastning vid hälsår
- Bibehållande av dorsalflexion
- Förhindra rotation av höft och ben

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Plastkomponenter i Kydex
- Vridbart skaft ger möjlighet att kontrollera fotens rotation

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Fotlängd



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Fotlängd	Art.nr.
S	15 - 19 cm	251802
M	19 - 23 cm	251803
L	23 - 26 cm	251804
XL	26 - 28 cm	251805

## TILLBEHÖR

### POLSTRINGSSATS

Storlek	Fotlängd	Art.nr.
S	15 - 19 cm	251812
M	19 - 23 cm	251813
L	23 - 26 cm	251814
XL	26 - 28 cm	251815

## DH OFFLOADING POST-OP STYLE SHOE

### INDIKATIONER

- Plantara sår

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Passar både höger och vänster fot
- Designad utifrån Össurs unika Active Offloading Insole
- Rymmer förband
- Ytterst mjuk ovansida i nylon och förstärkt hälkappa för bästa komfort och stabilitet
- Patenterade löstagbara tåstycken bidrar till åtkomst till såret för daglig inspektion
- Semirigid rullsula



### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek	Art.nr.
S	35,5 - 39	10340
M	39,5 - 42	10341
L	42,5 - 45	10342
XL	45,5 - 48,5	10343

## TILLBEHÖR

### SULA

Storlek	Art.nr.
S	12365
M	12366
L	12367
XL	12368

## SOFT TOP POST-OP SHOE

### INDIKATIONER

- För användning efter mjukdelsskada, trauma

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ovansidan i bomull/polypropylen låter patientens fot andas och ger utmärkt komfort
- Fästremmarna är lätta att använda och gör skon lätt att ta på och av

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skostorlek



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Skostorlek		Art.nr	
	Herr	Dam	Herr	Dam
S	35,5 - 38	35 - 36	18013	18003
M	38,5 - 42	37,5 - 38,5	18015	18005
L	43 - 45	40+	18017	18007
XL	45,5 - 48,5	-	18018	-

## CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE

### INDIKATIONER

- För användning med kort bengips

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stötdämpande gipssko med rullsula
- Kardborrefäste, öppen tå

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Innersulans längd



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	Sulans längd	Blå	SVART
XS	18 cm	308XS	-
S	19 - 23 cm	308SM	B308SM
S/M	23 - 25 cm	308SM/MED	B308S/M
M	25,5 - 26,5 cm	308MED	B308MED
M/L	26,5 - 28 cm	308MLG	B308MLG
L	28 - 30,5 cm	308LG	B308LG
XL	30,5 - 35 cm	308XLG	B308XLG

# INLÄGG

Novatherm är tunna och smidiga inlägg med en mjuk och behaglig ovansida av Alcantara. Kanterna är mjuka och flexibla, vilket gör inläggen komfortabla och lättanpassade. En formfast termoplastbotten ger inläggen stabilitet och styrka. Materialet är formbart vid 110°C, vilket möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.

## NOVATHERM LANGE

Traditionell Lange-modell med extra höga och stabila kanter. Finns i junior storlekar, från strl. 19/20.

### NOVATHERM LANGE

Storlek	Art.nr.
19/20 - 47/48	981 289 0 + strl



## NOVATHERM COMFORT

Novatherm Comfort är ett tunt, smidigt och formbart inlägg och ett utmärkt alternativ i kombination med de flesta skomodeller.

### NOVATHERM COMFORT, LÅNG OCH BRED

Storlek	Art.nr.
35 - 48	985146-454 + strl



## NOVATHERM COMFORT MED PPT

Tunt, smidigt och formbart inlägg i likhet med övriga inlägg i Novatherm-serien. Här i utförande med ett tunt lager stötdämpande PPT under toppskiktet av beige Alcantara. Lång modell.

Storlek	Art.nr.
35 - 48	985361-197 + strl



## INLÄGG

### NOVATHERM AKTIV

Samma karakteristiska funktioner som Novatherm Comfort men med högre kanter. Gjord på en lästform för effektivare utnyttjande av fotsulans fettkudde.

#### NOVATHERM AKTIV

Storlek	Art.nr.
35 - 48	986543-454 + strl



### NOVATHERM AKTIV MED PPT

Novatherm Aktiv med PPT har samma funktioner som Novatherm Aktiv. Här i utförande med ett tunt lager stötdämpande PPT under toppskiktet av svart Alcantara.

#### NOVATHERM COMFORT, LÅNG OCH BRED

Storlek	Art.nr.
35 - 48	986539 + strl



### KOLFIBERINLÄGG

Förformade kolfiberinlägg.

Storlek	Tjocklek	Art.nr.
36 - 48	1,6 mm	047950 0 + strl
36 - 47	1,9 mm	047955 0 + strl



### DIABETIC WALKER INSOLE

Passar till Rebound Diabetic Walker.

Storlek	Höger	Vänster
S	972659-006-S	972759-006-S
M	972659-006-M	972759-006-M
L	972659-006-L	972759-006-L
XL	972659-006-XL	972759-006-XL



# INLÄGG

## DIABETIC INSOLE

Temporära inlägg för behandlingsskor.

Storlek	Art.nr.
35 - 47	970058-000 + strl





MATERIAL & TILLBEHÖR



# ORTHOTIC SOCK, AFO/KAFO

## INDIKATIONER

- Komfort och skydd under ortos

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Rundstickad strumpa med DuPont Coolmax material med lycra spandex vilket gör strumporna väldigt mjuka och elastiska
- Materialet transporterar effektivt bort svett från huden
- X-static - ett nytt material som innehåller silverpartiklar vilket ger en effektiv bekämpning av dålig lukt och bakterier



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

ORTOSSTRUMPA AFO - X-STATIC - FÄRG: SILVER		
Storlek	Mått	Art.nr.
Spädbarn	5,0 x 23 cm	204821
Barn, S	5,5 x 28 cm	204822
Barn, M	6,5 x 36 cm	204823
Vuxen, S	7,5 x 46 cm	204824
Vuxen, M	9,0 x 51 cm	204825

ORTOSSTRUMPA AFO - FÄRG: VIT		
Storlek	Mått	Art.nr.
Spädbarn	5,0 x 23 cm	204801
Barn, S	5,5 x 28 cm	204802
Barn, M	6,5 x 36 cm	204803
Vuxen, S	7,5 x 46 cm	204804
Vuxen, M	9,0 x 51 cm	204805

ORTOSSTRUMPA AFO - FÄRG: SVART		
Storlek	Mått	Art.nr.
Spädbarn	5,0 x 23 cm	2048012
Barn, S	5,5 x 28 cm	2048022
Barn, M	6,0 x 36 cm	2048032
Vuxen, S	7,5 x 46 cm	2048042
Vuxen, M	9,0 x 51 cm	2048052

ORTOSSTRUMPA KAFO - FÄRG: VIT		
Storlek	Mått	Art.nr.
Barn, lång	6,5 x 46 cm	204851
Vuxen, S	10 x 6,5 x 61 cm*	204852
Vuxen, M	15 x 9 x 71 cm*	204853

\*Säljes styckevis

## COMPRESSION STOCKINET

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kompressionstrikå för avgjutning av exempelvis ståskal, lårbensprotes, korsett etc.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Bredd	Längd	Art.nr.
30 cm	10 m	6041012

## CAST-RITE FRACTURE/ORTHOTIC SOCK

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Kan användas som skydd vid avgjutning eller under ortos.
- Anpassar sig väl till armens kontur. Kan tvättas.
- Material/tjocklek: Acryl/Lycra. 1-ply.
- Måtten nedan är tagna med strumpan liggande på plant underlag.



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

BESKRIVNING	Längd	BREDD	Art.nr.
Cast-Rite strumpa med hål för tumme (barn)	25 cm	ca 5 cm	KR1AL1-AOCH-10





## FAST FIT® CHIPMUNK®

### INDIKATIONER


- För patienter med måttlig pronation och korrigerbar fotposition.
- Patienter med sänkt medialt fotvalv, måttlig framfotsabduktion och eversion i hälen.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som ett konturerat skoinlägg ger.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Hög medial trimlinje
- Liner i tyg
- Ytterskal i plast
- Platt tådel
- Definierat hålfotsstöd Prefabricerad
- Plantaryta

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50 - 9.50 inch. wide

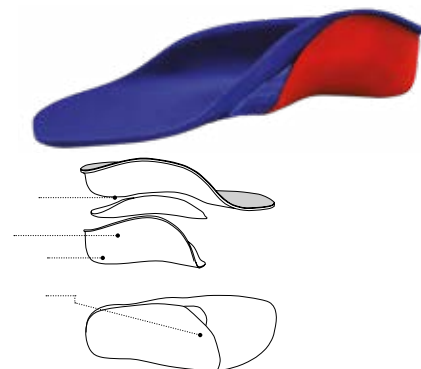

Moderate pronation, unstable foot position.

Improved foot alignment and steadier gait.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Chipmunk		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF10	+	6,25	+	Left	=	DAF10625L



## FAST FIT® CRICKET®

### INDIKATIONER

- För patienter med korrigerbar fotposition
- Patienten med lätt till måttlig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter som behöver fri dorsalflexion och plantarflexion

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Stadigt ytterskal
- Delvis omslutande inre liner
- Prefabricerad

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Cricket		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF40	+	6,25	+	Left	=	DAF40625L



## JUMPSTART® LEAP FROG®

### INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition
- Patienter med måttlig till kraftig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter med behov av sensoriskåterkoppling som en helkonturerad fotsula ger
- Patienter som behöver fri dorsalflexion och plantarflexion.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppen vristtrimlinje
- Helt omslutande inre liner
- Stadigt ytterskal
- Prefabricerad

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Leap frog	Storlek inches	Sida (left/right)	Art.nr.
DAF30	+ 6,25	+ Left	= DAF30625L



## JUMPSTART® BUNNY®

### INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition
- Patienter med måttlig till kraftig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter med lätt instabilitet i svingfasen eller överdriven plantarflexion som yttrar sig som lätt tågång eller hyperextension i knäet.
- Patienter som behöver visst motstånd mot plantarflexion.

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Helt omslutande inre liner
- Proximal bakre elastisk rem



### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Bunny	Storlek inches	Sida (left/right)	Art.nr.
DAF20	+ 6,25	+ Left	= DAF20625L



# JUMPSTART® KANGAROO®

## INDIKATIONER

- Patienter med korrigerbar fotposition.
- Patienter med måttlig pronation eller supination och tillhörande instabilitet vid gång.
- Patienter med motverka överdriven plantarflexion som yttrar sig som kraftig tågång eller hyperextension i knäet.
- Patienter som kan ha nytta av den sensoriska återkoppling som en helkonturerad fotsula ger.
- Patienter som behöver fri dorsalflexion

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Öppen främre del
- Stadigt ytterskal och bakre bendel
- Prefabricerad
- Helt omslutande inre liner

## NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Tillgängliga storlekar från Össur Nordic: 4.50-7.75 inch. wide



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG (SÅ HÄR FÅR DU FRAM ARTIKELNUMRET)

Kangaroo		Storlek inches		Sida (left/right)		Art.nr.
DAF50	+	6,25	+	Left	=	DAF50625L



No casting needed!





# ÖSSUR SERVICES

## FÖRETAGSINFORMATION

### POSTADRESS

Össur Nordic  
Box 7080  
SE-164 07 Kista

### BESÖKSADRESS

Kistagången 12, 2 tr  
SE-164 40 Kista

tel: +46 (0) 18 18 22 00  
e-mail: info@ossur.com

ÖSSUR NORDIC STÅR FÖR FRAKTEN VID FÖLJANDE RETURER:

- Reklamationsärenden inom garantin
- Reparationer inom garantin

## GARANTIFÖRFARANDE

Alla Össurs produkter har garanti mot material- eller tillverkningsfel, från och med dagen för köpet. Varje produkt som konstaterats vara defekt under normal och korrekt användning ersätts utan kostnad med samma vara. Om en vara behöver ersättas när garantin gäller, skickas den ersättande varan så snabbt som möjligt och hela återförsäljningspriset faktureras. När garantiartikeln mottagits, sker återbetalning enligt gällande villkor.

CUSTOM KNÄORTOS	Ram och leder: Livstid för den ursprungliga patienten. Polstring, liners och band: 6 månader
OTS ORTOSER	Ram och leder: 24 månader Polstring, liners och band: 6 månader
POSTOPERATIVA ORTOSER	Skal och leder: 3 månader Polstring och band: 30 dagar
ÖVRIGA PRODUKTER	6 månader, om inget annat uppges på förpackning och etikett.
AVGJUTNING OCH SKENOR	36 månader

## RETURER

VAROR KREDITERAS ENLIGT FÖLJANDE:

- Äldre än 365 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
- Custom Made-produkter återtages ej.
- Produkter i osäljbart skick återtages ej.

Vid retur till Össur behöver du ha ett RSA-nummer. Detta nummer får du genom att kontakta Össur Nordics Kundsupport via: info@ossur.com eller +46 (0) 18 18 22 00.

För bästa och snabbaste service vill vi att du vid kontakten har dessa uppgifter framtagna:

- Kundnamn/Kundnummer
- Artikelnummer
- Ev. LOT eller Serienummer
- Fakturanummer
- Anledning till retur

Össur återkommer med ett RSA-nummer. Detta RSA-nummer ska skrivas tydligt utanpå godset.

## ÖSSUR SERVICES

---

### RETURER

---

ÖNSKAR NI ATT SKICKA RETUREN SJÄLV, SÅ SKICKAS DEN TILL:

UPS SCS Sweden AB  
 To: Össur  
 Stensättravägen 5-7  
 127 39 Skärholmen  
 SWEDEN

alternativt till:

Össur Europe B.V.  
 Receiving Department  
 De Schakel 70  
 Eindhoven  
 5651 GH  
 NETHERLANDS

OBS! Returer utan RSA-nummer återtages ej.

### FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

---

LEVERANSVILLKOR: Fritt vårt lager.

BETALNINGSVILLKOR: 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Össurs registrerade varumärken är registrerade i USA och utvalda länder.

### TVÄTTRÅD

---

TVÄTTRÅD FÖR:

Exoform handledsortos, Exoform CTS handleds ortos, Formfit handledsortos, Spectra och Spectra Air handledsortos, Formfit tumortos, Universal thumb splint.

Produkten kan rengöras med mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Handflatans aluminiumstöd ska avlägsnas innan tvätt. Använd inte blekningsmedel eller starkt rengöringsmedel. Tvätta inte i tvättmaskin.

Lufttorkas enbart. Krama eller vrid inte ur ortosen. Placera inte i en torktumlare eller i närheten av ett element.



TVÄTTRÅD FÖR:

Samtliga Alfa-, Lycrafleece-, och Ventroprene ortoser.

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråd nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



# ANTECKNINGAR

---

# ANTECKNINGAR

---

# ANTECKNINGAR

---





FOLLOW ÖSSUR ON



TEL + 46 18 18 22 00  
info@ossur.com

WWW.OSSUR.SE

