



**ÖSSUR**<sup>®</sup>  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

# Navii

<sup>®</sup>

Expand Your World

# En helt ny patientupplevelse

Vårt gemensamma mål är att erbjuda protesanvändare bästa möjliga proteslösningar för att förbättra deras rörlighet och livskvalitet. Med Navii, som innehåller de senaste innovationerna inom protesteknologi, kan dina patienter nu uppleva en förbättrad stabilitetsfunktion, ökad frihet och en ny nivå av självbestämmande – allt i en och samma produkt.



## Revolutionerande stabilitet och tillit

Tänk dig en protesknäled som ger trygghet och tillit i varje steg. Navii betar sig konsekvent och förutsägbart, framför allt under mer utmanande aktiviteter som att gå nedför trappor eller ramper.

## Hittills oöverträffad frihet och mångsidighet

Navii's banbrytande, vattentäta konstruktion bryter ner de barriärer som traditionellt begränsat protesanvändare. Nu kan dina patienter till exempel bada i havet eller i poolen, eller njuta av strandliv på sommaren – och duscha obekymrat. Navii möjliggör ett liv utan begränsningar och friheten att delta i alla aktiviteter som de önskar.

## Avancerad träning för ökat självbestämmande

Navii är så mycket mer än en protesknäled – det är ett verktyg för ökat självbestämmande. Navii erbjuder utökade funktionella träningsprogram som uppmuntrar dina patienter att utforska hela potentialen i proteserna. Genom att aktivt engagera sig i sin protes, kan patienten ta kontroll över sin mobilitetsresa – allt för att nå ökad mobilitet och tillfredsställelse.





### En sömlös upplevelse för dig

På Össur förstår vi hur viktigt det är att hela upplevelsen fungerar så bra som möjligt för både dig och dina patienter. Våra dedikerade kliniska specialister, våra omfattande träningsprogram och vårt lyhörda team på kundsupport, stöttar dig i varje steg – från beställning till underhåll av Navii. Vi arbetar hårt för att du ska få tillgång till alla verktyg och resurser som du behöver för att uppnå bästa möjliga resultat för dina patienter.



# Upptäck de unika funktionerna hos Navii

## Kraftfull aktuator

Naviis kraftfulla aktuator ger exceptionellt stöd, framför allt vid stora flexionsvinklar. Den avancerade bromskontroll-funktionen ger ökad förutsägbarhet och ett konsekvent beteende när patienten rör sig,

särskilt vid gång nedför trappor eller ramper. Den förbättrade stabilitetskontrollen gör att patienten kan känna sig lika trygg, eller till och med tryggare, och möjliggör en tillförlitlig mobilitetsupplevelse.



Mekanisk låsfunktion med flera lägen



Kraftfull aktuator



Vattentät konstruktion



Avtagbar skyddskosmetik och naturligt utseende i sittande



Össur Logic-övningar och avancerade inställningar



Avancerade gångrapporter



Förbättrat och förenklat användargränssnitt



Funktioner för hög belastning

### Vattentät konstruktion

Navii är utformad med en tålig, vattentät konstruktion (IP68-klassad), vilket gör den perfekt för patienter som gillar aktiviteter i vatten. Navii klarar det mesta, från en dag vid poolen eller en utflykt till havet, till en promenad på stranden. Protesen klarar nedsänkningar i söt- eller saltvatten eller klorerat vatten\* – skölj bara av den snabbt med färskvatten efteråt för att hålla den i toppskick.


### Avtagbar skyddskosmetik och naturligt utseende i sittande

Navii kombinerar funktionalitet och estetik med sin avtagbara skyddskosmetik och olika anpassningsmöjligheter. Kosmetiken finns i tre längder (standard, medium och lång) och har utformats för att tillmötesgå olika kosmetiska önskemål, bland annat med olika färger och ytfinish. Kosmetikens anatomiska form och högkvalitativa finish förbättrar utseendet och känslan när patienten sätter sig ned. Eftersom kosmetiken inte går över knäleden, undviks en oönskad knästräckning vid sittande. Med den här genomtänkta, användarcentrerade konstruktionen får patienten en protesknäled som både känns och ser fantastisk ut.

### Mekanisk låsfunktion med flera lägen

Ge dina patienter den komfort de förtjänar med Navii's innovativa mekaniska låsfunktion med flera lägen. Med den här funktionen kan patienten stå tryggt och säkert vid olika graders knäböjningar: protesens kan låsas mekaniskt vid 20°, 10° eller i helt rakt läge vid 0°. På så sätt kan patienten alltid stå stabilt och bekvämt.

\*Kan sänkas ned i upp till 2 m djupt vatten i högst 30 min

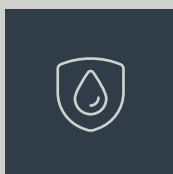

### Össur Logic-övningar och avancerade inställningar

Navii är utrustad med Össur Logic-övningar, bland annat åtta övningar för funktionsträning som gör användarna mer delaktiga och uppmuntrar dem att bli bättre på protesanvändning. Inställningsguiden förenklar utprovningen och den kraftfulla funktionen för autojustering minskar behovet av manuella justeringar, vilket gör hela processen enklare för såväl ortopedingenjören som patienten. De anpassningsbara inställningarna för gång, sittande och gång i lutande plan gör att motståndet enkelt kan anpassas efter användarens specifika behov och förmåga, vilket ger en mer personlig upplevelse.

### Avancerade gångrapporter



Navii innefattar funktioner för avancerade gångrapporter som visar användarens framsteg över tid, vilket stärker det fortsatta engagemanget och motivationen. Genom att kunna visa användaren dess framsteg, blir det lättare att hålla motivationen uppe och se konkreta resultat av alla ansträngningar. Det skapar en positiv spiral som stärker önskan om en fortsatt förbättring.

### Förbättrat och förenklat användargränssnitt


Navii's förbättrade användargränssnitt är enkelt att använda för både ortopedingenjörer och användare. Gränssnittet har utformats för att likna andra Össurprodukter. Där visas tydlig information om driftstatus och felmeddelanden, och utprovningen blir enklare tack vare funktionen för autojustering i Össur Logic. Det enkla, robusta laddningssystemet möjliggör också smidig integrering med den avtagbara skyddskosmetiken, vilket förbättrar både funktionen och utseendet.

### Funktioner för hög belastning

För patienter som lever ett aktivt liv finns det specifika Navii-funktioner för en mängd olika aktiviteter, bland annat steg-över-steg-gång i trappor, automatisk identifiering vid cykling och sömlös övergång till löpning. Med de här funktionerna blir det enklare för patienten att kunna fortsätta att delta i fritidsaktiviteter och ägna sig åt många olika typer av fysisk aktivitet utan begränsningar.

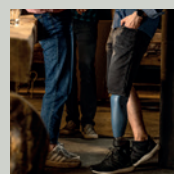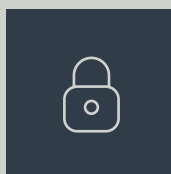

# Med Islands innersta väsen i varje detalj

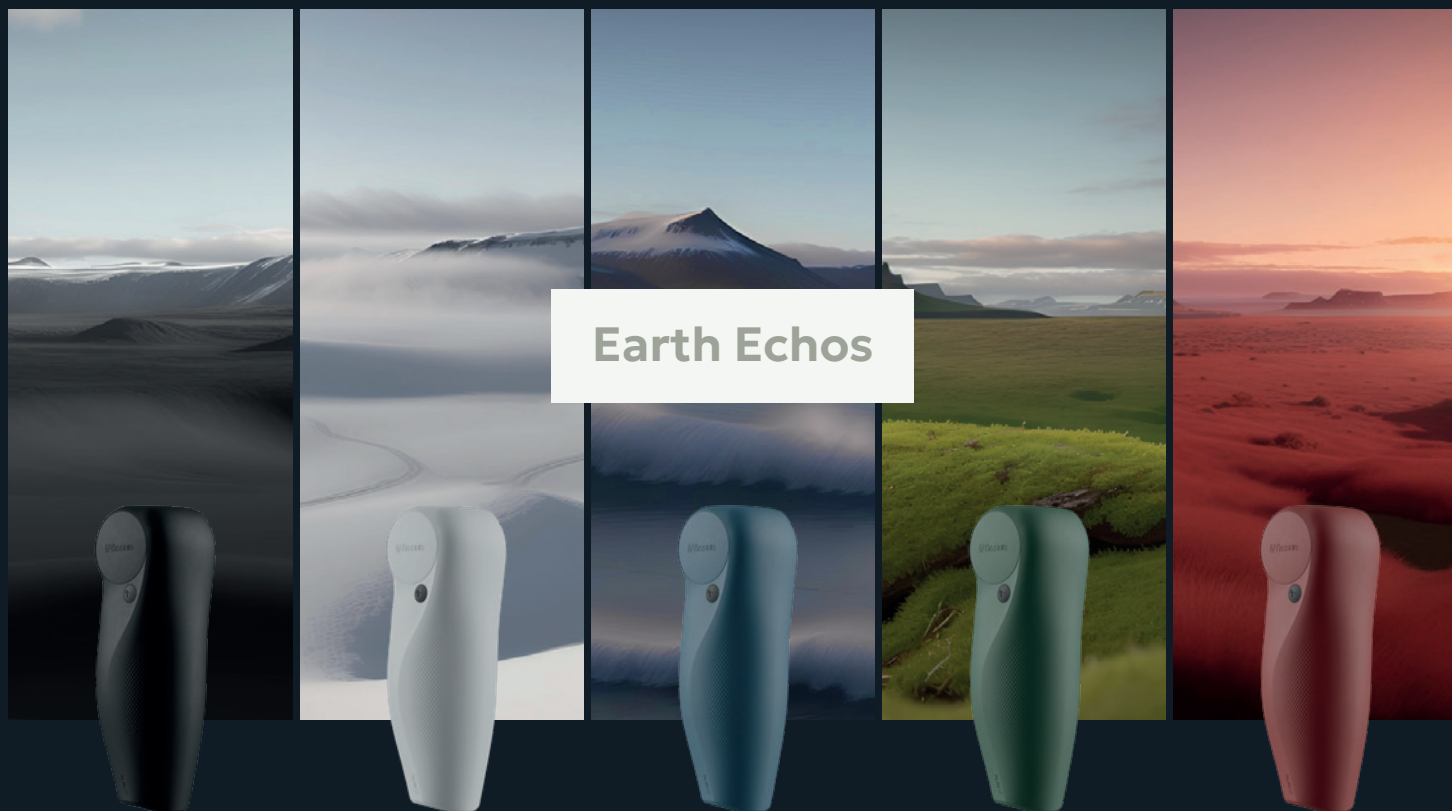

## Earth Echos

### Navii-kosmetiken är inspirerad av Islands vackra natur

Vårt isländska arv finns med oss i allt vi skapar inom Össur. Vårt huvudkontor ligger i Reykjavík och vi låter oss ständigt inspireras av Islands dramatiska natur och starka färger för att skapa produkter som både har exceptionell funktion och är estetiskt tilltalande. Vår nya skyddskosmetik för Navii är en del av kollektionen Earth Echos. De är en hyllning till vårt vackra land som minner om det storslagna, karga isländska landskapet och de livfulla nyanser som präglar vår natur.

Island är känt för sin orörda, vackra natur – ett land där naturens starkaste krafter skapar häpnadsväckande vyer. De här förtrollande miljöerna är inte bara vackra att se på – de symboliserar också renhet och kvalitet. Genom att införliva de här kvaliteterna i Navii-kosmetiken vill vi ge patienterna möjlighet att knyta an på ett mer känslomässigt plan till våra produkter. Varje val återspeglar både estetiska aspekter och överlägsen kvalitet.

# Utforska kollektionen Earth Echos



## Onyx Black

Navii-kosmetiken Onyx Black har inspirerats av kraften och elegansen i Islands svarta sandstränder. Färgen är en tidlös, djupsvart nyans som passar med det mesta. Den här mångsidiga kosmetiken kan användas tillsammans med de flesta klädstilar och vid alla tillfällen. Ett praktiskt och samtidigt stilsäkert val. Tack vare magnetlåset går det snabbt och enkelt att byta till Onyx Black för lite mer elegans och personlig stil när så behövs. Finns i 3 längder.



## Wave Blue

Navii-kosmetiken Wave Blue har inspirerats av Islands oändliga himlar och hav. Den blå nyansen ger ett lugnt och fridfullt intryck. Den här kosmetiken signalerar både lugn och öppenhet och är därmed ett perfekt val för den som älskar naturens storslagenhet. Konstruktionen med magnetlås gör det enkelt att anpassa kosmetiken, så att rätt stil alltid kan väljas för varje tillfälle.



## Mosi Green

Navii-kosmetiken Mosi Green har inspirerats av den isländska mossan, dess friskhet och lugn. Den klara, gröna färgen signalerar förnyelse och utveckling. Den här kosmetiken är ett perfekt val för den som känner sig nära naturen. Den ger proteserna en känsla av liv och vitalitet. Det enkla magnetlåset på Mosi Green gör att proteserna snabbt kan anpassas efter livets naturliga växlingar.



## Adobe Red

Navii-kosmetiken Adobe Red har inspirerats av den råa, kraftfulla skönheten hos isländsk lavasten. Den symboliserar styrka och en stark koppling till planeten som vi bor på. Den djupa, röda färgen utstrålar självförtroende och påminner om de vilda, vulkaniska naturområdena på Island. Denna djärva kosmetik ger ett omedelbart och starkt intryck, och det enkla magnetlåset gör att den snabbt kan bytas ut och anpassas efter olika tillfällen.



## Luna Grey

Navii-kosmetiken Luna Grey har en ljust grå färg som ger ett lugnt, nedtonat intryck. Den smälter fint in i alla miljöer med en diskret elegans, så att andra detaljer kan lysa starkare. Det här mångsidiga överdraget passar de flesta miljöer och tillfällen: allt ifrån formella tillställningar till en vardaglig utflykt. Tack vare magnetlåset på Luna Grey går det snabbt och smidigt att byta kosmetik så att patienten alltid kan utgå från sina egna behov.



### Navii med Proprio Foot®

Synkron funktion i knä- och fotled ger säkerhet och stabilitet med aktiv dorsal-flexion och anpassning till olika terrängar.

### Navii med Pro-Flex® Terra

Össurs förstahandsval för transfemoralt amputerade K3/K4-patienter som lever ett aktivt liv och söker maximal dynamik.

## Specifikationer

### Mått utan kosmetiskt överdrag

Bygghöjd	23.6 cm
Knäcentrum till pyramidfästet	3.5 cm
Bredd	8.0 cm
Vikt	1.8 kg
Flexion	-2 till 120°

### Mått med kosmetiskt överdrag

Bredd	8.7 cm
Vikt	2.0 kg



[WWW.OSSUR.SE](http://WWW.OSSUR.SE)

Össur Nordic  
Box 7080  
SE-164 07 Kista  
Sweden

TEL +46 18 18 22 00  
[info@ossur.com](mailto:info@ossur.com)

**ÖSSUR**  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS