



# Eine für alles!

Stabilisiert, entlastet und  
lindert Schmerzen: Miami LSO™



# Alles für ein Ziel: Entlastung.

Die Rückenorthesen Miami LSO™ Light und Miami LSO™ sind für zahlreiche Indikationen im Einsatz – immer mit dem Ziel, eine dauerhafte Stabilisierung, Entlastung und Schmerzlinderung zu erreichen.




**Miami LSO™ Light**

HMV-Nummer 23.14.04.0013



**Miami LSO™**


HMV-Nummer 23.14.02.2009

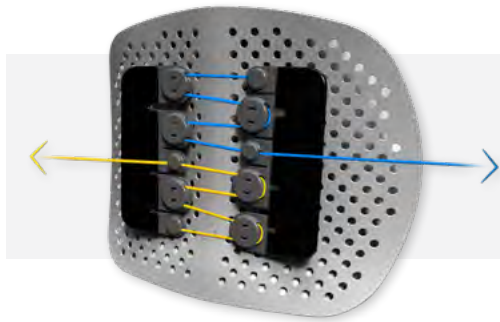

**Der Össur Seilzug-Mechanismus** ermöglicht auf Basis der 4:1-Hebelkraft mit wenig Aufwand eine zirkulierende Kraft. Erzielt wird eine konstante Gurtspannung und damit eine gleichmäßige, dauerhaft wirkende Kraft.

## Wirkprinzip

Der Gurt umfasst das Becken und erzeugt eine Kompression. Der Seilzug-Mechanismus fördert eine entlastende Position der Lendenwirbelsäule. Die Entlastung ist je nach Therapieziel individuell einstellbar. Die Kombination aus Gurt und Polster schränkt ungewollte Bewegungen der Lendenwirbelsäule entsprechend den Therapievorgaben ein.

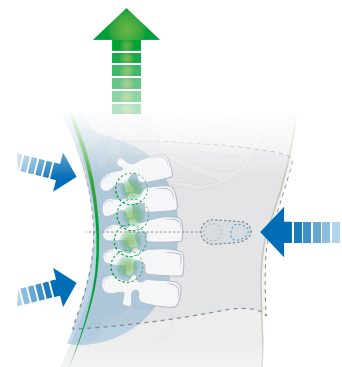

**Das Seilzug-Prinzip bietet eine effiziente Dosierbarkeit der Entlastung, was bei unterschiedlichen Beanspruchungen oder Schmerzintensitäten vorteilhaft ist.**

Dr. rer. nat. Jana Rogoschin, Expertin für Biomechanik & Össur Clinical Specialist Bracing and Support – Medical Office

**Mehr Produktinformationen und zum Experten-Interview.**

