


Abformen mit Alginate

Werkzeuge: Eimer, Alginat, Rührbesen, Gipsisolercreme, Dentalgips

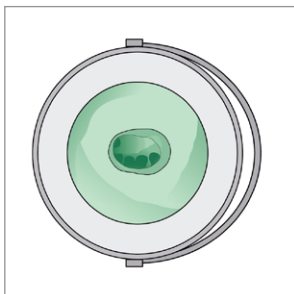
<p>Positivabdruck der Hand Vorzugsweise in Dentalgips</p>	 <p>Positioniere die Hand in Neutralstellung: - 15° Extension im Handgelenk - 30° Flexion im MCP-Gelenk Entspannte Finger</p> <p>Hinweis: Falls Dein:e Anwender:in die vorgesehene Handposition nicht halten kann, nimm den Abdruck in einer entspannten Handhaltung ab, die so viele der Anforderungen wie möglich erfüllt. Vermerke diese Einschränkung unbedingt im Bestellformular.</p>	<p>Positivabdruck der Hand Erfasse folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daumen in Neutralposition – mittig zwischen Schlüsselgriff und vollständiger Extension Handlinien müssen klar und deutlich erkennbar sein Gute Detailgenauigkeit Keine Stange oder Schaft verwenden
--	---	--



1
Wähle den Abdruckplatz in einer angenehmen Höhe aus.
Bringen dem:der Anwender:in die richtige Handstellung bei.



2
Mische das Alginat an und verarbeite es nach Herstellerangaben.
Tauche die Hand langsam in das Alginat ein. Die Hand sollte sich mittig im Eimer befinden. Schließe das Handgelenk mit ein.




3
Entferne die Hand nach dem Aushärten, um das Alginat-Negativ zu enthüllen.
Bewege leicht die Fingern um die Hand einfacher aus der Form zu entfernen.



4
Gieße das Negativ sofort mit Dentalgips aus. Fülle den Gips vorsichtig ein um Luft einschließen zu vermeiden. Lasse den Gips vollständig aushärten, bevor Du das Positiv entnimmst. Der Zeitpunkt der Aushärtung kann variieren.






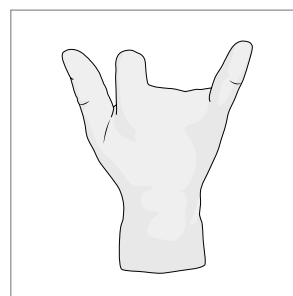5
Drehe den Eimer nach dem Aushärten, um das Positiv zu entnehmen. Schneide die Außenseiten des Alginats mit einem Messer ein. Entnimm das Positiv.



6
Kontrolliere den Abdruck auf eine ideale Stellung. Wiederhole den Vorgang, wenn nötig.
Bitte kontaktiere unseren Kundenservice bei Fragen

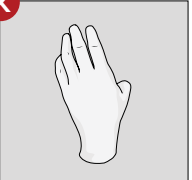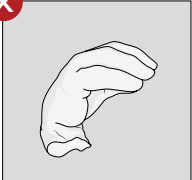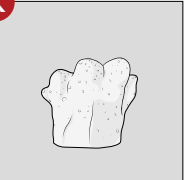Hinweis: Gipspositiv kann abgelehnt werden, wenn die Handstellung nicht korrekt ist, oder der Abdruck zu kurz ist. (s. unten)

<p>X</p>  <p>Abgewinkelt</p>	<p>X</p>  <p>Flexion im Fingerglied oder Handgelenk</p>	<p>X</p>  <p>Zu kurz</p>	<p>X</p>  <p>Unklare Details</p>
--	---	---	--