



ThumbDriver® | Snabbanpassningsguide

Produktens Anatomi

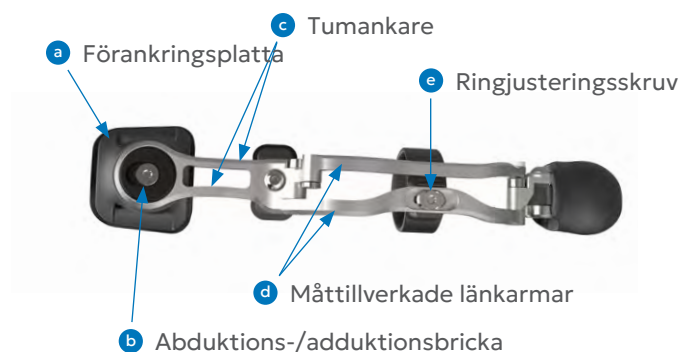


Statisk + Dynamisk Inriktning

1. Rikta in **a** förankringsplattan ovanför CMC-leden och **f** gångjärnsleden en aning proximalt om MCP-leden
2. Vinkla remmen för att säkerställa att den statiska inriktningspositionen upprätthålls när remmen dras åt
3. Flektera fullt i alla leder för att säkerställa fullt rörelseomfång och säkerställ att det inte finns någon kontakt mellan metall och brukare

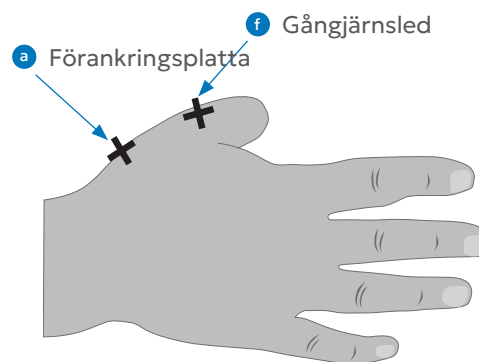


Dåligt rörelseomfång med protesen:

- a. Ringen sitter för hårt
 - ➔ Använd en större ringstorlek
- b. Ringen sitter alltför proximalt:
 - ➔ Flytta ringen distalt med 
- c. Inkorrekt placering av MCP-knogdynan:
 - ➔ Se instruktionerna för statisk inriktning
- d. Begränsningar i brukarens anatomi
 - ➔ Rörelseomfånget är beroende av brukarens rörelseomfång i MCP-leden

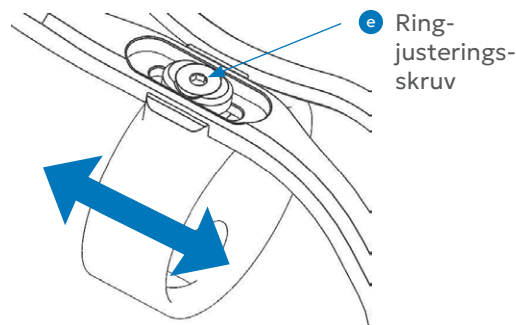


Inklämning mot området mellan tummen och pekfingeret:

- a. Använd en liten slipmaskin för att ta bort material runt området mellan tummen och pekfingeret

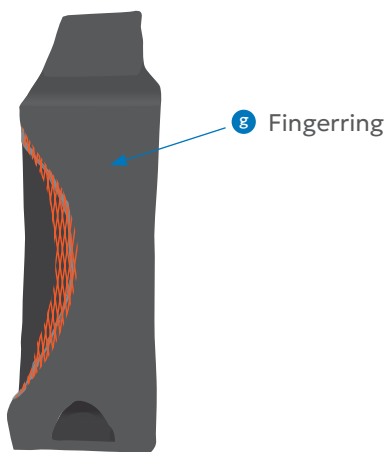

Inklämning mot distal ände:

- a. Produkten påtagen alltför proximalt
 - ➔ Se instruktionerna för statisk inriktning
- b. Använd abduktions-/adduktionsbrickan för att flytta länkarmen distalt
 - ➔ Brickan kan roteras 360 grader för att möjliggöra 1/4" (6,35 mm) justering i alla riktningar

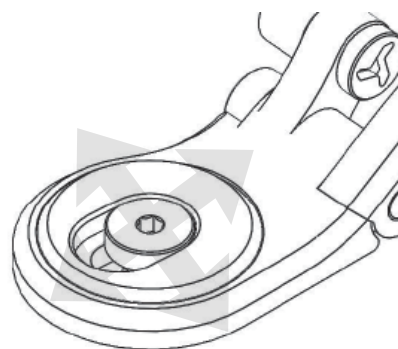

Om du fortfarande har frågor:

Ta kontakt med kundtjänst på info@ossur.com eller tel: +46 (0) 18 18 22 00 för att boka en tid med vårt kliniska team.