

PIPDriver[®] | Snabbanpassningsguide

Produktens Design

a Inläggshål

b Stor fästskruv

c Liten fästskruv



d Länkarm

e Hylsa

f Ring



Statisk + Dynamisk Inriktning


1. Rikta in **b** den stora fästskruven i linje med den anatomiska PIP-leden
2. Använd distansinlägg i **e** hylsan och **f** ringsektionerna för att skapa en tät passform
3. Böj produkten åt alla håll för att säkerställa fullt rörelseomfång



Felsökning | Frågor om passform och funktion

Dåligt rörelseomfång vid flexion och/eller extension:

Justera distansinläggen i **e** hylsan

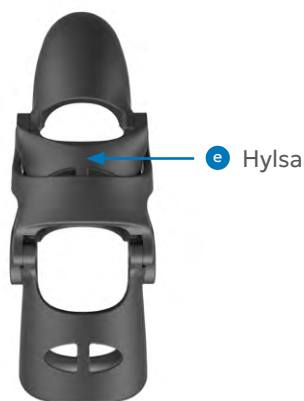

Inklämning mot området mellan tummen och pekfingeret:

Använd en liten slipmaskin för att avlägsna material runt området mellan tummen och pekfingeret



Inklämning mot området mellan tummen och pekfingeret:

Justera distansinläggen i **f** ringen



Inklämning mot distal ände:

Använd en liten slipmaskin för att avlägsna material runt den palmara PIP-leden



Om du fortfarande har frågor:

Ta kontakt med kundtjänst på info@ossur.com eller tel: +46 (0) 18 18 22 00 för att boka en tid med vårt kliniska team.

FOLLOW ÖSSUR ON



TEL + 46 18 18 22 00
info@ossur.com

WWW.OSSUR.SE

