
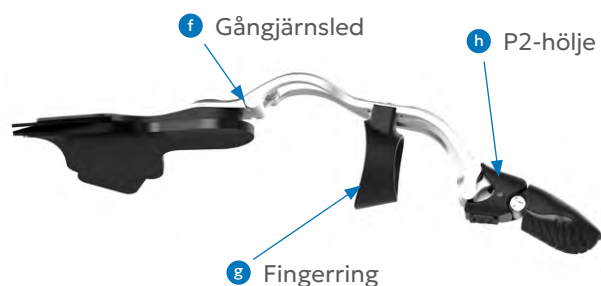


MCPDriver® | Snabbanpassningsguide

Produktens Design

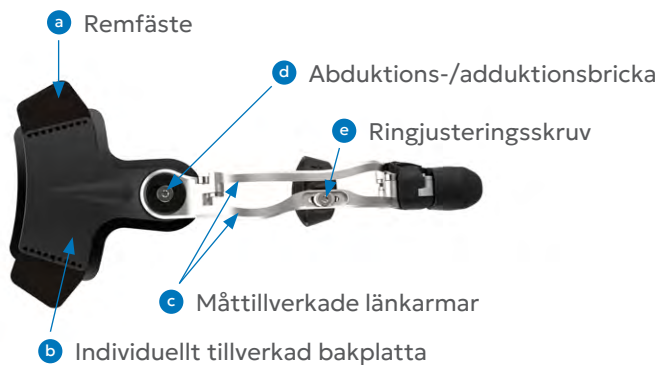


Statisk + Dynamisk Inriktning

1. Rikta in **f** gångjärnsleden ovanför MCP-leden och **d** abduktions-/adduktionsbrickan en aning proximalt om MCP-leden
2. Säkerställ att **g** fingerringen är både distalt placerad och sitter något lös på fingret
3. Flektera fullt i alla leder för att säkerställa fullt rörelseomfång och kontrollera för att säkerställa att det inte finns någon kontakt mellan metall och brukare
 - ➔ Vinkla remmen på **a** remfästet för att säkerställa att den statiska inriktningspositionen upprätthålls




Dåligt rörelseomfång med protesen:

- a. Ringen sitter för hårt
 - ➔ Använd en större ringstorlek
- b. Ringen sitter alltför proximalt:
 - ➔ Flytta ringen distalt med  ringjusteringsskruven
- c. Begränsningar i brukarens anatomi
 - ➔ Rörelseomfånget är beroende av brukarens rörelseomfång i MCP-leden

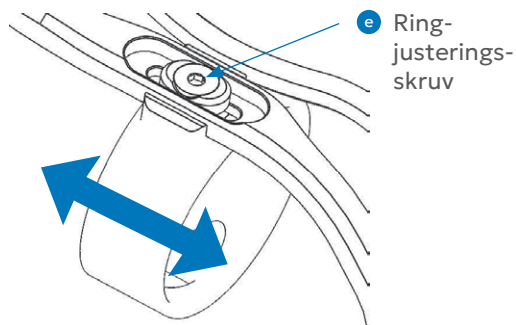


Inklämning mot området mellan tummen och pekfingeret:

- a. Använd en liten slipmaskin för att ta bort material runt området mellan tummen och pekfingeret

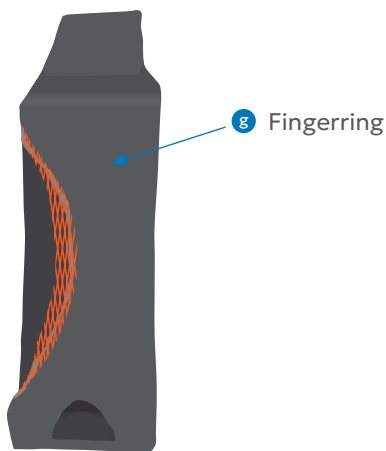

Inklämning mot distal ände:

- a. Produkten påtagen alltför proximalt
 - ➔ Se instruktionerna för statisk inriktning
- b. Använd abduktions-/adduktionsbrickan för att flytta länkarmen distalt
 - ➔ Brickan kan roteras 360 grader för att möjliggöra 1/4" (6,35 mm) justering i alla riktningar

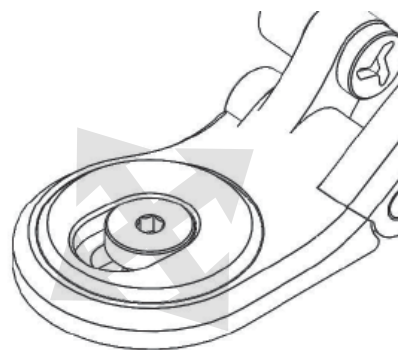

Om du fortfarande har frågor:

Ta kontakt med kundtjänst på info@ossur.com eller tel: +46 (0) 18 18 22 00 för att boka en tid med vårt kliniska team.

FOLLOW ÖSSUR ON



TEL + 46 18 18 22 00
info@ossur.com

WWW.OSSUR.SE

